


Handy Liukulakana Pitkä

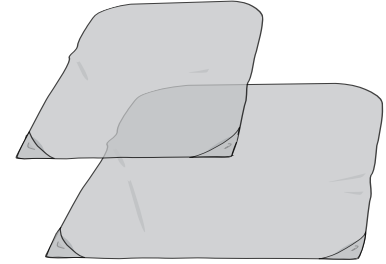

Handy Liukulakana Lyhyt

Tuotekuvaus

Tuote	Yksikkö	Malli	Tuotenumero	Koko	Mitat (a x b)	
Liukulakana Lyhyt, ilman vetohihnaa	pari	150	3715015	M	85 cm x 70 cm	
Liukulakana Lyhyt, ilman vetonauhaa	pari	150	3715017	XL	120 cm x 85 cm	
Liukulakana Pitkä, vetonauhalla, sis. Kiristysnauha*	pari	160	3716015	M	90 cm x 185 cm	
Liukulakana Pitkä, vetonauhalla, sis. Kiristysnauha*	pari	160	3716017	XL	140 cm x 215 cm	

* Kiristysnauha 260 cm, tuotenumero 3696002.

Tuotekuvaus

Handy Liukulakana on Likon kehittämä apuväline, joka keventää potilaan siirtämistä kitkaa vähentämällä. Liukulakana on valmistettu potilaan ja makuualustan välistä kitkaa vähentävästä materiaalista, joten hoitohenkilökunnan työ helpottuu monissa eri tilanteissa.

Pitkä Liukulakana on erittäin hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun kovista kivuista tai vammoista kärsivälle tai erittäin painavalle potilaalle puetaan nostokangasta.

Lyhyttä Liukulakanaa käytetään helpottamaan nostokankaan pukemista tuolissa tai pyörätuolissa

istuvalla potilaalla. Kumpaakin mallia voidaan käyttää myös muissa siirtotilanteissa, esimerkiksi kääntämiseen tai siirtämiseen ylempäs vuoteessa.

Tässä käyttöohjeessa esiteltävät siirtomenetelmät ovat helppoja ja käteviä. Jos ne tuntuvat raskailta, suosittelemme jonkin muun Likon apuvälineen käyttämistä siirtämiseen ja nostamiseen.


△ Liukulakanaa ei ole tarkoitettu potilaan nostamiseen tai siirtämiseen makuulta istumaan. Näihin tarpeisiin suosittelemme nostokankaitamme, joita on saatavilla useita eri malleja.

Tässä tekstissä siirrettävää henkilöä kutsutaan potilaaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

△ on varoituskolmio tilanteisiin, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

Lue käyttöohjeet. Käyttöohjeita voi ladata ilmaiseksi osoitteesta www.liko.com.

Nostokankaan sijoittaminen tuoliin/pyörätuoliin lyhyen Liukulakanan avulla

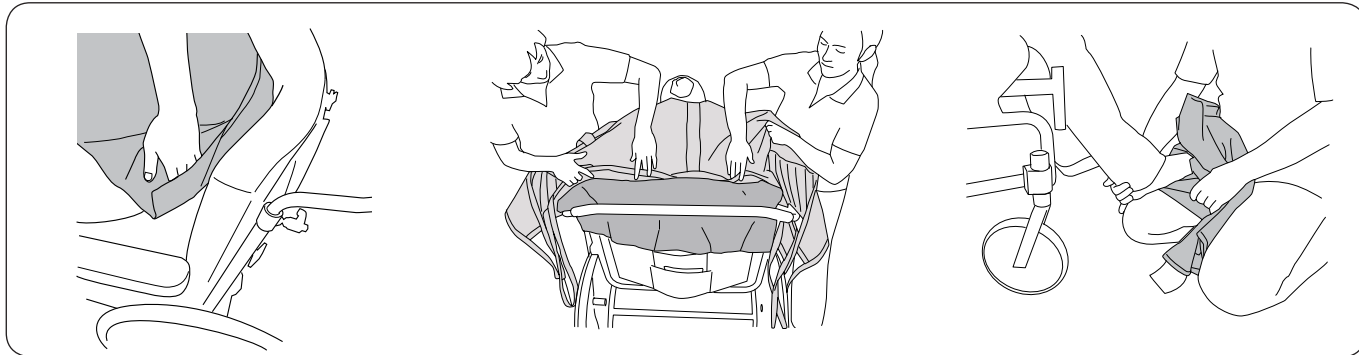


Laske molemmat Liukulakanat potilaan ja tuolin selkänojan väliin. Käytä taskuja asettelun helpottamiseksi. Varmista, että Liukulakana ulottuu alas potilaan takamukseen saakka.

Sijoita sen jälkeen nostokangas Liukulakanoiden väliin ja vie se alas potilaan selän taakse. Työskentele ergonomisesti.

Käytä Liukulakanaa ja nosta potilaan jalka oman reitesii päälle, jotta nostokankaan reisituet olisi kevyempi asettaa paikalleen. Katso nostokankaan asettelua koskevat lisätiedot kyseisen nostokankaan käyttöohjeesta.

Siirtäminen vuoteessa ylempäs lyhyen Liukulakanan avulla

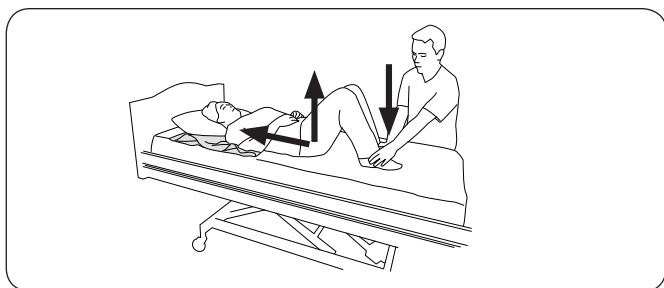


Yksi avustaja

Asettele Liukulakana potilaan pään ja hartioiden alle. Potilas taivuttaa polviaan ja avustaja painaa jalkapohjia patjaa kohti lisäkittikan aikaansaamiseksi. Potilas nostaa hieman lantiotaan ja työntyy samanaikaisesti vuoteesta ylöspäin.

Tämä menetelmä edellyttää, että potilaalla on riittävästi voimaa ja toimintakykyä jaloissa ja vartalossa.

Helpota hieman lisää kallistamalla vuoteen jalkapäätä ylös!

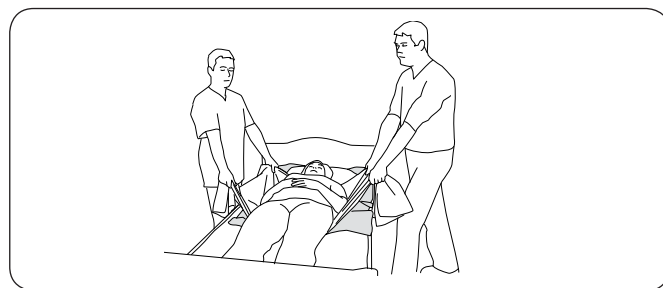

Kaksi avustajaa

Levitä Liukulakana potilaan pään ja takamuksen väliselle pituudelle vetolakanan alle. Avustajat asettuvat potilaan olkapäiden tasalle ja ottavat kiinni vetolakanasta, kumpikin omasta päästään lakanaa. Avustajat siirtävät potilasta ylöspäin vuoteesta painonsiirtoliikkeellä. Tämä toimenpide toistetaan, kunnes potilas on halutussa kohdassa.

Huomioi ergonomia – vältä vetämistä käsilläsi!

Nosta vuoteen jalkapäätä suorituksen keventämiseksi!



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Vamistaja:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se

Maahantuonti ja myynti Suomessa:

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puhelin (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490
Sähköposti info.algoltrehab.fi@algol.fi
Internet www.algoltrehab.fi

