



UUSI &
TEHOKAS



R82 Heron

Kun haluat yksinkertaisen
mutta parhaan ratkaisun

R82[®]

SISÄLTÖ

- 3 Yksi koko - enemmän vaihtoehtoja
- 5 Optimaalinen asento
- 6 Yksinkertaiset päivittäiset säädöt
- 7 Täydelliset työskentelyolosuhteet
- 8 Kotona kylpeminen
- 10 Pesu ja puhdistus
- 12 Lisävarusteet
- 15 Mitat


Heron

Heron tarjoaa uusinta muotoilua wc- ja suihkutuoliin. Yksinkertainen muotoilu ja ulkoasu tarjoavat useita toimintoja, jotka parantavat sekä käyttäjien että avustajan kokemuksia.

Heron asettaa uudet standardit käyttäjille, joilla on erityistarpeita istuinasennon suhteen. Istuin on ergonomisesti oikeanlainen. Istuinta ja selkänöjää voidaan kallistaa aiheuttamatta epämukavuutta/haittaa käyttäjälle.

Älykkään rakenteen ansiosta painopiste säilyy vakaana kallistuksen aikana. Tämä mahdollistaa käyttäjälle miellyttävämmän istuma-asennon.

nothing compares to daily convenience!

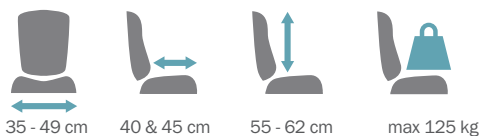




Kyllä - on ihan ok tehdä asiat helpoksi

Heron on saatavissa yhdessä koossa. Kapea selkänoja antaa tilaa liikkeille. Lisätukea ja – mukavuutta saadaan lisäämällä sivulle kääntyvät vartalotuet tai pehmustetut levikkeet, jotka tukevat hartiasseutua. Suosittelemme käyttämään istuimen ja selkänojan pehmusteita lisäämään mukavuutta.

Heron on saatavissa joko ilman käsinoja tai yläskääntyvillä käsinojilla. Käytä käsinoja suihkussa tai wc-käynnin aikana ja käännä ne pois tieltä, kun niitä ei tarvita.

Heron on saatavissa hydraulisena tai sähköisenä versiona. Molemmissa on samat ominaisuudet säätöjen osalta.

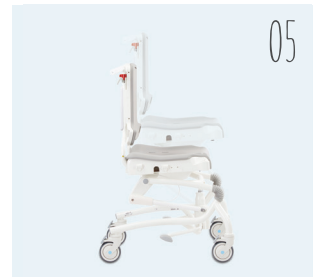

[01] Heron, hydraulinen versio. [02] Istuinkallistuksen säätökahva [03] Selkänojan säätökahva. [04] Jalkapainike hydrauliseen korkeudensäätöön. [05] Heron, hydraulinen versio [06] + [07] Ylöskääntyvät käsinojat

Heron | sähkösäätöinen



[01] Laturi, seinäkiinnitteinen [02] Selkänöjan säätökahva. [03] Käsikytkin korkeuden ja istuinkulman säätämiseen [04] Heron käsinojilla, sähköinen versio. [05] Johdot on merkitty numeroin [06] Heron, sähköinen versio [07] Akku on kiinnitetty runkoon.



Optimaalinen asento

Heron sopii sekä teini-ikäisille että aikuisille. Säättämällä selkänöjan korkeutta ja lisäämällä muutamia lisävausteita voidaan muuttaa istuinleveyttä ja -syvyyttä. Heronista saa helposti käyttäjälle sopivan.



Selkänöjan korkeus on säädettävissä


Heronin istuimen kokonaisleveys on 55 cm. Lisäämällä lantiotuet on istuinleveys säädettävissä 35-49 cm. Samalla tuetaan lantio hyvään asentoon.



Heronin vakioistuinsyvyys on 45 cm mutta istuinsyvyyttä voidaan lyhentää 35 cm erillisellä syvyys-lyhennyssetillä.



Heron-tuolin suunnittelussa on hyödynnetty painekartoitusta paineen minimoimiseksi istuessa ja mukavuuden parantamiseksi käyttäjille. Istuinpehmuste lisää käyttömukavuutta.

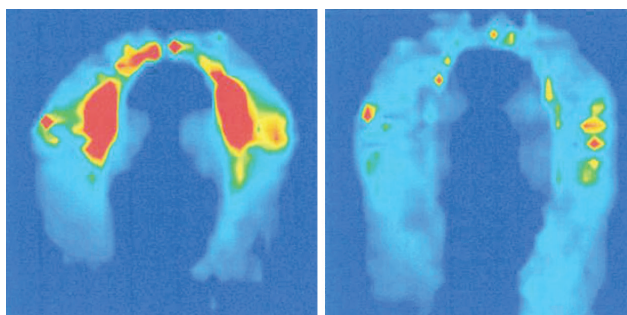

Helpot säädöt

ISTUINKORKEUS



Heron, hydraulinen: istuinkorkeus lattiasta 51 - 78 cm
Heron, sähköinen: istuinkorkeus lattiasta 56 - 78 cm

ISTUIMEN KULMANSÄÄTÖ



Istuimen kulmansäätö -5° - 25°

SELKÄNOJAN KULMANSÄÄTÖ



Selkänojan kulmansäätö 90° -120°

TÄYDELLISET TYÖSKENTELY- OLOSUHTEET



Manuaaliset nostot ja niihin liittyvät vartalonkierrot aiheuttavat tapaturmariskitilanteita hoitotyössä. Tämän takia suosittelemme että käytät nostinta siirtäessäsi käyttäjää Heron wc-suihkutuoliin.

Heronin helpon korkeudensäädän (hydraulinen tai sähköinen) ja kulmansäätöjen avulla työergonomia voidaan parantaa hoitotilanteessa.



KYLPEMINEN KOTONA








PESU JA PUHDISTUS

Keskusyksikkö, akku ja kaukosäädin ovat vedenpitäviä suihkutustilanteessa. Poista kuitenkin kaikki lisävarusteet, irroita tuolista johdot, keskusyksikkö, akku ja kauko-ohjain ennen tuolin koneellista puhdistusta.

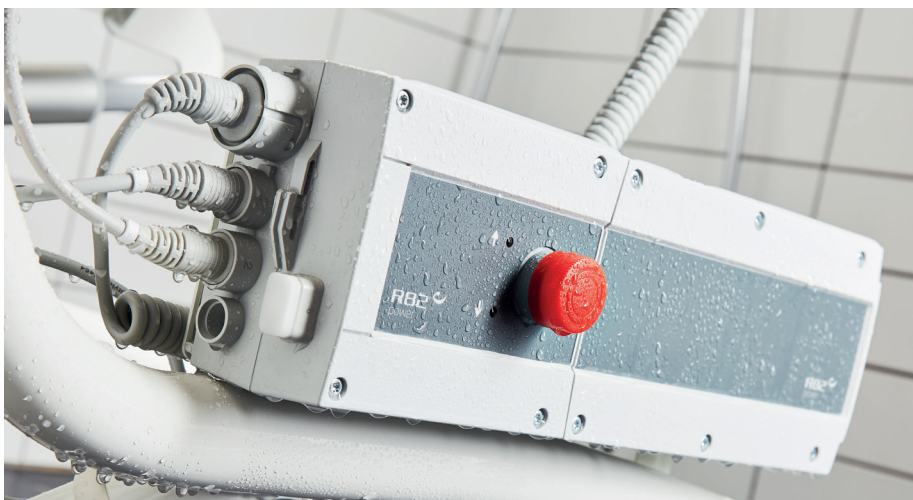

Koneellinen puhdistus
85 asteessa.



* Keskusyksikkö, akku sekä käsikytin poistettava ennen pesua



Lisävarusteet

Lisävarusteiden avulla saat Heron tuolista mukavan, käyttäjää tarpeeksi tukevan ja turvallisen kokonaisuuden wc- ja suihkutilanteisiin.



Tarkistuslista!

- Päätuki
- Vartalotuet
- Hartiatuet
- Liivit ja vyöt
- Käsinojat
- Pöytä
- Lantiotuet
- Roiskesuoja
- Alusastia
- Istuinsyvyyden lyhennyssetti
- Jalkatuet
- Pohjetuet
- Kantatuet
- Pehmeusteet jalkatuille



01



02



03



04



05



06



07



08



09



10



11



12



13



14


[01] Päätuiki [02] Vartalotuet, sivulle kääntyvät [03] Hartiatuet päällisillä [04] Verkkoliivi. [05] Istuinpehmusteet, käsinojat ja pöytä [06] Lantiotuet [07] Roiskesuoja, korkea tai matala [08] Alusastia [09] Istuinsyvyyden lyhennys [10] Jalkatuet pohjetuella [11] Jalkatuet, lyhyet [12] Jalkatuet, avoimet [13] Kantatuet [14] Pehmusteet jalkatuille.




Onko Heron sinulle sopiva?

Muutama mitta antaa sinulle vastauksen


Muutaman mitan avulla huomaat, onko Heron oikea wc- suihkutuoli käyttäjälle. Tee mittaukset niin että käyttäjä on selinmakuulla, polvet ja lonkat 90 asteen kulmassa.

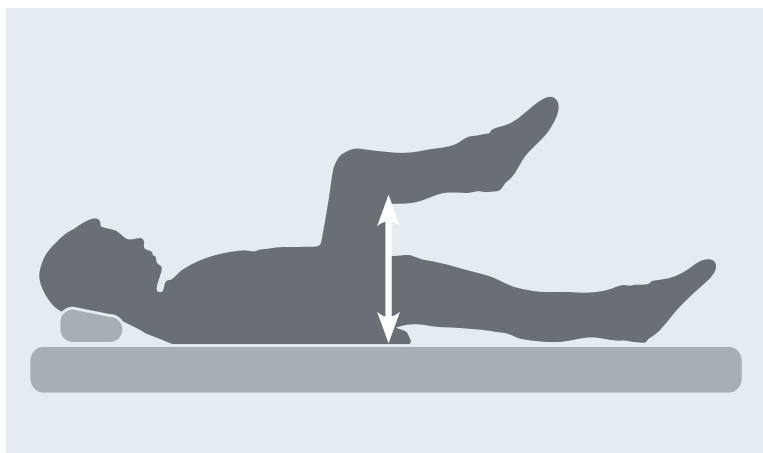

Istuinsyvyys

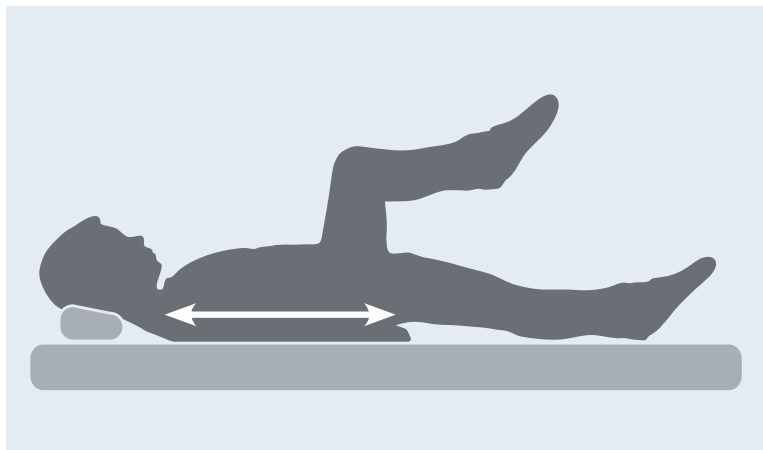


Selkänojan korkeus

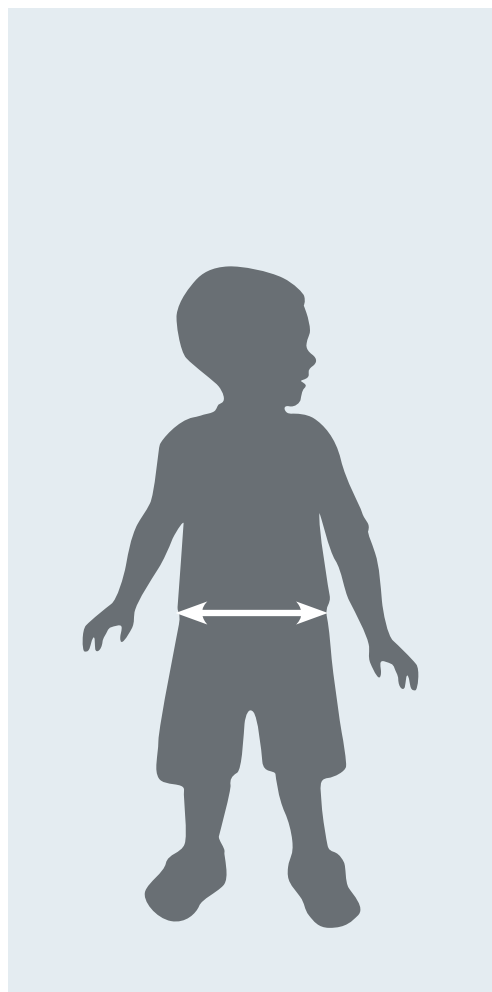

Lantion leveys

Mitat

Heron on saatavissa yhdessä koossa ja sopii teini-ikäisille ja aina aikuisuuteen saakka. Muuta selkänöjan korkeutta ja lisää lisävarusteita muuttaaksesi istuinleveyttä- ja syvyyttä. Näin teet Heronista helposti sopivan käyttälle.

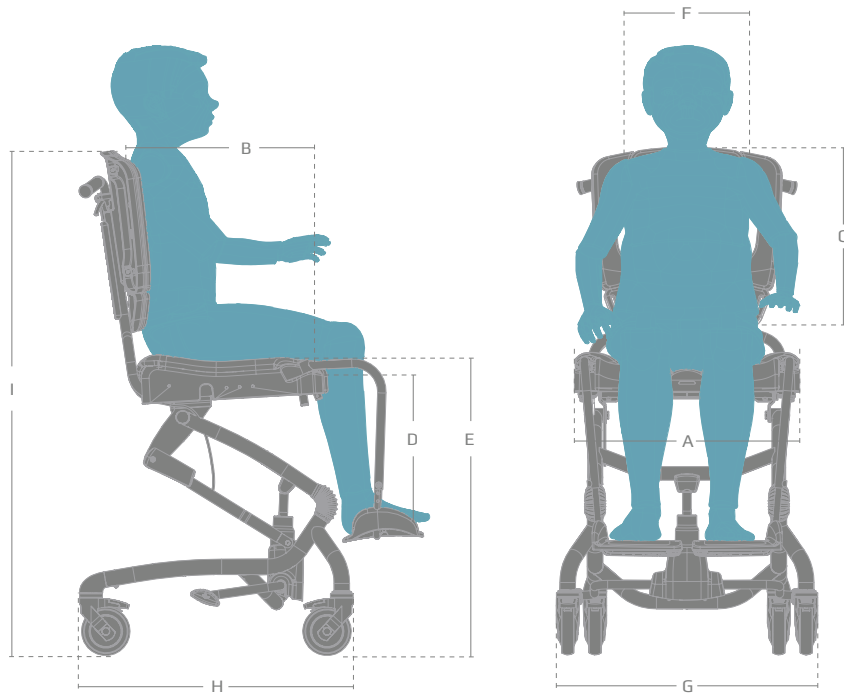

Mitat

	Heron, hydraulinen	Heron, sähköinen
Istuinleveys (A)	55 cm (21¾")	55 cm (21¾")
Istuinleveys lantiotuilla (lisävaruste)	35 - 49 cm (13¾ - 19¼")	35 - 49 cm (13¾ - 19¼")
Istuinsyvyys (B)	45 cm (17¾")	45 cm (17¾")
Istuinsyvyys lyhennyssetillä (lisävaruste)	40 cm (15¾")	40 cm (15¾")
Selkänöjan korkeus (C)	55 - 62 cm (21¾ - 24½")	55 - 62 cm (21¾ - 24½")
Säären pituus (D)	40 - 56 cm (15¾ - 22")	40 - 56 cm (15¾ - 22")
Istuinkorkeus lattiasta (E)	51 - 78 cm (20 - 30¾")	56 - 78 cm (22 - 30¾")
Selkänöjan leveys (F)	29 cm (11½")	29 cm (11½")
Rungon leveys (G)	67 cm (26½")	67 cm (26½")
Rungon pituus (H)	71 cm (28")	71 cm (28")
Kokonaiskorkeus (I)	108 - 135 cm (42½ - 53¼")	113 - 135 cm (44½ - 53¼")
Istuimen kallistus (tiltti)	-5° -> 25°	-5° -> 25°
Selkänöjan kallistus	90° -> 120°	90° -> 120°
Paino ilman käsinoja	28 kg (61.75 lb)	31 kg (68.25 lb)
Max. käyttäjäpaino	100 kg (220 lb)	125 kg (275.6 lb)



*Share your R82
Heron moments*



#R82heron #nothingcomparestoasmile

R82 A/S
Denmark
+45 79 68 58 88
R82@R82.com
R82.org



Maahantuonti ja markkinointi:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi

R82[®] 
nothing compares to a smile!