

Krabat Jockey Lite

Taita selkänoja alas: Löysää kahva (01), löysää 2 sormiruuvia (02), taita selkänoja alas


Selkänojan korkeuden säätö: Löysää kahva (01), säädä selkänojan korkeus, kiristä kahva (01)

Istuimen säätö: Vedä vipua ylöspäin (03), säädä korkeutta, vapauta vipu (03)

Istuimen kallistuskulman säätö: Vedä vipua ylöspäin (04), säädä kallistuskulmaa, vapauta kahva (04)

Jalkatukien säätö: Löysää sormiruuvia (05), säädä jalkatuki, kiristä sormiruuvi (05)

Lukitse pyörät: Paina pyörän jarrupoljinta alas (06)

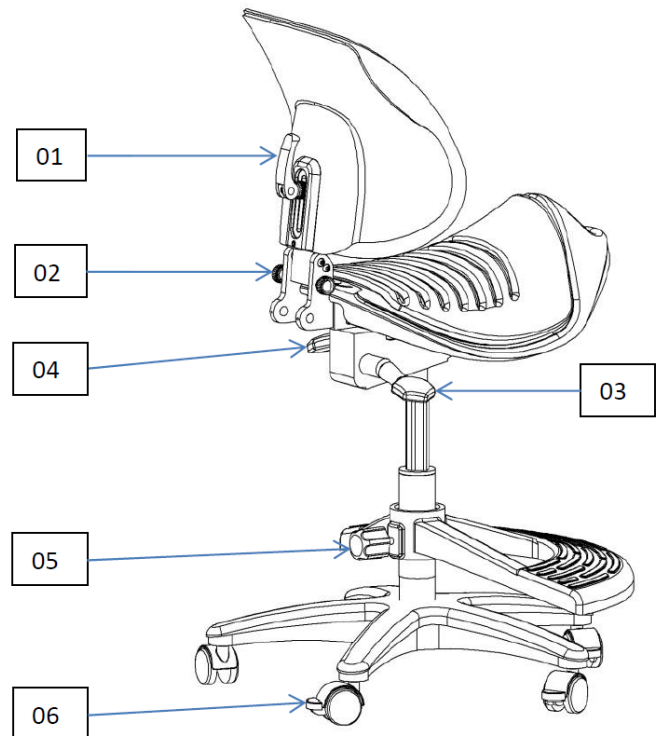

Käyttäjän enimmäispaino: Koko 1 ja koko 2: 80 kg ja koko 3: 100 kg

TURVALLISUUS

Kaikki Krabat-tuotteet on merkitty CE-merkinnällä 93/42 / EØF, luokka 1, 14. kesäkuuta 1993 - Lääketieteellinen laite

Direktiivi.

Tämä osoittaa, että se täyttää kaikki asiaankuuluvat eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset. Tämä käyttöohje on hyväksytty näiden standardien mukaisesti.

Tuotteella on noin 5 vuoden käyttöikä normaalissa käytössä. Sen jälkeen Krabat AS: n tai hyväksytyyn yhteistyökumppaniin on uudistettava tuote käyttöiän pidentämiseksi. Kaikki palvelut on tehtävä Krabat tai valtuutettu kumppani.

Tuotteet, joissa on sähkökomponentteja, on toimitettava Krabatile teknisen tarkastelun / kunnostuksen suorittamiseksi ennen kuin se lähetetään uudelleen käytettäväksi.

TAKUU


Krabat tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja materiaallivirheiden osalta. Takuu voidaan alentaa tai luopua, jos huoltoa tai päivittäinen hoitoa ei noudateta. Asiakkaan vastuulla on varmistaa huolto. Takuu ei kata vahinkovaurioita, eikä väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata kuluvia osia esim. renkaita tai verhoilua, jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka on ajoittain vaihdettava uusiin. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta ei ole pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan hyväksymä tai käyttöohjeessa kuvattuja muutoksia.

CE-merkki on poistettava, jos tuotetta muutetaan tai käytetään muita kuin alkuperäisiä osia!

Krabat-tuotteet eivät ole leluja! Virheellinen käyttö voi vahingoittaa sekä käyttäjää että / tai tuotetta.

Korjauksia, joita ei ole kuvattu Krabatin käyttöohjeissa, saa suorittaa vain Krabat, tai Krabatin hyväksymällä henkilöllä.

TEKNISET TIEDOT

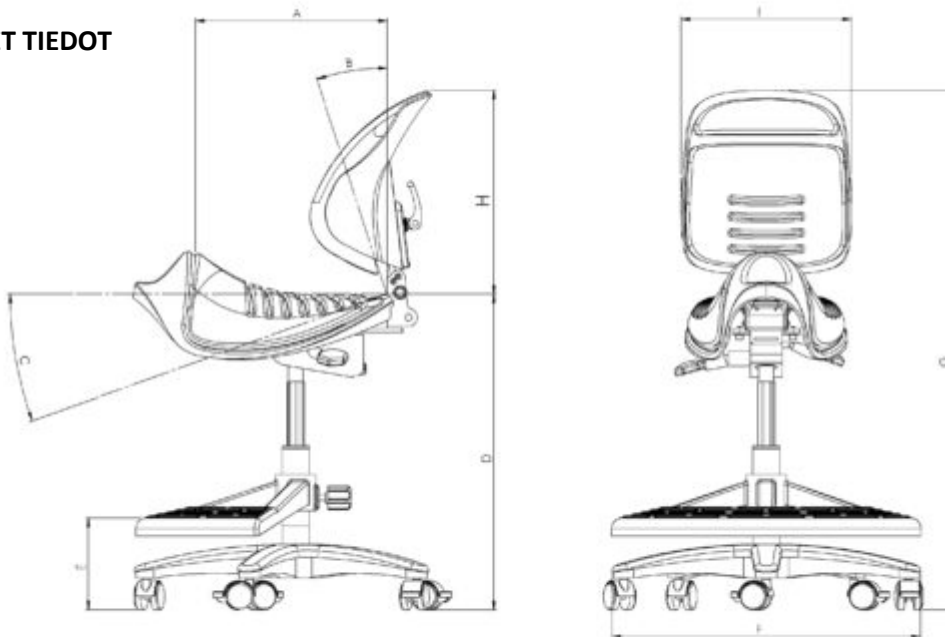

Mitta	Kuvaus	Koko 1	Koko 2	Koko 3
A	istuinosan syvyys	28 cm	34 cm	42 cm
B	selkänöjan kulma	90°	90 astetta	90 astetta
C	tiltti	-15° - 0	-15° - 0	-15° - 0
D	istuinkorkeus	45-57 cm	45-57 cm	45-57 cm
E	jalkatuen korkeus	14-23 cm	14-23 cm	14-23 cm
F	kokonaisleveys	57 cm	57 cm	57 cm
G	kokonaiskorkeus	87 cm	87 cm	87 cm
H	selkänöjan korkeus	33-38 cm	38-43 cm	41-46 cm
I	selkänöjan leveys	25 cm	32 cm	32 cm
	paino	10 kg	10 kg	11,6 kg
	max käyttäjäpaino	80 kg	80 kg	100 kg
	käyttäjän ikä noin	2-7 vuotias	7-14 vuotias	14 vuodesta ylöspäin