

KÄYTTÖOHJE FUNKE MEDICAL X-SEAT

Painehaavatyyny XSEAT (Taso 4 EPUAP)

Lue ohje ennen istuintyyntyn käyttöä.

Toimitukseen sisältyy: istuintyynty XSEAT hyperelastisella vaahtorungolla, irrotettava päällinen ja käyttöohje

Käyttöindikaatiot: Painehaavojen syntymisen ehkäisy pyörätuolissa tai vastaavassa istuvilla ;matala-, keski- ja korkeariski sekä painehaavojen hoito (EPUAP 4). Kontraindikaatioita ei ole.

Painoraja: Soveltuu käytettäväksi 20-120 kg painoisilla henkilöillä

Tekniset tiedot: Istuimen yläosa visco-vaahtoa ja alaosa HR-vaahto

V5225/ tiheys 52kg/kuutiometri / Puristuslujuus 2,5 kPa

HR5060 / tiheys 50kg/kuutiometri / Puristuslujuus 6,0 kPa

Puhdistus:

Normaalikäyttö (yhdellä käyttäjällä) päällisen säännöllinen vesipesu 60 asteen konepesussa, ei saa silittää

Käyttäjän vaihtuessa vesipesu 60 asteen konepesussa ja /tai autoklaavissa 105 astetta. Päällistä ei saa silittää.

- Istuintyynty XSEAT on RL93/42, RL2007/47 ja Germanu Advice Act.: n mukainen lääkinällinen laite

-kunnossapitoa ei tarvita

Paloturvallisuus: BS 7175 CRIB 5, DIN EN 597 Teil 1+2, EN 1021-1:2006, EN1021-2:2006

Toksikologiset ja bioyhteensopivuus testit: DIN EN SIO 10993-5; DIN EN ISO 10993-1

Käyttö:

1. Ota tyynty pois pahvisesta kuljetuslaatikosta
2. Laita tyynty pyörätuoliin tai vastaavaantuoliin.
3. Aseta XSEAT niin ,että päällisessä oleva kahva osoittaa eteen päin.

Valmistaja: Funke Medical AG, Saksa

Maahantuoja: Algol Trehab Oy, Espoo