



Likon nostokankaiden hoito ja kunnossapito

Suomi
7FI160884-02
2012-04-23

Likon nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Tarttuvien tautien leviämisen välttämiseksi on tärkeää puhdistaa nostokangas, jos se on likaantunut tai ollut toisen avustettavan käytössä.

Likon nostokankaita valmistetaan monesta erilaisesta kangasmateriaalista, joiden ominaisuudet vaihtelevat. Nostokankaat on konepestävä. Pesu- ja kuivauslämpötilat mainitaan tuotelapussa. Kuivaus on tehtävä mahdollisimman nopeasti pesun jälkeen ja mieluiten rumpukuivaimessa tai kuivauskaapissa. Joitakin tuotteita ei voi kuivata rumpukuivaimessa ja jotkut voidaan kuivata korkeissa lämpötiloissa.

Muutamit Likon nostokankaat sisältävät vahvistusmateriaaleja, esimerkiksi jalkatuet sekä selkä- ja pääntuet. Tämä materiaali voidaan pestä lämpötilassa 60 - 80°C. Korkeammissa lämpötiloissa vahvistusmateriaali voi muuttaa muotoaan, kutistua ja aiheuttaa sen vuoksi epämukavuutta. Yleensä se ei vaikuta nostokankaan turvallisuuteen.

On tärkeää noudattaa suositeltuja hoito- ja kunnossapito-ohjeita; muuten takuu raukeaa ja nostokankaan käyttöikä voi lyhentyä.

Pesuohteet:

Noudata pesuohteita nostokankaan tuotelapussa.



Poista muovisäleet (jos varusteena).



Mikäli tarpeen, esipese matalassa lämpötilassa, 25 - 30°C. Jotkut tahrat häviävät helpommin matalissa lämpötiloissa.



Konepesu ilmoitetussa lämpötilassa. Käytä pesuainetta.



Kuivaa rumpukuivaimessa matalassa lämpötilassa, enintään 50°C, tai anna kuivua kuivauskaapissa.



Ei kloorivalkaisuaaineita.



Ei kuivapesua.



Ei silitystä.

Pyyhkiminen alkoholilla

Muovisäleet ja muovipinnoitteut verkkokankaat suositellaan pyyhittävän pesunesteellä, joka sisältää 70 % etanolia tai 45 % isopropanolia. Muovisäleet voidaan pyyhkiä myös vesiliukoisella saippualla. Huomaa kuitenkin, että jotkut yksittäiset kohteet kuten hihnat ja saumat voivat olla eri materiaalia, ja siksi niiden perusteellinen puhtaus on varmistettava konepesulla.


Desinfiointi

Lämpödesinfioi 65°C lämpötilassa vähintään 10 minuutin ajan tai 71°C lämpötilassa vähintään 3 minuutin ajan. Molemmissa vaihtoehdoissa suosittelemme 8 minuutin lisäaikaa sen varmistamiseksi, että lämpö pääsee tunkeutumaan kankaaseen, mikä takaa desinfioitumisen. Pesuohjelma on tärkeää päättää huuhtelulla. (Ref. HSG (95)18: Hospital Laundry Arrangements for Used and Infected Linen, Department of Health, NHS).

Tarkasta nostokangas pesun jälkeen

Tarkista kaikki kohteet kulumisen ja vahinkojen osalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Ripustuslenkit
- Soljet (jos varusteena)

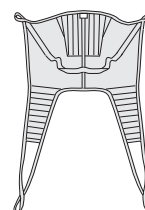

Nostokankaan käyttöikä on rajallinen ja tärkeä tekijä turvallisuuden kannalta. Älä käytä vahingoittuneita nostokankaita. Määräaikaistarkastusten pöytäkirjaa voidaan käyttää ohjenuorana osille, joiden tarkastaminen on erityisen tärkeää jokaisessa nostokankaan mallissa. Polyesterikankaiset nostokankaat kestävät kauemmin kuin verkkopolyesteri. Joissakin nostokankaissa on kädensijat ohjaamista varten. Liian suuri kädensijoihin kohdistuva kuormitus voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Solo-tuotteet

Likon Solo-tuotteet ovat hävitettäviä tarvikkeita, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Solo-tuotteita ei pitäisi pestä, vaan ne on poistettava käytöstä, kun ne likaantuvat tai avustettava ei enää tarvitse niitä.



Älä pese.



Älä käytä.

Jos Solo-tuote pestään, tämä symboli ilmoittaa, että tuotetta ei saa käyttää, vaan se on hävitettävä.

Yleiset pesuohjeet kankaasta riippuen

		Polyesteri	Verkkopolyesteri	Nallekuvioitu loimineule polyesteri	Muovipinnoitettu verkko	Muovipinnoitettu kangas	Polyesteri-/puuvillakankainen Repo-lakana	Polyesteri-/puuvillakankainen LiftSheet 1900 -nostokangas	Solo-kangas	Polyamidi HandySheet-liukulakana, Handy-liukulierio	Jatkolenkki Vaakatasonostimen hihnät
Pesu 60 - 80°C		X	X	X	X	X				X	
Pesu 60 - 85°C		X ¹						X			X
Pesu 85°C							X				
Ei vesipesua									X		
Ei kloorivalkaisua		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Rumpukuivaus, matala lämpötila, enintään 50°C		X	X	X				X		X	
Rumpukuivaus, normaali lämpötila, enintään 70°C							X				X
Älä kuivaa rumpukuivaimessa					X	X			X		
Silitys, enintään 150°C							X ²	X ²			
Ei silitystä		X	X	X	X	X			X	X	X
Ei pehmenysaineita		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ei kuivapesua		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Voidaan pyyhkiä alkoholilla					X	X					
Lämpödesinfointi		X	X	X	X	X	X	X		X	X

¹ Tuotenumero 3526111, 3526115, 3526116, 3526117

² Silitytty lakanan sisäpuolelta (hinnaton puoli)



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Liko AB
Nedre vägen 100
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se