


manatee[™]

Suomenkielinen käyttöohje

FIN SISÄLLYS

Turvallisuus	4
Takuu	4
Hoito	4
Valmistelut ennen käyttöä.....	5
Selkänojan kallistus	6
Säärituen kulmasäätö	6
Istuimen syvyys	7
Istuimen korkeus	7
Istuimen kallistus	8
Päätuki/sivutuki	8
Lantiovyö.....	9
Rintavyö.....	9
Haarakiila.....	10
Jalkahihnat.....	10
Päällisen irrottaminen ja asentaminen.....	11
Tuolin kokoontaittaminen.....	12
Alusta.....	13
Korkeussäädettävä alusta	14
Seinäripustimet alustaa varten	15
Tuotteen tunnistus	16
Tuotteen tunnistus	17
Mitat.....	18
Tekniset tiedot.....	19
Valmistaja	19
Jakelija.....	19
Hoito ja huolto.....	20
Vianetsintä	20

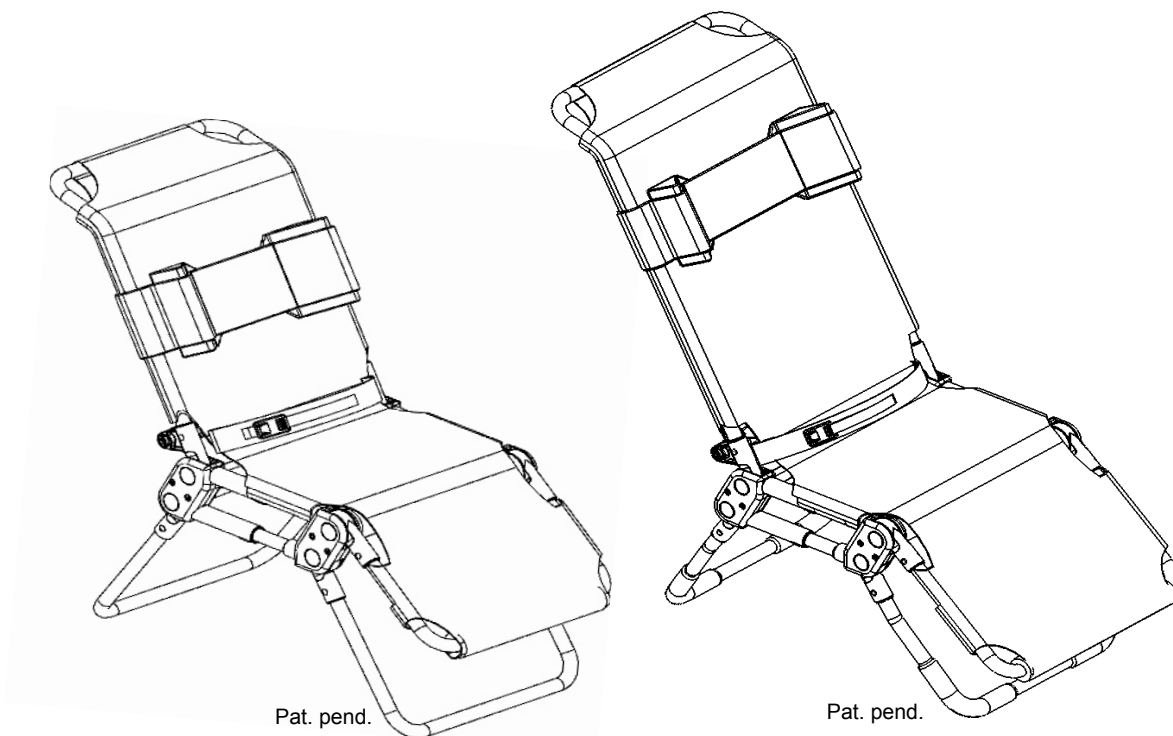


FIN MANATEE

Onnittelut uudesta Manatee-kylpyistuimestanne. Olemme vakuuttuneita, että Manateen valinnan myötä teillä on kylpyistuin, joka täyttää kaikki nykyaikaiselle lasten apuvälineelle asetetut odotukset. Manatee on suunniteltu käytettäväksi kylpyhuoneissa, joihin lasta ei milloinkaan saa jättää yksin.

Manatee on kylpyistuin 2 - 11-vuotiaille lapsille, joilla on vähäinen haitta-aste. Manateen rakenne tarjoaa sekä avustajille että käyttäjille miellyttävän kylpemiskokemuksen. Kylpyistuin on suunniteltu sellaiseksi, että käyttäjällä on täsmälleen oikea istuma-asento. Tuolin syvyyttä voidaan säätää, mikä mahdollistaa kylpyistuimen "kasvattamisen" lapsen mukana ja monivuotisen käyttökelpoisuuden. Säädöt ja lisävarusteet on sijoitettu loogisesti, tarjoten avustajalle tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet.

Tämä käyttöohje toimii apuna täyden hyödyn saamiseksi Manateen tarjoamista vaihtoehdoista. Siksi suosittelemme tämän käyttöohjeen lukemista ennen tuolin käyttöönottoa.

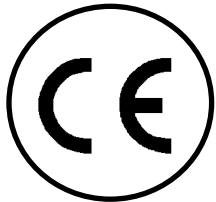

FIN TURVALLISUUS

Manatee on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen täyttävän kaikki relevantit eurooppalaiset turvavaatimukset. Tämän tuotteen kestoikä on päivittäiskäytössä 5 vuotta. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n toimesta) sen käyttöiän pidentämiseksi.

 Poista CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia.

 Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Manateen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

 Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuolin jalkojen kulmasäätöä. Selkänojan ja säätimen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja säätikeä kevyesti kuormituksen poistamiseksi.

 Tarkista veden lämpötila ennen Manateen ja lapsen laittamista suihkuun.

 Mukana seuraavia voiteita ja lisävarusteita ei voida käyttää pitkäaikaisena tukina, vaan ainoastaan lisäapuna käyttäjää tuoliin asetettaessa.

 Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

 Tarkista päällinen, vyöt ja lisävarusteet ja varmista, että tarranauha kiinnittyy tukevasti.

FIN TAKUU

Vikailmoituksia otetaan vastaan R82 A/S :ssa kahden vuoden ajan.

Manateen takuu on 12 kuukautta. Takuu on voimassa vain käytettäessä alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita. Kaikki erikoissäädöt on tehtävä R82:n toimesta. R82 ei ole vastuussa vauriosta tai vammasta, joka aiheutuu muiden kuin alkuperäisosien käytöstä tai muun kuin R82-valtuutetun henkilön tekemistä korjauksista.

FIN HOITO

 Kun tuolia on käyetty klooripitoisessa vedessä, se on huuhdeltava puhtaalla vedellä ja kuivattava liinalla. Varmista, että kaikki vesi on poistunut kehyksestä/alustasta.

 Älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.

 Kaikki tuolissa olevat ruuvit on tarkistettava säännöllisesti tahattomien vahinkojen välttämiseksi.



 Ainoastaan valtuutettu R82-henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa.

FIN VALMISTELUT ENNEN KÄYTTÖÄ

Manatee toimitetaan taitettuna tilan säästämiseksi kuljetuksen aikana. Noudata alla olevia ohjeita suihkutuilin valmistelemiseksi käyttöä varten:

- 1) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-painikkeita (A) ja taita tuolin jalat alas.
- 2) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-painikkeita (B) ja taita säärutuki alas.
- 3) Paina molemmilla puolin olevia lukitus-painikkeita (C) ja nosta selkänoja ylös.


Manatee on käyttövalmis.

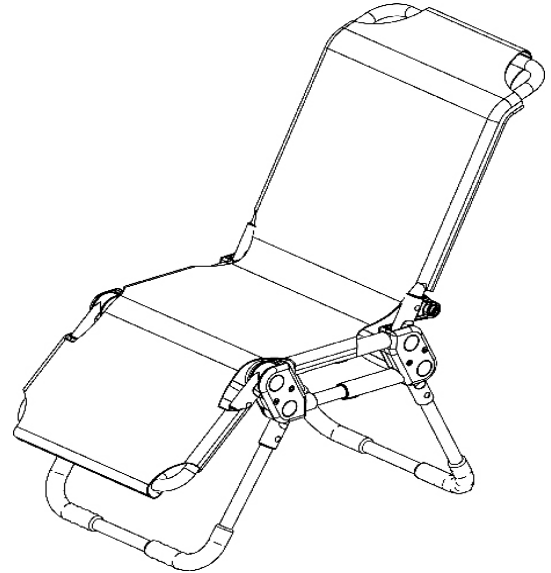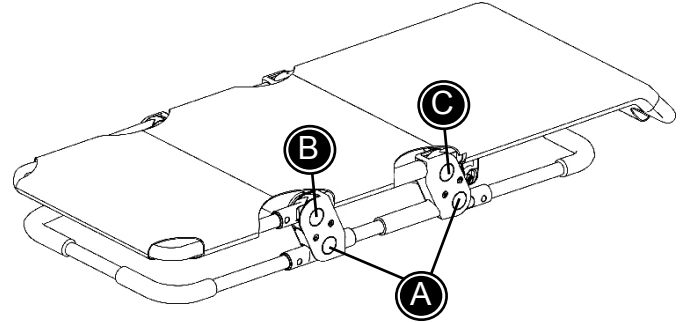

! Tarkista, että kaikki lukituspainikkeet palautuvat paikoilleen säätämisen jälkeen.

! Älä koskaan jätä käyttäjää ilman valvontaa Manateehen.

! Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuolin jalkojen kulmasäätöä. Selkänojan ja säärituen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormituksen poistamiseksi.

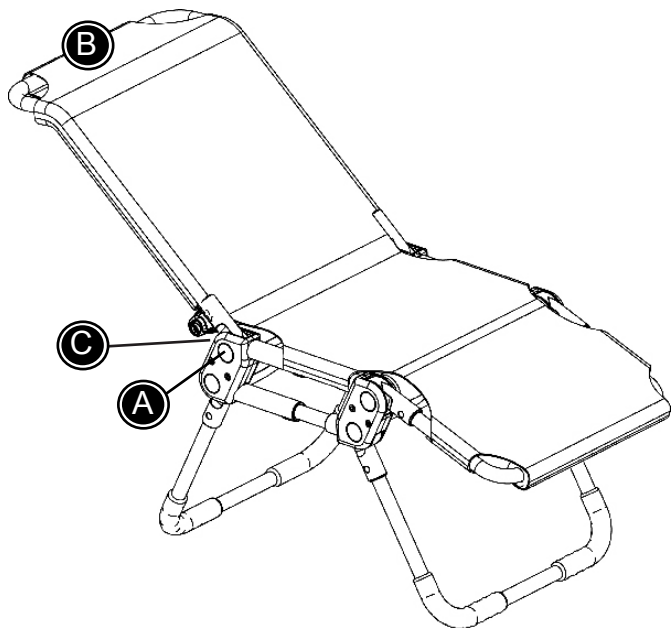

FIN SELKÄNOJA

Manateen selkänoja kallistuu yksilöllisesti. Noudata alla olevia ohjeita selkänojan kallistussäädön tekemiseksi:

- 1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
- 2) Kallista selkänoja (B) vaadittuun asentoon.
- 3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palautuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.

Selkänojan kallistus voidaan myös tehdä vetämällä tuolin takana olevasta hihnasta.




Varo sormien joutumista kiertonivelen ja selkänojan väliin (C).



Selkänojan ja säärিতuen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja säärিতukea kevyesti kuormituksen poistamiseksi.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

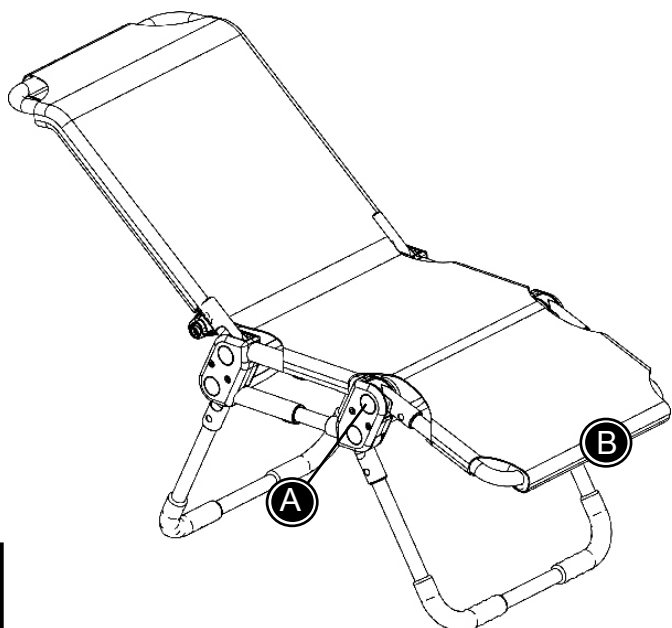

FIN SÄÄRITUEN KULMASÄÄTÖ

Manateen säärিতuen kulma säätyy yksilöllisesti. Noudata alla olevia ohjeita säärিতuen kulmasäädön tekemiseksi:

- 1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
- 2) Säädä säärিতuen (B) kulma vaadittuun asentoon.
- 3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palautuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.

Säärিতuen kulmasäätö voidaan myös tehdä vetämällä tuolin alla olevasta hihnasta.



Selkänojan ja säärিতuen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja säärিতukea kevyesti kuormituksen poistamiseksi.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

FIN ISTUIMEN SYVYYS

Istuimen syvyys Manateessa (koko 0) voidaan säätää kahteen asemaan:

- 1) Pura ruuvit (A) molemmin puolin 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- 2) Korvaa lyhyet putket mukana seuraavilla pitkillä putkilla. Kiristä ruuvit (A) tiukalle.

Noudata alla olevaa ohjetta Manateen istuisyvyyden säätämiseksi (koko 1+2):

- 1) Avaa ruuveja (A) molemmin puolin 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- 2) Säädä syvyys vaadittuun asemaan vetämällä kehystä ulos.
- 3) Kiristä ruuvit (A) uudelleen.





Tarkista säännöllisesti, että ruuvit ovat kireällä. Varmista ruuvien ja muttereiden kireys.



Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen säätöä.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

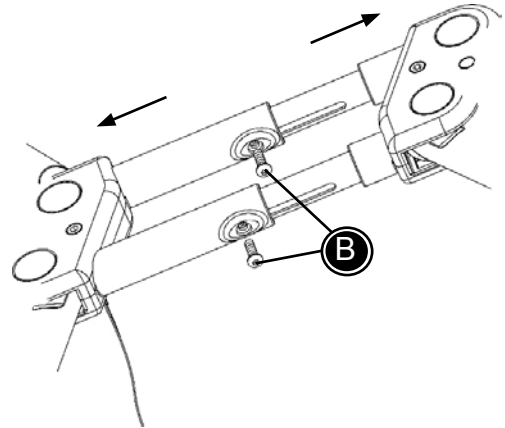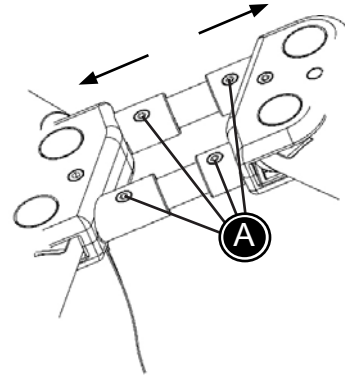

FIN ISTUIMEN KORKEUS

Istuinkorkeutta Manateessa voidaan säätää muuttamalla jalkojen asentoa.

- 1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
- 2) Säädä jalkojen (B) kulma haluttuun asentoon.
- 3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palautuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.


Jalkoja voidaan myös säätää vetämällä istuimen alla olevasta hihnasta.




Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen jalkojen kulmasäätöä.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

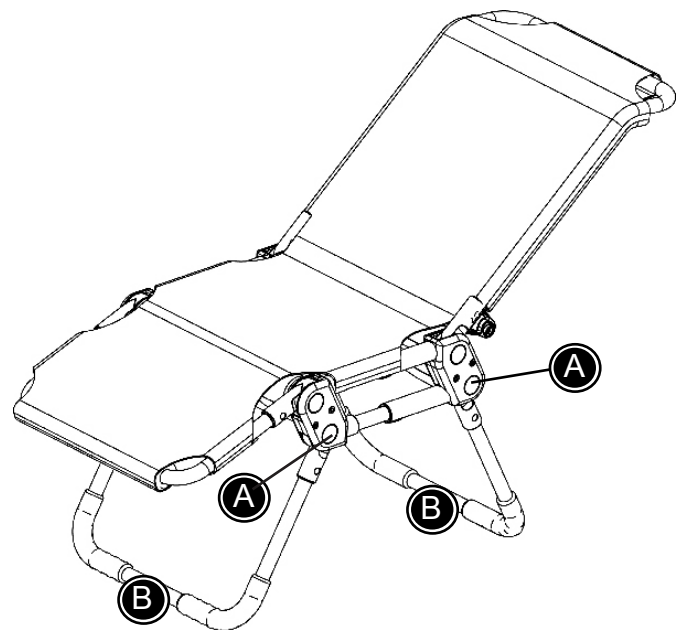

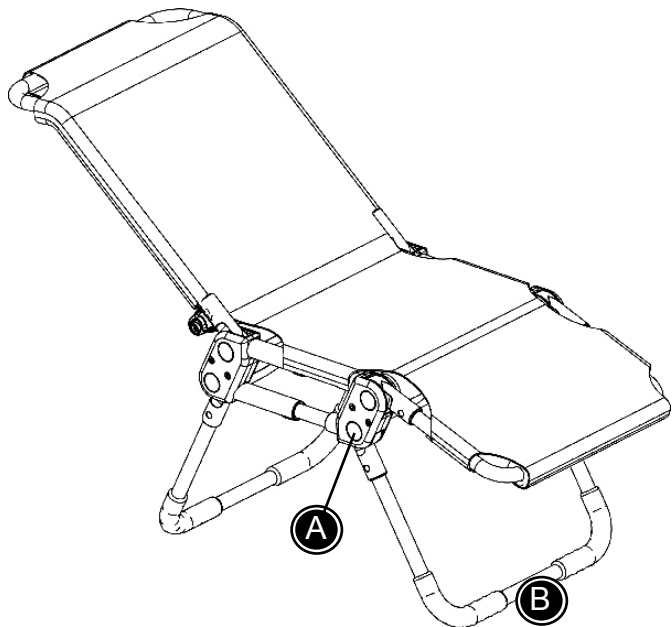

FIN ISTUIMEN KALLISTUS


Noudata alla olevia ohjeita Manateen istuimen kallistussäädön tekemiseksi :

- 1) Paina lukituspainikkeita (A) molemmin puolin.
- 2) Säädä etumaisen jalan (B) kulma halutuksi.
- 3) Tarkista, että molemmat painikkeet (A) palautuvat säätämisen jälkeen paikoilleen.

Etumaista jalkaa voidaan säätää myös vetämällä istuimen alla olevasta hihnasta.

 Käyttäjä on poistettava tuotteesta ennen tuolin jalkojen kulmasäätöä.

 Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

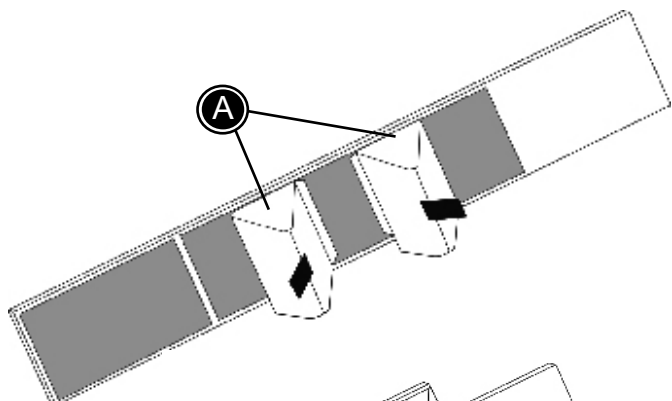

FIN PÄÄTUKI/ SIVUTUKI

Manatee toimitetaan normaalisti päätuen/ sivutuen kanssa. Noudata alla olevaa ohjetta tuen asentamiseksi oikealla tavalla:

- 1) Levitä hihna auki kääntöpuoli ylöspäin. Aseta kiilat hihnan päälle haluttuun kohtaan (A).
- 2) Taita hihnan päät ja kiinnitä kiiloihin (B) tarranauhan avulla.
- 3) Käännä hihna ympäri, ja se on valmis asennettavaksi tuoliin (C).

 Varmista, että kiilat ovat kunnolla kiinni hihnassa olevassa tarranauhassa.

 Pääntuki/sivutukea ei saa käyttää pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.

 Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten tuoliin.

FIN LANTIOVYÖ

Manatee toimitetaan normaalisti lantiovyön kanssa. Noudata alla olevaa kuvausta tuen asentamiseksi oikealla tavalla:


- 1) Kiinnitä hihna tuolin molemmin puolin oleviin kiinnikkeisiin (A).
- 2) Lantiovyö kiristetään tarranauhalla ja soljella (B).



Lantiovyötä ei saa käyttää pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

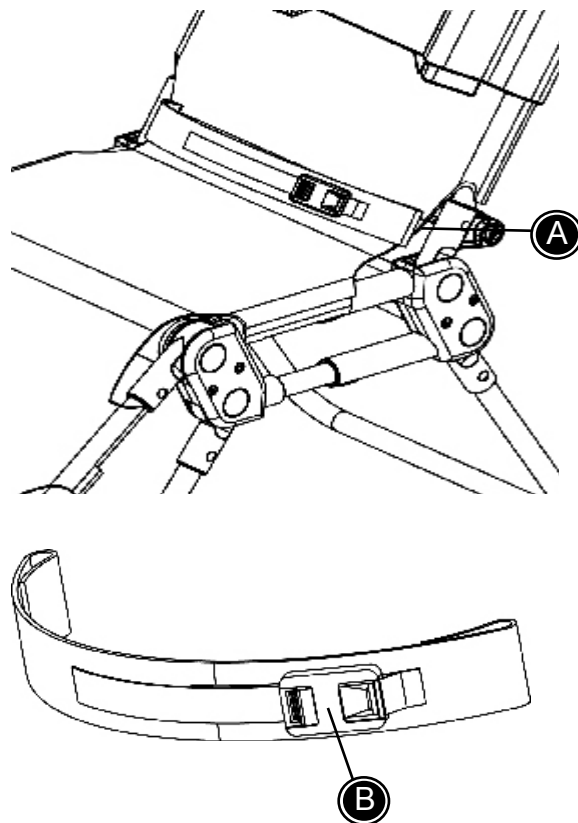

FIN RINTAVYÖ

Noudata alla olevaa kuvausta rintavyön asentamiseksi oikealla tavalla:


- 1) Kiinnitä hihna tarranauhalla selkänöjan (A) ympäri.
- 2) Aseta käyttäjä tuoliin. Asenna hihna (B) varatalon ympäri.
- 3) Kiristä rintavyö tarranauhalla ja soljella (C).




Rintavyötä ei saa käyttää pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

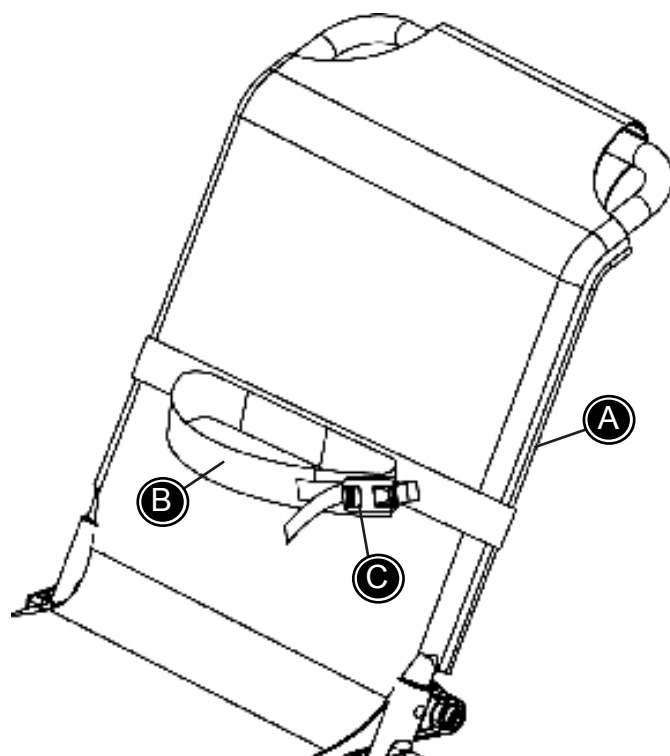

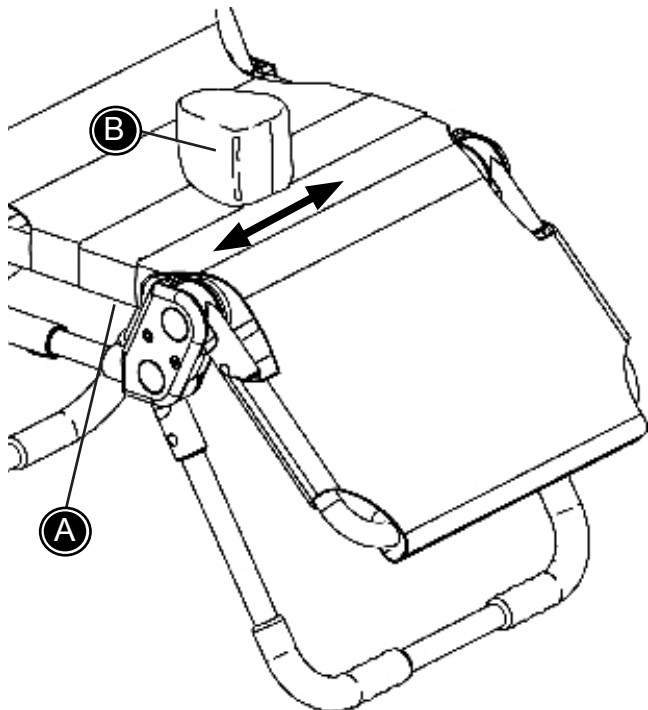

FIN HAARAKIILA

Noudata alla olevia ohjeita haarakiilan asentamiseksi oikealla tavalla:


- 1) Kiinnitä hihna tarranauhalla istuimen alle (A).
- 2) Säädä haarakiilaa (B) sivuttaissuunnassa optimaalisen kohdan löytämiseksi.



Haarakiilaa ei saa käyttää pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

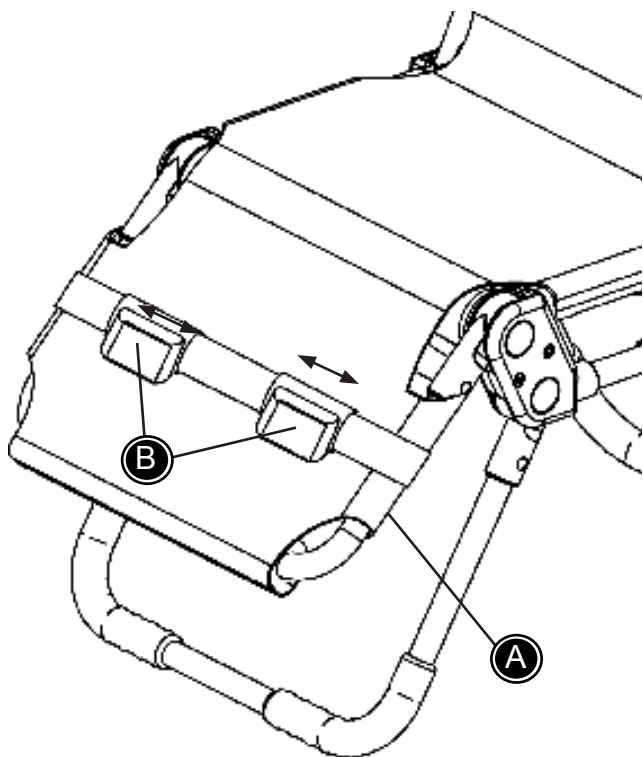

FIN JALKAHIHNAT

Noudata alla olevaa kuvausta hihnojen asentamiseksi oikealla tavalla:

- 1) Kiinnitä hihna tarranauhalla säärätuen alle (A).
- 2) Säädä jalkahihnoja (B) sivuttaissuunnassa optimaalisen kohdan löytämiseksi. Kiristä tarranauhalla.



Jalkahihnoja ei saa käyttää pitkäaikaisena tukena. Tuki on suunniteltu ainoastaan helpottamaan lapsen sijoittamista tuoliin.



Lukitse tuoli aina säätöjen tekemisen jälkeen. Aseta käyttäjä sitten Manateehen.

FIN PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN JA ASENTAMINEN

Noudata alla olevaa ohjetta, kun päällinen on irrotettava ja pestävä:

- 1) Avaa päällisen vetoketju selkänojan takaa (A) ja istuimen alta (B).
- 2) Avaa tarranauha istuimen alta (C) ja päällinen voidaan vetää ylös (D) ja pois tuolista.



Katso päällisen hoito-ohjeet muualta tästä käyttöohjeesta.

Noudata alla olevaa kuvausta päällisen asentamiseksi uudelleen tuoliin:



- 1) Aseta päällinen selkänojan päälle ja vedä alas (D). Varmista, että päällisessä olevat pehmustetyyny tulevat rungon ympärille.
- 2) Sulje päällinen tuolin takaa (A) vetoketjulla.
- 3) Asenna pieni vetoketjun suojakappale tuolin alle (B). Varmista, että tarranauha osoittaa alaspäin.
- 4) Kallista sääritykeä (E) ja istuimen (C) alla oleva ja sääritynen alla (C) oleva tarranauha voidaan sulkea. Varmista, että päällisessä olevat pehmustetyyny tulevat rungon ympärille.
- 5) Käännä sääritykeä (E) alas ja varmista, että tarranauha on kiinnitetty oikein.



Tarkista säännöllisesti, että vetoketjut (A) + (B) ovat turvallisesti suljetut.



Tarkista säännöllisesti, että tarranauha tarttuu turvallisesti.

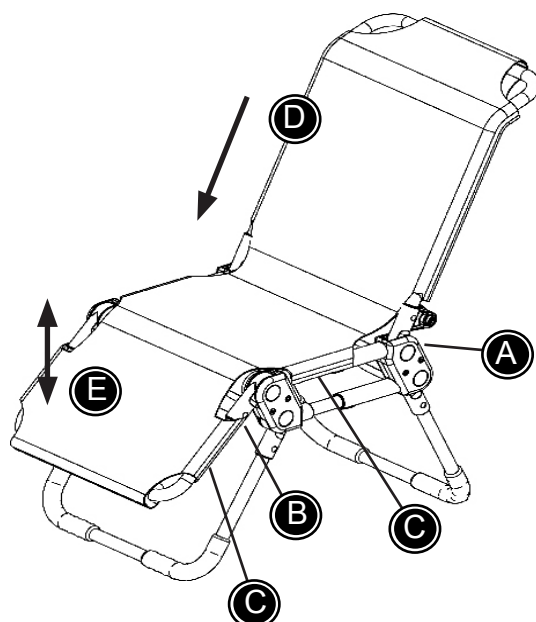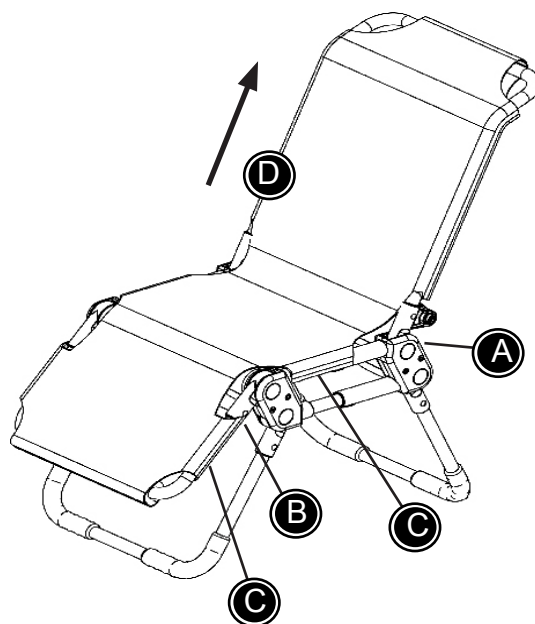

FIN TUOLIN KOKOON- TAITTAMINEN

Manatee voidaan helposti taittaa kokoon ja säilyttää pienessä tilassa.

Noudata alla olevaa ohjetta Manateen taittamiseksi oikein:

- 1) Paina molemmilla puolilla olevia lukitus-painikkeita (A) ja siirrä säärutuki ylös vaakasuoraan asentoon.
- 2) Paina lukituspainikkeita (B) ja käännä selkänoja vaakasuoraan asentoon.
- 3) Paina lukituspainikkeita (C) ja käännä sekä etu- että takajalat vaakasuoraan.

Manatee on nyt taitettu kokoon.



Käyttäjä on poistettava tuolista ennen tuolin jalkojen kääntämistä.



Selkänojan ja säärituen kallistussäädön yhteydessä suosittelemme, etteivät käyttäjän vartalo ja jalat paina niitä. Työnnä selkänojaa ja sääritukea kevyesti kuormituksen poistamiseksi.



Tarkista, että kaikki lukituspainikkeet palautuvat paikoilleen säätöjen jälkeen.



Varo sormien joutumista kiertonivelen ja selkänojan väliin (D). Haluttaessa on mahdollista vetää avaushihnaa ulos yhdellä kädellä ja kallistaa selkänojaa toisella kädellä (E).

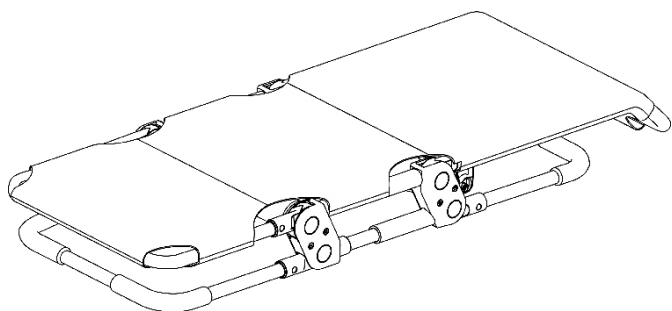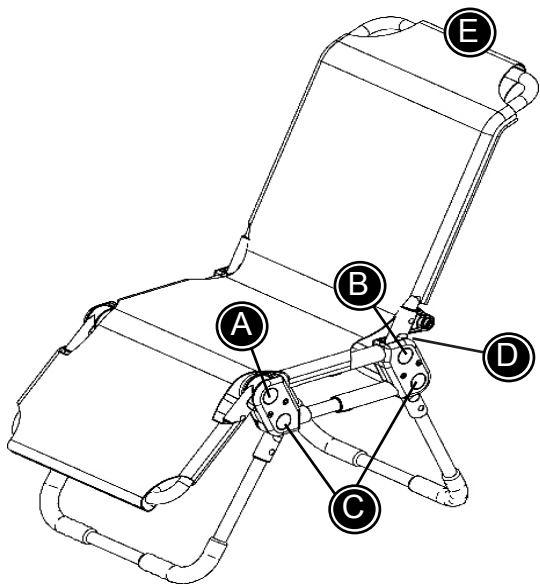

FIN ALUSTA

Alustan säätäminen:

- * Avaa molemmilla puolilla olevia sormiruuveja (A).
- * Vedä alusta haluttuun pituuteen.
- * Varmista, että sormiruuvit (A) loksahtavat paikoilleen tangossa oleviin reikiin.



Huomioi tangossa oleva maksimimerkintä.

Tuolin sijoittaminen alustalle:




- * Avaa sormiruuveja (B).
- * Aseta tuolin takaosa (C) alustassa olevaan pidikkeeseen (D).
- * Aseta tuolin etuosa (E) toisiin alustassa oleviin pidikkeisiin (F).
- * Kiristä kaikki neljä sormiruuvia (B).



Varmista, että tuoli on kunnolla asennettu alustalle esim. nostamalla varmistaen, että se on oikein kiinnitetty alustaan.



Alustaa tulee käyttää ainoastaan kylpyammeessa.

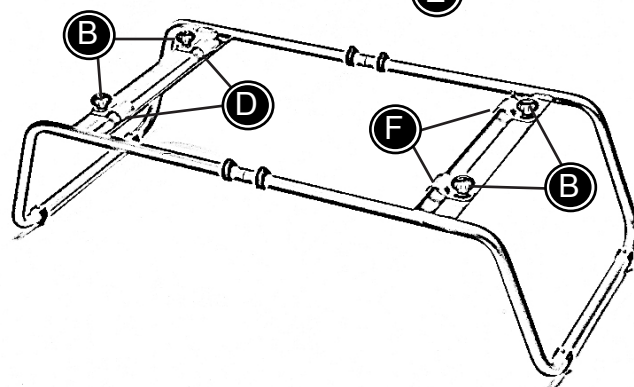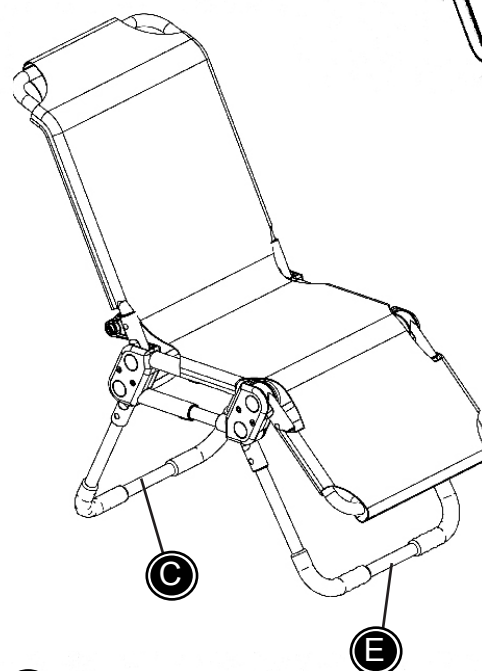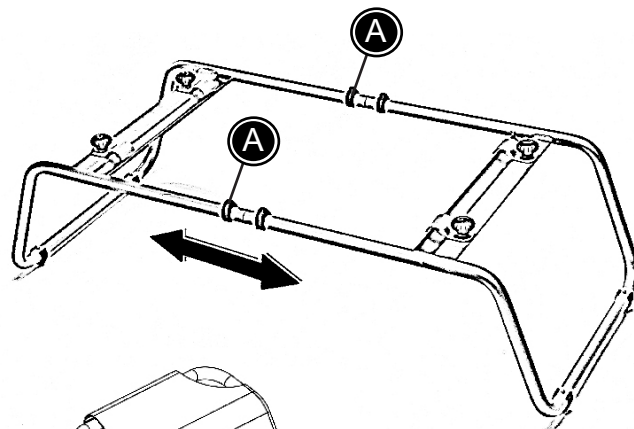

FIN

KORKEUS- SÄÄDETTÄVÄ ALUSTA

Pyörien asennus:

- * Asenna 4 pyörää kiintoavaimella ja kiristä turvallisen asennuksen aikaansaamiseksi.

Alustan säätäminen:

- * Avaa sormiruuveja (A).
- * Taita alusta auki ja nosta haluttun korkeuteen.
- * Varmista sormiruuvien (A) kunnollinen kiristäminen haluttuun korkeuteen.

Tuolin sijoittaminen alustalle:


- * Lukitse pyörät jalalla käytettävillä lukoilla.
 - * Aseta tuolin takaosa (B) alustassa olevaan kannattimeen (E).
- Saattaa olla tarpeen käyttää säätökappaleita (G) halutun asennon saavuttamiseksi.
- * Aseta tuolin etuosa (D) toiseen alustassa olevaan kannattimeen (C).



Varo sormien joutumista puristuksiin alustaa taitettaessa ja avattaessa.



Tuoli on sijoitettava alustan keskelle kahden kumituen väliin (F). Varmista, että osa (G) loksauttaa paikalleen. Testaa, että tuoli on kunnolla asennettu alustalle.


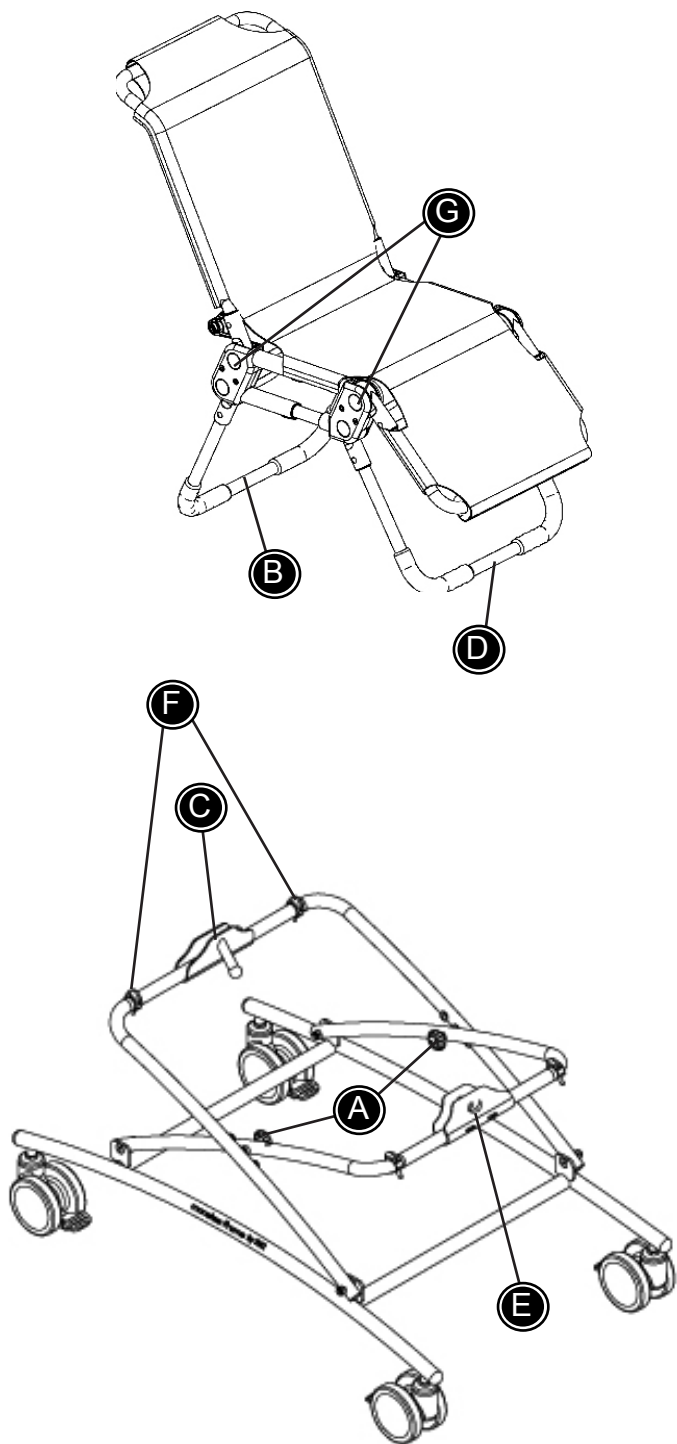



FIN SEINÄRIPUSTIMET ALUSTAA VARTEN

- * Pora 8 mm:n reiät ruuveja (B) varten. Pane rawlplug-kiinnikkeet (C) reikiin.
- * Ruuvaa 2 seinäripustinta (A) iseenään ruuveilla (B).
- * Ripusta kokoonlaitettu Manateen alusta seinäkannattimiin.



Seinäripustimet on tarkoitettu vain Manatee-alustaa varten.

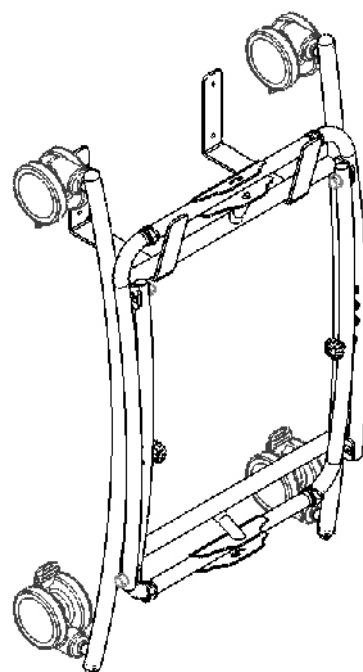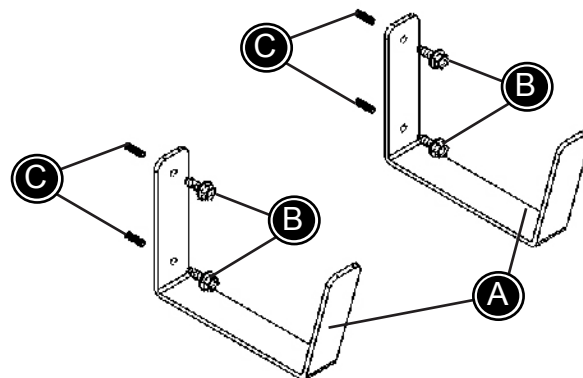

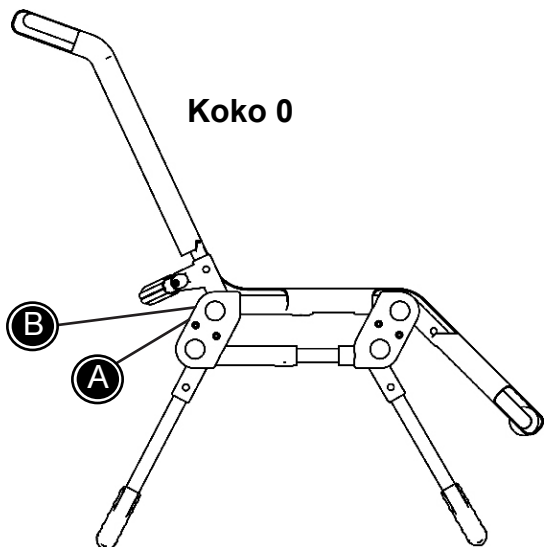

Koko 0



TUOTTEEN TUNNISTUS


Koko 0

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee poikittaistangon oikealla sivulla takana.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee poikittaistangon oikealla sivulla takana.

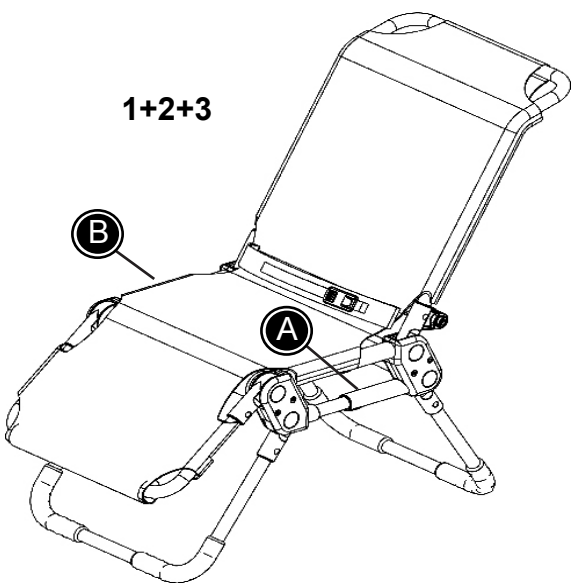

1+2+3

Koko 1+2+3

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee alustan sisäisivulla tuolin oikealla sivulla.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee alustan sisäisivulla tuolin vasemalla sivulla.



FIN TUOTTEEN TUNNISTUS


Alusta

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

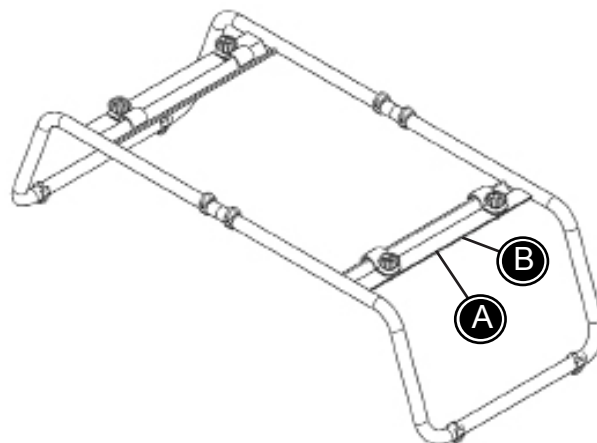


Korkeussäädettävä alusta

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee alustan sisäsivulla

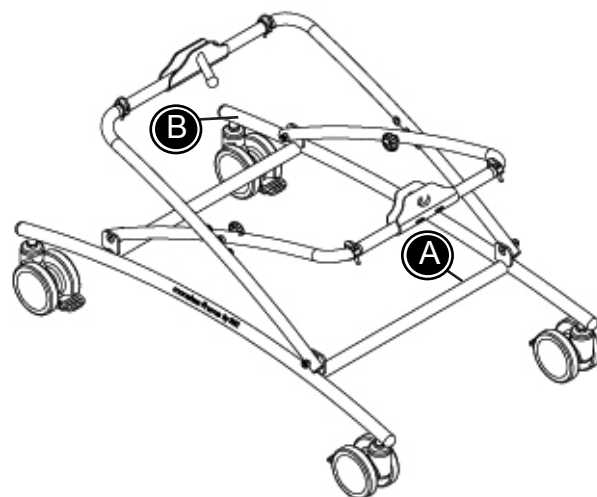

Dato: 31-01-02 Belast: kg
SN: 0840-01-111878-001
Varenr: 880003




5707292

134158



R82[®]  **CE**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved

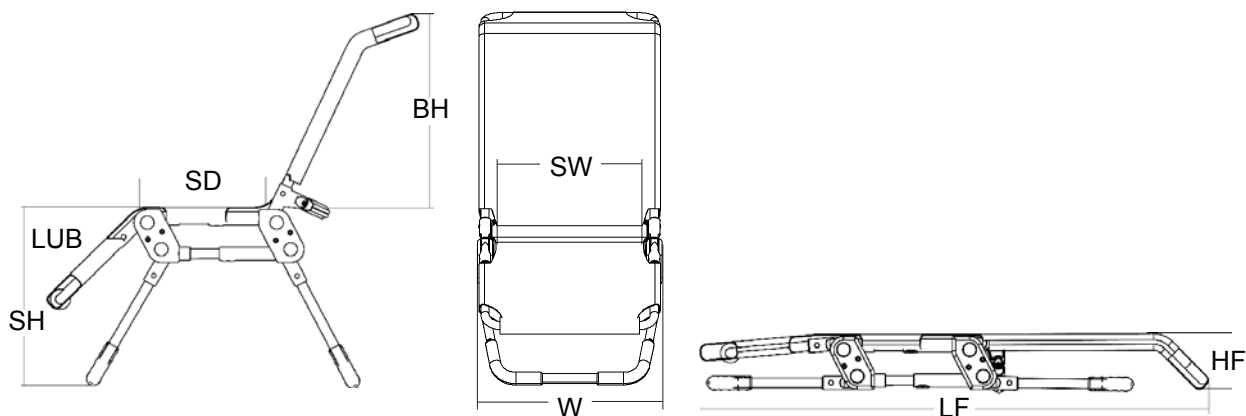

MITAT

	Koko 0 cm (tuumaa)	Koko 1 cm (tuumaa)	Koko 2 cm (tuumaa)	Koko 3 cm (tuumaa)
Istuinleveys (SW)	33 (12 ³ / ₄ "	33 (12 ³ / ₄ "	33 (12 ³ / ₄ "	40 (15 ¹ / ₂ "
Istuimen syvyys (SD)	21 & 25 (8-9 ³ / ₄ "	32-39 (12 ¹ / ₂ -15 ¹ / ₂ "	41-48 (16-18 ³ / ₄ "	41-48 (16-18 ³ / ₄ "
Istuinkorkeus (SH)	13-43 (5-16 ³ / ₄ "	13-43 (5-16 ³ / ₄ "	13-43 (5-16 ³ / ₄ "	13-43 (5-16 ³ / ₄ "
Selkänojan korkeus (BH)	43 (16 ³ / ₄ "	43 (16 ³ / ₄ "	58 (22 ¹ / ₂ "	65 (25 ¹ / ₄ "
Säärenpituus (LUB)	28 (11"	28 (11"	37 (14 ¹ / ₂ "	37 (14 ¹ / ₂ "
Kokonaisleveys (W)	42 (16 ¹ / ₂ "	42 (16 ¹ / ₂ "	42 (16 ¹ / ₂ "	49 (19"
Pituus taitettuna (LF)	110-117 (43-45 ³ / ₄ "	110-117 (43-45 ³ / ₄ "	137-144 (53 ¹ / ₂ -56 ¹ / ₄ "	144-151 (56-58 ³ / ₄ "
Korkeus taitettuna (HF)	13 (5"	13 (5"	13 "	13 (5"
Paino	4 ¹ / ₄ kg (9 ¹ / ₂ lb)	4 ¹ / ₂ kg (10 lb)	4 ³ / ₄ kg (10 ¹ / ₂ lb)	6 ³ / ₄ kg (14 ³ / ₄ lb)
Max. kuorma/paino	50 kg (110 lb)	50 kg (110 lb)	75 kg (165 lb)	75 kg (165 lb)

Alusta

Yksi koko

Kokonaisleveys	59 (23"
Kokonaispituus	98 (38 ¹ / ₄ "
Korkeus, minimi	38 (13 ³ / ₄ "
Korkeus, keski	44 (17"
Korkeus, maksimi	48 (18 ³ / ₄ "
Istuinkorkeus min., Manatee alustalla	76 (29 ³ / ₄ "
Istuinkorkeus keski, Manatee alustalla	84 (32 ³ / ₄ "
Istuinkorkeus max., Manatee alustalla	90 (35"

Korkeus, taitettuna	21 (8 ¹ / ₄ "
Paino	7,8 kg (17 lb)
Max. kuorma/käyttäjän paino	75 kg (165 lb)

FIN TEKNISET TIEDOT

Kehys: jauhelakatut alumiiniputket
ABS-osat: lasikuituvahvisteinen nailon
Päällinen: tulenkestävä, 100 % polyesteri

FIN VALMISTAJA

R82 A/S
Parallevej 3
8751 Gedved
Tanska

FIN JAKELIJA

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 5099 490
Sähköp. info.algoltrehab.fi@algol.fi
Internet www.algoltrehab.fi

Jakelijanne löytyy verkkosivuilta www.r82.com

FIN HOITO JA HUOLTO

PÄÄLLINEN

Päällinen on valmistettu tulenkestävästä kankaasta. Päällinen on helposti irrotettavissa ja voidaan konepestä 50°:ssa.

ALUSTA

Varmista, että kaikki tuolin alla olevat ruuvit (A) on kunnolla kiristetty, etenkin kun tuolin syvyyttä on säädetty. Kier-
tonivelissä olevat ruuvit (B) on tarkistettava säännöllisesti.



On tärkeää pitää tuoli puhtaana sekä oman miellyttävyyden että takuun voimassaolon kannalta. Kun tuolia on käytetty
klooripitoisessa vedessä, se on huuhdeltava puhtaalla vedellä ja kuivattava liinalla. Varmista, että kaikki vesi on pois-
tunut rungosta/alustasta. Älä käytä klooria tai denaturoitua spriitä sisältäviä puhdistusaineita.

TARKASTUS

On tärkeää havaita kaikki viitteet alkavista vioista alustassa/rungossa, PVC-osissa ja vastaavissa.

KORJAUS

Mikäli suihkutuolissanne on ongelma, ottakaa välittömästi yhteys myyjään. Viallisia tuoleja ei tule käyttää. Mikäli
tuolinne tarvitsee kunnostusta tai korjausta, saadaan käyttää vain alkuperäisiä R82-osia. Rikkoutuneet lisävarusteet
tai saatavilla olevat varaosat voidaan toimittaa R82:lle korjausta varten. Mikäli ongelma on perusosissa, on koko tuoli
palautettava R82:lle korjattavaksi. R82 ei ole vastuussa vauriosta tai vammasta, joka aiheutuu muiden kuin alku-
peräisosien käytöstä tai muun kuin valtuutetun R82:n henkilöstön tekemistä korjauksista.

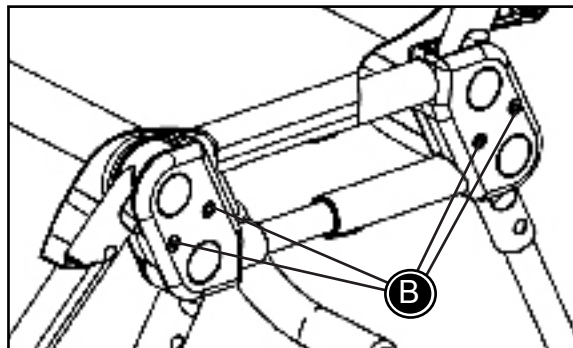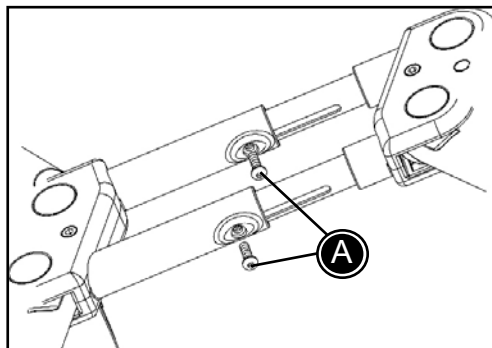

FIN VIANETSINTÄ

Ongelma*

Ruuvit eivät mene muttereihin
syvyysäädön jälkeen.

Lukituspainikkeet eivät palaudu
paikoilleen.

Päällinen on löystynyt.

Tuoli liikuu kylpyhuoneen lat-
tialla.

Tarranauha ei tartu kiinni.

Ratkaisu

Vedä kehys pisimpään asentoonsa. Käänä istuin auki ja siirrä mutteria kehyksessä
olevan aukon kohdalle ja ruuvi voidaan kiristää tiukasti.

Liikuta kehystä hieman edestakaisin, kunnos painikkeet menevät paikoilleen.

Kiristä päällinen tarranauhan avulla istuimen ja säärätuen alta.

Kumisuojaus saattaa olla vaurioitunut. Käänny R82:n puoleen ja vaihda suojus
uuteen.

Poista mahdollinen lika tarranauhasta. Ellei tämä auta, on päällinen tai varuste
vaihettava uuteen. Käänny R82:n puoleen.

* Käyttäjä/avustaja voi kohdata useita näistä ongelmista suihkustuimessa, joka on väärin säädetty tai jota käytetään
väärin.