


panda futura 5[™]

Suomenkielinen käyttöohje

FIN SISÄLLYS

Turvallisuus	4
Takuu	4
Työkalut	4
Istuimet	5
Sivutukien asentaminen/irrotus	5
Selkänojan kallistus	6
Lannetuki	6
Haarakiila	7
Istuimen jatke	7
Selkänojan jatke	8
Päätuki	8
Selkänojan jatke ja päätuki	8
Vartalotuet	9
Sivuun kääntyvät vartalotuet	9
Käsinoja	10
Pöytälevy	10
Rsitikkoliivi	11
Lantiovyö	11
Panda Futura 5 High-low:x -alustalla, koko 2	12
Työntötanko High-low:x sisäalustalle	13
Sivuun kääntyvät polvituet	13
Panda Futura 5 Combi-alustalla, koko 4	14
Tuotteen tunnistus	15
Mitat	16
Tekniset tiedot	17
Valmistaja	17
Huolto	17
Jakelija	17

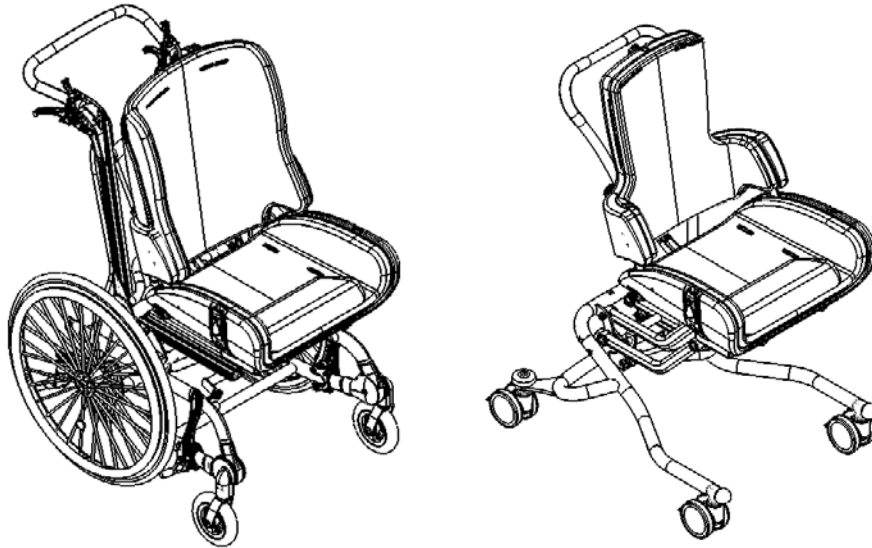

FIN PANDA FUTURA 5


Panda-tuoli on saatavissa kahtena eri versiona: Panda Standard ja Panda Active. Standard-tuoli on ensisijaisesti tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea käsivarsien ja olkapäiden ympärillä. Active-tuoli on aktiivisia lapsia varten, jotka tarvitsevat enemmän liikkumavapautta.

Selkänöjää voidaan molemmissa versioissa kallistaa istuinalustasta riippumattomasti. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima mahdollistavat tuolin säätämisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti mukavuutta ja tukea tarjoten. Panda on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön riippuen siitä, mitä alustaa käytetään.

Sisäkäyttö High-low:x-alusta

Ulkokäyttö Combi-alusta

Tämä käyttöohje mahdollistaa Panda Futura 5:n monien mahdollisuuksien täydellisen hyödyntämisen.

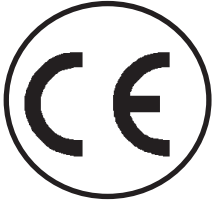

FIN TURVALLISUUS

Panda Futura 5 on saanut CE-merkinnän. Tämä todistaa sen täyttävän kaikki relevantit eurooppalaiset turvavaatimukset.

Tämän tuotteen kestoikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n henkilöstön toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.



Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteen rakennetta muutetaan tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita.



Panda Futura 5 on tarkoitettu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita useampaa kuin yhtä käyttäjää Panda Futura 5 -tuoliin.



Älä milloinkaan jätä käyttäjää tähän tuotteeseen ilman valvontaa. Varmista jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Panda Futura 5:n väärä käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.



Ainoastaan R82:n henkilöstö saa tehdä säätöjä ja lisävarusteiden kiinnityksiä, joita ei mainita tässä käyttöohjeessa. Liivit ja vyöt on kiinnitettävä tuotteiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.




Käyttöohjeen viimeisin versio on aina saatavissa verkossa:
www.r82.com

FIN TAKUU

Jokaiseen R82-tuotteeseen, joka on ostettu R82-myyjältä, sisältyy 1 vuoden takuu valmistusvirheiden ja materiaalien osalta. Alustan murtumien osalta takuu on 5-vuotinen.

Takuun myöntää R82-myyjä tai muu R82:n edustaja.

Takuu on voimassa ainoastaan mikäli R82-tuote on käytössä samassa maassa, jota varten se on valmistettu. Takuu ei kata vahingon aiheuttamaa vauriota, väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttama vaurio mukaan lukien. Takuu mitätöityy, jos sarjanumero poistetaan tai jos kuka tahansa muu kuin valtuutettu R82:n edustaja tekee tuotteeseen korjauksia tai muutoksia.

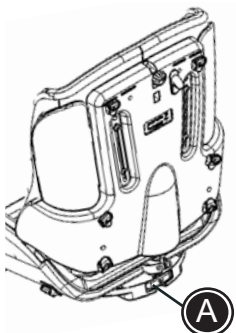

FIN TYÖKALUT

Käyttäkää istuimen alle sijoitettua 5 mm:n kuusiokoloavainta useimpien tässä käyttöohjeessa kuvattujen säätöjen tekemiseen.

FIN ISTUIMET

Panda Futura 5:n istuin on saatavissa vaihtoehtoina (A) STANDARD ja (B) ACTIVE.

Pääasiallinen ero näiden kahden mallin välillä on istuinten muotoilu. ACTIVE-istuin on muotoiltu siten, että yläraajoilla on enemmän liikkumatilaa ja on ideaalinen aktiivisemmille lapsille.

STANDARD-istuin on muotoiltu sivutuvin, jotka antavat lapselle enemmän tukea ja rajoitetumman liikkuvuuden.

Lapsen vartalonhallinta määrää sen, kumpi malli on sopivin. Istuin on helposti vaihdettavissa toiseen malliin (katso jäljempänä). Selkänojan pehmuste on vaihdettava mallia vaihdettaessa. Molempiin istuimiin sopii laaja lisävarusteiden valikoima.



FIN VARTALOTUKIEN ASENTAMINEN / IRROTUS


Noudata alla olevia ohjeita vartalotukien asentamiseksi/irrottamiseksi oikein:


Asentaminen:

- * Aseta vartalotuet selkänojassa oleviin aukkoihin (A)
- * Kiinnitä takaa käyttäen mukana seuraavia ruuvipultteja ja 5 mm:n kuusiokoloavainta (B)

Irrotus:

- * Poista ruuvipultit (B) takaa käyttäen mukana seuraavaa 5 mm:n kuusiokoloavainta
- * Irrota vartalotuet

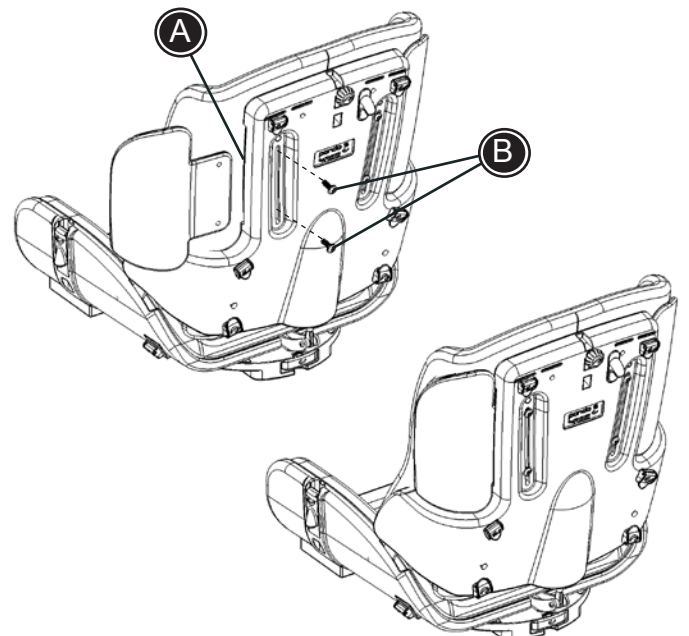

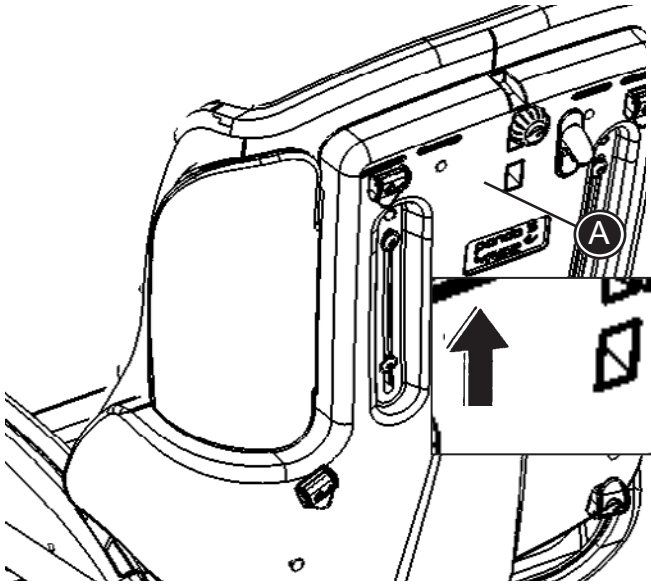


FIN SELKÄNOJAN KALLISTAMINEN



Akillisen kallistumisen estämiseksi tartu lujalla otteella selkänojasta ennen kahvan nostamista.

Nosta kahvaa (A) ylöspäin selkänojan kallistamiseksi ennen selkänojan työntämistä.

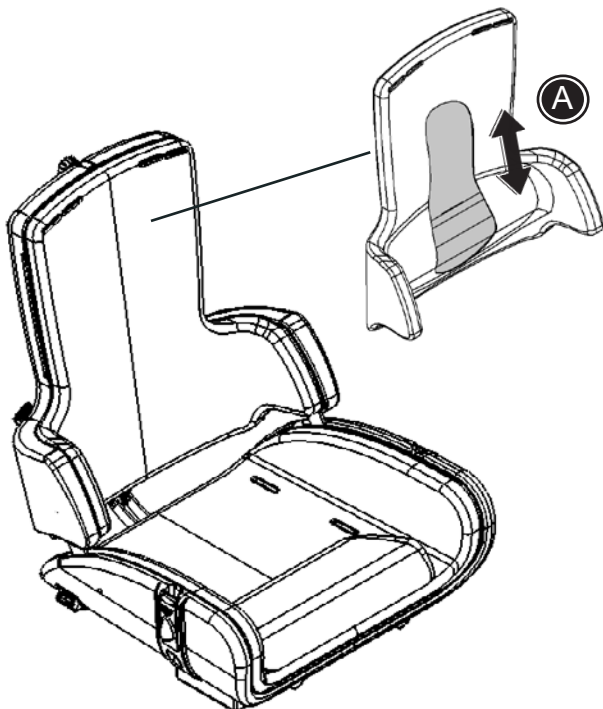


FIN LANNETUKI

Panda Futura 5 toimitetaan selkänojan pehmusteessa olevan säädettävän lannetuen kanssa. Siirrä lannetukea ylös- tai alaspäin (A) tuentarpeen mukaisesti.

FIN HAARAKIILA

Panda Futura 5 on varustettu haarakiilan asennusta varten.

- * Kiinnitä kiinnitysosa mukana toimitetulla 4 mm:n kuusiokoloavaimella (A).
- * Haarakiila asennetaan kiinnitysosaan ja sen syvyyttä säädetään käyttämällä vipua (B).

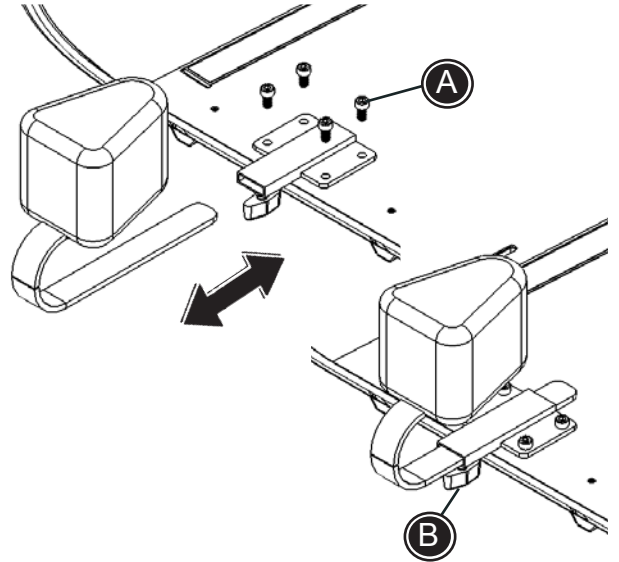


FIN ISTUIMEN JATKE

Panda Futura 5 on varustettu istuimen jatkeen asennusta varten.

- * Työnnä istuimen jatkeesta tulevat tangot kahteen istuimen alla olevaan aukkoon.
- * Työnnä oikeaan asemaan ja kiristä mukana seuraavilla ruuvipulteilla ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella (A).




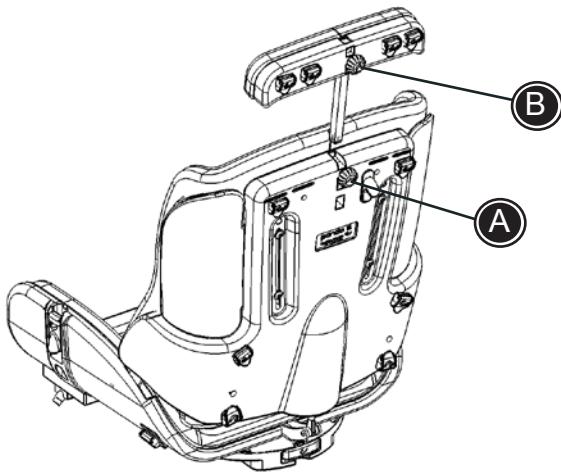

FIN SELKÄNOJAN JATKE

Panda Futura 5 on varustettu selkänöjan jatkeen asennusta varten.


- * Asenna selkänöjan jatkeesta tuleva tanko selkänöjassa olevaan kiinnitysosaan ja kiristä siipiruuvilla (A).
- * Avaa siipiruuvia (A) tai (B) korkeuden säätämiseksi.

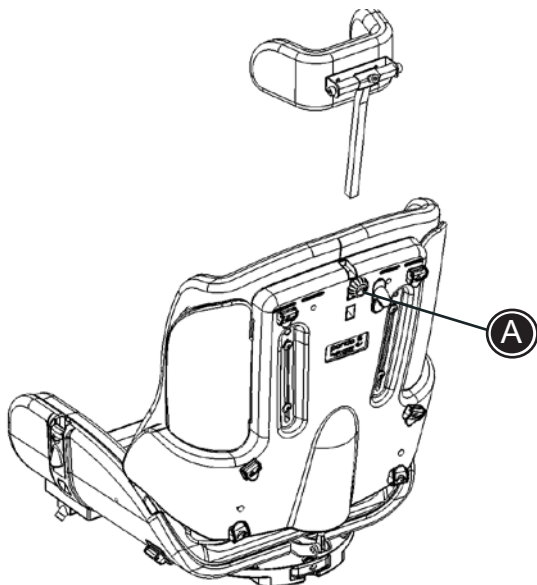

FIN PÄÄNTUKI

Panda Futura 5 on varustettu päntuen asennusta varten.

- * Asenna päntuen tanko selkänöjassa olevaan kiinnitysosaan ja kiristä siipiruuvilla (A).

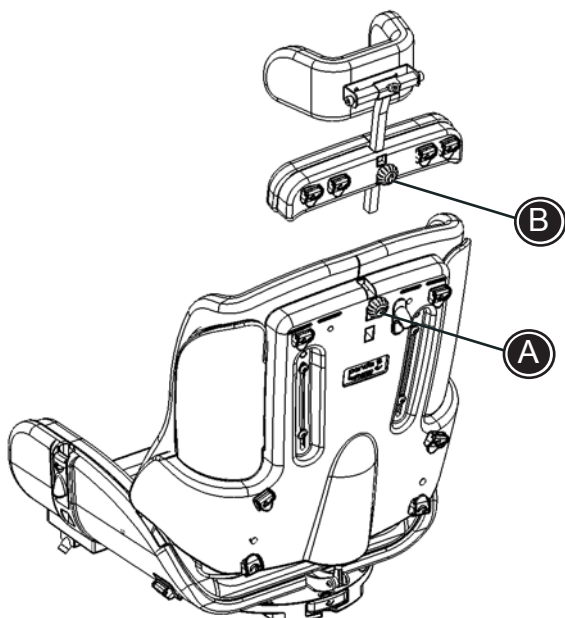

FIN SELKÄNOJAN JATKE JA PÄÄNTUKI


Noudata alla olevia ohjeita selkänöjan jatkeen ja päntuen asentamiseksi samanaikaisesti.

- * Liu'uta päntuen tanko selkänöjan jatkeessa olevan aukon läpi ja edelleen selkänöjassa olevaan aukkoon/kiinnitysosaan.
- * Säädä päntuen korkeus ja kiristä siipiruuvilla (A).
- * Säädä selkänöjan jatkeen korkeus ja kiristä siipiruuvilla (B).

FIN VARTALOTUET

Panda Futura 5 on varustettu vartalotukien asennusta varten.


- * Aseta vartalotuet aukkoihin.
- * Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin aukkoihin.
- * Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Säädä korkeus ja kiristä.

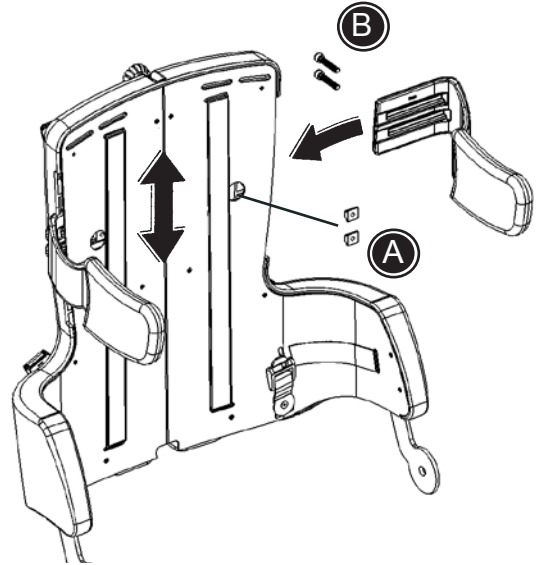

FIN SIVUUNKÄÄNTYVÄT VARTALOTUET

Panda Futura 5 on varustettu sivuun kääntyvien vartalotukien asennusta varten.


- * Aseta vartalotuet aukkoihin.
- * Aseta mutterit yksi kerrallaan selkänojassa olevaan reikään (A) ja vartalotuissa oleviin aukkoihin.
- * Kiristä takaa mukana seuraavilla pulteilla (B) ja 5 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Säädä korkeus ja kiristä.

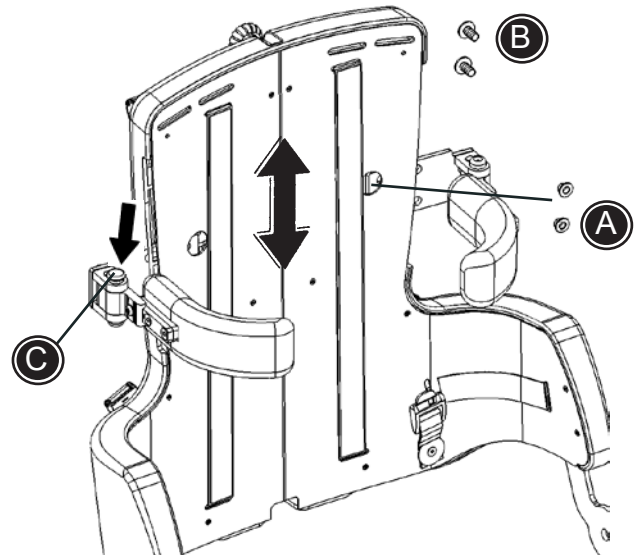

Sivuun kääntyvät vartalotuet vapautetaan painamalla punaista painiketta (C) ja käännetään sitten sivuun.



Avustajan tulisi tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden välein.

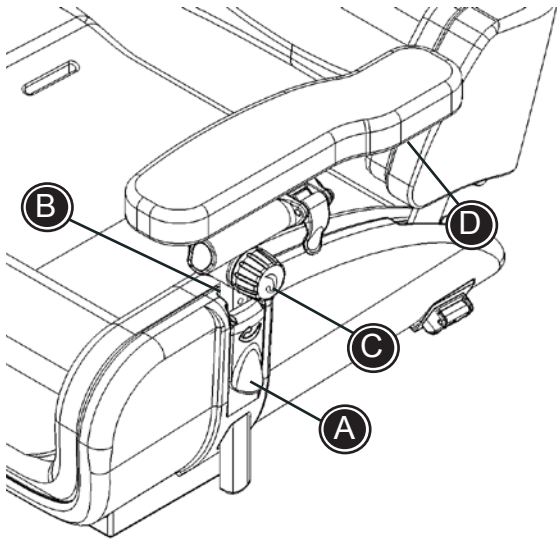

FIN KÄSINOJA


Korkeussäätö:

Avaa vipu (A) käsinojan siirtämiseksi oikeaan asentoon. Aseta pieni ruuvi (B) halutulle korkeudelle. Sulje vipu säätämisen jälkeen.

Käsinojan pehmusteen kallistussäätö:

Avaa sormiruuvi (C).

Säädä käsinojan pehmusteen kallistusta sivuittain: avaa pehmusteen alla olevia ruuveja (D).

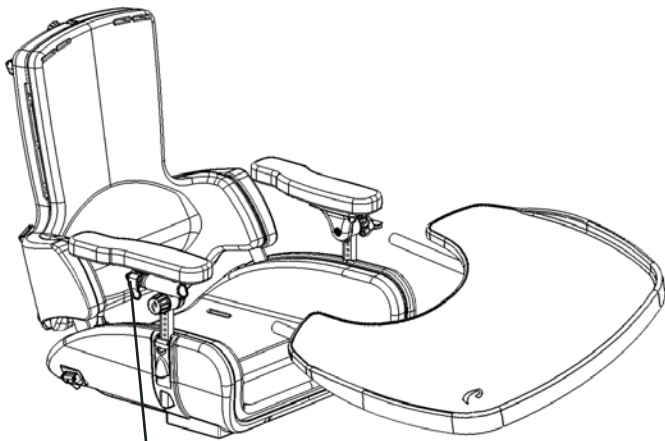


FIN PÖYTÄLEVY

A) Asentaminen ja syvyyssäätö

B) Pöytälevyn kallistaminen käsinojien kallistuksen avulla.



Pöytälevy voidaan asentaa vain käsinojilla varustettuun Panda Futura 5:een.

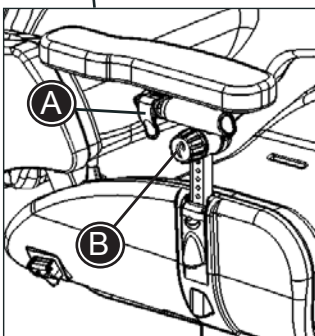


FIN RISTIKKOLIIVI

Liivi ja ristikkoliivi voidaan avata ja sulkea käyttämällä solkia ja vetoketjua.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänöjan pehmusteessa olevan aukon läpi ja selkänöjan yläosassa oleviin fixlock-kiinnittimiin (A).
- * Kiinnitä ylemmät hihnat selkänöjassa oleviin fixlock-kiinnittimiin (B).
- * Kiinnitä alemmat hihnat selkänöjan alaosassa oleviin yönkiinnittimiin (C).



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä säännöllisesti.

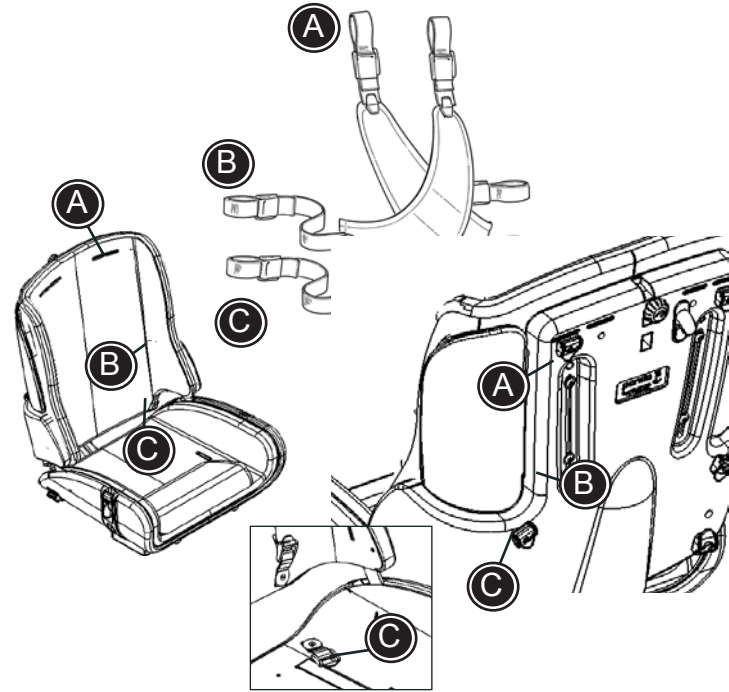


FIN LANTIOVYÖ


Lantiovyö voidaan avata ja sulkea solkien avulla.

- * Kiinnitä hihnat istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin (A).



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja tehty oikein. Tarkista nämä säännöllisesti.

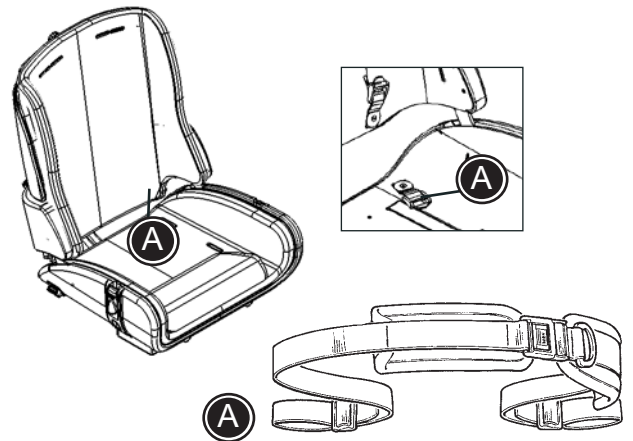

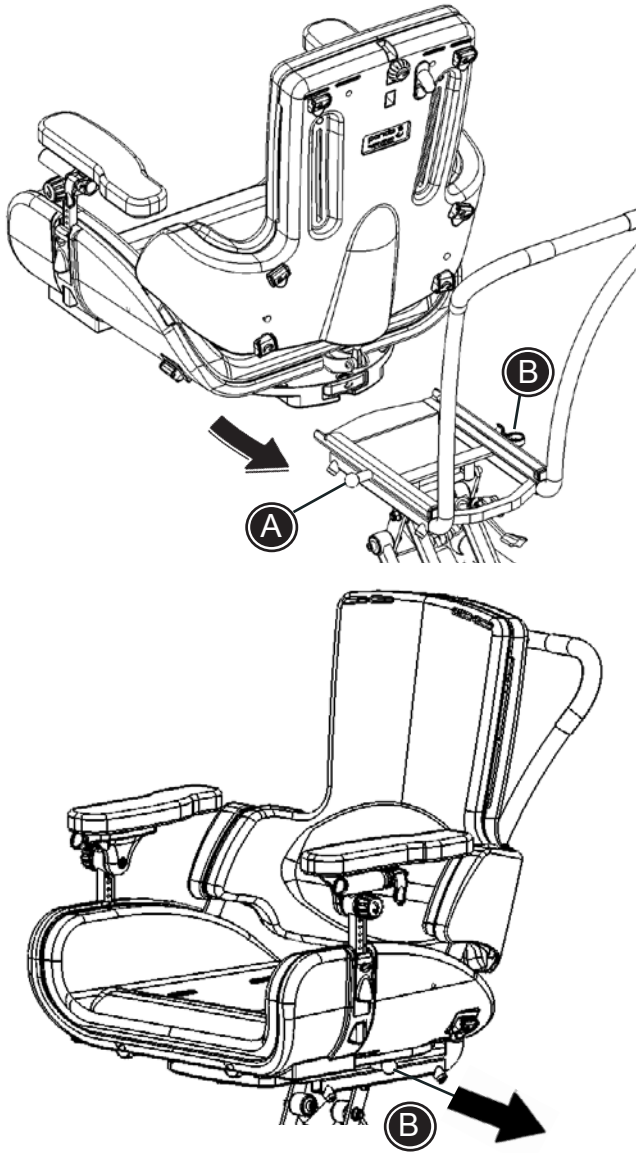

FIN PANDA FUTURA 5 HIGH-LOW:X -ALUS- TALLA, KOKO 2

! Tätä yhdistelmää ei pidä käyttää vahvasti spastisille, voimakkaita liikkeitä tekeville lapsille.

Istuimen asentaminen:

Aseta istuin adapteriin ja työnnä se kokonaan taakse, kunnes se loksauttaa paikalleen. Lukitse punainen kahva (A) istuimen lukitsemiseksi tukevasti paikalleen.

! Älä käytä ensimmäistä koloa, johon se loksauttaa. Se on vain turvakolo, joka pysäyttää istuimen, jos se vahingossa hyppää ulos oikeasta kolosta.

Istuimen irrotus:

Avaa punainen kahva (A). Vedä nuppi (B) ulos, liu'uta istuinta eteenpäin kunnes se irtoaa adapterista.

! Maksimikuorma alustalla on 60 kg.

! Panda Futura 5:tä EI voida asentaa kokoa 1 olevalle alustalle.

i Viittaamme 'Alustojen käyttöohjeisiin' lisätietojen saamiseksi kokoa 2 olevien alustojen version ja toimintojen osalta

FIN TYÖNTÖTANKO HIGH-LOW:X SISÄALUSTALLE


Syvyyssäätö:

Avaa alustan molemmilla puolilla olevia ruuveja (A) ja säädä työntötangon syvyys. Työntötanko säätyy kahteen asemaan ja loksauttaa paikalleen varmistusnastan avulla.

Kiristä vaadittuun asemaan.



Älä käytä työntötankoa alustan nostamiseen/vetämiseen ylös tai alas portaita, reunakiveyksiä jne. Alustan nostamiseen tarvitaan kaksi ihmistä. Älä milloinkaan nosta alustaa työntötangosta.

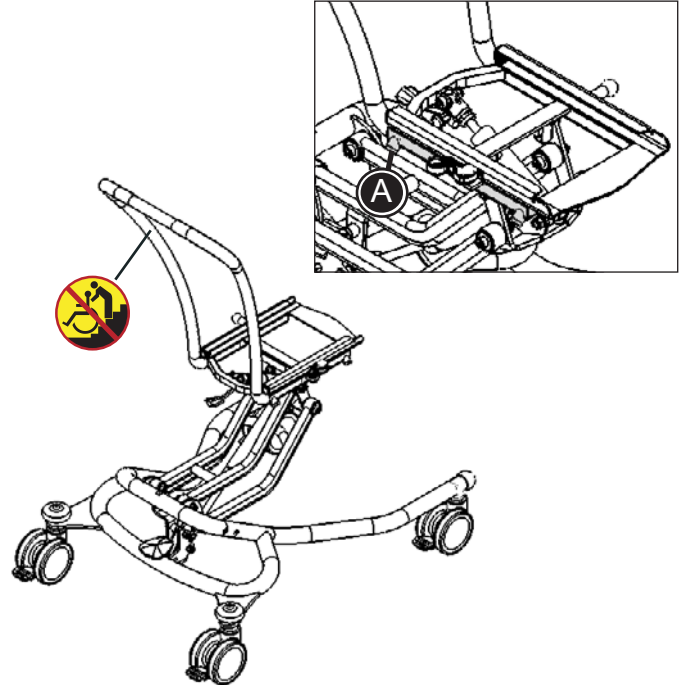


FIN SIVUUN KÄÄN- TYVÄT POLVITUET

Kiinnitä kiinnitysosa (A) istuimen alle 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Työnnä polvituet kiinnitysosaan ja kiristä 6 mm:n kuusiokoloavaimella (B)

- * Avaa ruuveja (C) 6 mm:n kuusiokoloavaimella polvituen tankojen kulman säätämiseksi.
- * Avaa ruuveja (B) tai (D) 4 tai 6 mm:n kuusiokoloavaimilla syvyyden säätämiseksi.
- * Itse polvituet ovat kulma- ja sivuttaisuunnassa säädettäviä (E) 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Paina kannattimessa (F) oleva punainen painike alas polvitukien kääntämiseksi sivuun.




Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden välein.

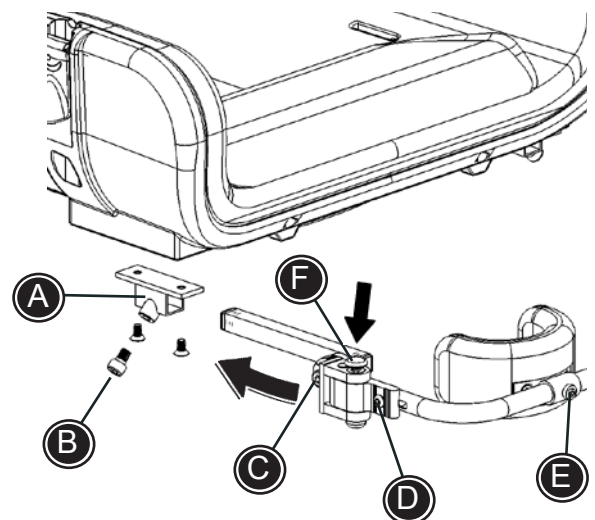

FIN PANDA FUTURA 5 COMBI-ALUSTALLA KOKO 4

Noudata alla olevia ohjeita liitoskappaleen asentamiseksi Panda Futura 5:tä varten Combi-alustalle:

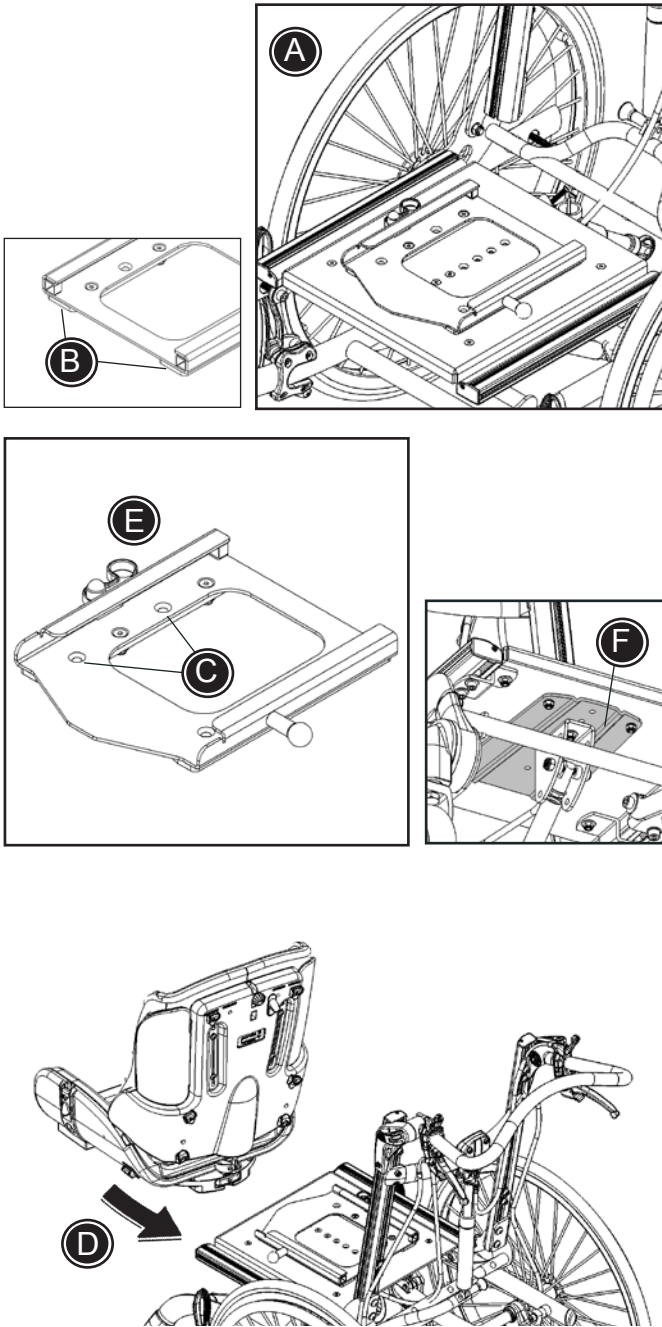

1. Asenna liitoskappale alustalle kuvassa (A) esitetyllä tavalla. Kiinnitä liitoskappale yhdessä mukana seuraavien metallilevyjen (B) kanssa istuinalustalle. Asenna mukana seuraavat pultit yläpuolelta ja kiristä mutterilla istuinalustan alta. Kiristä kaikki ruuvit tiukalle käyttäen 4 mm:n kuusiokoloavainta ja 10 mm:n kiintoavainta.
2. Liitoskappaletta voidaan siirtää 5 cm taaksepäin ja eteenpäin, vaaditun sijainnin mukaisesti. Irrota neljä pulttia (C), siirrä oikeaan asemaan ja asenna pultit uudelleen.
3. Aseta istuimen adapteri liitoskappaleeseen ja työnnä se koko matkan taaksepäin, kunnes se loksahtaa paikalleen (D).
4. Lukitse punainen, säädettävä kahva tiukasti, kun tuoli on oikeassa kohdassa. Punaisen kahvan kiristysteho on säädettävissä. Avaa ruuvia ja siirrä kahvaa lähemmäs tai kauemmas istuimesta.



ÄLÄ käytä ensimmäistä koloa, johon istuin loksahtaa. Tämä on vain turvakolo, joka pysäyttää istuimen, jos nastavaahingossa hyppäisi pois oikeasta kolosta.



Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen irrottaa istuinalustan alla oleva metallilevy (F) liitoskappaleen oikean asennuksen mahdollistamiseksi.



Viittaamme Combi-alustan käyttöohjeeseen lisätietojen saamiseksi Combi-alustasta ja sen toiminnoista

FIN TUOTTEEN TUNNISTUS

Panda Futura 5 -istuin

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla oikeassa yläkulmassa.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee istuimessa pehmusteen alla vasemmassa yläkulmassa.

High-low:x -alusta, koko 2

A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee rungon vasemmalla sivulla.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee rungon vasemmalla sivulla.



Combi-alusta





A) Sarjanumero

Kilpi sijaitsee vasemmalla eturistikkorungossa istuimen alla.

B) Valmistaja

Kilpi sijaitsee edempänä vasemmalla eturistikkorungossa istuimen alla.

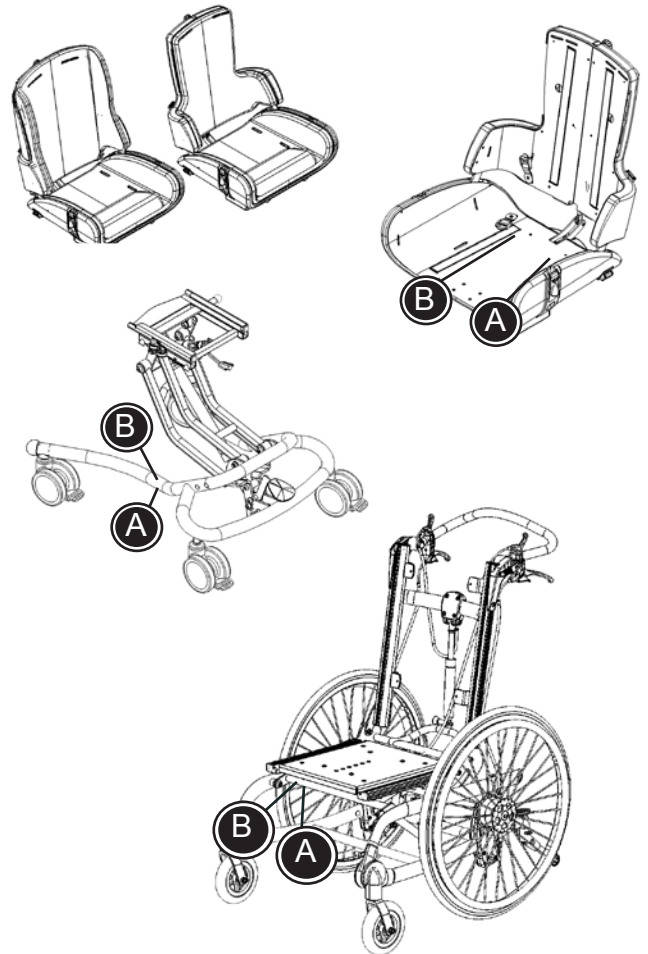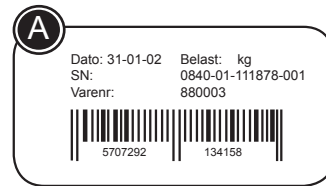

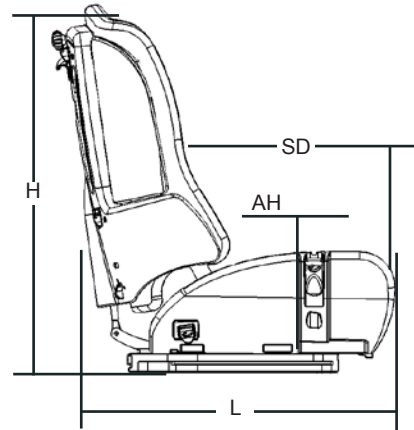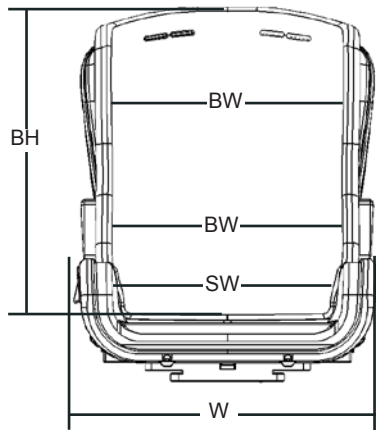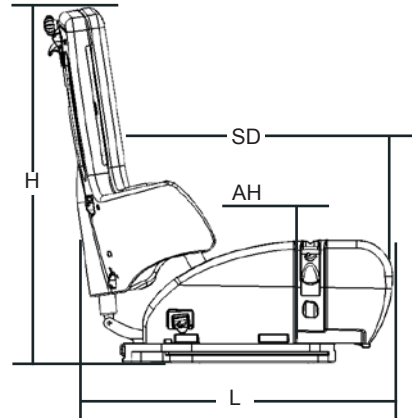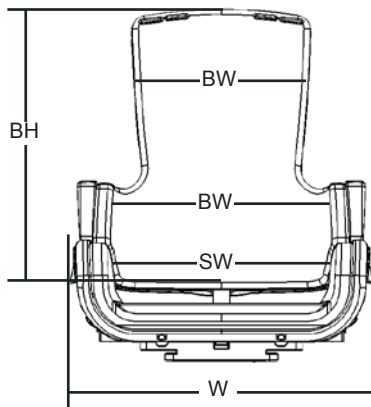

FIN MITAT

	Panda Futura 5 Active cm (tuumaa)	Panda Futura 5 Standard cm (tuumaa)
Istuimen leveys (SW)	35 (13½")	35 (13½")
Istuimen syvyys (SD)	43 (16¾")	43 (16¾")
Selkänojan korkeus (BH)	59 (23")	59 (23")
Selkänojan leveys, ylä (BW)	35 (13½")	38 (15")
Selkänojan leveys, ala (BW)	32 (12½")	27 (10½")
Käsinojan korkeus istuintyyntyn yläpuolella (AH)	17 - 35 (6½ - 13½")	17 - 35 (6½ - 13½")
Kokonaisleveys (W)	56 (22")	56 (22")
Kokonaispituus (L)	56 (22")	56 (22")
Kokonaiskorkeus (H)	67 (26")	67 (26")
Paino	15 kg (33 lb)	15 kg (33 lb)
Käyttäjän maksimipaino Combi-alustalla	80 kg (176 lb)	80 kg (176 lb)
Käyttäjän maksimipaino, High-low:x	45 kg (100 lb)	45 kg (100 lb)
Selkänojan kallistus	-5° to 30°	-5° to 30°

Panda Futura 5 on mitattu ISO 7176-5:n mukaisesti istuin vaakasuorassa ja selkänoja pystyasennossa. Toimitamme erityyppisiä lisävarusteita, minkä johdosta paino ja mitat on lueteltu ilman niitä. Standardissa kuvatusa poikkeavat säädöt voivat johtaa toisenlaisiin mittoihin.

FIN **TEKNISET TIEDOT**

Istuin: Capron GR30
Kierrätettävä
Vaahtomuovi: Tulenkestävää
Päällys: 100% Trevira CS

FIN **VALMISTAJA**

R82 A/S
Parallelvej 3
8751 Gedved
Tanska

FIN **JAKELIJA**

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 509 91
Faksi (09) 5099 490
Sähköp. info.algoltrehab.fi@algol.fi
Internet www.algoltrehab.fi

Jakelijanne löytyy verkossa, www.r82.com

FIN **HUOLTO**

Panda Futura 5:n tyyny on irrotettava ja voidaan pestä max. 40°:ssa. On tärkeätä pitää alusta puhtaana istuimen kestävyuden ylläpitämiseksi.



Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 6 kuukauden välein.



Pyyhi lika istuimesta kuivaa liinaa käyttäen viikottain. Älä käytä klooria tai denaturoitua spritä sisältäviä puhdistusaineita.



Panda Futura 5 on toimitettava pätevän asentajan tarkastettavaksi ja kiristettäväksi vähintään 6 kuukauden välein toimintahäiriöiden välttämiseksi.



Ainoastaan R82:n henkilöstö saa tehdä säätöjä, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjeessa.