

**FIN STINGRAYN PUHDISTUSOHJEET**

Stingray tyyny/päällinen ovat irroitettavia ja ne voidaan pestä maks. 40 asteessa. ÄLÄ laita Stingray tyynyä kuivausrumpuun. Varaa aikaa tyynyn kuivumiseen. Suosittelemme tyynyn säännöllistä puhdistusta kostealla pyyhkeellä. Pidä runko puhtaana, jotta tuoli pysyy kunnossa.



Hoitajan pitäisi tarkistaa kääntyvät osat ajoittain - vähintään kerran 6 kuukaudessa.



Pyyhi lika pois renkaista kuivalla pyyhkeellä viikoittain. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät klooria tai denaturoitua spriitä.



Koulutetun huoltohenkilön tulee tarkistaa ja kiristää Stingray vähintään kerran 6 kuukaudessa, vikojen välttämiseksi.



Kaikki lisävarusteiden säädöt ja lisäykset, jotka ei ole mainittu tuotteen käyttöohjeessa, voi tehdä ainoastaan hyväksyty korjaaja. Liivit ja vyöt tulee asentaa tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.



Tarkista säännöllisesti, että lukot loksahtavat paikoilleen ja ettei reijät ole täynnä rasvaa tai likaa.

Hoitaja tulisi tarkistaa ja täyttää renkaat ilmalla vähintään kerran kuussa.  
Ilmanpaine, maks.: Edessä: 35 PSI/250 kPa, takana: 40 PSI/2,5 bar

**Maahantuonti ja myynti:**

Algol Trehab Oy  
Karapellontie 6  
02610 Espoo  
Puhelin: (09) 5099 331  
Faksi: (09) 595 006  
Sähköposti: [algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)  
Internet: [www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)