


stingrayTM

Suomenkielinen käyttöohje

FIN SISÄLLYSLUETTELO

TURVALLISUUS.....	4
TAKUU.....	4
TYÖKALUT.....	4
STINGRAY KÄYTTÖVALMIIKSI.....	5
ALUSTA.....	6
TAKAPYÖRÄT.....	6
KIERREJOUSITUS	6
KALLISTUS	7
TYÖNTÖKAHVAN SÄÄTÄMINEN.....	7
SUUNTALUKKO.....	7
PYSÄKÖINTIJARRUT	8
KÄSIJARRUT	8
VALINNAINEN ISTUINJÄRJESTELMÄ.....	9
KIINNITYSSOLJET	9
JALKATUKI.....	9
SELKÄNOJAN KORKEUSSÄÄTÖ	10
SELKÄNOJAN KALLISTUSSÄÄTÖ	10
ISTUIMEN SYVYYSSÄÄTÖ.....	10
LANNETUKIEN ASENTAMINEN.....	11
KÄÄNTÖISTUIN	12
ISTUIMEN KIINNITTÄMINEN / IRROTTAMINEN	12
STINGRAYN SÄILYTYS.....	13
KULJETTAMINEN MOOTTORIAJONEUVOISSA	14
VALMISTELUT STINGRAYN KULJETTAMISEKSI	15
STINGRAYN KIINNITTÄMINEN AJONEUVOON.....	16
LAPSEN KIINNITTÄMINEN STINGRAYYN	17
TUOTTEEN TUNNISTUS.....	18
MITAT	19
KUNNOSSAPITO	20
TEKNISET TIEDOT	21
VALMISTAJA	21
JÄLLEENMYYJÄ.....	21

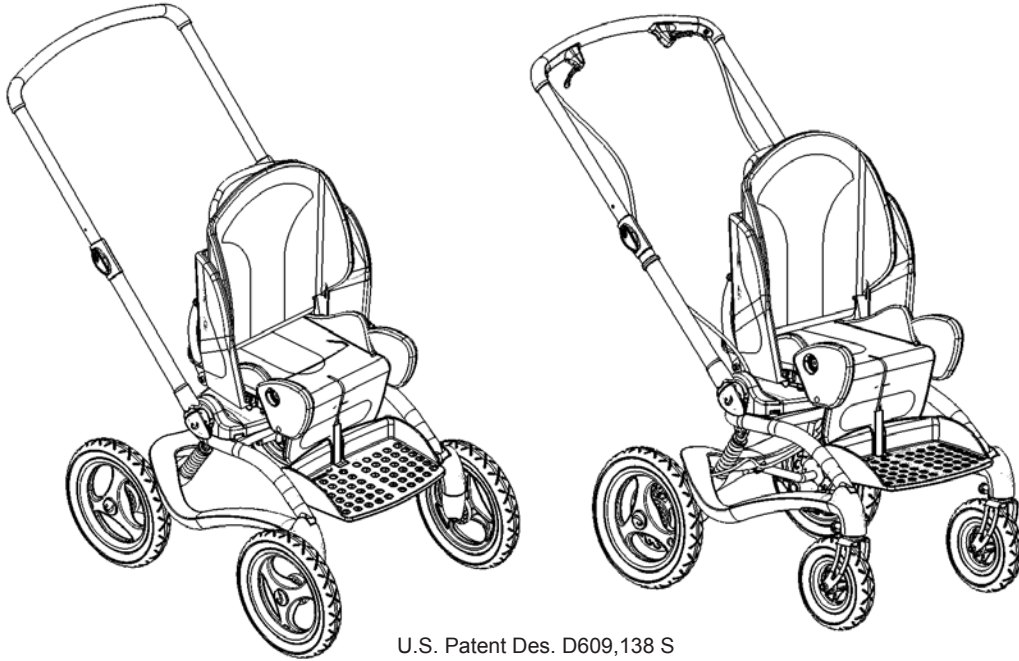

U.S. Patent Des. D609,138 S
U.S. Patent Des. D602,405 S
Norwegian Design Reg. No. 81500
Pat. Pend.



STINGRAY

Onnittelumme uusista Stingray-rattaistanne. Stingray on korkealaatuinen R82-tuote ja olemme vakuuttuneita siitä, että se tulee täyttämään kaikki odotuksenne.


Stingray on suunniteltu lapsille, jotka tarvitsevat runsaasti mukavuutta ja tukea, ja suunnittelussa on huomioitu tyylikkyys ja korkeatasoinen toiminnallisuus.

Istuin voidaan asentaa menosuuntaan tai kääntää ympäri 180° katsekontaktin säilyttämiseksi hoitajan/vanhempien kanssa. Istuin voidaan kääntää ympäri sekä lapsen istuessa rattaissa että niiden ollessa tyhjänä.

Istuimen syvyyttä ja selkänojan korkeutta on helppo säätää, mikä mahdollistaa istuimen laajentamisen lapsen kasvamisen myötä. Lukuisat lisävarusteet mahdollistavat mukautumisen lähes kaikkiin erityistarpeisiin miellyttävän istuma-asennon aikaansaamiseksi.

Tämän ohjekirjan avulla voitte nauttia kaikista Stingrayn tarjoamista mahdollisuuksista.

FIN TURVALLISUUS

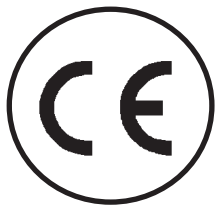

Stingray on saanut CE-merkinnän, mikä takaa sen täyttävän kaikki merkitykselliset eurooppalaiset turvavaatimukset. Stingray on lisäksi hyväksytty ISO 7176/19-2001, EN 12182:n mukaisesti. Tämän tuotteen käyttöikä on 5 vuotta, kun sitä käytetään päivittäin. Tämän jälkeen tuote on kunnostettava (R82:n henkilökunnan toimesta) käyttöiän pidentämiseksi.

Lukekaa tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ja pitäkää se tallessa myöhempää käyttöä varten. Lapsen turvallisuus voi vaarantua, ellei tässä käsikirjassa annettuja ohjeita noudateta.

Poistakaa CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisävarusteita.

Tämä tuote on suunniteltu vain yhtä käyttäjää varten. Älkää sijoittako siihen useampaa kuin yhtä käyttäjää.

Rattaita ei tule jättää suoraan auringonvaloon pidemmäksi ajaksi. Rattaiden lämpötila tulee tarkistaa ennen lapsen sijoittamista niihin.

Älkää milloinkaan jättäkö lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmistakaa jatkuva valvonta aikuisen toimesta. Tämän tuotteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa käyttäjälle vakavan vamman. Varmistakaa aina ennen käyttöä, että vyö on tukevasti kiinnitetty runkoon.

Kaikenlainen kahvaan kiinnitetty kuorma, esimerkiksi ostoslaukku vaikuttaa rattaiden vakauteen.

Käyttöohjeen uusin versio on aina saatavilla netissä: www.R82.com

Lapsen istuessa rattaisissa on kaikkien vöiden ja tukiliivien oltava kiinnitettyinä ennen istuimen säätämistä

FIN TAKUU

R82 tarjoaa 2 vuoden takuun työn laadun ja materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun hitsausliitosvikojen aiheuttamien metallirungon murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikäli asiakkaan vastuu huoltamisesta ja/tai päivittäisestä kunnossapidosta ei toteudu toimittajan määäämien ja/tai käsikirjassa esitettyjen ohjeiden ja määräaikaisten mukaisesti. Lisätietojen osalta viittaamme R82:n kotisivuihin/latauksiin. Takuu on voimassa vain, jos R82-tuote on käytössä samassa maassa kuin mistä se on ostettu ja tuote voidaan tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei kata vahinkovaurioita eikä väärinkäytön tai huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata kulumia, jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka on ajoittain vaihdettava uusiin. Takuu mitätöityy, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-osia/lisävarusteita tai jos tuotetta korjaa tai muuntaa kuka tahansa muu kuin valtuutettu R82:n edustaja tai koulutettu henkilöstö, jonka R82 on virallisesti hyväksynyt suorittamaan R82-tuotteiden korjausta ja kunnossapitoa. R82 varaa oikeuden tarkastaa takuuvaatimuksen kohteena oleva tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen takuuvaatimukseen suostumista ja tehdä päätös siitä, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai korjataan se. Takuuvaatimuksen kohteena olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan osoitteeseen on asiakkaan vastuulla. Takuun myöntää R82 tai myöhemmässä vaiheessa R82-myyjä.

FIN TYÖKALUT

Stingray-rattaisissa oleva pieni pussi sisältää 3, 4 ja 5 mm:n kuusiokoloavaimet. Näiden työkalujen avulla suoritetaan eräitä tässä ohjekirjassa kuvattuja säätöjä.

FIN STINGRAY KÄYTTÖVALMIIKSI

- * Poista Stingray laatikosta.
- * Nosta alustan takaosaa vetämällä kohdasta (A). Varmista, että alusta lukkiutuu paikalleen.
- * Nosta työntötankoa ylös, kunnes se loksauttaa paikalleen (B).
- * Lukitse kahvat (C).






Varmista, että selkänojassa oleva punainen turvavipu (D) on käännetty ylöspäin. Jos punainen vipu on painettu alas, istuimen liittäminen alustaan ei tapahdu oikein.

- * Asenna istuin alustalle istuinta siihen liu'utamalla, kunnes se loksauttaa paikalleen. Varmista istuinta ulospäin vetämällä, että se on kiinnittynyt paikalleen.
- * Paina punainen turvavipu (D) alas, kun istuin on asennettu.

Noudata seuraavilla sivuilla annettuja ohjeita selkänojan, istuimen ja jalkalaudan asennon säätämiseksi.

Stingray on nyt käyttövalmis.

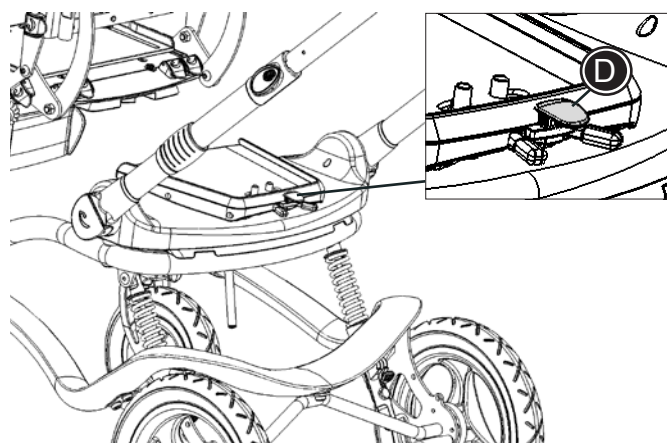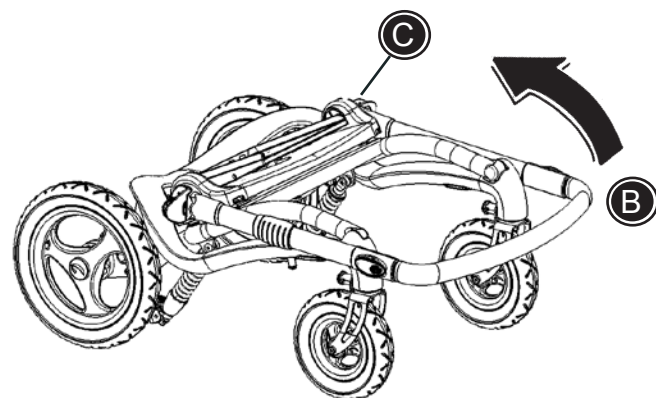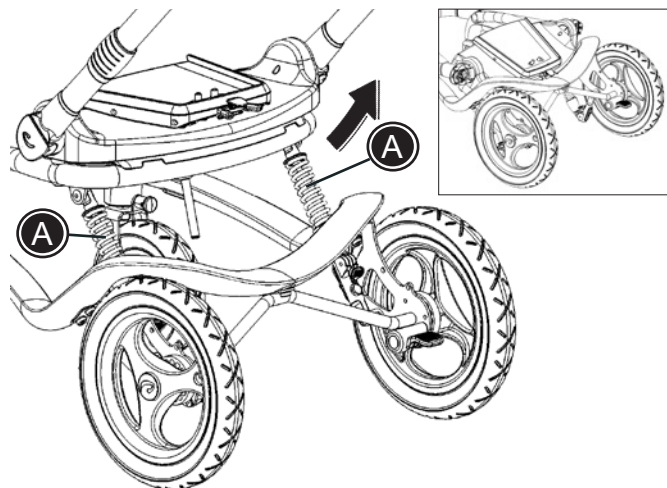




FIN ALUSTA

Stingrayn alusta on saatavissa:

- * 4 suurella pyörällä tai
- * 2 suurella takapyörällä ja 2 pienellä etupyörällä
- * 1-tankoisella pysäköintijarrulla
- * 1-tankoisella pysäköintijarrulla ja käsijarruilla
- * 2-tankoisella pysäköintijarrulla
- * 2-tankoisella pysäköintijarrulla ja käsijarruilla

i Pyörien ilmanpaineen tulee olla max. 36 PSI/2,5 bar.

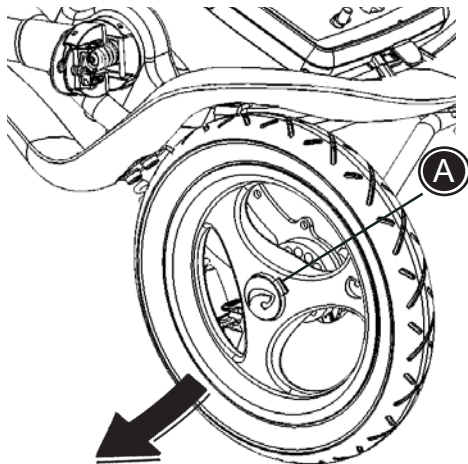


FIN TAKAPYÖRÄT

Takapyörät voidaan irrottaa alustan keventämiseksi sen säilytystä varten ja nostamisen helpottamiseksi.

- * Pyörän kiinnittämiseksi/irrottamiseksi painetaan painiketta (A)

! Varmista, että takapyörät on oikein asennettu ja paikoillaan.

! Levyjarruin varustettuja pyöriä EI voida irrottaa.

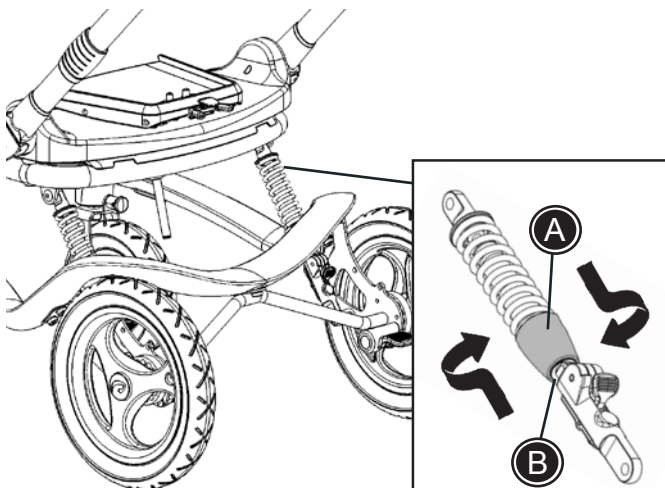

FIN KIERREJOUSITUS

Kierrejoussia voidaan säätää.

- * Kun vaaditaan kovempaa jousitusta, kahvaa (A) kierretään myötäpäivään jousen tiukentamiseksi. Pehmeämpää jousitusta varten kahvaa (A) kierretään vastapäivään, jolloin jousi löystyy.

i Jousitus säädetään samanlaiseksi alustan molemmin puolin merkkien (B) avulla

FIN KALLISTUS


Koko istuinyksikön kallistuksen säätämiseksi vedetään alustan oikealla sivulla olevaa kahvaa (A) ylöspäin.



Tartu selkänojasta sen äkkinäisen liikkeen estämiseksi kun kahva vapautetaan.




Stingraytä kallistettaessa on varottava sormien joutumista puristuksiin istuimen ja alustan väliin.

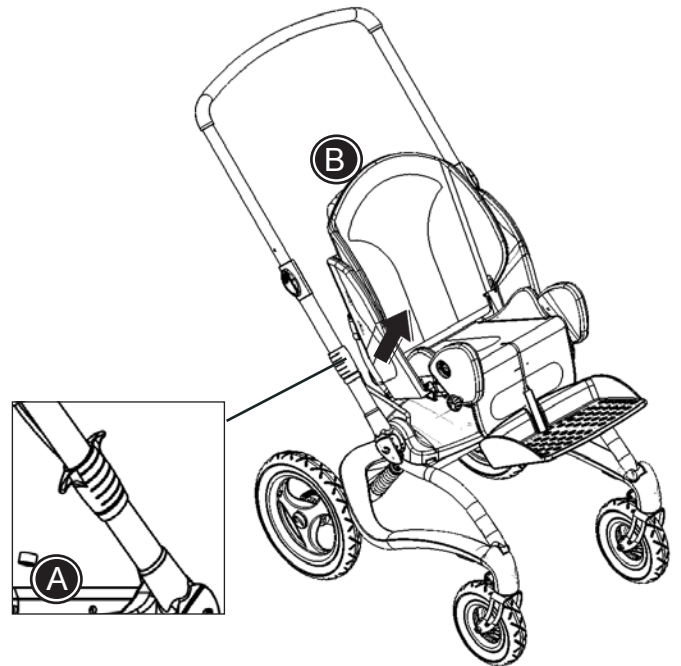


FIN TYÖNTÖKAHAVAN SÄÄTÄMINEN



Työntökahvaa säädetään painamalla kahvan molemmilla puolilla sijaitsevat painikkeet (A) sisään ja nostamalla kahva haluttuun asentoon.

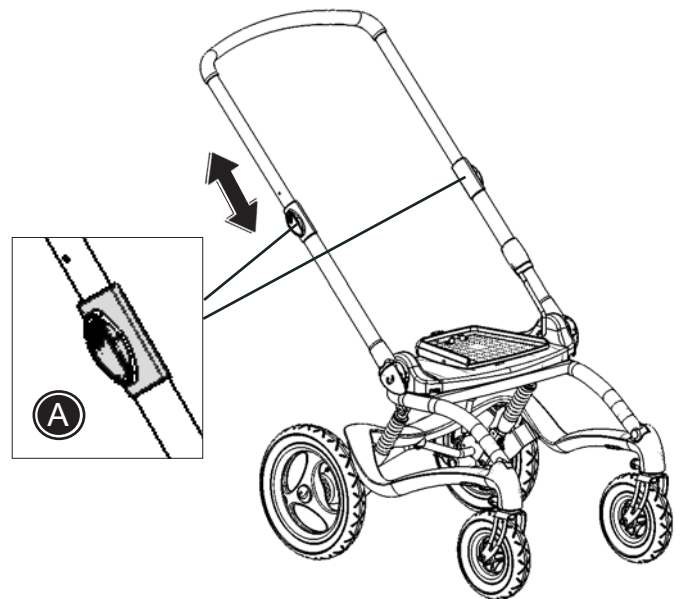

FIN SUUNTALUKKO

Suuntalukko mahdollistaa pyörien lukitsemisen kiinteään asentoon (A).

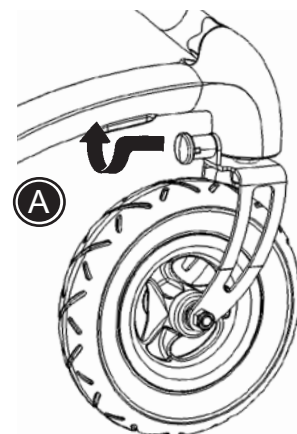

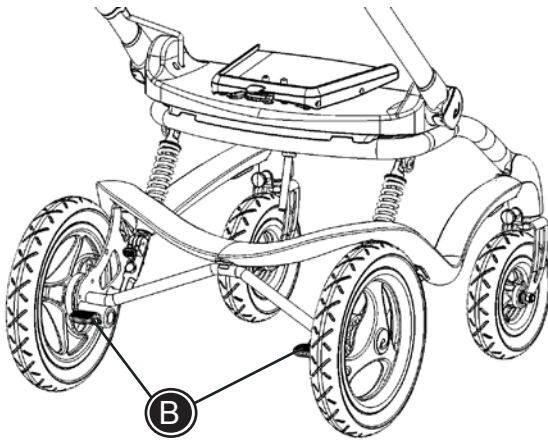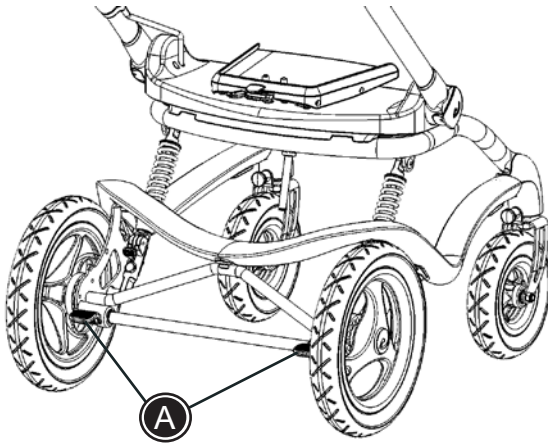

FIN PYSÄKÖINTIJARRUT

Stingray on saatavilla joko yksitankoisella tai kaksitankoisella pysäköintijärjestelmällä.

Stingray yksitankoisella pysäköintijarrulla:

* Kytke jarrut päälle painamalla poljin (A) alas.



Muiden valmistajien seisomalautoja voidaan helposti liittää tähän järjestelmään.

Stingray kaksipisteisellä pysäköintijarrulla:


* Kytke jarrut päälle painamalla poljin (B) molemmiin puolin.



Varmista aina, että jarrut ovat päällä Stingray-rattaiden ollessa pysäköitynä.



Tarkista säännöllisesti, että lukot toimivat moitteettomasti ja etteivät reiät ole täyttyneet rasvalla tai lialla.

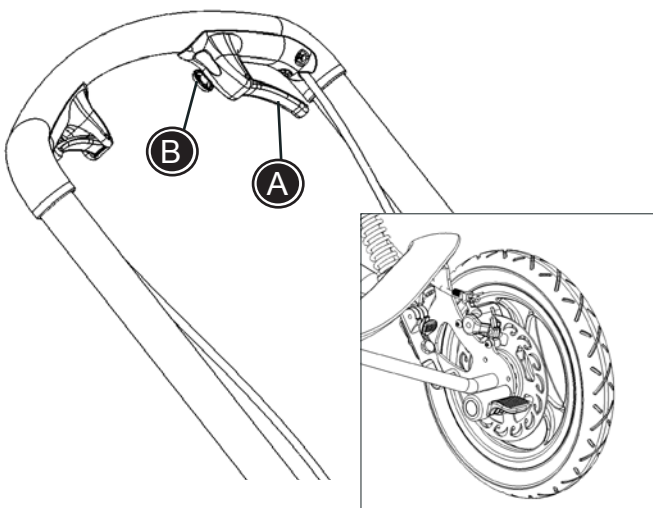

KÄSIJARRUT


Stingray on saatavilla asennetuin käsijarruin tai ilman niitä.

- * Purista kahvasta (A) jarruttaaksesi
- * Jarru lukitaan kahvaa (A) puristamalla ja punainen painike (B) sisään painamalla
- * Jarru vapautetaan lukituksesta kahvaa (A) puristamalla

FIN VALINNAINEN ISTUINJÄRJESTELMÄ


Istuimen säätöjä koskevia kuvauksia löytyy seuraavilta sivuilta:

- * Selkänojan korkeussäätö
- * Selkänojan kallistussäätö
- * Istuimen syvyyssäätö

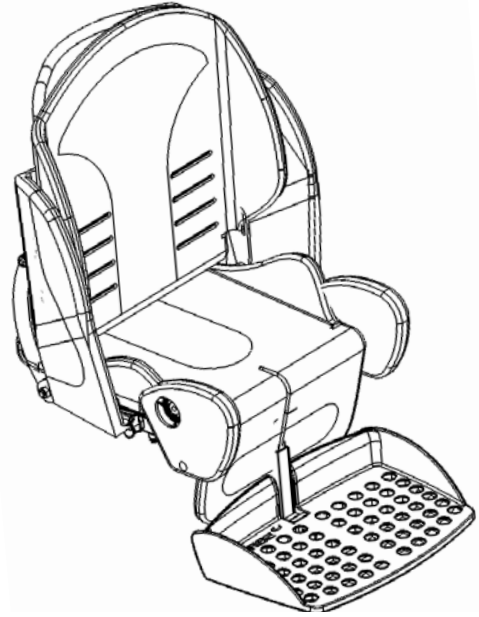

FIN KIINNITYSSOLJET

Istuin on varustettu kiinnityssoljilla (fix-lock) erilaisten liivien ja vöiden kiinnittämisen helpottamiseksi.

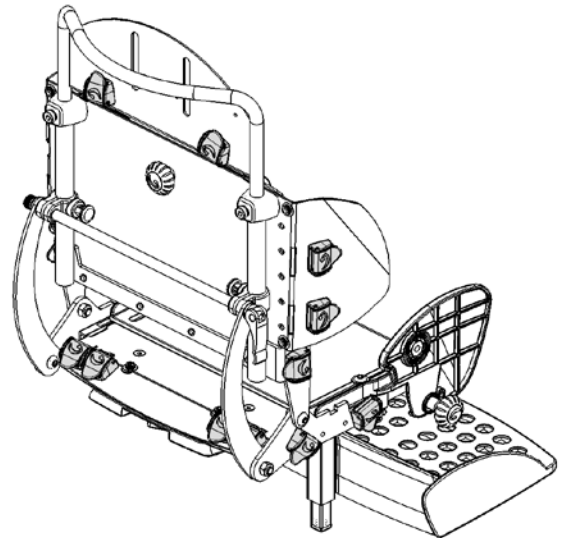


FIN JALKATUKI


Jalkatuen tarkoituksena on tukea käyttäjää ja estää liukuminen pois tuolista.

 Jalkatukea ei tule käyttää tukena seisten tapahtuvissa siirtymisissä

- * Jalkalaudan kallistussäätö (A)
- * Jalkatuen tangon kallistussäätö (B)
- * Korkeussäätö (C)


 Jalkatuen tankoa (D) kiertämällä voidaan jalkalautaa asentaa korkeammalle.

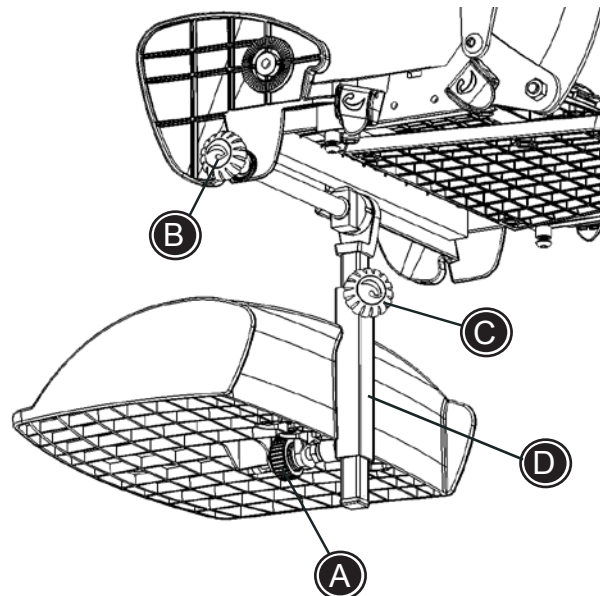

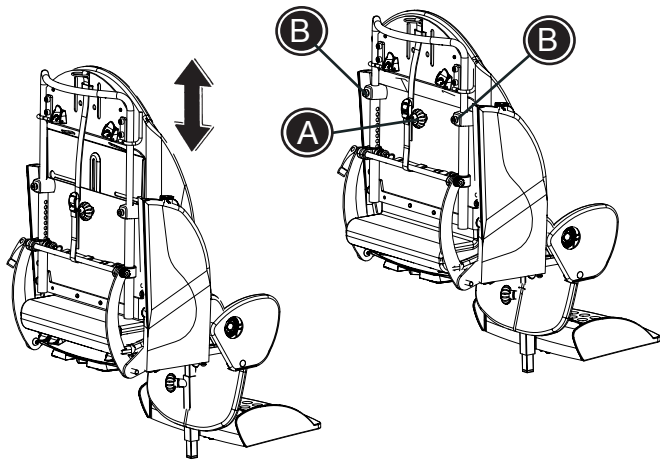

FIN SELKÄNOJAN KORKEUSSÄÄTÖ

Selkänöjan korkeuden säätämiseksi avataan kahvaa (A) ja kahta ruuvia (B). Kahva ja ruuvit kiristetään, kun haluttu asento on saavutettu.

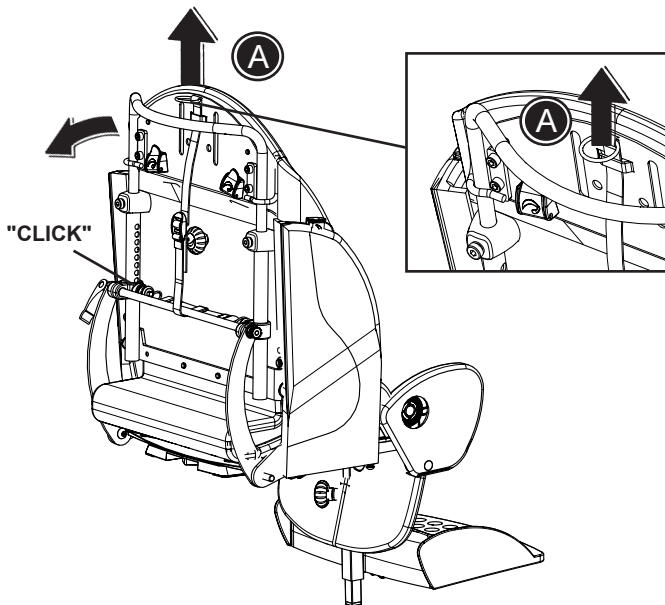


FIN SELKÄNOJAN KALLISTUSSÄÄTÖ

Selkänöja kallistuu siinä olevasta hihnasta (A) ulospäin vetämällä.



Tartu selkänöjasta äkillisen liikkeen estämiseksi hihnaa vedettäessä.

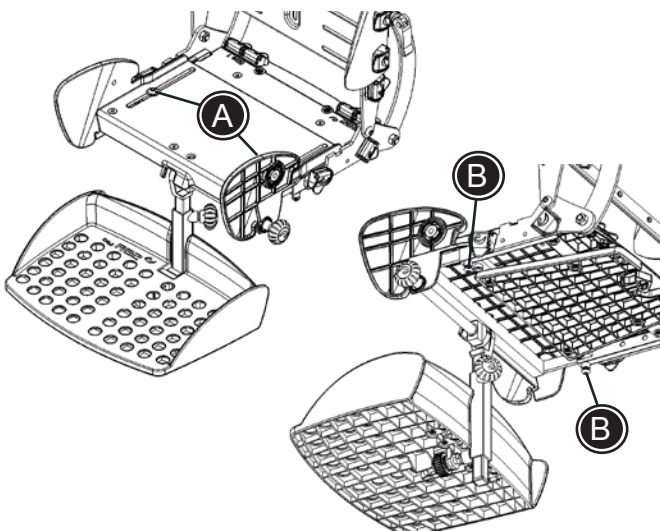

FIN ISTUIMEN SYVYYSSÄÄTÖ

Avaa kahta istuimessa olevaa ruuvia (A) ja kahta istuimen alla olevaa ruuvia (B) istuimen säätämiseksi syvyyssuunnassa. Käytä apuna 5 mm:n kuusioavainta.

Kiristä kaikki ruuvit säätämisen jälkeen.

FIN LANNETUKIEN ASENTAMINEN

Asentaminen:

- * Kiinnitä pidike (A) tuolin sivulle 5 mm:n kuu-sioavaimella
- * Asenna lannnetuki pidikkeeseen (B). Varmista, että se loksahaa paikalleen.

Irrottaminen:




- * Lannnetuet irrotetaan painamalla painiketta (C).


Säätäminen:

- * Leveyssuunnassa tapahtuva säätö tehdään jatkokappaleiden (D) avulla.
- * Syvyysuunnassa tehtävä säätö tapahtuu siirtämällä lannnetukea urassa (E).



Kaikki säädöt ja lisävarusteiden liittämiset tulee suorittaa oikein ja tarkistaa aina ennen käyttöä.

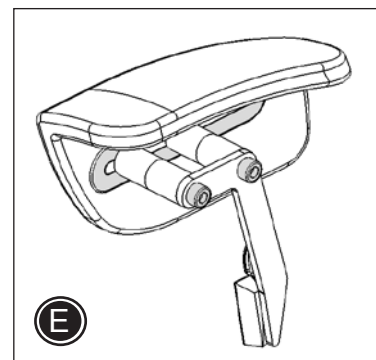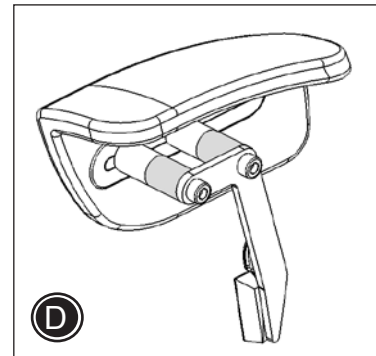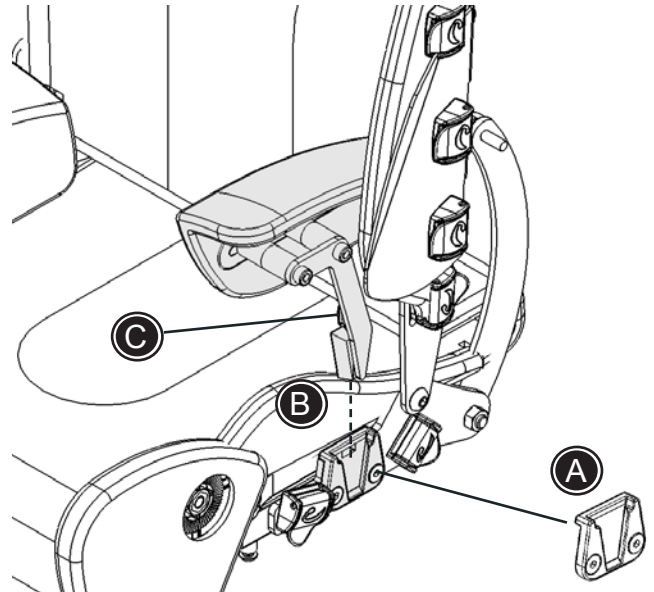

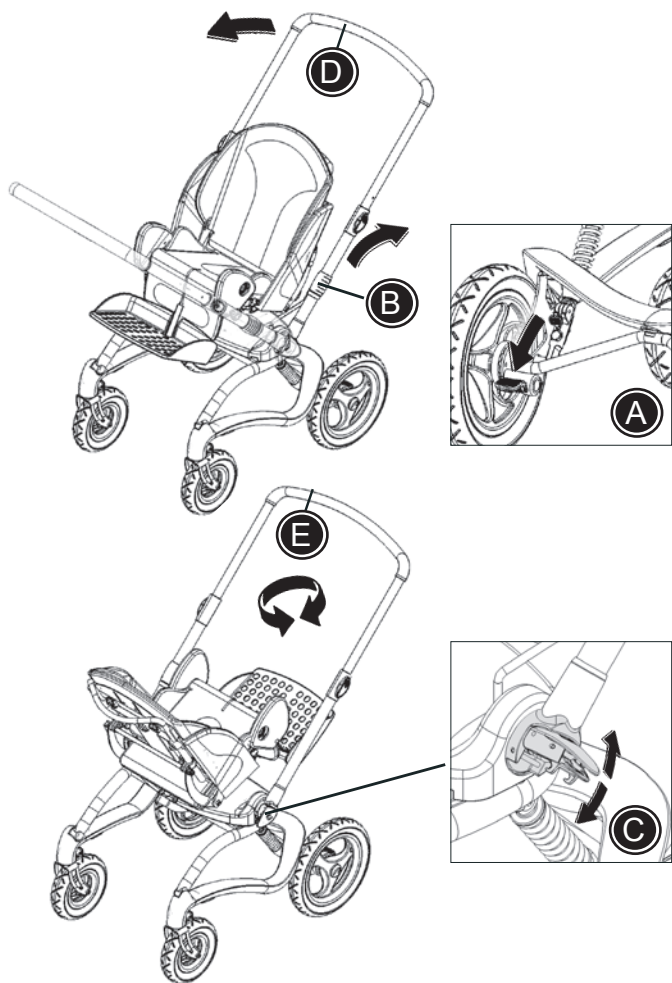

FIN KÄÄNTÖISTUIN

Stingrayn istuinta voidaan kääntää 180°. Tämä tapahtuu helpoiten seuraavasti:

- * Kytke jarrut päälle (A)
- * Kallista koko istuinyksikköä taaksepäin (B)
- * Avaa kahvat (C)
- * Nosta työntökahva pystyyn (D)
- * Lukitse kahvat (C)
- * Käännä istuinta, kunnes se lokahtaa paikalleen (E)

! Istuin kääntyy vain yhtä kautta. Oikea kiertosuunta on merkitty nuolella työntökahvaan.

Istuin voidaan kääntää lapsen istuessa siinä tai istuimen ollessa vapaana.

! Istuinta käännettäessä tulee varoa sormien joutumista puristuksiin istuimen ja alustan väliin.

FIN ISTUIMEN KIINNITTÄMINEN / IRROTTAMINEN

! Varmista, että selkänojassa oleva punainen turvavipu (A) on käännetty YLÖS ennen kiinnitystä. Varmista, että selkänojassa oleva punainen turvavipu (A) on käännetty ALAS kiinnittämisen jälkeen.

- * Asenna istuin alustan päälle ja varmista, että se lokahtaa paikalleen.
- * Paina punainen kahva (A) alas

Irrottaminen:

- * Käännä punainen kahva (A) ylös
- * Purista kaksi kahvaa (B) yhteen, vedä istuinta eteenpäin ja irrota se alustalta.

FIN STINGRAYN SÄILYTYS

Stingray on helppo muuttaa kooltaan pienemmäksi ja siten ottaa mukaan minne tahansa.

Stingray voidaan säilyttää kahdella tavalla:

- 1) istuin kiinni alustassa
- 2) istuin irrotettuna ennen säilytystä

Istuin kiinni alustassa:

- * Kytke jarrut päälle (A)
- * Taita selkänoja kokonaan eteenpäin (B)
- * Avaa kahvat (C)
- * Käännä työntökahva pystyyn (D)
- * Paina kohdasta (E) takapään taittamiseksi kokoon

Istuin irrotettuna:










Istuimen irrottamiseksi vapautetaan istuimen takaosassa oleva kahva (C). Sitten toimitaan yllä kuvatulla tavalla.



Stingray-rattaita säilytykseen laitettaessa on varottava sormien joutumista puristuksiin hiilikuitualustan ja alustan yläosan väliin.



Stingrayn varastointia varten mahdollinen kuomu, ostoskori ja käsituki irrotetaan.

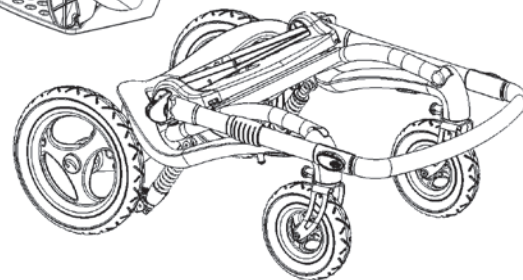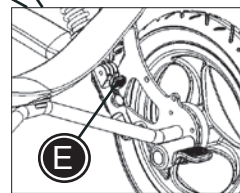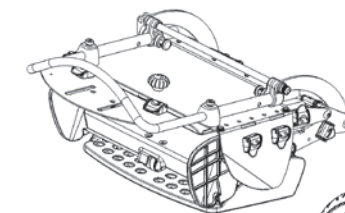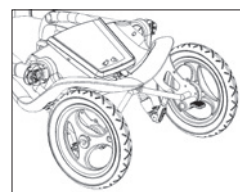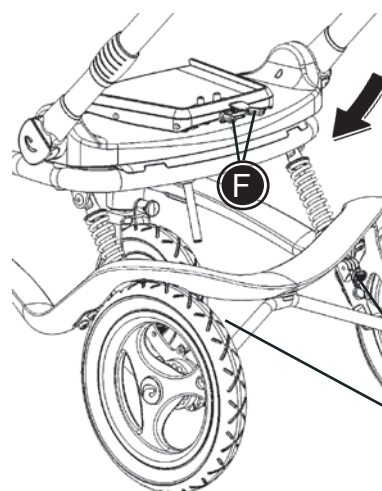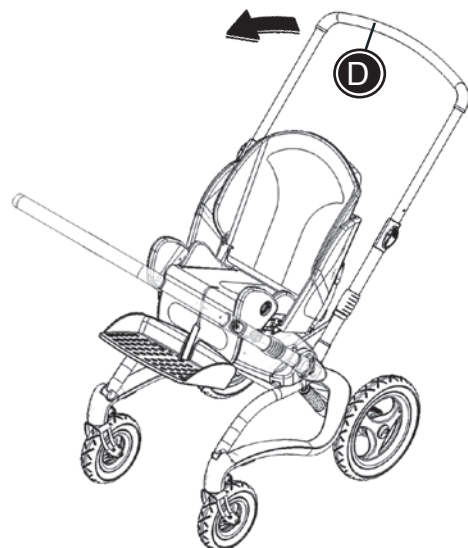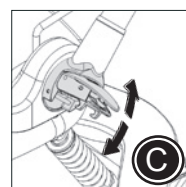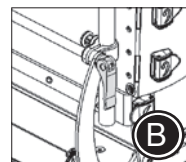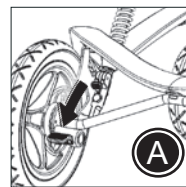

FIN KULJETTAMINEN MOOTTORI AJONEUVOISSA

Stingray on hyväksytty lasten kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa, kun pyörätuoli sijoitetaan menosuuntaan.



Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisvalmisteisille tuoleille.



Lapsen tulee siirtyä ajoneuvon istuimeen ja käyttää ajoneuvon asennettua turvajärjestelmää aina sen ollessa mahdollista.



Pyörätuoli on testattu dynaamisesti standardin ANSI/RESNA WC/Vol. 1-1998, kap-pale 6.4.1, litra c mukaisesti.



Käytä hyväksyttyä 3-pistevyötä pyörätuo-lissa. Pyörätuolin osien, kuten käsinojien tai pyörien ei saa estää kehon kiinnitys-järjestelmien käyttöä.



Etupyörät on käännettävä alustan alle en-nen rattaiden kiinnittämistä.




Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörä-tuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneu-voon. Varusteet, joita ei voida poistaa, on kiinnitettävä pyörätuoliin mutta sijoitettava lapsesta erilleen siten, että lapsen ja varu-steiden välissä on energiaa absorboiva pehmustus.



Myyjän tulee tarkastaa pyörätuoli ennen sen käyttämistä uudelleen kaikenlaisen ajoneuvotörmäyksen jälkeen.


Pyörätuolin osien,
kuten käsinojien
tai pyörien ei saa
estää kehon kiin-
nitysjärjestelmien
käyttöä

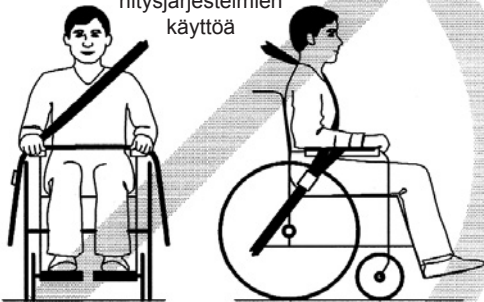

FIN VALMISTELUT STINGRAYN KULJETTAMISEKSI

Kuljetuskiinnikkeet:

- * Asenna kaksi kiinnikettä (A) Stingrayn molemmilla puolin oleviin reikiin 5 mm:n kuusioavaimella
- * Asenna kaksi kiinnikettä (B) Stingrayn takana oleviin reikiin 5 mm:n kuusioavaimella. Kuljetuskiinnikkeet (B) on merkitty turvasymbolilla (C).

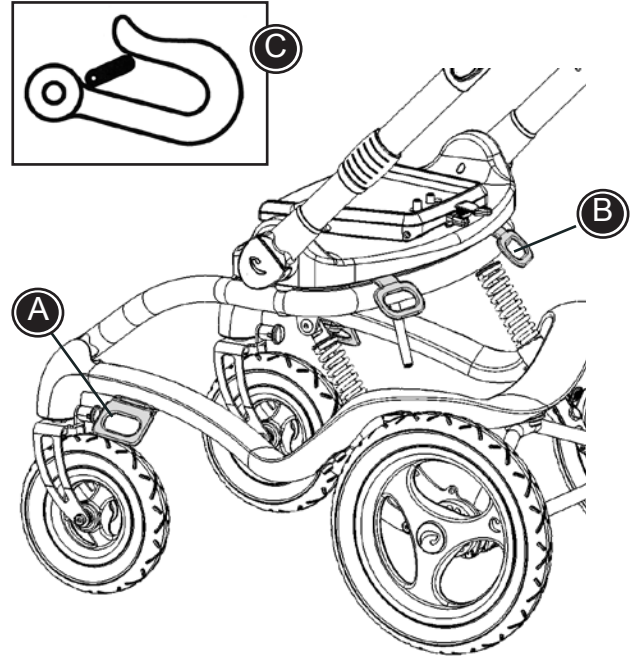


Selkänojan säätäminen:




Selkänoja TÄYTYY säätää pystyasentoon kuljetuksen ajaksi.



Tuoli on hyväksytty kuljettamiseen 40 kg:n maksimikuormalla.

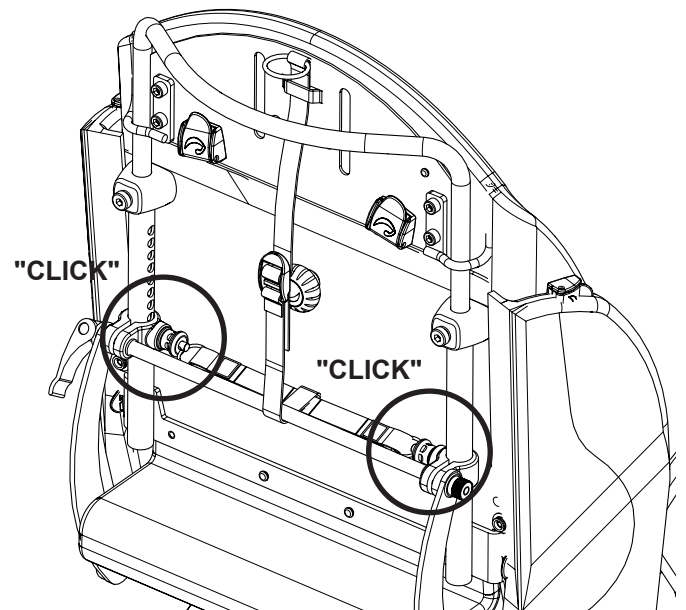

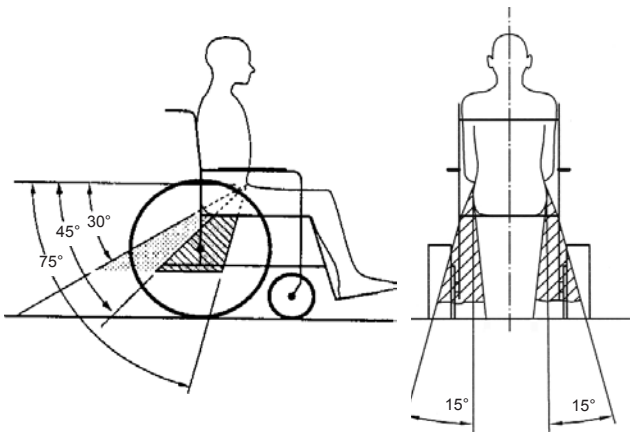


FIN STINGRAYN KIINNITTÄMINEN AJONEUVOON

- * Asenna 4-pisteinen hihnatyypinen kiinnitys-järjestelmä ajoneuvoon. (Noudata valmistajan ohjeita)
- * Kiinnitä pyörätuoli ajoneuvoon käyttäen 4-pisteistä hihnakiinnitysjärjestelmää. Käytä joko koukkua tai hihnaa kiinnikkeissä (A).



Käytä 4-pisteistä ISO 10542-2- ja SAE J2249 –hyväksyttyä hihnatyypistä kiinnitysjärjestelmää.

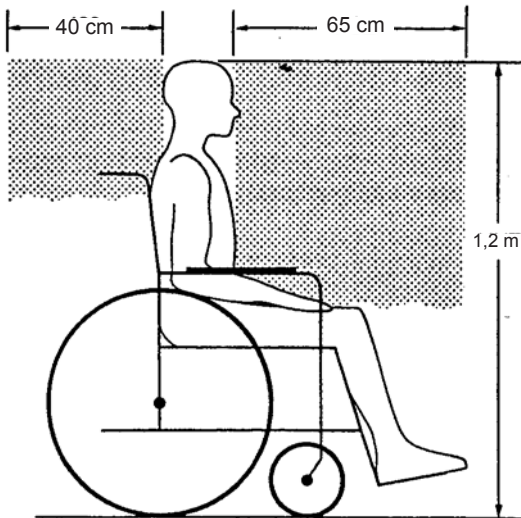

Sijoitus ajoneuvon sisällä:

- * Poista kaikki lisävarusteet tuolista ennen kuljetusta.
- * Sijoita lapsi kasvot menosuuntaan.




Huomioi suositeltu turvaetäisyys (C) lapsia ajoneuvoissa liikuteltaessa.

FIN LAPSEN KIINNITTÄMINEN STINGRAYYN

- * Kiinnitä lantiovyö istuimessa olevin vyönkiinnikkeisiin ja kiinnitä käyttäjä vyöllä.
- * Käytä punaisia turvavyön ohjaimia apuna ajoneuvon 3-pisteturvavyön sijoittamiseksi istuimen ja käyttäjän päälle. Varmista, että kaikki vyöt ovat sopivan kireällä ja kuitenkin käyttäjälle miellyttävät. Vyön kudος ei saa olla kiertynyt.



Käytä lantiovyötä ja 3-pistevyötä, joka on hyväksytty standardien ISO 10542-1 tai SAE J2249 mukaisesti.

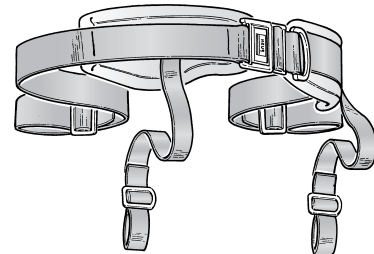

A

Date: YYYY-MM-DD Max.Load: XX KG
 SN: XXXXXX Ver.: XX
 Art.No: XXXXXX
 Product - Size X



(01)0570729530134(21)256829



B

R82®

Parallelsvej 3
 DK-8751 Gedved

www.R82.com
 Made in Denmark

FIN

TUOTTEEN TUNNISTUS

A) Sarjanumero



Alusta: kilpi sijaitsee työntötangon oikeanpuoleisen tangon alaosa sisäpuolella.


Istuin: kilpi sijaitsee oikeassa takakulmassa.

B) Valmistaja

Alusta: kilpi sijaitsee työntötangon vasemmanpuoleisen tangon alaosa sisäpuolella.

Istuin: kilpi sijaitsee vasemmassa takakulmassa.

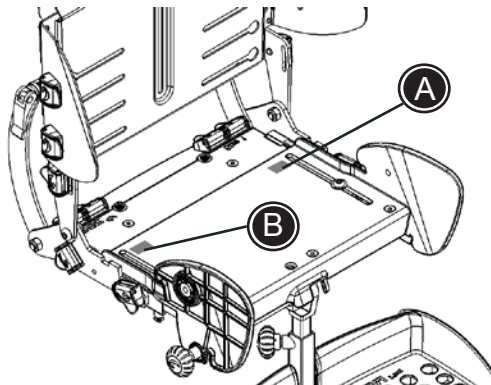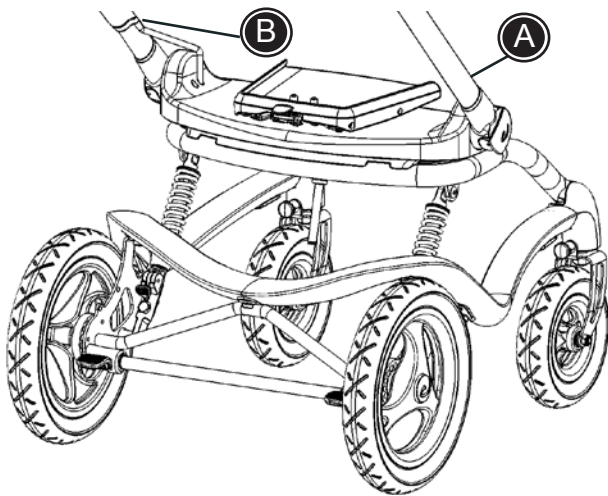

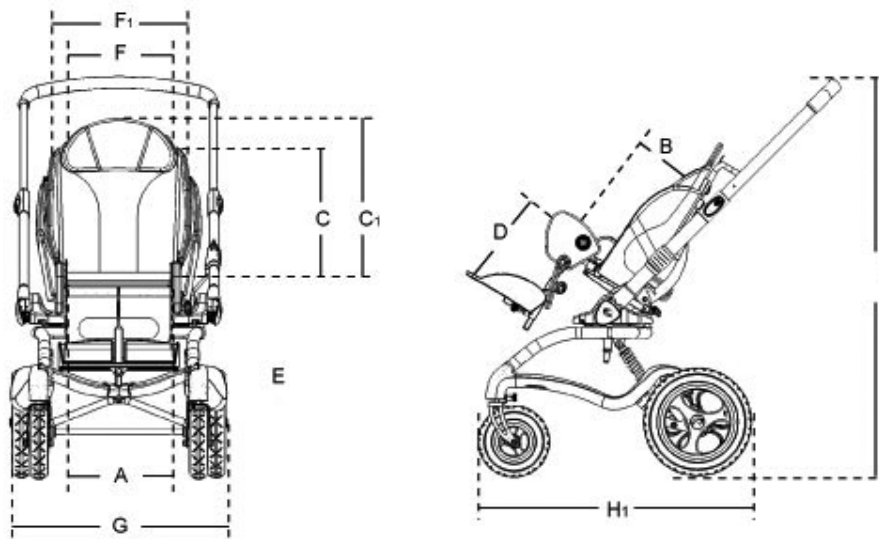

FIN MITAT

Istuimen leveys (A)	
Istuimen leveys lannetukien välissä	
Istuimen leveys lannetukien välissä Istuimen leveys polvitukien välissä	
Istuimen syvyys (B)	
Selkänojan korkeus olkapäiden korkeudella (C)	
Selkänojan korkeus (C1)	
Alaraajapituus (D)	
Istuinkorkeus lattiasta (E)	
Selkänojan leveys, sisä (F)	
Selkänojan leveys, ulko (F1)	
Alustan leveys (G)	
Alustan leveys kääntyvin etupyörin (H1)	
Alusta leveys suurilla etupyörillä	
Työntötangon korkeus (I)	
Jalkalauta (leveys x syvyys)	
Alustan pituus taitettuna	
Korkeus taitettuna	
Alustan paino	
Istuimen paino	
Maksimikuormitus/käyttäjän paino	
Maksimikuormitus/käyttäjän paino ajoneuvoissa kuljetettaessa	

Koko 1
cm (tuumaa)

Koko 2
cm (tuumaa)

30 (11 ³ / ₄ "	35 (13 ³ / ₄ "
18, 22, 26 (7, 8 ¹ / ₂ , 10 ¹ / ₄ "	23, 27, 31 (9, 10 ¹ / ₂ , 12")
28 (11")	33 (12 ³ / ₄ "
18-30 (7-11 ³ / ₄ "	25-40 (9 ³ / ₄ -15 ¹ / ₂ "
27-41 (10 ¹ / ₂ -16")	36-51 (14-19 ³ / ₄ "
41-55 (16-21 ¹ / ₂ "	50-65 (19 ¹ / ₂ -25 ¹ / ₄ "
14-45 (5 ¹ / ₂ -17 ¹ / ₂ "	14-45 (5 ¹ / ₂ -17 ¹ / ₂ "
52 (20 ¹ / ₄ "	52 (20 ¹ / ₄ "
30 (11 ³ / ₄ "	36 (14")
45 (17 ¹ / ₂ "	52 (20 ¹ / ₄ "
59 (23")	59 (23")
74 (28 ³ / ₄ "	74 (28 ³ / ₄ "
84 (32 ³ / ₄ "	84 (32 ³ / ₄ "
100, 103, 106 (39, 40, 41 ¹ / ₄ "	100, 103, 106 (39, 40, 41 ¹ / ₄ "
31 x 20 (12 x 7 ³ / ₄ "	31 x 20 (12 x 7 ³ / ₄ "
90 (35")	90 (35")
49 (19")	49 (19")
13,5 kg (29,5 lb)	13,5 kg (29,5 lb)
5,5 (12 lb)	6,5 (14,5 lb)
40 kg (88 lb)	40 kg (88 lb)
40 kg (88 lb)	40 kg (88 lb)

Kallistuskulmat

Istuin: 45°

Selkänoja: 170°

FIN KUNNOSSAPITO

Stingrayn tyyny/päällinen on irrotettava ja voidaan pestä korkeintaan 40 °C:ssa. Sitä EI saa kuivata rumpukuivaajassa. Huomioi tyynyn kuivumiseen tarvittava aika. Suosittelemme tyynyn säännöllistä puhdistamista kostealla liinalla. Alustan puhtaana pitäminen on tärkeätä tuolin käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi.

 Hoitajan tulee tarkistaa ja voidella kääntyvät osat ajoittain – ainakin 6 kuukauden välein.

 Pyyhi lika ja pöly pyöristä kuivalla liinalla viikoittain. Älä käytä klooria tai metyylispiiritä sisältäviä puhdistusaineita.

 Vikojen ehkäisemiseksi pätevän teknikon tulee tarkastaa ja kiristää Stingray vähintään 6 kuukauden välein.

 Kaikki säädöt ja lisävarusteiden liittämiset, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa, kuuluvat ainoastaan hyväksytyn korjaushenkilöstön tehtäväksi. Liivit ja vyöt tulee asentaa tuotteiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

 Tarkista säännöllisesti, että lukot lukkiutuvat moitteettomasti ja reiät eivät ole täyttyneet rasvalla tai lialla.

Hoitajan tulee tarkastaa rengaspaineet ja täyttää renkaat vähintään kerran kuukaudessa.
Ilmanpaine, maksimi: Etu: 35 PSI/250 kPa, taka: 40 PSI/2,5 bar

FIN TEKNISET TIEDOT

Alusta: hiilikuitua ja lasikuitua
Istuin: alumiinia
Muoviosat: lasikuituvahvisteista polyamidia
Tyyny: palonkestävää vaahtomuovia
Kangas: palonkestävää mikrokuitua

FIN VALMISTAJA

R82 A/S
Parallevej 3
DK- 8751 Gedved

FIN JÄLLEENMYYJÄ

Algol Trehab Oy
Karapellontie 6
FIN-02610 Espoo
Tel. +358 (0)9 509 91
Fax. +358 (0)9 595 006
<http://www.algoltrehab.fi>

Luettelo jälleenmyyjistä löytyy sivuilta www.R82.com

