



R82 Wombat Solo

Optimaalisen riippumattomuuden saavuttaminen helpottuu!

R82[®] 



R82 Wombat Solo

Wombat Solo on tyylikäs, yksinkertainen työtuoli pikkulapsille, esikouluikäisille lapsille, koululaisille ja teini-ikäisille. Kolmessa koossa saatavilla olevissa tuoleissa on lapsen kasvun mukaan säädettävä, pitkäaikaisen käytön mahdollistava rakenne. Moderni ja tyylikäs muotoilu ja siro runko sekä värit tekevät siitä soveltuvan käytettäväksi kaikenlaisissa sisätiloissa.

Optimaalinen riippumattomuus!

Käytä Wombat Soloa päivittäisiin toimintoihin kuten lukemiseen ja koulunkäyntiin, hauskanpitoon ystävien kanssa ja kotiaskareiden parissa.

Sekä käyttäjä itse että avustaja voivat käyttää tuolin toimintoja. Valitse tarpeeseen sopivat säädöt. Istuimen alla olevien korkeuden-, kallistus- ja kääntösäätöjen kahvat antavat käyttäjälle mahdollisuuden hallita itse istuinasettoaan. Avustaja voi käyttää kallistus- ja korkeussäätöä rungossa olevan polkimen tai työntötangossa olevan säätövivun avulla.

Toiminnallisuutta ja tyyliä!

Wombat Solo on minimalistisen ulkonäkönsä, tyylikkään runkonsa ja ainutlaatuisten kangasväriensä ansiosta kaikkiin tilanteisiin soveltuva tanskalaisen suunnittelun tuote. Tuoli on saatavissa kolmessa koossa ja tarpeen mukaan muunneltava.

Käyttäjä voi käyttää erityistä kääntötoimintoa yksinkertaisesti istuimen alla sijaitsevaa vipua nostamalla, jolloin siirtymiset helpottuvat ja hoitajilta vaadittava fyysisen avun tarve vähenee.



Tanskalainen design | Innovaatio | Laatu



Ominaisuudet

Monia lisävarusteita

Wombat Solo on työtuoli, joka tarjoaa lukuisia muuntelumahdollisuuksia. Joillekin käyttäjille riittää tuoli vain muutamilla varusteilla, kun taas toiset voivat tarvita enemmän lisävarusteita.

Kallistus

Istuin kallistuu sekä rennon että aktiivisen istuma-asennon mahdollistaen. Käyttäjät kykenevät itse suorittamaan kallistuksen istuimen alla olevan kahvan avulla.

Riippumattomuus

Wombat Solo auttaa käyttäjää saavuttamaan optimaalisen riippumattomuuden mahdollistamalla istuin-asennon hallinnan istuimen alla olevia selkeästi merkittyjä kahvoja käyttämällä.

Avoin runko

Wombat Solon runko ei ole pelkästään tyylikäs ja huomaamaton, vaan sen avoin rakenne tekee siirtymisen tuoliin ja siitä pois helpoksi. Valittavana ovat joko 75 mm:n tai 100 mm:n pyörät omin jarruin, ja 100 mm:n pyörien yhteydessä myös keskusjarruvaihtoehto.

Mukavuus

Tyynyt on valmistettu paksusta, miellyttävästä solumuovista, ja niillä on hengittävät päälliset. Pienillä yksityiskohdilla kuten muotoilluilla tyynyillä ja erikoiskestäville reunoilla on suuri merkitys jokapäiväisessä käytössä.

Hyvin säädettävä

Wombat Solo tarjoaa kasvua lapsen kasvun myötä. Selkänojaa eteen- tai taaksepäin siirtämällä ja lannetukia säätämällä saadaan tuolin kokoa pienemmäksi tai suuremmaksi.

Kääntötoiminto

Käyttäjä voi käyttää kääntötoimintoa, joka vähentää tilantarvetta tuolin takana, koska tuolia ei tarvitse työntää pois pöydän luota.

Matala istuinkorkeus

Wombat Solon ominaisuuksiin kuuluu matala, 38 cm:n istuinkorkeus. Yhdessä etukallistuksen kanssa tämä tekee siirtymisistä helppoja.



Katso
mitat





Tapaa Thessa

Meillä oli ilo tavata 7-vuotias Thessa sisarensa Thean ja parhaan kaverinsa DICTEN kanssa maukkaiden keittiöaskareiden parissa.

Mukanaolo on tärkeintä

Vietimme aamupäivän Thessan, hänen sisarensa Thean ja parhaan kaverinsa DICTEN kanssa herkullisia vuoka-leivoksia leipoen ja maukkaan sotkun keittiöön aikaansaaden.

Thessa on 7 vuotta vanha ja hänellä on toispuolinen spastinen CP-oireyhtymä. Hän kävelee itsenäisesti useimmissa tilanteissa ja käyttää manuaalista pyörätuolia pidempien etäisyyksien siirtymisiin. Koulussa Thessa käyttää työtuolia maksimoidakseen kykynsä oppia ja toimia vuorovaikutuksessa ikätovereidensa kanssa sen sijaan että keskittäisi huomionsa pysty-asennossa seisomiseen.

Thessa on aktiivinen lapsi, joka nauttii osallistumisesta kouluopetukseen, voimisteluryhmään ja vierailemisesta suosikkihuvipuistossaan. Vaikka Thessalla esiintyy väsymystä osallistuessaan, hänelle on tärkeää olla

mahdollisimman itsenäinen, mitä kaikki hänen apuvälineensä edistävät.

Wombat Solo –tuolia käyttäessään Thessa pystyi hallitsemaan siirtymisiään ja tuolin säätöjä. Istuimen alla olevia kahvoja käyttämällä hän kykeni hallitsemaan tuolin korkeus-, kallistus- ja kääntötoimintoja itsenäisesti. Tuki lisäksi mahdollisti hänelle optimaalisen asennon käsivarsien ja käsien käyttämiseksi erilaisiin haastaviin liikkeisiin keittiössä päivän mittaan.

Thessa ilmaisi kuinka hän nautti Wombat Solo –tuolin käyttämisestä ja jopa pyysi toista tuolia kotikäyttöön. Hän selitti meille kuinka miellyttävää oli istua siinä ja kuinka helppoa sitä oli käyttää.

Katso
video





Avoim, tyylikäs runko

Wombat Solo -tuolin runko ei ole pelkästään tyylikäs ja siro, vaan tekee siitä myös täydellisesti sopivan luokkahuoneisiin ja kotiin. Avoim runko helpottaa siirtymisiä.

Matala istuinkorkeus!

Wombat Solon ominaisuuksiin kuuluu matala, 38 cm:n istuinkorkeus. Yhdessä etukallistuksen ja avoimen runkorakenteen kanssa tämä tekee siirtymisistä helppoja.

Keskipyövä voidaan säätää 6 asentoon, joilla kullakin on 12 cm:n säädettävyys minimistä maksimiin.

90° asteen kääntö!

Käyttäjä kykenee hallitsemaan ainutlaatuista kääntötoimintoa yksinkertaisesti istuimen alla olevasta kahvasta nostamalla.

Tuolin kääntäminen 90° tekee tuoliin siirtymisen ja sitä poistumisen yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi.



90° asteen kääntö
molemmille puolille

Mukavuus ja tyyli yhdessä

Mikäli arvostatte hyvää istumamukavuutta yhtä paljon kuin me, Wombat Solo on oikea tuoli teille! Tyynyjä on erilaisten asentotukitarpeiden täyttämiseksi saatavissa eri kokoisina, muotoisina, ja ne on valmistettu kaikki standardivaatimukset täyttävästä tulenkestävästä solumuovista. Sekä istuimen että selkänojan päälliset on käsitelty hylkimää kuivaa likaa ja yllättäviä vuotoja ja roiskeita. Nesteroiskeet voidaan pyyhkiä ja kuiva lika harjata pois helposti. Näin voit elää, työskennellä ja leikkiä huolettomammin. Pestävä istuimen inkontinenssisuojaus on myös saatavissa lisävarusteena.

Mukautuva istuinjärjestelmä liikuntarajoitteisille lapsille

Mukautuvan istuinjärjestelmän tavoitteena esikoulu- ja kouluikäisille lapsille on parantaa lapsen toiminnallisia kykyjä ja suoriutumista tukemalla jalkoja, sääriä, lantiota, ylävartaloa ja tarvittaessa myös päätä.

Mukautuvan istuinjärjestelmän erityinen tarkoitus riippuu aina lapsen toimintakyvystä. Tarkoituksena voisi joka tapauksessa olla seuraavien seikkojen parantaminen:

- Kyky ylläpitää vartalon ja pään pystyasento pitkien ajanjaksojen ajan ja väsymyksen vähentäminen
- Yläraajojen ja käsien käyttö kirjoittamisen, syömisen ja juomisen kaltaisiin toimintoihin
- Viestintävälineiden käyttö ja lapsen puhekyky
- Kyky leikkiä ja seurustella ikätovereiden kanssa
- Lapsen itsenäisyys, samalla hoitajien tarvetta ja huomiota vähentäen

Petrooli



Punainen



Harmaa



Harmaa muotoiltu





Wombat Solo- tuolin vaihtoehdot

VALITSE KOKO



Saatavana koossa 1, 2 ja 3

VALITSE SELKÄNOJA



Matala selkänoja



Korkea selkänoja

RUNGON VÄRI



Antrasiitinharmaa

VALITSE PYÖRÄT JA JARRUT




75 mm:n tai 100 mm:n pyörät
Jarrut kaikissa 4 pyörässä



100 mm:n pyörät
Saatavana keskujarrulla

VALITSE KORKEUS- JA KALLISTUSSÄÄTÖ

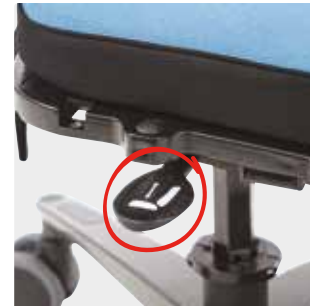

Korkeus- ja kallistussäätökahva istuimen alla,
ei kallistusta



Korkeuden ja kallistuksen säätökahva
istuimen alla



Korkeus- ja kallistussäätöpoljin rungolla,
kallistussäätökahva istuimen alla



Korkeuden ja kallistuksen säätöpolkimet
rungolla olevalla polkimella



Korkeus- ja kallistussäätöpoljin rungolla,
kallistusvipu työntötangolla



Korkeuden ja kallistuksen säätöpoljin
työntötangolla

VALITSE JALKATUKI



Istuimen alle asennettu



Rungolle asennettu
(Suositellaan kääntötoiminnon yhteydessä)

VALITSE KÄÄNTÖTOIMINTO



Saatavana 90°:n kierroilla
Käyttö istuimen alla olevalla kahvalla

Katso
neuvontavideot





Mukanaolon tunne
on tärkeä!

Wombat Solo –tuolin mitat

		1	2	3
	Selkänöjan korkeus (A)	280-340 mm (11-13½")	310-380 mm (12¼-15")	390-500 mm (15¼-19¾")
	Istuimen syvyys (B)	180-310 mm (7-12¼")	250-380 mm (9¾-15")	320-500 mm (12½-19¾")
	Selkänöjan leveys, litteä tyyny (C)	250 mm (9¾")	300 mm (11¾")	350 mm (13¾")
	Selkänöjan leveys, muotoiltu tyyny (D)	170 mm (6¾")	230 mm (9")	270 mm (10½")
	Istuinleveys (E)	300 mm (11¾")	370 mm (14½")	420 mm (16½")
	Selkänöjan kulma (F)	0-28°	0-28°	0-28°
	Istuimen kulma (G)	-10-15°	-10-15°	-10-10°
	Jalkatuen kiinnitysraudan kulma (H)	-30-30°	-30-30°	-30-30°
	Pituus (I)	645 mm (25½")	645 mm (25½")	645 mm (25½")
	Etäisyys jalkatuesta istuimeen, istuimeen asennettu (J) Ilman istuintynyä **	85-185 mm (3¼-7¼")	85-285 mm (3¼-11¼")	85-375 mm (3¼-14¾")
	Etäisyys jalkatuesta istuimeen, runkoon asennettu (J) Ilman istuintynyä**	95-320 mm (3¾-12½")	95-320 mm (3¾-12½")	245-395 mm (9¾-15½")
	Istuimen korkeus lattiasta ilman istuintynyä(K)*	310-430 mm (12¼-17")	310-430 mm (12¼-17")	375-491 mm (14¾-19¼")
	Istuimen korkeus lattiasta istuintynyn kanssa	375-495 mm (14¾-19½")	375-495 mm (14¾-19½")	440-556 mm (17¼-22")
	Kokonaisleveys (L)	560 mm (22")	560 mm (22")	560 mm (22")
	Maksimikuormitus	45 kg (99.2 lb)	45 kg (99.2 lb)	70 kg (154.3 lb)
	Paino	12.5 kg (27.5 lb)	13 kg (28.7 lb)	16 kg (35.3 lb)

* Mitattu ilman tynyä. Keskipylväässä on 6 asentoa korkeussäädölle. Kukin lisäys lisää 22 mm mittaan alkane asemasta -1.

** Lisää 65 mm mittaan tynyn kanssa.

(A-E) Mitattu tynyn kanssa

(I) Lisää 15 mm mittaan 100 mm:n pyörien kanssa.

(L) Lisää 10 mm mittaan 100 mm:n pyörien kanssa.



R82 Wombat -tuoteperhe

Wombat-tuoteperheeseen kuuluu kaksi erilaista työtuolia, joten oikean tuolin valinta on tärkeää. Olemme koonneet yhteen molempien työtuolien tärkeimmät ominaisuudet avuksi teille oikean työtuolin valintaan.



Wombat Solo:

Wombat Solo on kehitetty varmistamaan käyttäjän optimaalinen riippumattomuus. Se on suunniteltu yksinkertaiseksi ja se soveltuu moniin ympäristöihin siten, että käyttäjä voi tuntea täydellisesti osallistuvansa toimintoihin.

- Korkeudensäätö kaasujousella
- Matala istuinkorkeus 12 cm:n säädettävyydellä 6:sta pylvään asemasta kussakin
- Käyttökahvat istuimen alla, polkimet rungolla tai vivut työntökahvassa korkeuden säätämiseksi ja istuimen kallistamiseksi
- Istuimen 90°:n kääntötoiminto, jota käytetään istuimen alla olevalla kahvalla

Lisätietoja Wombat Solo -tuolista



Wombat Living:

Wombat Living on aktiivituoli, joka varmistaa optimaaliset työskentelyolosuhteet avustajille. Istuimen korkeuden vaivattoman säätämisen ansiosta käyttäjä on helppo kohottaa tovereidensa katseen tasalle ja istuma-asento säilyy aktiivisena.

- Sähkö- tai kaasujousikäyttöinen korkeudensäätö
- Matalaistuinkorkeus, liikealue 28 cm
- Korkeussäädön ja istuinkallistuksen säätövivut saatavilla työntötankoon.

Lisätietoja Wombat Living -tuolista





“Jokaisen tulisi kyetä viettämään vapaata ja itsenäistä elämää
ja toteuttaa unelmiaan fyysisistä rajoitteista riippumatta”

 **ALGOL**
TREHAB

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

R82[®] 
a part of Etac