

R82[®] 


panda futura[™]

Suomenkielinen käyttöohje

F
I
N

FIN SISÄLLYSLUETTELO

Turvallisuus	4
Takuu	4
Tuolit	5
Tuolin asentaminen / irrottaminen	5
Selkänojan kallistus	6
Selkänojan jatke	6
Päätuki	7
Työntötanko / Työntökahvat	8
Sivuun kääntyvät olkatuet	9
Kiinteät vartalotuet	10
Sivuun kääntyvät vartalotuet	10
Sivuun kääntyvät polvituet	11
Istuimen jatke	11
Jalkatuki/ Jalkalauta	12
Haarakiila	12
Fixlock-solkien asentaminen	13
Käsinojat ja pöytälevy	14
Liivi & ristikkoliivi	16
Rintavyö	16
5-pistevyö	17
H-turvavyö, pehmustettu	17
Lantiovyö	18
Y-lantiohihna	18
Haararemmi	19
Nilkkahihnat	19
Jalkaremmi	20
Rannehihnat	20
H-turvavyö	21
Lämpöpussi	21
Sadeviitta hupulla	22
Kuljettaminen moot-toriajoneuvoissa	23
Turvallisuus ajoneuvossa	24
Tuotteen tunnistus	25
Mitat	26
Tekniset tiedot	26
Valmistaja	26
Huolto	26
Jakelija	26

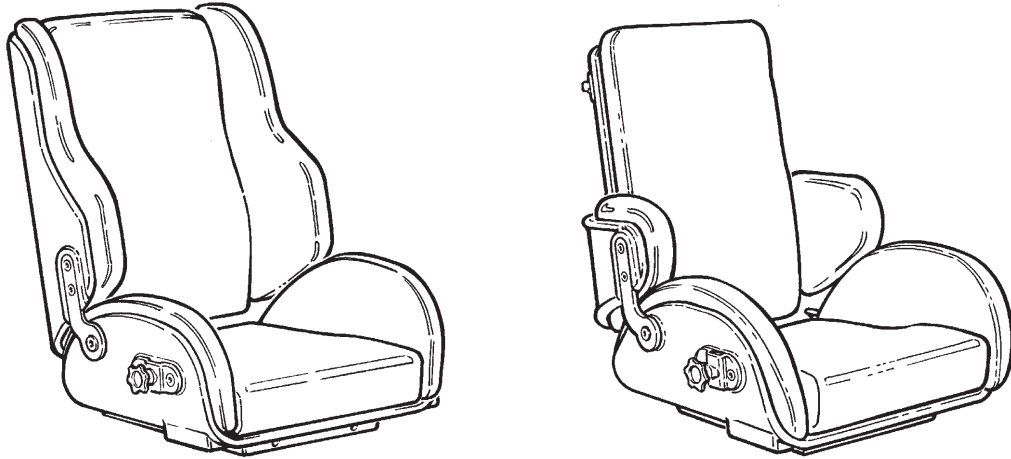


FIN PANDA FUTURA

Onnittelut Panda Futuran hankinnan johdosta R82:lta. Olemme vakuuttuneita siitä, että se tulee täyttämään odotuksenne täydellisesti.

Panda-tuoli on saatavana kahtena eri versiona: Panda Standard ja Panda Active. Standard-tuoli on pääasiassa tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat tukea käsivarsien ja olkapäiden ympärillä. Active-tuoli on tarkoitettu aktiivisille lapsille, jotka tarvitsevat enemmän liikkumavapautta.


Molemmissa versioissa selkänojaa voidaan kallistaa istuinalustasta riippumattomalla tavalla. Monipuoliset säätömahdollisuudet ja laaja lisävarusteiden valikoima mahdollistavat istuimen säätämisen jokaisen lapsen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti mukavuutta ja tukea tarjoten. Panda soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön riippuen siitä, mitä alustaa käytetään.


Tämä käyttöohje mahdollistaa Panda Futuran monien mahdollisuuksien täydellisen hyödyntämisen.

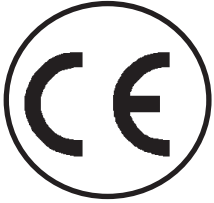


FIN TURVALLISUUS


Panda Futura on saanut CE-merkinnän. Tämä varmistaa sen, että tuoli täyttää kaikki olennaiset eurooppalaiset turvavaatimukset.

 Poista CE-merkintä, jos tuotteeseen tehdään rakenteellisia muutoksia tai jos käytetään muita kuin alkuperäisiä R82-varaosia ja lisäosia.

 Tuoli on hyväksytty ISO 7176/19-2001 ja 16840-4:2009 -standardien mukaisesti.

 Panda Futura on suunniteltu vain yhtä käyttäjää varten. Älä sijoita useampaa kuin yhtä käyttäjää Panda Futuraan.

 Älä milloinkaan jätä lasta ilman valvontaa tähän tuotteeseen. Varmista jatkuva aikuisen toimesta tapahtuva valvonta. Panda Futuran vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavan vamman käyttäjälle. Huolehdi, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on tehty oikein ja tarkista ne säännöllisesti.

 Käyttöohjeen viimeisin versio on aina saatavilla verkossa: www.r82.com

FIN TAKUU

R82 antaa viiden vuoden takuun vain alustan rikkoutumiselle. Lisäksi R82 antaa takuun valmistusvirheille ja materiaaleille kansallisten säädösten ja määräysten tai jälleenmyyjän ilmoittamien myyntiehtojen mukaisesti. Asiakkaan vastuu tuotteen huoltamisesta ja kunnossapidosta käyttöohjeessa kuvatulla tavalla voi vaikuttaa takuun voimassaoloon.

Takuu pysyy voimassa vain, jos R82:n tuotetta käytetään sen ostomaassa, jos tuote voidaan tunnistaa sen sarjanumeron perusteella ja jos asiakas on täyttänyt kaikki velvoitteensa.

Takuu ei kata tapaturmavahinkoja eikä väärinkäytön tai laiminlyönnin aiheuttamia vaurioita. Takuu ei kata normaalin kulumisen vuoksi määrävällein vaihdettavia osia. Takuu raukeaa, jos käytetään muita kuin R82:n alkuperäisiä osia tai tarvikkeita tai jos muu kuin R82:n valtuutettu edustaja korjaa tuotteen tai tekee siihen muutoksia.


R82 varaa itselleen oikeuden tarkastaa tuotteen ja sen asiakirjat ennen takuuhuollon antamista. Tämän takuun myöntää R82:n jälleenmyyjä tai edustaja.

FIN TUOLIT

Panda Futura -tuoli on saatavana (A) STANDARD-tuolina 5 koossa ja (B) ACTIVE-tuolina 4 koossa.

ACTIVE-tuoli on muotoiltu siten, että se sallii laajemman yläraajojen liikkeen ja on ihanteellinen aktiivisemmille lapsille.

STANDARD-tuoli on muotoiltu sivutuolin, jotka tarjoavat lapselle enemmän tukea ja vähemmän liikemahdollisuuksia. Lapsen tuentarvevaatimukset määrittävät sen, mikä malli on sopivin. Molemmissa malleissa voidaan käyttää laaja lisävarusteiden valikoimaa.

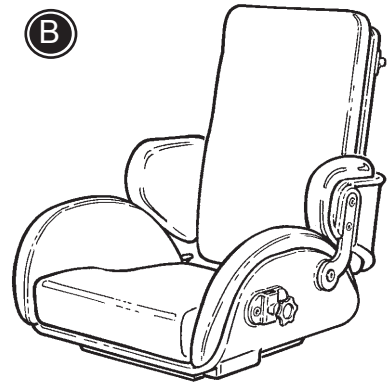

FIN TUOLIN ASENTAMINEN / IRROTTAMINEN


Tuolin asentamiseksi:


Sijoita tuoli kannattimeen ja työnnä se koko matkan taaksepäin, kunnes se loksahtaa paikalleen.



Älä käytä ensimmäistä lukitusta, johon se loksahtaa. Tämä on vain turvalukitus, joka pidättää tuolin, mikäli nosta sattuisi vahingossa hyppäämään pois oikeasta lukituksestaan.

Tuolin irrottamiseksi: Vapauta punainen painike (B) lukituksesta. Vedä nuppi (A) ulos, vedä tuolia eteenpäin ja nosta samanaikaisesti.

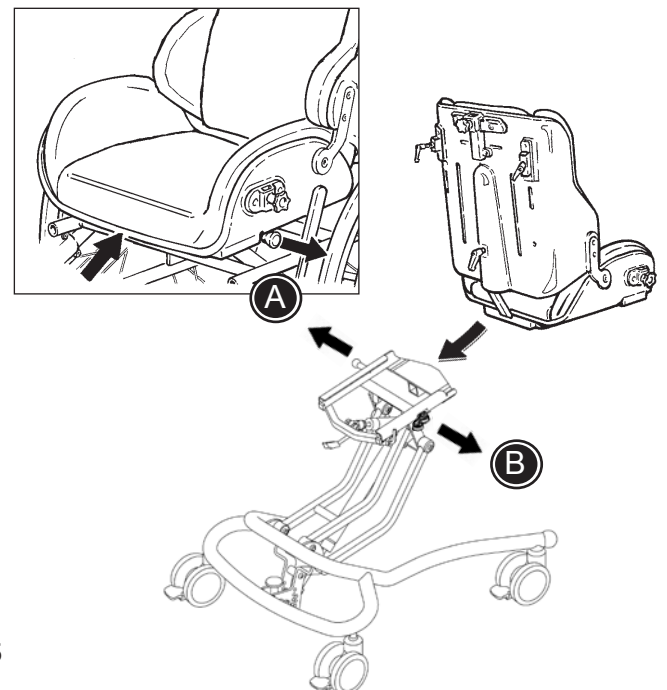

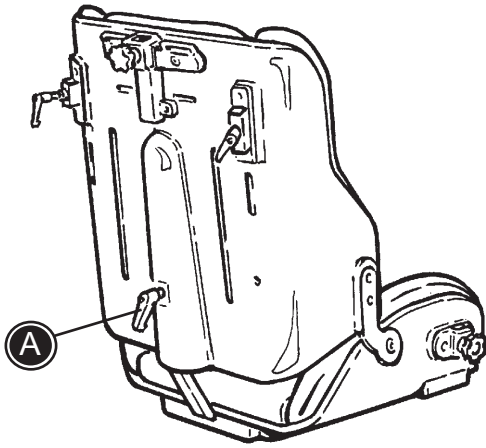


FIN SELKÄNOJAN KALLISTUS



Tartu tuolin selkänojasta tukevasti ennen vipuruuvin avaamista äkillisen kallistumisen estämiseksi.

Avaa vipuruuvi (A) selkänojan kallistamiseksi.

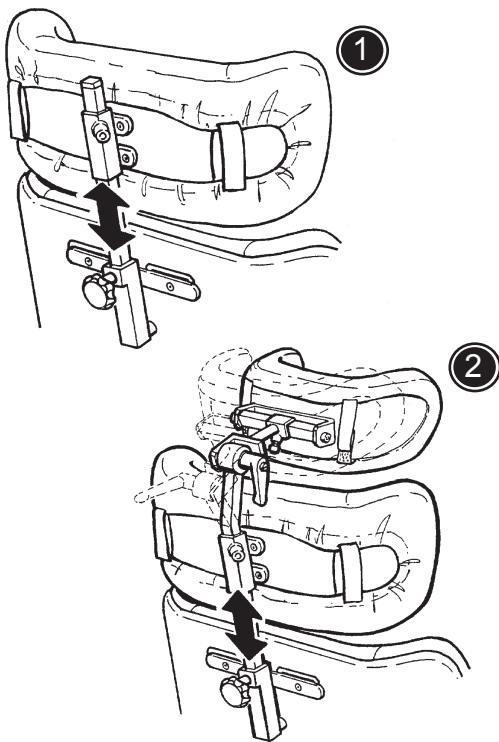

FIN SELKÄNOJAN JATKE





- 1) Selkänojan jatkeen korkeussäätö.
- 2) Päätuen ja selkänojan jatkeen asentaminen yhdessä. Päätuen tankoa käytetään kiinnitystankona.

FIN PÄÄTUKI




- A) Päätuen sivuttaissäätö.
- B) Päätuen kulmasäätö.
- C) Päätuen syvyyden säätö.
- D) Korkeussäätö.

! A:n, B:n, C:n ja D:n on oltava löysällä päätuon säätöjen tekemiseksi oikein. Kun oikea asema on määritetty, kiristä A, B, C ja D.

- E) Päätukea voidaan kääntää 180° lisätuen saamiseksi pidemmälle eteen.
- F) Joutsenkaulatangolla varustettu päätuki on saatavilla, jos peruspäätuksi ei tarjoa riittävästi tukea edessä.
- G) Aseta päällinen päätuon päälle.

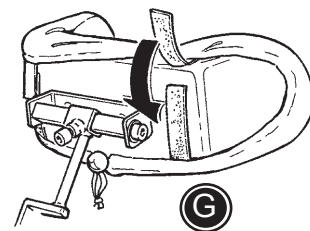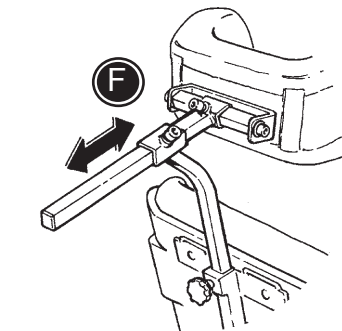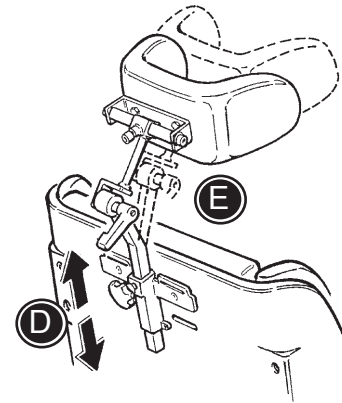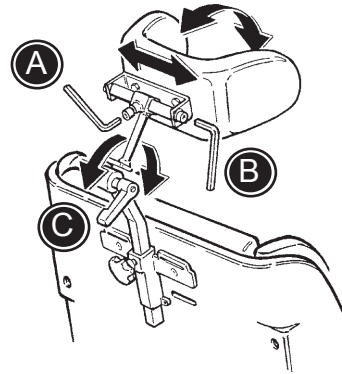

FIN TYÖNTÖTANKO / TYÖNTÖKAHVAT

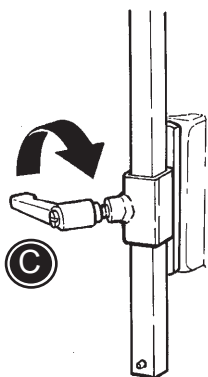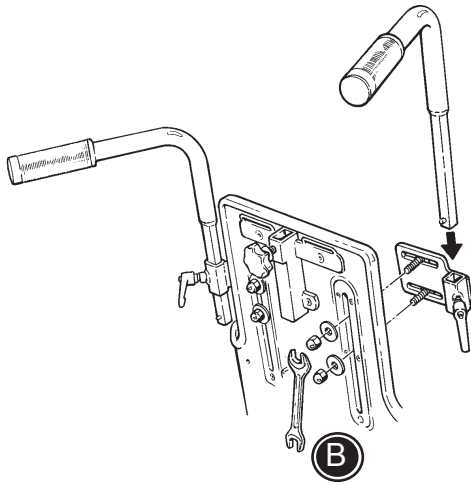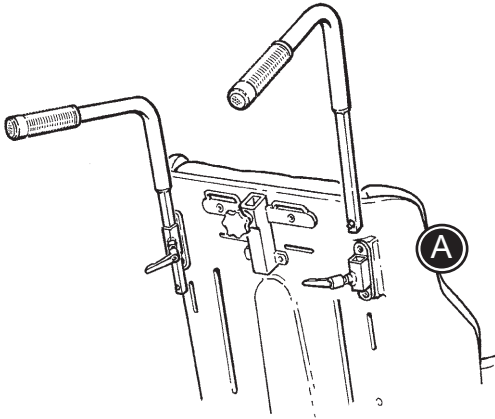

Panda Standard:

Kiinnikkeet asennetaan selkänojaan käyttämällä kuusiokoloavainta (A). Työntötanko/työntökahvat asennetaan tuolin selkänojassa oleviin kiinnikkeisiinsä. Kiristä vivulla (C).

Panda Active:





Aloita asentamalla kiinnikkeet selkänojaan kuvassa osoitetulla tavalla (B). Työnnä kahvat kiinnikkeisiin ja kiristä huolellisesti (C).


FIN SIVUUN KÄÄNTYVÄT OLKATUET

- A) Olkatuet kiinnitetään pääntuen tankoon. Asenna pääntuen tanko selkänöjassa olevaan kiinnikkeeseen.
- B) Vedä lukitusnuppia ulospäin olkatukien kääntämiseksi ylös ja pois.
- C) Säädä olkatukien korkeutta kuusiokoloavaimen avulla.
- D) Säädä olkatukien syvyyttä kuusiokoloavaimen avulla.




Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään kolmen kuukauden välein.

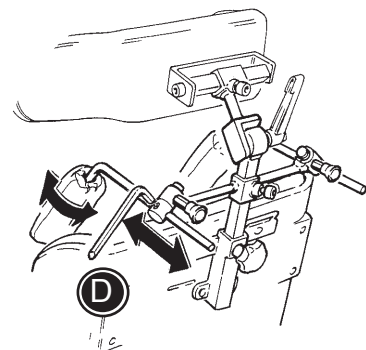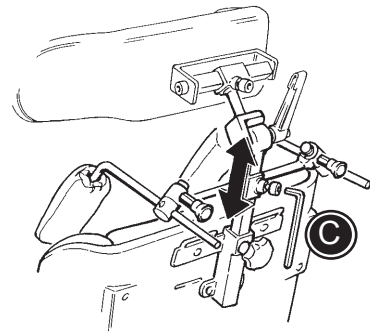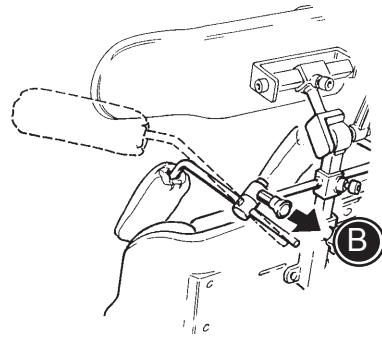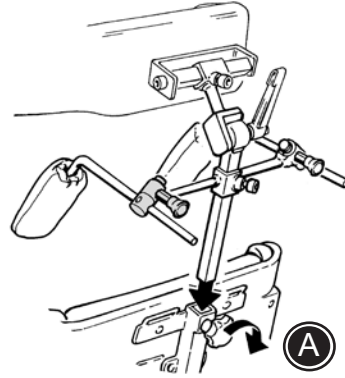

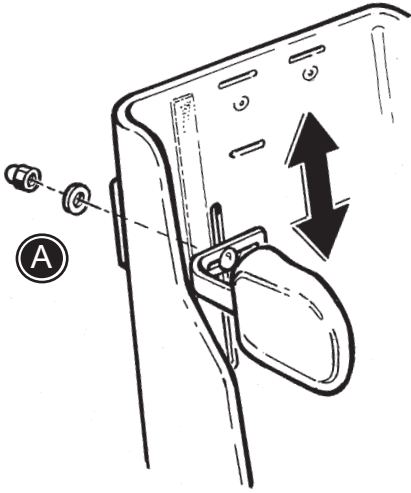

FIN KIINTEÄT VARTALOTUET

Irrota selkänojan pehmuste ja asenna vartalotuet selkänojassa oleviin aukkoihin (A).

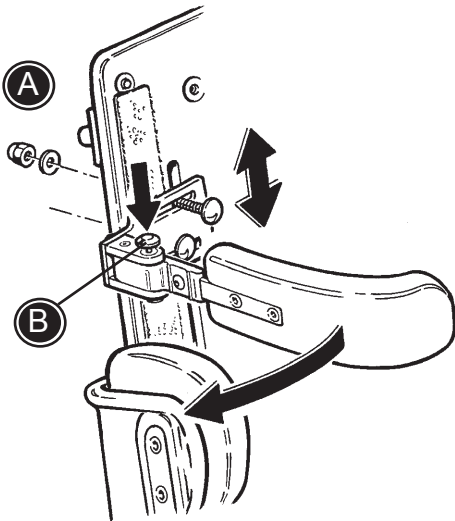

FIN SIVUUN KÄÄNTYVÄT VARTALOTUET

Irrota selkänojan pehmuste ja asenna vartalotuet tuolin selkänojassa oleviin aukkoihin (A).
Sivuuun kääntyvät vartalotuet vapautetaan painamalla punaista painiketta (B) ja käännetään sitten sivuun.




Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään kolmen kuukauden välein.

FIN SIVUUN KÄÄNTYVÄT POLVITUET

Kiinnitä kiinnitysosa (A) istuimen alle 4 mm:n kuusiokoloavaimella. Työnnä polvituet kiinnitysoosiin ja kiristä 6 mm:n kuusiokoloavaimella (B)

- * Avaa ruuveja (C) 6 mm:n kuusiokoloavaimella polvitukien kulman säätämiseksi.
- * Avaa ruuveja (B) tai (D) 4 ja 6 mm:n kuusiokoloavaimilla syvyyden säätämiseksi.
- * Itse polvituet ovat kulma- ja sivuttaissäädettäviä (E) 4 mm:n kuusiokoloavaimella.
- * Paina kannattimessa olevaa punaista painiketta (F) polvitukien kääntämiseksi sivuun.


! Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 3 kuukauden välein.

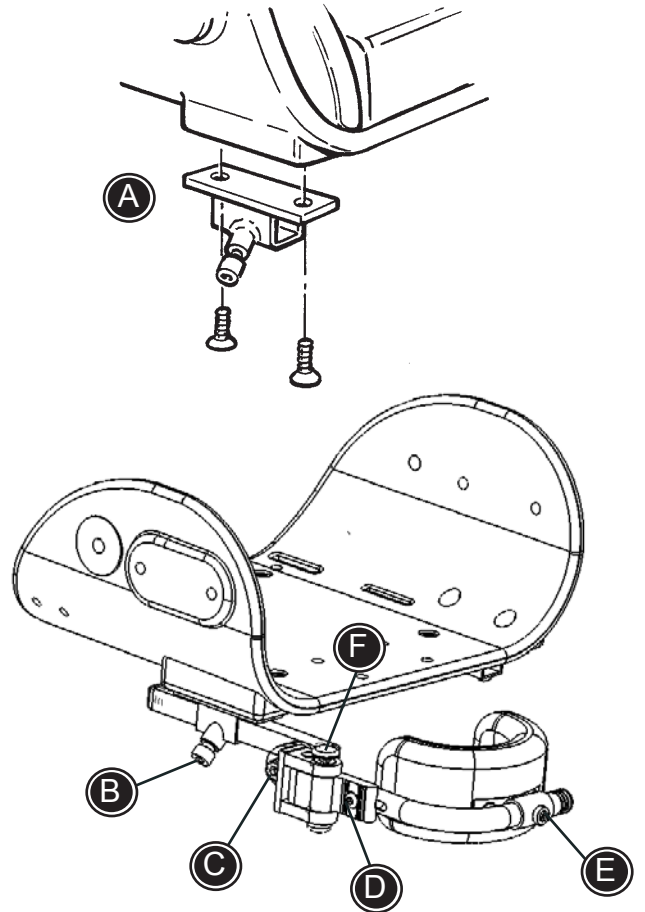


FIN

FIN ISTUIMEN JATKE


Istuimen jatke työnnetään istuimen alla olevaan adapteriin ja asetetaan haluttuun kohtaan. Kiristä ruuvilla (A).

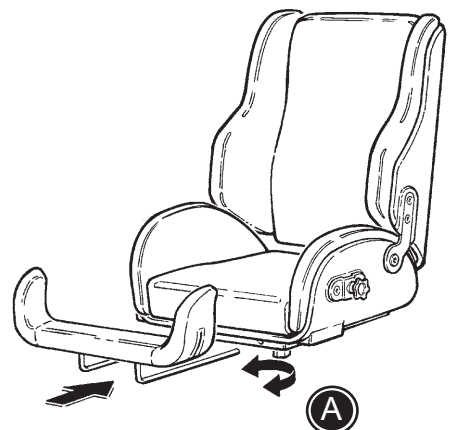


FIN JALKATUKI/ JALKALAUTA

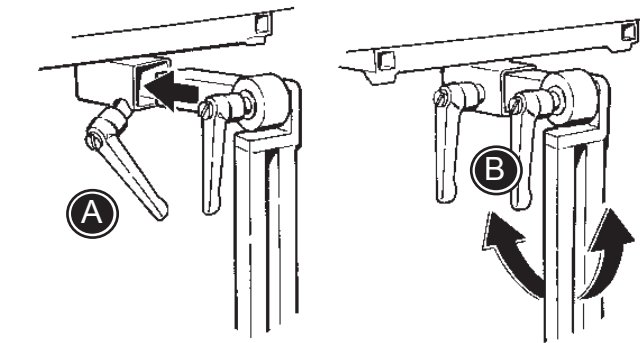


A) Kiinnitä jalkatuen kiinnitysrauta ja säädä sitä vipuruuvien avulla.

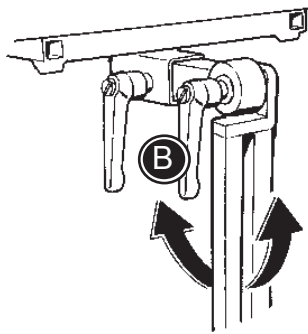


B) Säädä jalkatuen tangon kulmaa vipuruuvien avulla.

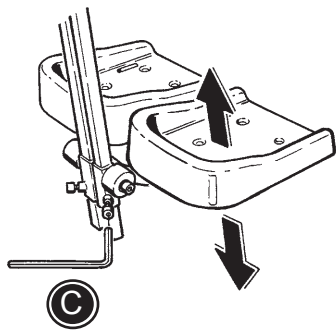


C) Säädä jalkatuen korkeutta 6 mm:n kuusiokoloavaimella.

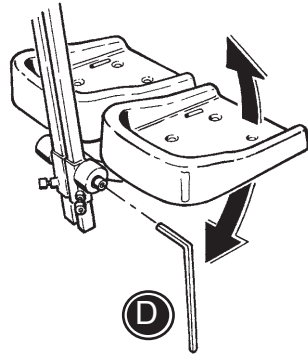

D) Säädä jalkatuen kulmaa 6 mm:n kuusiokoloavaimella.

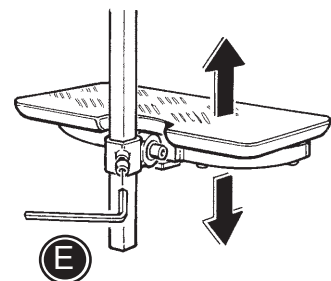


E) Säädä jalkalaudan korkeutta 6 mm:n kuusiokoloavaimella.

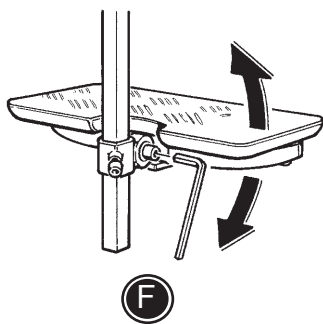


F) Säädä jalkalaudan kulmaa 6 mm:n kuusiokoloavaimella.

FIN

FIN HAARAKIILA

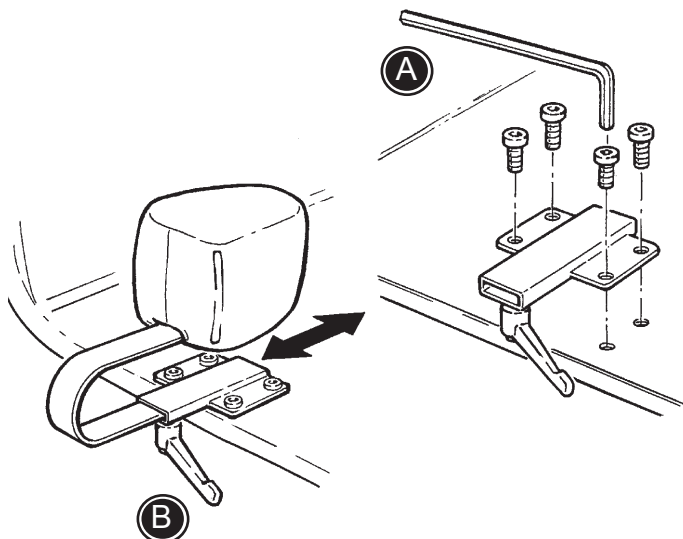

A) Kiinnitysosa kiinnitetään 6 mm:n kuusiokoloavaimella.

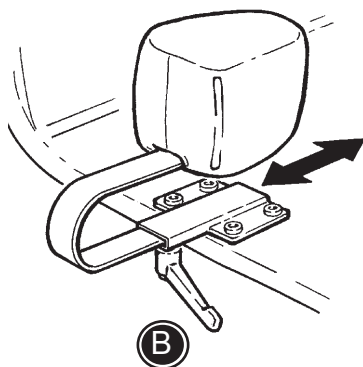

B) Haarakkiila kiinnitetään kiinnitysosaan ja sen syvyyttä voidaan säätää vipuruuvien avulla.

FIN FIXLOCK-SOLKIEEN ASENTAMINEN

Panda-tuoliin voidaan asentaa Fixlock-soljet hihnakiinnikkeiden pikalukitsemiseksi ja säätämiseksi. Lantiovyöt (85427-x), haararemmit (89112-x and 89108-x), 5-pistevyöt (89665-x), H-turvavyöt (85428-x) ja ristikkoliivit (89625-x) voidaan sitten kiinnittää nopeasti ja oikeaan asemaan. Niiden asentamiseen tarvitaan kuusiokoloavainta.

Asentaminen selkänojaan:




- * Kuusi fixlock-solkea (D) kiinnitetään selkänojaan kuusiokoloruuveilla. Kaksi ylintä fixlock-solkea voidaan myös säätää alempaan asemaan siten, että hihnat voidaan ohjata pehmusteiden läpi (sen jälkeen kun ne on leikattu auki).
- * Ristikkoliivihihnat ja 5-pistevyö voidaan siten ohjata aukkojen läpi ja kiinnittää fixlock-soljilla.


Huom:

Hihnat voidaan asentamisen jälkeen lyhentää oikeaan pituuteen (varmistaa, että päät päätetään sulattamalla).

Asentaminen istuimeen:

- * Synteettinen sovitinkappale (A) asennetaan istuimen molemmille puolille kahdella kuusiokoloruuveilla.
- * Yksi fixlock-solki (B) asennetaan istuimen molemmille puolille kuusiokoloruuveilla lantiovyötä ja haararemmiä varten (haararemmimalli (89108)).
- * Mikäli asennetaan T-mallinen haararemmi (89112), lisätään lisäksi fixlock-solki (C) alustan molemmille puolille. Ne kiinnitetään kuusiokoloruuveilla (sarja B).
- * Mikäli käytetään 5-pistevyötä, asennetaan lisäksi kaksi fixlock-solkea (C) selkänojan yläosaan.

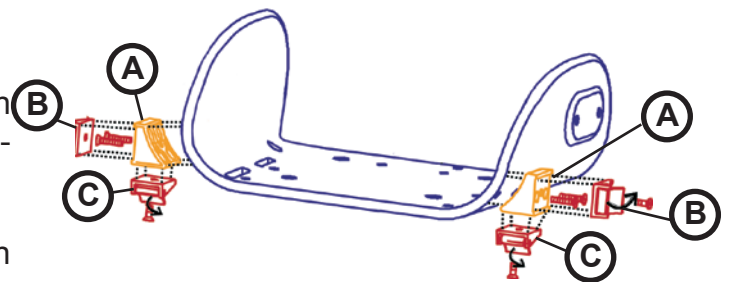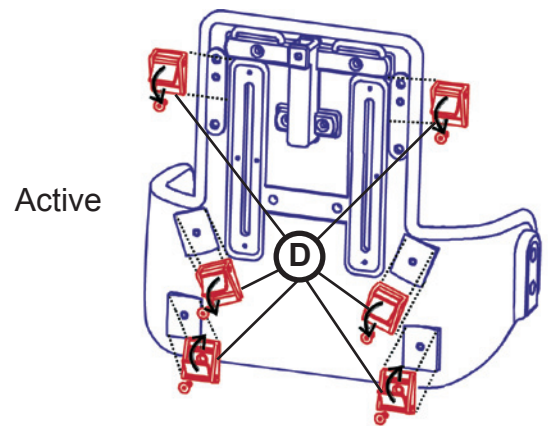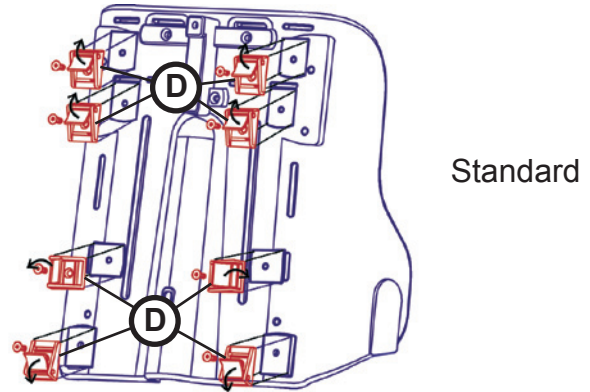

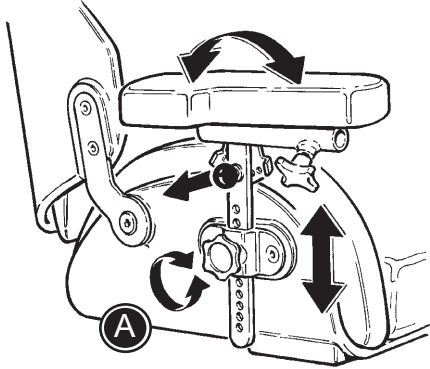


FIN KÄSINOJAT JA PÖYTÄLEVY



A) Käsinojien korkeussäätö.

B) Pöytälevyn sivuttaissäätö.


C) Pöytälevyn syvyyssäätö.

D) Pöytälevyn kulmansäätö käsinojia kallistamalla.

 Pöytälevy voidaan asentaa vain käsinojilla varustettuun Panda Futura -malliin.

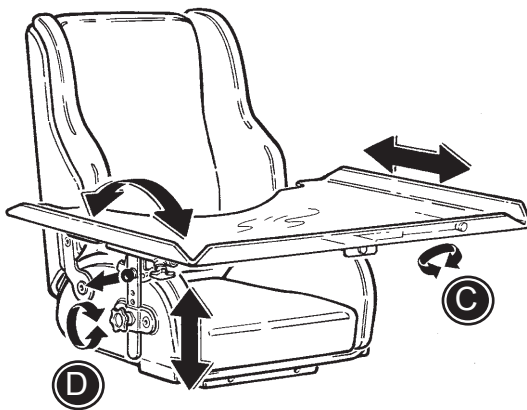
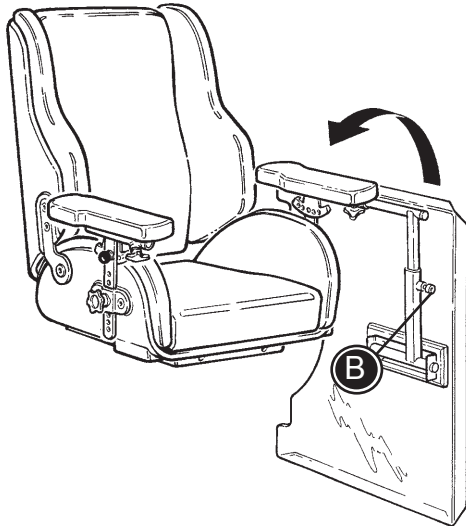


D

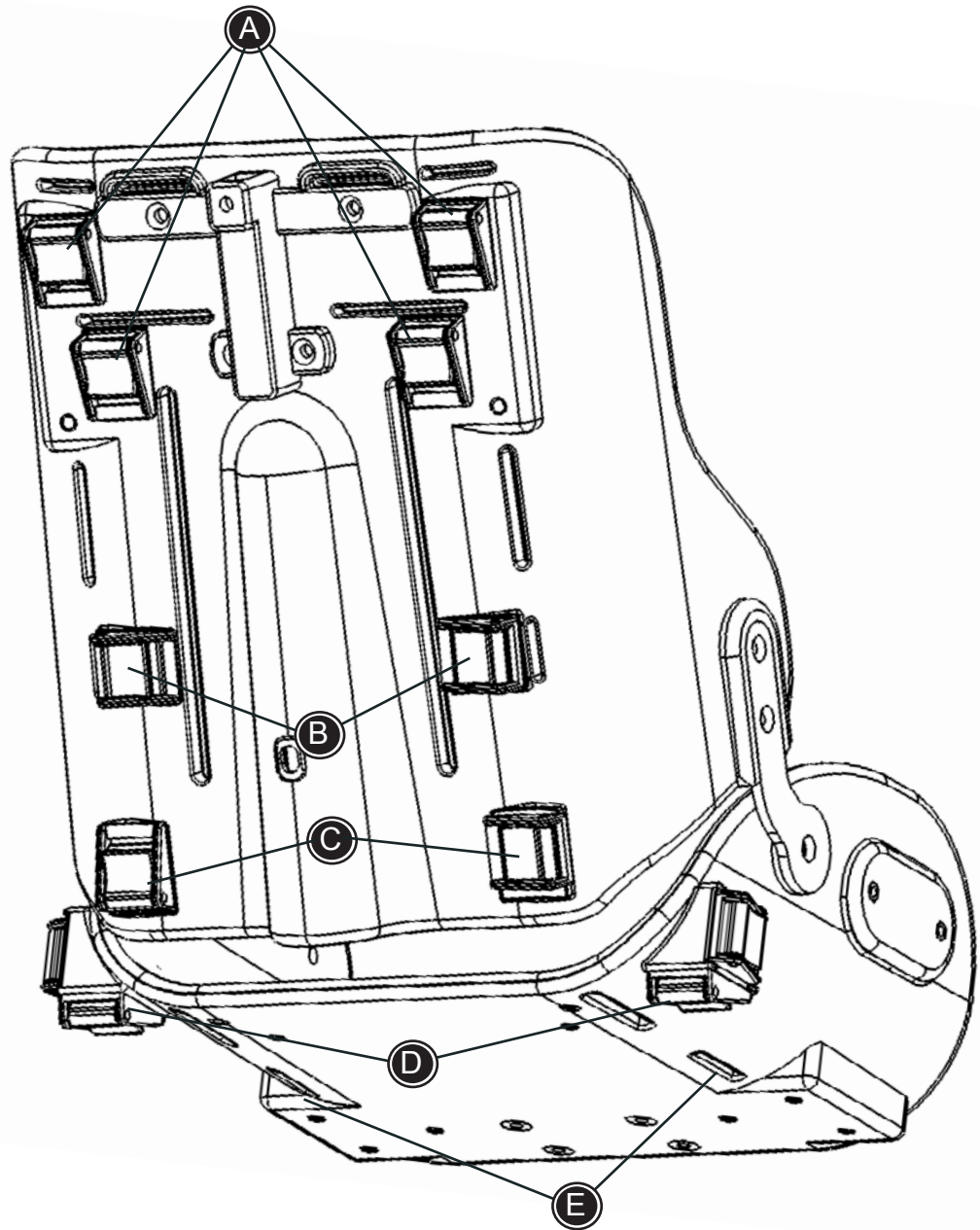

F
I
N

Tätä kuvaa käytetään seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden kanssa.

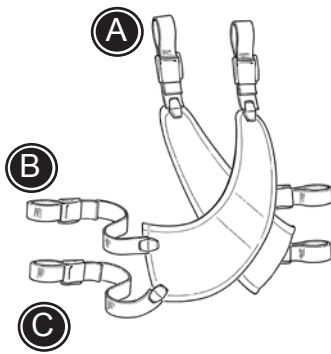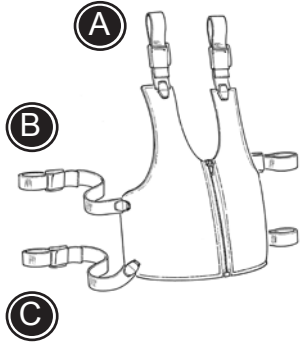

FIN LIIVI & RISTIKKOLIIVI

Kiinnitä fixlock-soljet selkänöjaan. Katso sivu 15.


Liivi ja ristikkoliivi voidaan avata ja sulkea soljilla ja vetoketjulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänöjan yläosassa oleviin kiinnikkeisiin. (A)
- * Kiinnitä sivulla olevat ylemmät hihnat selkänöjassa oleviin kiinnikkeisiin (B).
- * Kiinnitä sivulla olevat alemmat hihnat selkänöjan alaosassa oleviin kiinnikkeisiin (C).



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

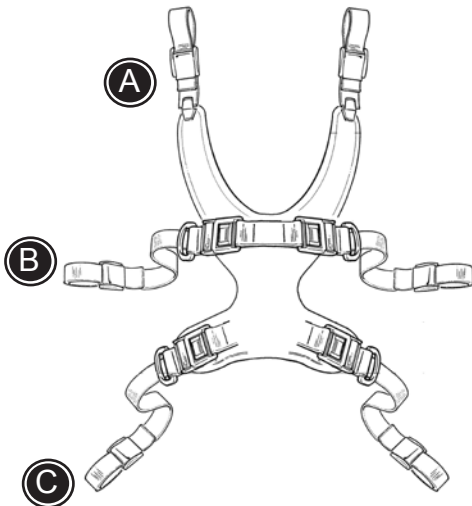

FIN RINTAVYÖ

Kiinnitä fixlock-soljet selkänöjaan. Katso sivu 15.

Rintavyö voidaan avata ja sulkea pikalukkojen avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänöjan yläosassa oleviin kiinnikkeisiin. (A)
- * Kiinnitä sivulla olevat ylemmät hihnat selkänöjassa oleviin kiinnikkeisiin (B).
- * Kiinnitä sivulla olevat alemmat hihnat selkänöjan alaosassa oleviin kiinnikkeisiin (C).



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.


FIN 5-PISTEVYÖ

Kiinnitä fixlock-soljet selkänöjaan. Katso sivu 15.

5-pistevyö voidaan avata ja sulkea solkien avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä hihnat (E) istuimessa oleviin kiinnikkeisiin tai hihnankiinnikkeisiin (D).
- * Aseta käyttäjä tuoliin istumaan "kolmion" päälle (F).
- * Sivuilla olevat hihnat (D) johdetaan istuimessa olevien aukkojen läpi ja kiinnitetään istuimessa oleviin hihnankiinnikkeisiin.
- * Olkahihnat kiinnitetään selkänöjan yläosassa oleviin kiinnittimiin (A).

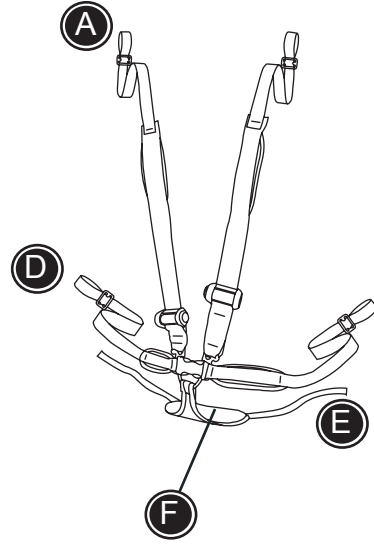

! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.


FIN H-TURVAVYÖ, PEHMUSTETTU

Kiinnitä fixlock-soljet selkänöjaan. Katso sivu 15.


H-turvavyö voidaan avata ja sulkea pikalukkojen avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänöjan yläosassa oleviin kiinnikkeisiin. (A)
- * Kiinnitä sivuilla olevat hihnat selkänöjassa oleviin kiinnikkeisiin (B).

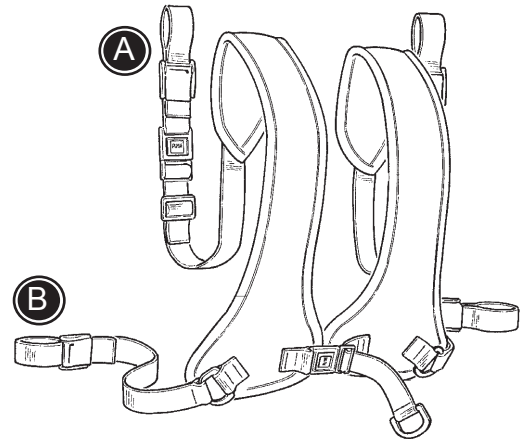

! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu sa sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

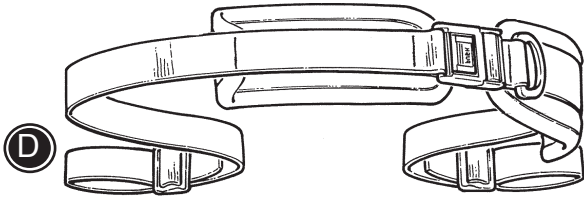

FIN LANTIOVYÖ

Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso kuva 15.


Lantiovyö voidaan avata ja sulkea pikalukon avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä hihnat istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin (D).



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

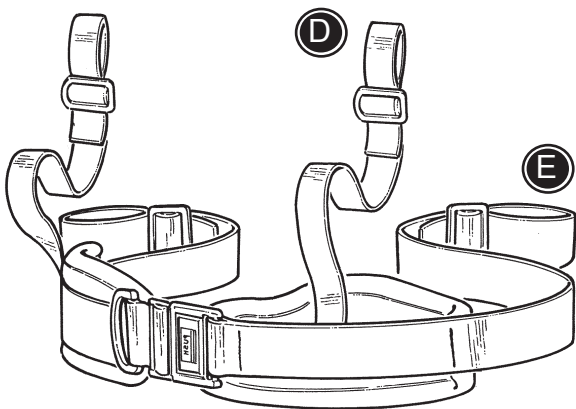

FIN Y-LANTIOHIHNA

Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso sivu 15.

Y-lantiohihna voidaan avata ja sulkea pikalukon avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä hihnat istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin (D).
- * Kiinnitä hihnat (E) istuimen etuosassa oleviin aukkoihin.

Hihnat E ja D voidaan vaihtaa keskenään.




Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

FIN HAARAREMMI

Kiinnitä fixlock-soljet istuimeen. Katso kuva 15.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Avaa pikalukot (G).
- * Kiinnitä hihnat (D) istuimen alla oleviin kiinnikkeisiin (D).
- * Aseta käyttäjä haararemmiin päälle ja sulje pikalukot (G) reisien päälle.

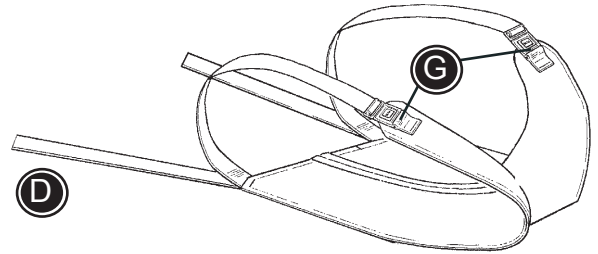


! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta ne säännöllisesti.

FIN NILKKAHIHNAT


Nilkkahihnat voidaan avata ja sulkea käyttämällä soljessa olevaa tarranauhaa (A).

Noudata alla olevia asennusohjeita.

- * Poista soljet (C).
- * Vedä hihnat (B) jalkalevyissä olevien aukkojen läpi.
- * Asenna soljet (C) takaisin paikoilleen ja varmista, etteivät hihnat pääse liukumaan pois.

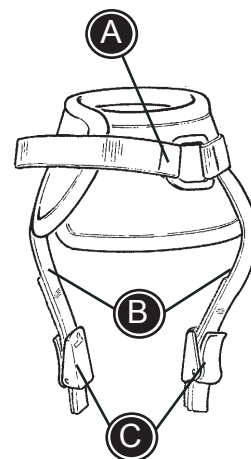

! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta ne säännöllisesti.

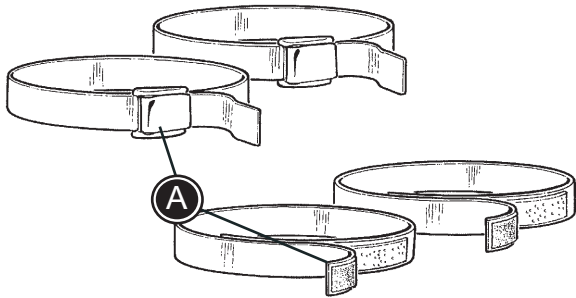


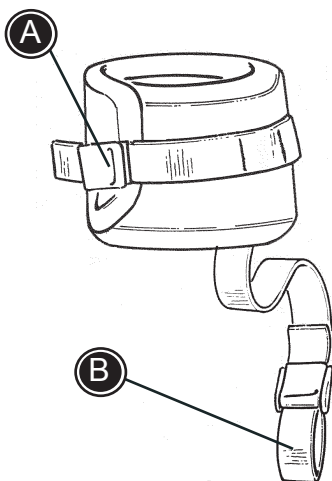
FIN JALKAREMMIT

Jalkaremmit voidaan avata ja sulkea käyttäen soljessa olevaa tarranauhua tai lukkoa (A).

Noudata alla olevia asennusohjeita.

- * Avaa hihnat ja vedä ne (A) jalkalevyissä olevien aukkojen läpi.
- * Kiinnitä hihnat käyttäjän jalan ympärille.

 Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta ne säännöllisesti.




FIN RANNEHIHNAT

Rannehihna voidaan avata ja sulkea soljen (A) avulla.

Noudata alla olevia asennusohjeita.

- * Kiinnitä rannehihna käyttäjän ranteen ympärille.
- * Kiinnitä hihna (B) esim. käsinojan tangon ympärille.

 Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta ne säännöllisesti.


FIN H-TURVAVYÖ

Asenna fixlock-soljet selkänöjaan. Katso sivu 15.

H-vyö voidaan avata ja sulkea pikalukon avulla.

Noudata alla olevia ohjeita käyttäen apuna sivun 15 kuvaa.

- * Kiinnitä olkahihnat selkänöjan yläosassa oleviin kiinnikkeisiin. (A)
- * Kiinnitä sivulla olevat hihnat selkänöjassa oleviin kiinnikkeisiin (B).

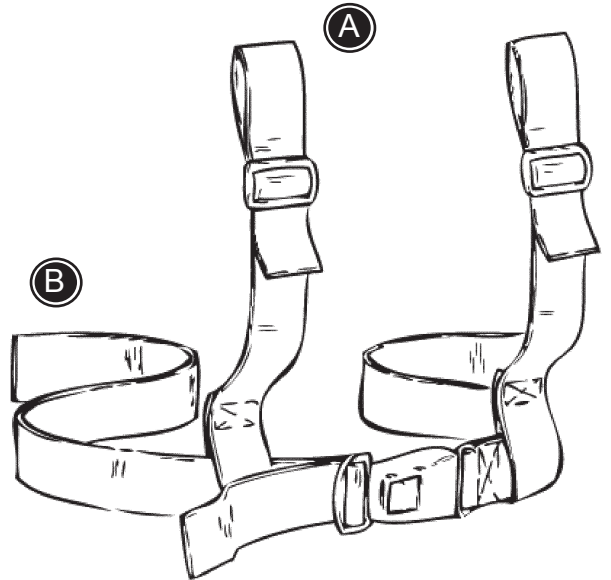


! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

FIN LÄMPÖPUSSI

- * Aseta lämpöpussi tuoliin.
- * Avaa sivuilla olevat vetoketjut ja aseta käyttäjä pussin sisään.
- * Sulje pussi vetoketjuin.

Pussin sivulla on myös tarranauhalla varustetut aukot, joiden läpi on mahdollista pujottaa lantiovyö.

! Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkastane säännöllisesti.

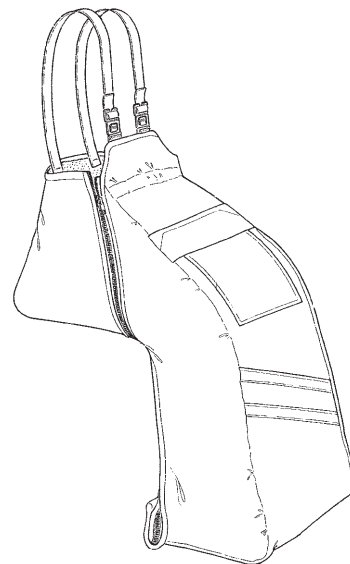



FIN SADEVIITTA HUPULLA

Sadeviitta kulkee istuimen selkänojan yli, peittää käyttäjän kehon ja ulottuu jalkatuen alle. Tällä tavoin se peittää myös tuolin.



Varmista, että kaikki kiinnitykset ja säädöt on sijoitettu ja sovitettu oikein ja tarkasta ne säännöllisesti.

i Istuin on hyväksytty standardin ISO 7176/19-2001 + 16840-4:2009 mukaisesti.

! Panda Futura -tuoli on hyväksytty käyttäjän kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa. Tarkista maksimikuorma tämän ohjekirjan lopussa olevasta MITAT-kappaleesta.

! Hyväksyntä ei ole voimassa erikoisvalmisteisille istuimille ja alustoille.

! Käyttäjän tulisi siirtyä ajoneuvon istuimeen ja käyttää ajoneuvon asennettua turvavyöjärjestelmää aina kun se on mahdollista.

! Istuin ja alusta on sijoitettava menosuuntaan istuimena moottoriajoneuvossa käytettäessä. Käytä ISO 10542-2-hyväksyttyä hihnatyypistä 4-pistesidontajärjestelmää.

! Käytä ISO 10542-1:n mukaista 3-piste-vyötä pyörätuolissa. Pyörätuolin osat (käsinojat, pyörät) eivät saa estää turvahihnoja kulkemasta kehon päällä. Pelkän lantiovyön tai liivien käyttäminen, jotka eivät ole ISO 10542 -hyväksytyjä, ei ole riittävää.

! Etupyörät on käännettävä alustan alla siten, että ne ovat linjassa alustan kanssa ennen kiinnittämistä.

! Kaikki lisävarusteet on poistettava pyörätuolista ja kiinnitettävä erikseen ajoneuvon. Varusteet, joita ei voida poistaa käyttäjän ulottuvilta, on kiinnitettävä pyörätuoliin mutta sijoitettava irti käyttäjästä siten, että varusteiden ja käyttäjän välissä on energiaa absorboiva pehmustus.


! Myyjän tulisi tutkia tuote ennen uudelleen käyttöä kaikentyyppiseen ajoneuvon törmäykseen osalliseksi joutumisen jälkeen.


! Seuraavat istuimen ja alustan valmisteluakoskevat ohjeet on toteutettava ennen kuljetusta.

FIN KULJETTAMINEN MOOTTORIAJONEUVOISSA

Panda Futura -tuoli on hyväksytty käyttäjän kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa Combi Frame-, Multi Frame- tai Serval Frame -alustalla, kun tuoli alustoineen on sijoitettuna menosuuntaan.

Kaikki tässä kappaleessa olevia ohjeita on noudatettava turvallisuuden säilyttämiseksi.

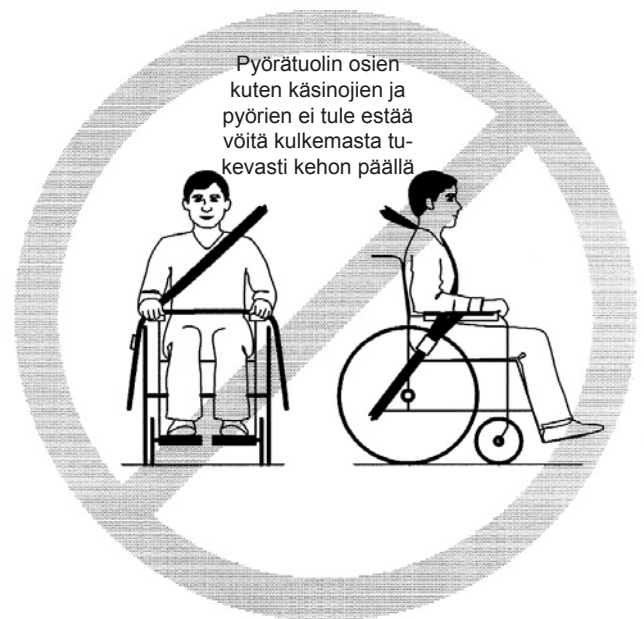

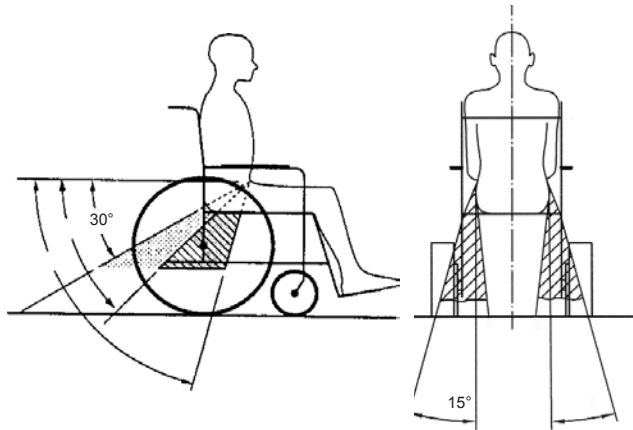


FIN TURVALLISUUS AJONEUVOSSA

- * Kiinnitä 4-pisteinen liikkeenrajoitusjärjestelmä ajoneuvoon.
- * Lukitse pyörätuoli ajoneuvon liikkeenrajoitusjärjestelmään. Käytä joko koukku- tai lukko-kiinnitystä



Käytä liikkeenrajoitusjärjestelmää hyväksytyin ISO 10542-2 ja SAE J2249 vaatimusten mukaisesti.
Sijoittaminen ajoneuvon sisällä

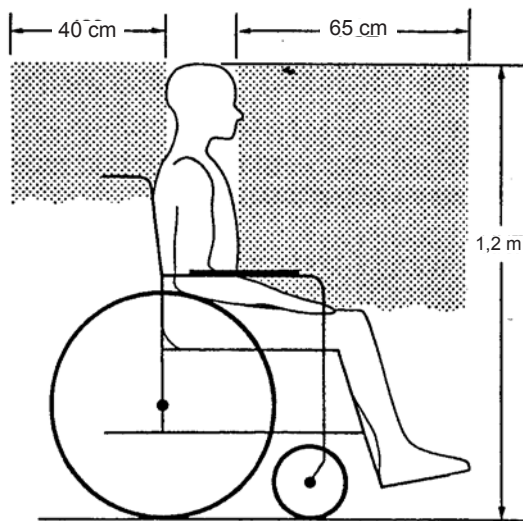

- * Poista ylimääräiset varusteet pyörätuolista ennen kuljetusta.
- * Aseta lapsi kasvot menosuuntaan.




Ole tietoinen suositusten mukaisista turva-alueista kun kuljetat lapsia ajoneuvossa.

FIN TUOTTEEN TUNNISTUS

Panda Futura standard- ja active-tuoli

- A) Sarjanumero
Kilpi on istuimessa pehmusteen alla oikealla.
- B) Valmistaja
Kilpi on istuimessa pehmusteen alla vasem-
malla.

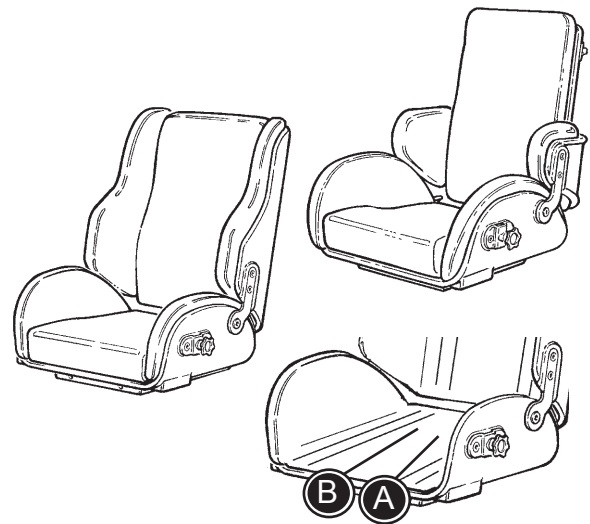

FIN MITAT

Tuoli	Ist. syvyys (cm)	Ist. leveys (cm)	Selkän. korkeus (cm)	Käsin. korkeus (cm)	Paino (kg)	Max käytt. paino (kg)	Selkän. kulma
Panda Active, koko 2	24	22	35	13-18	5,2	50	-4° - +27°
Panda Active, koko 2½	28	25	38	13-18	5,6	50	-10° - +20°
Panda Active, koko 3	31	29	40	13-27	6,2	50	-9° - +27°
Panda Active, koko 4	36	32	45	17-30	7,5	60	-6° - +17°
Panda Standard, koko 1	22	22	29	13-18	5,7	50	-3° - +28°
Panda Standard, koko 2	24	22	39	13-18	5,7	50	-15° - +32°
Panda Standard, koko 2½	28	25	41	13-28	6,2	50	-10° - +35°
Panda Standard, koko 3	31	29	44	13-27	7,3	50	-5° - +36°
Panda Standard, koko 4	36	32	52	18-27	8,7	60	-5° - +30°



Lisätiedot koskien maksimi kuormaa/käyttäjän painoa ja kuljetusta:
www.R82.com/archive/Publications/Pdf/Chart_transport.pdf

FIN TEKNISET TIEDOT

Istuin: ABS: akryylinitriilibutadieenistyreeni.
 Kierrätettävä
 Vaahtomuovi: Tulenkestävä
 Päällyys: Gemma

FIN VALMISTAJA

R82 A/S
 Parallevej 3
 8751 Gedved

FIN JAKELIJA

Algol Trehab Oy
 Karapellontie 6
 02610 Espoo
 Puh. (09) 509 91
 Faksi (09) 5099 490
 Sähköp. algol-trehab@algol.fi
 Internet www.algoltrehab.fi

Jakelijanne on löydettävissä verkkosivuilta R82.com

FIN HUOLTO

Panda Futuran päällinen on irrotettava ja voidaan pestä korkeintaan 40°:ssa. Lisäksi on tärkeää pitää istuin puhtaana käyttökelpoisuuden ylläpitämiseksi.



Avustajan tulee tarkistaa ja voidella kääntöosat ajoittain - vähintään 6 kuukauden välein.



Pyyhi lika pois kuivalla liinalla viikoittain. Älä käytä klooria tai denaturoitua alkoholia sisältäviä puhdistusaineita.



Panda Futura on tarkastettava ja kiristettävä pätevän asentajan toimesta vähintään 6 kuukauden välein toimintahäiriöiden välttämiseksi.



Ainoastaan R82:n pätevä henkilöstö saa suorittaa säätöjä, joita ei kuvata tässä käyttöohjeessa.