

ROHO®

AGILITY™ Selkätuki

KAYTTÖOPAS

JALLEENMYYJÄ: Tämä opas tulee antaa tämän tuotteen käyttäjälle

KAYTTAJA: Ennen tämän tuotteen käyttöönottoa, lue käyttöohjeet ja säilytä ne myöhempiä tarkastelua varten.

Käy osoitteessa www.therohogroup.com nähdäksesi tämän asiakirjan sisällön muilla kielillä.

SISÄLLYSLUETTELO

KAYTTÖTARKOITUS	2
TURVALLISUUSOHJEET	2-3
OSIEN ERITTELY	4-5
TUOTETIEDOT	5-6
SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIEN ASENNUS JA IRROITTAMINEN	7
AGILITYN ASENNUS JA IRROITTAMINEN	8-9
SELKÄNOJAN RUNGON KÄÄNTÄMINEN	9
LEVEYDEN SAATÖ	10
KORKEUDEN SAATÖ	11
SYVYYDEN JA KULMAN SAATÖ	12
PAALLISEN IRROITTAMINEN JA ASENNUS	13
PAALLISEN OSAT - IRROITTAMINEN / PAALLISEN OSAT - ASENNUS	13-14
ILMATYÖN TAYTTÖ JA SAATÖ	15
LISÄVARUSTEET	16
PUHDISTUS JA DESINFOINTI	17
HUOLTO, HÄVITTÄMINEN JA VIANETSINTÄ	18
PALAUTUSOIKEUS, YHTEYSTIEDOT JA RAJOITETTU TAKUU	19

ROHO, Inc. on sitoutunut kehittämään tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden muuttaa tässä käyttöoppaassa annettuja tietoja. Asiakirjan tämänhetkinen versio on saatavilla osoitteessa www.therohogroup.com.



ROHO® AGILITY™ selkäjärjestelmät ovat ROHO Inc.:n valmismaisia,

100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429

www.therohogroup.com.

Yhdysvalloissa: 1-800-851-3449, Faksi 1-888-551-3449 Sähköposti: cs@therohogroup.com

Yhdysvaltojen ulkopuolella: 1-618-277-9150, Faksi 1-618-277-6518 Sähköposti: intl@therohogroup.com

© 2012 ROHO, Inc.

Seuraavat ovat ROHO Inc.:n tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä: ROHO®, AGILITY™, and shape fitting technology®.

Zytel® on DuPont'n rekisteröity tavaramerkki.

Tämän oppaan tuotteet saattavat kuulua yhden tai useamman Yhdysvaltain tai ulkomaisen patentin tai tavaramerkin suojaan. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.therohogroup.com.

KAYTTÖTARKOITUS

ROHO® AGILITY™ Selkänoja (AGILITY) korvaa pyörätuolin vakioselkänojan.. Selkänoja AGILITY*lla tuetaan vartaloa ja lantiot. AGILITY sisältää:

- ROHO AGILITY Minimum Contour Selkänojan (AGILITY Minimum Contour)
- ROHO AGILITY Mid Contour Selkänojan (AGILITY Mid Contour)

AGILITY:n painorajoitus on 136 kg.

ROHO, Inc. suosittelee, että AGILITY selkänojan soveltuvuus käyttäjän erityistarpeisiin selvitetään sellaisen lääkärin, terapeutin tai muun asiantuntijan kanssa, jolla on kokemusta yksilön istumiseen ja asentoon liittyvistä seikoista.

TURVAOHJEET - YLEISVAROITUKSET

VAROITUKSET

- **ÄLÄ** käytä AGILITY:a ennen kuin olet lukenut ja ymmärtänyt tämän oppaan tiedot. Jos tarvitset apua, ota yhteys fysioterapeuttiin, ROHO jälleenmyyjään tai ROHO Inc.:n.
- Tässä oppaassa esitettyjen tietojen lisäksi henkilöiden, joilla on jo AGILITY asennettuna pyörätuoliin tulee noudattaa pyörätuolin valmistajan antamia ohjeita.
- Kun käytät selkänojaa, on erityisen tärkeää tarkastaa ihon kunto, erityisesti kohdissa, jotka peittävät ulkonevia luukohtia, joiden haavoittumisriski on suurempi. Ihon värimuutokset (kuten punoitus, mustelmat, violetti tai tummempi alue normaalin ihon väriin verrattuna, voi olla merkki ihon vaurioitumisesta) on huomioitava ja jos se ei häviä 30 minuutin kuluessa selkänöjan poistamisesta, lopeta selkänöjan käyttö ja ota yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen välittömästi.
- AGILITY tulee asentaa pätevän terveydenhuollon ammattilaisen toimesta.
- AGILITY on mitoitettava oikein käyttäjän ja pyörätuolin mukaisesti.
- Kuten mikä tahansa pyörätuolin lisälaitte, AGILITY saattaa vaikuttaa pyörätuolin tasapainoon. Ennen AGILITY:n käyttöönottoa, ROHO, Inc. suosittelee, että ammattilainen arvioi pyörätuoliin mahdollisesti tarvittavat muutokset.
- ÄLÄ nojaa AGILITY:n yläosaan. Tämä saattaa aiheuttaa painopisteen siirtymisen ja pyörätuoli voi kaatua.
- Ole varovainen, kun asennat, säädät tai poistat AGILITY osia välttääksesi sormien juuttumisen aukkoihin.
- AGILITY ei ole tarkoitettu yli 136 kilon painoisten henkilöiden käyttöön.
- Tarkasta AGILITY:n ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet päivittäin varmistaaksesi, etteivät ne ole kuluneet, rikkoutuneet ja että ne on kiinnitetty tiiviisti. Kiristä löysät ruuvit noudattaen tässä käyttöoppaassa olevia ohjeita. ÄLÄ jatka AGILITY:n käyttöä, jos yksikään sen osista on rikkoutunut, tai jos osaa ei voida kiristää. ROHO, Inc. suosittelee, että ammattitaitoinen asentaja tarkastaa AGILITY:n huolellisesti säännöllisin väliajoin.
- ÄLÄ kiinnitä, poista tai säädä AGILITY:a silloin kun tuolissa istuu henkilö.
- ÄLÄ käytä AGILITY:a pyörätuolin nostamiseen tai työntämiseen. Tämä saattaa aiheuttaa selkänöjan tahattoman irtoamisen pyörätuolista. Varmista, että sekä vasemman- että oikeanpuoleiset turvalukot ovat LUKITTU (🔒) -asennossa ennen kuin henkilö istuu tuoliin ja varmista, että ne pysyvät LUKITTU (🔒) -asennossa kun henkilö istuu tuolissa.
- AGILITY on yhteensopiva useiden pyörätuolien kanssa, joiden selkänöjan kulmaa voidaan säätää tai kallistaa 60 asteeseen saakka. AGILITY ei välttämättä ole oikea vaihtoehto kallistuskulman ylitettäessä 60 astetta. Käyttö yli 60 asteeseen kallistettavien tai säädettävien pyörätuolien kanssa saattaa aiheuttaa AGILITY:n irtoamisen pyörätuolista, johtaen putoamiseen ja mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen. Keskustele ammattilaisen kanssa määrittääksesi, onko AGILITY yhteensopiva henkilön pyörätuolin kanssa.

TURVAOHJEET - YLEISVAROITUKSET**VAROITUKSET**

- AGILITY on tarkoitettu käytettäväksi AGILITY päällisen, vaahtomuovialustan, ristiselkätuen kanssa (tarvittaessa), joko ilma- tai vaahtomuovitäyteen kanssa (tarvittaessa). Ilma- ja vaahtomuovitäyhteitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti.
- Suojaa AGILITY:a tylpiltä voimakailta iskuilta, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ja/tai rikkoutumisen.
- Muiden kuin ROHO:n toimittamien laitteiden ja osien käyttö saattaa mitätöidä takuun. Ota yhteys ROHO jälleenmyyjään jos tarvitset varaosia.
- Ellei tässä oppaassa ole toisin mainittu, AGILITY:a ei ole tarkoitettu käytettäväksi, eikä sitä ole testattu käytettäväksi muiden valmistajien lisävarusteiden kanssa.
- AGILITY:n osia ei ole tarkoitettu käytettäväksi erillisinä, eikä muiden pyörätuolijärjestelmien kanssa.
- AGILITY:iin tehdyt muutostyöt saattaa vaikuttaa sen suorituskykyyn ja mitätöidä takuun.
- Metalliosat saattavat kuumeta, jos ne altistuvat korkeille lämpötiloille, sekä kylmetä, jos ne altistuvat alhaisille lämpötiloille.
- AGILITY voidaan joutua poistamaan pyörätuolista ennen pyörätuolin taittamista.
- Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto, Kanadan terveysministeriö ja muut valtion virastot ovat antaneet varoituksia otsonigeneraattorien käyttöön liittyen. Pitkäkestoinen otsonialtistus saattaa heikentää joitakin tämän laitteen valmistuksessa käytettyjä materiaaleja ja saattaa vaikuttaa tuotteen suorituskykyyn ja mitätöidä tuotteen takuun.

TURVAOHJEET - MOOTTORIAJONEUVOSSA KULJETTAMINEN

VAROITUS: Aina kun on mahdollista, pyörätuolissa olevan henkilön, joka käyttää AGILITY:a, tulisi siirtyä valmistajan asentamaan ajoneuvon istuimeen ja käyttää ajoneuvon törmäys-testattua turvajärjestelmää.

AGILITY Quick Release Attachment Hardware -pikakiinnitysosa on dynaamisesti testattu käytettäväksi moottoriajoneuvossa kolmannen osapuolen testauslaitoksessa l'u.

Alkuperäiseen etutörmäystestin säätöihin sisältyi:

- AGILITY korkeudeltaan 20 tuumaa (51 cm)
- Korvike: ISO/RESNA pyörätuolin runko (SWCF); metallinen istuin; neljän pisteen, hihnatyypinen
- Hybrid III keskikokoinen mies istuen eteenpäin suunnattuna, vartalo pystyasennossa

Lisätestaukseen AGILITY:llä asennossa 6.5 tuumaa (16.5cm) olkapäiden alapuolella, sisältyi:

- AGILITY korkeudeltaan 13 tuumaa (33 cm)
- Korvike: SWCF @ 18" metallialustalla; SWTORS; ja WC-ankkuroidulla turvavyöllä
- Takakahvan laitteisto asennettuna, sekä takakahvan eteen, että taakse, erillisten testien säädöillä

Testaukset osoittivat, kuten edellä kuvattu, että AGILITY täyttää kaikki pyörätuolin istuinjärjestelmille asetetut kriteerit, kuten esitetty Osion 20 ANSI/RESNA/WC/Volume 4 Osiossa 5.1.1, "Pyörätuolin Istuinjärjestelmien Käyttö Moottoriajoneuvoissa" (Wheelchair Seating Systems for Use in Motor Vehicles).


VAROITUKSET

- Näiden varoitusten huomioimatta jättäminen saattaa johtaa vakavaan pyörätuolissa olevan henkilön, tai muiden henkilöiden loukkaantumiseen.
- AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin oikein ja turvallisesti, noudattaen kaikkia ohjeita ja varoituksia, joita tässä käyttöoppaassa on annettu.
- AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin siten, että henkilö istuu pystyasennossa ja siten, että pyörätuoli osoittaa moottoriajoneuvossa kulkusuuntaan kuljetuksen aikana. AGILITY on törmäystestattu ainoastaan pyörätuolin osoittaessa kulkusuuntaan, kuten edellä annetuissa tiedoissa on mainittu.
- AGILITY:ä tulee käyttää ainoastaan pyörätuoleissa, jotka täyttävät ISO 7176-19 suorituskykyvaatimukset ja jotka on asennettu, joita käytetään ja joita huolletaan pyörätuolin valmistajan ohjeita noudattaen.
- Pyörätuolia jossa on AGILITY, on käytettävä tehokkaan pyörätuolin varmistusjärjestelmän kanssa, joka on oikein sijoitettu, törmäystestattu lantion ja hartioiden vyön kanssa, tai Wheelchair Tiedown and Occupant Restraint System (WTORS) -järjestelmän kanssa, valmistajan ohjeita noudattaen.
- AGILITY:n yläreuna tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle olkapäiden yläpäätä, antamaan tukea mahdollisen onnettomuuden sattuessa. Käyttäjän olkapäiden yläreunan ja takaosan yläreunan välisen etäisyyden ei tule olla suurempi kuin 6.5 tuumaa (16.5 cm.).
- Jos AGILITY on mukana liikenneonnettomuudessa, katso tämän oppaan HUOLTO-osio.

Lisätietoja AGILITYN moottoriajoneuvotestauksista on saatavilla osoitteessa www.therohogroup.com.

OSIEN ERITTELY

Pakkauksen sisältö:

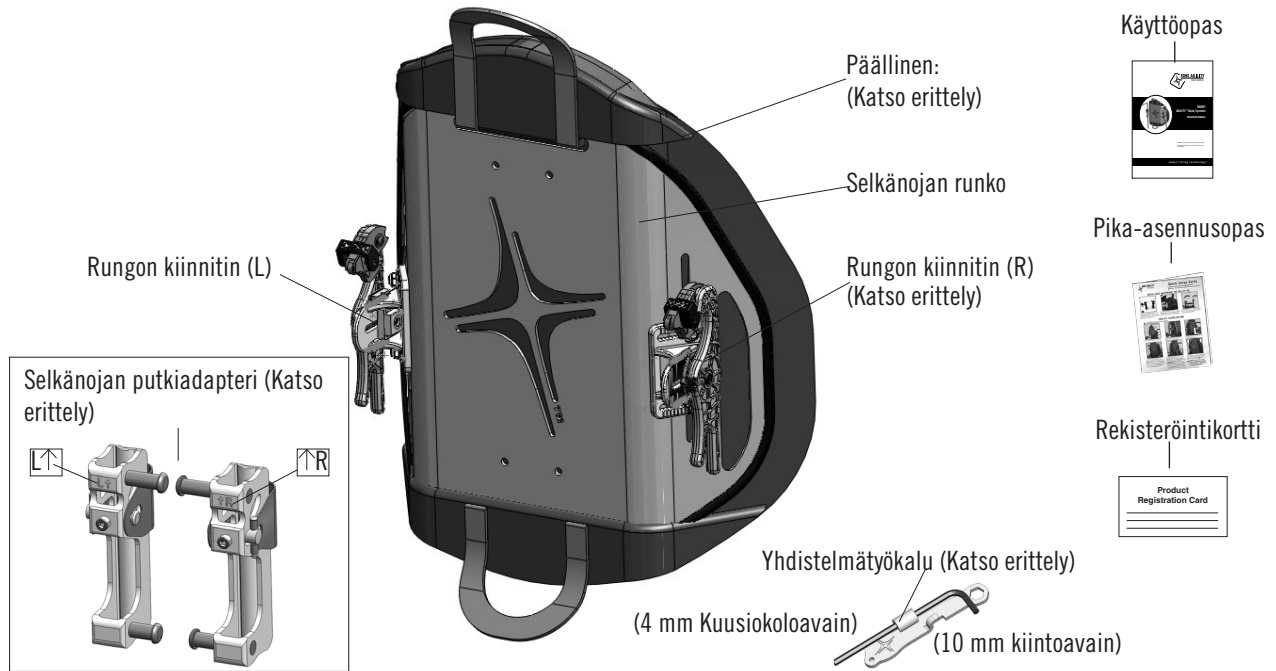


Lisäpakkauksen sisältö mallista riippuen:




Huom: Mittanauhan tai viivottimen käyttö on suositeltavaa, mutta ne eivät sisälly pakkaukseen.


Rungon kiinnitin hajoituskuva - oikeanpuoleinen (R) näkymä:

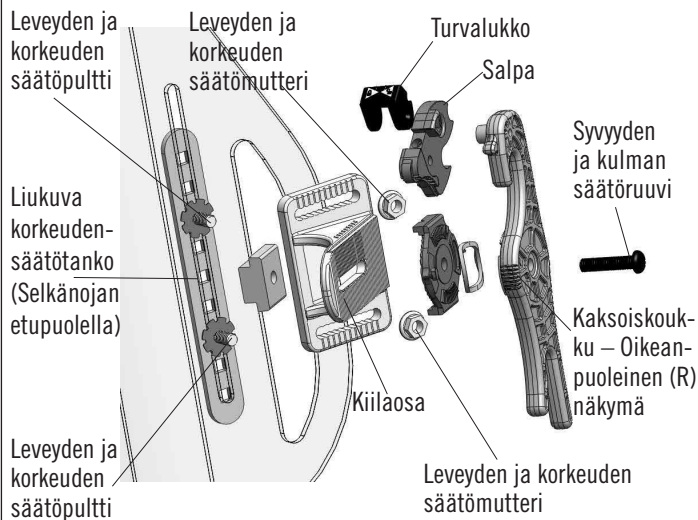

Selkänojan putkiadapteri hajoituskuva -Oikea puoli (↑R), Standardinäkymä:

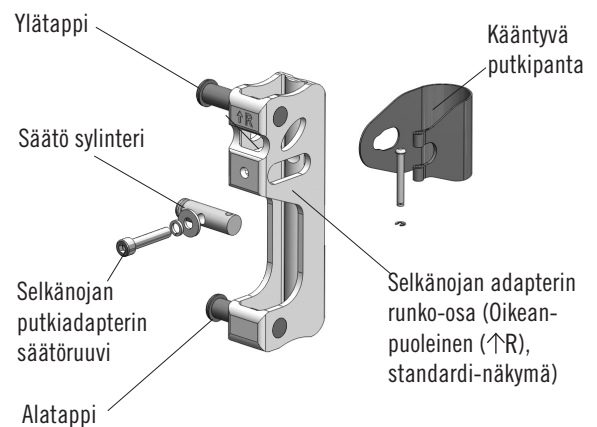


Yhdistelmäyökalun – Erottaminen ja kokoaminen voimakusiokoloavaimiksi:

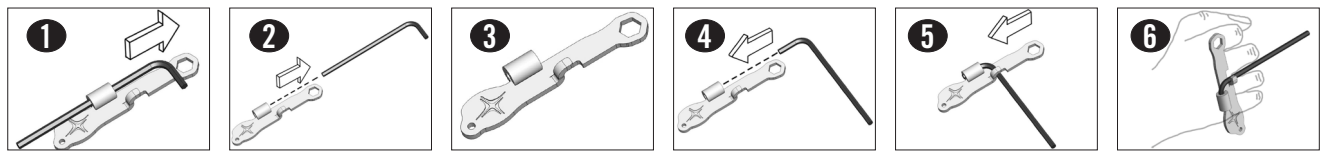

OSIEN ERITTELY

Päällisen osien erittely:

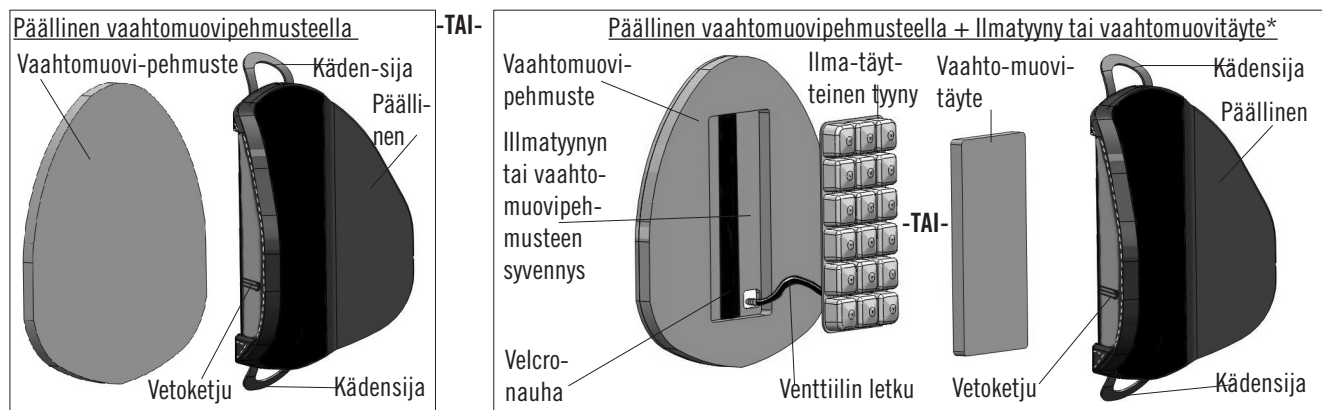

*Huom: Ilmatyynyä ja vaahtomuovipehmustetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi samanaikaisesti.

Varaosien tilaaminen: Yhdysvalloissa, ota yhteyttä ROHO:n asiakaspalveluun, soita tuotteen jälleenmyyjälle tai käy osoitteessa www.therohostore.com. Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.

TUOTETIEDOT*

Materiaalit:

Päällinen:

Etupuoli: Polyesteriä

Taus: Polyeetteri-vaahto-muovilla päällystetty nylon / polyuretaanilla päällystetty polyesteri

Läpät: Polyuretaanilla päällystetty polyesteri

Ristiselän tukityyny: Polyuretaanilla

Vaahtomuovipehmuste:

Etupuoli: Polyuretaanilla

Taus: polyeteeni

Vaahtomuovitäyte: Polyuretaanilla

Ilmatyyny:

Etupuoli: Polyeetteri polyuretaanilla

Taus: Ureetaani-kalvopäällysteinen nylon

Selkänöjanrunko: Alumiinia

Selkänöjan kiinnittimet: Zytel®

Liukuva korkeuden säätötanko Alumiinia

Selkänöjan putkiadapteri:

Adapterin runko-osa: Alumiinia

Kääntövä putkipanta ja säätö

sylinteri: Terästä

AGILITY noudattaa CAL 117, EN 1021-1, ja EN 1021-2 syytymisvaatimuksia.

Pyörätuolin yhteensopivuus:

VAROITUKSET:


AGILITY on yhteensopiva useiden pyörätuolin kanssa, joiden selkänöjan kulmaa voidaan säätää tai kallistaa 60 asteeseen saakka. AGILITY ei välttämättä ole oikea vaihtoehto kallistuskulman ylittäessä 60 astetta. Käyttö yli 60 asteeseen kallistettavien tai säädettävien pyörätuolin kanssa saattaa aiheuttaa AGILITY:n irtoamisen pyörätuolista, johtaen putoamiseen ja mahdollisesti vakavaan loukkaantumiseen. Keskustele ammattilaisen kanssa selvittääksesi, onko AGILITY yhteensopiva käyttäjän pyörätuolin kanssa.

Jäykkyydensäätöpalkit saattavat haitata asennustoimenpiteitä. Katso osio VIANETSINTÄ. Varmista, ettei jäykkyydensäätöpalkki häiritse takakahvan kiinnitysosia.

Huom: Jos adapterit on asennettu selkänöjanputkien etupuolelle, istuinsyvyyden lisämenetys tulee olemaan jopa 1 tuuman (2,5 cm).

AGILITY on suunniteltu käytettäväksi useimpien pyörätuolimallien kanssa, joissa on SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN YHTEENSOPIVUUS -kaaviota vastaavat selkänöjan putket.

AGILITY on mitoitettava oikein pyörätuolin mukaisesti, eikä se välttämättä ole yhteensopiva kaikkien pyörätuolin kanssa. Kysy neuvoa palveluntarjoajalta tai laitteen määräävältä asiantuntijalta, ovatko pyörätuolisi ja sen selkänöjanputket yhteensopivia AGILITY:n kanssa.

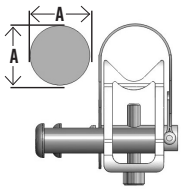SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN YHTEENSOPIVUUS					
Selkänöjan putkiadapteri (Näkymä ylhäältä katsottuna)		Säädä vastaamaan selkänöjanputkien halkaisijaa (A)			
		Pienin		Suurin	
		Tuumaa	(cm)	Tuumaa	(cm)
Standardi Yhteensopiva pyöreitten selkänöjanputkien kanssa		0.75	(2.0)	1.0	(2.5)


*HUOM: Kaikki mitat ovat arvioita.

TUOTETIEDOT* JATKU

AGILITY:n LEVEYS (W)		SAADETTAVISSA PYÖRÄTUOLIN LEVEYDEN MUKAAN			
		Pienin**		Suurin	
tuumaa	(cm)	tuumaa	(cm)	tuumaa	(cm)
14,0	(35,5)	13,0	(33,0)	14,0	(35,5)
16,0	(40,5)	15,0	(38,0)	16,0	(40,5)
18,0	(45,5)	17,0	(43,0)	18,0	(45,5)
20,0	(51,0)	19,0	(48,5)	20,0	(51,0)

Leveyden (W) mittaukset tehdään selkänöjan leveys putkien ulkopinnoista.

**Istuinsyvyydestä häviää 0.5 tuumaa (1.5 cm) jos AGILITY asennetaan pienimpään pyörätuoliin kussakin kokoluokassa.

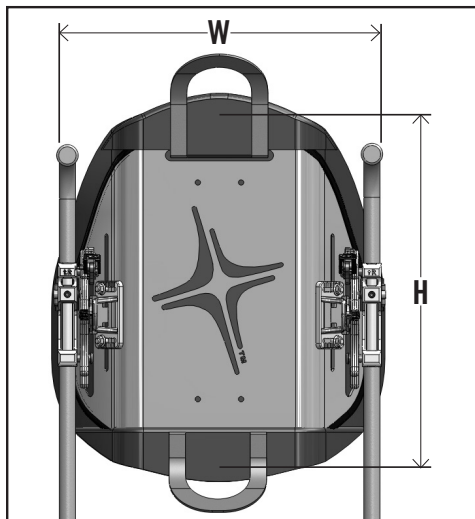

AGILITYN KORKEUS (H)		SAADETTAVA ILMATÄYTTEN KORKEUS		
tuumaa	(cm)	Tuumaa	(cm)	# Tutit
10,0	(25,5)	6,5	(16,5)	3
13,0	(33,0)	10,5	(27,0)	5
16,0	(40,5)	12,5	(32,0)	6
18,0	(45,5)	14,5	(37,0)	7
20,0	(51,0)	16,5	(42,0)	8

Korkeuden (H) mittaukset suoritetaan keskireunalta keskireunalle selkänöjan kapean ja leveän pään välillä. Huom: Päällisen kokoonpano ei sisälly korkeusmittauksiin.

Kaikki ilmatäytteet:

- Leveys: 3 tuttia, 6.5 tuumaa (16.5 cm)
- Ympärysmitta: 0.25 tuumaa (1.0 cm), joka sisältyy korkeuden ja leveyden mittauksiin
- Tutin korkeus: 1.25 tuumaa (3.0 cm) puhallettuna täyteen ilmaa

AGILITYN SYVYYS- (D) JA PAINOALUE						
AGILITY Malli	Syvyyden ja painon luvut perustuvat kertoimeen (W x H): 14 tuumaa x 10 tuumaa (35.5 cm x 25.5 cm), 16 tuumaa x 16 tuumaa (40.5 cm x 40.5 cm), ja 20 tuumaa x 18 tuumaa (51.0 cm x 45.5 cm) AGILITY Minimum Contour -mallit. 14 tuumaa x 10 tuumaa (35.5 cm x 25.5 cm), 16 tuumaa x 16 tuumaa (40.5 cm x 40.5 cm), ja 20 tuumaa x 18 tuumaa (51.0 cm x 45.5 cm) AGILITY Mid Contour -mallit.					
	Alhaisin		Keskiarvo		Suurin	
	SYVYYS					
	Syvyyden (D) mittaukset on otettu päällisen muotoillun reunan korkeimmasta kohdasta keskustaan, kootun päällisen etupinnalta kun se on täytetty ilmalla, mahdollistaen 0,5 tuuman (2,5 cm) syvenemisen. Vaahtomuovi vaihtoehtomallien syvyys tulee olemaan 0.5 tuumaa (2.5) vähemmän.					
	tuumaa	(cm)	tuumaa	(cm)	tuumaa	(cm)
AGILITY Minimum Contour	3,0	(7,5)	3,0	(7,5)	3,5	(9,0)
AGILITY Mid Contour	3,75	(9,0)	4,0	(10,0)	4,25	(11,0)
	PAINO					
	Painoalueet eivät sisällä selkänöjan putkiadaptereita. Vakio putkiadapterin painoStandardikiinnikkeillä: (0,30 kg)					
	lbs.	(kg)	lbs.	(kg)	lbs.	(kg)
AGILITY Minimum Contour	2,5	(1,1)	4,0	(1,8)	5,25	(2,3)
AGILITY Mid Contour	2,5	(1,2)	4,25	(1,9)	6,0	(2,8)

*HUOM: Kaikki mitat ovat arvioita.

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN ASENNUS


Huom: Alkuperäinen pyörätuolin selkänoja tulee poistaa pyörätuolista pyörätuolin/pyörätuolin selkänojan valmistajan ohjeita noudattaen. Älä poista tuolista selkänojan putkia.

Varmista, että pyörätuolin selkänojan putket ovat puhtaat ennen putkiadapterin asennusta.


Lukitse pyörätuolin jarrut ennen selkänojan asentamista.

Huomioi putkiadapterin merkinnät vasemmalla (L↑) ja oikealla (↑R) puolella. Esimerkkinä kuvissa saattaa näkyä ainoastaan vasemmanpuoleisen (L↑) adapterin asennus.


VAROITUS: ALA asenna AGILITY putkiadapteria kun henkilö istuu tuolissa.

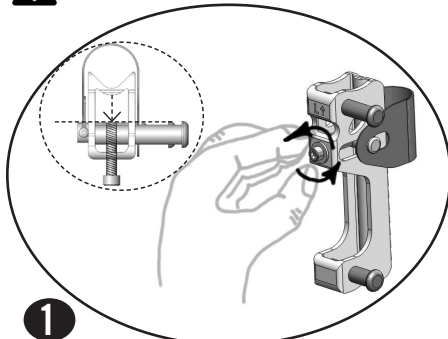


1 Löysää adapterin säätöruuvia kuten tässä on näytetty. **Huom:** Ruuvia EI tule irroittaa säätösyylinteristä.

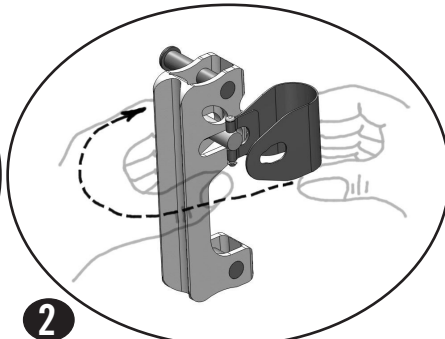


2 Paina säätösyylinterin päätä ja pujota putkipanta siitä irti. Taivuta kääntyvä putkipanta pois adapterin rungosta.

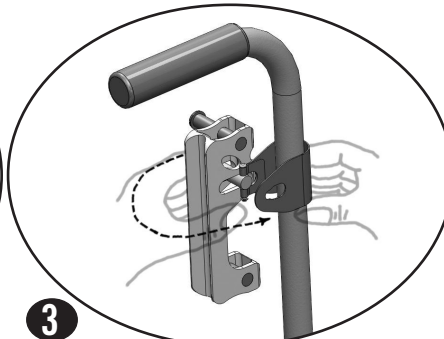


3 idä kääntyvää pantaa selkänojan putkea vasten ja kierrä selkänojan adapterin runko-osaa siten, että se painaa selkänojan putkea vasten.

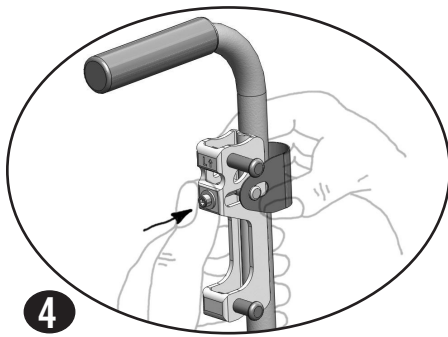

4 Paina putkiadapterin säätöruuvia peukalolla ja paina säätösyylinterinpää putkipannan aukosta läpi. Aseta pannan reiän kapea pää säätösyylinterin päässä olevaan uraan.

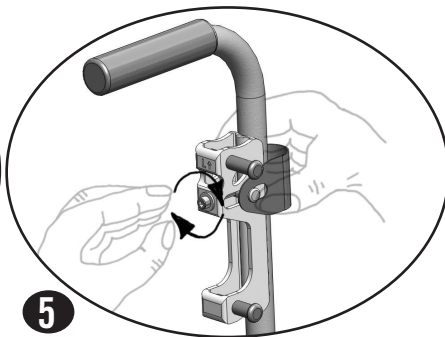

5 Pidä kääntyvää putkipantaa selkänojan putkea vasten ja kiristä selkänojan kääntyvän putkipannan säätöruuvia käsin, kunnes säätö-sylinteri on vedetty putkipantaa vasten.. (Toista kohdat 1 - 5 toisen puolen selkänojan putkiadapterin asennusta varten.)

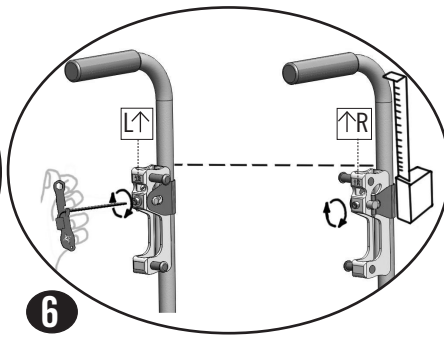


6 Kiristä selkänojan putkiadapterin säätöruuvit kuusiokoloavaimella kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää käännä sitten vielä neljänneskiertos lisää. **Huom:** Jos käytettävissäsi on momenttiavain, kiristä enintään 6,75 Newton-metriä.

TARKEAA! Varmista, että molempien selkäosan putkiadapterien ylä- ja alatapit ovat yhdensuuntaisia, molemmat adapterit on asennettu asianmukaiselle puolelle ja että molempien adaptereiden korkeus on sama.


SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIEN POISTAMINEN

Huom: oista AGILITY pyörätuolista ennen adapterien poistamista. KATSO AGILITYN POISTO.


VAROITUS: ALA poista AGILITY putkiadaptereita kun henkilö istuu tuolissa.

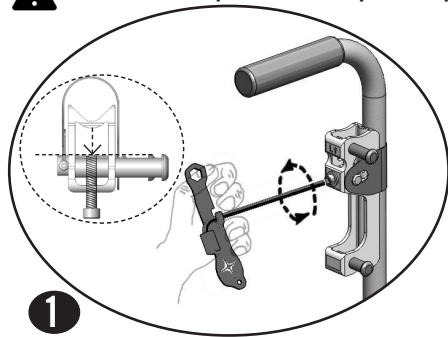

1 Löysää selkäosan putkiadapterin säätöruuvia kuten tässä on näytetty. **Huom:** Ruuvia EI tule irroittaa säätösyylinteristä.

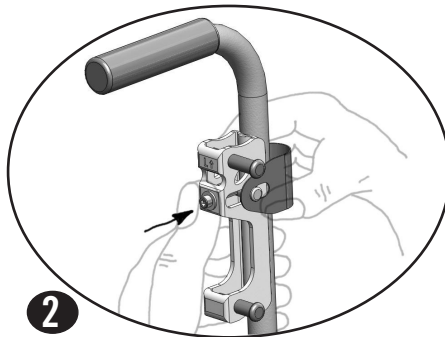

2 TPaina peukalolla adapterin säätöruuvia vasten ja nosta putkipanta pois säätösyylinterin urasta.

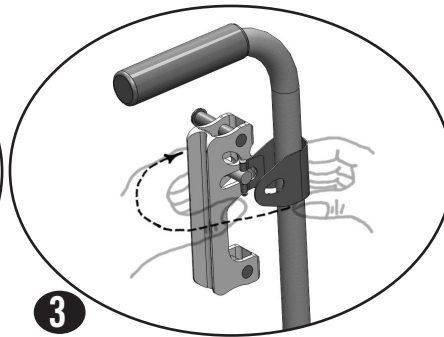


3 Kierrä selkänojan adapterin runko-osaa poisputkipannasta.


AGILITYN ASENNUS

Huom: Turvalukkojen tulee olla AUKI (🔓) -asennossa, jotta AGILITY voidaan asentaa.


! VAROITUS: ALA ASENNAGILITY:a kun henkilö istuu pyörätuolissa.

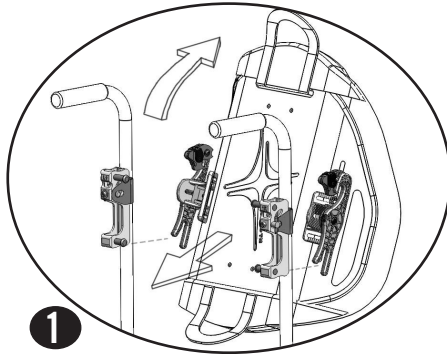


1
Kallista selkänöjan yläpäätä tuolin etuosaa kohti.

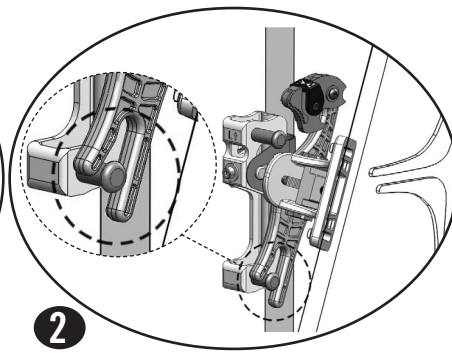


2
Aseta kaksoiskoukkujen alapää putkiadaptorien alempiin tappeihin.

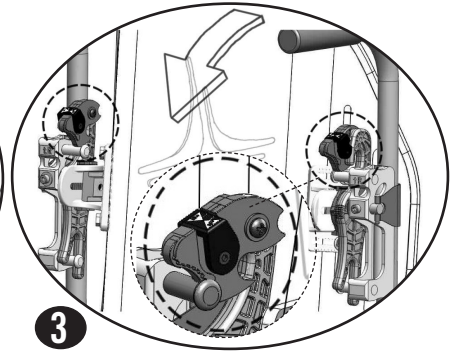

3
Kallista selkänöjaa takakahvoja kohti, kunnes salvat lepäävät ylätapeilla.

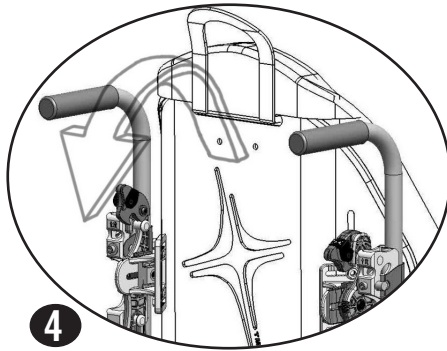


4
Nosta selkänöjaa hieman ylöspäin ja kallista se taakse selkäosan putkia kohden.
Huom: ALA kallista selkänöjaa niin paljoa, että kaksoiskoukkujen alapää irtoavat alatapeista. Kaksoiskoukkujen alapäiden tulee pysyä asetettuina alatappien päällä.

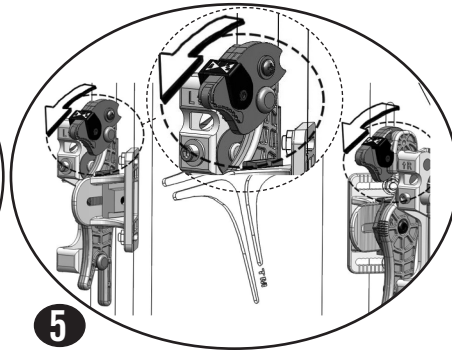

5
Paina selkänöjaa alas päin kunnes salpojen suut aukeavat ja kaksoiskoukkujen yläpäät kiertävät ylätappien ympärille. Salpojen tulee nyt olla alhaalla, suljetussa asennossa.

! TARKEAA! Varmista, että molemmat salvat on täysin suljettu. Jos salvat eivät sulkeudu, tai selkänöjan laitteisto ei kiinnity takakahvan kiinnikkeiden ylä- ja alatappeihin, katso osio VIANETSINTÄ.

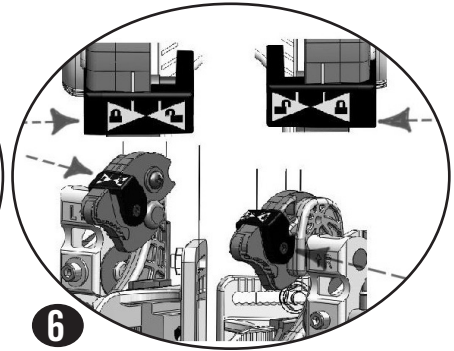

6
Lukitse salvat painamalla sekä vasenta, että oikeaa turvalukkoa keskustaa päin ja selkänosan LUKITTU (🔒) -asentoon.

! VAROITUS: Varmista, että sekä vasemman- että oikeanpuoleiset turvalukot ovat LUKITTU (🔒) -asennossa, ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin. Lukkoja testaaksesi, käytä kädensijojä vetääksesi AGILITY:a ylöspäin.


! VAROITUKSET:

ALA käytä AGILITYN kädensijaa tuolin vetämiseen, kun henkilö istuu pyörätuolissa. Kädensija on tarkoitettu ainoastaan autamaan AGILITY:n asennuksessa pyörätuoliin ja sen poistamiseksi pyörätuolista.

Varmista, että sekä vasemman- että oikeanpuoleiset turvalukot ovat LUKITTU (🔒) -asennossa ennen kuin henkilö istuu tuoliin ja varmista, että ne pysyvät LUKITTU (🔒) -asennossa kun henkilö istuu tuolissa.

Kun asennus on valmis, varmista että kaikki laitteiston osat on kiinnitetty kunnolla, ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin. Tarkista oikeat kiristysmomentit asennusohjeen mukaisista kohdista. Jos säädöissä tarvitaan muutoksia, henkilö tulee siirtää pois tuolista, tee sitten tarvittavat säädöt ja kiristä uudelleen kaikki ruuvit ennen kuin henkilö istuu takaisin pyörätuoliin.

LISÄÄ AGILITYN ASENNUKSESTA

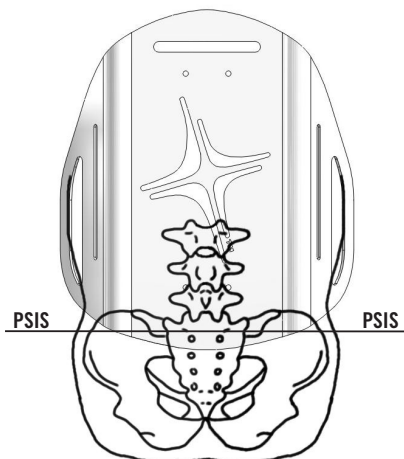


Posterior Superior Iliac -tukiranka (PSIS):

VAROITUS: Jos AGILITY:a ei ole asennettu siten, että se on kontaktissa PSIS:n kanssa, lantion tuki ja vartalon hallinta saattaa olla alhaisempi.


ROHO, Inc. suosittelee, että AGILITY:n alaosa on säädetty siten, että se on kontaktissa PSIS:n kanssa, jotta saavutetaan paras mahdollinen lantion tuki ja vartalon hallinta.

AGILITYN IRROITTAMINEN


VAROITUS: ALA poista AGILITY:a sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.

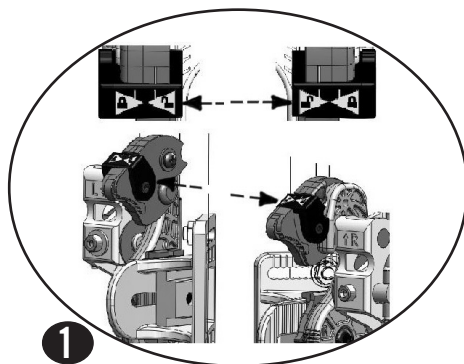

1 AVAA (🔓) turvalukot.

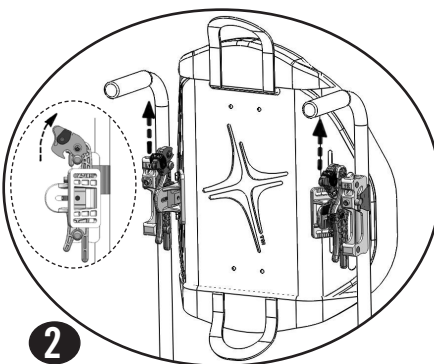


2 Avaa vasemman- ja oikean-puoleiset salvat kääntämällä salpoja ylöspäin.

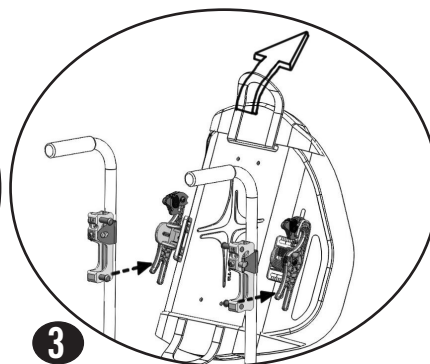


3 ylempää kahvaa apuna käyttäen, nosta AGILITY ylöspäin ja irroita se pyörätuolista.

SELKÄNOJAN RUNGON KÄÄNTÄMINEN


Huom: AGILITY tulee poistaa pyörätuolista ennen selkänöjan rungon asennon vaihtamista.

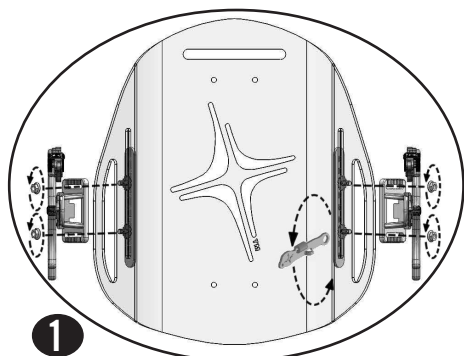

1 Poista mutterit leveyden- ja korkeuden-säätöpulttien päästä 10 mm kiin-toavaimella. Irrota kiilaosat selkänöjasta.

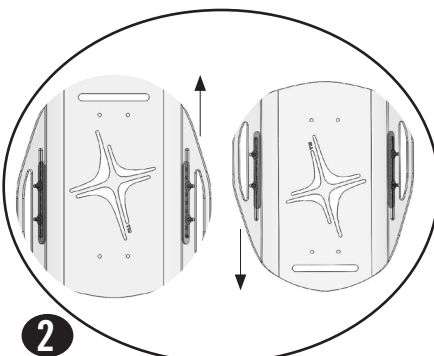


2 Käännä selkänöjan runkoa leveä tai kapea puoli ylöspäin.

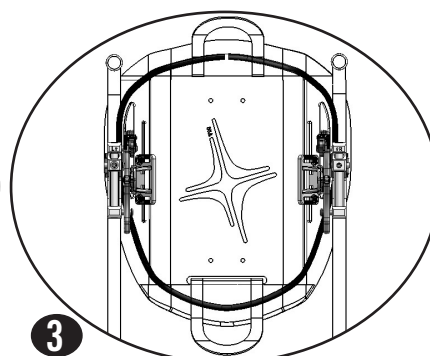

3 Katso tämän oppaan kohdat SAATÖ ja ASENNUKSE.


LEVEYDEN SAATÖ

! **VAROITUKSET:** ALA poista AGILITY:a sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.
ALÄ säädä AGILITY:n leveyttä sillä välin kun henkilö istuu pyörätuolissa.

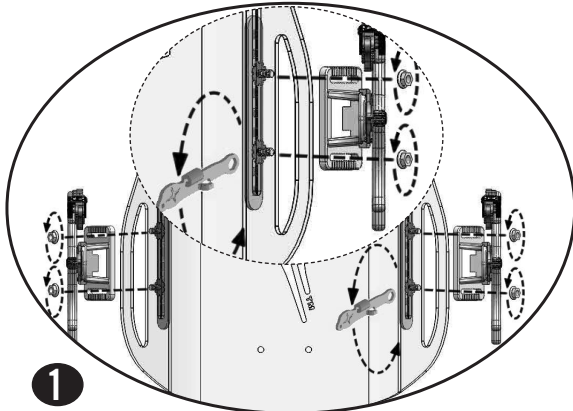


1

Katso tämän sivun yläladassa olevat LEVEYDEN SAATÖÖN liittyvät **VAROITUKSET**. Irrota AGILITY pyörätuolista ennen leveyden säätöä. Poista mutterit leveyden- ja korkeudensäätöpulttien päästä 10 mm kiintoavaimella. Irrota kiilaosat selkänojasta.

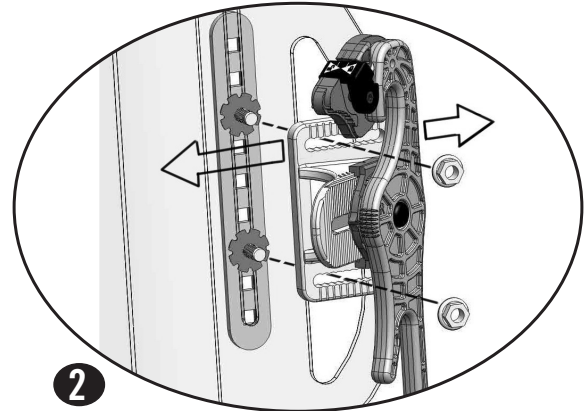

2


Tarkastele AGILITY kokotaulukkoa määrittääksesi, mitkä kiilaosan ylä- ja alaosan kohdistusurat vastaavat haluttua AGILITY leveyttä. Kun olet määrittänyt kiilaosalle oikean kohdan, pujota se takaisin leveyden -ja korkeudensäätö pultteihin.

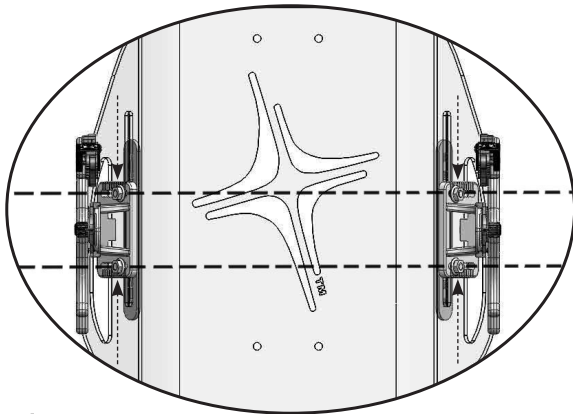

3


! **TARKEAA!** Käytä apuna kiilaosan kohdistusuria varmistaaksesi, että leveyden- ja korkeudensäätöpultit ovat samassa kohdassa kiilaosan urissa.

Asenna takaisin leveyden- ja korkeudensäätöpulttien mutterit. Kun vasen- (L) ja oikea (R) selkänojan rungon kiinnittimenosa on asetettu samalle korkeudelle, kiristä muttereita siten, että ne ovat tarpeeksi tiukassa pitääkseen rungon kiinnittintä paikallaan. Käytä 10 mm kiintoavainta tarvittaessa. Jos korkeuden säätö on tarpeen, etene kohtaan KORKEUDEN SAATÖ.

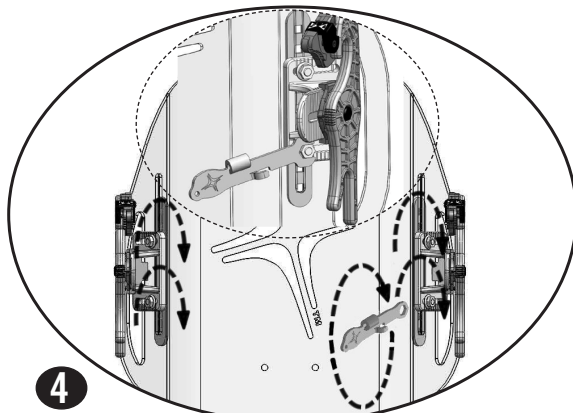

4

Kiristä leveyden- ja korkeudensäätöpultit 10 mm kiintoavainta käyttäen, kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää ja käännä sitten vielä neljänneksen verran lisää. **Huom:** Jos käytettävissäsi on momenttiavain, kiristä 4.75 +/- 0.25 Newton-metriin.

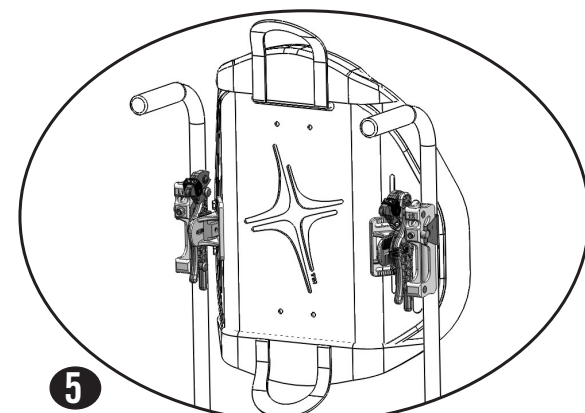


5

Asenna AGILITY pyörätuoliin. Katso AGILITYN ASENNUK.


! **VAROITUS:** Kun säätötoimenpiteet on lopetettu, varmista, että selkänoja on kunnolla kiristetty ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin.

KORKEUDEN SAATÖ


! **VAROITUS:** Korkeutta voidaan säätää henkilön istuessa pyörätuolissa, mutta säädöt tulee tehdä varovaisuutta noudattaen. Varmista, että pyörätuolin pyörät on lukittu, AGILITY turvalukot ovat LUKITTU (🔒) -asennossa, ja koko selkänoja on varmistettu ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin.

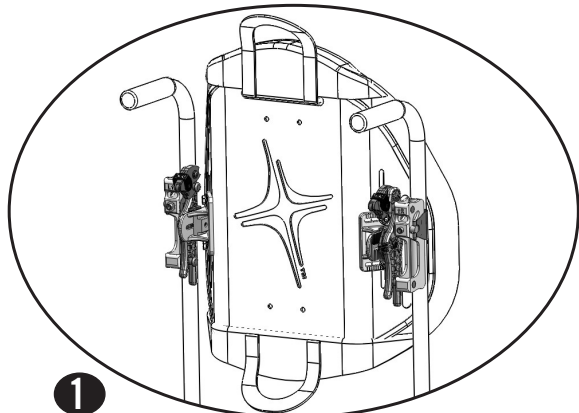


Asenna AGILITY pyörätuoliin. Katso AGILITYN ASENNUS. Henkilö voi istua pyörätuoliin. Katso tämän sivun ylälaidassa olevat KORKEUDEN SAATÖÖN liittyvät **VAROITUKSET**.

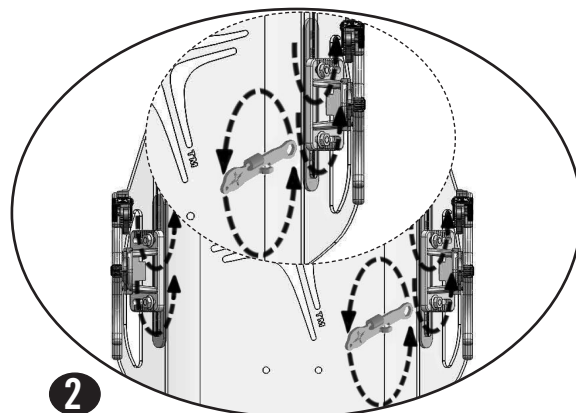


Löysytä mutterit leveyden- ja korkeuden-säätöpulttien päästä 10 mm kiintoavaimella.

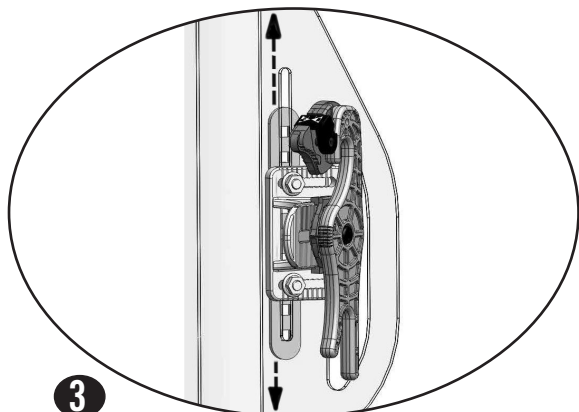

Liu'uta selkänojaa ylös- ja alas päin pystysuorissa urissa, kunnes haluttu korkeus on saavutettu.

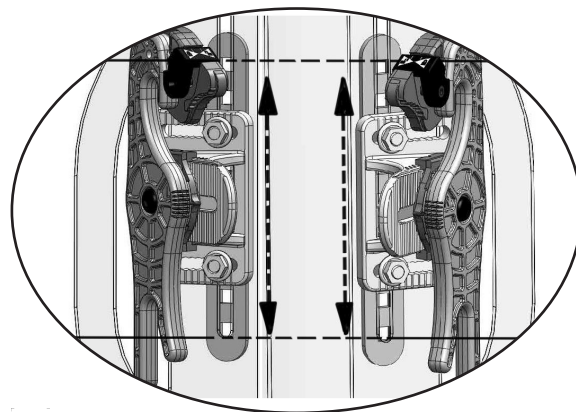

! **TARKEAA!** Laske liukuvalla korkeussäätötangolla olevien neljän muotoisten, reikien määrä, jotka näkyvät selkänojan pystysuorien urien läpi ja varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleisen (R) selkänojan laitteistot ovat samassa asemassa.

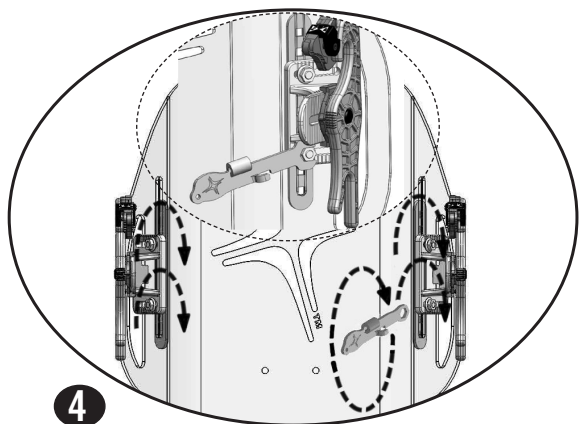

Kiristä leveyden- ja korkeussäätöpultit avoimäisestä kiintoavainta käyttäen, kunnes se tuntuu tiukalta ja käänä sitten vielä neljänneksen verran lisää. **Huom:** Jos käytettävissäsi on momenttiavain, kiristä 4.75 +/- 0.25 Newton-metriin.

! **VAROITUS:** Kun säätötoimenpiteet ovat suoritettu, varmista että laitteisto on kiinnitetty varmasti.

SYVYYDEN JA KULMAN SAATÖ


Huom: AGILITY tulee asentaa pyörätuoliin ennen istuimen syvyyden tai kulman säätötoimenpiteitä.

VAROITUKSET:

Syvyyttä ja kulmaa voidaan säätää henkilön istuessa pyörätuolissa, mutta säädöt tulee tehdä varovaisuutta noudattaen. Jos asentajan mielestä syvyyden tai kulman säätö on liian vaikeaa tai vaarallista silloin kun henkilö istuu tuolissa, siirtäkää henkilö turvallisesti pois tuolista.


Varmista, että pyörätuolin jarrut on lukittu, AGILITY turvalukot ovat LUKITTU (🔒) -asennossa, ja koko laitteisto on varmistettu ennen kuin henkilö istuu pyörätuoliin.

ALA kierrä syvyyden- ja kulmansäätötappeja enempää kuin kolme (3) kokonaista kierrosta. Jos syvyyden- ja kulmansäätötappeja kierretään liikaa auki, selkänöjan osat alkavat irrota, minkä johdosta syvyyden ja kulman säätöruuvien turvallinen kiristäminen voi estyä. Siirrä henkilö heti pois pyörätuolista jos pultteja on löysäty liikaa. Ota yhteys ROHO, Inc. :n maahantuojaan saadaksesi lisätietoja selkänöjan uudelleen kokoamiseksi. Katso YHTEYSTIEDOT.

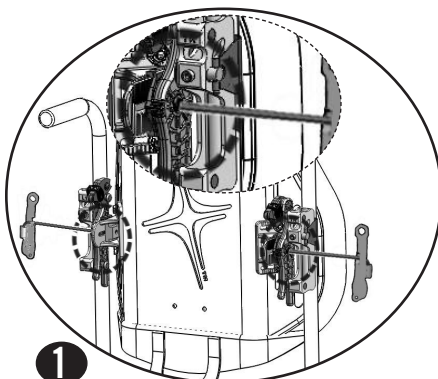


Katso tämän sivun yläaidassa olevat **VAROITUKSET**. Löysää vasemman- ja oikeanpuoleiset syvyyden- ja kulmansäätöpultit kuusiokoloavainta käyttäen:


- 2 - 3 täyttä kierrosta **ISTUIMEN SYVYYDEN SÄÄTÄMISEKSI**
- ainoastaan 1 - 2 täyttä kierrosta **ISTUIMEN KULMAN SÄÄTÄMISEKSI**

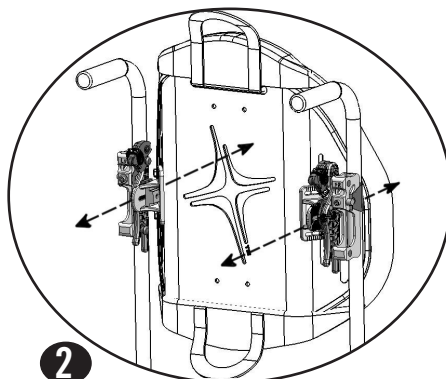


ISTUIMEN SYVYYDEN SÄÄTÄMISEKSI: Liu'uta selkänöjaa eteen- tai taakse päin halutun syvyyden saavuttamiseksi. **Huom:** Jos kiilaosat eivät liu'u, katso VIANETSINTÄ.

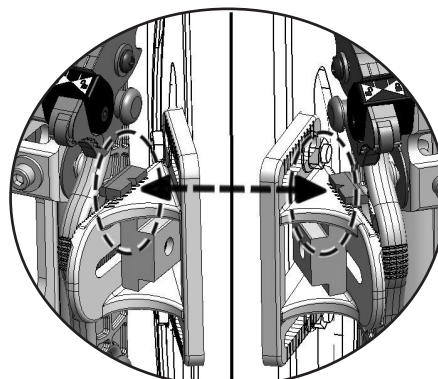


TARKEAA! Varmista, että syvyyden vasemman- ja oikeanpuoleiset asemat ovat samat, vertaamalla kiilojen yläpinnoissa olevia merkkejä.

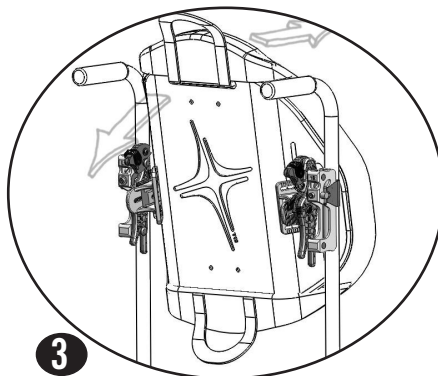

KULMAN SÄÄTÄMISEKSI: Kallista selkänöjaa eteen tai taakse päin, kunnes haluttu kaltevuus on saavutettu.

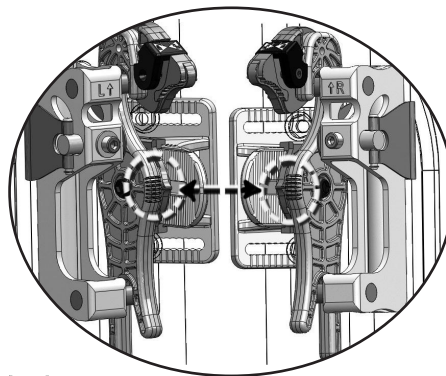

TARKEAA! Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset kaksoiskoukut kallistuvat samaan asentoon vertaamalla kaksoiskoukujen päissä olevia merkkejä.

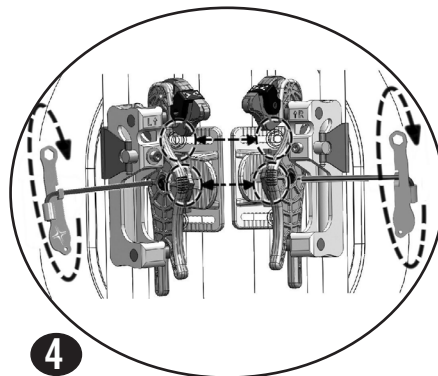

Pidä selkänöjaa asennossa. Kiristä vasemman- ja oikeanpuoleisia syvyyden- ja kulmansäätöpultteja kuusiokoloavainta käyttäen, kunnes kiristyksessä ei tunnu enää löysää ja käännä sitten vielä neljänneksen verran lisää. **Huom:** Jos käytettävissäsi on momenttiavain, kiristä 3.25 +/- 0.25 Newton-metriin.

VAROITUS: Kun syvyyden ja kulman säätötoimenpiteen ovat suoritettu, varmista että koko selkänöja on kiinnitetty varmasti. Tarkista oikeat kiristysmomentit asennusohjeiden asianmukaisista kohdista. Jos henkilö istuu tuolissa ja syvyyden ja kulman säätötoimenpiteitä tarvitaan, katso tämän osion alussa olevat **VAROITUKSET** ja tee tarvittavat säätötoimenpiteet. Kiristä ja varmista selkänöja uudellen.

PÄÄLLISEN IRROITTAMINEN JA ASENNUS

VAROITUS: ALA poista tai asenna AGILITYN päällistä kun henkilö istuu pyörätuolissa.
ALÄ käytä AGILITYÄ ilman päällistä ja vaahtomuovipehmustetta ja aseta ilma- tai vaahtomuovitäyte tarvittaessa.


PAALLISEN IRROITTAMINEN:



1 Irroita päällisen läppä tarrakiinnityksestä selkäosan rungon takaosan leveästä päästä.




2 Leveästä päästä alkaen, vedä päällinen pois selkänojasta, irroittaen se tarrakiinnityksistä, jotka ovat selkänojanrungon etupuolella.

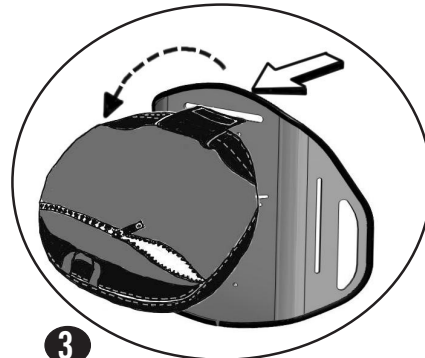


3 Käännä päällis kokonaan selkänojan kapean puolen yli.
Irroita päällisen läppä tarrakiinnityksestä selkänojan takaosan kapeasta päästä. Vedä läppä pois selkänojan kapean pään aukosta.

PAALLISEN ASENNUS:

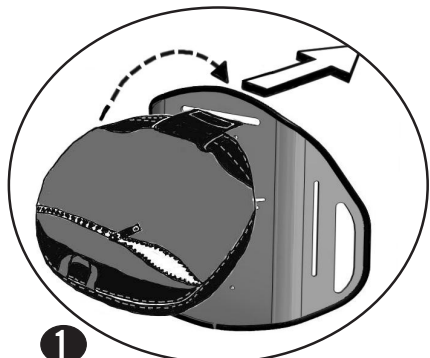

1 Työnnä läppä takakautta selkänojan kapean pään aukon läpi.
Paina läpän tarra yhteen selkänojan rungon tarran kanssa.
Käännä päällinen kokonaan selkänojan kapean puolen yli.

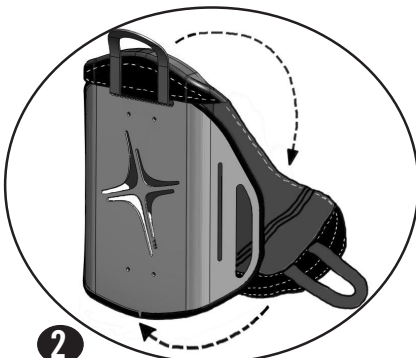

2 Varmista, että päällisen vetoketjupuoli on asetettu selkänojaa kohden.
Painele päällinen vasten selkänojan rungon etupuolen tarroja.



3 Vedä päällisen leveä pää selkänojan rungon leveän reunan yli.
Paina läpän tarranauha yhteen selkänojan leveän pään tarran kanssa.

PAALLISEN OSAT - IRROITTAMINEN

VAAHTOMUOVIPEHMUSTEEN, ILMATYÖNYN TAI VAAHTOMUOVITÄYTEEN IRROITTAMINEN:


1. Avaa päällisen vetoketju.
2. Poista vaahtomuovipehmuste päällisen sisältä, mutta älä irroita ilmatyyny- tai vaahtomuovitäytettä.
3. Irroita ilmatyyny tai vaahtomuovitäyte syvennyksen tarrakiinnityksestä.
4. Jos syvennyksessä oli ilmatyyny kiinnitettynä, vedä venttiilin letku pois vaahtomuovipehmusteen reiän läpi.

PAALLISEN OSAT - ASENNUS


VAAHTOMUOVIPEHMUSTEEN ASENNUS:

1. Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuovipehmuste päällisen sisälle.
Huom: Vaahtomuovipehmusteen leveä ja kapea pää tulee olla asetettuna päällisen leveän ja kapean pään mukaisesti.
2. Sulje päällisen vetoketju.
3. Asenna päällinen selkäosan runkoon.


VAAHTOMUOVIPEHMUSTE ILMATYNYLLÄ - ASENNUS:

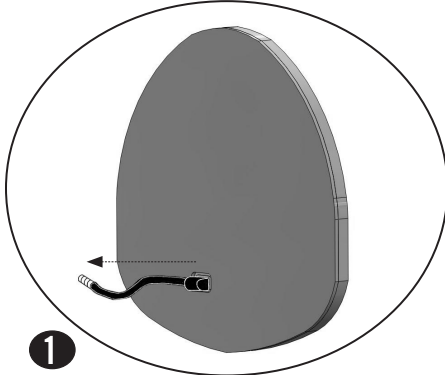


1
Aseta ilmatyynyn kankainen takaosa syvennykseen, ja aseta ilmantäyttöventtiilin letku syvennyksen kulman reiän kohdalle. Liu'uta ilman-täyttö-venttiilin letku reiän läpi.

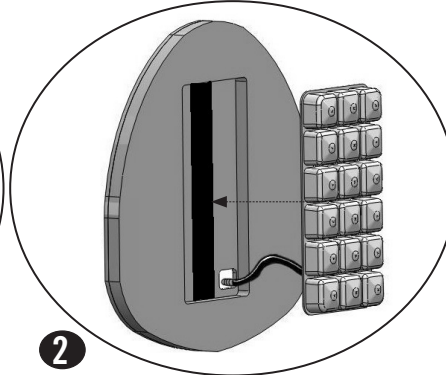


2
Aseta ilmatyyny syvennykseen. Painele ilmatyynyn kankainen takaosa huolellisesti syvennyksen tarraa vasten.

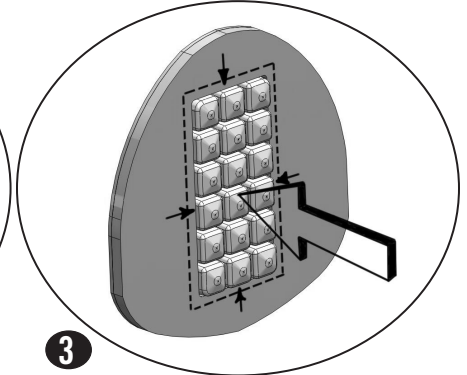


3
Työnnä ilmatyynyn ulkoreunat vaahtomuovialustan kerrosten väliin juuri syvennyksen reunan alle.

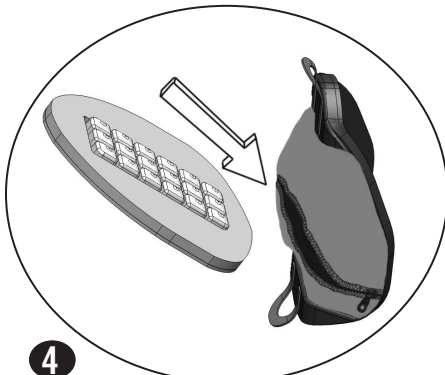

4
Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuovialusta ilmatyynyillä päällisen sisälle.
Huom: Ilmatyynyn tulee olla asetettu päällisen etupäätä kohti. Vaahtomuovialustan leveän ja kapea pään tulee olla asetettuna päällisen leveän ja kapean pään mukaisesti.

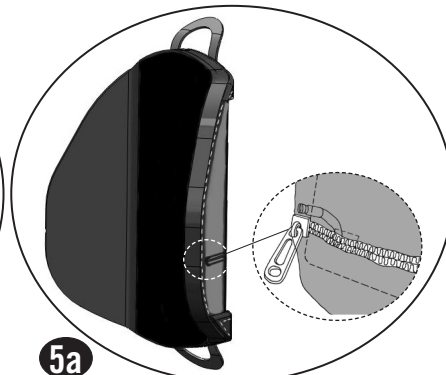

5a
a. Jos ilmatäytettä EI tarvitse säätää:
Aseta venttiiliin letku vetoketjullisen alueen sisälle.
Sulje päällisen vetoketju.
Asenna päällinen selkänöjan runkoon.

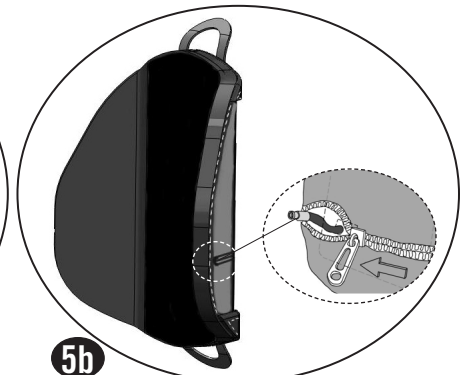

5b
b. Jos ilmatäytettä tarvitse säätää:
Sulje päällisen vetoketju osittain, mahdollistaen pääsyn venttiiliin.
Asenna päällinen selkänöjan.
Katso ILMATÄYTTEEN SAATÖ.

VAAHTOMUOVIPEHMUSTE VAAHTOMUOVITÄYTTEELLÄ - ASENNUS:

1. Aseta vastakkain vaahtomuovitäytteen takaosan tarranauha vaahtomuovipehmusteen etuosan syvennykseen tarranauhan kanssa ja paina ne yhteen varmiistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.
2. Avaa päällisen vetoketju ja aseta vaahtomuovialusta, jossa on vaahtomuovipehmuste päällisen sisälle.
Huom: Vaahtomuovialustan vaahtomuovipehmuste osan tulee olla asetettu päällisen etupäätä kohti. Vaahtomuovialustan leveän ja kapea pään tulee olla asetettuna päällisen leveän ja kapean pään mukaisesti.
3. Sulje päällisen vetoketju.
4. Asenna päällinen selkänöjan runkoon

ILMATYÖNYN TAYTTÖ JA SAATÖ


VAROITUKSET

- **TARKISTA PAIVITTAIN ETTEI TYÖNY VUODA!**
- Ilmatyönyä tulee käyttää siten, että ilmakennot osoittavat pyörätuolin etuosaa kohti.
- Käyttäjän mukavuus saattaa kärsiä, jos ilmatyöny:
 - ei ole asetettu oikealle kohdalle
 - ei ole oikean kokoinen vaahto-muovi-alustaan nähden
 - on täytetty liikaa tai ei ole täytetty tarpeeksi
- Jos vaikuttaa siltä, että ilmatyöny vuotaa, katso VIANETSINTA. Jos ilmatyöny vuotaa edelleen, vaihda ilmatyöny tilapäisesti vaahtomuovipehmusteeseen ja ota yhteys ROHO Inc.:n tai kansainväliseen jälleenmyyjäsi. Katso YHTEYSTIEDOT.
- Muutokset ulkoisessa ilmanpaineessa saattaa edellyttää ilmatyöny säätämistoimenpiteitä. Tarkista ilmatyöny tila kun ulkoinen ilmanpaine muuttuu.
- Säilytä ilmatyöny kaukana terävistä esineistä, jotka voivat puhkaista ilmakennot, johtaen ilman vuotamisen.

- Jos ilmatyöny on ollut alle 32°F / 0°C asteen lämpötilassa ja se tuntuu tavanomaista jäykemmältä, anna ilmatyöny lämmet huoneenlämmössä ja avaa sitten kulman ilma-venttiili. Rullaa ilmatyö kasaan ja rullaa se sitten auki, kunnes polyuretaania on taas pehmeää ja notkeaa. Kertaa ilmatyöny säätö-toimenpiteet ennen käyttö-ottoa.
- **ALA:**
 - käytä ilmatyönyä istuintyönyä.
 - altista pehmustetta kuumuudelle, avotulelle tai kuumalle tuhkalle.
 - käytä venttiiliä ilmatyöny kantamiseen tai vetämiseen.
 - käytä ilmatyönyä kelluntavälineenä (esim. pelastusvälineenä).
 - käytä sekä ilmatyönyä- että vaahtomuovipehmustetta samanaikaisesti.
 - käytä muita kuin ROHO Inc.:n tuotteita pumppuna, vaahtomuovipehmusteena tai korjaussarjana ilmatyöny kanssa. Muuten saatat mitätöidä tuotteen takuun.

ILMATYÖNY SAATÖ:


Huom: Ennen ilmatyöny säätötoimenpiteitä, päällisen ja vaahtomuovialustan tulee olla kunnolla asennettu selkänöjan runkoon. AGILITY:n tulee olla kunnolla asennettu ja säädetty pyörätuoliin.

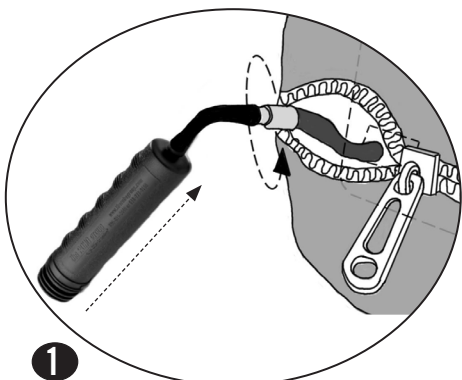

1

Liu'uta pumpun suutin venttiiliin päälle ja käännä venttiili auki vastapäivään.


Täytä ilmatyöny ilmalla, kunnes kennot pullistuvat.

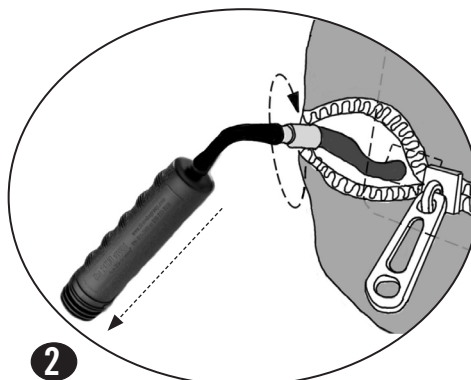

2

Purista pumpun kumiletkeä ja kierrä venttiiliä myötäpäivään sen sulkemiseksi.

Irrota pumppu.

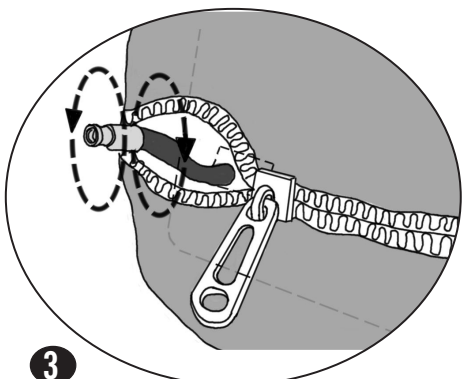


3

VAROITUS: Siirrä henkilö turvallisesti pyörätuoliin.

Henkilö voi istua pyörätuolissa tavanomaisessa asennossa.

Kierrä venttiiliä hitaasti **vastapäivään** päästääksesi ulos ilmaa, kunnes henkilö istuu mukavasti.

Kierrä venttiiliä **myötäpäivään** sulkeaksesi sen.

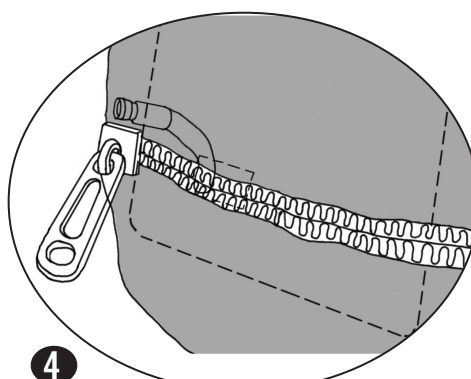

4

VAROITUS: Siirrä henkilö turvallisesti pyörätuolista.

Irrota vetoketju lähinnä oleva päällisen läppä.

Aseta venttiiliin letku vetoketjun sisälle.

Sulje päällisen vetoketju ja kiinnitä läppä takaisin selkänöjan runkoon.

LISÄVARUSTEET

RISTISELÄN TUKITYYNY:

Ristiselän tukityyny antaa lisätukea ristiselän alueelle. (Ei tule kaikkien mallien mukana.)

Pakkauksen sisältöön kuuluu koukku- ja silmukkatarranauhat. Tarranauhan koukku puoli on esikiinnitetty ristiselän tukityynyn takaosaan.

Ristiselän tukityynyn asennus:

1. Irrota vetoketju lähimpänä oleva päällisenläppä ja avaa päällisen vetoketju.
2. Aseta ristiselän tukityyny päällisen sisälle, asetettuna selän kaaren kohdalle, tai kohtaan, missä se tuntuu mukavimmalta.
Huom: Ristiselän tukityyny voidaan sijoittaa joko vaahtomuovipehmusteen eteen tai taakse.
Ilmatynteisissä malleissa se suositellaan asetettavaksi vaahtomuovipehmusteen taakse.
Sen asettaminen ilmatyynyn eteen saattaa haitata ilmatyynyn suorituskykyä.
3. Irrota tarranauhan liimapinnan suojapaperi silmukkapuolelta ja asettele ristiselän tukityyny haluttuun asentoon.
Huom: Jos silmukkainen tarranauha on liimattu päällisen sisäpuolelle, tarranauha voidaan joutua vaihtamaan päällisen useamman pesukerran jälkeen.
4. Sulje päällisen vetoketju ja kiinnitä päällisen läppä uudelleen selkänöjan runkoon.

Ristiselän tukityyny irrottaminen:

1. Irrota vetoketju lähimpänä oleva päällisläppä avaa päällisen vetoketju.
2. Irrota koukku- ja silmukkakiinnikenauhat varovaisesti toisistaan.

NISKA-/PÄÄTUKI:


Huom: Ennen toisen valmistajan niska-/päätuken asentamista, kysy neuvoa lääkäriltä tai palveluntarjoajalta varmistaaksesi, että niska-/pää-tuki on yhteensopiva AGILITY:n kanssa.

VAROITUKSET: ALA asenna AGILITY:yn niska-/päätukea kun henkilö istuu pyörätuolissa.

Huomioi kaikki varoitukset ja varotoimet, jotka on lueteltu AGILITY selkätukijärjestelmien käyttöoppaassa, kun asennat toisen valmistajan niska-/päätuken.

AGILITY:a ei ole testattu kolmannen osapuolen valmistamien niska-/päätukien kanssa. Jos niska-/päätuki on tarpeen, seuraa valmistajan asennus- ja turvallisuusohjeita.

VAROITUS: AGILITY:n muuttaminen, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen, lisäreikien poraaminen toisen valmistajan niska-/päätuken asentamiseksi saattaa mitätöidä AGILITY -takuun.

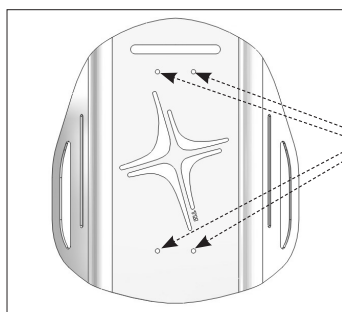

Valmiiksi poratut reiät universaalien niska-/päätuken kiinnittämistä varten.

Huom: Valmiiksi poratut reiät eivät ole saatavilla AGILITY malleissa, jotka ovat 10 tuumaa (25.5cm) korkeita.

Niska-/päätuken asentamista varten, tutustu maahantuojaan tuotetietoihin ja ohjeisiin, jotka tulevat niska-/päätuken mukana.

MUUT LISÄVARUSTEET:

Tutustu tuotetietoihin, jotka tulivat toisen ROHO lisälaitteen mukana.

PUHDISTUS JA DESINFOINTI

Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi erillistä toimenpidettä. Puhdistus TULEE suorittaa ennen desinfiointia.






















Huom: Tuote TULEE puhdistaa ja desinfioida ja sen toiminta on tarkistettava aina käyttäjää vaihdettaessa.

VAROITUS: Jos käytetään valkaisuainetta, seuraa valkaisuaineen pakkauksen turvallisuusohjeita.

VAROITUS: ÄLÄ käytä hioma-aineita kuten teräsvillaa tai hankaustyynyjä AGILITY:n osien puhdistukseen.
ÄLÄ käytä puhdistusaineita, joissa on petrolia tai orgaanisia liuotteita [eli esimerkiksi asetonia, tolueenia, metyylietyy liketonia (MEK), maaöljyä, kuivapesunesteitä, liimanpoistajia] AGILITY:n osien puhdistukseen.



= Pyyhi kostealla liinalla

AGILITY Osa	Puhdistus:	Desinfiointi:
Selkänojan runko, selkänojan rungon kiinnikkeet, selkänojan putkiadapterit hajoituskuva:	  Käsipesu lämpimässä (40°C) vedessä saippuan ja pesusienen kanssa. Huuhdo puhtaalla vedellä. Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua kunnolla.	  Pyyhi hellästi kostealla liinalla ja kotitalous yleisdesinfiointiaineella. Huuhdo puhtaalla vedellä. Pyyhi kuivaksi puhtaalla liinalla ja anna kuivua kunnolla.
Päällinen: Huom: Irrota vaahto-muovi- ja ilmatyyny ennen puhdistamista ja desinfiointia. Varmista kahvan koukku- ja silmukatarranauhat päällisen leveässä päässä. Käännä nurinpäin. Sulje vetoketju kulumien välttämiseksi.	  Pese pesukoneessa lämpimässä vedessä (40°C) miedolla pesuaineella. Kuivaa viileässä lämpötilassa kuivausrummussa.	 +  Tai   Pese käsin lämpimässä (40°C) vedessä käyttäen perusvalkaisuainetta sekoitussuhteessa 1:10 veteen nähden. Huuhtelee kauttaaltaan puhtaalla vedellä. Päällisen voi myös konepestä kuumassa (60°C) vedessä desinfiointin suorittamiseksi. Ilmakuivaa.
Vahtomuovitäyte ja ristiselän tukityyny: Huom: Irrota vahtomuoviosat päällisestä ennen puhdistustoimenpiteitä	  Pyyhi kevyesti kostealla liinalla. ALA käytä saippuaa. ALA upota veteen. Pyyhi puhtaalla liinalla. Anna kuivua ennen asetat päällisen takaisin.	Huom: Desinfiointiaineet EIVAT toimi tehokkaasti huokoisilla pinnoilla kuten vaahtomuovilla. Vaihtovahtomuoviosia voi ostaa erikseen. Likaisia ja tahraantuneita vaahtomuoviosia EI SAA siirtää käyttäjien välillä.
Ilmatyyny: Huom: Poista ilmatyyny päällisestä ennen sen puhdistamista ja desinfiointia. Varmista, että venttiili on kiinni. ALA päästä vettä tai puhdistusaineita ilmatyynyn sisään.	    Upota ilmatyyny suureen pesualtaaseen lämpimään veteen (40°C). ROHO, Inc. suosittelee nestemäisen miedon käsi pesuaineen, pyykinpesuaineen tai muiden yleispesuaineiden käyttöä. Hankaa tynyn kaikki pinnat kevyesti pehmeällä muovisella harjalla, sienellä tai pesulapulla. Huuhdo puhtaalla vedellä. Ilmakuivaa. ÄLÄ konepese tai rumpukuivaa. ÄLÄ altista suoralle auringonvalolle.	 +     Käsipesu lämpimässä vedessä (40°C), jossa on yksi osa nestemäistä kotikäyttöön tarkoitettua valkaisuainetta ja yhdeksän osaa vettä. Huuhdo perusteellisesti puhtaalla vedellä. Ilmakuivaa. ÄLÄ konepese tai rumpukuivaa. ÄLÄ käsittele autoklaavissa.

HUOLTO

Tarkasta AGILITY ruuvit, kiinnikkeet ja kannattimet päivittäin varmiistaaksesi, etteivät ne ole kuluneet, rikkoutuneet ja että ne on kiinnitetty tiukasti. Kiristä löysät ruuvit noudattaen tässä käyttöoppaassa esitettyjä ohjeita.

VAROITUS: ALA jatka AGILITY:n käyttöä, jos jokin sen osista on rikkoutunut, tai jos osaa ei voida kiristää. ROHO, Inc. suosittelee, että ammattitaitoinen asentaja tarkastaa AGILITY:n huolellisesti säännöllisin väliajoin.

HÄVITTÄMINEN

Tämän oppaan osilla ei ole tietävästi ympäristöön haitallisesti vaikuttavia ominaisuuksia, jos tuotetta käytetään asianmukaisesti ja se hävitetään oikein. Tuote ja/tai sen osat tulee hävittää alueesi säädösten ja lainsäädännön mukaisesti. **EI SAA POLTTAA.**

VIANETSINTÄ

Jos AGILITYN asennuksen ja säätämisen yhteydessä on hankaluuksia, tarkista seuraavat kohdat:

SELKÄNOJAN PUTKIADAPTERIN ASENTAMINEN:

1. Varmista, että sekä vasemman- (L↑) että oikeanpuoleiset (↑R) selkänöjan putkiadapterit ovat suorassa pyörätuolin runkoon nähden, eivätkä ne ole kiertyneitä.
2. Varmista, että sekä vasemman- (L↑) että oikeanpuoleiset (↑R) adapterit ovat samalla korkeudella. Käytä mittanauhaa tai viivotinta, jos se on tarpeen.
3. Tavanomainen asennuskohta adapterin kiinnikkeille on selkänöjanputkien takapuolella. Jos stabilointitanko häiritsee adapterin osia kun se on asennettu tavanomaiseen kohtaan, adapterin kiinnikkeet voidaan asentaa selkänöjan putkien etupuolelle. Kummassakin suunnassa, vasemmalla (L↑) ja oikealla (↑R) adapterin suuntamerkkien pitäisi sijaita oikeassa kohdassa asentajan näkökulmasta katsottuna.


AGILITYN ASENTAMINEN:

1. Varmista, että sekä vasemman- (L↑) että oikeanpuoleiset (↑R) selkänöjan putkiadapterit ovat suorassa pyörätuolin runkoon nähden, eivätkä ne ole kiertyneitä.
2. Varmista, että leveysasetus on oikea kyseiselle pyörätuolille. Selkänöjanputkien leveydet saattavat vaihdella. Selkänöjan laitteisto on asennettu tehtaassa useimmille pyörätuolille soveltuvaksi. Jos selkänöjan laitteisto ei kiinnity kunnolla selkänöjan kiinnikkeiden ylä- ja alapuoleihin, tai jos salvat eivät sukeudu, leveyden säätö saattaa olla tarpeen. Säädä leveys kuten kohdassa LEVEYDEN JA KORKEUDEN SAATÖ on kuvattu. Ihanteellisen leveysasennon löytäminen voi vaatia muutaman säätökerran.
3. Jos salvat eivät sulkeudu, tarkista, ovatko turvalukot LUKITTU (🔒) -asennossa. Turvalukkojen tulisi olla EI-LUKITTU (🔓) -asennossa AGILITYN asentamiseksi, ja sitten LUKITTU (🔒) -asennossa ennen kuin käyttäjä istuu tuoliin.

LEVEYDEN JA KORKEUDEN SAATÖ:

1. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R) laitteistot ovat oikeilla puolilla.
2. Varmista, että leveyden ja korkeuden säätöpultit ovat sijoitettu samanlaisesti kiilaosan ura reikiin. Käytä kohdistusuria kiilaosan reikien ylä- ja alapuolella viitteenä.
3. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset (R) selkänöjan laitteistot ovat sijoitettu samanlaisesti pystysuoriin uriin selkänöjan runkossa. Laske neliönmuotoisten kolojen lukumäärä liukuvalle korkeudensäätötangolla, jotka näkyvät pystysuorien urien läpi.

SYVYYDEN JA KULMAN SAATÖ:

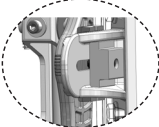1.  Jos kolmiokiinnike ei liu'u, varmista, että liukuva mutteri ei ole paikallaan häiritsemässä. Säädä tarvittaessa liukuvan mutterin asentoa.
2. Varmista, että syvyys vasemmalla (L) ja oikealla (R) puolella on sama. Vertaa kiilan päällä olevia kohdistus merkkejä.
3. Varmista, että vasemman- (L) ja oikeanpuoleiset kaksoiskoukut ovat samassa kulmassa selkänöjan runkoon nähden. Vertaa kaksoiskoukujen pään kohdistus merkintöjä.

Ongelmia ilmatyynyn kanssa, tarkista seuraavat kohdat:

1. Jos ilmatyyny vuotaa, varmista, että venttiili on kunnolla kiinni kääntämällä sitä myötäpäivään. Jos tyyny ei siltikään pidä ilmaa, tarkista näkykö reikiä. Jos reikiä ei näy, sulje venttiili ja upota ilmatyyny pesualtaaseen tai vesiastian ja katso, näkykö ilmakehä. Jos havaitset hyvin pieniä reikiä, kuivaa ilmatyyny huolellisesti ja käytä sitten korjaussarjaa, joka tuli tuotteen mukana ja seuraa korjaussarjan ohjeita. .
2. Jos havaitset suuria reikiä tai muita vuotoja, katso osio RAJOITETTU TAKUU. (Katso ILMATYNNYN SAATÖ). Varmista, että ilmakennot osoittavat pyörätuolin menosuuntaan ja että päällinen on asetettu oikein (katso PAALLISEN ASENNUKSEN) JA VAAHTOMUOVIPHEMUSTE ILMATYNNYLLÄ - ASENNUKSEN.
3. Jos ilmatyyny liukuu pyörätuolissa, varmista, että se on asetettu oikein ja että kankainen takaosa on kiinnitetty vaahtomuovipehmusteeseen syvennyksen tarraa vasten. (katso vaahtomuovialusta ilmatyynyllä - asennus). Ilmatyynyn reunan tulee olla kerrosten välissä juuri leikkausalueen reunan alla.

PALAUTUSEHDOT

Kaikkien palautettujen tuotteiden on oltava uusia ja käyttämättömiä, niille on saatava ROHO, Inc:n hyväksyntä ennen palautusta, ja niistä on maksettava uudelleenvarastointimaksu. Ennen tuotteen palauttamista:

Yhdysvalloissa, ota yhteyttä ROHO Inc.:n takuupalveluosastoon (Warranty Service Department).

Yhdysvaltojen ulkopuolella, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.

YHTEYSTIEDOT

Yhdysvalloissa

ROHO Takuu- ja Asiakaspalvelu (Warranty Service and Customer Service):

Puhelin: 1-800-851-3449 Faksi: 1-888-551-3449

Takuupalvelu: warranty@therohogroup.com

Asiakaspalvelu: cs@therohogroup.com

Huom: Jos tuote neuvotaan palauttaman, lähetä se osoitteeseen:

ROHO, Inc.

1501 South 74th Street

Belleville, IL 62223

Yhdysvaltojen ulkopuolella:

ROHO International:

intl@therohogroup.com Puhelin: 1-618-277-9150 Faksi: 1-618-277-6518

Tai käy osoitteessa www.therohogroup.com saadaksesi luettelon maahantuojista

RAJOITETTU TAKUU

Mitä se kattaa?

ROHO, Inc. takaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet.

Kuinka kauan se on voimassa?

Tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä:

AGILITY Osat	Selkänöja, selkänöjan laitteisto, takakahvan laitteisto	- 36 kuukautta
	Vaahtomuovialusta, vaahtomuovitäyte ja ristiselän tukialusta	- 6 kuukautta
	Ilmatäyte	- 18 kuukautta

Mitä se ei kata?

Takuu ei kata väärinkäytettyä tuotetta, vahingossa vahingoitettua tuotetta, eikä "luonnonvoimien", kuten tulvan, pyörremyrskyn tai maanjäristyksen, vahingoittamaa tuotetta. Minkä tahansa tuotteen ohella toimitetun lisävarusteen korvaaminen tai tuotteen muuntaminen mitätöi takuun.

Mitä asiakkaan tulee tehdä.

Yhdysvalloissa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä ROHO Inc.:n takuupalveluosastoon (Warranty Service Department). **Huom:** Kaikki ROHO, Inc:lle ilman valtuutusta lähetetyt tuotteet palautetaan asiakkaalle. **Yhdysvaltojen ulkopuolella**, ota yhteys paikalliseen ROHO:n kansainväliseen jälleenmyyjään.

Kysymyksiä?

Katso YHTEYSTIEDOT.

Vastuuvapauslauseke.

Kaikki epäsuorat takuut, mukaan lukien KAUPATTAVUUTTA ja TIETTYYN KÄYTTÖ—TARKOI—TUKSEEN SOPIVUUTTA KOSKEVAT TAKUUT, rajoittuvat yllä olevassa kohdassa "Kuinka kauan se on voimassa?" esitettyihin aikoihin, minkä vuoksi kaikkia näiden takuiden ja ilmaistujen takuiden vastaisia rikkomuksia koskevat vaatimukset on esitettävä tämän ajan kuluessa. ROHO, Inc. ei ole vastuussa satunnaisista tai välillisistä vahingoista koskien taloudellisia menetyksiä tai omaisuuden vioittumista, olivatpa ne ilmaistuja tai välillisten takuiden rikkomuksien tai muun seurauksia.

Oikeutesi ja tämän takuun vaikutus niihin.

Tämä takuu rajoittaa kaikkien epäsuorien takuiden kestoa, yllä mainituilla tavoilla, ja rajoittaa tai sulkee pois satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen korvaukset. Jotkut oikeudenkäyttöalueet eivät salli epäsuorien takuiden voimassaoloajan rajoittamista ja jotkut oikeudenkäyttöalueet eivät salli satunnaisten tai seurannaisten vahinkojen poissulkemista takuusta tai rajoittamista, joten on mahdollista, etteivät kyseiset lausekkeet koske sinua. Vaikka tämä takuu antaakin sinulle tiettyjä laillisia oikeuksia, sinulla saattaa olla myös muita asianomaisesta oikeudenkäyttöalueesta riippuvia oikeuksia.

171-OM-2012
Item # T20218 ----, Qty _____
Revision: 08/24/12
Print Date: _____



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



A PRODUCT SUPPORTED BY:



Mailing/Shipping Address:

1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900, USA

Administrative Offices:

100 North Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429, USA

www.therohogroup.com

U.S.: 1-800-851-3449 Fax 1-888-551-3449
Outside U.S.: 1-618-277-9150 Fax 1-618-277-6518