


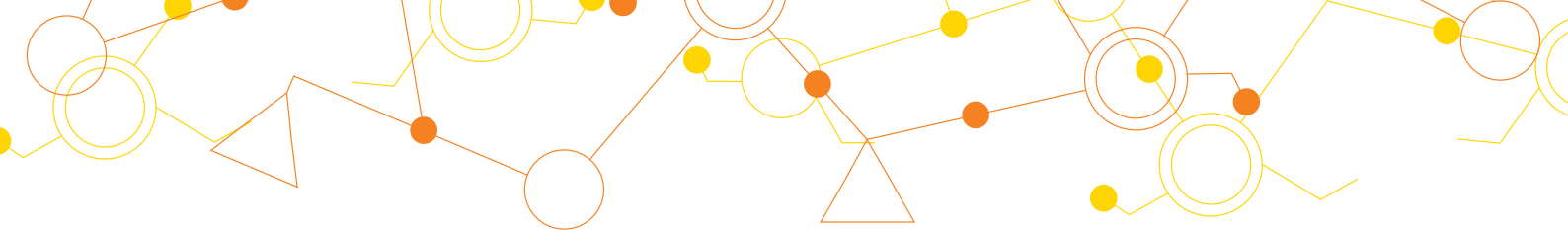

ROHO®-painehaavatyyny

| 2022




1-venttiilinen tyyny

On tarkoitettu käyttäjille:

- Joiden iholla on suuri rikkoutumisen vaara
- Joilla on tällä hetkellä heikentynyt iho
- Jotka tarvitsevat apua painon muutoksessa ja siirroissa
- Joilla ei ole tuntoa
- Joilla on esiintynyt ihon rikkoutumista aiemmin

ROHO® 1-VENTTIILINEN TYNYN

- Helposäätöinen ilmakennotyynty
- Ei asennonkorjausta

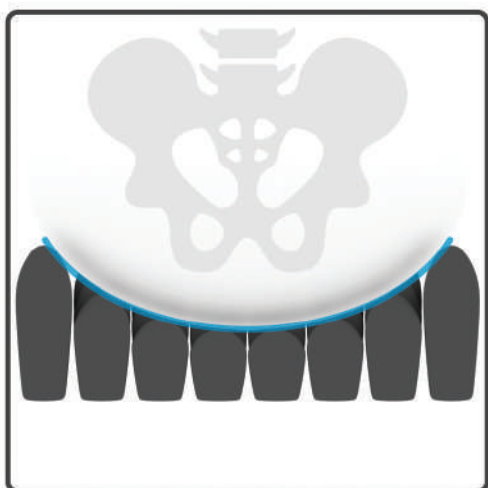

5 CM KORKEA - 21 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
1R66LPC	26,5-31 x 26,5-31 cm
1R67LPC	26,5-31 x 31-35 cm
1R77LPC	31-35 x 31-35 cm
1R78LPC	31-35 x 35-39,5 cm
1R79LPC	31-35 x 39,5-44 cm
1R87LPC	35-39,5 x 31-35 cm
1R88LPC	35-39,5 x 35-39,5 cm
1R89LPC	35-39,5 x 39,5-44 cm
1R810LPC	35-39,5 x 44-48,5 cm
1R98LPC	39,5-44 x 35-39,5 cm
1R99LPC	39,5-44 x 39,5-44 cm
1R910LPC	39,5-44 x 44-48,5 cm
1R911LPC	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
1R108LPC	44-48,5 x 35-39,5 cm
1R109LPC	44-48,5 x 39,5-44 cm
1R1010LPC	44-48,5 x 44-48,5 cm
1R1011LPC	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
1R119LPC	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
1R1110LPC	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
1R1111LPC	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm
1R1210LPC	53,5-57 x 44-48,5 cm


7,5 CM KORKEA - 11 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
1R77MPC	31-35 x 31-35 cm
1R78MPC	31-35 x 35-39,5 cm
1R88MPC	35-39,5 x 35-39,5 cm
1R89MPC	35-39,5 x 39,5-44 cm
1R99MPC	39,5-44 x 39,5-44 cm
1R910MPC	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
1R109MPC	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
1R1010MPC	44-48,5 x 44-48,5 cm
1R1011MPC	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
1R1110MPC	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
1R1111MPC	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm

**POISTUVA
TUOTE**

10 CM KORKEA - 24 VAKIOKOKOAA


TUOTENUMERO	KOKO
1R66C	26,5-31 x 26,5-31 cm
1R67C	26,5-31 x 31-35 cm
1R77C	31-35 x 31-35 cm
1R78C	31-35 x 35-39,5 cm
1R79C	31-35 x 39,5-44 cm
1R87C	35-39,5 x 31-35 cm
1R88LC	35-39,5 x 35-39,5 cm
1R89C	35-39,5 x 39,5-44 cm
1R810C	35-39,5 x 44-48,5 cm
1R811C	35-39,5 x 48,5-53,5 cm
1R98C	39,5-44 x 35-39,5 cm
1R99C	39,5-44 x 39,5-44 cm
1R910C	39,5-44 x 44-48,5 cm
1R911C	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
1R108C	44-48,5 x 35-39,5 cm
1R109C	44-48,5 x 39,5-44 cm
1R1010C	44-48,5 x 44-48,5 cm
1R1011C	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
1R1012C	44-48,5 x 53,5-57 cm
1R118C	48,5-53,5 x 35-39,5 cm
1R119C	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
1R1110C	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
1R1111C	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm
1R1210C	53,5-57 x 44-48,5 cm

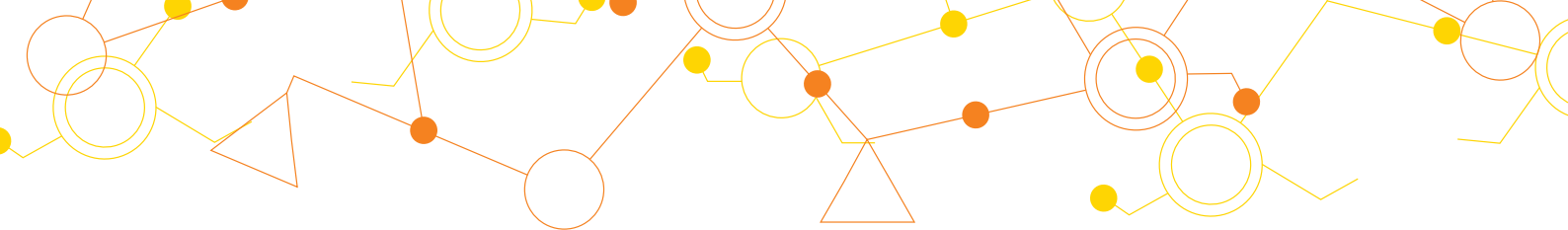

Quadtro Select -tyyny

Edellisellä sivulla listattujen käyttötarkoitusten lisäksi HIGH PROFILE QUADTRO SELECT -pehmuste on tarkoitettu myös käyttäjille:


- Jotka tarvitsevat asteittaista asettamista
- Jotka tarvitsevat asentotukea huomattavissa määrin
- Joilla on ajan kuluessa muuttuva diagnoosi
- Epäsymmetristen asentojen kanssa
- Kohtalaisesta heikkoon tasapainon kanssa
- Kallistus- tai nojausjärjestelmissä

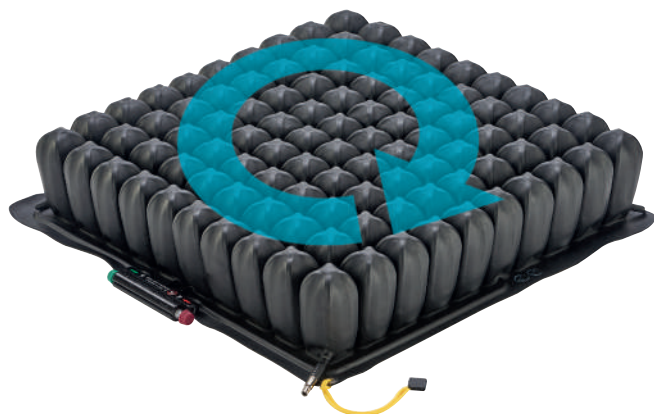

ROHO® QUADTRO SELECT -TYNNY

- ISOFLO-venttiilin avulla tyynyn säätö ja istuma-asennon tukeminen lukitsemalla ilman kulku neljän kammion välillä
- Samassa tyynyssä 1-venttiilisen tyynyn ominaisuudet ja edistyneempi asennonkorjaus/tukeminen mahdollista

Kun venttiili on auki, ilma kiertää vapaasti, kunnes käyttäjälle sopiva asento löytyy.

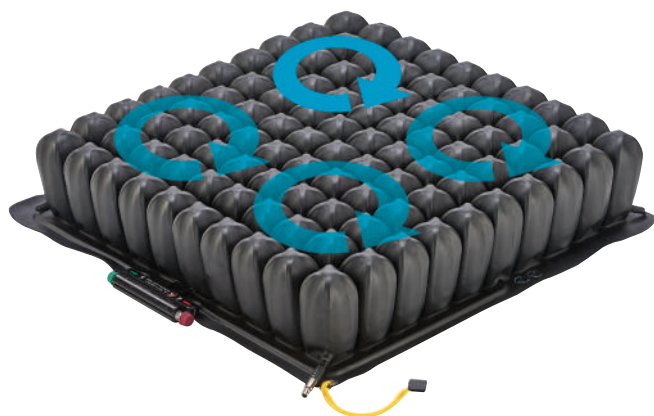

Kun venttiili suljetaan, lukittuu ilma kammioihin ja käyttäjälle sopivat asetukset säilyvät.

5 CM KORKEA - 21 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
QS56LPC	22-26,5 x 26,5-31 cm
QS66LPC	26,5-31 x 26,5-31 cm
QS67LPC	26,5-31 x 31-35 cm
QS77LPC	31-35 x 31-35 cm
QS78LPC	31-35 x 35-39,5 cm
QS79LPC	31-35 x 39,5-44 cm
QS87LPC	35-39,5 x 31-35 cm
QS88LPC	35-39,5 x 35-39,5 cm
QS89LPC	35-39,5 x 39,5-44 cm
QS810LPC	35-39,5 x 44-48,5 cm
QS98LPC	39,5-44 x 35-39,5 cm
QS99LPC	39,5-44 x 39,5-44 cm
QS910LPC	39,5-44 x 44-48,5 cm
QS911LPC	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
QS108LPC	44-48,5 x 35-39,5 cm
QS109LPC	44-48,5 x 39,5-44 cm
QS1010LPC	44-48,5 x 44-48,5 cm
QS1011LPC	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
QS119LPC	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
QS1110LPC	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
QS1111LPC	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm

7,5 CM KORKEA - 8 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
QS77MPC	31-35 x 31-35 cm
QS78MPC	31-35 x 35-39,5 cm
QS88MPC	35-39,5 x 35-39,5 cm
QS89MPC	35-39,5 x 39,5-44 cm
QS99MPC	39,5-44 x 39,5-44 cm
QS910MPC	39,5-44 x 44-48,5 cm
QS109MPC	44-48,5 x 39,5-44 cm
QS1010MPC	44-48,5 x 44-48,5 cm

10 CM KORKEA - 25 VAKIOKOKOAA

TUOTENUMERO	KOKO
QS66C	26,5-31 x 26,5-31 cm
QS67C	26,5-31 x 31-35 cm
QS77C	31-35 x 31-35 cm
QS78C	31-35 x 35-39,5 cm
QS79C	31-35 x 39,5-44 cm
QS710C	31-35 x 44-48,5 cm
QS87C	35-39,5 x 31-35 cm
QS88LC	35-39,5 x 35-39,5 cm
QS89C	35-39,5 x 39,5-44 cm
QS810C	35-39,5 x 44-48,5 cm
QS811C	35-39,5 x 48,5-53,5 cm
QS98C	39,5-44 x 35-39,5 cm
QS99C	39,5-44 x 39,5-44 cm
QS910C	39,5-44 x 44-48,5 cm
QS911C	39,5-44 x 48,5-53,5 cm
QS108C	44-48,5 x 35-39,5 cm
QS109C	44-48,5 x 39,5-44 cm
QS1010C	44-48,5 x 44-48,5 cm
QS1011C	44-48,5 x 48,5-53,5 cm
QS1012C	44-48,5 x 53,5-57 cm
QS118C	48,5-53,5 x 35-39,5 cm
QS119C	48,5-53,5 x 39,5-44 cm
QS1110C	48,5-53,5 x 44-48,5 cm
QS1111C	48,5-53,5 x 48,5-53,5 cm
QS1210C	53,5-57 x 44-48,5 cm

Tuotetiedot

MATERIAALIT

Pyörätuolipehmusteet on tehty neopreenikumista, jossa on nikkelipäälysteiset messinkiventtiilit. Quadro Select- ja Contour Select -pehmusteissa on myös ISOFLO®-venttiilit. ISOFLO-venttiin ylä- ja alaosa on polykarbonaattia, nupit ovat polypropeenaa ja kara on alumiinin päälle muovattua polypropeenaa.

Vakiopäällisen (UCFR) ylä- ja alamateriaalit ovat 100-prosenttista FR-polyesteria. Pohjamateriaali on 100-prosenttista PVC-lujitettua polyesteria, joka estää istuintyynyn liukumisen alustalla.

TUOTTEEN PUHDISTUS JA DESINFIOINTI:

Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi eri toimenpidettä. Puhdistus on suoritettava ennen desinfiointia. Tuote pitää puhdistaa, desinfioida ja sen asianmukainen toiminta pitää tarkistaa potilaiden välillä.

Päällisen puhdistus: Poista ensin päällinen pehmusteen ympäriltä. Konepesu lämpimässä vedessä (40 °C) miedolla pesuaineella, varovainen pesuohjelma, tai pyyhi puhtaaksi neutraalilla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Rumpukuivaus alhaisessa lämpötilassa.

Päällisen desinfiointi: Pese käsin lämpimässä vedessä käyttäen 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä. Huuhtelee sitten huolellisesti. **Päällinen voidaan myös desinfioida pesemällä kuumassa vedessä (60 °C).** Anna kuivua ilmassa. **Huomaa:** Noudata klooripuhdistusaineen mukana tulevia turvaohjeita.

Toimitus sisältää tynnynpäällisen, pumpun, korjaussarjan ja käyttöohjeen kaikissa tynnymalleissa.

Tynnyihin on saatavilla erillinen nesteitä läpäisemätön inkontinenssipäällinen.

Neopreenituotteilla ei ole painorajaa.

Pehmusteen puhdistus: Poista päällinen, sulje venttiilit ja aseta se suureen pesualtaaseen. Hankaa kaikki pehmusteen pinnat varovasti pehmeällä muovijouhiharjalla, pesusienellä tai pesulapulla. ROHO, Inc. suosittelee astianpesuaineen, pyykinpesuaineen tai muun yleispuhdistusaineen käyttöä. Laitoskäytössä voidaan käyttää yleistä desinfiointipuhdistusainetta. Huuhtelee vedellä. Taputtele kuivaksi pyyhkeellä tai anna kuivua ilmassa.

Pehmusteen desinfiointi: Toista yllä olevat puhdistusohjeet käyttäen germisidistä desinfiointiainetta, joka täyttää infektionhallinnan tarpeet (ROHO, Inc. suosittelee tuberkuloosibakteereja tappavan desinfiointiaineen käyttöä). Liuosta, jossa on 125 ml klooripuhdistusainetta per 1 litra vettä, voidaan myös käyttää. Pidä puhtas pehmuste kasteltuna klooripuhdistusaineliuoksella 10 minuuttia. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua puhdistusohjeiden mukaisesti. Huomaa: Useimmat germisidiset desinfiointiaineet ovat turvallisia, jos niitä käytetään valmistajan antamien laimennusohjeiden mukaan.

Pehmusteen sterilointi: ROHO, Inc. suosittelee voimakkaasti, ettei käytetä sterilointimenetelmiä, joissa lämpötila on yli 93 °C. Korkeat lämpötilat nopeuttavat vanhentumista ja voivat vioittaa tynnyä. Jos laitospohjaiset protokollat edellyttävät sterilointia, avaa venttiilit ja käytä alinta mahdollista lämpötilaa ja lyhintä mahdollista aikaa. Kaasusterilointi on parempi vaihtoehto kuin höyryautoklaavi, mutta kumpaakaan ei suositella. Jos käytetään höyryautoklaavia, varmista, että venttiilit ovat auki. HUOMAA: ÄLÄ käytä pehmusteiden kanssa öljypohjaisia voiteita, lanoliinia tai fenolipohjaisia desinfiointiaineita, sillä ne voivat heikentää neopreenia.



