



KÄYTTÖOHJE

Lasal-asentohoito tyyny

Ratkaisu asentohoitoon

Lasal-asentohoito tyyny on kehitetty erityisesti seuraaville potilasryhmille: muistisairaat, neurologiset, geriatriset, pallatiivisessä hoidossa olevat ja krooniset kipupotilaat.

Lasal-asentohoito tyynyä käytetään hoitolaitoksissa vanhuksilla ja kehitysvammaisilla, saattohoidossa ja yksityiskodeissa.



- tasaa kehoon kohdistuvaa painetta
- antibakteerisesti käsitelty tyynyn päällinen
- muotoutuvat kehon asennon mukaan
- vesipestävät irtopäälliset
- lisää kehon tuntemusta ja proprioseptiivistä stimulaatiota
- valikoimassa yli 25 erilaista tyynyä



Sisällys

1.Turvallisuus	3
2.Merkkien selitys	4
3.Yleistä	5
4.Käyttö	5
5.Lasal-asentohoitotyyny.....	6
6.Lasal-asentohoitotyyny.....	7
7.Asentohoitotyynyjen mallit.....	8
8.Asentohoito Lasal-asentohoitotyynyillä.....	11
9.Puhdistus ja huolto	12
10.Säilytys	12
11.Kierrätys ja hävittäminen	12
12.Takuu.....	13
13.Tekniset tiedot	14
14.Lisävarusteet	14

1. Turvallisuus



VAROITUS

Älä käytä Lasal-asentohoitotynyjä ennenkuin olet saanut käyttökoulutuksen asentohoitoon koulutetulta henkilöltä. Väärä käyttö voi vahingoittaa käyttäjää.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen Lasal-asentohoitotynyjen käyttöä. Kiinnitä huomiota merkittyihin Turvallisuus ohjeisiin.


Cobi Rehab ei vastaa vahingoista jotka ovat aiheuttaneet vahinkoa tuotteelle tai henkilövahinkoa Lasal-asentohoitotynyjen virheellisestä käytöstä.

Ota välittömästi yhteyttä Cobi Rehabiin mikäli tuote/sen osat ovat vahingoittuneet tai hävinneet. Älä koskaan käytä omia varaosia.

Cobi Rehab ei ole vastuussa virheistä tai onnettomuuksista, jotka tapahtuvat korjauksen jälkeen ilman Cobi Rehabin lupaa.



TURVALLISUUSOHJEET

Tässä käyttöohjeessa, symboli  tarkoittaa turvallisuusohjetta. Noudata turvallisuusohjeita huolellisesti.









Lasal-asentohoitotynnyt ovat tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, niitä ei saa laittaa pesukoneeseen tai altistaa vahvoille kemikaaleille.

Älä altista Lasal-asentohoitotynyjä korkeille lämpötiloille, pitkiä aikoja suoralle auringon valolle, kylmälle tai muulle säteilylle, tämä voi vaikuttaa tuotteen pinnan lämpötilaan tai sen kestävyteen.

Vältä käyttämästä teräviä esineitä tynnyjen ja päällisten läheisyydessä.

Ota yhteyttä Cobi Rehabiin tai maahantuojaan kaikissa huoltoon tai korjaukseen liittyvissä asioissa liittyen Lasal-asentohoitotynnyihin.

2. Merkkien selitys

	Varoitus
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus eli CE merkitty, Lääkinnällisten laitteiden asetus MDR, EU 2017/745
	Cobi nimikkeen numero
	Eränumero
	Valmistusvuosi
	Valmistaja
	Lääkinnällinen laite, luokka I
	Lue käyttöohje
CE-merkintä sijaitsee asentohoitotyynyn saumassa. Alla esimerkki merkinnästä.	


COBI REHAB[®]
The Positioning Company

LASAL

NECK CUSHION SMALL
HALVMÅNE SMALL
TUMLE LITEN HALVMÅNE

Pude/Cushion



Incontinence cover




Bomull/Cotton cover



Pude/Cushion: Cover of PU polyester with anti-bacterial coating. Filling: EPS beads

Incontinence cover: 100% PU polyester with Anti-bacterial coating

Bomull/Cotton cover:

OECO-TEX[®] 100% Bomull/Cotton 

Pude/Cushion : 1012 (0305-301-000)

Incontinence cover : 3012 (0305-301-010)

Bomull/Cotton cover : 2012 (0305-301-020)

 Medical Device



COBI REHAB
Fuglebaekvej 1D, DK-2770
DENMARK
www.COBIREHAB.com

Contact:
DENMARK: +45 70 2525 22
SWEDEN: +46 8-7029774

3. Yleistä

Tässä käyttöoppaassa annamme tärkeää tietoa Lasal-asentohoitotyyneiden käytöstä ja potilasryhmistä joille niitä voidaan käyttää. Tämä sisältää myös joitain teknisiä tietoja Lasal-asentohoitotyyneistä.

Viimeisin versio käyttöoppaasta löytyy meidän nettisivuiltamme. Tarkista että lukemasi käyttöopas on uusin versio.

Mikäli tarvitset käyttöoppaan isommalla kirjainfontilla, tuotesivu on saatavilla PDF muodossa osoitteessa cobirehab.com, jossa se voidaan skaalata tarvittavaan fonttikokoon.

Voit myös olla yhteydessä Cobi Rehab asentohoitotyyneiden maahantuontiin Algol Trehab Oy puh. 09 5099 331 tai s-posti: algol-trehab@algol.fi saadaksesi lisätietoa tuotteista.

Cobi Rehab pidättää oikeudet muuttaa tuotteiden teknisiä tietoja ilman etukäteisilmoitusta.

UDI-numero Lasal-asentohoitotyyneissä löytyy tyyneen sivusaumassa olevasta etiketistä.

Tuoteturvallisuusilmoitukset ja tuotteen takaisin kutsut ilmoitetaan nettisivuiltamme.

4. Käyttö

Lasal-asentohoitotyyneillä asennon tukeminen on käyttäjälle erittäin miellyttävää, eikä aiheuta epämiellyttävää tuntemusta.

Avustajalle tyyntä ovat helppokäyttöisiä monipuolisten asentojen oikeanlaiseen tukemiseen.

Oikein tuetulla asennolla voidaan ehkäistä nivelten kontraktuureja, vähentää spastisuutta ja ennaltaehkäistä painevaurioita.

Lasal-asentohoitotyyneillä voidaan rajata kehoa ja näin lisätä kehotuntemusta.

Tyyneillä voidaan tukea aikuisia ja lapsia selinmakuulle ja istuvaan asentoon.

Potilasryhmät:

- muistisairaat
- geriatriariset
- neurologiset
- pallatiivinen hoito
- krooniset kipupotilaat

Yhteistä näille potilasryhmille on riski saada kudoksen- ja painevaurioita.

Asentohoitotyyntä ja muut apuvälineet

Lasal-asentohoitotyyntä voidaan käyttää yhdessä muiden Cobi Rehabin apuvälineiden kanssa, kuten Cobi-asentohoitotyyntä, Kelvin Comfort -pyörätuoli ja Reden MobiBed -kuljetusalusta.

Uudelleenkäyttö

⚠ Huomioi, että Lasal-asentohoitotyyntä tulee desinfioida mikäli niitä käytetään käyttäjältä toiselle. Näin vältetään bakteerien leviäminen. Katso osio

Puhdistus ja huolto.

Päälliset tulee pestä ja vaihtaa ennen kuin ne siirretään uudelle käyttäjälle.

4.1 Kontraindikaatiot

Lasal-asentohoitotyyneiden käytölle ei ole kontraindikaatioita.

5. Lasal-asentohoito tyynt

Koostumus

Lasal tyyntjä on saatavilla useita eri muotoisia ja -kokoisia. Tyyntyn sisällä on erimuotoisia pieniä polystyreenihelmiä ja pehmeä joustava päällinen yhdessä irrallisella hygieni- tai puuvilla päällisellä, tyyntyt muotoituvat kehon mukaisesti tukien mahdollisimman laajalla tukipinnalla.

Lasal tyyntyt ovat muokattavia ja pysyvät paremmin paikoillaan kuin tavalliset tyyntyt.

Saatavilla kahdenlaista päällistä jokaiseen Lasal tyyntyn. Puuvillapäällinen eri väreissä ja harmaa hygieniapäällinen.

Puuvillapäällinen on hengittävä, pestävä ja anti-bakteerisesti käsitelty. Hygieniapäällinen on pestävä ja estää homeen ja sienten muodostumista.

Rauhoittava vaikutus

Tyyntyjien avulla voidaan vähentää kehoon kohdistuvaa painetta tasaamalla paine laajemmalle alueelle, tyyntyt vähentävät spantisuutta sekä antavat tuntoärsykeitä esim. muistisairailta.

Kun tyyntyillä tuetaan ja ympäröidään keho se luo tunteen kuin olisi sikiönä kohdussa, tunne rauhoittaa ja luo turvallisuutta.

Cobi-asentohoito tyyntyt

Cobi Rehabin asentohoito tyyntyjien valikoimassa on yli 15 erilaista Cobi-asentohoito tyyntyä. Kahta mallistoa yhdistettynä voidaan tarjota rajoittamaton määrä mahdollisuuksia yksilöllisen asennon tukemiseen, joilla saadaan aikaan mukavuutta, helpotusta, lepoa ja tukea koko kehoon.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota Cobi tyyntyjien muotoilussa siihen että tyyntyt voidaan asettaa mahdollisimman tiiviisti käyttäjän kehoa vasten.

Tyyntyt ovat tietyn painoisia jonka avulla tyyntyt pysyvät paikoillaan ja antavat tukea.

Cobi tyyntyt on täytetty polystyreenihelmillä, kylmävaahdolla, viskoelastisella vaahdolla ja SEBS rakeilla joilla saadaan kiinteä rakenne.

Lasal ja Cobi tyyntyjä voidaan käyttää myös XXL-kokoisten potilaiden tuentaan ja asentohoitoon.

Suosittellemme lämpimästi Lasal ja Cobi tyyntyjien yhdistelemistä erilaisissa asentohoidon tarpeissa.



Banaanityyntyy S selän takana ja yläraajan alla, Banaanityyntyy L selän takana vartaloa tukemassa ja reisien välissä, Yleistyyntyy (suorakaide) L säärien välissä.



Valikoima Cobi-asentohoito tyyntyjä.

6. Lasal-asettohoitotyynyt



U-niskatyyny, lapset S,
koko 62/109x33x4,5 cm,
tuotenumero: 0305-901-000



U-niskatyyny, junior S,
koko 54/90x15x4 cm,
tuotenumero: 0305-921-000



U-niskatyyny, junior L,
koko 60x114x21x6 cm,
tuotenumero: 0305-911-000

Niskatyyny, lapset
koko 23x16x5 cm
tuotenumero: 0305-321-000



Niskatyyny, aikuiset
koko 24x21x7 cm
tuotenumero: 0305-311-000



Puolikuutyyny S,
koko 47x22x4 cm,
tuotenumero: 0305-301-000



Puolikuutyyny,
koko 79x33x7 cm,
tuotenumero: 0305-801-000



Puolikuutyyny, paksu,
koko 86x40x7 cm,
tuotenumero: 0305-811-000



Kolmiotyynty L,
koko 94x24,5x22 cm,
tuotenumero: 0305-201-000



Kolmiotyynty M,
koko 66x20x71,5 cm,
tuotenumero: 0305-211-000



Kolmiotyynty M/S,
koko 55x16x14 cm,
tuotenumero: 0305-231-000



Kolmiotyynty S,
koko 39,5x12x10 cm,
tuotenumero: 0305-221-000

T-tyyny, XS,
koko 36/13x27/12,5x4 cm,
tuotenumero: : 0305-6041-000



T-tyyny, S, koko 56,5/17,5x37/15x7 cm
tuotenumero : 0305-6031-000



T-tyyny, M, koko 63/22x40/19,5x7 cm,
tuotenumero: 0305-6021-000



T-tyyny, L/M, koko 72/25x45/20x8 cm,
tuotenumero: 0305-6016-000



T-pude, L, Str. 83/27x56/27x10 cm
HMI: 27885, Varenr.: 0305-6011-000



T-pude, XL, Str. 98/26x61/29x11 cm
HMI: 27886, Varenr.: 0305-6001-000



Istuintyynty pitkä,
koko 104x50x40/18,5 cm,
tuotenumero: 0305-421-000

Vauvatyyny,
koko 34x24x14 cm,
tuotenumero: 0305-511-000

Istuintyynty korkea,
koko 73x50x13 cm,
tuotenumero: 0305-401-000

Yleistyynty L,
koko 73x42x5 cm,
tuotenumero: 0305-711-000



Yleistyynty S,
koko 59,5x29,5x5,5 cm,
tuotenumero: 0305-701-000



Yleistyynty XS,
koko 40x10x3 cm, tuotenumero:
0305-741-000



Yleistyynty pitkä,
koko 110x41x10 cm,
tuotenumero: 0305-721-000

Yleistyynty S,
koko 18x40x3 cm, tuotenumero:
0305-761-000
(Ei kuvassa)

Yleistyynty pieni,
koko 35x22x3 cm,
tuotenumero: 0305-731-000



Banaanityynty pitkä,
koko 320x30x9 cm,
tuotenumero: 0305-151-000

Banaanityynty L, koko 148x31x10 cm,
tuotenumero: 0305-101-000

7. Asentohoitotyynyjen mallit

7.1 Lasal T-tyyny

T-tyynyä käytetään abduktiotyynynä jalkojen välissä sekä yleisesti alaraajojen tuentaan.

Voidaan käyttää myös päinmakuu-asennon tuentaan, jolloin saadaan ylävartaloa kohotettua alustalta ja olkanivelille vapaa liikkuvuus.

Lasal T-tyynyä on saatavilla 6 eri kokoa.



7.2 Lasal-puolikuutyyny

Puolikuutyynyä voidaan käyttää yläraajojen tukemiseen istuma- ja selinmakuu-asennossa sekä paineen tasaamiseen polvien ja jalkaterien välissä.

Lasal-puolikuutyynyä on saatavilla 3 eri kokoa.



7.3 Lasal-kolmiotyynty

Kolmiotyynty on suhteellisen tukeva tyyny ja sitä käytetään vartalon tukemiseen, stabiloimaan kehoa istuma- ja selinmakuuasennossa sekä kylkimakuulla vuoteen laidan ja kehon välissä lisätukena.

Pienempiä kolmiotyyntyjä voidaan käyttää alaraajojen/polvien tukemiseen.

Lasal-kolmiotyyntyä on saatavilla 4 eri kokoa.



7.4 Lasal-niskatyyny

Niskatyyny asetetaan kaularangan ympärille, jolloin se tukee ja tasapinottaa pään ja niskan aluetta istuma-asennossa. Tyyny on muokattavissa niin, että työntää täytettä siihen kohtaan missä sitä eniten tarvitaan.

Päällisen voi tilata tarranauhalla, jolloin tyynyn saa asetettua mahdollisimman lähelle niskaa.

Lasal-niskatyynyä on saatavilla kahta kokoa.



7.5 Lasal-suorakaide-/yleistyyny

Suorakaidetyyny ovat muotoiltavia yleistyynyjä, joita käytetään etenkin pään, yläraajojen, alaraajojen ja jalkaterien tukemiseen.

Suorakaidetyynyllä voidaan tukea kehon heikompaa puolta tasapainoiseen/stabiiliin asentoon.

Suorakaide/yleistyynyä on saatavilla 6 eri koossa.



7.6 Lasal U-niskatyyny

Lasal U-niskatyyny asetetaan kevyesti harteille, jolloin se tukee pään ja niskan aluetta selinmakuu-asennossa tai tuetussa istuma-asennossa.

Lasal U-niskatyynyä voidaan käyttää myös hemikäden tukemiseen istuessa tai kylkimakuu-asennossa.

Lasal U-niskatyynyä on saatavilla 3 eri kokoa.



7.7 Lasal-tuki-/istuintyyny

Tuki-/istuintyyny ovat muokattavia pitkänmallisia ja korkeudeltaan kiilanmuotoisia tyynyjä.

Lasal-tuki-/istuintyynyä käytetään istuintyynynä sillä kiilamuoto tukee erinomaisesti istuma-asentoa.

Lasal Tuki-/istuintyynyä saatavilla 3 eri kokoa.



7.8 Lasal-banaanityyny

Banaanityyny on kevyesti täytetty ja on siksi hyvin muotoiltavissa. Muotoiltavuutensa ansiosta tyyny on monikäyttöinen erilaisiin asentohoidon tarpeisiin.

Banaanityynyä käytetään lapsilla ja aikuisilla asennon tukemiseen mm. jumppatessa tai terapeuttisessa harjoittelussa.

Tyynyillä voidaan myös rajata käyttäjän keho jolloin se rauhoittaa ja luo turvallisuuden tunteen.

Lasal Banaanityynyä on saatavilla 3 eri kokoa.



7.9 Lasal Embracer -tyyny

Istuessa ja selinmakuulla yläraajojen tukeminen Embracer-tyynylle rentouttaa yläraajoja hartioista sormiin asti ja yläraajat eivät pääse roikkumaan sivuille.

Tyynyyn on saatavilla lisävarusteena vyö, jolla se voidaan kiinnittää tuolin tai pyörätuolin selkänöjan ympärille, jotta tyyny pysyy paikoillaan käyttäjän hieman liikkuesssa.

Lasal Embracer-tyynyä on saatavilla 3 eri kokoa:

- Embracer S, koko 76x66x92 cm, sininen
tuotenumero: 0305-6441-000
- Embracer M, koko 87x70x113, vihreä,
tuotenumero: 0305-6421-000
- Embracer L, koko 95x78x117 cm, tummansininen,
tuotenumero: 0305-64010305-6401-000.



7.10 Lasal-säkkituoli

Säkkituoli on kehitetty käyttäjille jotka tarvitsevat hyvän tuetun ja ja stabiiliin asennon päivittäin.


Säkkituolissa käyttäjä uppoutuu tuoliin istuma- tai makuuasentoon jolloin asento on hyvin tuettu.

Säkkituolia on saatavilla 3 eri kokoa:

- Säkkituoli lasten, punainen, paino 6,6 kg,
tuotenumero: 0317-3201-000
- Säkkituoli junior, vihreä, paino 10,5 kg,
tuotenumero: 0317-4201-000
- Säkkituoli aikuisten, sininen, paino 18 kg,
tuotenumero: 0317-5201-000



8. Asentohoito Lasal-asentohoitotyynyillä

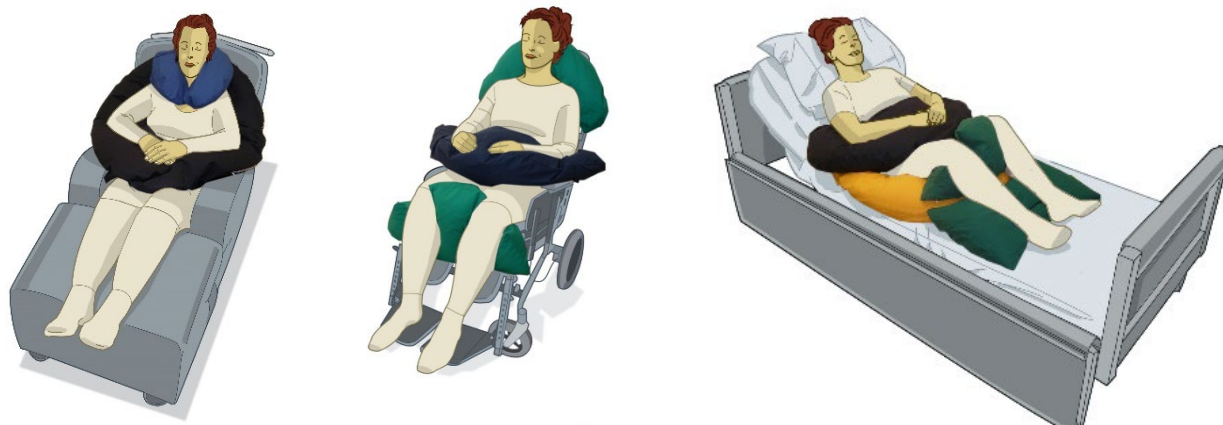

9. Puhdistus ja huolto

Päivittäinen Lasal-asentohoitotyyynyjen puhdistus

Pyyhi tynnyt mietoon saipualiuokseen kostutetulla liinalla. Tynnyjen tulee olla täysin kuivia ennen uudelleen käyttöä.

Desinfiointi ja pesu

Tynnyjen pinnan desinfiointiin käytä kertakäyttöisiä etanoliliinoja (esim. WET Wipe 70 %) tai kloori valmistetta 1000-1200 ppm (esim. Wet Wipe Chlorine Desinfection).

Puuvillapäällinen on konepestävä 60 asteessa ja hygieniapäällinen 95 asteessa. Molemmat päälliset voidaan rumpukuivata matalassa lämpötilassa

Puuvillapäällinen kutistuu pesussa noin 5 % ja väri haalistuu ajan mittaan.

Päällisten vetoketjut suljetaan pesun ajaksi, jottei ne vaurioitu pesussa.

⚠ Lasal-asentohoitotynnyjä EI SAA pestä koneessa. Konepesu vaurioittaa täytemateriaalin.

10. Säilytys

Älä altista tynnyjä korkeille lämpötiloille, pitkäaikaiselle ja voimakkaalle auringonvalolle tai muulle säteilylle.

10.1 Pitkäaikainen säilytys

Pitkäaikaisessa säilytyksessä (yli 3 kk) Lasal-tynnyt tulee säilyttää pimeässä ja hajuilta sekä kosteudelta suojassa. Asentohoitotynnyt tulee säilyttää +0-+40 asteessa.

11. Kierrätys ja hävittäminen

Hävitä käyttökelvottomat tuotteet ympäristön kannalta turvallisella tavalla.

Ota yhteyttä paikalliseen ympäristöviranomaiseen kysyäksi neuvoa.

12. Takuu

Cobi Rehab takaa että Lasal-asentohoitotyyny toimitetaan virheettöminä. Mikäli tyyny on vaurioitunut tai toimitettu virheellisesti, ole ystävällisesti yhteydessä välittömästi Cobi Rehabiin.

Takuuaika Lasal-asentohoitotyynyille on 1 vuosi toimituksen päiväyksestä ja kattaa valmistusvirheet tai viat vastaanotettaessa. Lasku/kuitti on takuutodistukseksi.

Takuu ei koske:

- tuotteita joiden sarjanumero, eränumero tai vastaava on poistettu tai merkittävästi vaurioitunut

- tuotteita jotka on korjattu muualla kuin tehtaan valtuuttamassa paikassa

Takuu ei kata:

- kuluvia osia

Takuu ei kata, mikäli Cobi Rehab arvioi että Lasal-asentohoitotyyny on käytetty virheellisesti.

Kun vaurio on johtunut virheellisestä käytöstä, asiakasta laskutetaan korjauksesta ja varaosista.

12.1 Vaaratilanteet

Ilmoita kaikista vaaratilanteista jotka liittyvät Lasal-asentohoitotyynyjen käyttöön Cobi Rehabille.

12.2 Toimenpiteet tuotteen odotetun käyttöön jälkeen

Odotetun käyttöön jälkeen tuotteelle tulee tehdä kokonaisarviointi tuotteen kunnosta ennen tuotteen jatkokäyttöä.

Tuotteen odotetun käyttöön jälkeen Cobi Rehab ei voi taata tuotteen turvallisuutta ja soveltuvuutta, koska Cobi Rehab ei ole valvonut miten tuotetta on käytetty ja kuinka paljon se on kulunut.

Tuotteen kokonaisarviointi on tehtävä ammattilaisen toimesta. Arvioinnissa on otettava huomioon miten tuotetta on käytetty, tuotteen kunto sekä tuotteen osien kunto. Cobi Rehab voi tehdä tällaisen arvion.

Cobi Rehab deltager gerne i konkrete afprøvningsopgaver hos brugere med komplicerede lejringsproblematikker.

Kontakt os på cobi@cobi.dk eller 7025 2522.

13. 13. Tekniset tiedot

Täyte	Erikokoiset polystyreeni helmet.
Sisempi päällinen	Polyuretaanikalvoinen palotestattu polyesterikangas. Home- ja kosteussuojattu
Puuvillapäällinen	100% ØKO-TEK®-sertifioitu puuvilla. Anti-bakteerinen käsittely
Hygieniapäällinen	Polyuretaanikalvoinen palotestattu polyesterikangas. Home- ja kosteussuojattu.
Tyynyn puhdistus	Tyynyä ei saa pestä koneessa, mutta pinnan voi pyyhkiä miedolla pesuaineella tai desinfiointiaineella.
Irtopäällisten pesu	Puuvillapäällinen voidaan pestä koneessa 60 °C:ssa ja hygieniapäällinen 95 °C:ssa. Molemmat päälliset voidaan kuivata rumpukuivauksessa alhaisissa lämpötiloissa. Puuvilla päällinen kutistuu noin 5 % ja väri haalistuu ajan myötä.
Säilytys	Älä altista tyynyjä korkeille lämpötiloille, pitkäaikaiselle ja voimakkaalle auringonvalolle tai muulle säteilylle
UDI-DI	5740000100014N5
ISO-luokitus	ISO 09.07.06
Tuotteen odotettu käyttöikä	2 vuotta

14. Lisävarusteet

Lasal-asentohoitotyynyjen tilaaminen päällisellä		
Sivulla 7 on kaikki saatavilla olevat Lasal-asentohoitotyynyt tuotenumeroineen. Tuotenumero koskee ainoastaan tyynyä.		
Tuotenumero hygieniapäälliselle loppuu 010 ja puuvillapäälliselle 020.		
Kuinka tilata tyyny ja päälliset:		
Asentohoitotyyny	Hygieniapäällinen	Puuvillapäällinen
Kolmiotyyny, pitkä, tuotenro 0305-721-000	0305-721-010	0305-721-020
T-tyyny, XL, tuotenumero 0305-6001-000	0305-6001-010	0305-721-020
Puolikuutyyny, tuotenumero 0305-801-000	0305-801-010	0305-801-020
Tilaa Lasal-tyyny algol-trehab@algol.fi		



COBI REHAB[®]

The Positioning Company



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab
Fuglebækvej 1D
DK-2770 Kastrup
Danmark
+45 7025 2522

cobirehab.com

Maahantuonti ja myynti:



Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi |
www.algoltrehab.fi