

Hoito- ja puhdistusohje kokoontaittuvaan / seinäkiinnitteiseen Nicke- hoitopöytään

- Maksimikuormitus:** Sallittu maksimikuorma 120 kg reunaputkien välillä.
- Ennen käyttöönottoa:** On hyvä tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa kankaan, ruuvien ja liitosten kiinnityskohdat. Mikäli kankaassa on reikiä, repeämiä tai jos saumoissa on purkaumia, täytyy kangas vaihtaa.
- Pöydän levittäminen:** Huomioi kokoontaitettavan hoitopöydän kallistumisriski!
- Pöytä asetetaan tasaiselle ja kiinteälle alustalle. Kaikkien jalkojen täytyy olla kosketuksissa alustaan silloin kun taso on tyhjä tai kevyesti lastattu. Lukitse jalat asettamalla lukituspinna sille kuuluvaan vastaruuviin. Huolehdi, että henkilö on hoitopöydän keskellä.
- Kankaan (makuualustan) hoito:** Pidä huoli, että terävät tai kulmikkaat esineet eivät pääse kosketuksiin kankaan kanssa. Pitkäaikaisessa käytössä kangas voi hieman venyä ja rypistyä reunaputkien keskelle. Suorista kangas reunaputkien myötäisesti.
- Pesu:** Puhdistuksessa voidaan käyttää tavallisia pyykinpesu- ja desinfiointiaineita. Vettäläpäisevä kangas voidaan pestä 40°C:ssa. Kuivausrumpua eikä valkaisuaineita saa käyttää. Tasokuivaus. Silitys miedolla lämmöllä. Liuottimia (lakkabensiiniä, tinneriä) ei saa käyttää.
- Kankaan vaihtaminen:** Pöytä taitetaan kokoon ja muoviset päätykappaleet irrotetaan. Vedä kangasta yhtä aikaa molemmista reunoista läpi urien. Työnnä lukituspinna kankaan päärmeeseen. Vedä kangas koko pituudeltaan uriin mahdollisimman symmetrisesti. Levitä hoitopöytä. Kiinnitä muoviset päätykappaleet takaisin paikoilleen.
- Henkilön asettaminen tasolle:** Henkilö asetetaan tasolle niin symmetrisesti kuin mahdollista reunaputkien väliin. Lyhyt henkilö asetetaan tasolle niin, että pään yläpuolella ja jalkojen alapuolella on yhtä paljon tilaa.

Onnea Nicke-hoitopöydän käyttöön!



Kokoontaittuva taso kotiympäristössä varustettuna vettäläpäisevällä kankaalla.

Hoitopöytää on saatavana 120, 140 och 160 cm pituisena.
Kaikki ovat CE-merkittyjä.

Makuualustoja/kankaita on kahta vaihtoehtoa:

- Vettäläpäisevä valkoinen kangas, elastinen ja pehmeä
- Galon-kangas, sininen

Säilytystasku, pesupussi ja roiskesuoja ovat saatavana lisävarusteina.