

GATE

REHAB DEVELOPMENT AB™



Bure Rise & Go™

StandTall-kävelyteline sähköisellä nousutoiminnolla

Kokonaan
uusi
järjestelmä!

Bure Rise & Go™

StandTall-kävelyteline sähköisellä nousutoiminnolla

The Bure Rise & Go on kustannustehokas kävelyteline, joka on varustettu patentoidulla sähkötoimisella nousutoiminnolla. Tämän sähkötoimisen nousutoiminnon ansiosta Bure Rise & Go toimii yhdistettynä seisomaan nousemisen, liikkumisen ja kävelyn apuvälineenä, kaikkien toimintojen sisältyessä yhteen laitteeseen.

UUTTA! – Rise & Go on nyt myös saatavana kävelytelineen alustan sähkötoimisella levennystoiminnolla varustettuna. Joustava levennystoiminto yhdessä alustan mataluuden kanssa lisää monikäyttöisyyttä potilaan tilanteesta riippumatta sairaalassa tai kotona.



Vaihe 1

Liivi sovitaan potilaan alaselän ja takamuksen yli, hihnat säädetään ja säädrituet pannan oikeaan asentoon.

Vaihe 2

Potilas tukeutuu kahvoihin ja sähkötoiminen nousutoiminto käynnistyy. Potilas nousee pystyyn luonnollista liikerataa seuraten erikoisliivin ja pystysuoran nostotoiminnon tukemana.

Vaihe 3

Sähkötoimisen nousutoiminnon päätyttyä säädrituet käännetään sivuun ja potilas voi kävellä vapaasti StandTall-kävelytelineen avulla. Potilas voi vaihtoehtoisesti asettaa jalkansa jalkalaudalle, minkä jälkeen siirtäminen on mahdollista sähköavusteisen nousun päätyttyä.

Ainutlaatuinen sähkötoiminen nousuapu

Bure Rise & Go säästää aikaa, tilaa ja rahaa. Se toimii seisomaan nousemisen, liikkumisen ja kävelyn apuvälineenä yhdessä ja samassa tuotteessa, mikä tekee järjestelmästä erittäin kustannustehokkaan.

Bure Rise & Go tarjoaa paremman työergonomian hoitajille, terapeuteille ja kaikille muille potilaiden parissa työskenteleville. Kätevän sähkötoimisen nousuavun ansiosta seisomaan nouseminen muuttuu turvalliseksi, luotettavaksi ja luonnolliseksi toiminnoksi, selkävaivoja terveydenhoitohenkilöstölle aiheuttamatta.

Tuote koostuu kävelytelineestä ja siihen liittyvästä liivistä hihnoineen. Liivejä on saatavissa erikokoisina (S, M ja L), ja ne ovat takaa avonaisia esim. WC-käyntien helpottamiseksi.

Kun potilas nousee ylös, sähkötoiminen nousutoiminto tulee käyttöön ja potilas lähenee kävelytelinettä, kunnes hän seisoo pystyssä. Bure Rise & Go vähentää työn kuormitusvaikutusta ja toimii investointina henkilökunnan terveyteen ja potilaiden kuntoutumiseen.

Uutta - Rise & Go on nyt myös saatavana kävelytelineen alustan sähkötoimisella levennystoiminnolla varustettuna. Joustava levennystoiminto yhdessä alustan mataluuden kanssa lisää monikäyttöisyyttä potilaan tilanteesta riippumatta sairaalassa tai kotona.

Tukeva

Kävelytelineessä on anatomiset tyynt, jotka helpottavat olkapäihin, käsivarsiin ja niskaan kohdistuvaa painetta ja siirtävät vastuuta suuremmille lihasryhmille, kuten jalka- ja rintalihaksille. Tämä lisää vakautta ja helpottaa kävelytelineen ohjaamista.

Joustava portaaton säätö

Kävelytelineen säätäminen ennalta valitulle korkeudelle on helppoa sähkötoimisen korkeussäädön avulla. Kun potilas on seisoma-asennossa, korkeutta voidaan säätää portaattomasti optimaalisen kävelyasennon kannalta miellyttävään ja sopivan tuen aikaansaamiseksi.

Sähkötoiminen nosto

Bure Rise & Go on ainutlaatuinen apuväline potilaiden tai käyttäjien avustamiseksi seisomaannousun aikana. Henkilökunnan työ kevenee ja toistuvat rasitusvammat minimoituvat.

Vesitiivis

Kaikkien Bure Rise & Go –kävelytelineen sähkökomponenttien suojausluokka on IP 65, mikä mahdollistaa niiden käytön märkätiloissa.

Matala korkeus

Matala korkeus lattiasta minimoi käyttäjän lähelle pääsemisen kaltaisia ongelmia esim. potilaan istuessa sängyllä.

Avoin, vahvistettu rakenne

Avoin rakenne tarjoaa saman tukevuuden mutta enemmän tilaa toiminnolle. Potilas ei tunne olevansa suljettu telineen sisään, ja nousun ja pukeutumisen avustaminen helpottuu. Bure Rise & Go on myös erikoisvahvistettu nousutoimenpiteen vakauttamiseksi.

Helppopääsyiset hallintapainikkeet

Käsiohjaimen hallintapainikkeiden sijainti on helppokäyttöinen sekä hoitajalle että käyttäjälle.

Ergonomiset kahvat

Ergonomiseksi suunnitellut kahvat ovat kaikkiin suuntiin portaattomasti säädettävät optimaalisen yksilöllisen sovituksen tarjoten. Tämä on äärimmäisen tärkeää aivohalvauspotilaille, jotka kykenevät näin saavuttamaan ”tavanomaisen” kädenasentonsa.

Käännettävät käsinojat

Bure Rise & Go –kävelytelineen anatomiseksi suunnitellut käsinojat voidaan taittaa sivuun helpottamaan käyttäjän kurkottamista kahvoihin nousutoimenpiteen aikana.

Kestävä

Kävelyteline on suunniteltu pitkään kestäväksi. Siinä on esimerkiksi ylimääräiset vahvistushihnat käsinojatyyppien ympärillä niiden estämiseksi hajoamasta sivutörmäysten yhteydessä.

Ainutlaatuinen nostoliivi

Sähkötoimisen nousutoiminnon yhteydessä käytettävä liivi on suunniteltu ulottumaan mahdollisimman pitkälle alas takamuksen ympäri. Tämä tarjoaa optimaalisen tuen ja johtaa luonnolliseen seisomiseen.

Säärituki nousutoimintoa varten

Bure Rise & Go on varustettu säärituilla, jotka tehostavat nousutoimintoa; ne ovat korkeussäädettävät ja helposti sivuun käännettävät lisätilan saamiseksi.

Lukittavat pyörät

Bure Rise & Go –kävelytelineessä on neljä erikseen lukittavaa pyörää vakiovarusteena.

Sähkötoiminen alustan levennys

Sähkötoiminen alustan levennys helpottaa StandTall-kävelytelineen siirtämistä hyvin lähelle käyttäjää tarvitsematta huolehtia pyörätuolin leveydestä, sängyn rakenteesta tai istuimen leveydestä. Alustan ollessa leveimmillään kävelyteline on erityisen tukeva ja palvelee parhaiten ylimääräistä kävelytilaa tarvitsevia potilaita.

Tekniset tiedot



CE Testattu ja hyväksytty standardin SS-EN 12182:1999 mukaisesti

Osa nro.		Ulkoleveys	Käyttäjän max.paino	Pituus	Korkeus	Käsinojat/sisämitta
56-309/75	Rise & Go DB sähkötoiminen alustan levennys	66-106 cm	150 kg	101 cm	89-129 cm	34-67 cm
56-316	Rise & Go StandTall-kävelyteline	77 cm	150 kg	92 cm	97-137 cm	34-67 cm
56-333-DB	Jalkalauta, lyhyt		150 kg			
56-383-DB	Jalkalauta, pitkä		150 kg			
56-384-S/M/L/XL	Liivi (saatavissa kokoina S, M, L, XL*)	-	150 kg	-	-	-
56-388-S/M/L/XL	Kävelyharjoitteluliivi (saatavissa kokoina S, M, L, XL*)	-	150 kg	-	-	-

* S=95-105cm, M=105-120cm, L=110-140cm, XL=130-160cm

Bure Rise & Go™

StandTall-kävelyteline sähkötoimisella nousutoiminnolla

- BURE RISE & GO on ratkaisu, joka säästää aikaa, tilaa ja rahaa, mikä merkitsee suurta kustannustehokkuutta.
- TURVALLINEN, VARMA seisominen ja liikuteltavuus merkitsevät parempaa työympäristöä terveydenhuoltohenkilöstölle.
- AINUTLAATUINEN sähkötoiminen nousuapu tarjoaa luonnollisen toiminnon, joka sallii potilaan aktiivisen osallistumisen.
- BURE RISE & GO on patentoitu, suojattu GATE Rehab Development AB -merkkituote.
- KÄVELYTELINETTÄ voidaan käyttää astinlautan kanssa, joka tekee potilaiden siirrosta helppoa.
- LIIVI VOIDAAN PESTÄ 60 °C:ssa, ja jaetun rakenteensa ansiosta sitä on helppoa ja joustavaa käyttää jopa esim. WC-käyntien yhteydessä.
- BURE RISE & GO on varustettu vaivattomalla, portaattomalla sähkötoimisella korkeussäädöllä.
- UUTTA -Rise & Go on nyt saatavissa myös sähkötoimisella kävelytelineen alustan levennyksellä joustavuuden lisäämiseksi kaikissa käyttöympäristöissä.

Astinlauta on erinomainen apu potilaiden siirroissa!



Kävelyharjoitteluliivi

(lisävaruste)


Kävelyharjoitteluliivit ovat turvavarusteita, joita käytetään Bure Rise & Go –kävelytelineen käyttöä harjoiteltaessa. Liivin kaksi haarahihnaa ja kiinnityskoukut toimivat turvavarusteina käyttäjän huimauksen tms. tilanteiden varalta.



GATE

WE DO BETTER.

Myynti:
Algol-Trehab Oy
Karapellontie 6, 02610 Espoo
Puhelin +358 (0)9 5099 331
algol-trehab@algol.fi
<http://www.algoltrehab.fi>

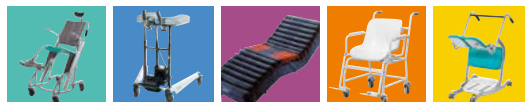

GATE COLLECTION