

KÄYTTÖOHJE

Somna Painopeitto HD™

Somna Painopeitto HD™ -painopeitto rauhoittaa ja lievittää levottomuutta. Peiton pitkittäiset ketjut myötäilevät kehon linjoja ja saavat aikaan miellyttävän sisään sulkevan tunteen.

Somna Painopeitto HD™ -painopeiton ominaisuudet ovat samat kuin Somna Painopeitto™-peitossa, mutta se on tarkoitettu päivkäyttöön. Peiton toiminta perustuu tieteellisiin tutkimuksiin painon rauhoittavasta vaikutuksesta.

Somna Painopeitto HD™ -painopeitto on kaksitoiminen: toinen puoli on ketjupuoli ja toinen puoli on pehmustettu. Ketjupuoli kehoa vasten käyttäjä saa lisästimulaatiota kosketusaistille. On yksilöllistä, kumpi puoli tuntuu mukavammalta.

Somna Painopeitto HD™ -painopeitto on valmistettu kestävästä ja käytännöllisestä tummanharmaasta kankaasta, joten peittoa voi käyttää ilman pussilakanaa.

Somna Painopeitto HD™ -painopeitto on apuvälinetietokannassa.



KÄYTTÖAIHEET

- Levottomuus ja ahdistus
- Neuropsykiatriset häiriöt (ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, Autismi ja Touretten oireyhtymä)
- Psykkiset ongelmat
- Dementia
- Aivovamma
- Unihäiriöt
- Spastisuus
- Neurologiset sairaudet
- Anoreksia ja Bulimia
- Ikääntyminen
- Motorinen levottomuus

KOOT JA PAINOT

- 15 kg, mitat noin 205 x 140 cm
- Jaettava/vetoketju

PESUOHJE



Somna Painopeitto HD™
-painopeitto tulee aina pestä
mukana tulevassa pesupussissa.



Valkaisu kielletty.



Hienopesuohjelma, lämpötila
enintään 60 astetta.



Silitys kielletty.



Voidaan jakaa kahteen osaan
avaamalla vetoketju.



Kemiallinen pesu
tetrakloorieteenillä.



Uudelleen käsittely
voidaan tehdä 70 asteessa.



Rumpukuivaus kielletty.

TUOTETIEDOT



Somna Painopeitto HD™
-painopeitto on valmistettu
syttymättömästä materiaa-
lista, ja se täyttää
SS-EN ISO 12952-1:2010
-standardin vaatimukset.



Patentoitu.



Somna Painopeitto HD™
-painopeitto on
ruotsalainen tuote.



Somna Painopeitto HD™
-painopeitto on CE-merkitty.

Valmistettu Stenkullenissa,
Ruotsi.

VAROITUS

Jos käyttäjän sydämen tai keuhkojen toiminta on heikentynyt, käänny
lääkärin puoleen ennen Somna Painopeitto™ -painopeiton käyttöä.

Lattialla oleva peitto voi aiheuttaa kompastumisriskin.

Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on
implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa
tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.