

KÄYTTÖOHJE

Somna Painoliivi™

Somna Painoliivin™ vaikutus perustuu Somna Painopeitto™-painopeiton lailla paineen tunteeseen kehoa vasten. Somna Painoliivi™ vaikuttaa tunto-, ta-sapaino-, lihas- ja nivelaisteihin, millä on rauhoittava vaikutus.

Somna Painoliivi™ on valmistettu kestävästä ja käytännöllisestä tummanharmaasta kankaasta.

Liivin kireyttä voi itse säätää halutun vaikutuksen saamiseksi.

KÄYTTÖAIHEET

- Levottomuus ja Ahdistus
- Neuropsykiatriset häiriöt (ADHD, ADD, Aspergerin oireyhtymä, Autismi ja Touretten oireyhtymä)
- Psykkiset ongelmat
- Dementia
- Aivovamma
- Unihäiriöt
- Spastisuus
- Neurologiset sairaudet
- Anoreksia ja Bulimia
- Ikääntyminen

	Koot	Paino, noin	Painokausus	Kokonaispaino
○	110/122	1 kg	Small 1,35 kg	2,35 kg
○	128/140	1,5 kg	Small 1,35 kg	2,85 kg
○	146/158	2 kg	Small 1,35 kg	3,35 kg
○	Small	2,5 kg	Large 2,3 kg	4,8 kg
○	Medium	3 kg	Large 2,3 kg	5,3 kg
○	Large	3,5 kg	Large 2,3 kg	5,8 kg
○	X-Large	4 kg	Large 2,3 kg	6,3 kg

Liivin pukeminen päälle

Somna Painoliivi™ on tarkoitus pitää niin lähellä kehoa kuin mahdollista. Liiviä voidaan käyttää vaatteiden alla tai päällä.



1



2



3

Pue liivi tiukasti päälle.

Kiinnitä soljet.



4

*Kiristä nauhoja halutun
paineen saamiseksi.*



5

*Jos haluat lisäpaineen tuntua,
käytä painokaulusta.*

Painokaulus



Painokauluksessa on kolme kiinnityskohtaa, joissa on painonapit. Kaksi on edessä ja yksi takana.



Painokaulusta voi käyttää myös ilman liiviä.

PESUOHJE

Somna Painoliivi™ ja painokaulus tulee aina pestä mukana tulevassa pesupussissa.



Kemiallinen pesu kielletty.



Rumpukuivaus kielletty.



Hienopesuohjelma, lämpötila enintään 60 astetta. Pestävä samanväristen kanssa.



Painokaulusta ei saa kuumentaa/lämmittää.

TUOTETIEDOT

Somna Painoliivi™ on valmistettu syttymättömästä materiaalista, ja se täyttää SS-EN ISO 12952-1:2010 -standardin vaatimukset.



Somna Painoliivi™ on CE-merkitty.



Somna Painoliivi™ on ruotsalainen tuote.

Valmistettu Stenkullenissa, Ruotsi.

VAROITUS

Painava tai kireälle kiinnitetty liivi ja keuhkojen heikentynyt toiminta voivat yhdessä johtaa siihen, että käyttäjän hengityskyky heikkenee liikaa.

Jos käyttäjällä on tällainen riski, liivin käyttöä tulee valvoa.

Lattialla oleva liivi voi aiheuttaa kompastumisriskin.

Liivi sisältää teräsketjuja. Käänny lääkärin puoleen, jos käyttäjällä on implantti tai lääkinnällinen apuväline, jonka toimintaa tuotteen sisältämä metalli voi häiritä.

Liivi voi muodostaa kiinnijäämisen riskin leikeissä.



MYYNTI JA MAAHANTUONTI:
www.algoltrehab.fi
algol-trehab@algol.fi



20160427

