


UUTUUS 2019
Mover Aqua

SIIRTOLAITE

Mover-siirtolaite on kehitetty mukavaan ja sujuvaan siirtymiseen sisätiloissa ja tasaisella alustalla. Sen käyttö on yksinkertaista, ja sen avulla käyttäjä pääsee siirtymään turvallisesti ja miellyttävästi. Moverin kapea alustaosa ja paripyörät tekevät siitä helposti ohjailtavan ahtaissakin tiloissa. Vakaa jalkalevy, pehmeät istuintyyny ja katsekontakti hoitajaan varmistavat Moverin käyttäjälle koko ajan hyvän ja turvallisen olon. Mover Aqua on suunniteltu soveltuvaksi myös märkätila- ja suihkukäyttöön. Sen mahdollistavat PU-tyynyt ja ruostumattomat ratkaisut. Uusi suunnittelu helpottaa myös tuotteen kuivausta ja puhdistusta.

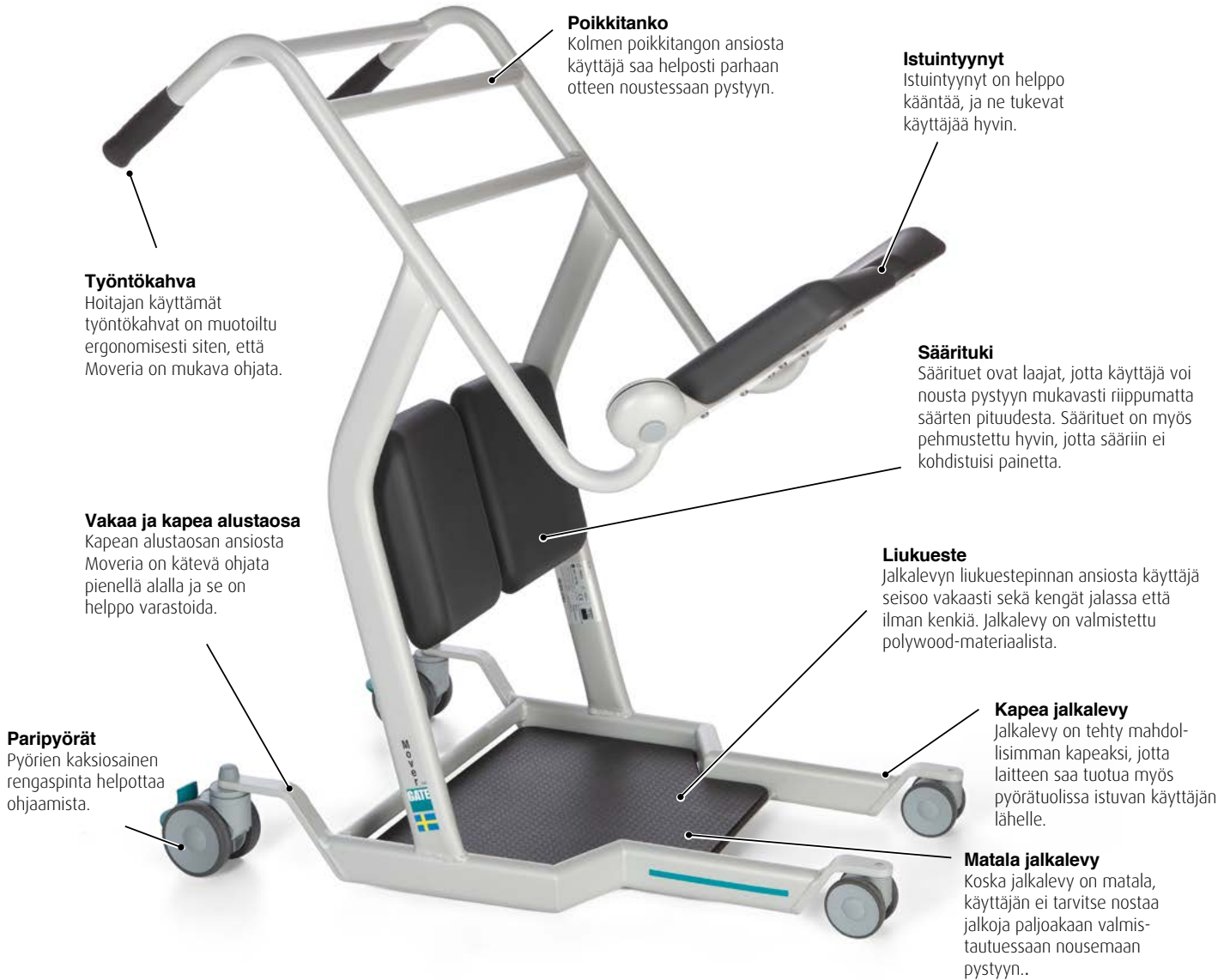

Tekniset tiedot

CE Lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY

Tuotekoodi	Tuote	Käyttäjän enimmäispaino	Leveys – ulkomitat	Leveys – jalkalevy	Korkeus	Pituus	Istumakork.	Paino
53-301	Mover Aqua siirtolaite	180 kg	635 mm	380 mm	1070 mm	960 mm	800 mm	28 kg

GATE

WE DO BETTER.

Haluatko lisätietoja?

Ota meihin yhteyttä: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | SE-333 75 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION

Tekniset tiedot

Kuvanro	Tuotekoodi	Kuvaus
1	53-341	Varsiruuvi M10, Ø30 mm
2	53-342	Ruuvi, polvitukilevy (x4)
3	53-344	Kumikädensija, pituus 92 mm (x2)
4	53-311	Aqua-jalkalevy
5	53-336	Ruuvi, istuintaso (x3)
6	53-337	Ruuvi, jalkalevy (x4)
7	53-338	Aluslevy, istuintaso (x3)
8	53-339	Lukkomutteri M10
9	53-340	Aluslevy M10
10	53-312	Jarruton paripyörä Ø75 mm
11	57-096	Kaksitoimisella jarrulla varustettu paripyörä Ø100 mm (Aqua)
12	53-343-L	Tukirauta, vasen istuinlevy
13	53-343-R	Tukirauta, oikea istuinlevy
14, 15	57-394	Istuma-/polvituki PUR (Aqua)
16	53-334	Aluslevy, polvitukilevy (x4)
17	53-330	Suojus/ruuvi, harmaa
18	53-331	Hatturengas

Puhdistus

Tuote tulee puhdistaa/desinfioida säännöllisesti: jokaisen käyttökerran jälkeen tarpeen mukaan tai vähintään kerran päivässä.

Puhdista tuote pyyhkimällä se lämpimällä vedellä ja desinfioidulla puhdistusaineella kostutetulla liinalla. Kuivaa huolellisesti, jotta kaikki pinnat tulevat tehokkaasti desinfioiduiksi.


Älä käytä klooria, fenoleja, pentanoleja tai muita voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pintoja tai kuivattaa tyyntyjä ja saada ne halkeilemaan ennakkaaisesti.

Kierrätys/hävittäminen

Kun tuotetta ei enää voi käyttää, kaikki sen osat tulee kierrättää noudattaen kunkin maan jätteiden käsittelyä koskevia lakeja ja määräyksiä. Kaikki sähköiset osat, mukaan lukien paristot ja akut, poistetaan ja kierrätetään asianmukaisesti erikseen.

(Tiedustele lisäohjeita tuotteen eri materiaalien (metalli, muovi, sähkö- ja elektroniikkaromu) kierrättämiseen paikalliselta kierrätyksen järjestäjältä.)

Tekniset tiedot

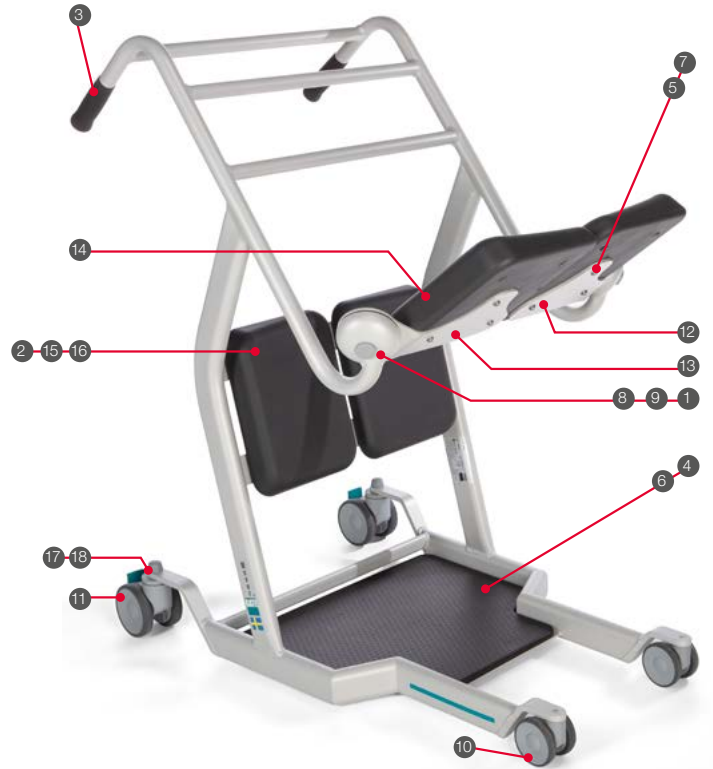

Huolto ja kunnossapito

Ennaltaehkäisevän huollon kaavio

Jos tuotetta tarkastettaessa havaitaan viallisia tai rikkiäisiä osia, tuotetta ei tule käyttää ennen kuin ne on vaihdettu.

Toimenpide/tarkastus	Aina ennen käyttöä	Vuosi-huolto
Tarkista yleisesti. Testaa tuotteen toiminnot. Tarkista, ettei mikään osa ole rikki tai säröillä. Tarkista, että tuote tuntuu vakaalta.	X	X
Tarkista, että istuinosaan molemmat puolet kääntyvät ylös/alas.	X	
Tarkista, että takapyörät pyörivät ja jarruttavat.	X	
Tarkista, että jalkalevy on lujasti kiinni.	X	X
Tarkista, että pyörät ovat kunnolla kiinni rungossa.		X
Tarkista, ettei vaurioille alttiissa osissa ole halkeamia tai teräviä reunoja (ne voivat olla epähygieenisiä tai vahingoittaa avustettavaa).		X
Tarkista, etteivät ruuviliitokset ole löysiä.		X
Paikkaa mahdolliset pintavauriot pintakorroosion ehkäisemiseksi. Tämä on erityisen tärkeää Mover Aqualle. Korjausmaalia voi tilata jakelijalta.		X