



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

## KÄYTTÖOHJE

# COBI-ASENTOHOITOTYYNYT

Parantaa vuodepotilaiden elämänlaatua ja varmistaa optimaalisen asento-hoidon 24 tuntia vuorokaudessa.

Cobi-asentohoitotyyntyt ovat kehitetty korkeatasoiseen asentohoitoon XXL-kokoisille, muistisairaille, geriatrisille, neurologisille, palliatiivisessa hoidossa oleville sekä kroonisille kipupotilaille. Käytetään esim. hoitolaitoksissa, sairaaloissa ja yksityiskodeissa.



- Paineen tasaus.
- Tyynynpäällinen on antibakteerisesti käsitelty.
- On monikäyttöinen ja hyvin muotoutuva.
- Sisältää kaksi erilaista irrotettavaa ja pestävää päällistä.
- Antaa tuntoärsykeitä.
- Cobi Rehab -asentohoitotyyntyt ovat kehitetty yhdessä dementiaan ja neurologiaan erikoistuneiden yksiköiden kanssa.



Scan eller klik på koden og find produktet på HMI-basen.



Cobi Rehab og Cobi Rehabs leverandører overholder FN's konventioner om børne- og tvangsarbejde og ILO 029, C132 samt C182.

# Sisällys

1.Turvallisuus .....	3
2.Merkkien selitys .....	4
3.Yleistä .....	5
4.Käyttö .....	5
5.Cobi-asentohoitotyyny .....	6
6.Cobi-asentohoitotyynyvalikoima .....	7
7.Tietoa erilaisista asentohoitotyynyistä .....	8
8.Asentohoitotyynyjen käyttö.....	11
9.Puhdistus ja huolto .....	14
10.Säilytys .....	14
11.Kierrätys ja hävittäminen .....	15
12.Takuu.....	15
13.Tekniset tiedot .....	16
14.Lisävarusteet .....	17


# 1. Turvallisuus

---



## VAROITUS

Cobi-asentohoitotyyntyjä saa käyttää vain koulutetun henkilökunnan tai opastettujen henkilöiden antaman perusteellisen ohjauksen jälkeen. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vahinkoa käyttäjälle.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen Cobi-asentohoitotyyntyn käyttöä. Turvallisuusohjeet on syytä lukea huolellisesti. Ne ovat korostettu  -merkillä.

Cobi Rehab ei vastaa vahingoista, jotka kohdistuvat tuotteeseen tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat Cobi-asentohoitotyyntyn väärinkäytöstä.

Ota yhteyttä Cobi Rehabiin, mikäli tuotteen osat ovat vahingoittuneet tai kadonneet. Älä koskaan käytä omia varaosia.

Cobi Rehab ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka johtuvat ilman sen kirjallista lupaa tehdyistä korjauksista.



## TURVALLISUUSOHJEET









Tässä käyttöoppaassa oleva symboli  tarkoittaa turvallisuusohjetta. Turvallisuusohjeita on noudatettava huolellisesti.

Cobi-asentohoitotyyntynyt ovat tarkoitettu ainoastaan sisätiloissa käytettäväksi ja niitä ei saa pestä pesukoneessa eikä altistaa voimakkaille kemikaaleille.

Älä altista Cobi-asentohoitotyyntyjä korkealle lämpötilalle, pitkäaikaiselle ja suoralle auringonvalolle, kylmälle tai muulle säteilylle, se voi vaikuttaa tuotteen pintalämpötilaan ja kestävyYTEEN.


Ota yhteyttä Cobi Rehabiin kaikissa Cobi-asentohoitotyyntyn huoltoon ja varaosiin liittyvissä asioissa.

## 2. Merkkien selitys


	Varoitus!
	Vaatimustenmukaisuusvakuutus, lääkkinnällisiä laitteita koskeva asetus, EU 2017/745
	Cobi nimikkeen numero
	Eränumero
	Tuotantovuosi
	Valmistaja
	Lääketieteelliset laitteet, luokka I
	Tutustu käyttöohjeeseen
<p>CE-merkki on kiinnitetty jokaiseen kelluntatyynyyn.</p> <p>Katso alla oleva esimerkki CE-merkinnästä.</p>	




Pude/Cushion

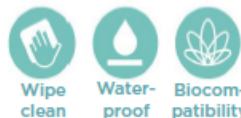


Incontinence cover

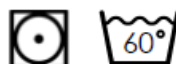


Eco-cover

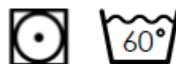

Pude/Cushion: PE & PP (recyclable), skum/foam OEKO-TEX Polyamid impreg. w. PU. Anti-bacterial coating 

Incontinence cover: Polyamid impregn. w. PU. Anti-bacterial behandl./coating

Eco-cover: OEKO-TEX® 100 Bomull/Cotton, Modacryl 

Pude/Cushion no: 0400-074-000

Incontinence cover no: 0400-074-010

Eco-cover no: 0400-074-015

 Medical Device



**COBI REHAB**  
Fuglebaekvej 1D, DK-2770  
DENMARK  
[www.COBIREHAB.com](http://www.COBIREHAB.com)

Contact:  
DENMARK: +45 70 2525 22  
SWEDEN: +46 8-7029774

## 3. Yleistä

---

Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä tietoja Cobi-asetotyyppien käytöstä ja mille potilasryhmistä niitä voidaan käyttää. Se sisältää myös joitakin Cobi-asetotyyppien koskevia teknisiä tietoja.

Tämän käyttöoppaan uusin versio on verkkosivuillamme. Tarkista, onko käyttämäsi versio uusin.

Mikäli tarvitset käyttöoppaan suuremmalla kirjaskoolla, on tuoteseloste saatavana PDF-tiedostona osoitteessa [cobirehab.com](http://cobirehab.com), jonka voit skaalata tarvittavaan kirjaskoon.

Lisätietoa Cobi-asetotyyppien käytöstä saat Algol Trehabista puhelimitse 09 5099 331 tai s-posti: [algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi)

Cobi Rehab pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotetietoja ilmoittamatta siitä etukäteen.

UDI-numero on jokaisessa Cobi-asetotyyppien sivusaumassa olevassa tuotelapussa.

Mahdolliset tuoteturvallisuusilmoitukset ja takaisinvedot on ilmoitettu verkkosivuillamme.

## 4. Käyttö

---

Cobi-asetotyyppiä voidaan käyttää lähes kaikissa tilanteissa, joissa kehoon kohdistuvaa painetta pitää saada vähennettyä ja asentoa hyvin tuettua.

Juuri näistä syistä Cobi-asetotyyppiä käytetään erilaisissa hoitolaitoksissa, saattohoitokodeissa sekä kotihoidossa, joissa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia.

Cobi-asetotyyppiä käytetään aina päällisen kanssa. Tyynyihin on saatavilla kahta erilaista päällistä.

Hygieniapäällinen on käsitelty antibakteerisesti ja on materiaaliltaan PU. Hygieniapäällinen on hengittävä, joustava ja paloturvallinen. Jersey-päällinen on valmistettu 100 % luomu puuvillasta, joka on pehmeää ja joustavaa materiaalia.

Potilasryhmät

- XXL-kokoiset
- muistisairaat
- geriatriset
- neurologiset

- palliatiivisessa hoidossa olevat
- krooniset kipupotilaat

Yhteistä näille potilaille on riski saada kudosis- ja painevaurioita.

### Asentotyyppi ja muut apuvälineet

Cobi-asetotyyppi ovat yhteensopivia Cobi Rehabin muiden apuvälineiden kanssa, kuten Lasl Asentotyyppien, Kelvin Comfort pyörätuolin ja Reden Kuljetusalustan kanssa.

### Uudelleenkäyttö

⚠ Huomioi, että Cobi-asetotyyppi tulee desinfioida ennen kuin käytät niitä seuraavalla käyttäjällä. Tämä tulee tehdä, jotta vältetään ristikontaminaatioilta. Katso kohta Puhdistus ja huolto.

Cobi-asetotyyppien irtopäälliset tulee pestä huolellisesti tai vaihtaa ennen seuraavaa käyttäjää.

## 4.1 Kontraindikaatiot

Cobi-asetotyyppien käytölle ei ole kontraindikaatioita eli vasta-aiheita.

## 5. Cobi-asentohoitotyynyt

Cobi Rehab -asentohoitotyynyt on kehitetty yhdessä dementian ja neurologian erikoisyksiköiden kanssa.

Asentohoitotyynyt ovat monikäyttöisiä ja ne pitävät hyvin muotonsa, pysyvät hyvin paikoillaan ja tukevat asentoa laajalla tukipinnalla. Tällä tavoin asentohoitotyynyt tasaavat kudoksiin kohdistuvaa painetta.

### Anatominen muotoilu ja tietyn painoinen

Cobi-asentohoitotyynyt on muotoiltu siten, että tyynyt voidaan asetella mahdollisimman tiiviisti käyttäjän kehoa vasten.

Tyynyt ovat tietyn painoisia, joka auttaa tyynyjen pysymistä paikoillaan ja näin tukevat käyttäjän kehoa asentohoidossa.

Tyynyjen täyte on 3 mm styreenihelmiä, viskoelastista vaahtoa, kylmäpuristettua vaahtoa ja SEBS-rakeita. Jokainen tyyny täytetään sopivalla määrällä kutakin täyteainetta.

### Lasal-asentohoitotyynyt

Cobi Rehabin valikoimissa on myös yli 40 erilaista Lasal-asentohoitotyynyä. Kahden tyyppiset asentohoitotyynyt luovat rajattomat mahdollisuudet yksilölliseen asentohoitoon. Yhdessä ne tuovat mukavuutta, vähentävät kehoon kohdistuvaa painetta, rentouttavat ja tukevat koko kehoa.

Lasal-asentohoitotyynyissä ei ole samanlaista painoa täyteen koostumuksessa kuin Cobi-asentohoitotyynyissä. Tyynysarja on erilainen, tyynyt on muokattavissa kehon muotojen mukaisesti ja ne on helppo asettaa mahdollisimman lähelle vartaloa, tyynyillä on helppo täyttää kehon ja tukipinnan väliin jäävät alueet. Yli 40 Lasal-asentohoitotyynyä, sisältäen eri kokoisia ja muotoisia tyynyjä, mahdollistavat yksilöllisen ja joustavan asentohoidon toteuttamisen helposti.

Lasal-asentohoitotyynyt ovat saatavilla kirkkaan värisillä puuvillapäällisillä. ärit auttavat tyynyjen asettelussa.

Suosittellemme Lasal- ja Cobi-asentohoitotyynyjen yhdistelmää moniin asentohoidon tilanteisiin.

Aina voit olla yhteydessä meihin ja pyytää lisätietoa. Haastavissa asentohoidon tilanteissa voit pyytää meiltä apua ongelman ratkaisemiseksi paikan päällä.



Asentohoito Cobi U-tyynyllä, Cobi-putkityynyllä ja Cobi-evätyynyllä.

Saatavilla on kahta erilaista päällistä; hygienia-päällinen ja jersey-päällinen. Molemmat päälliset ovat hengittäviä, antibakteerisesti käsiteltyjä ja joustavia.



Ote yli 40 erilaisen Lasal-asentohoitotyynyjen valikoimastamme.

## 6. Cobi-asettohoitotyynyvalikoima



Cobi Fin Cushion  
= Cobi-evätyyny



Cobi H-cushion  
= H-tyyny



Cobi Cylinder Short Cushion = Cobi-putkityyny, lyhyt




Cobi Seahorse Junior =  
Cobi Merihevonen Junior -tyyny



Cobi small pillow  
= pieni Cobi-tyyny



Cobi Large pillow  
= iso Cobi-tyyny

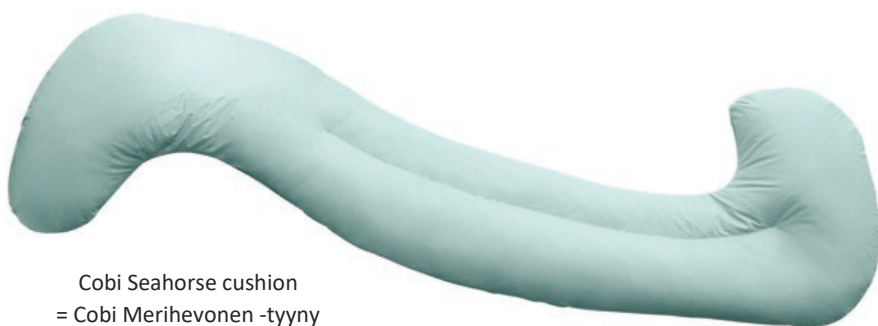

Cobi Seahorse cushion  
= Cobi Merihevonen -tyyny



Cobi U-cushion = U-tyyny



Cobi Universal Cushion  
= Cobi-yleistyyyny



Cobi Flexi Cushion = Cobi Flexi -tyyny



Cobi Robust Cushion = Cobi-Robust - pitkä putkityyny



Cobi Lab Cushion  
= Cobi-sylityyny



Cobi Heel/arm Cushion  
= Cobi-kiilatyyny



Cobi Wedge Cushion  
= Cobi-leveä kiilatyyny



## 7. Tietoa erilaisista asentohoitotyynyistä

### 7.1 Cobi Merihevonen / Merihevonen junior -tyyny

Täydellinen tyyny kylkimakuulle. Valitse tämä tyyny hyvän kylkimakuu-asennon tukemiseen.

**Merihevonen:** tuotenumero 0400-056-000

**Merihevonen junior:** tuotenumero 0400-057-000



Cobi Merihevonen Junior -tyyny | 127x27x12 | 2,5 kg.

Cobi Merihevonen -tyyny | 186x51x26 | 5 kg.

### 7.2 Cobi-evätyyny

Cobi-evätyyny on tarkoitettu lisävarusteeksi Cobi Merihevoselle ja se asetetaan tukemaan nilkan- ja jalkateränasentoa, jolloin se vähentää alueille kohdistuvaa painetta.

Evä-tyynyä yksistään voi käyttää pään ja kaularangan tukemiseen.

**Cobi-evätyyny:** tuotenumero 0400-058-000



Cobi-evätyyny | 64x34x | 0,6 kg.

### 7.3 Cobi Flexi -tyyny

Muotoilunsa ansiosta Flexi-tyynyä voidaan käyttää vartalon tukemiseen Semi-Fowler-asennossa (puoli-istuva-asento vuoteessa). Flexi-tyynyä voidaan käyttää kuten U-tyynyä monipuolisesti eri asentohoito-tilanteissa.

Flexi-tyyny voidaan asettaa vartalon taakse, eteen tai käyttäjän ympärille. Kun käyttäjä on puoliselinmakuuasennossa tai vatsamakuulla nojautuen tyynyä vasten, tyynyn muotoilun ansiosta keho saadaan rajattua erittäin stabiililla tuella.



Cobi Flexi -tyyny | 194x27x15 | 3,7 kg.

### 7.4 Cobi Robust - pitkä putkityyny

Robust-putkityyny on 200 cm pitkä ja 28 cm leveä. Muotoilunsa ja painonsa ansiosta tyyny on erinomainen, kun tarvitaan napakka tuki semi-fowler-asentoon (puoli-istuva-asento) tai osittaiseen vatsamakuu-asentoon.

Robust-tyynyä voidaan käyttää myös sellaisten levottomien potilaiden hoidossa, jotka tarvitsevat tuntoärsykeitä ja kehon rajaamista rauhoittuakseen.



Cobi Robust -tyyny | 200x28x28 | 6 kg.



## 7.5 Cobi - leveä kiilatyyny

Leveä kiilatyyny on muodoltaan kolmikulmainen ja sillä voidaan tukea käyttäjä stabiiliin kylkimakuu-asentoon vatsan ja selän puolelta.

Kun leveä kiilatyyny on aseteltu vartalon eteen, se tukee yläraajoja ja olkapäitä tehokkaasti neutraaliin asentoon. Selinmakuulla leveää kiilatyynyä voidaan käyttää alaraajojen tukemiseen.

**Cobi - leveä kiilatyyny:** tuotenumero 0400-066-000



Cobi-kiilatyyny | 40x50x14 | 1,1 kg.

## 7.6 Cobi-U-tyyny

U-muotonsa ansiosta tyyny sopii erityisesti vartalon tukemiseen. U-tyyny voidaan asettaa käyttäjän vartalon eteen, taakse tai vartalon rajaamiseen.

Käyttäjän tukeminen semi-fowler (puoli-istuva) -asentoon on asentohoidon perusta ja siksi U-tyynyä suositellaan käytettäväksi erityisesti siihen.

**Cobi-U-tyyny:** tuotenumero 0400-072-000



Cobi-U-tyyny | 88x94x17 | 2,7 kg.

## 7.7 Cobi-sylityyny

Sylityynyä käytetään istuma-asennossa yläraajojen tukemiseen ja yleisesti rauhoittamiseen/rentoutumiseen. Tyynyä voidaan käyttää myös pään tai reisien tuentaan istuma-asennossa vuoteessa.

**Cobi-sylityyny:** tuotenumero 0400-050-000



Cobi-sylityyny | 55x54x12 | 1,2 kg.

## 7.8 Cobi-yleistyyny

Yleistyynyä käytetään polvien välissä, kun potilas käännetään selinmakuulta kyljelle, näin varmistetaan lonkanivelen neutraaliasento sekä vältetään liiallista abduktiota.

Yleistyynyllä voidaan tukea yläraajoja ja olkaniveliä ja näin ehkäistä niiden turvotusta. Sillä voidaan tukea myös jalkaterät sängynpäätyä vasten.

**Cobi-yleistyyny:** tuotenumero 0400-054-000



Cobi-yleistyyny | 58x39x22 | 1,7 kg.

## 7.9 Cobi-H-tyyny

H-tyynyllä saadaan tuettua lonkkanivel lateraalisesti neutraaliin asentoon. Sen vuoksi se sopii lonkkamurtuman / lonkan tekonivelooperaation jälkitilan hoitoon sekä alaraajojen spastisuuden hoitoon.

Kun H-tyynyä käytetään selinmakuulla lonkkaniveltä hiukan koukistaen alaraajat asetellaan hyvin tuettuun ja stabiiliin asentoon. Tyynyä voidaan käyttää myös kuntoutuksessa ja terpian yhteydessä.

**Cobi-H-tyyny:** tuotenumero 0400-074-000



Cobi-H-tyyny | 50x30x30 | 1,8 kg.

## 7.10 Cobi-putkityyny, lyhyt

Lyhyt Putkityyny on hyvä asettaa polvien alle, kun potilas asetellaan vuoteessa semi-fowler (puoli-istuva) -asentoon. Lyhyttä Putkityynyä voidaan käyttää myös polvien välissä, kun potilas tuetaan kylkimakuu-asentoon.

**Cobi Lyhyt Putkityyny:** tuotenumero 0400—064-000



Cobi-putkityyny | 95x25x25 | 1,7 kg.

## 7.11 Pieni Cobi-tyyny

Pientä tyynyä suositellaan käytettäväksi asento-  
hoitotyynyjen väliin jääviin koloihin täytteeksi, jotta tukipinta olisi mahdollisimman laaja ja yhtenäinen.

Pientä tyynyä voidaan käyttää myös painevaurioiden tai hiertymien ennaltaehkäisyyn polvien välissä.

**Pieni Cobi-tyyny:** tuotenumero 0400—048-000



Pieni Cobi-tyyny | 39x25x8 | 0,3 kg.

## 7.12 Iso Cobi-tyyny

Isoa tyynyä käytetään esim. potilaan selän takana tuettaessa häntä semi-fowler (puoli-istuva) -asentoon. Tyynyä voidaan käyttää myös kaularangan neutraalinasennon tuentaan, jolloin tukipinta on mahdollisimman laaja.

Kun tyynyä käytetään selinmakuulla pohkeiden alla, se vähentää tehokkaasti kantapäähän kohdistuvaa painetta. Isolla tyynyllä voidaan tukea vartaloa ja/tai yläraajoja kylki- ja vatsamakuu-asennossa.

**Iso Cobi-tyyny:** tuotenumero 0400-049-000



Iso Cobi-tyyny | 58x40x13 | 0,9 kg.

## 7.13 Cobi-kiilatyyyny

Tyynyn avulla jalkaterä saadaan kohotettua ylös alustasta esim. hoidettaessa kantapään painevauriota. Tyynyä voidaan käyttää myös alaraajojen kohottamiseen turvotuksen ehkäisemiseksi.

Tyyny sopii myös yläraajojen asentohoitoon esim. hemi käden tukemiseen.


**Cobi Kiilatyyyny:** tuotenumero 0400-060-000




Cobi-kiilatyyyny | 40x28x11 | 0,9 kg.

## 8. Asentohoitotyynyjen käyttö

---

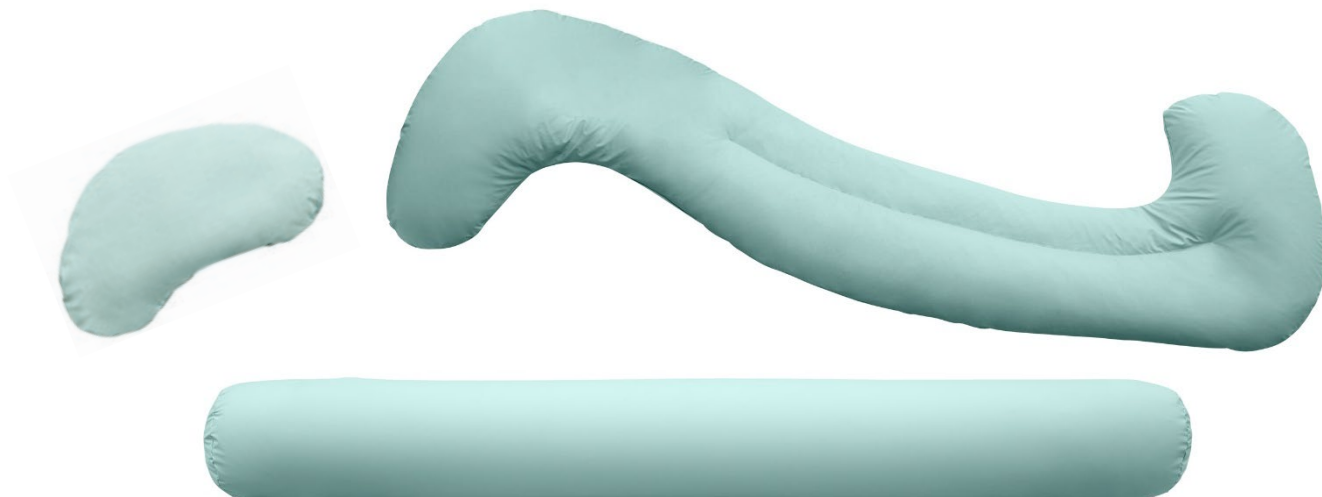

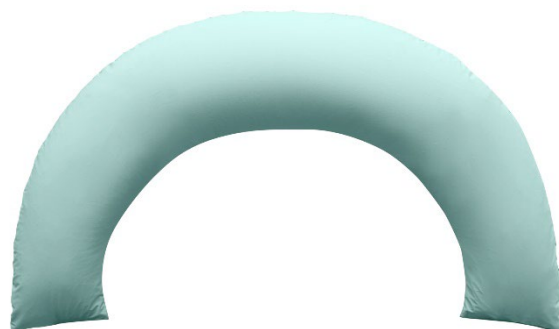

Cobi-niskatyyny (erikoistyyny)





## 9. Puhdistus ja huolto

---

### Päivittäinen puhdistus

Pyyhi tyyny mietoon pesuaineveteen kostutetulla liinalla. Tyyny kuivataan ennen seuraavaa käyttökertaa.

### Desinfiointi ja pesu

Käytä tyynypinnan desinfiointiin kertakäyttöisiä etanoliliinoja (kosteusliina 70 %) tai klooripitoisia puhdistusliinoja 1000–1200 ppm (esim. klooridesinfioitu kosteusliina).

Lisävarusteet, kuten hygieniapäälliset ja jersey-päälliset, voidaan pestä 60 asteessa ja rumpukuivata.

Päällisten vetoketjut suljetaan pesun ajaksi, jottei ne vaurioidu pesussa.

⚠ Cobi-asentohoitotyynyjä EI SAA pestä koneessa. Konepesu vaurioittaa täytemateriaalin.

## 10. Säilytys

---

Älä altista tyynyjä kuumuudelle, pitkäaikaiselle tai suoralle auringonvalolle tai muulle säteilylle.

### 10.1 Pitkäaikainen säilytys

Pitkäaikaisessa säilytyksessä (yli 3 kk) Cobi-asentohoitotyyny tulee säilyttää pimeässä, hajuilta ja kosteudelta suojattuna. Säilytys-lämpötila 0-40 astetta.



# 11. Kierrätys ja hävittäminen

---

Hävitä käytöstä poistetut tuotteet ympäristön kannalta asianmukaisesti. Tarvittaessa kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta.

## 12. Takuu

---

Cobi Rehab takaa, että tuotteet ovat toimitettaessa täysin virheettömiä. Mikäli kuitenkin havaitset tyyneyssä puutteita tai vikoja vastaanotettaessa, ota välittömästi yhteyttä Cobi Rehabiin.

Cobi-asentohoitotyyneillä on vuoden takuu ostopäivästä alkaen ja se kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Lasku toimii takuutodistuksena.

Takuu ei korvaa:

- tuotteita, joissa ei ole sarja- tai eränumeroa tai se on poistettu tai sitä on vahingoitettu tahallisesti

- tuotetta, jota ulkopuolinen taho on korjannut
- kuluvia osia

Takuu ei myöskään korvaa, mikäli Cobi Rehab toteaa, että Cobi-asentohoitotyynejä on käytetty väärin.

Vääränlaisesta käytöstä aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta sekä varaosista veloitetaan.

### 12.1 Vaaratilanteet

Cobi Rehab-asentohoitotyynejä käytöstä aiheutuvista vaaratilanteista tulee ilmoittaa aina Cobi Rehabiin.

### 12.2 Toimenpiteet tuotteen odotetun käyttöään jälkeen

Odotetun käyttöään jälkeen tuotteelle tulee tehdä kokonaisarviointi tuotteen kunnosta ennen tuotteen jatkokäyttöä.

Tuotteen odotetun käyttöään jälkeen Cobi Rehab ei voi taata tuotteen turvallisuutta ja soveltuvuutta, koska Cobi Rehab ei ole valvonut miten tuotetta on käytetty ja kuinka paljon se on kulunut.

Tuotteen kokonaisarviointi on tehtävä ammattilaisen toimesta. Arvioinnissa on otettava huomioon miten tuotetta on käytetty, tuotteen kunto sekä tuotteen osien kunto. Cobi Rehab voi tehdä tällaisen arvion.

## 13. Tekniset tiedot

Täyteaine	Laajentuneet polystyreeni helmet. SEBS-rakeet luomaan painoa. Kylmäpuristettu vaahtomuovi ja viskoelastinen vaahtomuovi, joka täyttää ØKO-TEX® Standard 100 -vaatimukset. Jakauma sovitetaan kunkin tyyntytyypin mukaan.
Tyynyn pinta	Hengittävä ja vedenkestävä. PU:lla kyllästetty ja antibakteerisesti käsitelty polyamidi.
Hygienenpäällinen	Hengittävä ja vedenkestävä. PU:lla kyllästetty ja antibakteerisesti käsitelty polyamidi. Palonestoaine (BS 5852-1 ja CAL117).
Jerseypäällinen	60 % puuvillaa ja 40 % modakryyilia, Oeko-Tex, REACH, paloturvallinen
Puhdistus	Molemmat päälliset ovat konepestäviä ja voidaan kuivata rummussa. Cobi Asentohoitotyynyjä EI SAA konepestä, mutta ne voidaan puhdistaa miedolla pesuaineliuoksella tai desinfiointiaineella.
Onko täyte paloturvallista?	Kyllä (Helmet ISO 3795:1989 ja PU vaahto ISO 3795)
ISO-luokitus	ISO 09.07.06
Tuotteen odotettu käyttöikä	2 vuotta

## 14. Lisävarusteet

Tilattava lisävaruste	Hygieniapäällinen	Jerseypäällinen
Lyhyt Putkityyny	0400-064-000	0400-064-015
Tyynyliina Cobi Flexi -tyynylle	0400-068-000	0400-068-015
Tyynyliina Cobi Robust -tyynylle	0400-070-000	0400-070-015
Tyynyliina kiilatyyntyylle	0400-060-000	0400-060-015
Tyynyliina yleistyynyylle	0400-054-000	0400-054-015
Tyynyliina Merihevonen-tyynylle	0400-056-000	0400-056-015
Tyynyliina Junior Merihevonen -tyynylle	0400-057-000	0400-057-015
Tyynyliina Evätyynyylle	0400-058-000	0400-058-015
Tyynyliina U-tyynyylle	0400-072-000	0400-072-015
Tyynyliina Sylityynyylle	0400-050-000	0400-050-015
Tyynyliina Pienelle tyynyylle	0400-048-000	0400-048-015
Tyynyliina Isolle tyynyylle	0400-049-000	0400-049-015
Tyynyliina H-tyynyylle	0400-074-000	0400-074-015
Tyynyliina Leveälle kiilatyyntyylle	0400-066-000	0400-066-015
Tyynyliina - Yläraajatyyyny O	0400-052-000H	0400-052-015H
Tyynyliina - Yläraajatyyyny V	0400-052-000V	0400-052-015V
Säilytyslaukku Cobi-asentohoitotyynyille	0400-080-000	



# COBI REHAB<sup>®</sup>

The Positioning Company



FORHANDLER OG FABRIKANT

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
+45 7025 2522

[cobirehab.com](http://cobirehab.com)

Maahantuonti ja myynti:



**Algol Trehab Oy**  
Karapellontie 6 | 02610 Espoo  
Puh. (09) 5099 331  
[algol-trehab@algol.fi](mailto:algol-trehab@algol.fi) |  
[www.algoltrehab.fi](http://www.algoltrehab.fi)