

Tuotekuvaus

Solo Multi-nostonauha on monipuoliseen käyttöön kehitetty yleishihna hoitotyöhön. Sitä käytetään potilaan kehonosien nostamiseen tai kannattelemiseen ja siten helpottamaan toimintaa tutkimusten, hoitojen ja muun hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Multi-nostonauhan avulla potilasta voidaan kääntää tai tukea kylkiasentoon. Sen sijaan, että nämä toimenpiteet tehdään manuaalisesti, voi hoitohenkilökunta käyttää Multi-nostonauhaa nostolaitteen kanssa ja säästyä kuluttavalta staattiselta ja raskaalta kuormitukselta.

Sopivia käyttöalueita:

- haavojen hoito, esimerkiksi palovammat
- hygienia
- toimenpiteet, esimerkiksi katetrointi
- tutkimus
- alusastian asettaminen
- pukeminen/riisuminen
- kääntäminen kyljelleen

Nostonauhaa voidaan käyttää yksittäin tai parina, esimerkkinä avustettavan kummankin jalan nostaminen katetroinnin yhteydessä.

Tässä tekstissä henkilöä, jota nostetaan, kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä kutsutaan avustajaksi.

△ on varoituskolmio tilanteisiin, joissa on noudatettava erityistä varovaisuutta.

i TÄRKEÄÄ!

Henkilön nostaminen ja siirtäminen sisältää aina mahdollisen vaaratilanteen. Lue siksi sekä nostimen että nostovaruusteiden käyttöohjeet. Käyttöohjeiden sisällön täydellinen ymmärtäminen on tärkeää ja vain asiaan perehtyneet avustajat saavat käyttää laitetta. Varmista, että nostovaruusteet sopivat nostimelle. Avustaja on aina vastuussa avustettavan turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan mahdollisuuksista selviytyä nostitilanteista. Mikäli kysymyksiä tai epäselvyyksiä ilmenee, pyydetään ottamaan yhteyttä Likoon tai Likon edustajaan. Käyttöohje on ladattavissa osoitteessa www.liko.com.

Multi-nostonauhaa on saatavana useita eri malleja/leveyksiä. Kapeampia nauhoja on yleensä helpompi käyttää ja ne jättävät paremmin tilaa hoidolle. Valitse leveämpi nauha, kun tarvitset laajemman tukipinnan painojakautumiselle.


Nostonauhaa on saatavissa kahta eri materiaalia, polyesteri ja kuitukangas, molemmissa painetta tasaava pehmuste. Kuitukangas sopii lyhytaikaiseen käyttöön ja käytön jälkeen tai likaannuttuaan se voidaan heittää pois.

Kun haluat lisätietoja polyesterivalmistuksesta Multi-nostonauhasta, ota yhteys Likon edustajaan.

Nostonauhaa voidaan käyttää yhdessä Likon siirrettävien tai kattonostinten kanssa.

△ Multi-nostonauha ei ole tarkoitettu potilaan nostamiseen tai siirtämiseen paikasta toiseen. Näitä tapauksia varten suosittelemme Likon nostokankaita, joita on saatavissa useina eri malleina.

Tuotetiedot

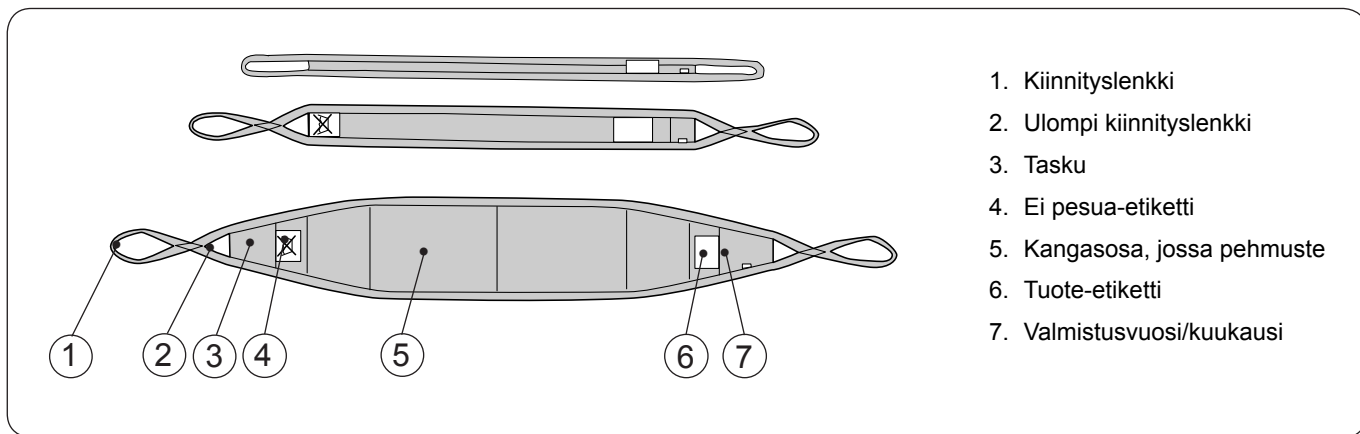


Turvaohjeet

△ Huomattavaa:

- Valitse sellainen Multi-nostonauha, joka sopii parhaiten suoritettavaan tehtävään.
- Huomioi avustettavan ihon herkkyys, paineherkkyys ja kivut Multi-nostonauha käytön aikana.
- Varmista avustettavan nivelten liikkuvuus, jota vaaditaan kehonosan passiiviseen nostoon Multi-nostonauhalla.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja joustavasti.
- Vaikka Likon nostokaaret on varustettu turvakoukuilla, on siitä huolimatta oltava erittäin varovainen: Kun nauha on kunnolla pingoitunut, mutta avustettavaa ei ole vielä nostettu irti alustalta, on tärkeää varmistaa, että kiinnityslenkit ovat oikein kiinni nostokaareissa.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Vuoteen pyörien on oltava lukitut työskentelyn aikana, mikä on tärkeää varsinkin kääntämisen yhteydessä.
- Käytä vuoteen kaiteita kääntämisen aikana, mikä on tärkeää varsinkin, jos tehtävää suorittaa vain yksi avustaja.
- Työskentele aina ergonomisesti.

Sijoittaminen paikalleen

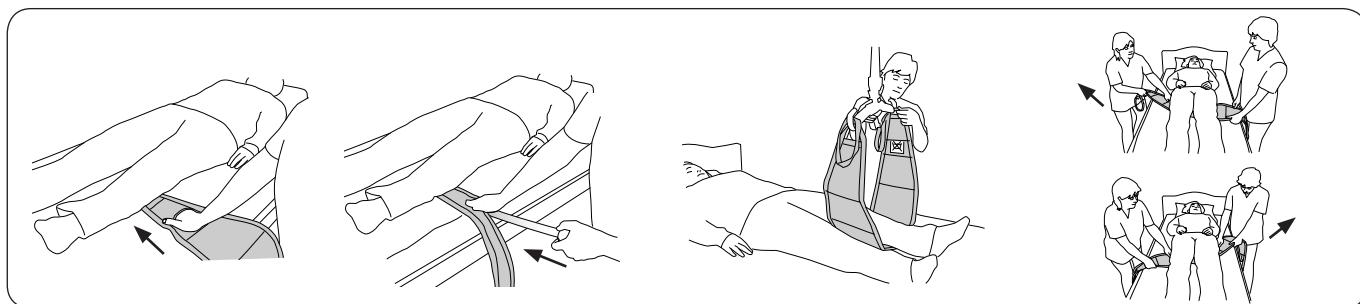

Sijoita Multi-nostonauha avustettavan nostettavan/kannateltavan kehonosan alle. Taita kiinnityslenkki nostonauhan alle ja työnnä se kehonosan alle. Työnnä kädellä tai käytä lastaa nostonauhan taskussa helpottaaksesi paikalleen viemistä. (ks. kuva yllä).

Vedä kiinnityslenkki ulos toiselta puolelta niin, että nostettava kehonosa tulee nauhan keskelle. Kiinnitä kiinnityslenkit nostokaareen. Valitse sisempi lenkki, jos nostokorkeus ei ole riittävä.

Nostonauha voidaan pujottaa alle myös sellaisesta kohdasta, jossa on parhaiten tilaa, esimerkiksi polvien alta, minkä jälkeen se vedetään varovasti haluttuun kohtaan avustettavan alle. Tätä toimenpidettä voidaan helpottaa hilaamalla nauhaa vuorotellen puolelta toiselle, kunnes se on paikallaan esimerkiksi takamuksen alla.


HUOMIO! Mutli-nostonauhaa voidaan käyttää myös kätevän Handy Liukulakanan avulla, mikä on suositeltavaa, jos avustettava on painava tai halutaan toimia erityisen hellävaraisesti. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyks Likoon.

Nostaminen ja kannatteleminen


Asettele nostonauha avustettavan henkilön nostettavan/kannateltavan kehonosan alle.

Varmista ennen aloittamista, että kiinnityslenkit ovat oikein kiinni nostokaassa. Nosta halutulle korkeudelle.


Esimerkki

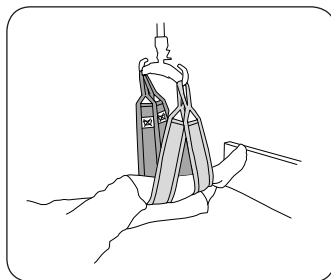


Kuva 1. Jaljen nosto/kannattelu kahdella nostonauhalla

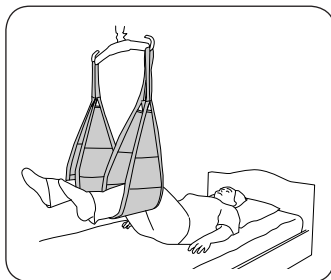

Kuva 2. Kummankin jaljen nosto/kannattelu kahdella nostonauhalla

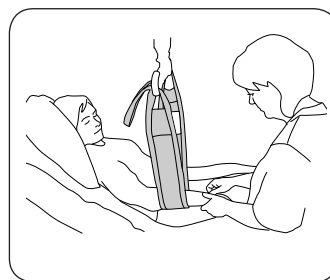

Kuva 3. Käden nosto/kannattelu

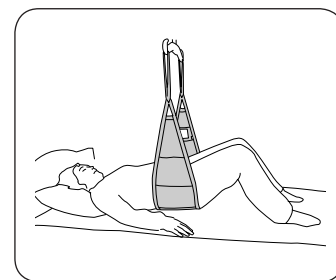

Kuva 4. Lantion nosto/kannattelu

Yllä kuvatus esimerkin mukaiseen nostoon/kannatteluun suositellaan nostokaarta, jossa on 2-pistekiinnitys.


Yhtä nostonauhaa (kuva 3) tai vaihtoehtoisesti kahta nostonauhaa (kuva 1) voidaan käyttää.

Vaihtoehtoisesti jaljen nostossa/kannattelussa voidaan käyttää yhtä 4-pistenostokaarta ja kahta nostonauhaa.

Nostokaaren kaikki koukut kuormittuvat noston aikana.

Kääntäminen kyljelle

Avustettavan kääntäminen kyljelle käy yhdeltäkin henkilöltä, mutta suosittelemme kahta avustajaa, mikä säästää aikaa ja antaa työhön joustavuutta. Käytä vuoteen kaidetta varsinkin silloin, jos toimit yksin.

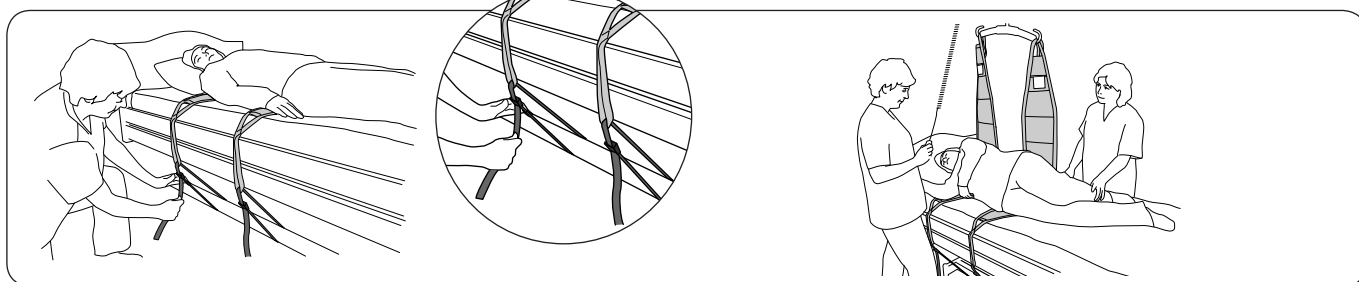


Käytä kahta nostonauhaa, joista yksi tukee hartioita ja toinen lantion seutua. Tarvittaessa voidaan kiinnityslenkit kiinnittää vuoteen sopivaan kohtaan kiristysriihillä 135 cm, tuote nro 3696001, joka pitää nostonauhaa paikallaan kääntämisen aikana.

Valmistele kääntäminen asettelemalla avustettava sellaiseen asentoon, jossa tehtävä onnistuu helpoimmin; käsivarsi sivulle ja jalat päällekkäin. Nosta varovasti niin, että avustettava siirtyy kyljelleen nostimen varassa. Älä nosta liian korkealle, koska silloin on vaara, että avustettava kiepahtaa ympäri. Tarkista avustettavan asento, että se on mukava.

△ Älä nosta liian korkealle!

Käännössä kyljelle suositellaan 2-pistenostokaarta.

Poistaminen

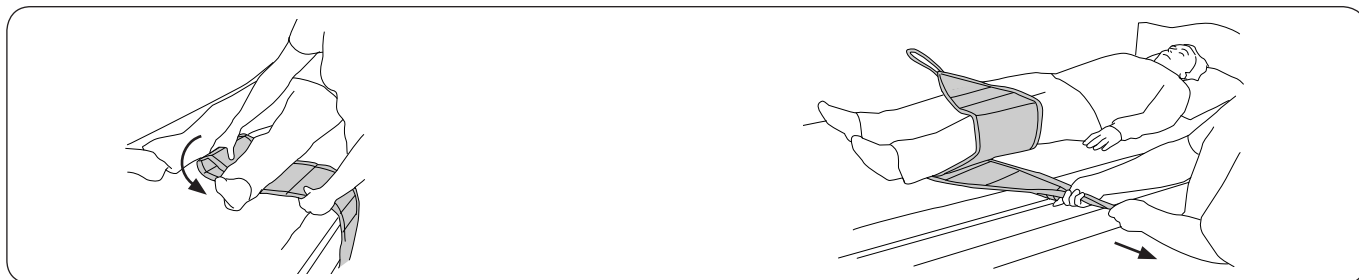

Kuva 5.

Kuva 6.

Taita kiinnityslenkki nostonauhan alle (kuva 5). Hilaa kiinnityslenkki ulos ja vedä nostonauha varovasti pois (kuva 6).

Multi-nostonauha voidaan vetää varovasti pois myös esimerkiksi polvitaiteiden alta, jos tilaa on riittävästi.

Mikäli poistaminen vaatii erityistä hellävaraisuutta, voit käyttää Handy Liukulakanaa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Likon edustajaan.

Solo Multi-nostonauhan kuvaus

Nimike	Tuote nro	Maks. kuormitus	Materiaali
Solo Multi-nostonauha, kapea	3695914	200 kg	Kuitukankainen polypropeeni
Solo Multi-nostonauha, vakio	3695915	200 kg	Kuitukankainen polypropeeni
Solo Multi-nostonauha, leveä	3695916	200 kg	Kuitukankainen polypropeeni

Varusteet: Lasta, malli 600 IVA (sopii vakiomalliseen ja leveään nostonauhaan)
Kirstyshihna 135 cm

3684002
3696001

Hoito ja kunnossapito

△ Solo Multi-nostonauha on henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu „kertakäyttötuote“. Solo Multi-nostonauha on poistettava käytöstä ja hävitettävä hoitajan ohjeiden mukaan, kun:

- se on likaantunut tai saastunut
- se on vahingoittunut
- avustettava ei enää tarvitse sitä.



EI SAA PESTÄ. Nostonauhan takapuolella (koskee standardimallista ja leveää Solo Multi -nostonauhaa) on ohjelappu, jossa on tämä symboli. Jos nostonauha pestään, EI SAA PESTÄ –symboli häviää ja EI SAA KÄYTTÄÄ –symboli tulee esiin. Tällöin nostonauha on hävitettävä.

Tarkasta nostovarusteet säännöllisesti. Huomioi erityisesti materiaalin/kankaan kuluminen sekä ompeleissa, nauhassa ja kiinnityslenkeissä esiintyvät vauriot. Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita. Jos jokin asia on epäselvä, ota yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

CE Lääketieteellinen luokan I laite

Solo Multi-nostonauha on tarkoitukseen valtuutetun luokituslaitoksen testaama ja täyttää kaikki MDD-luokan 1 laitevaatimukset sekä kaikki harmonisoidun standardin EN ISO 10535 vaatimukset

Mallisuojattu muotoilu

Likon tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja, ohjeita ja mahdollisia päivityksiä saa Likon edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden

Likolla on ISO 9001 –laatuluokitus ja sen lääkinnällisiä laitteita valmistavien yritysten vastaava ISO 13485 –laatuluokitus. Likolla on standardin ISO 14001 mukainen ympäristösertifiointi.



A Hill-Rom Company

www.liko.com

Vamistaja:

Liko AB
SE-975 92 Luleå
Sweden
info@liko.se



7330925716681