

RISTIKKORUNKOINEN AKTIVIPIYÖRÄTUOLI



**TEKNA
ADVANCE**

CE



**TEKNA
ADVANCE
SWING**

CE

Käyttöohje

SISÄLLYS

Joissakin tämän käyttöohjeen kuvissa voi olla pyörätuolimalli, joka poikkeaa vertailumallista. Kaikki ohjeet ovat kuitenkin paikkaansapitäviä mallieroista riippumatta. Tämän käyttöohjeen täydellinen tai osittainen jäljentäminen on kielletty ilman Rehateam s.r.l.:n kirjallista lupaa

JOHDANTO.....	4
TULENKESTO-OMINAISUUDET.....	5
SYMBOLIT.....	5
TUOTEKILPI.....	5
1 KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖEHDOT.....	6
2 KÄYTTÖÖNOTTO.....	7
2.1 Rengaspaine.....	8
2.2 Jarrut.....	8
2.3 Pikalukittavat kelauspyörät.....	10
2.4 Pyörätuolin taittaminen kokoon/auki.....	11
2.5 Jalkalauta.....	12
2.6 Eturunko irrotettavalla jalkatuella.....	14
2.7 Pohjehihna.....	15
2.8 Säädetty selkätuen verhoilu.....	15
2.9 Käsituet.....	16
2.10 Kiinnitysosat.....	19
2.11 Pyörätuolin käyttöikä.....	20
3 TURVALLISUUS.....	20
3.1 Onnettomuuksien välttäminen.....	20
3.2 Liikkeet: pyörätuoliin siirtyminen ja siitä poistuminen.....	21
3.3 Pyörätuolin käytön aloittaminen.....	22
3.4 Esteiden ylittäminen: portaat ja askelmat.....	23
3.5 Nousujen ja laskujen ylittäminen.....	25
3.6 Vakauden varmistaminen.....	26
4 PYÖRÄTUOLIN KULJETTAMINEN.....	27
5 OSIEN YLEIKUVAUS.....	28
6 SÄÄDÖT.....	29

7 LISÄVARUSTEET.....	30
7.1 Siirtopyörät.....	31
7.2 Pyörällinen kaatumiseste.....	32
7.3 Avustajan työntökahvat.....	33
7.4 Kynnyspojlit.....	33
7.5 Keppiteline.....	34
7.6 Taittavat työntökahvat.....	34
7.7 Pikalukittava haarukka.....	35
7.8 Tetracrip-pikalukitusakseli.....	35
7.9 Pöytä.....	35
7.10 Lantiovyö ja liivi.....	36
7.11 Lannetuki.....	37
7.12 Päätuki.....	37
7.13 Vartalogit.....	38
7.14 Kelauspyörät.....	38
7.15 Yhdenkäden kelausvanne.....	39
7.16 Rumpujarrulla varustetut pyörät.....	39
7.17 Kelausvanteet.....	40
7.18 Renkaat.....	40
7.19 Pinnasuoja.....	41
7.20 Tukipyörät.....	41
7.21 Lokasuojat.....	41
7.22 Yhdistäjäkangas (istuimen /selkätuen verhoiluun yhdistäjä).....	42
7.23 Irrotettava laukku.....	42
7.24 Rungon suojus.....	43
8 KUNNOSSAPITO.....	43
8.1 Kuluneiden osien vaihto.....	44
8.2 Komponenttien tarkistus.....	44
8.3 Pyörätuolin desinfiointi ja uudelleenkäyttö.....	45
8.4 Säilytys.....	45
8.5 Materiaalien hävittäminen / kierrätys.....	45
8.6 Vianetsintäohje.....	46
9 TEKNISET TIEDOT.....	47
10 TAKUU.....	48

JOHDANTO

Jatkuva laadullinen tutkimus ja luovuus Rehateam s.r.l.:in piirissä ovat toimintamme kulmakiviä

Monien toimintavuosien jälkeen keskitymme edelleen täydellisen asiakastytyväisyyden tarjoamiseen luoden samalla innovatiivisen tyylin ja suunnittelun kaikkiin korkealaatuisiin pyörätuoleihimme.

Olemme nousseet alalla johtavaan asemaan asettamalla etusijalle täydellisyyden ja palvelun.

Kaikki mallimme on rakennettu huolellisesti valikoiduista materiaaleista ja ne tarjoavat monia rakenteellisia mahdollisuuksia, jotka mahdollistavat täydellisen henkilökohtaisen sopivuuden.

Suoritamme jatkuvaa tiukkaa laadunvalvontaa ja testausta mahdollisimman korkean laadun tarjoamiseksi yhdessä nopean ja luotettavan huoltopalvelun kanssa.

Menestyksestämme kiitämme myös asiakkaistamme, jotka ovat luottaneet meihin ja auttaneet meitä erottumaan muista laadun ansiosta.

MYYJÄLLE

Tämä käyttöohje on EHDOTTOMASTI annettava tämän pyörätuolin käyttäjälle

Jälleenmyyjän on ENNEN pyörätuolin luovuttamista käyttäjälle suoritettava kaikkien sen kiinnitysosien ja toiminnan tarkastus.

Tarkastuksen jälkeen myyjän tulee lisätä viimeiselle sivulle yhtiön leima, jolle hän työskentelee, allekirjoittaa se nimellään ja lisättävä päivämäärä takuutodistukseen.

Käyttäjän tulee säilyttää takuutodistus..

Mikäli yhtiön leima ja allekirjoitus takuutodistuksessa puuttuu, takuu ei ole voimassa.

Tämä tuote on tarkoitettu potilaille, joiden näkökyky ja kyky lukea ovat normaalit.

Mikäli potilaalla on rajoitteita tällaisissa kyvyissä, on sopivat kyvyt omaavan avustajan oltava aina läsnä.

Heikkonäköisille henkilöille tämä asiakirja on saatavissa myös PDF- muodossa verkkosivuillamme www.rehateamprogeo.com..

KÄYTTÄJÄLLE ja/tai AVUSTAJALLE

Tämä käyttöohje **tulee lukea** kokonaisuudessaan ENNEN pyörätuolin käyttämistä ja säilyttää myöhempää tarvetta varten

Varmistakaa, että jälleemyyjä on täyttänyt takuutodistuksen kokonaan ja säilyttäkää se huolella.

tämä asiakirja on saatavissa myös PDF- muodossa (myös heikkonäköisille) verkkosivuillamme www.rehateamprogeo.com.

TULENKESTO-OMINAISUUDET

Tämä tuote on testattu EN12183-säädösten mukaisesti. Näihin säädöksiin sisältyy syttyvyyskoe.

SYMBOLIT



Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan henkilövahinkoon, ellei sitä vältetä.



Kielletty toiminta






Osoittaa mahdollisen vaarallisen tilanteen, joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.



Tärkeä ohje tai erityistieto

TUOTEKILPI

	Vuosi/tuotantokuukausi		UDI koodi (Yksilöllinen laitekoodi)
	Sarjanumero		Lue käyttöohje
	Käyttölämpötilan raja		Törmäystestattu
	Maksimikuormitus		Ei törmäystestattu
	Valmistajan tiedot		CE merkintä
	Suurin alustan kaltevuus		MD merkintä (Medical Device- Lääkintälaite)

	Progeo logo
XXXXXXXX	Tuotteen nimi



1 KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄYTTÖEHDOT

Tämä pyörätuolimalli on kelauspyörissä olevien kelausvanteiden avulla käsin kelattava malli tai avustaja voi sitä työntää työntökahvoista. Sitä voidaan käyttää sekä kuntoutuksessa että aktiivisemmissä tilanteissa ja palvelee ihanteellisesti hyvin monenlaisia käyttäjiä, joilla voi olla erilaisia liikuntarajoitteita.

Pyörätuoli mahdollistaa joko täysin itsenäisen tai avustajan kanssa tapahtuvan liikkumisen henkilölle, jonka kehossa on eriasteisia liikuntarajoitteita.

Laajan lisävarustevalikoimansa ja rakennevaihtoehtojensa ansiosta pyörätuolia voidaan käyttää täysin turvallisesti sekä sisätiloissa (kotina, koulussa jne.) että ulkona (tiellä, jalkakäytävällä, pihalla, jne.) lämpötiloissa, jotka ovat -30 °C:n ja +60 °C:n välillä.

Avustajan käyttöä suositellaan aina, kun käyttäjällä on erityisen vaikeita liikerajoitteita tai he eivät kykene liikkumaan itsenäisesti. Emme myöskään suosittele ajamista mäkisessä, etenkin pehmeä- tai hiekkapohjaisessa tai epätasaisessa maastossa, suositeltua jyrkemmillä kaltevilla pinnoilla tai happamissa ympäristöissä.



Pyörätuolin päivittäisessä käytössä käyttäjä voi kohdata erilaisia tilanteita, kuten epätasaista tai epäsäännöllistä maastoa (sora, mukulakivet, kuopat jne.) tai liukkaita alustoja (märkä, hiekkainen, pölyinen, öljyinen kova pinta jne.). Kaikissa tällaisissa tilanteissa ja yleensä kaikissa tapauksissa, joissa pyörätuolin käyttö voi olla vaikeaa tai vaarallista (pyörätuolille ja sen käyttäjälle), on aina suositeltavaa ajaa varovasti ja tasaisesti ilman äkillistä kiihdytystä tai voimakasta jarrutusta

Avustajan käyttöä suositellaan aina, kun vaikeus- tai vaara-aste on korkea..

Pyörätuolin suurin sallittu nousukyky taaksepäin kaatumisen estämiseksi on 3° (6%).

Jalkatukia käytettäessä suositellaan käytettävän sukkia tai kenkiä, joten paljaita jalkoja ei pidä lepuuttaa jalkatukilevyjen päällä.

Istumatasoa, kangasta tai muuta, jos sellainen on saatavana tälle mallille, ei ole tarkoitettu käyttäjille istuinpinnoille; sen vuoksi on välttämätöntä, että pyörätuolissa on tyynty, joka on tilattava erikseen ja käyttäjän erityistarpeiden mukaan ja joka on sijoitettava istuintasoon ja jolla käyttäjä istuu.

Maksimikuormitus mallille TEKNA ADVANCE / TEKNA ADVANCE kääntyvällä ja irrotettavalla jalkatuella: 125 kg.

Tietyissä kokoonpanoissa pyörätuolin kokonaisleveys voi olla suurempi kuin 700 mm. Jos näin on, tietyissä olosuhteissa ei ehkä ole mahdollista käyttää joitakin tai kaikkia rakennuksen käytettävissä olevia poistumisreittejä. Jos pyörätuolin kokoonpanon vuoksi pyörätuolin leveys ylittää 700 mm, voi olla vaikeaa tai mahdotonta matkustaa julkisilla liikennevälineillä.

TEKNA ADVANCE / TEKNA ADVANCE kääntyvällä ja irrotettavalla jalkatuella: Mittojensa ja rakenteellisten ominaisuuksiensa ansiosta pyörätuolimalli on ihanteellinen sekä teini-ikäisten että aikuisten käyttöön.



On tärkeää, että pyörätuolin toiminnallisten osien yleistarkastuksen tekee nimenomaan PÄTEVÄ JA VALTUUTETTU HENKILÖSTÖ, sekä sen soveltuvuuden arvioimiseksi että aisanmukaisen käytönopastuksen tarjoamiseksi käyttäjälle ja hänen mahdolliselle avustajalleen

Mikäli käyttäjä ja/tai hänen avustajansa havaitsevat minkäänlaista pyörätuolin jonkin osan puutteellista toimintaa, tulee hänen kääntyä jälleenmyyjän puoleen ongelman ratkaisemiseksi.

Tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden ja tietojen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa pyörätuolin vikaantumisen ja/tai vaurioitumisen ja/tai käyttäjään tai muihin henkilöihin kohdistuvia vahinkoja. Rehateam s.r.l ei ole vastuussa pyörätuolille ja/tai käyttäjälle ja/tai kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat näiden ohjeiden ja tietojen noudattamatta jättämisestä

Pyörätuolin käyttäminen edellyttää joidenkin sen osien käsittelyä. Pyörätuolin komponenttien oikeaa käsittelytapaa koskevia ohjeita löytyy tämän asiakirjan vastaavista kappaleista. Näitä ohjeita on siksi noudatettava mahdollisten loukkaantumisten välttämiseksi use of the wheelchair requires that some of its parts be handled. Instructions for correct handling of the components of the wheelchair can be found in the corresponding sections of this document. Therefore, follow these instructions to avoid possible injuries.

Sähköistyslaitteiden, mekaanisten ja / tai sähköisten ajolaitteiden tai muun tukijärjestelmän asennus ja käyttö, joka ei ole Rehateam s.r.l. valikoimissa toimitushetkellä voi aiheuttaa odottamattomia rasituksia tuotetestauksessa, minkä vuoksi tuotteen eheyttä ja täydellistä turvallisuutta ei taata. Jos Rehateam s.r.l. -yhtiön toimittamaan tuotteeseen asennetaan muita lisälaitteita, jälleenmyyjän, lisälaittevalmistajan on taattava tällainen laite ja Rehateam s.r.l.:n on hyväksyttävä se.

2.1 Rengaspaine

Tasaisen, täsmällisen kulun ja jarrutuksen takaamiseksi on tarpeen varmistaa, että renkaat on oikein täytetty ilmalla.

Poista muovinen venttiilinsuojus kelauspyörän vanteessa olevasta venttiilistä.

Täytä paine oikealle tasolle kompressorin tai pumpun avulla.

Ruuvaa muovinen venttiilinsuojus takaisin paikalleen.



Tarkista rengaspaine viikoittain. Paine on merkitty renkaaseen.

Oikea rengaspaine tekee pyörätuolin ajamisen ja hallinnan paljon sujuvammaksi ja helpommaksi..

Renkaiden väärä täyttöaste (etenkin liian alhainen) aiheuttaa jarrujen vääränlaisen toiminnan ja pyörätuoli ei ehkä pysähdy.




Älä ylitä renkaan sivussa mainittua painetta, koska sisärenkas tai itse rengas saattavat vaurioitua.

Renkaassa olevaa painemerkintää on aina noudatettava.



Jopa etupyörät voivat olla ilmatäytteiset, jos niin on, noudata vain samoja ohjeita.

Puhkeamattomat renkaat eivät vaadi täyttämistä. Tämä rengastyypin tarvitsee vähemmän huoltoa eikä vaadi sisärenkaan korjaamiseen tai vaihtamiseen liittyviä kuluja ja vaivaa. Normaalikäytössä ne ovat kuitenkin vähemmän sujuvia kuin perinteiset renkaat eivätkä pehmennä kulkua joustamalla epätasaisella pinnalla.

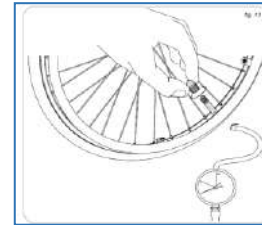

2.2 Jarrut

Pysäköintijarrut ovat turvavaruste, joten on tarpeen tarkistaa niiden toiminta päivittäin.



Jarru toimii vivulla, joka vaikuttaa suoraan renkaaseen. Tästä syystä jarrujärjestelmän tehokkuus on riippuvainen renkaan oikeasta ilmanpaineesta. Suosittelemme tarkistamaan rengaspaineet säännöllisin välein.



Suurin alustan kaltevuus, jolla pysäköintijarruja voidaan käyttää turvalisesti ja tehokkaasti, on 3° (6 %).

Turvallisuussyistä pysäköintijarruja ei saa käyttää pyörätuolin liikkuaessa, sillä seurauksena voi olla pyörätuolin kaatuminen ja käyttäjän loukkaantuminen.

Jarrujen tehon tarkistamiseksi ne kytketään päälle jäljempänä kuvatulla tavalla jarrujen mallista riippuen. Sitten pyörätuolia työnnetään käyttäjän istuessa sinä. Mikäli kelauspyörät eivät pyöri tai pyörivät vain vaivoin pyörätuolin liikkeen pysäyttäen, jarrut toimivat tehokkaasti. Tarkasta molemmat jarrut. Jarrun kytkemiseen/vapauttamiseen vaadittava voima voi olla erilainen eri jarrutyypeillä. Käyttäjille, joilla on vähemmän voimaa yläraajoissa, suositellaan jarrun varustamista pidennetyllä vivulla .




Varo sormien joutumista puristuksiin jarruja päälle ja pois kytkettäessä, ja myös muissa tilanteissa joissa kätesi on jarrujen lähellä.

TYÖNTÖLUKITUSJARRU

Jarruvipu voi olla joko taivutettu (1) tai suora (2).

Jarru päälle vipua eteen työntäen, kunnes jarru lukkiutuu.

Jarrun vapautus vipua taakse vetäen, kunnes jarru vapautuu ja palaa automaattisesti vapaa-asentoonsa.

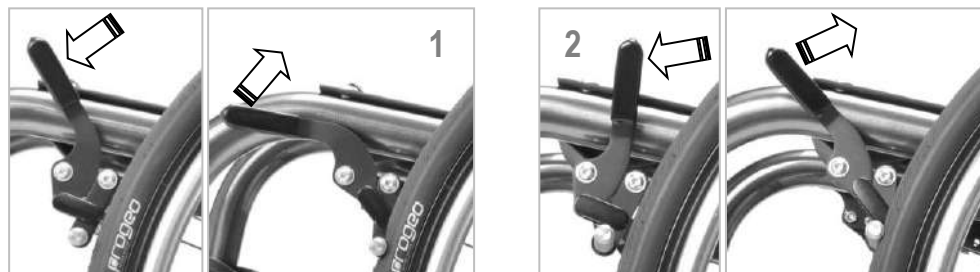


VETOLUKITUSJARRU

Jarrutus vipua taakse päin vetämällä, kunnes lukkiutuu

Jarrun vapautus vipua eteen päin työntäen, kunnes jarru vapautuu.

Jarru palaa automaattisesti vapaa-asentoonsa.

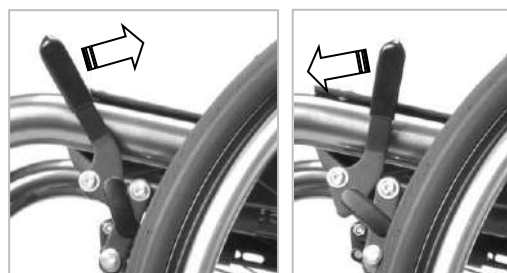


PIDENNETYLLÄ VIVULLA VARUSTETTU JARRU


Pidennetyllä vivulla varustettu jarru (työntö- ja vetolukitus) toimii samalla tavalla, mutta kytkeminen ja vapauttaminen on helpompaa.

Vipu voidaan taittaa alas siten, ettei se häiritse käyttäjän siirtymistä pyörätuoliin tai siitä pois. Taittaminen tapahtuu ensin vetämällä vipu ylös ja sen jälkeen taittamalla se alas.

Jarruvipu palautetaan normaaliin käyttöasentoon ylös kääntämällä ja sitten työntämällä paikalleen.

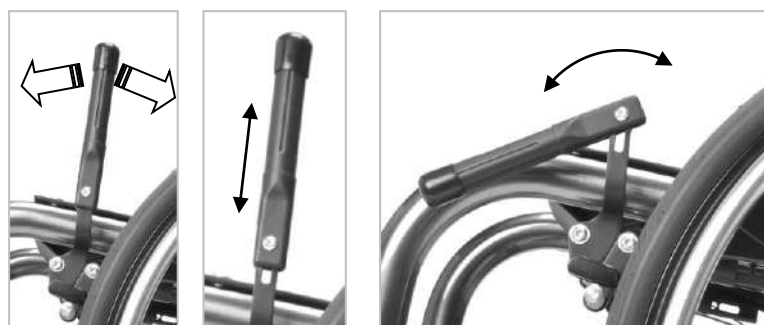

SPORT JARRU

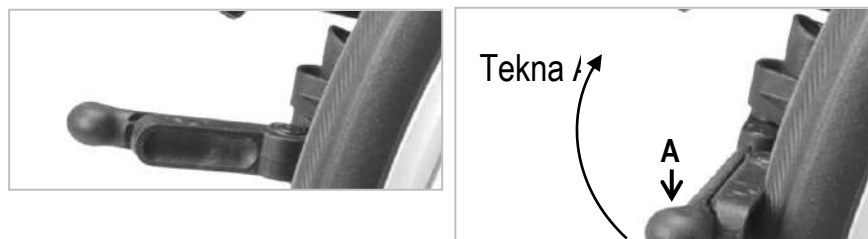

Jarru kytketään päälle vipua kääntämällä, kunnes se lukkiutuu

Jarru kytketään pois päältä työntämällä jarrun päässä olevaa nuppia **A** eteen päin

Jarru palaa vapaa-asentoonsa.

Tämä jarrutyypin helpottaa pyörätuolin käsittelyä, kun kelauspyörät irrotetaan.

Se ei aiheuta haittaa kädelle kelausvanteiden avulla pitkiäkin vetoja kelattaessa..

Perinteisiin jarruihin verrattuna jarruvipu on toisaalta alempana ja sitä on vaikeampi käyttää

Tästä syystä se ei sovellu käyttäjälle, jolla on puutteellinen vartalon ja/tai yläraajojen ja käsien liikkeiden hallinta.

2.3 Pikalukittavat kelauspyörät

Pikalukituksella varustetut kelauspyörät mahdollistavat pyörätuolin vaatiman tilan pienentämisen. Pyörätuoli on tällöin helpompi kuormata autoon, tai mikäli se on varustettu lisävaryusteena saatavilla "siirtopyörillä", pyörätuoli saadaan sekä lyhyemmäksi että kapeammaksi pääsyn mahdollistamiseksi pieniin tiloihin, kuten hissiin.

Varmista kelauspyörien pikalukitusakseleiden oikea kiinnittyminen, kun käyttäjä ei istu pyörätuolissa.

Kytke jarru aina pois päältä.

Nosta pyörätuolia hieman ylös toiselta puolen sitä selkänojasta pidellen.

Toinen kelauspyörä ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kädellä kelauspyörän navasta (pikalukitusakselin painiketta painamatta) sormia varoen, kun ne työnnetään pintojen välistä.

Työnnä ja vedä pyörää (nuolen osoittamalla tavalla) pyörän kunnollisen kiinnittymisen varmistamiseksi: pyörä ei saa irrota.

Mikäli pyörä irtoaa, on pikalukitusakselia säädettävä.

Säätö kuuluu ainoastaan pätevän ja valtuutetun henkilöstön tehtäväksi..



Kelauspyörien pikalukitusakseleiden tarkastaminen on toimenpide, joka käyttäjän tulee tehdä aika ajoin.

Mikäli pikalukitusakselit eivät ole kunnolla paikoillaan ja kiinni, ne saattavat löystyä normaalin käytön aikana ja aiheuttaa pyörän yllättävän irtoamisen, tasapainon menettämisen ja mahdollisen loukkaantumisen.

Pyörän irrottamiseksi jarru kytketään ensin pois päältä.

Nosta pyörätuolia hieman ylös toiselta puolen siitä selkänojasta pidellen.

Toinen kelauspyörä ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kädellä kelauspyörän navasta ja paina pikalukitusakselin painiketta peukalolla, pidä painettuna ja vedä pyörä irti.

Pyörän asentamiseksi jarru kytketään ensin pois päältä.

Nosta pyörätuolia hieman ylös toiselta puolen sitä selkänojasta pidellen. Toinen kelauspyörä ei nyt kosketa lattiaa.

Tartu kädellä kelauspyörän navasta ja paina pikalukitusakselin painiketta peukalolla, pidä painettuna ja työnnä pyörä kannatinholkkiin.



Vapauta pikalukitusakselin painike (klik-ääni osoittaa oikean kiinnittymisen).



Jarru on aina kytkettävä pois päältä ennen kelauspyörän irrotusta ja asentamista.

Varmista aina, että pikalukitusakselit ovat oikein lukittuneet.

Takarenkaan kiinnityksen säätöreiät voivat aiheuttaa sormien puristumis- tai puserumisvaaran. Kiinnitä huomiota kaikissa tilanteissa, joissa kätesi lähestyvät tällaisia reikiä.

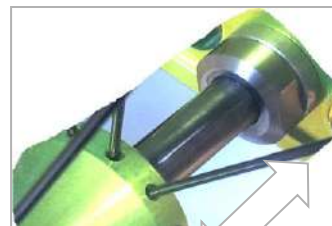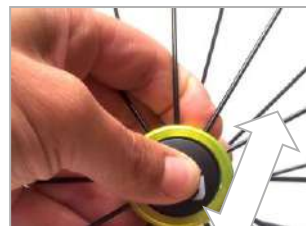

2.4 Pyörätuolin taittaminen kokoon/auki

Tässä mallissa on ristikkorungon avulla kokoontaitettava istuin.

1 AVAAMINEN

Paina kämmenillä istuinputkista kohdissa **A** ja **B** ja paina ne alas, kunnes pyörätuoli taittuu kokonaan auki.
Aukitettamisen jälkeen tulee huolella varmistaa, että istuinputket ovat kunnolla paikoillaan neljässä kannattimessa **S**.




Pyörätuolia auki taitettaessa on varottava sormien joutumista puristuksiin istuinputken ja kannattimien tai istuinputken ja runkoputken väliin.

Toimenpiteen helpottamiseksi on suositeltavaa nostaa toista kelauspyörää lattian aiheuttaman kitkan vähentämiseksi selkänojasta tarttumalla ja pyörätuolia hieman nostamalla. Tämän jälkeen vapaa käsi istuinputken päällä painetaan kohdista **A** tai **B** istuinputki alas kannattimien **S** päälle. Varmista, että istuinputket ovat kunnolla paikoillaan neljässä kannattimessa **S**.
Laske jalkalauta alas (tämä ei ole tarpeen, mikäli pyörätuoli on varustettu automaattisesti sulkeutuvalla jalkalaudalla).

2 KOKOON TAITTAMINEN

Poista tyyny ja muut pehmustetut tai jäykät tukirakenteet istuimesta ja selkänojasta.
Nosta jalkalautaa ylös (tämä ei ole tarpeen, mikäli pyörätuoli on varustettu automaattisesti sulkeutuvalla jalkalaudalla).
Vedä istuinkangasta ylöspäin kuvassa esitetyllä tavalla molemmiin käsiin.

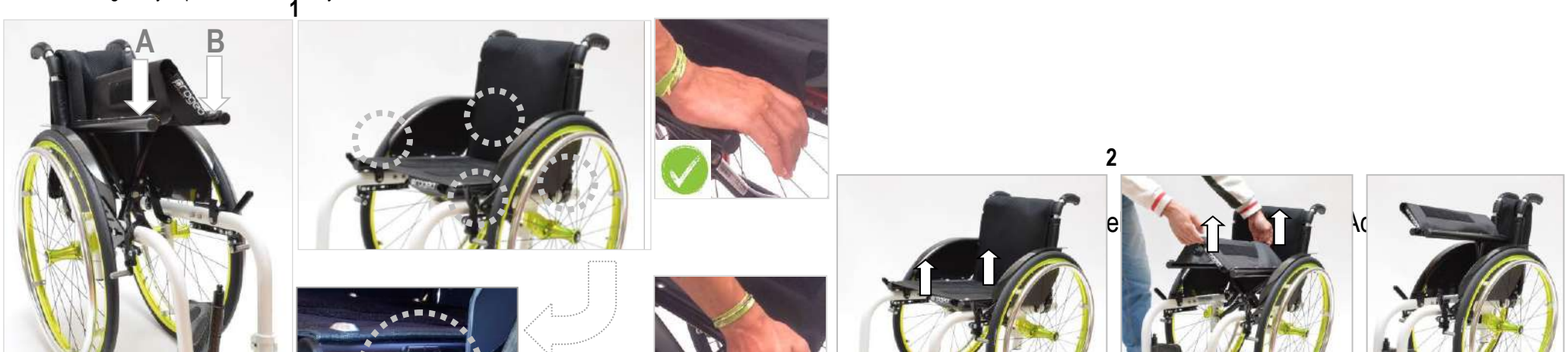

2.5 Jalkalauta



Suosittelimme, ettei jalkoja pidetä jalkalaudan päällä pyörätuoliin ja siitä pois siirryttäessä; liiallinen paino jalkalaudalla voi johtaa sen rikkoutumiseen ja edelleen vahingon aiheutumiseen käyttäjälle.



Tarkista jokaisen toimenpiteen jälkeen, että jalkalauta on aina oikeassa asennossa. Erilliset jalkalevyt ovat vähemmän kestäviä kuin yksiosaiset jalkalevyt, joten ne eivät sovellu käyttäjille, joilla on voimakkaita spasmeja ja/tai pakkoliikkeitä

Käyttäjän tarpeiden mukaan pyörätuoli voidaan varustaa millä tahansa edellä mainituista jalkalevyistä.

Yksiosaiset jalkalevyt ovat jäykempiä kuin kaksiosaiset, ja niitä suositellaan käyttäjille, joilla on spasmeja tai jotka työntävät voimakkaasti jalkalevyä vasten.

Kaikkien jalkalevyjen, lukuunottamatta automaattisesti sulkeutuvaa jalkalevyä, nostamisen jälkeen käyttäjä voi tukea jalkansa maahan helpommin, erityisesti siirron aikana.

Jalkalevyn kääntäminen ylöspäin on erittäin helppo toimenpide, jonka voit suorittaa yhdellä kädellä vetämällä levyä ylös.

Aseta jalkalevy takaisin käyttöasentoon työntämällä sitä vain alas ja, jos kyseessä on yksiosainen jalkalevy, varmista, että se lukittuu tukeen kunkin jalkalevytyypin mukaisesti.



Tilauslomakkeessa voit valita jalkalevyn tyylin mukaan sen asennon (sisennys, ulompana tai keskellä).

KAKSIOSAINEN JALKALAUTA

Varmista, että molemmat laudat ovat kokonaan alhaalla ennen pyörätuolin käyttämistä.



AUTOMAATTISESTI SULKEUTUVA JALKALAUTA

Tämä tarkistus ei ole tarpeen, koska jalkalauta aukeaa automaattisesti tuolin mukana.

AUTOMAATTISESTI SULKEUTUVA ALUMIININEN JALKALAUTA (COMPACT)

Tämä tarkistus ei ole tarpeen, koska jalkalauta aukeaa automaattisesti tuolin mukana.

YHTENÄINEN MUOVINEN YLÖSNOUSEVA JALKALAUTA

Varmista, että lukitustappi **A** on kunnolla paikoillaan kannatimen **B** hahlossa.

YHTENÄINEN YLÖSNOUSEVA JALKALAUTA ALUMIINIA

Varmista, että lukitustappi **A** on kunnolla paikoillaan kannatimen **B** hahlossa.

YHTENÄINEN YLÖSNOUSEVA JALKALAUTA HIILIKUITUA

Varmista, että lukitustappi **A** on kunnolla paikoillaan kannatimen **B** hahlossa.

Hiilikuituista jalkalautaa voidaan kääntää 180°. Tämä ominaisuus voi olla hyödyksi joko pyörätuolin vaatiman tilan pienentämiseksi tai jalkalaudan siirtämiseksi väliaikaisesti eri asentoon.




Tämän suorittamiseksi lauta nostetaan lukituskannatimestaan ja käännetään vastakkaiseen asentoon. Pyörätuoli voidaan nyt taittaa kokoon tai jalkalauta lukita kannattimeensa.

RUNGON LEVIÄMISEN ESTÄVÄ NAUHA

Jos pyörätuolissa on kaksiosainen jalkalauta, eturungon leviämisen estämiseksi pyörätuoli varustetaan joustavalla, haarukoiden pidikkeisiin kiinnitetyllä säärinauhalla.



Älä koskaan käytä joustavaa säärinauhaa jalkojesi tukena äläkä koskaan poista sitä. Ilman sitä

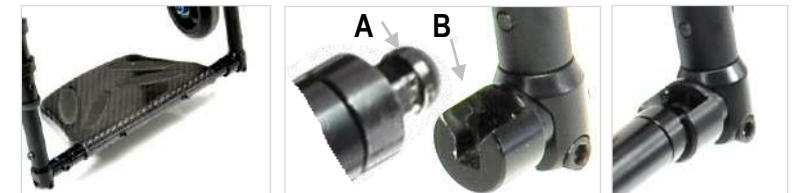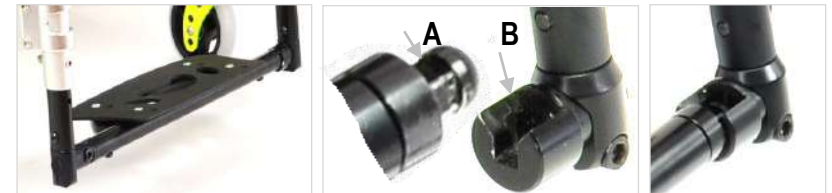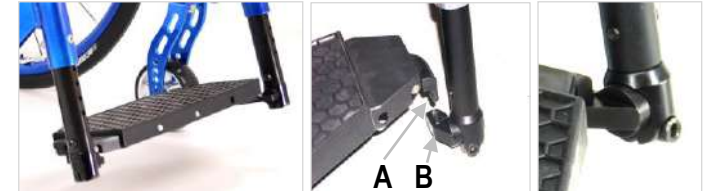

eturunko voi laajentua niin paljon, että se muuttaa pyörätuolin geometriaa normaalin ajon aikana. Rehateam s.r.l. ei ole vastuussa pyörätuolin tai käyttäjän toimintahäiriöistä tai vahingoittumisesta, jos kaksois- tai käännettävällä jalkalevyllä pyörätuolia käytetään ilman joustavaa säärinauhaa.

MUITA JALKALAUTAA KOSKEVIA TIETOJA

UNI EN 12183 -standardin kappaleen 6.1 mukaisesti, kaksiosaisia jalkalautoja asennettaessa on tarpeen säilyttää oikea etäisyys jalkatukien välillä alas laskettuina:

- 1) Jalkatukien etäisyys (C) ei saa ylittää 35 mm aikuisten käyttämissä pyörätuoleissa (1).
- 2) Jalkatukien etäisyys (C) ei saa ylittää 25 mm lasten käyttämissä pyörätuoleissa (2).

Alla esitettynä oikeat jalkalautojen koot (B) istuinlevyden mukaan (A):

2.6 Eturunko irrotettavalla jalkatuella

Tämän mallin ominaisuutena on erityinen eturunko, jossa jalkatuki voidaan kääntää sivuun tai irrottaa kokonaan.


Näiden toimintojen tarkoituksena on pyörätuolin koon ja painon pienentäminen sekä käyttäjän pääsyn helpottaminen esimerkiksi sängyn luo tai pöydän ääreen. Se on hyödyllinen myös amputoiduille, joille jalkalauta on t.

- (1) Tarkista, että jalkalaudan runko on tukevasti lukittu kannattimeensa. Tartu jalkalaudan runkoon yhdellä kädellä ja yritä kääntää sitä myötä- ja vastapäivään. Tukevasti lukittuna jalkatuki ei käänny, mutta pieni välitys tuntuu.
- (2) Jalkalaudan avaamiseksi ulos päin vipua A käännetään sivuttain samaan suuntaan ja jalkalaudan runkoa käännetään ulos päin.
- (3) Jalkalaudan kääntämiseksi istuimen alle, käännä vipua A sivulle päin samaan suuntaan ja käännä jalkatuen rungosta sisään päin.
- (4) Lukittaksesi jalkatuen käyttöasentoon, sitä käännetään keskelle, kunnes se lukittuu automaattisesti. Klikkausääni ilmaisee lukittumisen. Tarkista lukittuminen edellä kuvatulla tavalla
- (5) Irrota jalkatuki rungosta kääntämällä vipua A eteen päin ja vedä jalkatukea ylös päin kunnes pidike B irtoaa putkesta C. Nosta jalkatuki irti.
- (6) Kiinnitä jalkatuki asettamalla ensin haarukka D putken C ympäri. Laske nyt jalkatuen pidike B paikoilleen putken C sisään. Käännä jalkatukea tarvittaessa keskelle, kunnes se lukkiutuu automaattisesti. Klikkausääni ilmaisee lukittumisen (vipu A siirtyy automaattisesti lukitusasentoon).



Mikäli pyörätuoli on varustettu yhtenäisellä jalkalaudalla, se on aina nostettava ylös ennen jalkalaudan rungon kääntämistä sivuun.

Mikäli pyörätuoli on varustettu kaksiosaisella jalkalaudalla, sen nostaminen on tarpeen vain jalkalaudan rungon sisäänpäin kääntämisen yhteydessä.

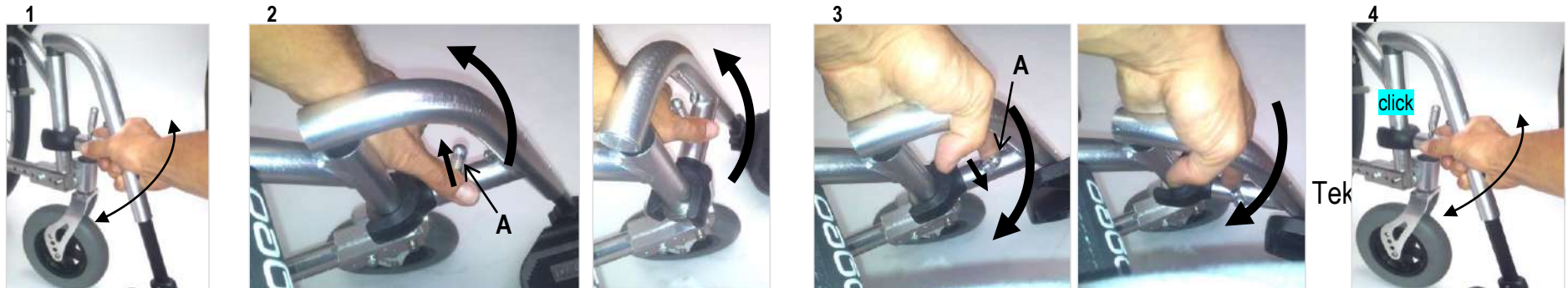


2.7 Pohjehihna

Joissakin tapauksissa, riippuen pyörän koosta ja pyörätuolin leveydestä, tukipyörä saattaa nkääntyessään koskettaa käyttäjän varpaita.

Tällaisen mahdollisesti pyörätuolin hallinnan menetykseen johtavan kosketuksen estämiseksi pyörätuoli on varustettu pohjehihnalla. Pohjehihna on säädettävä sellaiseksi, että käyttäjän jalat eivät milloinkaan kosketa tukipyörää..



Pohjehinnan säätäminen on helppoa tarranauhojen avulla.

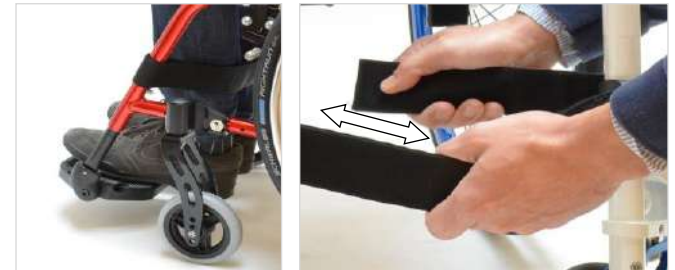

2.8 Säädettävä selkätuen verhoilu

Selkänöjaa voidaan säätää käyttäjän vaatimusten mukaiseksi kiristämällä tai löysentämällä kahta erityistä tarrahihnaa, jotka ovat selkänöjan verhoilun alla.

Säätäminen tapahtuu verhoilua nostamalla tai se irrottamalla, kiristämällä tai löysentämällä tarrahihnoja vaaditulla tavalla ja asentamalla verhoilu paikoilleen.



Jos pyörätuoli on käytössä erillinen selkätuki, noudata sen säätöohjeita.





Istuimen kulman, selkänojan putkien kulman ja erillisen selkätuen kulman yhdistelmä saattaa johtaa yli 25° kulmaan pystysuoraan nähden. Tällöin pyörätuolissa on käytettävä niskatukiea tai järjestely sen kiinnittämiseksi tälle mallille tarkoitetulla tavalla.

2.9 Käsituet

Tähän malliin on saatavilla käsituet.

Käsituet katsotaan lisävarusteiksi ja ne on siksi tilattava erikseen.

Ne ovat erityisen hyödylliset henkilöille, joilla on käsien tai käsivarsien liikerajotteita sekä henkilöille, joiden ylävartalon liikkuvuus on rajallinen ja jotka tarvitsevat enempi tukea pyörätuolissa istuessaan.



**Pyörätuolia ei saa nostaa käsinojasta; käsinojat saattavat tällöin irrota kannattimestaan ja aiheuttaa haittaa käyttäjälle ja pyörätuolille.
Käsinojia ei tule käyttää siirtymisten aikana tukena.
Suosittelemme käsinojan kääntämistä sivuun siirtymispuolelle toimenpiteen helpottamiseksi.**



Käsinojan tyynyissä voi olla ftalaaiteja, jotka ovat mahdollisesti terveydelle vaarallisia nieltynä. Vältä esimerkiksi pehmusteen naarmuuntumista ja sormiin jääneiden jäänteiden asettamista suuhun tai, mikä vielä pahempaa, itse pehmusteen pureskelua / imemistä (todennäköisemmin lasten tapauksessa).

IRROTETTAVAT KÄSITUET

Tämäntyyppiset käsinojat ovat käytännölliset. Voit poistaa ne siirron helpottamiseksi.

Irrotettava käsinoja sisältää vaateuojan.




Tämän tyyppinen käsinoja vedetään pystysuoraan ylös irti pidikkeestään.

(1) Oikea käyttöasento **P** on, kun levy **A** on työnnettyä tuen **B** läpi ja pysähtyy, kun pultti **C** menee vastakoloon **D** (2) (3) (4)

(5) Irrota käsituki vetämällä se suoraan ylös.

(5) (6) Aseta käsinoja asettamalla levy A tukeen B ja antamalla sen liukua alas oikeaan asentoonsa kuten edellä mainittiin.

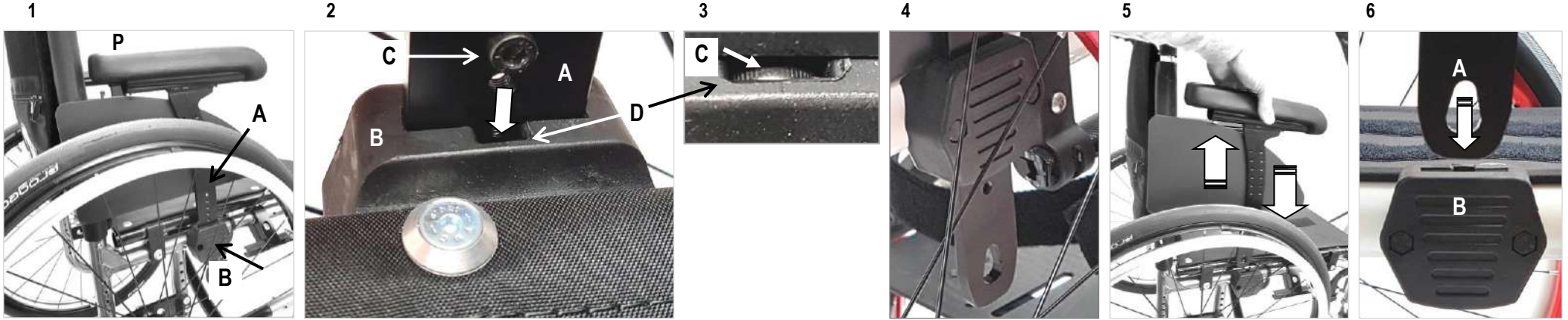

PUTKIMAISET KÄSITUET TERÄSKIINNITYKSELÄ

Tämä käsitukimalli on käännettävissä sivulle ja irrottavissa siirtymisen helpottamiseksi. Näiden käsitukien kanssa pyörätuolissa käytetään lokasuojia.



Käsinojen lukitus on aina varmistettava niiden ollessa käyttöasennossaan P (eteenpäin suunnattuina ja suorassa pyörätuolin sivujen kanssa). Kaikissa muissa asennoissa (paitsi taka-asentoonsa lukittuina) ne pääsevät vapaasti kääntymään. Tästä syystä niiden oikea kiinnitys on aina varmistettava ennen pyörätuolin käyttämistä. Tämä ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa pyörätuolin hallinnan menettämiseen.

(1) (2) Tarkasta oikea käyttöasento P yhdellä kädellä tarttumalla käsinojaan (2) ja yritä siirtää sitä myötä- ja vastapäivään.

Oikein lukittu käsinoja ei pyöri, mutta siinä tuntuu pieni väly.

(3) (4) Käsinoja voidaan kääntää siirtymisen helpottamiseksi sivuun. Kohota sitä noin 1 cm (kannattimen osa A liikkuu erilleen osasta B, muttei irtoa) ja käännä sivuun..

(5) (6) Käsinoja voidaan haluttaessa kääntää niin pitkälle, että se lukkiutuu vastakkaiseen asentoon (osa A lukkiutuu osaan B).

Takaisin käyttöasentoon siirtäminen tapahtuu kääntämällä, kunnes se lukkiutuu (mikäli se oli lukittu vastakkaiseen asentoon, kohota sitä ensin noin 1 cm).


(6) (7) (8) Teräskannatin, koostuen osista A ja B, ei päästä käsinojaa irtoamaan tahattomasti. Kun käsinojaa vedetään ylöspäin noin 1 cm, sen tulisi pysähtyä tähän kohtaan..

Tällöin käsinoja voidaan edellä mainitulla tavalla kääntää sivuun. Käsinojan irrottamiseksi on nosta C painettava yhdellä sormella reikään ja käsinoja sen jälkeen nostettava ylös.

(9) Käsinojan asentamiseksi kannattimen osa A työnnetään osan B reikään ja käännetään, kunnes se lukkiutuu edellä kuvatulla tavalla..



Koska tukien A ja B mitoitus on tarkka, käsinojan asettaminen ja irrottaminen on mahdollista vain pystysuorassa asennossa.

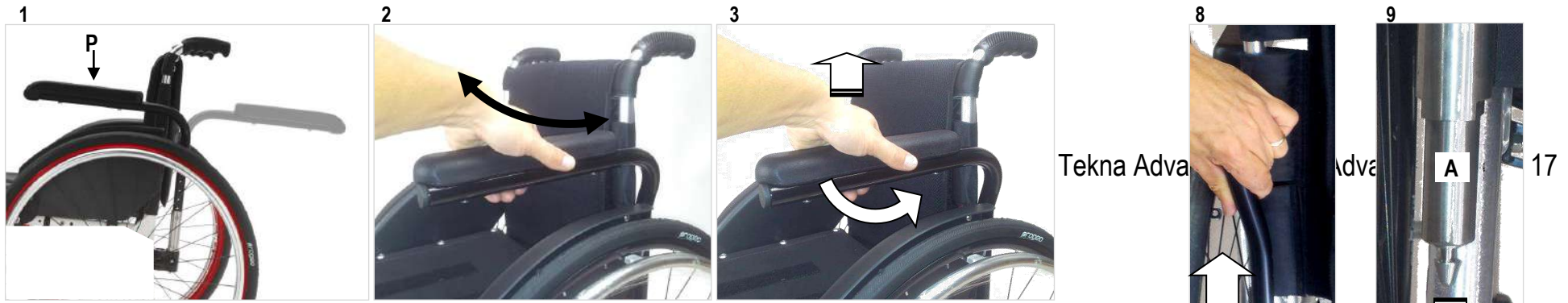

Tekna Adva

adva

A

17

PROGEO PÖYTÄKÄSITUKI

Tämäntyyppiset käsinojat ovat käytännölliset. Voit poistaa ne siirron helpottamiseksi. Pöytäkäsituki sisältää vaateuojan.



**Käsitukien lukitus on aina varmistettava niiden ollessa käyttöasennossaan.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa pyörätuolin hallinnan menettämiseen.**

(1) (2) Käsituen P oikean käyttöasennon tarkistamiseksi tartu käsinojan pehmusteesta ja yritä vetää sitä ylös. Oikein lukittuna käsinoja ei irtoa kannattimesta A, eikä pehmuste nouse ylös.


(3) (4) Poista käsinoja painamalla ensin vipua B, tarttumalla sitten käsinojan tyynyyn ja vetämällä se irti.

(4) (5) Aseta käsinoja työntämällä sen osa C alas tukeen A. Napsautus osoittaa, että se on lukittu. Tarkista, että käsinoja on lukittu kunnolla, kuten edellä on mainittu.

(6) Käyttäjä voi myös helposti säätää käsinojan korkeutta. Paina painiketta D eteenpäin, pidä siitä kiinni ja nosta tai laske sitten käsinojaa uudelle korkeudelle. Vapauta painike D ja ohjaa putkea E, kunnes se lukkiutuu johonkin reikänsä.



Varo jättämästä sormiasi puristuksiin laskiessasi käsinojan tyynyn kokonaan alas (8)

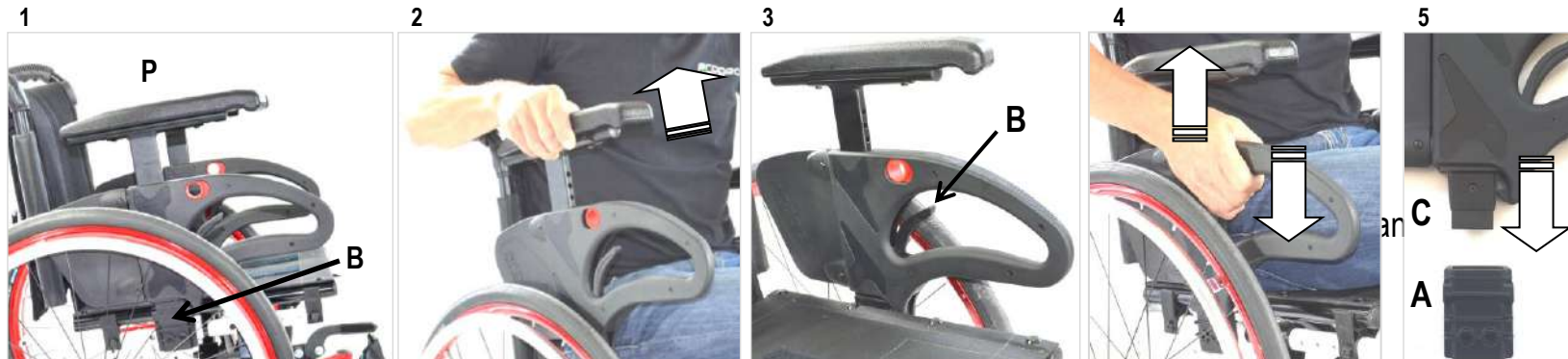

2.10 Kiinnitysosat

Jälleenmyyjä on tarkastanut pyörätuolin ennen käyttäjälle toimittamista ja näin varmistanut sen olevan täydellisessä toimintakunnossa. Pyörätuolin päivittäinen käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa pulttien ja muttereiden löystymistä.



Suosittelimme kaikkien kiinnitysosien kireyden tarkistamista ainakin kerran kuukaudessa. Tarvittaessa on käännettävä valuatetun PROGEO-myyjän tai mekaanikon puoleen.

Jokaisella huoltokerralla tulee varmistaa, että kaikki mutterit, pultit ja ruuvit on kiristetty oikeaan kireyteen.

Rehateam s.r.l. ei ole millään tavoin vastuussa käyttäjälle, kolmansille osapuolille tai pyörätuolille aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat tämän varoituksen noudattamatta jättämisestä.

2.11 Pyörätuolin käyttöikä

PROGEO-pyörätuolit ovat päivittäisessä käytössä ja siten joutuvat jatkuvan rasituksen alaisiksi, mikä aiheuttaa osien väistämätöntä kulumista. Normaalissa päivittäiskäytössä PROGEO-pyörätuolin käyttöikä on 5 vuotta edellyttäen, että se saa säännöllistä huoltoa oikein aikavälein.

Käyttöikä on huomattavasti pidempi, jos pyörätuolia käytetään ainoastaan sisätiloissa tai jos sitä ei käytetä päivittäin.

3 TURVALLISUUS



Progeo –pyörätuoli on lääkinällinen väline, EIKÄ SITÄ SIKSI TULE LAINATA MUILLE KÄYTTÄJILLE edes lyhytaikaisesti.

Luvattomien muutosten tekeminen tai ei-hyväksytyjen osien käyttäminen ei ole sallittua, koska ne voivat muuttaa pyörätuolin rakennetta ja aiheuttaa vaaratilanteen sekä mahdollista vahinkoa tuolille ja sen käyttäjälle.



Rehateam s.r.l. ei ole vastuussa tapauksista, joissa ei ole noudatettu tässä käyttöohjeessa esitettyjä ohjeita ja suosituksia ja tällainen toiminta johtaa valmistajan myöntämän takuun välittömään mitätöitymiseen.

PALOVAMMAVAARA! Pyörätuolin osat voivat kuumentua voimakkaasti, jos ne ovat alltiina voimakkaalle auringonsäteilylle



Ilmoita valmistajalle laitteen vakavista onnettomuuksista.

Valmistaja: Rehateam s.r.l., Vicolo Negrelli 5, 31038 Castagnole di Paese TV, Italia, puh. 0039 0422 484657, posti: info@rehateamprogeo.com

3.1 Onnettomuuksien välttäminen

LIIKKEET

Vältä äkillisiä, nytkähtäviä liikkeitä pyörätuolin käytön aikana, koska ne voivat aiheuttaa pyörätuolin joutumisen epätasapainoon. Esteitä lähestyttäessä tulee välttää äkillisiä liikkeitä (kuten äkillistä jarrutusta). Luisumisriski kasvaa epätasaisella tai kostealla alustalla.

Esteiden, kuten portaiden ja luiskien ylittäminen tulee suorittaa varovasti (pyydä avustajaa avuksi). Turvallisuuden vuoksi suositellaan pyörätuolin takana olevan avustajan käyttämistä kaltevien pintojen tai potentiaalisesti vaarallisten alustojen yli liikuttaessa.

NOPEUS

Sääda nopeus aina alustan ja olosuhteiden asettamien edellytysten mukaiseksi. Yleissääntönä suosittelemme tasaista nopeutta äkillisiä kiihdytyksiä tai suunnanmuutoksia välttämällä.

JARRUT

Pysäköintijarrut on suunniteltu pitämään pyörätuoli tukevasti paikoillaan sen ollessa liikkumaton.



Turvallisuussyistä emme suosittele pysäköintijarrujen käyttöä pyörätuolin liikkuessa.



Jarruja käytettäessä on noudatettava suurta varovaisuutta käsien tai sormien loukkaantumisen välttämiseksi.

3.2 Liikkeet: pyörätuoliin siirtyminen ja siitä poistuminen



Pyörätuoliin siirryttäessä tai siitä pois noustaessa ei jalkoja saa asettaa jalkalaudan päälle. Tämä voi johtaa pyörätuolin kaatumiseen ja vahingon aiheutumiseen sekä tuolille että käyttäjälle.

Pyörätuoliin siirtyminen ja siitä poistuminen tulee aina tehdä äärimmäistä varovaisuutta noudattaen, vaikka kyseessä olisi kokenut käyttäjä, ja suoritettava vasta sen jälkeen, kun koulutettu henkilöstö on antanut ohjeet tätä varten. Mikäli pyörätuoliin siirtymisessä ja siitä poistumisessa on vaikeuksia, on avustajan oltava läsnä. Nämä toiminnot on joka tapauksessa tehtävä liikerajoitteen ja liikumisen salliman itsenäisyysasteen edellyttämällä tavalla.

Yleisluontesia ohjeita pyörätuoliin siirtymiseksi ja siitä poistumiseksi turvallisesti:

Varmista, että pyörätuoli on pysäköity tukevalle, tasaiselle tai säännölliselle pinnalle. Älä nouse pyörätuoliin tai poistu siitä mäkisessä maastossa tai epätasaisella alustalla, jotka voisivat tehdä pyörätuolista epävakaa ja saada käyttäjän putoamaan ja/tai pyörätuolin menettämään tasapainonsa. Jarrut tulee kytkeä päälle.

Siirrä jalat pois jalkalaudan päältä pyörätuolista noustaessa ja vie ne lähelle jalkalautaa pyörätuoliin siirryttäessä. Mikäli pyörätuoli on varustettu ylös taittuvalla jalkalaudalla (yhtenäinen tai kaksiosainen), nosta se ylös siirtymisen helpottamiseksi.

(1) Nojautu eteenpäin pyörätuolissa ja mikäli mahdollista ota tukea jostakin lähellä olevasta tukevasta kohteesta. Nosta ja siirrä vartaloa käsivoimien avulla.

(2) Mikäli käyttäjä ei yksin kykene suorittamaan tätä liikettä tai liike on suoritettava epätasaisella alustalla, tarvitaan avustajaa.

Avustajan, joka suorittaa potilaan siirtämisen pyörätuolista tai pyörätuoliin, on aina suoritettava ne huolellisesti. Tällaiset toimet saa suorittaa vasta saatuaan opastuksen asianosaavalta henkilöstöltä




Jos potilaan pääsy pyörätuoliin ja siitä pois on vaikeaa, toisenkin avustajan tulisi olla läsnä. Kaikki nämä toimet tulisi aina suorittaa potilaan toimintakyky ja rajoitukset huomioiden.



Pyörätuoliin siirryttäessä tai siitä poistuttaessa ei milloinkaan tule nojata vaatesuojukseen tai istua sen päällä, koska se voi taipua tai rikkoutua vammaan johtaen.



Mikäli pyörätuoli on varustettu käsinojilla, irrota tai käännä käsinoja sivuun siltä puolelta, josta pyörätuoliin tai siitä pois siirrytään. Jos pyörätuolissa on istuimen kallistus, siirtymisen helpottamiseksi on suositeltavaa kallistaa pyörätuolin istuin mahdollisimman suoraksi.

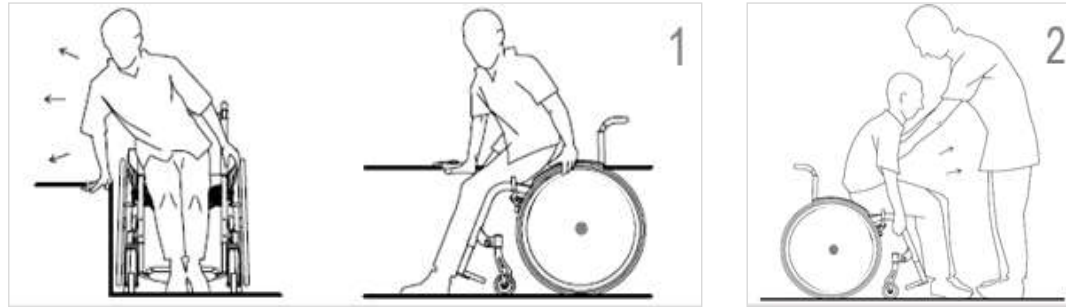

3.3 Pyörätuolin käytön aloittaminen

PAINOPISTEEN ETSIMINEN

Kyky hallita ja turvallisesti kallistaa pyörätuolia on pääasiassa riippuvaista istumakohdasta ja painopisteen sijainnista suhteessa kelauspyöriin.

Kelauspyörien oikea sijainti riippuu monista tekijöistä, kuten käyttäjän painosta, liikuntarajoitteen tyypistä ja kyvystä hallita pyörätuolia.

Valmistaja toimittaa pyörätuolin kelauspyörät alkuperäisessä tilauskaavakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti sijoitettuna.



Tuolin taaksepäin kallistumisen kannalta turvallisen kohdan löytäminen edellyttää avustajan läsnäoloa, jonka tulee seistä pyörätuolin takana valmiina estämään sitä kaatumasta..



Sen kohdan löytämiseksi, jossa tuoli kaatuu helposti taaksepäin, ja siten turvallisen hallinta- alueen määrittämiseksi toimitaan seuraavasti:

Istuudu pyörätuoliin.

Tartu tiukasti kelauspyörien kelausvanteista.

Työnnä kelausvanteita hieman taaksepäin ja samalla vartalon painoa taaksepäin siirtäen nykyise kelausvanteita eteenpäin siten, että tuolin etuosa nousee ylös.

Tässä vaiheessa kehoa varovasti taaksepäin ja eteenpäin liikuttaen ja kelausvanteita taakse- ja eteenpäin heijaten on mahdollista löytää painopiste ja piste, jossa tuolia voidaan turvallisesti hallita.



Ripustettaessa reppu, laukku tai jokin muu esine työntökahvoille tai pyörätuolin takaosalle, tämä lisäpaino voi aiheuttaa merkittävän muutoksen pyörätuolin painopisteeseen ja lisätä kaatumisriskiä taakse päin.

PYÖRÄTUOLIN KAATUMISEN ESTÄMISEKSI NORMAALIN KÄYTÖN AIKANA SUOSITTELEMME PYÖRÄLLISTEN KAATUMISESTEIDEN ASENTAMISTA.

3.4 Esteiden ylittäminen: portaat ja askelmat



Ole aina erityisen huolellinen seuraavissa tilanteissa.

ASKELMAN NOUSEMINEN TAI SILTÄ LASKEUTUMINEN YKSIN



Yli 20 cm:n (6 tuuman) korkuisia askelmia tai esteitä ei tule milloinkaan pyrkiä ylittämään. Mikäli kohdataan erityisen hankalia esteitä, tulee aina käyttää avustajaa pyörätuolin takana täydellisen turvallisuuden varmistamiseksi.



Ennen askelman tai miltä tahansa esteen ylittämistä yksin (ilman avustajaa) on pyörätuolin hallinta ja sen kallistaminen osattava tasapaino kelauspyörien päällä säilyttäen.

Alasmeno

Ohjaa pyörätuoli aivan esteen reunan luo.

Nosta tukipyöriä ylös pyörätuolia taaksepäin kallistaen ja tasapaino säilyttäen.

Siirrä kelauspyörät varovasti alas esteeltä; tässä vaiheessa laskeutumista tulee tukea laskeutumisen hallitsemiseksi.

Kun kelauspyörät ovat laskeutuneet esteeltä, kallista pyörätuolia eteenpäin, kunnes tukipyörät koskettavat jälleen alustaa.



Ylösmeno

Ohjaa pyörätuoli aivan esteen reunan luo.

Nosta tukipyöriä ylös pyörätuolia taaksepäin kallistaen ja tasapaino säilyttäen.

Aja kelauspyöriä kelausvanteiden avulla varovasti eteenpäin, kunnes ne koskettavat askelman reunaa.

Kallista pyörätuolia eteenpäin, kunnes tukipyörät ovat esteen päällä. Nojaa eteenpäin tuolissa siten, että tuolin takaosa kevenee.

Siirrä kelauspyörät esteen päälle kelausvanteista tiukasti pidellen.



ASKELMAN NOUSEMINEN TAI SILTÄ LASKEUTUMINEN AVUSTETTUNA



Avustaja voi kallistaa tuolia helpommin, mikäli käytetään tähän malliin lisävarusteena saatavissa olevaa kynnyksipoljinta.


Alasmeno

Ohjaa pyörätuoli aivan portaan yläpuolelle siten, että tukipyörät ovat mahdollisimman lähellä reunaa.

Tartu työntökahvoista tukevasti ja paina niitä alaspäin pyörätuolin etuosan kohottamiseksi.

Pyörätuolia tässä asennossa pitäen laske se alas askelma kerrallaan. Tuolissa istuva käyttäjä voi avustaa laskeutumista kelausvanteiden avulla.

Laskeutumisen lopussa päästä tuoli kallistumaan eteenpäin siten, että tukipyörät koskettavat uudelleen alustaa..

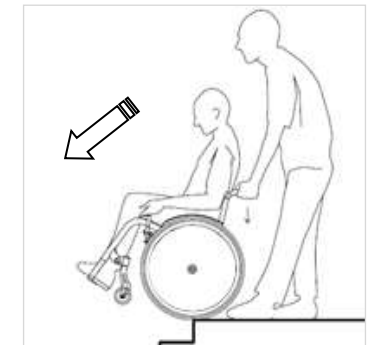

Ylösmeno

Siirry takaperin kohti porrasta siten, että pyörätuolin kelauspyörät koskettavat sitä.

Tartu pyörätuolin työntökahvoista tukevasti ja vedä voimakkaasti taaksepäin pyörätuoli kallistettuna pitäen (tukipyörät irti maasta nostettuna käyttäjän tuolista pois luisumisen estämiseksi), kunnes kelauspyörät ovat portaan päällä.

Vedä pyörätuoli pois portaan luota edelleen kallistettuna, kunnes tukipyörät pääsevät koskettamaan samalla tasolla olevaa alustaa..

Ylösmeno ja alasmeno portaissa



Jos portaita on enemmän kuin yksi askelma, vaaditaan aina kahden avustajan läsnäoloa.

Toinen avustaja seisoo pyörätuolin takana ja pitää kiinni työntökahvoista.

Toinen avustaja tarttuu kiinteään osaan eturungosta ja varmistaa pyörätuolin asennon edestä.

3.5 Nousujen ja laskujen ylittäminen




Suurin alustan kallistus, jonka yli voidaan turvallisesti yrittää kulkea, on 6 % (3°).

YLÄMÄKEEN AJAMINEN

Ylöspäin ajaminen kaikenlaisilla kaltevilla pinnoilla tulee tehdä äärimmäisen varovasti. Käyttäjän on säilytettävä pyörätuolin hallinta ja samalla ajettava eteenpäin sopivalla nopeudella kelausvanteita käyttäen.

Nojaa eteenpäin ja pidä paino edessä tuolin estämiseksi kaatumasta taaksepäin.

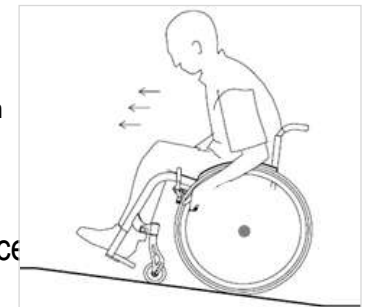

Tartu kelausvanteista lujalla otteella.

Aja pyörätuolia voimakkaasti ylös kaltevaa pintaa samalla varmistaen, että liike on tasaista ja sujuvaa. Älä liikuta ylävartaloa edestakaisin tuolissa



Suosittelemme, että sellaisia käyttäjiä varten, jotka eivät vielä täysin hallitse tuolin turvallista käyttöä, asennetaan kippieste, joka on saatavissa tähän malliin lisävarusteena ja toimii estäen tuolia kaatumasta taaksepäin.

ALAMÄKEEN AJAMINEN

Turvallinen ajaminen alaspäin edellyttää, että käyttäjä ylläpitää tasaisen, hallitun nopeuden ja suunnan koko ajan kaltevalla pinnalla liikuttaessa.

Lähesty kaltevaa pintaa maltillisella nopeudella.

Pidä paino tuolin takaosassa poisliisumisen välttämiseksi.

Pitele kelauspyörien kelausvanteista ja anna niiden liukua hitaasti käsien läpi.

Käyttäjän tulee milloin tahansa kyetä pysäyttämään pyörätuoli yksinkertaisesti kelausvanteen liike pysäyttämällä.

3.6 Vakauden varmistaminen

Käytännössä kohdataan tilanteita, jotka edellyttävät kurkottautumista pyörätuolista.

Nämä näennäisen helpot liikkeet saattavat varomattomasti suoritettuina johtaa vakauden menettämiseen ja pyörätuolin mahdolliseen kaatumiseen.

Jotta saat parhaan hallinnan pyörätuolissasi, seuraavassa on lista yleisimmistä tilanteista. Pyydämme sinua kiinnittämään erityistä huomiota näihin ohjeisiin tasapainon ja vakauden ylläpitämiseksi.

Eteenpäin kurkottaminen

Varmista, että tuolin tukipyörät osoittavat eteenpäin. Pyörät saadaan suunnatuksi tuolia eteenpäin ja sitten taaksepäin liikuttamalla.

Tekna Advance



Kytke jarrut päälle tuolin yllättävän liikkeen estämiseksi kurkottautumisen aikana.

Kurkottaudu eteenpäin siten, että ylävartalo ei missään vaiheessa siirry tukipyörien etupuolelle. Kehon painon siirtyminen liian eteen voi saada pyörätuolin painon keskittymään tukipyörille ja kaatumaan ja aiheuttamaan mahdollista vahinkoa sekä tuolille että käyttäjälle.

Vakauden lisäämiseksi käyttäjän tulee ottaa tukea pyörätuolista vapaalla kädellään..



Älä kurkota liian pitkälle eteen; vaarana on putoaminen tuolista.

Älä siirry eteenpäin lantiota istuintyynyn päällä liu'uttamalla liian kaukana olevien kohteisiin kurkottamiseksi. Tuoli voi tällöin kaatua.

Taaksepäin kurkottaminen

Varmista, että tuolin tukipyörät osoittavat eteenpäin. Tämän tekemiseksi liikuta tuolia eteenpäin ja sitten taaksepäin

Älä pane jarruja päälle.

Kurkota taaksepäin istumiskohtaa vaihtamatta.



Älä kurkota liian pitkälle taakse yli selkänojan. Tuoli voi kaatua.

Sivulle kurkottaminen

Älä siirrä ylävartaloa sivullepäin yli kelauspyörän, koska tuoli voi silloin kaatua.

Pidä pyörätuolista kiinni vapaalla kädellä turvallisuuden ja vakauden säilyttämiseksi.



Älä kurkota liian pitkälle sivulle. Tuoli voi kaatua.

4 PYÖRÄTUOLIN KULJETTAMINEN

Yksittäistä parasta tapaa pyörätuolin kuormaamiseksi ajoneuvoon ei ole olemassa. Potilaan liikerajoitteen laatu ja taso (hänen kykynsä hallita yläruumiinsa, käsivarsiensa ja käsiensä liikkeitä), fyysinen vahvuus (toimenpide voi osoittautua liian raskaaksi iäkkäälle henkilölle tai lapselle) ja käytettävä ajoneuvotyyppi ovat kaikki vaikuttavia tekijöitä.

On selvää, että kaikki nämä tekijät ovat liian moninaisia yhden täsmällisen toimintaohjeen antamiseksi kaikkia tapauksia varten; joten näitä ohjeita tulee pitää yleisohjeina.



Suorita kaikki autoon kuormaamiseen liittyvät toimenpiteet äärimmäisellä varovaisuudella ja vasta sen jälkeen kun



Te

dv

valtuutettujen myyjiemme henkilöstö on antanut ohjeet tätä varten. Mikäli nämä ohjeet eivät vaikuta turvallisilta tai ne ovat vaikeita, suositlemme avustajan pyytämistä avuksi



Älä milloinkaan kuljeta pyörätuolia ajoneuvossa käyttäjän istuessa siinä, ellei pyörätuolia ei ole setrificioitu ja hyväksytty tällaiseen käyttöön standardin ISO 7176-19:2008 mukaisesti.

Mikäli käyttäjää on kuljetettava hänen istuessaan tuolissa, muistutetaan siitä, että perusversiossaan pyörätuolia ei toimiteta turvavöillä varustettuna. Kaikki ajoneuvossa tapahtuvaan kuljettamiseen tarkoitetut turvavyöt on asennettava erikoishenkilöstön toimesta.

PYÖRÄTUOLIN KULJETTAMINEN KÄYTTÄJÄN ISTUESSA SIINÄ

Varmista aina, että pyörätuoli sopii käyttäjän kuljettamiseen ajoneuvossa.

Tuotekilvessä olevat symbolit osoittavat, onko pyörätuoli törmäystestattu, ja mikäli näin on, sitä voidaan käyttää käyttäjän kuljettamiseen moottoriajoneuvossa.



Törmäystestattu



Ei törmäystestattu

PYÖRÄTUOLIN KUORMAAMINEN AVUSTAJAN KANSSA

Tapauksissa, joissa käyttäjän fyysiset rajoitteet estävät häntä itsenäisesti siirtymästä ja kuormasta pyörätuolia autoon, tarvitaan avustajaa. Tämän mallin keveys ja kokoontaittavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia, koska ne mahdollistavat pyörätuolin helpon siirtämisen myös henkilöille, joiden fyysiset voimat ovat rajalliset. Irrota kaikki irtoavat osat.

Kytke jarrut pois päältä ja irrota kelauspyörät. Taita pyörätuoli kokoon.(istuin ja/tai selkätuki). Tartu tuolista yhdellä kädellä rungon etuosasta ja toisella kädellä selkänojan kahvasta siten, että pyörätuolista saadaan tasapainoinen ote ja nostaminen on helpompaa. Kuormaa pyörätuoli autoon ja sitten kelauspyörät

Kokoontaittuvuutensa ansiosta pyörätuoli voidaan kuormata auton tavaratilaan tai etu- ja takaistuinten väliin.

Tilavammissa kuljetusvälineissä voit kuljettaa pyörätuolin sellaisenaan sitä kasaamatta.

PYÖRÄTUOLIN KUORMAAMINEN ILMAN AVUSTAJAA

Seuraavat toimenpiteet on tarkoitettu henkilöille, jotka hallitsevat hyvin ylävartalonsa ja käsiensä liikkeet ja joilla on riittävästi voimaa liikkeiden suorittamiseksi täysin turvallisesti.. Irrota kaikki irtoavat osat.

Avaa ovi siltä puolelta, josta autoon ollaan nousemassa (esim. kuljettajan ovi), aja pyörätuoli sitten mahdollisimman lähelle istuinta..

Kytke jarrut päälle ja siirry autoon.

Kun olet siirtynyt auton sisään, vapauta pyörätuolin jarrut ja vedä kelauspyörät irti

Taita pyörätuoli kokoon (istuin ja/tai selkätuki).

Tartu tuolista yhdellä kädellä rungon etuosasta ja toisella kädellä selkänojan kahvasta siten, että pyörätuolista saadaan tasapainoinen ote ja nostaminen on helpompaa, ja kuormaa sekä tuoli että kelauspyörät autoon.

5 OSIEN YLEIKUVAUS

1	Runko
1 a	Jalkatuen ylärunko
2	Selkänojan verhoilu + tarrahihnat säätämistä varten



3	Jarru ja lokasuojan alumiinikannatin
4	Lokasuojan kiinnitys/säätörengas
5	Jarru
6	Selkätuen kahvallinen putki
7	Istuinkangas
8	Lokasuoja
9	Kelausvanne
10	Selkätuen kiinnike
11	Kelauspyörä
12	Pikalukitusakseli
13	Kelauspyörän säätölevy
14	Rengas
15	Haarukka
16	Tukipyörä
17	Haarukan kannatin
18	Ristikkorunko
19	Jalkalevy
20	Jalkalevyn säätöputki
21	Pohjehiha
22	Eturungon leviämisen estävä nauha
23	Kiinnike eturungon leviämisen estävälle nauhalle

6 SÄÄDÖT

PROGEO pyörätuoli on lääkinällinen laite, joka perustuu alkuperäiseen tilauskaavakkeeseen ammattihenkilöstön toimesta kirjattuihin potilaan yksityiskohtaisiin tietoihin. Rehateam s.r.l.in toimittama pyörätuoli on testattu ja säädetty optimaalisen toiminnan varmistamiseksi.



Suosittelimme, ettei pyörätuolia lainata muille käyttäjille edes lyhytaikaisesti. Pyörätuolin lainaaminen muille saattaa vaarantaa sen turvallisen toiminnan ja aiheuttaa kaatumisen, millä on potentiaalisesti vakavat seuraukset sekä pyörätuolille että käyttäjälle

Pyörätuolin mitat on säädetty alkuperäisen käyttäjän vaatimusten huolellisen selvittämisen jälkeen ja tuolin käsiteltävyys, tukevuus ja kestävyysominaisuudet taataan ainoastaan kyseiselle käyttäjälle.

Kaikenlaisten muutosten tekeminen alkuperäiseen rakenteeseen, vaikka ne olisivat mahdollisia, on kielletty.



AINOASTAAN PÄTEVÄ JA VALTUUTETTU REHATEAM S.R.L. HENKILÖSTÖ VOI TEHDÄ KAIKKI SÄÄDÖT.

Jokainen säätö- ja/tai muutostyö, joka on valtuuttamattoman henkilöstön suorittama, mitätöi välittömästi tuotteen takuun ja vapauttaa Rehateam s.r.l.in kaikesta vastuusta, joka koskee tällaisten säätöjen/muutosten aiheuttamaa toimintahäiriötä ja/tai vauriota.

Kääntykää aina Rehateam s.r.l.:in ja sen teknisen henkilöstön puoleen mahdollisten standardista poikkeavien vaatimusten tai muutosten osalta, jolloin he voivat arvioida tällaiset muutokset ja varmistaa, että ne eivät vaaranna pyörätuolin normaalia ja turvallista käyttöä.

Kaikki alkuperäisten parametrien ja säätöjen muutokset saattavat vakavasti vaarantaa pyörätuolin turvallisen käyttämisen, aiheuttaen vahingon sekä käyttäjälle että itse pyörätuolille

Aina pyörätuolin säätämisen jälkeen tulee tarkistaa huolellisesti, että kaikki osat on oikein kiinnitetty. Tarkista, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty ja kaikki liikkuvat osat toimivat moitteettomasti.

Kaikenlaisen säätämisen jälkeen pyörätuoli tulee aina testata ennen normaalikäyttöä mahdollisesti avustajan tai teknikon avustuksella.



Tämän mallin mahdolliset säädöt on lueteltu tässä..

Ohjeet säätöjen oikeaan suorittamiseen sisältyvät vastaavaan HUOLTO-KÄSIKIRJAAN, joka on saatavana verkkosivustolta www.rehateamprogeo.com

TEHTÄVISSÄOLEVAT SÄÄDÖT

✓ = Mahdollinen ✗ = Ei

✓	Takakorkeus	✓	Jalkatuen korkeus
✓	Etukorkeusa	✓	Jalkatuen kulma
✓	Tasapainopiste	✓	Jalkalevyn kulma
✓	Haarukan kulma	✓	Jarrut
✓	Selkätuen korkeus	✓	Konvergenssi
✓	Selkätuen kulma	✗	Istuinsyvyys

7 LISÄVARUSTEET

Tämä malli voidaan varustaa erilaisilla lisävarusteilla, jotka tulee arvioida käyttäjän ja/tai hänen avustajansa tarpeiden mukaisesti

Joissakin tämän käyttöohjeen kuvissa voi olla pyörätuolimalli, joka poikkeaa vertailumallista.
Kaikki ohjeet ovat kuitenkin merkityksellisiä mallieroista riippumatta.



7.1 Siirtopyörät

Tämä lisävaruste on tarpeen, kun pyörätuolin leveys estää kapeiden aukkojen läpi kulkemisen (esim. ovi, hissi).
Tämän lisävarusteen käyttäminen edellyttää kelauspyörien irrottamista. Pyörätuoli saadaan näin sekä kapeammaksi että lyhyemmäksi.
Siirtopyörä voidaan irrottaa kannattimestaan.

Paina nastaa **A**, joka pitää sen paikallaan ja vedä putki ulos kannattimesta **B**.

Siirtopyörän kiinnittämiseksi putki työnnetään kannattimeen **B**, kunnes nasta **A** koskettaa kannatinta.

Sitten nastaa painetaan ja putkea työnnetään sisään, kunnes nasta lukkiutuu kannattimessa olevaan reikään.

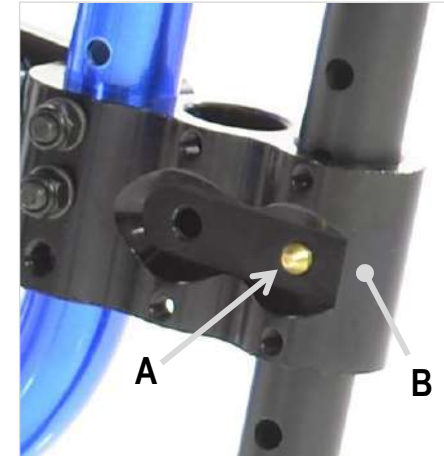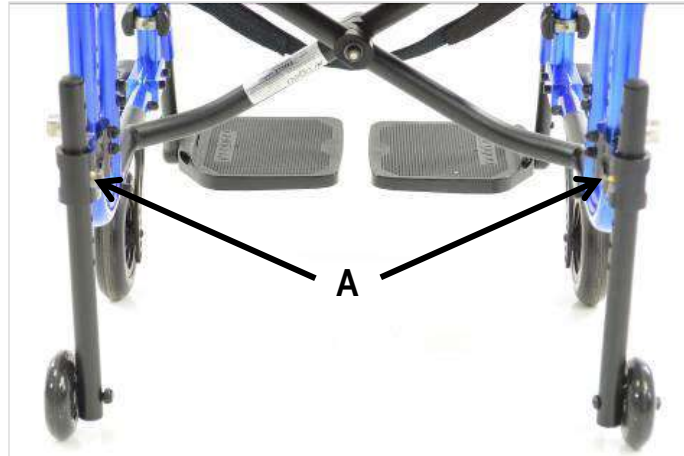

Siirtopyörän oikea asennus edellyttää, että sitä kannattimeen työnnettäessä nastan **A** tulee aina osoittaa pyörätuolin sisäpuolelle.

Muista, että siirtopyöriä käytettäessä (kelauspyörät irrotettuina), pyörätuolin jarrut eivät toimi lainkaan.

Siirtopyöriä käytettäessä pyörätuolin vakaus on heikentynyt, joten kiinnitä tähän paljon huomiota ja pyydä apua avustajalta.

7.2 Pyörällinen kaatumiseste

Tämän lisävarusteen tehtävänä on estää pyörätuolia kaatumasta taaksepäin.

Oikein toimiakseen se on säädettävä 2-3 cm:n etäisyydelle maasta.

Kippiestepyörää voidaan käyttää pyörätuolin toisella sivulla, mutta lisäturvallisuuden aikaansaamiseksi sen molemmilla puolilla



Tämän tarkistuksen jälkeen järjestelmä toimivuus tarkistetaan avustajan kanssa. Tällöin pyörätuolin etupäätä nostetaan ylös, kunnes kippiestepyörä koskettaa maata ja estää kaatumisen. Tämän toimenpiteen yhteydessä on noudatettava varovaisuutta.

(1) Oikean käyttöasennon tarkistamiseksi tartutaan yhdellä kädellä putkesta ja yritetään siirtää sitä oikealle ja vasemmalle: putken ei tulisi kääntyä (pieni välys voi tuntua). Sitten putkea painetaan alaspäin: putki menee noin 1 cm alas, muttei irtoa.

Kaatumiseste voidaan irrottaa tai kääntää sivuun esim. askelmaa ylittäessä.

(2) (3) (4) Kaatumisesteen kääntämiseksi sitä painetaan alas noin 1 cm:n verran (kannattimen osa **A** erkanee osasta **B**, muttei irtoa) ja käännetään sivulle.

Kun kaatumisestettä käännetään 180° (vastakkainen asema), kannatin lukkiutuu automaattisesti (osa **A** lukittuu osaan **B**).

(5) (6) Irrotaaksesi kaatuimesteen, paina nastaa **C** kannattimen yläreunassa ja paina putki irti kannattimesta.

(6) Kaatumisesteen asentamiseksi paikalleen osa **A** työnnetään osan **B** reikään ja putkea kierretään, kunnes molemmat osat lukkiutuvat toisiinsa.



Kannatinkappaleiden **A** ja **B** tiukkuudesta johtuen kippiesteen asentaminen ja irrotus on mahdollista vain pystysuoralla liikkeellä.

7.3 Avustajan työntökahvat

Kahvat voidaan asentaa vain "sport"-mallin selkäputkiin, johon kahvat eivät kuulu vakiovarusteina.

Kahvat ovat korkeussäädettävät, tarjoten paremman otteen ja työntöasennon avustajalle.

Kahvat ovat helposti käyttäjän ja/tai avustajan säädettävissä ja irrottavissa.

Korkeuden säätämiseksi avataan ruuvia L, putkea siirretään ylös- tai alaspäin sopivalle korkeudelle, kahva käännetään taaksepäin ja lopuksi ruuvi L kiristetään tiukkaan.

Työntökahvan irrottamiseksi ruuvi L kierretään auki ja putki vedetään pois kannattimesta.

Työntökahva asennetaan paikalleen kannattimeen työntämällä ja säätämällä korkeus edellä kuvatulla tavalla.



Tärkeä varoitus avustajalle: työntökahvan putket ovat tukevat vain kun molemmat vivut L ovat tiukalle kiristetyt, mikä itse asiassa estää putkia liukumasta ylös tai alas tai jopa irtoamasta kokonaan vahingossa.

Ennen pyörätuolin työntämistä on varmistettava, että molemmat putket ovat tukevasti kiinni.

Rehateam s.r.l. ei voi olla vastuussa tämän varoituksen huomioimatta jättämisestä johtuvasta vahingosta tai loukkaantumisesta.



7.4 Kynnyspojljin

Tämän lisävarusteen tarkoituksena on antaa avustajalle mahdollisuus kallistaa pyörätuolia taaksepäin vaivattomasti pienten esteiden ylittämisen helpottamiseksi. Muovista poljinta painetaan yhdellä jalalla alas samalla työntökahvoista alaspäin painaen.

Kallistusapulaite voidaan irrottaa painamalla sitä paikallaan pitävää nastaa A ja vetämällä putki kannattimesta B.

Kallistusapulaitteen asentamiseksi paikalleen putki työnnetään kannattimeen B, kunnes nasta A koskettaa kannatinta.

Sitten nastaa painetaan ja putkea työnnetään sisään, kunnes nasta lukkiutuu kannattimessa olevaan reikään.




7.5 Keppiteline

Tämän lisävarusteen avulla käyttäjä voi kuljettaa mukanaan kyynärsauvoja ilman että ne häiritsevät pyörätuolin normaalia käyttöä.

Kyynärsauvan alaosa asetetaan kannattimelle **A** ja yläosa selkänojan runkoputkeen hihnojen **B** avulla..

Putki kannattimiseen voidaan helposti irrottaa: paina nastaa **D** ja vedä putki pois kannattimesta.

Putken asentamiseksi paikalleen se työnnetään kannattimeen **C**, kunnes nasta **D** koskettaa kannatinta. Sitten nastaa painetaan ja putkea työnnetään sisään, kunnes se lukkiutuu kannattimen reikään.

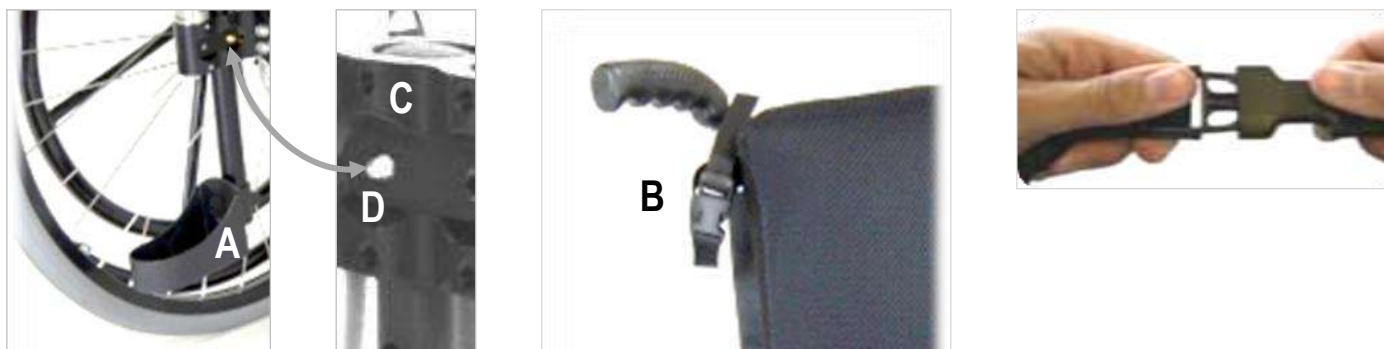

7.6 Taittavat työntökahvat


Nämä työntökahvat pienentävät alastaitettuina (1) pyörätuolin kokoa ja saadaan pois tieltä häiritsemästä käyttäjän käsivarsia pyörätuolia itse kelattaessa. Ylöstaitettuina (2) ne toimivat tavallisten kahvojen tavoin.

Taita kahva alas (1) painamalla tappi **A** (2), juuri kahvan alapuolelle ja kääntämällä kahva alas. Tappi pysyy painettuna (3).

Nosta kahva käyttöasentoon (2) kääntämällä sitä, kunnes tappi **A** lukittuu automaattisesti



Avustajan työntäessä pyörätuolia käyttäjän istuessa siinä on varmistettava, että työntökahvat ovat tukevasti lukittuneet käyttöasentoonsa.

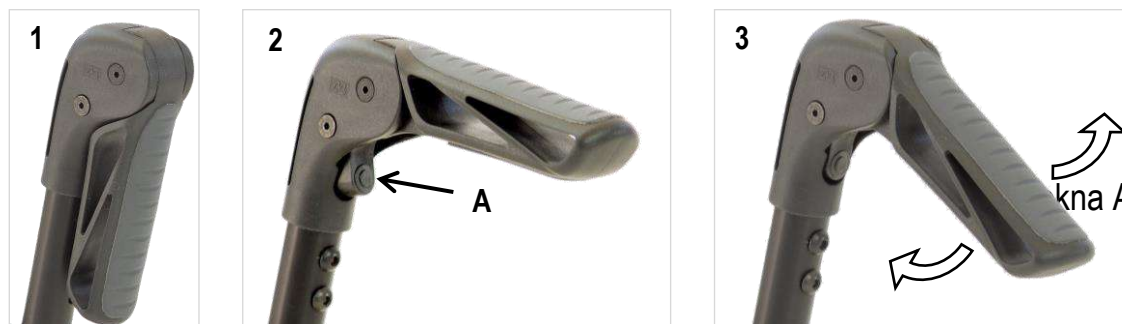

7.7 Pikalukittava haarukka


Tämä lisävaruste helpottaa pyörätuolin vaatiman tilan pienentämistä kasattuna.

Kahden haarukkaparin yhteydessä tämä varuste voi olla hyödyllinen, jos käyttäjän täytyy muuttaa tukipyörien kokoa erilaisilla pinnoilla kulkemista varten.



Kokeile haarukasta vetämällä, onko se tukevasti lukittunut. Haarukka ei saa irrota. Pientä välystä voi tuntua

Poista haarukka tarttumalla siihen kuvan osoittamalla tavalla, paina akselin **A** alapuolella olevaa tapia **B** ja työnnä haarukka irti. Asenna haarukka painamalla tappia **B** ja pitämällä sitä alhaalla ja antamalla akselin **A** kulkea laakerin reiän läpi paikoilleen. Lopuksi vapauta tappi.

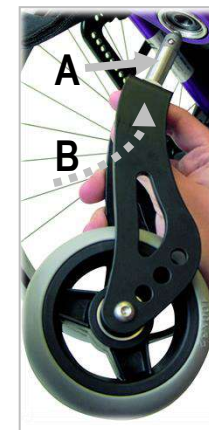

7.8 Tetraclip-pikalukitusakseli


Tämä on erityinen pikalukitusakseli rengasvivulla. Se helpottaa pyörän irrotusta käyttäjillä, joilla on erityisiä ongelmia käsien ja sormien kanssa.

Akseli toimii keirtämällä rengasvipua 90°.

Kelauspyörän ollessa paikallaan rengasvivun on oltava kuten kuvassa 1, siis 90° kierrettynä akselin suuntaan nähden.

Pyörän irrottamiseksi rengasvipu käännetään kuvassa 2 esitetyn mukaisesti akselin suuntaiseksi. Sitten pyörä irrotetaan.

Pyörän kiinnittämiseksi rengasvivun on oltava kuten kuvassa 2. Pyörä asetetaan paikalleen ja rengasvipua käännetään 90° kuten kuvassa 1.

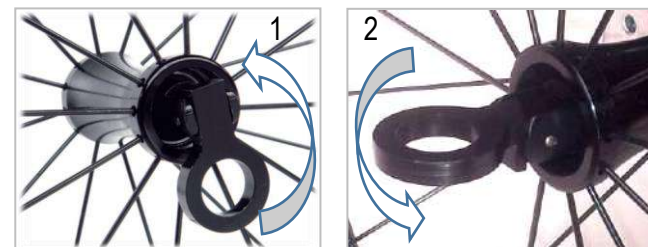


Kelauspyörien pikalukitusakseleiden tarkistaminen on toimenpide, joka käyttäjän tulee tehdä aika ajoin. Mikäli pikalukitusakselit eivät ole kunnolla paikoillaan ja kiinnitetty, ne voivat löystyä normaalikäytössä ja aiheuttaa pyörän irtoamisen, pyörätuolin kaatumisen ja mahdollisen loukkaantumisen. Katso myös luku "Pikalukittavat kelauspyörät".

7.9 Pöytä

Tämä lisävaruste voidaan asentaa vain mikäli pyörätuoli on varustettu käsinojilla.

Pöydän liittämiseksi kannattimen **S** pulttia **A** avataan pyörätuolin molemmilta puolin, kunnes kiinnitysreikä tulee vapaasti näkyviin.

Putket työnnetään yhdensuuntaisesti kannattimiin ja pöytä säädetään halutulle syvyydelle. Lopuksi molempien kannattimien **S** pultti **A** kiristetään.

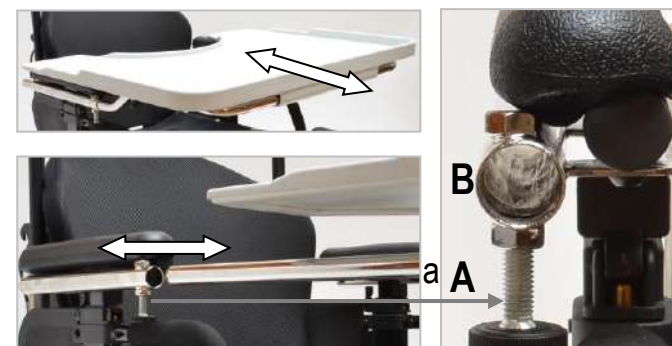


Ennen pöydän käyttämistä on varmistettava, että se on tukevasti kiinni. Kokeile vetämällä sitä: ellei pöytä liiku, se on käyttökunnossa.

Pöydän irrottamiseksi kannattimen **S** pulttia **A** avataan pyörätuolin molemmilta puolin ja pöytä vedetään irti.
Pentru a scoate masa, slăbiți șurubul **A** al suportului **S** de pe fiecare parte a scaunului cu roțile și glisați-l.

7.10 Lantiovyö ja liivi

Sekä lantiovyö että liivi ovat tämän mallin lisävarusteita ja ne on siksi tilattava erikseen. Nämä vyöjärjestelmät on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälle enemmän tukea ja vakautta hänen istuessaan pyörätuolissa.

 Sekä lantiovyö että liivi ovat erityisen hyödyllisiä käyttäjille, joiden ylävartalon hallinta on puutteellista ja jotka tarvitsevat lisätukea pysyäkseen käyön aikana tukevasti istuimessa.

 **Danger of serious injury or strangulation. A loose belt can allow the user to slide downward and pose a strangulation hazard. The posture belt must be fitted by an experienced technician and the person responsible for prescribing must ensure its suitability.**

LANTIOVYÖ

Tukee käyttäjää tuolissa lantiosta ja jättää ylävartalon vapaaksi liikkeille. Lantiovyö kiinnitetään pyörätuoliin kahdesta kiinnityskohdasta rungon takaosassa.

HARNESS

Tukee käyttäjää tuolissa lantiosta ja hartioista. Käyttäjän koko ylävartalo on tuettuna istuimeen. Se on tarkoitettu käyttäjille, joilla on erityisen rajoittunut ylävartalon liikkumiskyky. Liivi kiinnitetään pyörätuoliin neljästä kiinnityskohdasta: kaksi rungon takaosassa ja kaksi selkänojan putkissa.


KÄYTTÖ

Lantiovyön ja liivin käyttäminen on varsin yksinkertaista.

Ennen käyttäjän istuutumista pyörätuoliin hänen avustajansa tulee avata soljet lukituspainikkeita painamalla ja vetämällä osat erilleen.

Kun käyttäjä istuu pyörätuolissa vyö tai liivi paikallaan, hän voi kiinnittää soljet niiden osat yhdistämällä.

Molempia vöitä voidaan helposti säätää hihnojen päistä vetämällä.

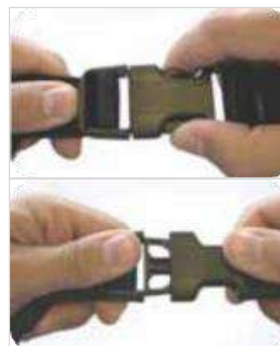

7.11 Lannetuki

Pehmuste, joka tarjoaa paremman tuen lannerangan alueelle.

Lannetuen asettamiseksi selkänöjan verhoilua nostetaan etupuoleltaan.

Lannetuki kiinnitetään osissa olevien tarrapintojen avulla joko selkänöjan verhoiluun tai selkänöjan hihnoihin sopivalle korkeudelle. Lopuksi verhoilu palautetaan takaisin normaaliasentoonsa.



7.12 Päätuiki

Tämän lisävarusteen tarkoituksena on pään tukeminen.

Se soveltuu kokoontaitettaviin pyörätuoleihin; tässä päätukimallissa on kokoontaittuva rakenne. Kun pyörätuoli taitetaan kokoon, myös päätuki taittuu.

Päätuiki kääntämiseksi käyttöasentoonsa sitä vedetään ylöspäin, kunnes molemmat putket **A** kallistuvat alaspäin keskusyksiköstä **B**.


Ennen pyörätuolin kokoontaittamista on keskusyksikkö **B** painettava alas.

Käyttäjä tai avustaja voivat helposti säätää päätuiki asentoa käyttäjän tarpeiden mukaiseksi.

Korkeutta voidaan säätää avaamalla nappi **1**.

Syvyysuuntainen säätö tapahtuu avaamalla nappi **2**.

Pehmustetta voidaan säätää avaamalla nappi **3**, ja kiertämällä pehmustetta ylös/alas/oikealle/vasemmalle.

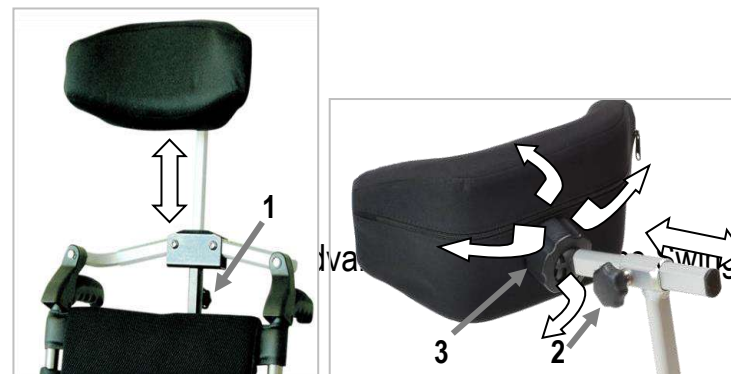

Jokaisen säädön jälkeen nappi on kiristettävä ja varmistettava, että järjestelmä on tukeva. Tarkistaminen on aina tarpeen; löysästi kiinnitetty järjestelmä voi aiheuttaa vaaratilanteita.



Löysättyäsi kutakin säätönuppia, voit myös irrottaa vastaavat osat.

7.13 Vartalotuki

Tämä lisävaruste on suunniteltu antamaan tukea käyttäjän vartalolle.
Tämä sivutuki on tyyppiä "sivuun kääntyvä", eli sen voidaan kääntää taakse.

Käännä vipua L 90° ja käännä sivutuki vastakkaiseen asentoon, jonne se automaattisesti lukkiutuu.



Varmista, että järjestelmä on tukeva. Tarkistaminen on aina tarpeen; löysästi kiinnitetty järjestelmä voi aiheuttaa vaaratilanteita käyttäjälle.



7.14 Kelauspyörät

Toiminnallisista ja/tai ulkonäöllisistä näkökohdista riippuen tähän malliin on saatavilla useita erilaisia kelauspyöriä (1) (2) (3).
Näihin kelauspyöriin voidaan asentaa erityyppisiä kelausvanteita.

Erikoispyörät

(4) SPINERGY FLEX VANNE: Tässä mallissa yhdistyvät alumiini ja joustava kumiteippaus, joka parantaa käden tarttumaotetta.

(5) OFF ROAD- MAASTOPYÖRÄT*: Nämä pyörät on suunniteltu kulkemaan sujuvammin ja mukavammin maastossa ja epätasaisilla alustoilla. Saatavana vain maastorenkaan ja alumiinisen kelausvanteen kanssa.

(6) FAT - PAKSURENGASPYÖRÄ*: Näiden pyörien avulla pyörätuolia voidaan käyttää haastavassa maastossa. Ne toimitetaan omalla renkaallaan ja alumiinisella kelausvanteella.



ance /

re Swing

38



*Tämä pyörätyyppi on valittavissa lisävarusteena pyörätuoliin valittujen peruspyörien ohella. Tällöin pyörät ovat vaihdettavissa ja näin ollen on tarpeen vain irrottaa yksi pari ja asentaa toinen paikoilleen. Katso myös kappale "Pikalukittavat kelauspyörät".

7.15 Yhdenkäden kelausvanne

Tämän lisävarusteen avulla käyttäjä voi kelata ja hallita pyörätuolia vain yhdellä kelauspyörällä. Tällaisessa pyörässä on itse asiassa kaksi erillistä kelausvannetta: suurempi vanne vaikuttaa vanteen puoleiseen pyörään kun taas pienempi vanne vaikuttaa vastakkaiseen pyörään kytkennän A välityksellä.

Kun pyörätuoli on tarpeen taittaa kokoon, on kytkentätanko A ensin poistettava. Tämä tapahtuu vetämällä toista tangossa A olevasta kahdesta ulokkeesta sen vetämiseksi kokoon (sisällä on jousi), kunnes se voidaan irrottaa kelauspyörän akselilta ja poistaa kokonaan.

KytKentätangon A asettamiseksi paikalleen toinen sen kahdesta ulokkeesta työnnetään kelauspyörän akselille, tangosta vedetään sen vetämiseksi tarpeeksi kokoon siten, että toinen uloke voidaan työntää toisen pyörän akselille.




Molemmat nupit B on tarkistettava usein. Niissä ei tulisi olla vällystä, mutta niiden tulisi päästää kytkentätanko puristumaan kokoon ja piteneään. Tämä on ihannetila ajettaessa sekä tangon A liittämisen ja irrottamisen kannalta.

7.16 Rumpujarrulla varustetut pyörät

Tämän lisävarusteen avulla avustaja voi jarruttaa pyörätuolia sen liikuessakin. Sitä voidaan myös käyttää pysäköintijarruna. Se on varsin hyödyllinen kaltevilla pinnoilla, joilla pyörätuolin hallinta saattaa olla vaikeaa.

Jarruttaaksesi purista kahvasta A, joka on kiinnitetty kuhunkin työntökahvaan. Mitä voimakkaampi puristus, sitä suurempi on pyörään kohdistuva jarruvoima.

Kun kahvat A vapautetaan, jarruvaikutus päättyy.

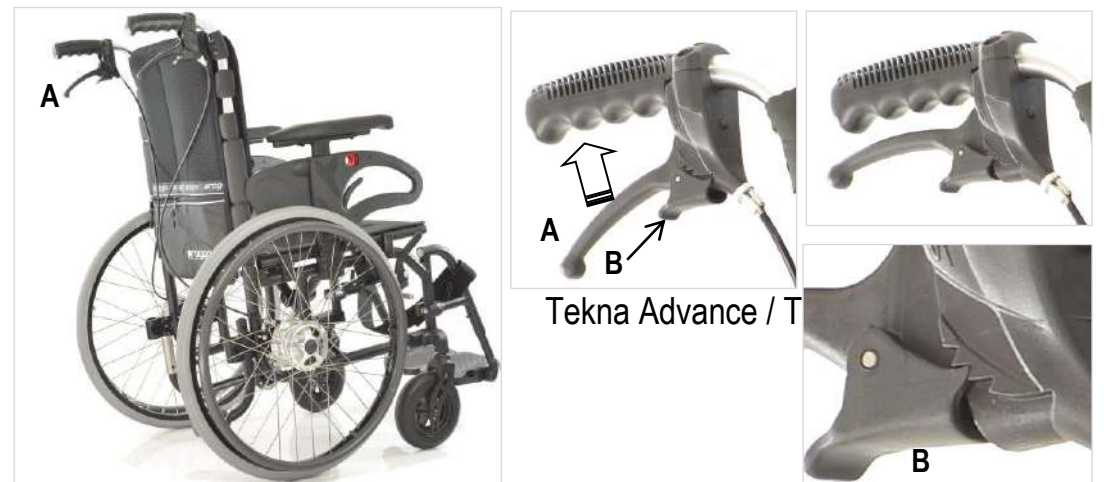

Rumpujarru voi toimia pysäköintijarruna.

Pitä kahvaa **A** puristettuna, ja työnnä hammastettua vipua **B** sitten eteenpäin (sijaitsee jarrukahvan alapuolella) ja vapauta lopuksi kahva **A**.

Vipu **B** pitää nyt kahvan **A** päälle kytkettynä ja jarru on päällä. Jarrun vapauttamiseksi tästä tilasta kahvaa **A** puristetaan juuri sen verran, että vipu **B** avautuu.

7.17 Kelausvanteet

Tähän PROGEO-pyörätuolimalliin on saatavissa valikoima eri kelausvanteita.

Nämä erikoisominaisuuksin nvarustetut kelausvanteet takaavat paremman otteen ja siten tehokkaamman kelausliikkeen etenkin käyttäjille, joiden köäsien ja sormien voima ja liikkuvuus on rajallinen.



Kelausvanteen rakenne voi olla sellainen, että se voi aiheuttaa vaaran sormien puristumisesta kelausvanteen ja pyörän vanteen väliin. Kiinnitä aina huomiota tähän.

7.18 Renkaat

Erityyppisiä renkaita on saatavissa. Yhteensopivuus kelauspyörän kanssa riippuu pyörän koosta.

(1) Korkeapainerengas

Kevyt ja luotettava, soveltuu useimpiin ympäristöihin and reliable, suitable for most environments.

(2) Marathon Plus

Pistosuojattuna soveltuu useimpiin ympäristöihin.

(3) Kuvioitu korkeapainerengas

Kevyt ja luotettava, soveltuu parhaiten karkeille pinnoille.

(4) Umpikumirengas

Soveltuu useimpiin ympäristöihin, ei vaadi täyttämistä, mutta on vähemmän sujuva ja tarjoaa hieman heikomman otteen etenkin sileillä ja märillä pinnoilla.



7.19 Pinnasuoja

Pinnasuojilla on lähinnä kosmeettinen rooli, mutta ne myös estävät käyttäjän sormia joutumasta vahingossa kelauspyörän pinnojen väliin.



7.20 Tukipyörät

Tukipyörien malli ja koko on valittavissa tähän malliin toiminnallisten ja/tai ulkonäöllisten näkökohtien perusteella.

Yleisesti ottaen kulkeminen pienten esteiden kuten pikkukivien, matalien askelmien (1 cm), jne. yli on helpompaa pyörillä, joiden läpimitta ja leveys on suurempi.

“Pehmeä” tukipyörä on mukavampi kuin “aktiivinen” (kova) pyörä. Paineilmapyörä on mukavuudeltaan paras, mutta se on täytettävä usein.



7.21 Lokasuojat

Lokasuojat voivat olla muoviset tai paljon kestävämpää hiilikuitua. Ne voivat olla tyypiltään kaartuvat tai suorat.

Mikäli sivusuojus on tyyppiä kaartuva, ne on alunperin kiinnitetty reunastaan noin 5 mm renkaan yläpuolelle käyttäjän sormien estämiseksi joutumasta renkaan ja suojuksen väliin.

Irrotettavat lokasuojat korkeussäätölevyllä (1), kaartuvana tai suorana, käyttävät samaa irrotettavien käsinojen järjestelmää. Katso luku ”Käsinojat”



**Älä nosta pyörätuolia tarttumalla irrotettaviin lokasuojiin, koska ne eivät ole lukossa.
Varo sormiesi puristumista, kun asennat irrotettavia sivusuojuksia**



7.22 Yhdistäjäkangas (istuimen /selkätuen verhoilun yhdistäjä)

Tämän lisävarusteen avulla voit liittää selkänojan verhoilun istuinkankaaseen, ja on hyödyllinen välttääksesi istuimeen kiinnittämättömän tyynyn mahdollisen taaksepäin liukumisen.

Tämän läpän käyttö on melko yksinkertaista. Se kiinnitetään siinä olevien Velcro-tarrojen avulla selkänojan verhoilun sisäpuolelle vasta tarroihin ja istuinkankaan pinnan vastatarroihin.



7.23 Irrotettava laukku


Tämä lisävaruste on erittäin hyödyllinen pienten tavaroiden kuljettamiseen mukana sekä pyörätuolia käytettäessä että sen ulkopuolella. Laukku on helposti irrotettavissa pyörätuoliin kiinnitetyn tuen ansiosta.

Käytettävissä olevasta tilasta riippuen laukku voi olla taaksepäin (1) tai eteenpäin (2) ja se on yleensä kiinnitetty pyörätuolin etuosaan.

Laukun irrottamiseksi käännä nuppia A (3) lukitusasennosta (4), kunnes urahjain B (5) vapautuu.

(5) Nupin vipu C voi olla eri asennoissa, itse asiassa lukitusasemia on enemmän kuin yksi.

(6) Kun urahjain B on vapautunut, vedä pussia ylöspäin sen poistamiseksi. Pussin asettamiseksi aseta tuki D uritettua ohjainta B pitkin ja käännä nuppia lukitusasentoon yllä esitetyllä tavalla.

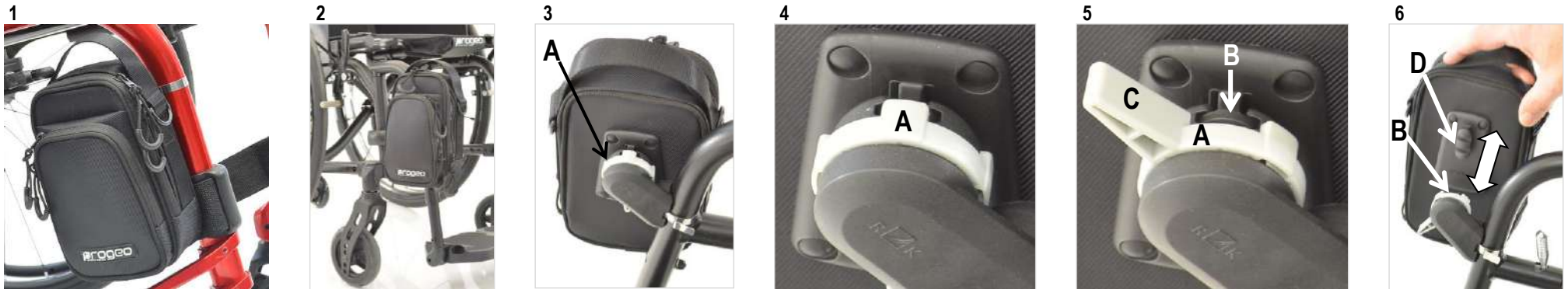

7.24 Rungon suojus


Tämä lisävaruste on erittäin hyödyllinen eturungon suojaamiseksi mahdollisilta iskuilta. Tämän pehmusteen käyttö on yksinkertaista. Aseta suojus runkoputken ympärille ja kiinnitä tarranauhoilla.




8 KUNNOSSAPITO


Pyörätuolin määräaikainen tarkastus on olennaista maksimaalisen toimintakyvyn ja pitkän käyttöiän takaamiseksi. Säännöllisin välein toistettu huolellinen tarkastus yhdessä pyörätuolin asianmukaisen käytön kanssa takaa, että pyörätuolinne tulee kestäväksi monia vuosia.

Alumiinisten tai hiilikuituosien (runko, kelausvanteet, jarrut jne.), selkänojan ja istuimen puhdistamiseen suosittelemme käytettäväksi vain **pehmeää kostutettua liinaa**

 Suosittelemme käyntiä valtuutetun PROGEO-myyjän luona pyörätuolin täydellistä tarkastusta varten 6 kuukauden sisällä hankinnasta. Valmistaja ei ole vastuussa, mikäli tässä käyttöohjeessa esitetyt ohjeita ja suosituksia ei noudateta, ja kaikki tällainen toiminta johtaa valmistajan takuun välittömään mitätöitymiseen.

 Suosittelemme kiinnittämään erityistä huomiota kelauspyörien kelausvanteiden puhdistamiseen, jotka likaantuvat hyvin helposti jatkuvasta käytöstä ja maan kanssa kosketuksiin joutumisesta johtuen. Kelausvanteiden huolellinen puhdistaminen takaa optimaalisen otteen ja siksi turvallisemman käytön.

 Pyörätuolin puhdistamiseen ei tule käyttää mahdollisesti vaurioita aiheuttavia hankaavia puhdistusaineita tai rasvaliuottimia.

 Hiekka, merivesi ja klooripitoinen vesi tai muut syövyttävät ympäristöt voivat vaurioittaa laakereita, pultteja, mutterita tai kaikkia liikkuvia osia. Kosketusta edellä mainitun kaltaisten syövyttävien ympäristöjen kanssa tulee välttää, ja mikäli tätä tapahtuu, on huolellinen pesu ja puhdistaminen tarpeen. Takuu ei koske hapettuneita osia ja vaurioita, jotka johtuvat tuotteen huolimattomasta käsittelystä.

 Kiristä kaikki ruuvit tiukalle ja vaihda lukkomutterit, joita käytetään usein. Niillä on itse asiassa taipumus menettää tehokkuuttaan usein tapahtuvien avaamisten ja kiristysten myötä.

 Tarkistuta pyörätuoli kokonaan (vähintään kerran kolmessa kuukaudessa) pätevällä henkilöstöllä, joka on valtuutettu huoltamaan PROGEO-tuotteita.

Mahdollisia PROGEO-pyörätuolinne säätämistä ja huoltoa koskevissa kysymyksissä Rehateam s.r.l.:in kokenut tekninen henkilökunta on aina käytettävissä kaikille asiakkaillemme. Voitte ottaa suoraan yhteyttä meihin alla mainitussa osoitteessa:

8.1 Kuluneiden osien vaihto

Käytön myötä jokainen pyörätuoli vaatii rutiinomaisen kunnossapidon lisäksi osien normaalista kulumisesta johtuvaa muuta "huolto-ohjelman ulkopuolista" huoltoa. Tällaisen kunnossapidon tarve on läheisessä yhteydessä pyörätuolin käytön määrään ja tyyppiin (esim. käyttö epätasaisella alustalla, rannikkoalueilla, joissa on enemmän ilman mukanaan kuljettamaa suolaa, jne.).

Puhjetun renkaan korjaaminen

Irrota pyörä ja poista rengas polkupyörän rengasrautojen avulla. Ota sisäkumi pois ja korjaa se käyttäen tavallista renkaanpaikkaussarjaa ja samaa menettelyä kuin normaalia polkupyörän sisärengasta korjattaessa. Ellei korjaaminen ole mahdollista, on sisärengas vaihdettava uuteen.

Kelauspyörien renkaat tulee vaihtaa uusin aina kun havaitaan liiallista tai epäsäännöllistä kulumista, koska se johtaa pyörätuolin toiminnan heikkenemiseen.

Sisärenkaan ja renkaan asentamiseksi takaisin pyöränvanteelle on tarpeen osittain tyhjentää sisärengas. Työnnä venttiili seuraavaksi vanteessa olevaan reikään ja työnnä sisärengas renkaan sisään käsiä ja rengasrautoja käyttäen ja pakota renkaan reuna pyöränvanteen päälle.

Tee näin ympäri koko pyörän varmistaen huolellisesti, että sisärengas ei jää puristuksiin vanteen ja renkaan väliin. Täytä rengas lopuksi oikeaan paineeseen.

oppuun kuluneet tai vahingoittuneet täyskumiset tukipyörän renkaat on vaihdettava uusiin.

Varaosat

Kulumisesta tai rikkoutumisesta johtuvaa osien vaihtoa varten (tai pelkästään lisävarusteiden hankintaa varten) on vaivatta saatavissa varaosia pyörätuolin pitämiseksi täydessä toimintakunnossa.



Kaikkia varaosia voidaan tilata valtuutettujen jälleenmyyjien kautta.

8.2 Komponenttien tarkistus

Suosittellemme seuraavien kohteiden tarkistamista päivittäin:

- Tarkista rengaspaine.
- Tarkista pikalukitusakselit.
- Tarkista kasausmekanismi (istuin ja/tai selkätuki).
- Tarkista jalkatuki.
- Tarkista jarrut.

- Kaikkien ruuviliitosten tarkistus.
- Kaikkien kuluvien osin kunto

8.3 Pyörätuolin desinfiointi ja uudelleenkäyttö

Pyörätuolia käytettäessä kaikki käyttäjän kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat tulee käsitellä säännöllisesti tai tarvittaessa suihkutuettavalla desinfiointiaineella.

Verhoilun ompeleiden turvallista desinfiointia ei yleensä voida taata. Siksi suosittelemme, että istuinkangas ja selkänojan päälliset vaihdetaan ja hävitetään asianmukaisesti bakteerikontaminaation yhteydessä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Jos pyörätuoli kierrätetään uudelleenkäyttöön, sen puhdistus ja desinfiointi on suoritettava erittäin huolellisesti ennen pyörätuolin ottamista käyttöön.



Ensinnäkin sinun pitäisi tietää, että **puhdistus ei ole sama kuin desinfiointi**. Puhdistamalla poistamme bakteerit ja lian pinnoilta, mutta emme tapa bakteereja, vaikka niiden poistaminen vähentää infektioiden määrää ja riskiä levitä. Toisaalta desinfiomalla tapamme mikro-organismit, kuten bakteerit, kemikaalien avulla.

Tämä prosessi ei välttämättä puhdistaa likaisia pintoja, mutta tappamalla pinnalla olevia bakteereita se voi edelleen vähentää infektion leviämiskä.

Pyörätuolin kanssa noudatettava oikea puhdistusprosessi on suorittaa **aina ensin rutiinipuhdistus ja sitten desinfioida se** pintojen desinfiointiaineella.

Nämä tuotteet ovat bakterisidisiä ja virusideja. Löydät lisätietoja näistä tuotteista terveysministeriön verkkosivuilta tai muista luotettavista lähteistä. Suosittelemme myös, että luet huolellisesti valmistajan ohjeet tuotteen oikeasta käytöstä ja desinfioinnista sekä mahdollisten kontraindikaatioiden välttämiseksi.

8.4 Säilytys

Mikäli pyörätuolia ei käytetä kohtalaisen pitkään aikaan (yli 4 kuukauteen), on suositeltavaa säilyttää se peitettynä ja puhtaana kuivassa paikassa ja laatikon sisällä (mieluiten alkuperäisessä pakkauslaatikossa). Uudelleen käyttöön otettaessa on tarpeen suorittaa pyörätuolin yleistarkastus kappaleessa 8.2 lueteltujen kohtien mukaisesti.

Ennen kuin potilas voi käyttää pyörätuolia, tulee suorittaa ajokokeet sen varmistamiseksi, ettei pyörätuoli käyttäydy poikkeavasti.

Mikäli ilmenee toimintahäiriöitä, poikkeavaa käyttäytymistä tai rikkoutuneita osia, tulee kääntyä valtuutetun jälleenmyyjän puoleen tarvittavan korjauksen järjestämiseksi.

8.5 Materiaalien hävittäminen / kierrätys

Kun pyörätuoli on hävitettävä (tuotteen käyttöänsä lopussa), tulee huomioida kaikki paikalliset voimassa olevat jätteen hävittämistä tai kierrätystä koskevat säädökset.

Tähän sisältyy pyörätuolin puhdistaminen ja desinfiointi ennen hävittämistä. Alla on kuvaus käytetyistä materiaaleista.



- Alumiini: runko, haarukat, pyörät, selkänojaputket, jalkalautaputket
- Titaani: runko, selkänojaputket
- Teräs: pultit ja mutterit, pikalukitusakseli

- Muovi: jalkalaudat, lokasuojat
- Kumi/PU: kahvat, renkaat, pyörät
- Hiilikuitu: runko, sivusuojukset, jalkalaudat
- Verhoilu: tekstiili, solumuovi
- Pakkaus: pehmeästä polyeteenistä valmistetut muovipussit, pahvi



Kääntykää valtuutetun jäteaseman puoleen hävittämisen ja kierrätyksen järjestämiseksi. Pyörätuoli voidaan vaihtoehtoisesti palauttaa jälleenmyyjälle hävitettäväksi.

Hävitettäessä on otettava huomioon rikkoutuneet tai vaurioituneet osat, jotka saattavat aiheuttaa potentiaalisen viiltämis- tai puristumisvaaran. On suositeltavaa käyttää sopivia suojaimia.

8.6 Vianetsintäohje

Pyörätuolin jatkuvan ja pitkäaikaisen käytön myötä ja osien säätämisen jälkeen saatetaan helposti kohdata "vikoja", jotka pätevä henkilöstö voi helposti korjata, tai käyttäjä ja/tai hänen avustajansa voi suorittaa korjauksen joissakin tapauksissa, merkitty symbolilla ✓.

Joka tapauksessa suosittelemme, että otat yhteyttä Rehateam s.r.l: n valtuuttamaan jälleenmyyjään.

Ongelma	Ongelman syy	Korjaus
Pyörätuoli ei kulje suoraan.	Etuhaarukat eivät ole suorassa kulmassa maahan nähden.	Tarkista haarukan kulma
	Tukipyörät eivät ole samalla korkeudella.	Tarkista tukipyörien korkeus
	Rengaspaine ei ole oikea tai erilainen toisessa renkaassa	Tarkista oikea ilmapaine kumpaankin renkaaseen ✓
	Pinnoja on poikki tai ne ovat löysällä.	Vaihda vaurioituneet pinnat tai kiristä löysällä olevat.
	Tukipyörän laakerit ovat likaiset tai vaurioituneet.	Puhdista laakerit ✓ Vaihda laakerit.
Pyörätuoli kippaa herkästi.	Kelauspyörät on säädetty liian aktiiviseen säätöön.	Siirrä kelauspyöriä taemmas.
	Pyörätuoli on liian iso istuinkulma.	Kasvata takakorkeutta tai alenna etukorkeutta.
Jarrut eivät toimi kunnolla.	Rengaspaine ei ole oikea	Tarkista rengaspaine. ✓
	Jarru on säädetty väärään kohtaan	Tarkista jarrun säätö
Pyörätuolin kelaaminen on vaikeata.	Rengaspaine ei ole oikea.	Tarkista rengaspaine. ✓
	Renkaat ovat loppuun kuluneet.	Vaihda renkaat uusiin. ✓
Pyörätuolin auki taittaminen on vaikeaa.	Selkänojan tarrahihnat ovat liian kireällä.	Löysenä selkätuen tarrahihnoja. ✓

9 TEKNISET TIEDOT

Merkkiavain: \Rightarrow = säätöväli; \Leftrightarrow = säädettävissä; \square = runko; **1** = vakaa; **2** = vakio; **3** = aktiivi; **4** = äärimmäisen herkkä **LS** = istuinleveys; \approx = noin; \perp = alkaen; \diamond = mallin mukaan; \wedge = camberkulmalla

	TEKNA ADVANCE	TEKNA ADVANCE avec repose-pied amovible	
ISTUINLEVEYS	360 390 420 450 480 mm	360 390 420 450 480 mm	
ISTUINSYVYYS	350 375 400 425 450 475 mm	350 375 400 425 450 475 mm	
JALKATUEN KORKEUS	350 \Rightarrow 540 mm \Leftrightarrow	350 \Rightarrow 540 mm \Leftrightarrow	
SELKÄNTUEN KRKEUS	245 \Rightarrow 470 mm \Leftrightarrow	245 \Rightarrow 470 mm \Leftrightarrow	
SELKÄTUEN KULMA	84° 90° 96° \Leftrightarrow	84° 90° 96° \Leftrightarrow	
CAMBER	0° 2° 4°	0° 2° 4°	
ETUKORKEUS	400 \Rightarrow 580 mm \Leftrightarrow	400 \Rightarrow 580 mm \Leftrightarrow	
TAKAKORKEUS	380 \Rightarrow 460 mm \Leftrightarrow	380 \Rightarrow 460 mm \Leftrightarrow	
PAINOPISTEEN SÄÄTÖ	1 2 3 \Leftrightarrow	1 2 3 \Leftrightarrow	
ETURUNGON KULMA	90° 110°	95° 110° 120°	
KOKONAISLEVYYS	LS + 170 mm (\wedge 0°)	LS + 170 mm (\wedge 0°)	

KOKONAISPITUUS (kevein kokoonpano)	850 mm ≈	850 mm ≈	
PYÖRÄTUOLIN PAINO (kevein kokoonpano)	┆ 10.2 kg ≈	┆ 11.0 kg ≈	
PAINO ILMAN KELAUSPYÖRIÄ (kevein kokoonpano)	┆ 7.6 kg ≈	┆ 8.4 kg ≈	
KELAUSPYÖRIEN PAINO (pari)	3.2 kg	3.2 kg	
IRROTETTAVIEN JALKATUKIEN PAINO	---	1.5 kg	
KÄSITUKINE PAINO (pari)	1.0 – 2.0 kg ◇	1.0 – 2.0 kg ◇	
SUURIN SALLITTU KUORMITUS	125 kg	125 kg	
TILANTARVE (pyörätuoli kokoonlaitettuna)	28 cm ≈ (∧ 0°)	28 cm ≈ (∧ 0°)	
ISTUIMEN KALLISTUS	---	---	

10 TAKUU

Takuusopimus on ainoastaan Rehateam s.r.l.:n ja sen valtuutettujen jälleenmyyjien välinen. Tästä syystä asiakas ei voi esittää takuuvaateita suoraan Rehateam s.r.l.:ille. Seuraavat takuehdot selostetaan siksi ainoastaan informaatiotarkoituksessa.

Takuun yleiset ehdot

Rehateam s.r.l. tarjoaa apua tuotteilleen edellyttäen, että niitä on käytetty oikein ja pyörätuolin kaikki osat ovat saaneet riittävää huoltoa (katso ohjekirja).

Takuu kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet edellyttäen, että tällaisten vikojen voidaan osoittaa aiheutuneen ennen tuotteen toimitusta valtuutetulle myyjälle.

Takuun alaisten oikeuksien validointi: Kaikkien takuun piirissä olevien oikeuksien validoimiseksi (kaikille tuotteillemme) valtuutetun myyjän on suoritettava tarkistus 7 päivän kuluessa toimituksesta kaikille vastaanotetuille tuotteille mahdollisten valmistusvirheiden toteamiseksi, ja toiseksi, mikäli mitä tahansa tällaisia valmistusvirheitä havaitaan, vahvistettava tämä välittömästi kirjallisena Rehateam s.r.l.:lle.

Rehateam s.r.l.:lle tulee myös toimittaa kirjallinen tieto mahdollisesta viasta, joka huolellisesta tarkastuksesta huolimatta havaitaan vasta edellä mainitun ajanjakson päätyttyä.

Takuuaika: Rehateam s.r.l. antaa kaikille pyörätuoleilleen 5 vuoden takuun rungon osalta ja 2 vuoden takuun muiden osien ja lisävarusteiden osalta toimituspäivästä alkaen lukuun ottamatta osia, jotka ovat päivittäisessä käytössä alttiina normaalille kulumiselle.

Vikojen korjaaminen ja vaihdot

Vikoja koskeva kontaktiosien takuu on kokonaan Rehateam s.r.l.:n harkinnan varainen sekä vian korjaamisen että itse osan vaihdon osalta. Yksinkertaisten korjausten tapauksissa voi valtuutettu jakelija ryhtyä itsenäisesti toimiin vian korjaamiseksi tai erityistapauksissa saattaa Rehateam s.r.l. tietoiseksi viasta.

Viitaten tuotantolinjaamme, joka on merkitty nimillä PROGEO ja PHYSIO, nämä tuotteet on valmistettu mittatilaus- ja käsityönä eikä teollisesti, minkä johdosta pieniä epätasuuksia, vähäisiä värien ja hiilikuitukudosten epätarkkuuksia ei pidetä virheinä.

Takuun rajoitukset

Rehateam s.r.l.:n myöntämä takuu ei kata lisäkustannuksia (esim. korjaus, pakkaaminen, työkustannukset, satunnaiset kulut jne.) Takuu ei kata seuraavia:

- Kuljetuksen aikana syntynyt vaurio, jota ei ole toimituksen yhteydessä ilmoitettu kuljetusliikkeelle.
- Valtuuttamattomien myyjien tai henkilökunnan tekemät korjaukset.
- Kulumiselle alttiit osat.
- Omaisuus- tai henkilövahingot, jotka syntyvät tuotteidemme käytön aikana.
- Tahalliset tai ostajan aiheuttamat vahingot tai vahingot, jotka johtuvat tuotteen väärästä tai epäasianmukaisesta käytöstä.
- Pyörätuolille, esineille ja henkilöille aiheutetut vahingot, jotka johtuvat mistä tahansa välineestä tai esineestä, joka on asennettu/lisätty pyörätuoliin ilman Rehateam s.r.l.:n kirjallista valtuutusta

Takuun piiristä poissuljettuja ovat kaikki vahingonkorvausverukkeet edeltävissä kappaleissa nimenomaisesti mainittuja lukuun ottamatta.

Rehateam s.r.l. ei ole vastuussa yksittäisissä sopimuksissa sovittujen ehtojen täyttämättä jättämisestä, mikäli seuraavat seikat ovat estäneet ja/tai tehneet mahdottomaksi itse sopimuksen ehtojen noudattamisen: kauppasulut, sopimuksen alaisille tuotteille asetetut tuonti- ja vientikiellot, lakipäätökset, lakot, raaka-aineiden puute, onnettomuudet, pakottavat tai muut hallitsemattomat tekijät.

Rehateam s.r.l. pidättää oikeuden ilman aiempaa ilmoitusta tehdä tuotteita teknisesti epäsuhteelliseksi.



TAKUUTODISTUS



Rehateam S.r.l.

Vicolo Negrelli,5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) Italy

Tel. +39 0422 484657 ra -Fax +39 0422 484661

<http://www.rehateamprogeo.com>

info@rehateamprogeo.com

Sertifioija TÜV Rheinland
direktiivin UNI CEI EN 13485 : 2016 mukaan

Lääkinnällinen laite Luokka I



Valmistuspaikka: Castagnole di Paese (TV) ITALY

JÄLLEENMYYJÄ

Toimituspäivä : _____

Jälleenmyyjän leima