

ROLLIT



BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOPAS

Inspired by life

 Life & Mobility

Rollit är en bekväm och robust rullstol för permanent användning. Den stabila basramen gör Rollit lämplig även för intensiv användning. Den här praktiska rullstolen kombinerar extrem hållbarhet med utmärkt sitt- och körkomfort.

Rollit är lätt att använda för både användare och assistent. Rullstolen kan anpassas till en specifik användare med hjälp av kompletterande delar och tillbehör.

Rollit är vattentålig och lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk.

Den maximala vikten är 160 kg.

Rollit har testats och uppfyller de relevanta kraven i de europeiska rullstolsstandarderna EN 12182 och EN 12183.

Rollit uppfyller därmed de relevanta kraven i det europeiska DIREKTIVET (EU) 2017/745 för medicinska enheter.

Rollit har inte testats i enlighet med ISO 7176-19. Vi på Life & Mobility uppmanar därför användarna att inte sitta i rullstolen när den transporteras med taxi.



Observera:

- *Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder rullstolen.*
- *När du ser den här symbolen i bruksanvisningen så markerar den en till anvisning. Följ alltid dessa instruktioner. Underlåtenhet att följa anvisningen kan påverka användningen av rullstolen och orsaka fysisk kroppsskada eller skador på rullstolen eller omgivningen.*



Innehåll

Säkerhetsföreskrifter	5
Kontroll av leveransen	9
Tekniska specifikationer	10
Produktbeskrivning	11
Tillval	12
Inställningar och justeringar	13
Användning	14
Underhåll	16
Tekniska problem	17
Garanti	18
Avfallshantering av produkt och förpackning	19

Säkerhetsföreskrifter

Rullstolens brukare ansvarar alltid för att följa de lokalt tillämpliga säkerhetsinstruktionerna och riktlinjerna.

Life & Mobility tar inget ansvar för förlust eller skada som orsakats av vårdslöshet eller underlåtenhet att följa säkerhetsinstruktionerna.

Allmänt**Varning:**

- Rullstolens konstruktion får aldrig ändras.
- Håll rullstolen på avstånd från öppen eld.

**Observera:**

- Denna rullstol är lämplig för transport av en enda person.
- Använd endast originaldelar och originaltillbehör från Life & Mobility.
- Säkerhetsföreskrifter och etiketter får aldrig täckas över eller avlägsnas.

**Personliga krav****Observera:**

- Din syn måste vara tillräckligt bra för att du ska kunna köra rullstolen på ett säkert sätt i alla möjliga situationer.

**Montering och justering**

(se även kapitlet "Inställningar och justeringar")

Varning:

- Du måste kontrollera att alla delar är monterade och ordentligt fastsatta innan du använder rullstolen.





Säkerhetsföreskrifter

Sitta i rullstolen

Varning:

- Se till att brukarens fingrar och lemmar inte fastnar i rullstolen. Var alltid mycket försiktig:
 - När brukaren sitter snett i rullstolen.
 - När brukarens armar hänger slapt över armstödet.
 - När en kombination av ovanstående inträffar.
- En felaktig sittställning kan orsaka tryckpunkter. Om du är osäker på detta ska du omedelbart kontakta din läkare eller terapeut.

Köra rullstolen


Observera:

- Vid körning uppför en lutning kommer tyngdpunkten att förskjutas och rullstolen kan lättare tippa bakåt.
- Var uppmärksam på dina händer när du använder drivringen om det inte finns mycket utrymme på rullstolens sida/sidor.
- Ledsagare får aldrig lämna rullstolen i en lutning utan att aktivera bromsen.
- Ta dig aldrig an hinder som är högre än 10 cm på egen hand. Endast erfarna rullstolsförare med tillräcklig styrka kan vanligtvis ta sig an hinder som är högre än 10 cm.
- Aktivera rullstolens broms innan du sätter dig på eller kliver ur stolen.
- Använd bromsen endast för att låsa hjulen när den står still. Bromsen är inte lämplig för att sakta ner rullstolen.


Transport av rullstolen

Extremt farligt:

- Rullstolen är inte Crash Test Safe, vilket innebär att den inte är lämplig för transport i en taxi när det sitter någon i rullstolen.
- När du transporterar rullstolen ska du alltid se till att du sitter i ett fast säte i motorfordonet.

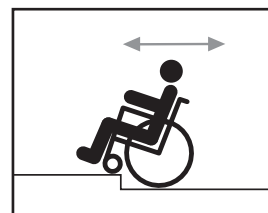

Trappor

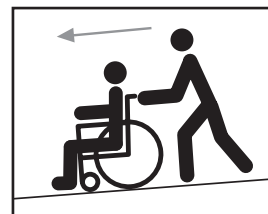

Lutningar

Säkerhetsföreskrifter

Observera:

- Rullstolen får endast lyftas i ramens fasta delar och inte i de löstagbara tillbehören såsom armstöd, fotstöd, o.s.v.

Lutningar och andra hinder

(se även sidan SE 15 för mer information)

Observera:

- Risken för att rullstolen tippas på en sluttning är större än på en plan yta.
- Gå alltid baklänges nedför ett trappsteg så att rullstolen inte tippas framåt och så att du inte faller.
- Åk aldrig själv med rullstolen i trappor.
- Kör aldrig på en sluttning med en vinkel på mer än 5 grader.
- Be om hjälp från andra när du inte är säker på att du kan nå den högsta punkten på egen hand.
- Assistenten som skjuter på rullstolen måste fortsätta att skjuta på rullstolen för att förhindra att den börjar röra sig av egen kraft.
- Vänd inte rullstolen i en brant lutning. Om rullstolen står på tvären i en brant lutning är risken stor att den tippas.
- Ha alltid kontroll på din hastighet när du åker nerför en lutning.
- Assistenten som hjälper till måste bromsa med bromsspakarna.
- När du förflyttar rullstolen själv ska du endast bromsa med händerna på drivringen och inte använda hjulbromsarna. Annars riskerar du att förlora kontrollen över rullstolen.

Övrigt

Varning:

- Ställ inte rullstolen i direkt solljus: klädseln kan bli varm och orsaka brännskador eller irritation på huden.



Säkerhetsföreskrifter



Var försiktig:

- *Låt inte rullstolen komma i kontakt med havsvatten, eftersom havsvatten är frätande och får rullstolen att rosta.*
- *Låt inte rullstolen komma i kontakt med sand, eftersom den kan tränga in i rullstolens rörliga delar och orsaka onödigt slitage.*


Kontroll av leveransen

Kontroll av leveransen

Innan du använder rullstolen ska du kontrollera om leveransen stämmer överens med produktbeskrivningen på sida 11. Kontakta din återförsäljare om du upptäcker några transportskador vid leverans. Life & Mobility är säkra på att rullstolen motsvarar dina förväntningar och hoppas att den blir till stor nytta.



Tekniska specifikationer

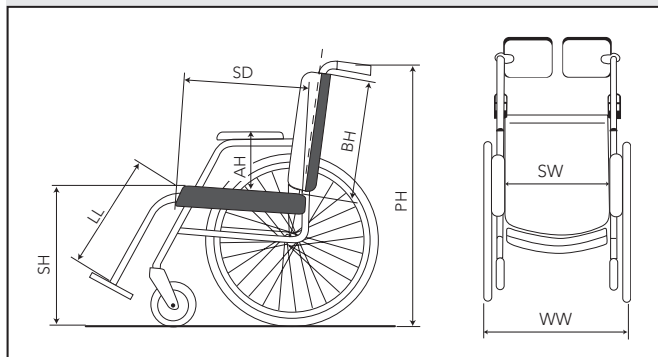

- Sätets bredd (SW): 47–52 cm
- Sätets höjd (SH): 51–56 cm
- Sätets djup (SD) 46 cm
- Ryggstödets höjd (BH): 47 cm
- Armstödets höjd (AH): 24 cm
- Rullstolens bredd (WW): 72 cm
- Handtagets höjd (PH): 92–97 cm
- Längd för underben (LL): 45–55 cm
- Total vikt: 39 kg
- Brukarens maximala vikt: 160 kg

Life & Mobility rekommenderar att rullstolen används i en omgivningstemperatur mellan -5°C och +40°C.

Produktbeskrivning



Produktbeskrivning

1. Körhandtag
2. Vadderat ryggstöd
3. Drivring (halvfast bakhjul)
4. Fällbar sida med vadderat armstöd
5. Vadderat säte
6. Förlängd handbromsspak
7. Tippskydd
8. Framhjul (halvfast)
9. Fotstöd + hälärem



Tillval


Tillval (ej illustrerat)

Utöver standarddelarna finns följande alternativ för rullstolen:

- Sidorna
 - Vikbara sidor med höjd- och sänkbara armstöd
 - Sats med fäste för sidorna
- Arbetsyta
 - Arbetsyta av Perspex
 - Arbetsyta av trä
 - College-arbetsyta
 - Armbågskudde
- Säte
 - Planksäte (med kant)
 - Contour+ säte
- Ryggstöd
 - Anatomiskt ryggstöd
- Benstöd
 - Bekväma benstöd (med hälrem)
 - Knä kudde
 - Benstöd för gipsförband
 - Amputationsstöd
- Nackstöd
 - Standardnackstöd, litet
- -Tillbehör (ej illustrerat)
 - Kateterkrok
 - Hållare för syrgasflaska 12,5 cm
 - Kryckhållare
 - Stöd för tippskydd
 - Spakskydd med logotyp
 - IV-stolpe, justerbar höjd
 - Stöldsdyddsstolpe



Inställningar och justeringar

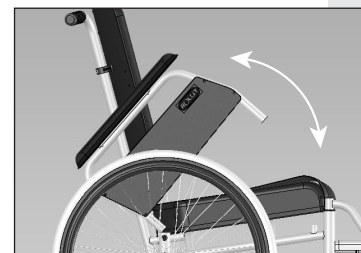


Vik upp sidorna



Borttagning av benstöden



Sväng benstöden utåt

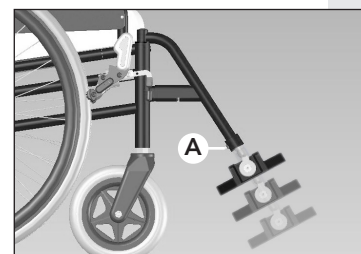

Längd för underben

Rullstolen kan justeras på olika sätt för att uppfylla dina särskilda behov. Justeringarna är lätta att utföra själv.

**Observera:**

- Kontrollera att sidorna sitter fast i fästena och inte på sidorna. Annars kan det skada sidorna och hjulen.

Vik upp sidorna

Ta tag i och lyft armstödet framsida och vik hela sidan bakåt.

Borttagning av benstöden

Benstöden är lätta att ta bort från ramen. Ta tag i den del som den hänger på och ta bort den med en uppåtgående rörelse.

Sväng benstöden utåt

1. Lyft upp benstöden lite.
2. Sväng benstöden åt sidan.
3. Ta ner benstöden igen.

**Observera:**

- Se till att fotplattorna är uppfällda innan du kliver ur rullstolen. Stå aldrig på fotplattorna. Annars riskerar du att ramla ur rullstolen.
- Använd aldrig fotplattorna för att sätta dig i rullstolen.

**Justering av underbenslängden**

1. Skruva loss hylsskruven eller stjärngreppet (A) med ett varv.
2. Ställ in önskad längd på underbenet.

**Observera:**

- Avståndet till golvet ska vara minst 5 cm.
- 3. Skruva fast hylsskruven eller stjärngreppet (A).



Användning

Ta bort och montera nackstödet*

Nackstödet kan enkelt tas bort:

1. Skruva loss hylsskruven tills den är lös.
2. Ta bort nackstödet.

Sätta tillbaka den:

3. Placera nackstödet i fästet.
4. Skruva fast stjärngreppet.



Nackstöd

*Om det finns ett

Göra en förflyttning

Rollit är en rullstol för brukare med olika begränsningar. Förflyttningar från rullstolen för att, exempelvis, lägga sig i sängen, o.s.v., kan göras på olika sätt.

Lyftmetoden beror på hur mycket rullstolsanvändaren kan samarbeta. Rullstolen möjliggör både aktiva och passiva förflyttningar med eller utan hjälp av en assistent eller en hiss.



Observera:


- Aktivera alltid bromsen på rullstolen före en förflyttning.

Förflyttningar som utförs framifrån.


1. Vik upp fotplattorna. Sväng fotplattorna åt sidan om det behövs.
2. Aktivera rullstolens broms.

Förflyttningar som utförs från sidan

Vik sidorna med armstöd uppåt och bakåt om det behövs.

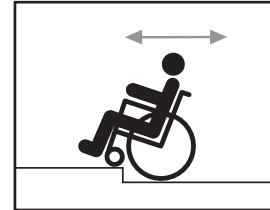

Trappor

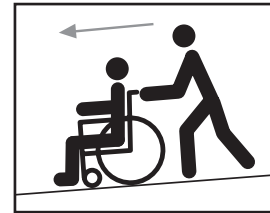

Lutningar



Komma över hinder med assistans

1. Tryck ner stegröret med foten och tryck ner handtagen med händerna.
2. Tryck upp rullstolen på hindret och ta bort din fot från stegröret.
3. Kör rullstolen längre, och lyft bakhjulen över hindret med körhandtagen.

Du kan gå upp för trappor framlänges, och nedför baklänges.

Observera:

- Ha alltid kontroll på din hastighet när du åker nerför en lätt lutning.

Bromsar

Rullstolens bromsar är standardmässigt justerade till rätt inställning i fabriken. Life & Mobility rekommenderar att du alltid använder båda bromsarna när du sätter dig i eller stiger ur rullstolen.



Underhåll

Enklare underhåll (varannan vecka)

Du kan utföra enklare underhåll på Rollit själv.

Rengöring

Rengör din rullstol med en fuktig trasa, vatten och ett allrengöringsmedel.



Observera:

- Slipande eller aggressiva rengörings- och lösningsmedel såsom thinner, bensin etc. får inte användas för att rengöra rullstolen.

Kontrollera att alla fästen sitter fast ordentligt. Dra åt dem vid behov.



Observera:

- För hård åtdragning av justeringsskruven kan skada rullstolen.

Desinfektion

Du kan använda alkohol (70 %) eller klor (1 000 ppm) för att desinficera rullstolen.

Hjulens spänning

Kontrollera hjulens spänning regelbundet (en gång per kvartal, beroende på användningsintensiteten) för att se till att din rullstol fortsätter att vara bekväm och säker. Be din återförsäljare om hjälp vid behov.

Större underhåll (årligen)

Din återförsäljare sköter gärna det större underhållet av din rullstol. På så sätt kan du vara säker på att du får bästa möjliga användning av din rullstol. Du kan också vända dig till din återförsäljare för att byta ut delar.

Tekniska problem

Om din rullstol skulle drabbas av oväntade tekniska problem rekommenderar vi att du kontaktar din återförsäljare. Återförsäljaren beslutar om de kan reparera rullstolen eller om den måste returneras till fabriken.

Du kanske kan lösa vissa problem själv.

Rörliga delar, t.ex. armstöd, fot- och benstöd och sidor rör sig inte:

- De ovannämnda delarna kan ha fastnat i ramen när alltför mycket kraft har använts på dessa delar. Knacka försiktigt loss delarna med en plasthammare.

Bromsarna har inte tillräcklig bromskraft eller bromsarna på vardera sida har inte samma bromskraft:

- Du måste justera bromsarna. Kontakta din återförsäljare för denna uppgift.



Observera:

- Alla andra reparationer än de som nämns ovan ska alltid utföras av en auktoriserad återförsäljare. Felaktiga reparationer kan äventyra din hälsa. Dessutom upphävs garantin på produkten. Använd ditt sunda förnuft och bestäm om du själv kan lösa tekniska problem med rullstolen. Om du har några tvivel om dina färdigheter så kontaktar du din återförsäljare. När du monterar och byter ut delar måste du följa denna bruksanvisning och din återförsäljares råd. Förhindra att en farlig situation uppstår för assistenten och den som sitter i rullstolen!



Garanti

Allmänna garantivillkor

Produkter från Life & Mobility tillverkas med omsorg och inspekteras noggrant innan de lämnar fabriken. Skulle det visa sig att en produkt inte motsvarar förväntningarna, ber vi dig att kontakta den part där du köpte produkten.

Life & Mobility respekterar de lagar och bestämmelser som skyddar konsumenter, och som gäller i det land där produkten är köpt.

Garantin gäller inte för defekter orsakade av: underlåtenhet att iaktta anvisningarna för användning och underhåll, annan användning än normal användning, slitage, misskötsel, överbelastning, olyckor med tredje part, användning av delar som inte är i original eller defekter som inte orsakats av produkten.

Garantin ersätter alla andra garantier, antingen avtalade enligt lag eller muntligt kommunicerade, förutom skriftliga garantier från Life & Mobility.

Garantierna är endast giltiga inom EU.

Avfallshantering av produkt och förpackning

Avfallshantering av produkt och förpackning

Ur ett miljöperspektiv rekommenderar vi att du gör dig av med förpackningen och rullstolen genom att separera avfallet så mycket som möjligt så att avfallsmaterialen kan återvinnas så effektivt som möjligt.

I de flesta fall kan du lämna in din förbrukade produkt till din återförsäljare av rullstolar. Om det inte är möjligt kan du lämna in rullstolen på din lokala återvinningsanläggning.



Den här bruksanvisningen har förberetts med yttersta omsorg och är baserad på den information som Life & Mobility kände till vid tidpunkten för publiceringen. Life & Mobility åtar sig inget ansvar för eventuella fel i texten eller konsekvenser därav.

Informationen i denna bruksanvisning gäller för standardversionen av produkten. Life & Mobility åtar sig inget ansvar för eventuella skador som kan inträffa på grund av ändringar eller modifieringar av produkten efter att den har sålts för första gången. Life & Mobility kan inte heller hållas ansvariga för eventuella skador som orsakats av arbete från tredje part.

Informationen i bruksanvisningen får inte reproduceras och/eller göras tillgänglig för allmänheten utan på förhand skriftligt godkännande av Life & Mobility.

I enlighet med den holländska lagen om varumärken (Dutch Trade Names Act), kan inte namn och varumärken som används av Life & Mobility anses vara fria.

Det går inte att härleda några rättigheter ur denna text. Föremål för förändringar.

© Life & Mobility – Med ensamrätt

Rollit on miellyttävä ja tukeva pyörätuoli, joka on tarkoitettu pysyvään käyttöön. Lujan alarungon ansiosta Rollit soveltuu myös runsaaseen käyttöön. Tässä käytännöllisessä pyörätuolissa ei ole mitään turhaa, mutta siinä yhdistyvät erinomainen kestävyys sekä loistava istumamukavuus ja ajokäyttäytyminen.

Rollit on helppokäyttöinen sekä käyttäjälle että avustajalle. Pyörätuolin voi mukauttaa kullekin käyttäjälle sopivaksi käyttämällä lisäosia ja -varusteita.

Rollit kestää vesiroiskeita ja soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Käyttäjän suurin sallittu paino on 160 kg.

Rollit on testattu ja sen on todettu täyttävän eurooppalaisten pyörätuoleja koskevien standardien EN 12182 ja EN 12183 olennaiset vaatimukset.

Siten Rollit noudattaa lääkinnällisistä laitteista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston ASETUSTA (EU) 2017/745, jonka soveltaminen on pakollista.

Rollitia ei ole testattu standardin ISO 7176-19 mukaisesti. Tämän vuoksi Life & Mobility suosittelee, ettei pyörätuolissa istu käyttäjää, kun sitä kuljetetaan taksilla.

**Huomaa:**

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen pyörätuolin käyttämistä.
- Lisäohjeet on merkitty oppaassa tällä symbolilla. Noudata ohjeita aina. Huolimattomuus voi vaikuttaa haitallisesti pyörätuolin toimintaan ja aiheuttaa loukkaantumisia tai aineellisia vahinkoja.



Sisällysluettelo

Turvallisuusohjeet	5
Toimituksen tarkistaminen	9
Tekniset tiedot	10
Tuotekuvaus	11
Lisäosat	12
Asetukset ja säädöt	13
Käyttäminen	14
Huolto	16
Tekniset ongelmat	17
Takuu	18
Tuotteen ja pakkauksen hävittäminen	19

Turvallisuusohjeet

Pyörätuolin käyttäjän on aina noudatettava turvallisuusohjeita ja -säädöksiä.

Life & Mobility ei vastaa menetyksistä tai loukkaantumisista, joita aiheutuu huolimattomuudesta tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä.

Yleistä**Varoitus:**

- Älä tee muutoksia pyörätuolin rakenteeseen.
- Säilytä pyörätuoli kaukana avotulesta.

**Huomaa:**

- Tämä pyörätuoli on tarkoitettu yhden henkilön kuljettamiseen.
- Käytä vain alkuperäisiä Life & Mobility -varaosia ja -lisävarusteita.
- Älä peitä tai poista turvallisuusohjeita ja -tarroja.

Käyttäjää koskevat vaatimukset**Huomaa:**

- Näkösi on oltava riittävän hyvä, jotta voit kulkea pyörätuolilla turvallisesti kaikissa mahdollisissa tilanteissa.

Kokoaminen ja säädöt

(katso myös luku Asetukset ja säädöt)

**Varoitus:**

- Tarkista ennen pyörätuolin käyttämistä, että sen kaikki osat on asennettu oikein ja kiinnitetty kunnolla.



Turvallisuusohjeet

Pyörätuolissa istuminen

Varoitus:

- Varmista, etteivät pyörätuolissa istuvan henkilön sormet tai raajat joudu puristuksiin. Ole varovainen seuraavissa tilanteissa:
 - Kun käyttäjä istuu pyörätuolissa vinossa.
 - Kun käyttäjän käsivarret roikkuvat velttoina käsinojan yli.
 - Kun kumpikin edellä mainittu tilanne esiintyy.
- Virheellinen istuma-asento voi aiheuttaa painepisteitä. Jos olet epävarma asiasta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai terapeuttiin.

Pyörätuolilla ajaminen


Huomaa:

- Ajettaessa kaltevaa pintaa ylöspäin painopiste siirtyy ja pyörätuoli voi kaatua taaksepäin helpommin.
- Kiinnitä huomiota käsiisi käsivanteita käytettäessä, jos pyörätuolin sivutuki(i)lla ei ole paljon tilaa.
- Avustaja ei saa lähteä pyörätuolin luota kaltevalla pinnalla kytkemättä jarruja.
- Älä yritä päästä yli 10 cm:n korkuisten esteiden ylitse itse. Vain kokeneet pyörätuolin käyttäjät, joilla on riittävästi voimaa, kykenevät yleensä pääsemään yli 10 cm:n esteiden ylitse.
- Kytke pyörätuolin jarru ennen siirtymistä pyörätuoliin ja siitä pois.
- Käytä jarrua pyörien lukitsemiseen vain, kun pyörätuoli seisoo paikallaan. Jarrua ei ole tarkoitettu pyörätuolin jarruttamiseen.

Pyörätuolin kuljettaminen

Erittäin vaarallista:

- Pyörätuoli ei täytä törmäystestien vaatimuksia, mikä tarkoittaa, että sitä ei ole tarkoitettu kuljetusvälineeksi taksissa, kun pyörätuolissa istuu käyttäjä.
- Kun pyörätuolia kuljetetaan, istu aina moottoriajoneuvon kiinteällä istuimella.

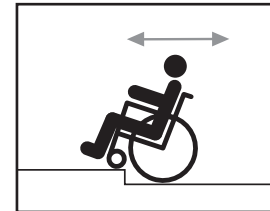

Portaat



Kalteva pinta

Turvallisuusohjeet

Huomaa:

- Nosta pyörätuolia vain rungon kiinteistä osista; älä nosta sitä irrotettavista lisävarusteista, kuten käsinojista tai jalkatuista.

Kaltevat pinnat ja esteet

(katso myös sivu FI 15, jossa on lisätietoja)

Huomaa:

- Kaltevalla pinnalla pyörätuolin kaatumisriski on suurempi kuin tasaisella pinnalla.
- Peruuta aina kulkiessasi portaita alaspäin, jotta pyörätuoli ei pääse kaatumaan eteenpäin ja pudottamaan sinua kyydistä.
- Älä aja pyörätuolilla portaissa itsenäisesti.
- Älä aja kaltevalla pinnalla, jonka kulma on suurempi kuin 5 astetta.
- Pyydä sivullisilta apua, jos et ole varma, pääsetkö korkeimpaan kohtaan itsenäisesti.
- Pyörätuolia työntävän avustajan on jatkettava pyörätuolin työntämistä, jotta se ei pääse karkaamaan.
- Älä käänny ympäri jyrkällä kaltevalla pinnalla. Jos pyörätuoli on sivuttain jyrkällä kaltevalla pinnalla, kaatumisriski on merkittävästi suurempi.
- Kun kuljet kaltevaa pintaa alaspäin, pidä nopeus aina hallinnassa.
- Avustajan on jarrutettava pyörätuolia työntökahvoja käyttäen.
- Kun liikutat pyörätuolia itsenäisesti, jarruta käsivanteilla käsiäsi käyttäen äläkä käytä pyöräjarrua. Muutoin saatat menettää pyörätuolin hallinnan.

Sekalaista

Varoitus:

- Älä jätä pyörätuolia suoraan auringonvaloon, sillä verhoilu voi kuumentua ja aiheuttaa palovammoja tai ihoärsytystä.



Turvallisuusohjeet



Varo:

- *Älä päästä pyörätuolia kosketuksiin meriveden kanssa, sillä merivesi syövyttää ja saa pyörätuolin ruostumaan.*
- *Älä päästä pyörätuolia kosketuksiin hiekan kanssa, sillä hiekkaa voi joutua pyörätuolin liikkuviin osiin, jolloin se voi nopeuttaa osien kulumista.*


Toimituksen tarkistaminen

Toimituksen tarkistaminen

Tarkista ennen pyörätuolin käyttöä, että toimitus vastaa sivun 11 tuotekuvausta. Ilmoita jälleenmyyjälle välittömästi, jos havaitset vaurioita toimituksen yhteydessä. Life & Mobility toivoo, että pyörätuoli vastaa odotuksiasi ja tuottaa paljon iloa.




Tekniset tiedot

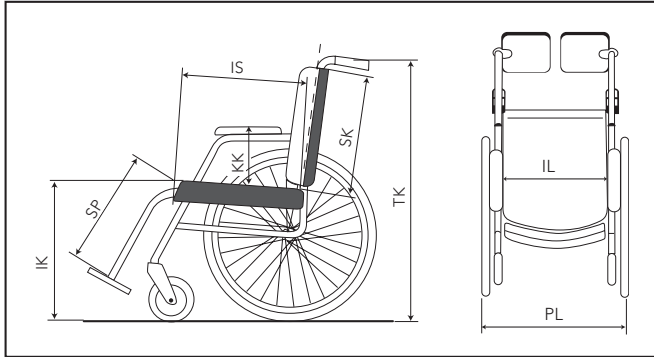

- Istuimen leveys (IL): 47–52 cm
- Istuimen korkeus (IK): 51–56 cm
- Istuimen syvyys (IS): 46 cm
- Selkänojan korkeus (SK): 47 cm
- Käsinojan korkeus (KK): 24 cm
- Pyörätuolin leveys (PL): 72 cm
- Työntökahvan korkeus (TK): 92–97 cm
- Säätien pituus (SP): 45–55 cm
- Kokonaispaino: 39 kg
- Käyttäjän enimmäispaino: 160 kg

Life & Mobility suosittelee käyttämään pyörätuolia ympäristössä, jonka lämpötila on –5–+40 °C.

Tuotekuvaus

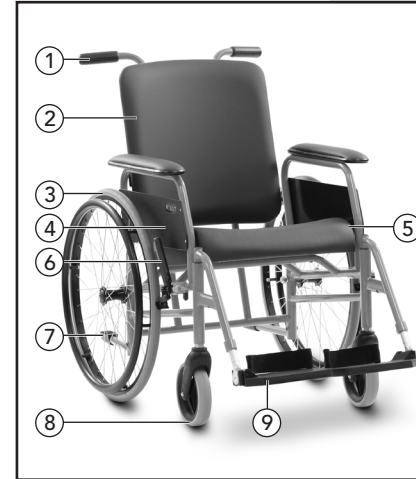

Tuotekuvaus

1. Työntökahva
2. Pehmustettu selkänoja
3. Käsivanne (puolikiinteä takapyörä)
4. Taattuva sivu, jossa pehmustettu käsinoja
5. Pehmustettu istuin
6. Pidennetty käsijarru
7. Kallistusvipu
8. Etupyörä (puolikiinteä)
9. Jalkatuki + kantapäähihna



Lisäosat


Lisäosat (ei kuvissa)

Vakio-osien lisäksi pyörätuoliin on saatavana seuraavia lisäosia:


- Sivut
 - Taittuvat sivut, joiden käsinojien korkeutta voi säätää
 - Sivujen kiinnityssarja
- Työtaso
 - Perspex-työtaso
 - Puinen työtaso
 - Työtaso opiskelua varten
 - Kynärpääpehmuste
- Istuin
 - Lankkuistuin (jossa reunus)
 - Contour+-istuin
- Selkänoja
 - Anatominen selkänoja
- Säätimet
 - Comfort-säätituki (jossa kantapäähihna)
 - Polvityyny
 - Säätituki kipsille
 - Amputaatiotuki
- Niskatuki
 - Vakiomallinen niskatuki, pieni
- Lisävarusteet (ei kuvissa)
 - Katetrin koukku
 - Happipullon pidike, 12,5 cm
 - Kainalo- tai kynärnsauvan pidike
 - Kaatumistuet
 - Pinnasuojat, joissa painettu logo
 - Infuusioteline, jonka korkeutta voi säätää
 - Varkaudenestotanko




Asetukset ja säädöt

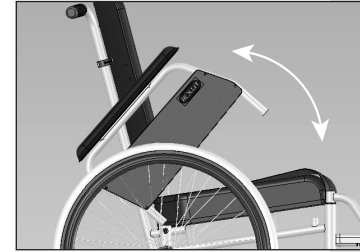


Sivujen taivuttaminen ylös

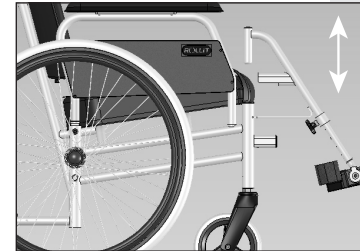

Säätitukien irrottaminen

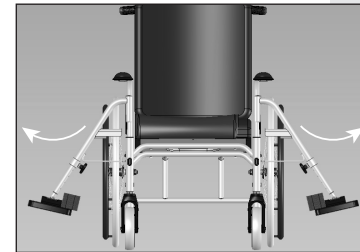

Säätitukien kääntäminen ulospäin

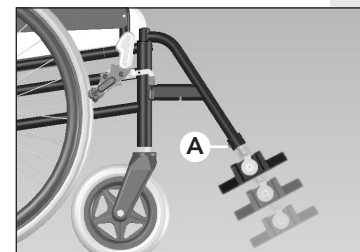

Säätituen pituus

Pyörätuoli on säädettävissä eri tavoin tarpeidesi mukaan. Säädöt on helppo tehdä itsenäisesti.

**Huomaa:**

- Tarkista, että sivut on kiinnitetty pidikkeisiin eikä sivuihin. Muutoin sivut ja pyörät voivat vaurioitua.

Sivujen taivuttaminen ylös

Tartu käsinojan etuosaan, nosta sitä ja taita koko sivu taakse.

Säätitukien irrottaminen

Säätimet on helppo irrottaa rungosta. Tartu osaan, johon tuki on ripustettu, ja irrota tuki ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä.

Säätitukien kääntäminen ulospäin

1. Nosta säätitukea hieman ylöspäin.
2. Käännä säätituki sivulle.
3. Laske säätituki takaisin alas.

**Huomaa:**

- Varmista, että jalkalevyt on taitettu ylöspäin, ennen kuin lähdet pyörätuolista. Älä seiso jalkalevyillä. Muutoin saatat kaatua eteenpäin pyörätuolissa.
- Älä käytä jalkalevyjä astuaksesi pyörätuoliin.

Säätituen pituuden säätäminen

1. Löysää kuusiokoloruuvia tai tähtikahvaa (A) yhden kierroksen verran.
2. Aseta säätituki haluamaasi pituuteen.

**Huomaa:**

- Jätä vähintään 5 cm:n etäisyys lattiaan.
- 3. Kiristä kuusiokoloruuvi tai tähtikahva (A).



Käyttäminen

Käyttäminen

Niskatuen* irrottaminen ja kiinnittäminen

Niskatuki on helppo irrottaa:

1. Löysää tähtikahvaa, kunnes se on löysällä.
2. Irrota niskatuki.

Asettaminen takaisin paikalleen:

3. Aseta niskatuki pidikkeeseen.
4. Käännä tähtikahva lujasti kiinni.



Niskatuki

*Jos mukana

Siirtymisten toteuttaminen

Rollit-pyörätuolin käyttäjillä on erilaisia rajoitteita. Siirtymiset pyörätuolista vuoteeseen, WC-istuimelle, suihkuun ja niin edelleen, sekä päinvastoin, voidaan toteuttaa eri tavoin.

Nostotapa riippuu siitä, missä määrin pyörätuolin käyttäjä voi tehdä yhteistyötä. Pyörätuoli mahdollistaa sekä aktiiviset että passiiviset siirtymiset avustajan tai nostimen avustuksella tai ilman apua.



Huomaa:


- Kytke pyörätuolin jarru aina ennen siirtymisen toteuttamista.

Siirtyminen edestä


1. Taita jalkalevyt ylös. Tai käännä jalkatuet tarvittaessa ulospäin.
2. Kytke pyörätuolin jarru.

Siirtyminen sivusta

Käännä tarvittaessa sivut, joihin on asennettu käsinojat, ylös- ja taaksepäin.

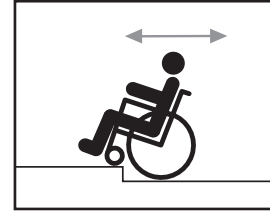

Portaat

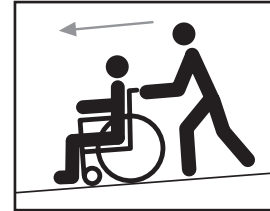

Kalteva pinta



Esteistä selviytyminen avustajan kanssa

1. Paina askelputkea alaspäin jalalla ja paina kahvoja alaspäin käsillä.
2. Työnnä pyörätuoli korokkeelle (esteelle) ja ota jalka pois askelputkelta.
3. Työnnä pyörätuolia lisää ja nosta takapyörät esteen yli työntökahvoja käyttäen.

Kulje portaita ylös eteenpäin ja portaita alas taaksepäin.

Huomaa:

- Pidä nopeus hallinnassa, kun kuljet loivaa kaltevaa pintaa alaspäin.

Jarrut

Pyörätuolin jarrut on säädetty asianmukaiseen asentukseen tehtaalla vakiona. Life & Mobility suosittelee käyttämään molempia jarruja siirryessäsi pyörätuoliin ja sieltä pois.



Huolto

Pieni huolto (2 viikon välein)

Voit tehdä Rollitin pienen huollon itse.

Puhdistaminen

Puhdista pyörätuoli kostealla liinalla, vedellä ja yleispuhdistusaineella.



Huomaa:

- Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita tai liuotteita, kuten tinneriä tai lakkabensiiniä (eli mineraalitärpättiä).

Tarkista, että kaikki kiinnitysosat on kiinnitetty kunnolla. Kiristä ne tarvittaessa uudelleen.



Huomaa:

- Jos säätöruuvi kiristetään liian kireälle, pyörätuoli voi vaurioitua.

Desinfiointi

Voit käyttää pyörätuolin desinfiointiin alkoholia (70 %) tai klooria (1 000 ppm).

Pyörien kireys

Tarkista pyörien kireys säännöllisesti (neljännesvuosittain, käytön määrästä riippuen) varmistaaksesi, että pyörätuolilla kulkeminen on edelleen miellyttävää ja turvallista. Kysy tarvittaessa neuvoa jälleenmyyjältä.

Suuri huolto (vuosittain)

Jälleenmyyjä suorittaa mielellään pyörätuolin suuren huollon. Niin voit olla varma siitä, että pystyt käyttämään pyörätuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Voit kysyä jälleenmyyjältä myös osien vaihdosta.

Tekniset ongelmat

Jos pyörätuolissa ilmenee odottamattomia teknisiä ongelmia, sinun kannattaa ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Jälleenmyyjä arvioi, pystyykö hän korjaamaan pyörätuolin vai onko se palautettava valmistajalle korjattavaksi.

Saatat pystyä ratkaisemaan useita ongelmia itse.

Liikkuvat osat, kuten käsinoja, jalka-/säärituet ja sivut, eivät liiku:

- Edellä mainitut osat ovat saattaneet jäädä jumiin runkoon, kun niihin on kohdistettu liiallista voimaa. Koputa osia varovasti muovivasaralla.

Jarrujen jarrutusteho ei ole riittävä tai eri puolella olevien jarrujen jarrutusteho ei ole sama:

- Sinun on vietävä jarrut säädettäväksi. Kysy tästä toimenpiteestä jälleenmyyjältä.



Huomaa:

- Kaikki muut korjaukset kuin edellä mainitut on annettava aina sertifioidun jälleenmyyjän tehtäväksi. Huolimattomat korjaukset voivat vaarantaa terveytesi. Lisäksi tuotteen takuu mitätöityy. Käytä tervettä järkeä ja päätä, pystytkö ratkaisemaan pyörätuolin tekniset ongelmat itse. Kysy aina neuvoa jälleenmyyjältä, jos olet epävarma. Kun asennat tai vaihdat osia, sinun on noudatettava tätä opasta ja jälleenmyyjän antamia neuvoja. Estä avustajalle ja tuolin käyttäjälle koituvat vaaralliset tilanteet!



Takuu

Takuun ehdot

Life & Mobility -tuotteet on valmistettu huolella ja tarkastettu huolellisesti ennen niiden lähtöä tehtaalta. Jos tuote ei vastaa odotuksia, ota yhteyttä osapuoleen, jolta ostit tuotteen.

Life & Mobility kunnioittaa kuluttajaa suojaavia lakeja ja asetuksia, joita sovelletaan tuotteen ostomaassa.

Tämä takuu ei koske vikoja, jotka aiheutuvat käyttö- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, muusta kuin normaalista käytöstä, kulumisesta, huolimattomuudesta, ylikuormituksesta, kolmannen osapuolen aiheuttamista onnettomuuksista, muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä ja vioista, jotka eivät johdu tuotteesta.

Tämä takuu korvaa kaikki muut lain määräämät tai suulliset takuut, paitsi mitä Life & Mobility on kirjallisesti taannut.

Takuut ovat voimassa vain Euroopan unionissa.

Tuotteen ja pakkauksen hävittäminen

Tuotteen ja pakkauksen hävittäminen

Ympäristönäkökulmasta suosittelemme pakkauksen ja pyörätuolin jätteen erottelemista mahdollisimman tarkkaan, jotta jätemateriaalit voidaan kierrättää mahdollisimman tehokkaasti.

Useimmissa tapauksissa voit jättää käytetyn pyörätuolisi pyörätuolin jälleenmyyjälle. Jos tämä ei ole mahdollista, voit jättää pyörätuolin paikalliselle jäteasemalle.



Tämä käyttöopas on laadittu erittäin huolellisesti, ja se perustuu Life & Mobilityn julkaisuhetkellä tiedossa olleisiin tietoihin. Life & Mobility ei vastaa millään tavoin tekstissä mahdollisesti olevista virheistä tai niistä aiheutuneista seurauksista.

Tämän käyttöoppaan tiedot koskevat tuotteen tavallista versiota. Life & Mobility ei vastaa millään tavoin vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteeseen ensimmäisen myyntikerran jälkeen tehdyistä muutoksista tai mukautuksista. Life & Mobility ei myöskään vastaa mistään kolmannen osapuolen tekemän työn aiheuttamista vahingoista.

Tämä oppaan tietoja ei saa jäljentää tai julkaista millään tavoin ilman kirjallista lupaa Life & Mobilityltä.

Alankomaiden tuotenimilaki (Trade Names Act) kieltää Life & Mobilityn käyttämien tuotenimien ja tavaramerkkien vapaan käytön.

Tästä tekstistä ei voi johtaa mitään oikeuksia. Muutokset mahdollisia.

© Life & Mobility – Kaikki oikeudet pidätetään

Life & Mobility bv

PO Box 304
NL - 7000 AH Doetinchem
Logistiekweg 7
7007 CJ Doetinchem

T +31 (0)314 328 000
www.life-mobility.com
info@life-mobility.com

