

One Way Master

mastercare
HUMAN HANDLING SYSTEM

One Way Master on ohut pehmustettu yhteen suuntaan liukuva liukualusta, jonka päälle pyörätuolissa istutaan. Sitä käytetään henkilön siirtämiseen taaksepäin pyörätuolissa siten että eteenpäin liukuminen estyy. Ulkopinta on joustavaa velour-materiaalia ja sisäpuoli hyperkitkatonta Nylon Gliding -materiaalia. Saatavissa avoimena (Open)- ja suljettuna (Tube)-versiona. Saatavana 3 eri kokoa.

One Way Master **Tube** -versiota suositellaan henkilöille, joilla on hyvä ylävartalon hallinta ja jotka pystyvät nojaamaan eteenpäin ja samalla työntämään lantiota taaksepäin. One Way Master **Open** -versiota voidaan käyttää **Tube**-mallin tavoin, mutta kahvat voidaan viedä istuimen ja selkänöjan välisestä aukosta ja avustaja voi työntää takaa. Avustaja voi vaihtoehtoisesti käyttää sivulla olevia kahvoja siirtymisen avustamiseen ja asennon korjaamiseen. Voidaan käyttää pidennyshihnojen kanssa tai ilman - asennettavissa jälkikäteen.



Pesu max. 40 astetta, hellävarainen rumpukuivaus max. 40 astetta.
EI SAA silittää eikä pestä kemiallisesti.

TUOTENRO	HMI-NRO	TUOTEKUVAUS	KOKO
MC 001-1285	40372	One Way Master Tube S	p. 40 x l. 35 cm
MC 001-1290	40373	One Way Master Tube M	p. 50 x l. 50 cm
MC 001-1295	40376	One Way Master Tube L	p. 60 x l. 60 cm
MC 001-1265	34162	One Way Master Open S, 3 kahvaa	p. 80 x l. 35 cm
MC 001-1270	33243	One Way Master Open M, 3 kahvaa	p. 100 x l. 50 cm
MC 001-1275	34161	One Way Master Open L, 3 kahvaa	p. 120 x l. 60 cm
MC 001-1277	81135	One Way Master pidennyshihnat	p. 49 x l. 2,5 cm