

ROHO®

Hybrid Select -tyyny

Erinomainen istuma-asento
ja todistettua suojaa iholle



permobil

Edistyksellinen hybridi istuintyyny poikkeuksellisella asennon säätömahdollisuudella

Hybrid Select -istuinalusta mukautuu käyttäjän yksilölliseen muotoon, painoon ja asentomuutoksiin. ROHO®-päällinen ja IT-lisäke hyödyntävät ISOFLO® Memory Controlia, joka mahdollistaa oikean asennon helpon löytämisen ja asettamisen joka kerta.



3-vyöhykkeinen ISOFLO Memory Control
mahdollistaa asennon säädön

Hyvän istumisen ominaisuudet



Ihon suojaus

Upotustesti (ISO 16840-2) paljastaa, kuinka syvälle keho uppoaa tyynyyn.

Ympäröintitesti (ISO 16840-12) paljastaa, miten tyyny kannattelee kehon painoa ympäröimällä sen tai keventämällä kuormitusta.

Leikkaustesti (leikkausvoiman tunnistin) paljastaa tyynyn ja kehon välisen liikkeen potentiaalin häiritä/vaurioittaa kudosta.

Kosketusalue (paineen kartoitus) osoittaa, kuinka paljon kosketusta istuintuen ja käyttäjän välillä on.



Asettautuminen

Liukuvastustesti (ISO 16840-2) paljastaa, kuinka paljon voimaa tarvitaan liukumiseen eteenpäin tyynyllä istuttaessa.



Vakaus

Lateraalinen kallistustesti (ISO 16840-13) paljastaa tyynyn vakauden sivuttaiskallistuksen aikana.




Ainutlaatuinen ROHO-kennorakenne suojaa ihoa ja takaa mukavuuden

Lantion alueella käytetään patentoitua ROHO® DRY FLOATATION®-teknologiaa kuormituksen jakamiseen ja 3,2 cm upotukseen.

Muotoiltu reisiventa
vaahtomuovipohjassa

Ainutlaatuinen sivusuuntainen vakaus

Hybrid Selectin innovatiivisessa rakenteessa on muotoiltu vaahtomateriaalialusta, jonka HR-vaahtomuovi ja reisiventit tarjoavat tukea ja lateraalista vakautta sekä poistavat häntäluuhun kohdistuvaa kuormitusta.

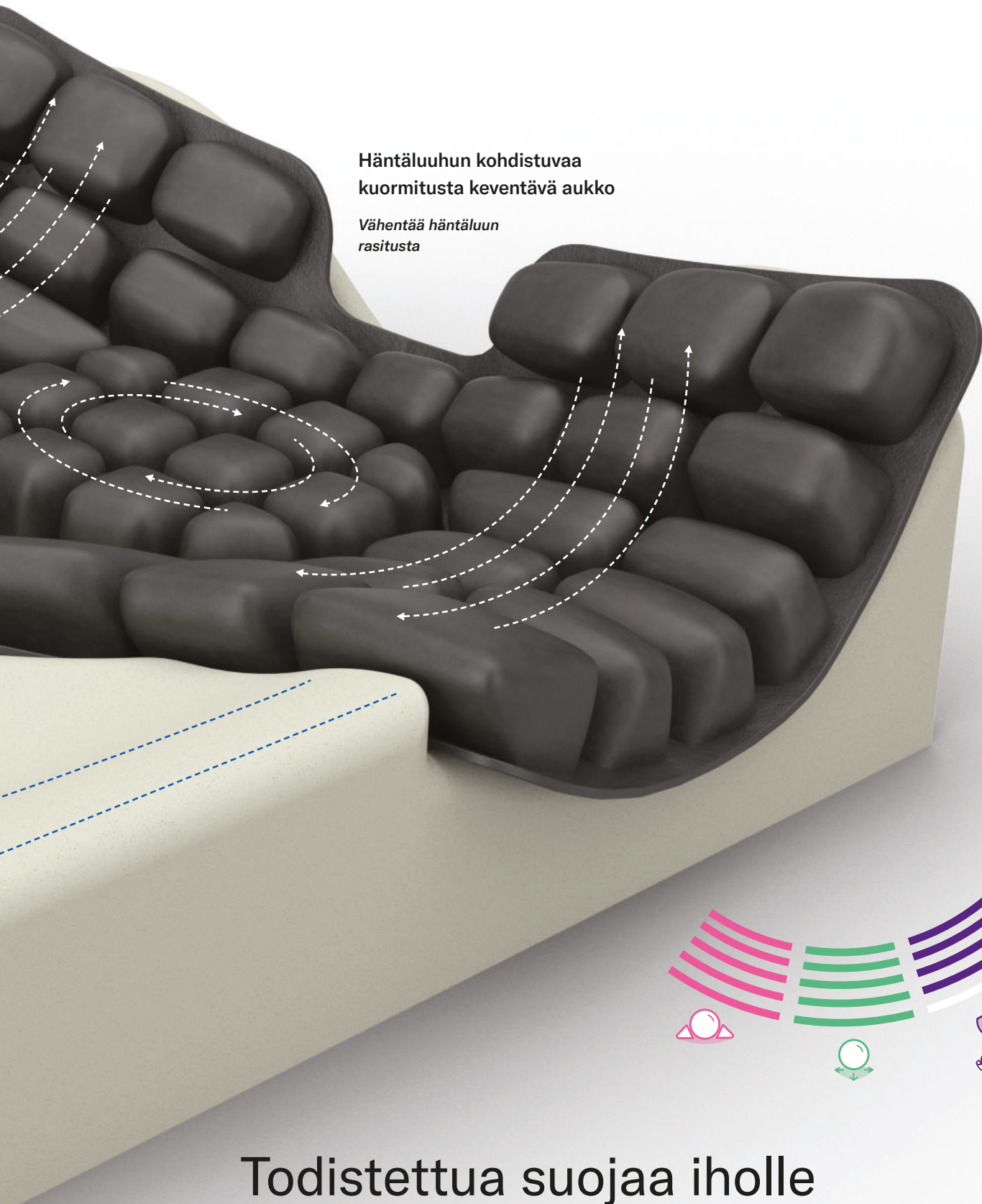

Häntäluuhun kohdistuvaa kuormitusta keventävä aukko

Vähentää häntäluun rasitusta

Todistettua suojaa iholle

Hybrid Select tarjoaa funktionaalista vakautta sekä erinomaista ihon ja pehmytkudosten suojausta. Hybrid Select -tyynyn muotoilun ansiosta lantio uppoutuu ilmatäytteeseen, joka muotoutuu ja liikkuu kehon mukaan ja suojaa ihoa sekä pehmytkudosta.

- Ihon suojaus
- Asettautuminen
- Vakaus
- Uppoutuminen
- Ympäriöminen
- Kuormituksen keventäminen

Valinnainen kuormituksen kevennys vakiona

Hybrid Select on joustavampi ja anteeksiantavampi kuin muut kuormitusta keventävät tyynyt, mikä helpottaa oikean asennon löytämistä joka kerta. Istuinluiden (IT) alla oleva ilmaosio on irrotettavissa mahdollistaen ainutlaatuisen kuormituksen kevennyksen.

Kuormituksen kevennys

*Irrotettava IT-ilmatyynyosio
valinnaiseen kuormituksen
kevennykseen*





Hybrid Select
tarjoaa tarvitsemani
säätömahdollisuudet
ja helpottaa siirtymistä
paikasta toiseen.

— Eric
Permobil-käyttäjä



ROHO®
HYBRID SELECT

permobil

Tekniset tiedot

Päällisen materiaali	Stretch-Air®
Tuotteen paino	1,45 kg*
Painoraja	227 kg
Tyynyn takuu	36 kuukautta rajoitettu
Päällisen takuu	6 kuukautta rajoitettu

*Tuotteen paino perustuu tyynyn kokoon 40,5 x 40,5. Tuotteen paino vaihtelee tyynyn koon mukaan.

Kokovaihtoehdot

35,5 cm x 37,5 cm	40,5 cm x 42,5 cm	43,0 cm x 47,5 cm	51,0 cm x 42,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 52,5 cm	51,0 cm x 45,0 cm
38,0 cm x 40,0 cm	40,5 cm x 47,5 cm	45,5 cm x 42,5 cm	51,0 cm x 47,5 cm
38,0 cm x 42,5 cm	40,5 cm x 52,5 cm	45,5 cm x 45,0 cm	51,0 cm x 52,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm	43,0 cm x 42,5 cm	45,5 cm x 47,5 cm	
40,5 cm x 40,0 cm	43,0 cm x 45,0 cm	45,5 cm x 52,5 cm	

mitat ovat
tyynyn
todelliset
ulkomitat

Seuraavat ovat Permobilin tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä: ROHO®, ISOFLO®, Stretch-Air® ja DRY FLOATATION®.

 **ALGOL**
TREHAB

Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

permobil

permobil.com



HYBRIDSELECTBROCHUREFI220122