



# Likorall 200

## Pikakäyttöopas

Suomi

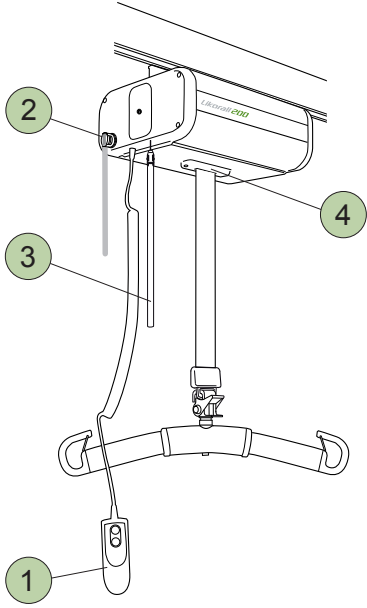


### 1 Käsiohjain

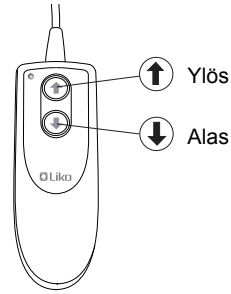

### 2 Häätöälytys


Aktivointi:

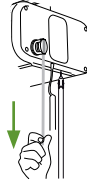


Vapautus:



### 3 Sähköinen varalasku

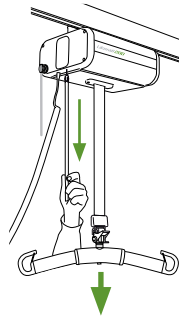


### 4 Rajakatkaisija

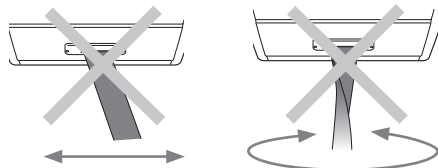


Nostoliike keskeytyy, kun nostohihnaa kuormitetaan vinoon tai kun nostohihna on kiertynyt.

### Akkujen lataus

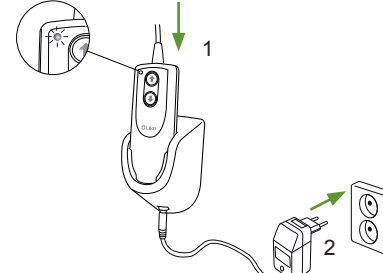


- Lataa nostin säännöllisesti käytön jälkeen.
- Nostin ei toimi latauksen aikana.
- Häätöälytyksen painike ei saa olla painettu latauksen aikana.

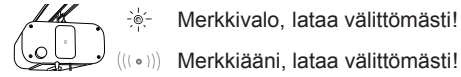


☀ Merkkivalo, lataa välittömästi!  
((( ))) Merkkiäni, lataa välittömästi!

### Nostovälineen vaihto

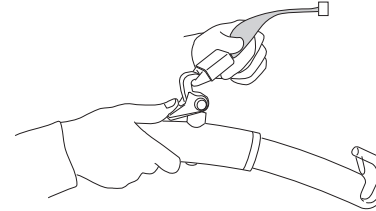

### Vaihtoehtoinen käyttötapa

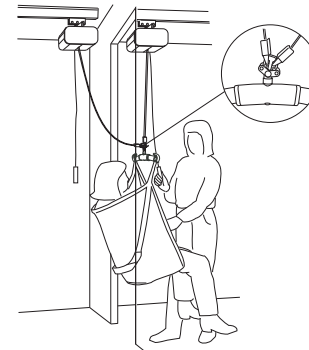

Lue lisää käyttöohjeesta.

### Ergonomia

- Ei manuaalista nostoa – anna nostimen tehdä työ.
- Älä hätäile – työskentele rauhallisesti ja suunnitelmallisesti.
- Säästä selkää – työskentele pystyasennossa ja pidä selkä suorana.
- Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.
- Lyhennä vipuvartta – työskentele lähellä.

### Puhdistus

Puhdista nostin tarvittaessa lämpimällä vedellä tai pesusprillä kostutetulla rievulla.

### Nopea vianetsintä

Tarkista, että:

- hätäkatkaisijaa ei ole painettu alas, katso ②
- akku on ladattu.

### Muita pikakäyttöoppaita

Likon nostinten ja nostokankaiden pikakäyttöoppaat voi ladata osoitteesta [www.liko.com](http://www.liko.com).

© Copyright Liko AB



### Turvaohjeet

- Sekä potilasnostimen että nostovälineiden käyttöohjeet on luettava ennen niiden käyttöä.
- Suunnittele nostohetki huolellisesti.
- Ennen avustettava nostamista alustalta jakun nostokankaan kiinnityslenkit ovat kunnolla kiristyneet, on tärkeää varmistua, että kiinnityslenkit on oikein kiinnitetty nostokaareen.
- **Enimmäiskuormitus: 200 kg**

Tarkista lisävarusteiden enimmäiskuormitus, että se vastaa nostimen enimmäiskuormitusta tai on jopa enemmän.

### TÄRKEÄÄ!

Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen käyttöohjetta, joka voidaan ladata osoitteesta [www.liko.com](http://www.liko.com).



A Hill-Rom Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

Vaivastaja:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
[info@liko.se](mailto:info@liko.se)