

Molift EvoSling

Mukavat, toimivat ja turvalliset nostoliinat

Molift EvoSling

Molift on valmistanut korkealaatuisia nostoliinoja jo usean sukupolven ajan. Erityishuomiota on kiinnitetty tuotteiden laatuun, mukavuuteen ja turvallisuuteen. Valikoimamme on erittäin laaja; meiltä löytyy sopiva malli ja koko kaikkiin tarpeisiin.

MITÄ KÄYTTÄJÄT TARVITSEVAT?

Liikkumisen apuvälineitä tarvitseville ihmisille on tärkeintä, että nostoliina on sekä mukava että turvallinen. Nostoliinan on tehtävä siirtäminen helpoksi, ja samalla sen on täytettävä käyttäjän vaatimukset.

MUKAVUUTTA, TOIMIVUUTTA, TURVALLISUUTTA

Moliftin nostoliinoiden toimivuutta, mukavuutta ja turvallisuutta on kehitetty yhteistyössä hoitajien ja käyttäjien kanssa. Nostoliinoiden on oltava mukavia ja turvallisia, ja lisäksi niiden on oltava helppokäyttöisiä sekä käyttäjälle että avustajalle. Vakiomallit on suunniteltu tavanomaisiin siirtotilanteisiin, ja ne soveltuvat useimmille käyttäjille. Valikoimassa on mallit kolmelle eri selkänöjan pituudelle: **HighBack** (korkea selkätuki), **MediumBack** (keskikokoinen selkätuki) ja **LowBack** (matala selkätuki). Koska käyttäjät ovat erilaisia ja heidän tarpeensa vaihtelevat, Molift on suunnitellut lisää yksilöllisiä malleja, kuten **EvoSling Hygiene-** ja **EvoSling Ampu** -nostoliinat. Nostoliinat on suunniteltu mahdollisimman tukeviksi ja turvallisiksi niin, että paino ja kuormitus jakautuvat tasaisesti.

YKSILÖLLINEN SOVITUS

Suosittellemme kokeilemaan nostoliinoja parhaan yksilöllisen vaihtoehdon löytämiseksi, sillä valikoimassamme on runsaasti eri malleja ja kokoja. Moliftin laatima nostoliinan valintaopas auttaa oikean mallin löytämisessä.



VÄRIKOODIT

Sovittamisen helpottamiseksi nostoliinan säätösilmukat on merkitty värikoodeilla.

PEHMUSTEET

Selkä- ja jalkatukien pehmusteet jakavat painon laajemmalle alueelle niin, että nostoliina on käyttäjälle mukavampi.

VYÖ

EvoSling Hygiene -mallin sisäpuolella on lisäksi turvavyö ja liukueste.

OHJAUSHIHNAT

Ohjaushihnat helpottavat noston aikaista siirtämistä.



SÄÄDETTÄVYYS

Pää- ja jalkatuet on varustettu säätösilmukoilla, jotka helpottavat ripustuskorkeuden sekä istuinosan kallistuskulman säätämistä.

KOLME MALLIA SELKÄTUEN KORKEUDEN MUKAAN

HighBack-, MediumBack- ja LowBack -mallit erilaisten käyttäjien tarpeisiin.


MERKINNÄT

Selkeät, käytännölliset ja selvästi erottuvat merkinnot. Pesuohjeet ja tekniset tiedot sijaitsevat selkätuen takana olevassa taskussa.

APUTASKUT

Selkä- ja jalkatuet on varustettu taskuilla, jotka helpottavat nostoliinan kiinnittämistä.

EvoSling MediumBack Padded.

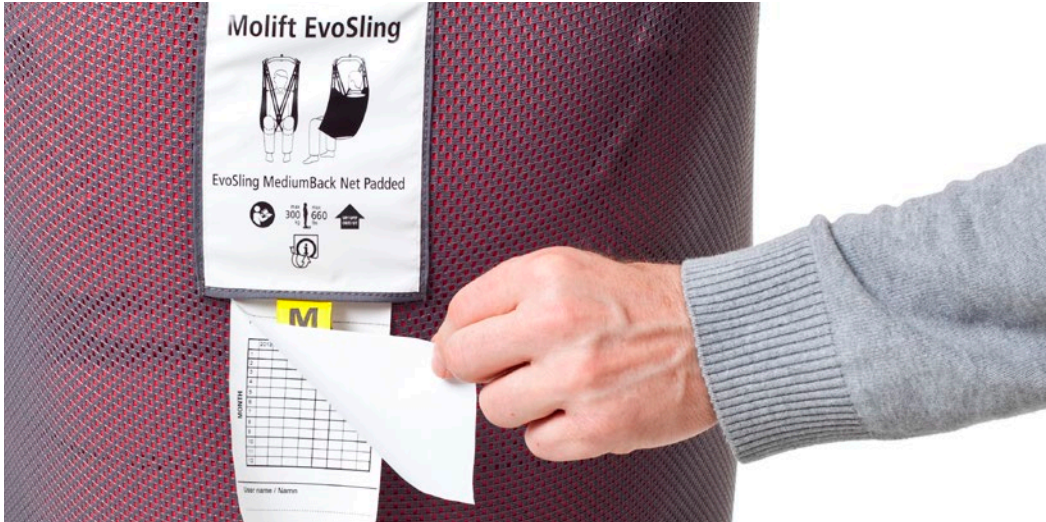

Periodic inspection performed

MONTH	YEAR											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

User name / Namn

.....

.....

.....

KÄYTÄNNÖLLISET JA SELKEÄT MERKINNÄT


Suurikokoisessa merkkilapussa on kaikki tiedot, joita päivittäiseen käyttöön tarvitaan. Pesuohjeet, sarjanumero ja tekniset tiedot löytyvät merkkilapun takana olevasta taskusta, joka suojaa pesemisestä johtuvalta kulumiselta.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET


Nostoliinassa on lappu, johon on tarkoitus merkitä viimeksi tehdyn määräaikaistarkastuksen päivämäärä. Tämä lappu löytyy merkkilapun takana olevasta taskusta. Merkitsemällä tähän lappuun päivämäärän, jolloin nostoliinaa käytettiin ensimmäisen kerran, voit suunnitella, milloin nostoliina tarkastetaan seuraavan kerran.

MATERIAALIT

Nostoliinat ovat lujaa ja kulutusta kestävästä polyesteriä. Materiaali on joustavaa, helposti huollettavaa ja likaa hylkivää. Polyesteriverkosta valmistetut nostoliinat kestävät kulutusta yhtä hyvin ja ovat yhtä lujia ja joustavia. Lisäksi tämä materiaali on ilmava.

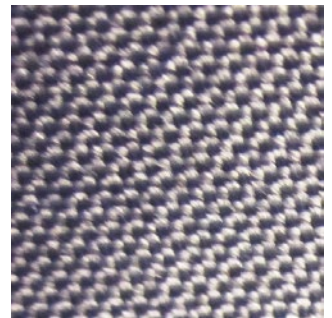

Polyesteri

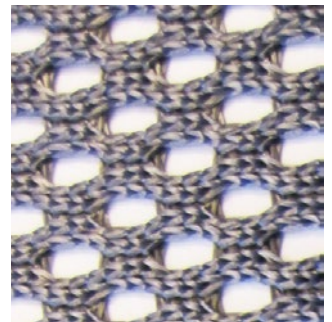

Polyesteriverkko

EVOSLING-NOSTOLIINAN YKSITYISKOHTAISET TIEDOT

Koko	Painosuositus maks.	Pesuohjeet	Värikoodit
XS	17–25 kg		XS S M
S	25–50 kg		L XL XXL
M	45–50 kg		
L	90–160 kg		
XL	160–240 kg		
XXL	230–300 kg		
Materiaalit		Pesu korkeissa lämpötiloissa nopeuttaa materiaalin kulumista.	
polyesteri			
PE-vahtomuovi (pehmusteet)			

Sisällys

MOLIFT EVOSLING HIGHBACK	7
MOLIFT EVOSLING MEDIUMBACK	8
MOLIFT EVOSLING LOWBACK	9
MOLIFT EVOSLING HYGIENE	10
MOLIFT EVOSLING AMPU MEDIUMBACK	11
MOLIFT EVOSLING COMFORT MEDIUMBACK	12
MOLIFT EVOSLING SHADOW HIGHBACK	13
MOLIFT EVOSLING -LISÄVARUSTEET	14



Molift EvoSling HighBack

KÄYTTÄJILLE, JOTKA TARVITSEVAT PALJON TUKEA

MUKAVA TUKI

EvoSling HighBack tukee koko selkää, ja siinä on mukava päätuki. Nostoliina soveltuu useimmille, myös henkilöille, joiden on vaikea pitää vartalo tai pää vakaana.

EvoSling HighBack soveltuu erityisesti makuuasennosta tai lattialta nostamiseen. Siirrettävä henkilö istuu liinassa mukavasti takanojassa.

Selkätuen takana alhaalla ja jalkatuissa on taskut, jotka helpottavat liinan kiinnittämistä.

KAKSI VAIHTOEHTOA

Molift EvoSling HighBack -nostoliinoja on saatavana kahden mallisena: polyesteriliinassa on pehmustetut selkä- ja jalkatuet, ja pehmeässä verkkokankaisessa polyesteriliinassa on pehmustetut pää- ja jalkatuet.




HELPOMPI SOVITTA

Polyesteriverkosta valmistetun nostoliinan selkätuen keskellä on punainen sauma, joka auttaa varmistamaan, että nostoliina on symmetrisesti paikallaan.




EvoSling HighBack
Net Padded

MOLIFT EVOSLING HIGHBACK

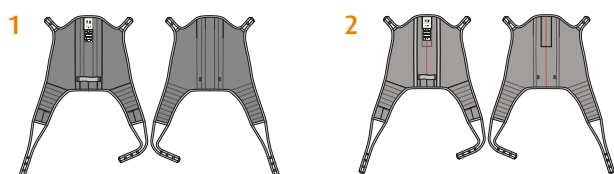

Koko	1 Tuotenro (Padded)	2 Tuotenro (Net Padded)
XS	1722810	1722710
S	1722820	1722720
M	1722830	1722730
L	1722840	1722740
XL	1722850	1722750
XXL	1722860	1722760

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	70 cm	30 cm
S	80 cm	35 cm
M	93 cm	40 cm
L	100 cm	47 cm
XL	105 cm	54 cm
XXL	110 cm	60 cm

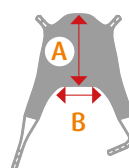

Molift EvoSling MediumBack

KÄYTTÄJILLE, JOTKA PYSTYVÄT KANNATTELEMAAN PÄÄTÄ, MUTTA TARVITSEVAT KOKO SELÄN TUKEA

TÄYSI TUKEA SELÄLLE

EvoSling MediumBack on monipuolinen malli, joka soveltuu useimpiin tavanomaisiin nostotilanteisiin. Siirrettävä henkilö istuu nostoliinassa mukavasti pystyasennossa, koko selkä tuettuna.

Kädet ovat nostoliinan sisällä. Selkätuen takana alhaalla ja jalkatuissa on liinan sovittamista helpottavat taskut. Verkkokangasmallissa on punainen sauma, joka auttaa varmistamaan, että nostoliina on symmetrisesti paikallaan.

KAKSI VAIHTOEHTOA

Molift EvoSling MediumBack -malleissa on kaksi vaihtoehtoa: polyesteriliinassa on pehmustetut selkä- ja jalkatuet, ja pehmeässä verkkokangaisessa polyesteriliinassa on pehmustetut jalkatuet.




EvoSling
MediumBack
Net




EvoSling
MediumBack
Padded

MOLIFT EVOSLING MEDIUMBACK

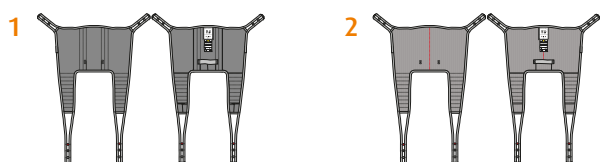

Koko	1 Tuotenro (Padded)	2 Tuotenro (Net Padded)
XS	1723010	1723110
S	1723020	1723120
M	1723030	1723130
L	1723040	1723140
XL	1723050	1723150
XXL	1723060	1723160

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	54 cm	30 cm
S	56 cm	37 cm
M	60 cm	49 cm
L	67 cm	57 cm
XL	70 cm	72 cm
XXL	73 cm	81 cm

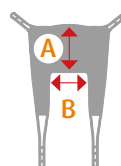

Molift EvoSling LowBack

AKTIIVISILLE KÄYTTÄJILLE, JOTKA PYSTYVÄT PITÄMÄÄN VARTALON VAKAANA

TUKI HARTIAKORKEUDELLE

EvoSling LowBack on monipuolinen malli, joka antaa tukea hartiakorkeudelle. Käyttäjä istuu liinassa mukavasti ja voi pitää käsiä joko liinan sisä- tai ulkopuolella.

Selkätuen takana alhaalla ja jalkatuissa on taskut, jotka helpottavat liinan kiinnittämistä. Polyesteriverkosta valmistetun nostoliinan selkätuen keskellä on punainen sauma, joka auttaa varmistamaan, että nostoliina on symmetrisesti paikallaan.

KOLME VAIHTOEHTOA

Molift EvoSling LowBack -nostoliinoja on saatavana kolmen mallisena: polyesteriliinassa on pehmustetut selkä- ja jalkatuet, ja pehmeä verkkokankainen malli on saatavana joko pehmustettujen jalkatukien kanssa tai ilman niitä.




EvoSling
LowBack
Padded



EvoSling
LowBack

MOLIFT EVOSLING LOWBACK

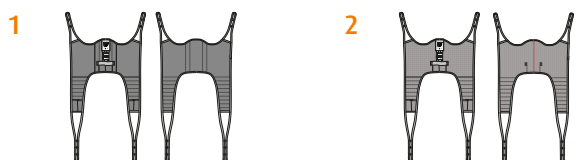

Koko	1 Tuotenumro (Padded)	2 Tuotenumro (Net Padded)
XS	1722310	1722510
S	1722320	1722520
M	1722330	1722530
L	1722340	1722540
XL	1722350	1722550
XXL	1722360	1722560

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	41 cm	40 cm
S	43 cm	43 cm
M	44 cm	48 cm
L	47 cm	55 cm
XL	51 cm	62 cm
XXL	55 cm	70 cm



Molift EvoSling Hygiene

KÄYTTÄJILLE, JOILLA ON HYVÄ TASAPAINO JA LIHASJÄNTEVYYS

HELPPO ASETTAA PAIKALLEEN

EvoSling Hygiene -mallissa on matala selkätuki ja leveä tila jalkatuille, jotta pukeminen ja riisuminen helpottuisi wc:n käytön yhteydessä.

APUTASKUT



Molift EvoSling Hygiene on polyesteriä, ja siinä on pehmustetut selkä- ja jalkatuet. Jalkatuet on varustettu aputaskuilla, jotka helpottavat nostoliinan kiinnittämistä.

LISÄTUKI

EvoSling Hygiene -mallissa on turvavyö, joka lisää vakautta noston aikana.




MOLIFT EVOSLING HYGIENE

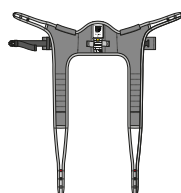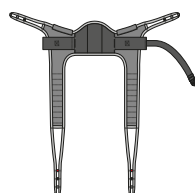

Koko	Tuotenumero (Padded)
XS	1722210
S	1722220
M	1722230
L	1722240
XL	1722250
XXL	1722260

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	29 cm	35 cm
S	33 cm	46 cm
M	33 cm	52 cm
L	33 cm	70 cm
XL	34 cm	73 cm
XXL	35 cm	76 cm

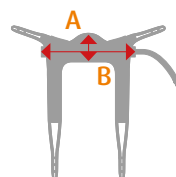

Molift EvoSling Ampu MediumBack

KÄYTTÄJILLE, JOILTA ON AMPUTOITU JALKA TAI JOILLA ON HEIKKO LIHASJÄNTEVYYS

TUKEVA JA MUKAVA

EvoSling Ampu MediumBack -mallissa on kapea jalkatukien väli ja hartiakorkeudelle ulottuva selkätuki. Liinassa on jalkatuet, jotka kiedotaan jalkojen alitse. Jalkatukihihnat työnnetään läpi ohjaussilmukasta, joka pitää jalkatuet kiinni toisissaan. Jalkatukien väli on kapea, jotta käyttäjä ei luiskahtaisi nostoliinasta.



Selkätuen takana alhaalla ja jalkatuissa on taskut, jotka helpottavat liinan kiinnittämistä. Selkätuen keskellä on punainen sauma, joka auttaa varmistamaan, että nostoliina on symmetrisesti paikallaan.

LIUKESTE ANTAA LISÄTUKEA

EvoSling Ampu on valmistettu polyesteristä, ja sen sisäpuolella pakaroiden kohdalla on liukusteet, jotka antavat lisätukea noston aikana. Siirrettävä henkilö istuu liinassa mukavasti takanojassa. Pehmustetut jalkatuet lisäävät mukavuutta.




MOLIFT EVOSLING AMPU MEDIUMBACK

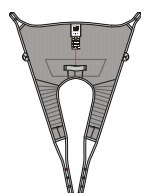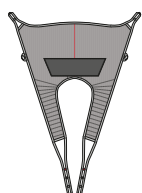

Koko	Tuotenumero (Net Padded)
XS	1723210
S	1723220
M	1723230
L	1723240
XL	1723250
XXL	1723260

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	47 cm	21 cm
S	52 cm	26 cm
M	63 cm	32 cm
L	77 cm	42 cm
XL	90 cm	48 cm
XXL	100 cm	54 cm

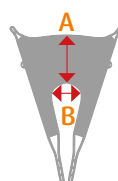

Molift EvoSling Comfort MediumBack

KOKO VARTALOA TUKEVA NOSTOLIINA KÄYTTÄJILLE, JOTKA TARVITSEVAT LISÄTUKEA

TUKEE KOKO VARTALOA


EvoSling Comfort MediumBack Net on verkkokankaasta valmistettu koko vartaloa tukeva nostoliina, jossa on kiinteä jalkatuki ja hartiatasolle ulottuva selkätuki. Nostoliina tukee käyttäjää koko istuma-alueelta, ja siksi se sopii erityisen hyvin nivelongelmista tai kipuherkkyydestä kärsiville.

Nostoliina kiinnitetään henkilön ollessa makuuasennossa. Liina on valmistettu polyesteriverkosta, joka on ilmavaa ja voidaan jättää pyörätuoliin käyttäjän alle.

SÄÄDETTÄVÄ KALLISTUSKULMA

Pää- ja jalkatuet on varustettu säätösilmukoilla, joiden avulla voidaan säätää istuinosan kallistuskulmaa.


Nostoliinan selkätuen keskellä on punainen sauma, joka auttaa varmistamaan, että liina on symmetrisesti paikallaan.

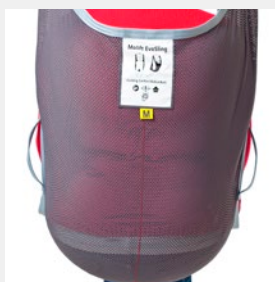

OHJAUSHIHNAT


Mukavuuden varmistamiseksi ohjaushihnat on liitetty sivuhihnoihin.

MOLIFT EVOSLING COMFORT MEDIUMBACK

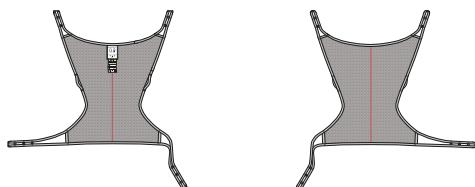

Koko	Tuotenro
XS	1722610
S	1722620
M	1722630
L	1722640
XL	1722650
XXL	1722660

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	77 cm	85 cm
S	90 cm	86 cm
M	102 cm	94 cm
L	115 cm	113 cm
XL	118 cm	120 cm
XXL	120 cm	126 cm

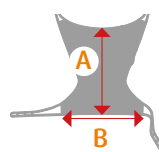

max 300 kg
 max 660 lbs

Molift EvoSling Shadow HighBack

JOUSTAVA NOSTOLIINA, JOKA MUKAUTUU KEHON MUOTOIHIN

**VOIDAAN JÄTTÄÄ PAIKALLEEN PYÖRÄTUOLIIN
TAI ISTUIMEEN**

EvoSling Shadow HighBack on korkea nostoliina, jossa on kaksiosainen jalkatuki lisäämässä mukavuutta ja joustavuutta. Tämä malli mukautuu kehon muotoihin ja sopii lisätukea tarvitseville henkilöille.

Shadow Highback sopii moniin nostotilanteisiin, mutta erityistä etua siitä on, kun käyttäjää siirretään pyörätuoliin, jossa liina on jätettävä istuimeen käyttäjän alle.


EvoSling Shadow on joustavasti säädettävissä, sillä siinä on kuusi ripustushihnaa, ja niissä kaikissa on useita säätösilmukoita. Istuinosaan kallistuskulma ja päätuki ovat säädettävissä yksilöllisesti, ja käyttäjä voi pitää käsiä joko liinan sisä- tai ulkopuolella.

MUKAILEE KEHON MUOTOJA


EvoSling Shadow HighBack on valmistettu joustavasta polyesteriverkosta, joka läpäisee kosteutta ja lämpöä. Tässä mallissa ei ole taskuja eikä pehmusteita, ja sen hihna on erittäin ohut.

EvoSling Shadow voidaan jättää paikalleen pyörätuoliin tai istuimeen siirron jälkeen.

Päätuki voidaan säätää kolmeen asentoon. Suurempi-kokoisissa malleissa (M-XL) on kaareva päätuki.

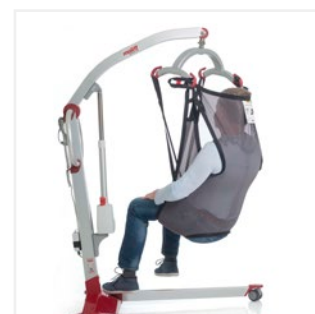


MOLIFT EVOSLING SHADOW HIGHBACK

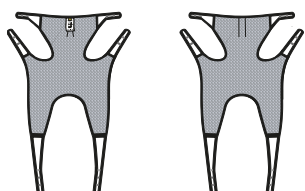

Koko	Tuotenumero (Net)
XS	1723210
S	1723220
M	1723230
L	1723240
XL	1723250
XXL	1723260

Koko	A Selkäkorkeus	B Leveys
XS	47 cm	21 cm
S	52 cm	26 cm
M	63 cm	32 cm
L	77 cm	42 cm
XL	90 cm	48 cm
XXL	100 cm	54 cm

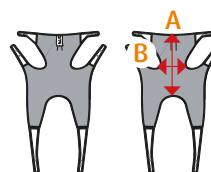

Molift EvoSling -lisävarusteet

MOLIFT EVOSLING -TUKI

LISÄVARUSTEET LIINOILLE, JOISSA EI OLE PÄÄTUKEA

Päätuki kiinnitetään liinaan ja sen pituus on säädettävissä muovisoljella. Se tukee päätä mukavasti ja on hyödyllinen apuväline, jos käyttäjä tarvitsee lisätukea.

Tuote	Tuotenumero
Molift EvoSling Support	1723400



MOLIFT EVOSLING SOFT PADDING -PEHMUSTE

PAINEELLE HERKILLE KÄYTTÄJILLE

EvoSling Soft Padding -mallissa on kaksi painetta lievittävää pehmusteputkea, jotka voidaan sujauttaa liinan jalkatukien ympärille, jos liinassa on kaksiosainen jalkatuki.

Tuote (myydään pareittain)	Tuotenumero
Molift EvoSling Soft Padding -pehmuste XS-M	1723710
Molift EvoSling Soft Padding -pehmuste L-XXL	1723810
Molift EvoSling Hygiene Soft Padding XS-XXL	1723740




MOLIFT EVOSLING EXTENSION LOOP -JATKOSILMUKKA

SOVITTAMISTA HELPOTTAVAT HIHNAT

Käytetään pidentämään nostoliinan hihnoja tai pitämään jalkatuet yhdessä, jos liinassa on kaksiosainen jalkatuki.

Tuote	Tuotenumero
Molift EvoSling Extension loop 16 (+9) cm	1723510
Molift EvoSling Extension loop 25 (+18) cm	1723520

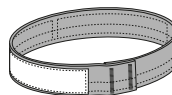

MOLIFT STRAP MARKER -HIHNANSÄÄTÖMERKKI

Tällä merkitään valittu nostohihnan silmukka pää- tai jalkatuellisiin nostohihnoihin. Merkitse valitut säätösilmukat, kun nostoliinaa sovitetaan käyttäjälle.

Tuote (myydään pareittain)	Tuotenumero
Etac Molift Strap Marker	1723600



MOLIFT EVOSLING FLEXISTRAP

VÄLTÄ RASKAIDEN KUORMIEN NOSTAMISTA

Molift EvoSling FlexiStrap -liina on tarkoitettu helpottamaan jalan tai käden nostamista henkilöä hoidettaessa tai käsiteltäessä. Nostoliina on pehmustettua polyesteriä, ja sitä on saatavana kahden kokoisena. Liinan toisella sivulla on tasku, joka helpottaa kiinnittämistä.

Tuote	Tuotenumero
Molift EvoSling FlexiStrap, standardi 15 x 95 cm	1723310
Molift EvoSling FlexiStrap, leveä 25 x 95 cm	1723330



IMMEDIA SLINGON

KUN KÄYTTÄJÄÄ EI VOIDA KÄÄNTÄÄ KYLJELLEEN

Käytetään pidentämään nostoliinan hihnoja tai pitämään jalkatuet yhdessä, jos liinassa on kaksiosainen jalkatuki.

Tuote	Tuotenumero
Immedia SlingOn, koko S 80 x 100 cm	IM437/S
Immedia SlingOn, koko M 80 x 170 cm	IM438
Immedia SlingOn, koko L 120 x 150 cm	IM437



Sujuvamman arjen puolesta

