



molift
a part of Etac

Molift Mover 180

Kevyt ja kompakti kotihoitoon sekä laitospäätöön soveltuva nostin

HELPPO OHJATA

Molift Mover 180:ssa on kevyt alumiinirakenne, joka tekee siitä helposti ohjattavan. Sen laaja nostoväli, 27-163 cm, mahdollistaa nostamisen sekä korkeilta alustoilta että lattiatasolta. Saatavilla on sekä 2- että 4-piste-nostokaaria, ja ne on helppo vaihtaa ilman työkaluja pikakiinnityksen ansiosta.

75 mm pyörät takaavat erinomaisen ohjattavuuden ahtaissa tiloissa. Epätasaisilla pinnoilla liikuttaessa 100 mm pyörät tarjoavat paremman vakauden ja käytön helppouden.



Käsiohjaus

Vankka ja pestävä. Ilmaisimet akun varaukselle, ylikuormitukselle ja huoltotarpeelle.



Ainutlaatuinen työntökahva

Työntökahva takaa ergonomisen ja luonnollisen otteen useilla eri vaihtoehtoilla.



Nostokaarivaihtoehdot

Saatavilla on sekä 2-piste- että 4-piste-nostokaaria useissa eri kokovaihtoehtoissa.



Akku

Litiumioniakku, paino on vain 0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä kädellä.

OMINAISUUDET

ERGONOMINEN KÄSITTELY

Molift Mover 180 on varustettu Moliftin ainutlaatuisella työntökahvalla, joka tarjoaa useita ja joustavia otemahdollisuuksia hoitajan ergonomian parantamiseksi.

KÄYTTÖIKÄ

Nostimella on odotettu käyttöikä 30 000 nostokertaa tai 15 vuotta sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.

AKKU

Akussa käytetään kehittynyttä litiumioni (Li-Ion) -teknologiaa, ja sen turvallinen, suljettu rakenne tekee siitä pestävän (IPX6). Akku painaa vain 0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä kädellä.

Akun voi ladata suoraan nostimessa, mutta saatavilla on myös ulkoinen laturi. Latausaika on vain 3,5 tuntia. Täyteen ladattuna akku mahdollistaa 160 nostoa (75 kg per nosto), ja se on yhteensopiva kaikkien Moliftin siirrettävien nostimien kanssa.

Akulla on odotettu käyttöikä 1 700 latauskertaa ja 5 vuoden takuu – se on suunniteltu kestäväksi.

NOPEUSLISÄYS

Nopeuslisäystoiminto mahdollistaa noston suuremmalla nopeudella, kun toimilaite ei ole kuormitettuna.

KÄSIOHJAUS

Käsiohjaus on kestävä ja hyvin testattu. Siinä on akun varaustason ilmaisin, ylikuormitusilmaisin ja huoltoilmaisin, jotka varmistavat optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Kaapeli on suunniteltu helposti vaihdettavaksi vahingoittumisen sattuessa, ja käsiohjaus on pestävä (IPX6).

MOLIFT-HUOLTOTYÖKALU

Molift Mover 180, kuten kaikki Molift-nostimet, on varustettu ainutlaatuisella huoltomuistutustoiminnolla, joka ilmoittaa, kun huolto on tarpeen. Integroitu huolto-ohjelmisto voi myös näyttää tietoja nostimen käytöstä ja auttaa huoltoteknikoita vianetsinnässä.

Lisäksi nostin on varustettu Bluetooth-yhteydellä, joka mahdollistaa langattoman yhdistämisen Molift Service Tool -huoltotyökaluun.

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	Molift Mover 180 M1801 (pyörien koko 75 mm) Molift Mover 180 M1802 (pyörien koko 100 mm) – ilman nostokaarta (tilattava erikseen) 2-piste nostokaari 450 mm, koko M 1830042
Materiaali	Alumiini, teräs, muovi
Paino	Suurin sallittu kuormitus: 180 kg Laitteen paino (ilman akkua): 31 kg
Korkeus	1940 mm
Pituus	1260 mm
Jalkojen korkeus	105 mm
Pyörien koko	75/100 mm
Nostoväli	1365 mm
Nostokorkeus min-max 2-piste nostokaarella	360–1730 mm
Nostokorkeus min-max 4-piste nostokaarella	265–1630 mm
Ulkoleveys jalat suljettuna	670 mm
Ulkoleveys jalat avattuna	1145 mm
Sisäleveys jalat suljettuna	555 mm
Sisäleveys jalat avattuna	1025 mm
Akku	Li-Ion 25,2 V, 2,85 Ah
Akun latausaika	3,5 tuntia
Nostonopeus	46 mm/s
Nostosuurituskyky	160 nostoa / 75 kg

PUHDISTUS

Puhdista/desinfioi tuote tavallisella, hankaamattomalla puhdistusaineella, jonka pH on 5–9, tai 70 % desinfiointiliuoksella.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.