



**molift**  
a part of Etac

07/2025

## Molift Mover 205

Monipuolinen pyörällinen henkilönostolaite säännölliseen ja päivittäiseen käyttöön missä tahansa hoitoympäristössä

Molift Mover 205 on monipuolinen nostin kaikkiin hoito-, laitos- ja sairaalaympäristöjen siirto- ja nostotilanteisiin. Sen kevyt kokonaispaino helpottaa liikuttelua ja ohjattavuutta, mutta ainutlaatuinen rakenne kestää turvallisesti jopa 205 kg:n kuorman.

Laitteen nostokorkeus on erinomaisen laaja ja valittavana on myös 4-pisteenostokaari, joka yhdessä Moliftin nostoliinan kanssa tarjoaa käyttäjälle mukavan ja tilavan tuen. Pikalukitus mahdollistaa helposti myös muiden erikokoisten nostokaarien käytön. Tukikäsivarsilla varustettua malli sopii myös kävely- ja tasapainoharjoitteluun.



### Käsiohjaus

Vankka ja pestävä. Ilmaiset akun varaukselle, ylikuormitukselle ja huoltotarpeelle.



### Ainutlaatuinen työntökahva

Työntökahva takaa ergonomisen ja luonnollisen otteen useilla eri vaihtoehtoilla.



### Nostokaarivaihtoehdot

Saatavilla on sekä 2-piste- että 4-pisteenostokaaria useissa eri kokovaihtoehtoissa.



### Akku

Litiumioniakku, paino on vain 0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä kädellä.

## OMINAISUUDET

### ERGONOMINEN KÄSITTELY

Molift Mover 205 on varustettu Molifitin ainutlaatuisella työntökahvalla, joka tarjoaa useita ja joustavia ote-mahdollisuuksia parantaen hoitajan ergonomiaa.

### KÄYTTÖIKÄ

Nostimella on odotettu käyttöikä 30 000 nostokertaa tai 15 vuotta sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.

### AKKU

Akussa on kehittynyt Li-Ion-tekniikka ja turvallinen, tiivis rakenne, jonka ansiosta se on pestävä (IPX6). Akku painaa vain 0,9 kg ja sen voi vaihtaa yhdellä kädellä.

Akun voi ladata suoraan nostimessa, ja saatavilla on myös ulkoinen laturi. Latausaika on vain 3,5 tuntia. Täyteen ladattuna akku mahdollistaa 130 nostoa (75 kg per nosto), ja se on yhteensopiva kaikkien Molifitin siirrettävien nostimien kanssa.

Akun odotettu käyttöikä on 1 700 latauskertaa, ja sillä on 5 vuoden takuu – akku on suunniteltu kestäväksi.

### NOPEUSLISÄYS

Nostimessa on nopeuden lisäysoiminto, joka mahdollistaa nopeuden kasvattamisen, kun nostin on kuormittamaton.

### KÄSIOHJAUS

Käsiohjain on vankka ja hyvin testattu. Siinä on akun varaustason ilmaisin, ylikuormitusilmaisin ja huoltoilmaisin, jotka takaavat optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Kestävyys takaamiseksi kaapeli on helposti vaihdettavissa, jos se vahingoittuu, ja käsiohjain on pestävä (IPX6).

### MOLIFT SERVICE TOOL

Molift Mover 205, kuten kaikki Molifitin nostimet, on varustettu ainutlaatuisella huoltomuistustustoiminnolla, joka ilmoittaa, huollon tarpeesta. Sisäänrakennettu huolto-ohjelmisto voi myös näyttää tietoja nostimen käytöstä ja auttaa huoltohenkilöstöä vianmäärityksessä.

Lisäksi nostin on varustettu Bluetooth-yhteydellä, joka mahdollistaa langattoman yhdistämisen Molift Service Tool-huolto-ohjelmistoon.

### TUOTETIEDOT

	Molift Mover 205 ilman nostokaarta M1401
	Molift Mover 205 matala malli ilman nostokaarta M1402
Tuotenumero	Molift Mover 205 käsitukivarsin ilman nostokaarta M1403
	2-piste nostokaari 450 mm, koko M 1430116
	4-piste nostokaari 550 mm, koko L 1530102
Materiaali	Alumiini, teräs, muovi
	Sallittu kuormitus 205 kg
Paino	Laitteen paino (ilman akkua) M1401 & M1402 36 kg
	Laitteen paino (ilman akkua) M1403 42,3 kg
Korkeus	2020 mm
Pituus	1285 mm
Jalasten korkeus	115 mm (matala malli 60 mm)
Etupyörien koko	75 mm
Takapyörien koko	100 mm lukittava jarrupyörä
Nostoväli	1410 mm
Nostokorkeus min-max 2-piste nostokaarella	400-1810 mm
Nostokorkeus min-max 4-piste nostokaarella	300-1710 mm
Ulkoleveys jalat suljettuna	690 mm
Ulkoleveys jalat avattuna	1205 mm
Sisäleveys jalat suljettuna	550 mm
Sisäleveys jalat avattuna	1065 mm
Akku	Li-Ion 25,2 V, 2,85 Ah
Akun latausaika	3,5 tuntia
Nostonopeus	40 mm/s
Nostosuurituskyky	130 nostoa / 75 kg

### PUHDISTUS

Puhdista/desinfioi tuote tavallisella, hankaamattomalla puhdistusaineella, jonka pH on 5-9, tai 70 % desinfiointiliuoksella.

Tuote on CE-merkitty lääkinnällinen laite.