



Molift RgoSling

Mukaviin ja ergonomisiin nostoihin

Molift RgoSling

Sisäänrakennettua ergonomiaa mukavaan nostamiseen.

MAKSIMOITUA MUKAVUUTTA

Kaikki nostoliinamme on suunniteltu mahdollisimman mukaviksi varmistamalla, että paino jakautuu tasaisesti. Mukavien ja turvallisten Molift-tuotteiden valikoimassa on runsaasti eri malleja ja kokoja. Suosittelemme testaamaan tuotteet käyttäjäkohtaisesti. Valinnan nopeuttamiseksi ja helpottamiseksi nostoliinat on värikoodattu koon mukaan.

ANATOMINEN MUOTOILU RATKAISEE!

Molifffin RgoSling -nostoliina on anatomisesti muotoon leikattu, ja selkä- ja jalkaosissa on pehmusteet. Nostoliina myötäilee selkärangan luonnollista muotoa ja estää käyttäjän luisumisen. Turvallinen ja mukava nosto varmistetaan jakamalla käyttäjän paino tasaisesti.

AINUTLAATUISET LIUKUSÄÄDETTÄVÄT LENKIT

Olkahihnoissa on ainutlaatuiset liukusäädettävät lenkit, joiden avulla painon jakautumista voidaan kontrolloida koko nostotapahtuman ajan. Siirtyminen istuma-asennosta makuuasentoon tai toisinpäin on tästä syystä erittäin mukavaa, eikä ripustimen kallistuskulmaa tarvitse säätää erikseen.

POHJOISMAISTA SUUNNITTELUA

Molift-nostoliinat on suunniteltu Norjassa samoilla laatu-kriteereillä kuin Molift-nostolaitteet. Kaikki nostoliinat on tarkastettu ja todettu laatustandardin EN ISO 10535 mukaisiksi. Mukavimmin nosto onnistuu, kun nostoliinan kanssa käytetään neljän pisteen nostotankoa, mutta myös kahden pisteen nostotangon käyttäminen on mahdollista.



AINUTLAATUISET OMINAISUUDET

Olkahihnoissa on ainutlaatuiset liukusäädettävät Molift-lenkit, joiden avulla voidaan varmistaa, että nostaminen on potilaalle mukavaa ja turvallista. Myös taitavasti suunniteltu jalkaosa auttaa jakamaan painon tasaisesti. Nostoliinan keskellä on sovittamista helpottava tasku, ja laskostaminen on vaivatonta Molifffin suunnittelemalla erikoistekniikalla.

OMINAISUUDET



Selkäosan tasku

Selkäosassa on tasku, joka helpottaa nostoliinan asettamista paikalleen.



Jalkatuki

Jalkatuki on pehmustettu ja sen hihna on sijoitettu niin, että reiteen kohdistuva paine jakautuu tasaisesti. Tämä tekee nostamisesta mukavampaa.



Liikusäädettävät lenkit

Liikusäädettävien lenkkien avulla painon jakautumista voidaan kontrolloida noston alusta loppuun.




Useita vaihtoehtoja

Nostoliinoja on saatavana HighBack- ja MediumBack-mallisina.



Tuotetietolappu

Tuotetietolapussa on selkeät ja hyvin erottuvat ohjeet jokapäiväisen käytön tarpeisiin. Huoltoohjeet on taitettu tuotetietojen taakse.

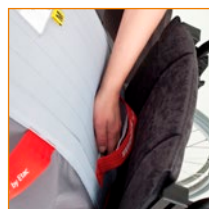

Selkäosassa oleva sovitustasku

Selkäosassa oleva tasku helpottaa nostoliinan sovittamista.



Jalkatuessa oleva sovitustasku

Tasku helpottaa jalkatuen kiinnittämistä.



Sovitusta helpottavat värikoodit

Jalkahihnoissa on värikoodit, jotka auttavat valitsemaan oikean kiinnityskorkeuden.



NOSTOIHINAT

Lenkeissä on sovittamista helpottavat värikoodit.

LIUKUESTE

RgoSling-amputaatio-nostoliinoissa, WC-nostoliinoissa ja seisontanostoliinoissa on turvallisutta parantava liukueste.

VYÖ

Moliftin RgoSling-merkkisissä amputaatio- ja WC-nostoliinoissa on mukavuutta ja turvallisuutta lisäävä vyö.

JALKATUKI

Jalkatuet ovat pehmustettuja. Kiinnitystasku helpottaa jalkatuen sovittamista.



Pehmustettu RgoSling MediumBack.

TUOTETIEDOT

Ylöskäännettävässä tuotetietolapussa on selkeät ja hyvin erotuvat ohjeet jokapäiväisen käytön tarpeisiin. Huolto-ohjeet on taitettu tuotetietojen taakse.

PEHMUSTE

Pehmuste jakaa painon tasaisesti ja tekee nostosta potilaalle mukavampaa.

OHJAUSTASKU

Tasku, joka helpottaa nostoliinan sovittamista. Käytetään pääasiassa istuma-asennossa.



Molift RgoSling MediumBack ja HighBack

Sisäänrakennettua ergonomiaa mukavaan nostamiseen.

KOTI- JA LAITOSKÄYTTÖÖN

Molift RgoSling MediumBack ja Molift RgoSling HighBack ovat monipuolisia nostoliinoja, jotka soveltuvat useimmille käyttäjille ja useimpiin nostolanteisiin koti- ja sairaalaympäristöissä.

MOLIFT RGO SLING

RgoSling MediumBack tukee vartaloa ja RgoSling HighBack tukee vartalon lisäksi päätä. RgoSling HighBack -mallissa käyttäjä voi nojata hieman taaksepäin. Tästä on apua, jos käyttäjän on vaikea pitää vartalo tai pää vakaana. Tämä nostoliina soveltuu erityisesti makuuasennosta tai lattialta nostamiseen.

MOLIFT RGO SLING -NOSTOLIINAN VERKKOMALLI

RgoSling MediumBack- ja RgoSling HighBack -nostoliinoiden vaihtoehtoisena materiaalina on pehmeä polyesteriverkko. Se hengittää hyvin ja kuivuu nopeasti. Tämä nostoliina soveltuu erityisesti suihku- ja kylpykäyttöön. Verkkomallissa on samat muotoilut ja ominaisuudet kuin pehmustetussa mallissa (esim. liukusäädettävät lenkit, selkäosan sovitustasku ja jalkahihnojen sijoitus niin, että paino jakautuu tasaisesti).



Molift RgoSling MediumBack

Koko	Pehmuste	Verkko
XXS		1720300
XS	1720110	1720310
S	1720120	1720320
M	1720130	1720330
L	1720140	1720340
XL	1720150	1720350
XXL	1720160	1720360

Materiaalit

Polyesteri, PE-solumuovi

Molift RgoSling HighBack

Koko	Pehmuste	Verkko
XXS		1720400
XS	1720210	1720410
S	1720220	1720420
M	1720230	1720430
L	1720240	1720440
XL	1720250	1720450
XXL	1720260	1720460


Pesuohjeet



Painosuositukset

XXS	12-17 kg (26-37 lbs)
XS	17-25 kg (37-55 lbs)
S	25-50 kg (55-110 lbs)
M	45-95 kg (99-210 lbs)
L	90-160 kg (198-353 lbs)
XL	160-240 kg (353-529 lbs)
XXL	230-300 kg (507-660 lbs)

Värikoodit

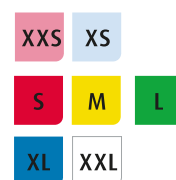

Molift RgoSling -nostoliina WC-käyttöön LowBack ja HighBack

WC-käyttöön suunniteltu joustava nostoliina.

OPTIMOITU ERITYISESTI WC-KÄYNTJÄ VARTEN

Kahdella vyösoljella kiinnitettävä WC-nostoliina tukee vartaloa erittäin hyvin. Joustavat jalkatuet helpottavat sovittamista ja ne voidaan asetella eri tavoin käyttäjän toimintakyvyn ja tarpeiden mukaan.

MUKAVUUS JA TURVALLISUUS POTILAALLE

Molifin RgoSling-merkkisen WC-nostoliinan olkahihnoissa ja jalkatukien hihnoissa on useita lenkkejä, joiden avulla istumiskulma voidaan valita käyttäjän tarpeen mukaan. Myös pystyssä istuminen onnistuu. Nostoliina tukee istuvan henkilön vartaloa erinomaisesti. Vyösoljet voidaan säätää niin, että paino kohdistuu optimaalisesti käyttäjän menettänytä tasapainoa ja vakautta.

SAATAVANA HIGHBACK- JA LOWBACK-MALLISINA

HighBack-mallinen WC-nostoliina antaa lisätukea käyttäjille, jotka eivät pysty pitämään pään asentoa vakaana.




Vaihtoehtoinen käyttötapa. Jalkatuen ainutlaatuinen kiinnitysmenetelmä mahdollistaa joustavan ja yksilöllisen käytön.

Koko	LowBack	HighBack
XXS	1720500	1720600
XS	1720510	1720610
S	1720520	1720620
M	1720530	1720630
L	1720540	1720640
XL	1720550	1720650
XXL	1720560	1720660

Painosuositukset	
XXS	12–17 kg (26–37 lbs)
XS	17–25 kg (37–55 lbs)
S	25–50 kg (55–110 lbs)
M	45–95 kg (99–210 lbs)
L	90–160 kg (198–353 lbs)
XL	160–240 kg (353–529 lbs)
XXL	230–300 kg (507–660 lbs)

Värikoodit

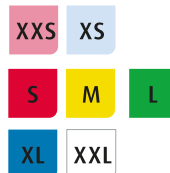

Materiaalit
Polyesteri, PE-solumuovi

Pesuohjeet



Moliftin RgoSling-amputaationostoliina MediumBack ja HighBack

Lisäturvaa nostoliinassa olevasta vyöstä.

TURVALLISUUTTA PARANTAVA KAPEA AUKKO


Moliftin RgoSling-amputaationostoliina antaa lisätukea, jota tarvitaan, jos nostettavalla henkilöllä on amputoitu raaja tai alentunut lihasjänteys. RgoSling-amputaationostoliina on leikattu anatomiseen muotoon ja pehmustettu niin, että käyttäjä on hyvin tuettu koko nosto- ja siirtotilanteen ajan. Jalkakappaleet ovat kahdessa osassa ja erikoispitkiä niin, että ne voidaan kiinnittää kummankin jalan alle. Lisä-hihnojen avulla jalat eivät liu'u pois paikoiltaan ja käyttäjällä on turvallisempi olo.

SAATAVANA HIGHBACK- JA MEDIUMBACK-MALLISINA

HighBack-mallinen amputaationostoliina antaa lisätukea käyttäjille, jotka eivät pysty pitämään vartaloa tai pään asentoa vakaana. Liinaa käytetään myös käyttäjän siirtämiseen istumaasennosta makuuasentoon tai toisinpäin.



OMINAISUUDET

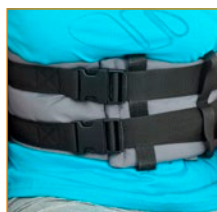

Lisätukea vartalolle

Kahdella soljella varustettu vyö ja sisäosan liukueste antavat lisätukea käyttäjälle, jonka lihasjänteisyys tai tasapaino on alentunut.



Pienempi aukko

Jotta käyttäjä ei pääse luiskahtamaan alas nostoliinassa, pakaroiden ympärillä oleva aukko on pienempi kuin vakiomallissa.

Koko	MediumBack	HighBack
XXS	1721100	1721200
XS	1721110	1721210
S	1721120	1721220
M	1721130	1721230
L	1721140	1721240
XL	1721150	1721250
XXL	1721160	1721260

Painosuositukset

XXS	12–17 kg (26–37 lbs)
XS	17–25 kg (37–55 lbs)
S	25–50 kg (55–110 lbs)
M	45–95 kg (99–210 lbs)
L	90–160 kg (198–353 lbs)
XL	160–240 kg (353–529 lbs)
XXL	230–300 kg (507–660 lbs)

Värikoodit

XXS	XS
S	M L
XL	XXL

Materiaalit

Polyesteri, PE-solumuovi

Pesuohjeet



Molift RgoSling Shadow

Voidaan jättää pyörätuoliin käyttäjän alle.

SOVELTUU KÄYTETTÄVÄKSI YKSILÖLLISESTI MUOTOILTUIHIN ISTUIMIIN

Molift RgoSling Shadow sopii käyttäjille, jotka tarvitsevat täydellisen tuen. Nostoliina on suunniteltu jätettäväksi käyttäjän alle siirron jälkeen. Pinnalla ei ole hihnoja tai saumoja, jotka olisivat kosketuksissa käyttäjään. RgoSling Shadow sopii erityisen hyvin muotoiltuihin istuimiin.

MIELLYTTÄVÄÄ TUKEA

Nostoliinassa on korkea tuki, joka tukee päätä ja koko vartaloa. Jalkatuet ovat erilliset keskikokoisella aukolla. RgoSling Shadow ei sovellu kaksoisamputoitujen henkilöiden käyttöön. Nostoliinaa voidaan käyttää nostamiseen makuuasennosta istuma- tai makuuasentoon.



OMINAISUUDET



Nauhaton ja saumaton pinta

Nostokankaan pinta on nauhaton ja saumaton, eikä paina pyörätuolin käyttäjää.



Ei taskuja

Takana tai jalkatuissa ei ole taskuja, jolloin saavutetaan mahdollisimman mukava asento nostoliinan jäädessä käyttäjän alle siirron jälkeen.

Koko

XXS	1722900
XS	1722910
S	1722920
M	1722930
L	1722940
XL	1722950


Vakiomalli

1722900
1722910
1722920
1722930
1722940
1722950

Painosuositukset

XXS	12–17 kg (26–37 lbs)
XS	17–25 kg (37–55 lbs)
S	25–50 kg (55–110 lbs)
M	45–95 kg (99–210 lbs)
L	90–160 kg (198–353 lbs)
XL	160–240 kg (353–529 lbs)

Värikoodit

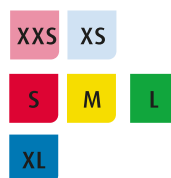

Materiaalit

Polyesteri, PE-solumuovi

Pesuohteet



Moliftin RgoSling -kävelyharjoitteluliivi

Kävelyharjoituksiin yksin tai avustajan kanssa.

VAKAA JA MUKAVA APUVÄLINE KÄVELYHARJOITUKSIIN

Moliftin RgoSling-kävelyharjoitteluliivi on turvallinen ja vakaa apuväline erilaisiin kuntoutustoimiin, kuten kävely-, seisomis- ja tasapainoharjoituksiin. Moliftin RgoSling-kävelyharjoitteluliivissä on kahdella soljella varustettu leveä, pehmustettu vyö, joka jakaa painon tasaisesti ja laajalle alueelle. Pehmustetut nivushihnat estävät liiviä liukumasta pois paikaltaan.

SUUNNITTELUN TAUSTALLA AMMATTIKIIPEILIJÖIDEN VÄLINEET

RgoSling-kävelyharjoitteluliivin suunnittelussa on käytetty apuna ammattikiipeilijöiden varusteita. Tuloksena on erittäin mukava ja turvallinen harjoitusliivi. Itsekiristyvät ripustuslenkit estävät käyttäjää putoamasta. Etuosassa olevat soljet antavat käyttäjälle entistä paremmat mahdollisuudet harjoitella kävelyä tai käydä WC:ssä itsenäisesti, ehkä jopa ilman avustajaa.

LISÄVARUSTE



Haaravyöt

Haaravyöt kiinnitetään liivin ulkopuolelle. Näin vähennetään puristumisen vaaraa, kun liiviin kohdistuu enemmän painoa.



Koko	Vakiomalli
XXS	1721300
XS	1721310
S	1721320
M	1721330
L	1721340
XL	1721350

Lisävarusteet	
Haaravyöt kävelyharjoitteluliiviin.	
Tilaa 2 kpl koko paria varten.	
Koko	Tuotenumero
XXS-XS	1721700
S-M	1721720
L-XL	1721740

Painosuositukset	
XXS	12-17 kg (26-37 lbs)
XS	17-25 kg (37-55 lbs)
S	25- 50 kg (55-110 lbs)
M	45-95 kg (99-210 lbs)
L	90-160 kg (198-353 lbs)
XL	160-240 kg (353-529 lbs)

Värikoodit	
XXS	XS
S	M L
XL	

Materiaalit
Polyesteri, PE-solumuovi

Pesuhjeet



max 300 kg max 660 lbs

Molifin RgoSling Comfort HighBack

Mukautuu vartalon muotoihin.

TUKEE KOKO SELKÄÄ

Koko vartaloa kannatteleva Molift RgoSling Comfort HighBack on valmistettu hengittävästä polyesteriverkosta, joka kuivuu nopeasti. Se soveltuu erityisen hyvin tilanteisiin, joissa nostoliina on jätettävä tuolissa tai pyörätuolissa istuvan käyttäjän alle. Molift RgoSling Comfort HighBack sopii myös henkilöille joilla on lihastai luustokipuja. Molift RgoSling Comfort tukee hyvin koko selkää. Käyttäjä istuu tässä korkeaselkäisessä mallissa enemmän takanojassa. Olkahihnoissa on ainutlaatuiset liikusäädettävät lenkit, jotka mahdollistavat sujuvan siirtymisen makuuasennosta istuma asentoon tai toisinpäin. Tämä nostoliina kiinnitetään makuuasennossa olevalle käyttäjälle.



Koko

Koko	Vakiomalli
S	1721420
M	1721430
L	1721440

Painosuositukset

S	25–50 kg (55–110 lbs)
M	45–95 kg (99 – 210 lbs)
L	90–160 kg (198 – 353 lbs)

Värikoodit



Materiaalit

Polyesteri

Pesuohjeet



MOLIFT-LISÄVARUSTEET



Molift-säilytysjärjestelmä

Molift-nostoliinoiden säilytysjärjestelmä on kätevä tapa säilyttää ja esitellä Molift-nostoliinoja ammattimaiseen tapaan. Tuotenumero: 3030700



Molift RgoSling - pidennyslenkit

Pidennyslenkki 10, 20 ja 30 cm. Tilaa kaksi kappaletta koko silmukkaparia varten. Tuotenumero: 3013000

Sujuvamman arjen puolesta

