




Etac Cross 6

Säädettävän
ristikkorunkoinen pyörätuoli

 **etac**[®]



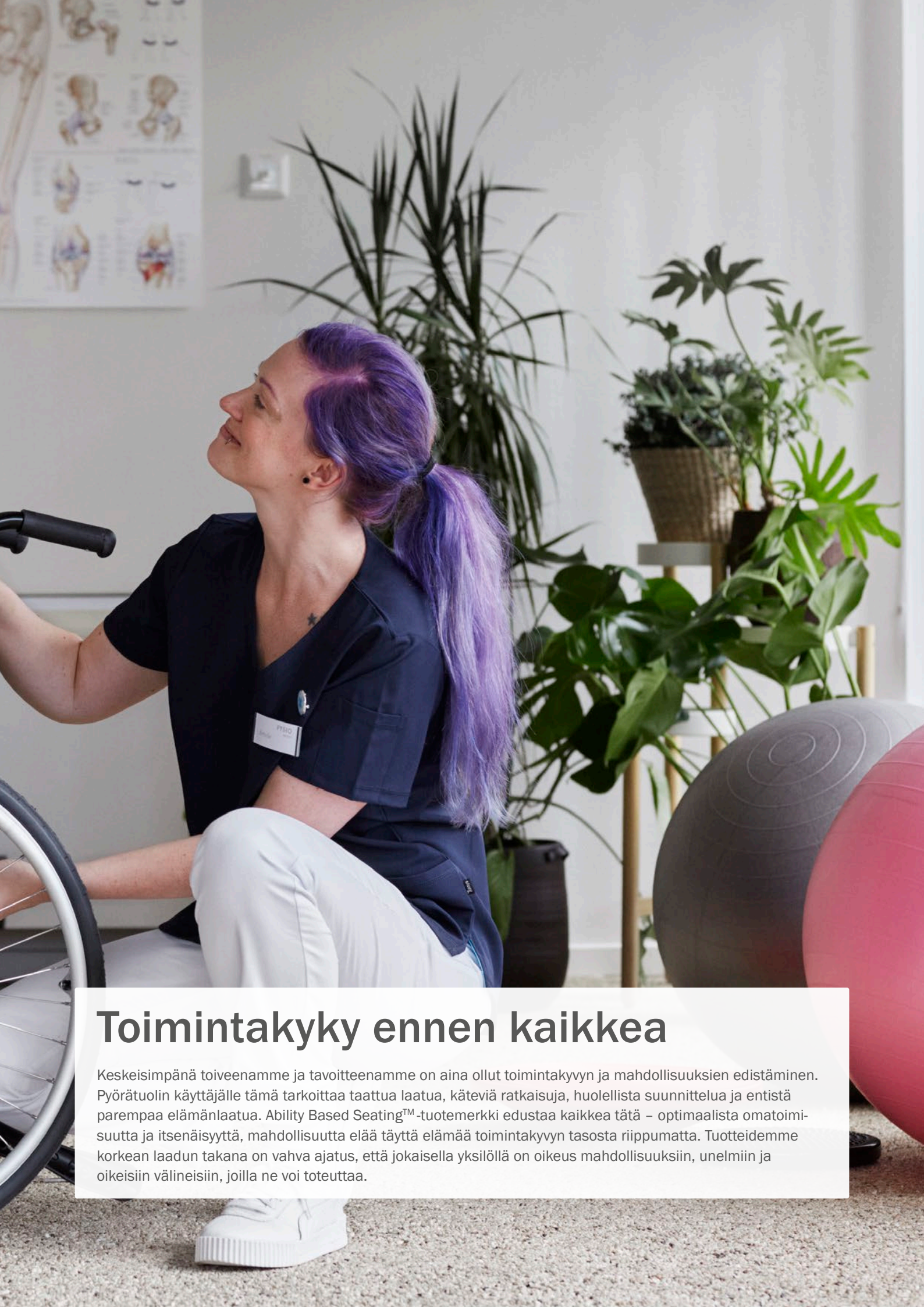

Toimintakyky ennen kaikkea

Keskeisimpänä toiveenamme ja tavoitteenamme on aina ollut toimintakyvyn ja mahdollisuuksien edistäminen. Pyörätuolin käyttäjälle tämä tarkoittaa taattua laatua, käteviä ratkaisuja, huolellista suunnittelua ja entistä parempaa elämänlaatua. Ability Based Seating™-tuotemerkki edustaa kaikkea tätä – optimaalista omatoimisuutta ja itsenäisyyttä, mahdollisuutta elää täyttä elämää toimintakyvyn tasosta riippumatta. Tuotteidemme korkean laadun takana on vahva ajatus, että jokaisella yksilöllä on oikeus mahdollisuuksiin, unelmiin ja oikeisiin välineisiin, joilla ne voi toteuttaa.

Etac Cross 6

Säädettävien ristikkorunkoinen pyörätuoli

Se oikea pyörätuoli. Tässä ja nyt!

Enää sinun ei tarvitse haaskata aikaa työläisiin testauksiin ja mittauksiin. Riittää, että pyörätuolin istuinleveys on oikea – kaikki muut voidaan säätää yksilöllisen tarpeen mukaan.

Cross 6 on suunniteltu täyttämään pohjoismaisten terveydenhoitojärjestelmien tiukat vaatimukset.

Säästä aikaa

Cross 6 -pyörätuolissa on nyt entistä enemmän säätömahdollisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua ja säästävät aikaa. Haastattelemamme kuntoutuksen ammattilaiset ovat vahvistaneet, että Cross 6 on kätevä ja helppokäyttöinen.

Cross 6 – pohjoismaista muotoilua, valmistettu Ruotsissa. Jokainen ansaitsee sen oikean pyörätuolin, tässä ja nyt!



Tarvitset vain lonkan mitat

Lattian ja istuimen välisen korkeuden säätöväli on peräti 32–56 cm! Pyörät on tasapainotettu niin, että ne pysyvät vakaina kaikissa istuinkorkeuksissa. Jokaiselle syvennykselle on neljä asentoa. Vakiomallinen runko sopii useimmille käyttäjille*. Tilaa oikea tuote – mittaa vain lonkan leveys.

*Vakiomallinen istuinsyvyys sopii enintään 190 cm:n pituisille. Jos käyttäjän pituus on 185 cm tai enemmän, harkitse pitkän rungon valitsemista, mikäli käyttäjän asento ja 3A-selkänöjan säädöt sitä edellyttävät.

Parannetut ominaisuudet – entistä kätevämpi

Tuotekehityksen jokainen vaihe on suunniteltu yhteistyössä alan parhaimpiin kuuluvien kuntoutuksen ammattilaisten kanssa piirustuspöydältä valmiiseen tuotteeseen asti. Nämä parannukset auttavat terveydenhoitoalan ammattilaisia säästämään arvokasta aikaa.



Nopein tasapainotus

Kelauspyörien säätömekanismi on alan nopein. Uusi tasapainotettu rakenne pitää tuolin vakaana kaikilla istuinkorkeuksilla. 44 asentoa.



Yksi istuinsyvyys sopii kaikille

Vakiomallinen istuinsyvyys sopii useimmille käyttäjille. Säästää tilaajan aikaa.



Oikea lantion asento on helppo löytää

Lantiokulman muuttaminen on nyt äärimmäisen helppoa, ja äänimerkkimäinen napsahdus kertoo, milloin säätö on valmis.



Hyvä asento jokaiselle vartalomallille

Istuma-asennon korkeuden ja lantiokulman säätäminen on helppoa ja nopeaa.



Mukavat ja kätevät työntökahvat

Ergonomiset säädöt jokaisen avustajan tarpeisiin.



Lujuutta nyt ja tulevaisuudessa

Runko säilyttää lujuutensa vuodesta toiseen.



Kiinnitä lannevyö haluamaasi kohtaan

Uusi helposti säädettävä lannevyö.



Kaatumiseste

Sopii kaikkiin istuinkorkeuksiin (säätöväliä 24 cm!). Nopea ja helppo.

Rungon väri vaihtoehdot



Musta -01



Harmaa -78



Valkoinen -92



Se oikea pyörätuoli. Myös huomenna! Cross 6 -pyörätuolia voi aina säätää uudelleen käyttäjän tarpeen mukaan. Kestävä ja säädettävä – sopii vaihtuville käyttäjille. Cross 6 on valmistettu kestävällä tavalla tulevaisuuden tarpeisiin.

Cross 6 -malli	Tuotenumero	Kokonaisleveys	Istuinsyvyys selkätuen putkesta mitattuna	Paino kelauspyörän kanssa
35 cm vakio	13240101	55,5 cm	36-49 cm	14,6 kg
35 cm pitkä	13240102	55,5 cm	42-55 cm	14,8 kg
37,5 cm vakio	13240103	58,0 cm	36-49 cm	14,7 kg
37,5 cm pitkä	13240104	58,0 cm	42-55 cm	14,9 kg
40 cm vakio	13240105	60,5 cm	36-49 cm	14,8 kg
40 cm pitkä	13240106	60,5 cm	42-55 cm	15 kg
42,5 cm vakio	13240107	63,0 cm	36-49 cm	14,9 kg
42,5 cm pitkä	13240108	63,0 cm	42-55 cm	15,1 kg
45 cm vakio	13240109	65,5 cm	36-49 cm	15,1 kg
45 cm pitkä	13240110	65,5 cm	42-55 cm	15,3 kg
47,5 cm vakio	13240111	68,0 cm	36-49 cm	15,2 kg
47,5 cm pitkä	13240112	68,0 cm	42-55 cm	15,4 kg
50 cm vakio	13240113	70,5 cm	36-49 cm	15,3 kg
50 cm pitkä	13240114	70,5 cm	42-55 cm	15,5 kg
52,5 cm vakio	13240115	73,0 cm	36-49 cm	15,4 kg
52,5 cm pitkä	13240116	73,0 cm	42-55 cm	15,6 kg

* Kun käytössä on kolmisäätoinen 3A-selkänöja. Paino- ja pituusmitat koskevat tuolia, jossa on pikakiinnityskeskiöillä varustetut 24 tuuman kelauspyörät, korkeapainerenkaat, alumiiniset kelausvanteet, sääri- ja jalkatuet, jarrut ja käsitet sekä 6,5 tuuman tukipyörät, joissa keskikokoiset haarukat. Mittaustuloksissa voi olla $\pm 2\%$:n poikkeamia.


Etuosan istuinkorkeus 32–56,5 cm	Kuljetusleveys 32 cm	Pituus taitettuna 62-86 cm	Kelauspyörän halkaisija 46,5–58 cm
Takaosan istuinkorkeus 32–53 cm	Kokonaiskorkeus 72-116 cm	Säärituen pituus 26–64 cm	Käyttäjän enimmäispaino 135 kg
Selkätuki Katso 3A-selkätuen tekniset tiedot sivulta 8.	Kokonaispituus 80-122 cm	Säärituen kulma 108°–114°	

Etac 3A -selkätuki

Täyttää kuntoutuksen ammattilaisten tiukimmatkin vaatimukset

3A-selkätuelle ei löydy vertaista. Tutki mahdollisuuksia ja näe, miten pyörätuolin säädöt onnistuvat täydellisesti ilman hintavia selkänojajärjestelmiä. Muoto ja tuki voidaan säätää suoraan käyttäjän ollessa pyörätuolissa. Säätäminen on nopeaa ja helppoa, ja voit aina muokata tukea uudelleen tarvittaessa.

Proksimaalinen vakaus on lähtökohta asennon hallinnalle. Cross 3A -selkätuki auttaa saavuttamaan halutut asennot käyttäjän omien yksilöllisten kykyjen ja vartalon muodon mukaan. Tämä edistää käyttäjän toimintakyvyn kehittymistä ja aktiivisuutta. Tätä on Ability Based Seating™.

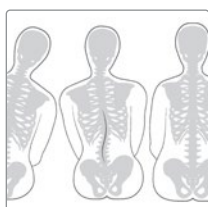

Ability Based Seating™

Tuotekehityksemme avainajatuksena on käyttäjän toimintakyvyn edistäminen. Tukeva ja tasapainoinen istuma-asento lisää pyörätuolin käyttäjän aktiivisuutta. Toimintakyky on kullannarvoista. Jos sitä ei harjoita, sen menettää. Jokaisella pitää olla mahdollisuus kehittää toimintakykyään.



Kätevä sovitus

Juuri oikea muoto on helppo saada aikaan sivutukien, paineenjakajien ja tukikiilojen avulla.



Proksimaalinen vakaus on keskeistä

Lantion riittävä tukeminen on ensimmäinen askel kohti proksimaalista vakautta. Jotta lantion asento pysyy vakaana, selkätuen kulma ja alaselän hihnat on säädettävä oikein.



Hyvän asennon löytäminen

Huono asento vie kaiken energian. Pyörätuolissa istuvan henkilön selän tukeminen on välttämätöntä toimintakyvyn kannalta. Valmistajan kotisivuilla www.etac.com on lisää tietoa Cross 3A -selkänojan muotoilemisesta. Otetaan hyvä asento!

Erittäin mukautuva

3A-selkätuessa on useita älykkäitä ja helppokäyttöisiä säätövaihtoehtoja, joiden ansiosta sen säädettävyyden huippuluokkaa. Asento voidaan valita tarpeen mukaan säätämällä istuimen ja selkätuen sekä lantion kallistuskulmia.


Nimi "3A" on peräisin kolmesta latinan kielen sanasta: Angulus, Altitudo ja Altus – kulma, korkeus ja syvyys.

Alla on joitakin esimerkkejä Etac 3A -selkätuen lukuisista säätömahdollisuuksista.



Säädettävän selkätuen korkeus

Säätöväli 32–45 cm.

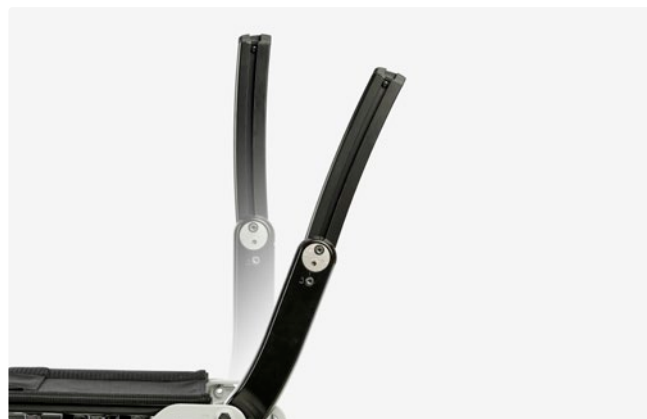


Säädettävä lonkan kulma (istuimen ja selkätuen välissä)

Säätöväli -5 – +20°.



Säädettävä lantiokulma

Säätöväli -16 – +16°.

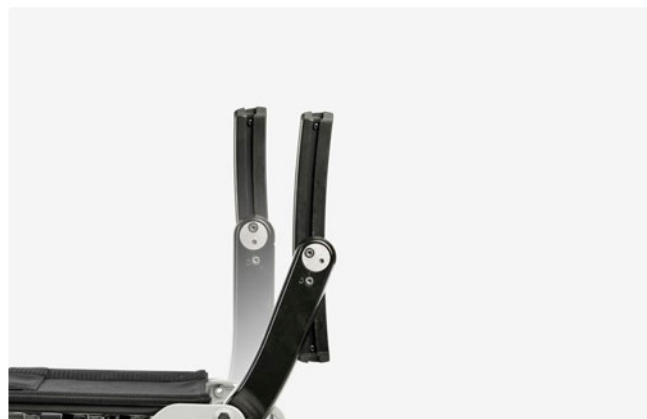

Säädettävä istuinsyvyys

Lisäys 7 cm.

Korkeus

Säätöväli 32–45 cm
Korkea malli: Säätöväli 38–51 cm

Istuimen ja selkätuen välinen kulma

Vakioasetukset +2°, säätöväli -5 – +20°.

Lantiokulma

Vakioasetus +7°, säätöväli -16 – +16°

Selkätuen verhoilu

6 selkänöjan hihnaa, joiden kireys on säädettävissä. Suuritehkeinen vaahtomuovi elastista polyesteriä.

Istuimen syvyys

Vakiomallinen runko: 36–41 cm
Pitkä runko: 42–48 cm
Etuosan säätäminen: Istuimen syvyyttä voi lyhentää 5 cm.
Takaosan säätäminen: Istuinsyvyys vaihtelee selkätuen säätöjen mukaan. Käyttämällä jatko-kappaletta ja säätämällä selkätuen kulmaa istuimen syvyyttä voidaan lisätä enintään 7 cm.

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

Seuraaville Etac-pyörätuoleille on saatavana erinomaisen runsas valikoima vaihtoehtoja ja lisävarusteita: Cross 6, Cross 5 and Cross 5 XL.



Päätuki, plyysikangas

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävissä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.




Päätuki, hygieniapäällinen

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävissä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.



Päätuki sivutuen kanssa

Päätuki on korkeus-, syvyys-, kulma- ja sivusuuntaisesti säädettävissä. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Vaatii kiinnitystangon.

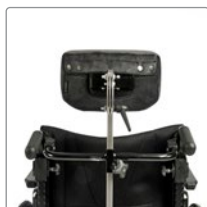

Päätuen kiinnitystanko

Tanko on helposti avattavissa pikalukolla.




3A-selkätuki

Korkeus, lonkan ja lantion kulma säädettävissä Saatavana vakiomalli sekä korkeaselkäinen malli



2B-selkätuki ja kiinteät työntökahvat

Aktiivisin selkätukimallimme. Kaareva putki antaa hienovaraista sivutukea. Päällisen kireys on säädettävissä ja siinä on pehmusteet, jotka suojaavat lantion seutuun kohdistuvalta paineelta.

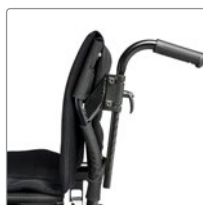

2B-selkätuki ja säädettävät työntökahvat

Kaareva putki antaa hienovaraista sivutukea. Päällisen kireys on säädettävissä ja siinä on pehmusteet, jotka suojaavat lantion seutuun kohdistuvalta paineelta. Työntökahvojen korkeus on säädettävissä. Kaksi selkätuki-korkeusvaihtoehtoa



Päällinen

Pehmeä joustokangaspäällinen. Tummanharmaa plyysi.




Comfort-päällinen

Lisäpehmuste. Tummanharmaa plyysi.




Päällinen Airmesh-kangasta

Antaa modernin ja kevyen vaikutelman. Sopii käytettäväksi 2B-selkätuen (matala ja korkea) sekä 3A-selkätuen kanssa (vain vakiokorkeus).

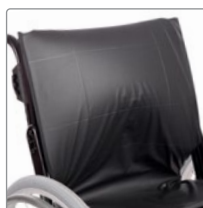

Dartex-hygieniapäällinen

Hygieniapäällinen 3A-selkätukeen. Materiaali: Dartex. Hylkii vettä, voidaan pyyhkiä märällä liinalla, pesulämpötila 90 °C. Haluttaessa voidaan varustaa räätälöidyllä kuvioinnilla.

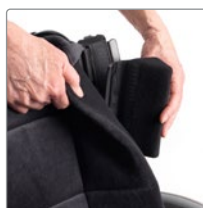

Selkätukikiila plyysiä, lyhyt

Pituus 15 cm. Pehmeä kiila, joka kiinnitetään päällysteen alle tarranauhalla. Yhdistetään sivustoppariin (saatavana suorana tai levennyskappaleen kanssa). Verhoilu: tummanharmaa plyysiä. Myydään yksittäiskappaleina

Lisävarusteet ja vaihtoehdot, jatkoa




Selkätukikiila, plyysiä, pitkä

Pituus 30 cm. Pehmeä kiila, joka kiinnitetään päällysteen alle tarranauhalla. Yhdistetään sivustoppariin (saatavana suorana tai levennyskappaleen kanssa). Verhoilu: tummanharmaata plyysiä. Myydään yksittäiskappaleina.



Sivutyyny

Tukee kuin syli. Käännä ja valitse kahden muodon välillä. Tuetaan suoraan käsitukeen ja/tai sivustoppariin. Myydään yksittäiskappaleina.

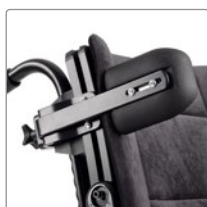

Vartalotuki, säädettävä

Korkeus- ja syvyyssäädettävä. Kiinnitetään lähelle vartaloa niin, että kädet liikkuvat vapaasti. Pehmuesteen pidiketangosta on saatavana neljä eri mallia. Irrottavissa ilman työkaluja. Myydään yksittäiskappaleina.



Sivustoppari, suora

Yhdistetään kiiloihin tai sivutyynyyn. Säädettävä korkeus. Myydään yksittäiskappaleina.



Vartalotuki, sivulle käännettävä

Korkeus- ja syvyyssäädettävä. Takaosaan sovitettavan saranan ansiosta tuki sopii hyvin yhteen käsitukien kanssa. Kiinnitetään lähelle vartaloa niin, että kädet liikkuvat vapaasti. Pehmuesteen pidiketangosta on saatavana kolme eri mallia. Myydään yksittäiskappaleina.



Sivustoppari, leveyden laajennus 1,5 cm

Kummassakin sivussa on 1,5 cm:n levennysosa. Yhdistetään kiiloihin. Myydään yksittäiskappaleina.



Tukikiilat, malli 1 (pieni)

Solumuovia, tarranauhakiinnitys. Pituus: 13 cm
Leveys: 9,5 cm
Korkeus: 2 cm
Myydään pareittain.




Sivustoppari, leveyden laajennus 3 cm

Kummassakin sivussa on 3 cm:n laajennusosa. Yhdistetään kiiloihin ja suurempaan päälliseen. Myydään yksittäiskappaleina.



Tukikiilat, malli 2 (keskikokoinen)

Solumuovia, tarranauhakiinnitys. Pituus: 19 cm
Leveys: 12 cm
Korkeus: 2 cm
Myydään pareittain.

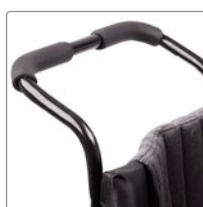

Työntökaari

Korkeussäädettävä ja irrotettava.



Tukikiilat, malli 3 (suuri)

Solumuovia, tarranauhakiinnitys. Pituus: 20 cm
Leveys: 17 cm
Korkeus: 2,5 cm
Myydään pareittain.



Työntökahva

Säädettävä korkeus, irrotettava malli.



Paineenjakaaja

Helppo ja nopea apuväline juuri oikean muodon saamiseksi. Pituus: 20 cm
Leveys: 15 cm
Korkeus: 1 cm



Kiinteä työntökahva

(Vain 3A-selkänöjaan).



Takaosan poikittaistanko

Vakautta lisäävä poikittaistanko. Sopii 3A-profiiliin. Taitettava, varustettu pikalukolla.



Käsituki

Irrotettava ja korkeussäädettävä käsituki. Kiinteä päällinen. Pehmusteen pituus 25 cm, pitkä malli 35 cm. Korkeus säädetään joko kuusiokoloavaimella tai sormiruuvilla.



Käsinojan päällyste

Pehmuste kylmävahtomuovia tai geeliä, irrotettava. Saatavilla lyhyt malli (25 cm) tai pitkä malli (35 cm). Päällinen on tummanharmaata plyysiä tai mustaa Dartexia.



Käsinojan pehmuste, leveä ja pehmeä

Kiinnitetään valmiiksi asennettuun käsinojaan. Koko 8 x 40 cm. Sopii sekä lyhyeen että pitkään käsinojaan, oikealle ja vasemmalle puolelle.



Hemikäsitukipehmuste

Säädettävä kallistuskulma, korkeus sovitaan käsituen kanssa. Kiinnitetään pitkään käsitukeen. Irrotettava päällinen tummanharmaata plyysiä.




Sivusuoja

Säädettävä korkeus, irrotettava malli.



Reisituki

Kiinnitetään valmiiksi asennettuun käsitukeen. Saatavilla lyhyt malli (50 cm) ja pitkä malli (57 cm).

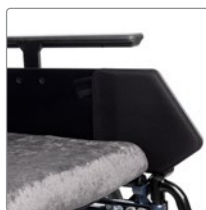

Reisituen pehmuste

Solumuovipehmuste, polyeteeniä. Kiinnitetään reisitukeen tarranauhoilla.



Käsituki

Irrotettava ja korkeussäädettävä käsituki. Käsituen pehmuste on vaihdettavissa. Pehmusteen pituudet 25 cm ja 35 cm. Korkeus säädetään joko kuusiokoloavaimella tai sormiruuvilla.



Lokasuoja

Korkeus, syvyys ja sivusuunta säädettävissä. Hiilikuitua.



Jalkatuki, vakiomalli

Musta. Irrotettava, sivulle käännettävä. Saatavana myös lukituksen kanssa.




Jalkatuki, kapea

Tuo jalkatuen noin 5 cm lähemmäksi istuinta. Sopii käytettäväksi vain 4 tai 5 tuuman tukipyörien kanssa. Saatavana myös lyhyenä mallina sekä varustettuna lukituksella.



Kipsijalka- ja pohjetuki

Varustettu kokoon taitettavalla pohjetuella. Jalkatuen putki voidaan sovittaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi. Sopii oikealle ja vasemmalle puolelle.

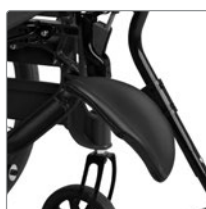

Pohjetuen päällinen


Kipsijalan tukeen. Tummanharmaata plyysiä tai mustaa Dartexia.

Lisävarusteet ja vaihtoehdot, jatkoa



Jalkalauta

Säädettävä sysyys ja kulma. Säädettävä korkeus. Varustettu vakiomallisella kiinnityspotkella. Saatavana myös lyhyt ja pitkä kiinnityspotki.

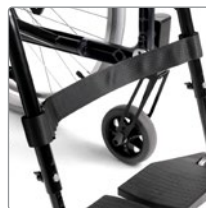

Pohjehihna

Irrotettava, pituussäädettävä.



Jalkatuen päällinen.

Antaa lisämukavuutta, plyysiä.



Pohjehihnan pehmuste

Pehmeämpi tuki.
Saatavana olevat pituudet: 20, 30 ja 40 cm.



Yhtenäinen jalkalauta

Sivulle taitettava, korkeus- ja kulmasäädettävä jalkalauta.



Pehmustettu pohjetuki

Mukavan pehmeä ja lämmin, tarranauhakiinnitys. Kiinnitetään kiinteään jalkatukeen tai kipsijalan tukeen.



Yhtenäisen jalkalaudan pehmuste

Antaa lisämukavuutta. Plyysiä.




Kantapäähihna

Pituus säädettävissä.
Ei sovi jalkatuen jatkokappaleeseen.



Yhtenäinen jalkalauta lapsille

Säädettävä korkeus, syvyys ja kulma. Saatavana istuinleveyksille 35 ja 37,5 cm. Irrotettava.

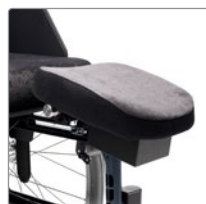

Amputaatiojalkatuki

Säädettävissä korkeuden, syvyyden ja kulman suhteen sekä sivusuunnassa. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Päällinen: Tummanharmaata plyysiä tai mustaa Dartexia.



Jalkalaudan jatkokappale

Lisää jalkalaudan syvyyttä. Kiinnitetään valmiiksi asennettuun jalkalautaan.



Amputaatiopaino

ehkäisee kaatumisriskiä alaraaja-amputoiduilla käyttäjillä ja parantaa kelausominaisuuksia. Voidaan yhdistää amputaatiopainoon.
Paino: 3 kg.




Jalkalaudan laajennuskappale

Lisää jalkalaudan leveyttä. Kiinnitetään valmiiksi asennettuun jalkalautaan. Sopii Cross XL -malliin, jonka istuinleveys on 52,5–60 cm.



Kelauspyörät:

20", 22" tai 24", sekä kevyt 24":n kelauspyörä. Umpi- tai ilmakumirenkaat. Kevyissä pyörissä on ilmakumiset korkeapainesisärenkaat.

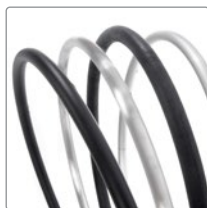

Kelausvanteet

Vaihtoehdot: muovipinnoite, vaahtokumi, alumiini, titaani ja ruostumaton teräs.



Yhden käden kelaus

Sopii tuolin vasemmalle tai oikealle puolelle. Ei voida yhdistää avustajan jarruun.



Tukipyörät:

4", 5", 6,5" tai 8".



Tukipyörän kulman säätöyökalu

Helpottaa pyörän oikean kulman löytämistä.



Camberkulma

Vakio 2°, valinnainen 0°.



Pinnasuojat

Harmaa tai keltainen väripainatus.



Kulmakahvalla varustettu jarru

Suurempi tarttumispinta. Väri: Musta



Kulmakahvalla varustettu jarru

Suurempi tarttumispinta. Väri: Punainen



Pidennetyllä kahvalla varustettu jarru

Jarruvivun kulmaa voidaan kallistaa eteenpäin, jotta sivuttain siirtyminen helpottuu.




Yhden käden jarru

Oikea- tai vasenkätinen. Voidaan yhdistää rumpujarrulliseen pyörään.



Avustajan jarru, vaihtoehto 1

Pienempi kahvajarru henkilöille, joilla on pienet kädet. Jarrukahvan ja jarruvivun etäisyys on 75 mm.

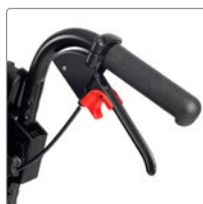


Avustajan jarrut

Jarrukahvan ja jarruvivun etäisyys on 100 mm.



Kiinteä istuin

Irrotettava. Lisävarusteena saatavana sopiva istuintyyny. Matala kiinnitys.

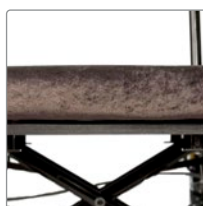

Asennussarja korkeaan kiinnitykseen, kiinteä istuin.


Välinsarja, jolla kiinteä istuin voidaan sovittaa samalle korkeudelle kuin istuimen putket.

Lisävarusteet ja vaihtoehdot, jatkoa



Istuintyynty

Anatomisesti muotoiltu istuintyynty. Pituus 56 cm. Leikattavissa haluttuun istuinsyvyyteen. Verhoilu: tummanharmaata plyysiä.

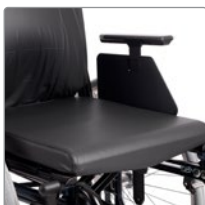

Istuintyynty hygieniapäällisellä

Varustettu hygieniapäällisellä. Hylkii vettä, voidaan pyyhkiä märällä liinalla, pesulämpötila 90 °C. Pituus 46 cm, leveys 35–40 cm, pituus 50 cm, leveys 42,5–60 cm.



Istuimen jatkokappale

Kiinnitetään istuimeen tarranauhoilla. Lisää istuimen syvyyttä 7 cm.




Jalkatukiputken päätysuoja

Suojus, kun jalkatukea ei käytetä. (Vain Cross 6 -malliin).



Teleskooppimallinen kaatumiseste

Ylöskäännettävä. Syvyys ja kulma säädettävissä. Sopii kaikkiin istuinkorkeuksiin.

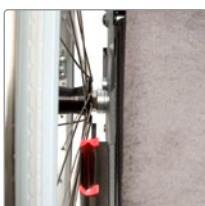

Istuimen levityssarja

Leventää käsitukien väliä 1 cm. Myös kokonaisleveys kasvaa 1 cm:n.



Levennetty etuhaarukan kiinnitys

Siirtää tukipyöriä 3 cm ulospäin. Tuolin kokonaisleveys ei muutu.



Levennetty etuhaarukan kiinnitys, lyhyt

4 ja 5 tuuman tukipyörille. Erittäin mataliin istuinkorkeuksiin.



Pöytälevy

Läpinäkyvä. Kiinnitetään pitkiin käsitukiin.



Pieni pöytälevy, taitettava

Syvyys ja leveys säädettävissä. Taittuu sivuttain. Kiinnitetään käsinojan kiinnittimiin. Korkeutta säädetään käsituen avulla.



Kiinnitysmekanismi turvalvaljaille

Asennetaan päätuen pidiketankoon.



Lannevyö

Pikalukolla, pituus säädettävissä. Rungossa kiinnityskisko.



Kepinpidike

Kaksi osaa; kuppiosa kiinnitetään toisen polkaisuputken sisäpuolelle ja joustava hihna kiinnitetään kepin ympärille.



IV-teline

Toimitetaan kiinnitysosien kanssa.





Etac on maailman johtava ergonomisten apuvälineiden sekä siirtämisen välineiden kehittäjä ja tuottaja. Erikoistuneiden tuotemerkkijemme kautta tarjoamme ensiluokkaisia tuotteita erilaisiin päivittäisiin tarpeisiin ja hoitoympäristöihin kaikissa elämänvaiheissa. Olipa kyseessä lapsi tai iäkäs ihminen, tavoitteemme on edistää yksilön toimintakykyä ja parantaa hoitohenkilökunnan työolosuhteita kestäväällä laadulla, toimivuudella ja muotoilulla.

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitetty tuotetiedot ovat osoitteessa www.etac.com