



# Etac Prio 3A

Toimintakykyä tukemaan

 **etac**<sup>®</sup>

# Yksilön toimintakykyyn pohjautuvat ratkaisut

Kun henkilö ei pysty omin voimin istumaan pyörätuolissa, otetaan usein käyttöön pyörätuolimalli, jonka istuin ja selkätuki voidaan kallistaa ja asettaa makuuasentoon. Tarkoituksena on parantaa tukea ja mukavuutta. Tämä voi kuitenkin tehdä pyörätuolin käyttäjästä turhan riippuvaisen toisten avusta.

Toisin kuin muut säädettävällä istuimella varustetut pyörätuolit, Prio 3A on paitsi mukava ja sopivan tukeva, myös suunniteltu optimoimaan käyttäjien omaan toimintakykyyn perustuvaa aktiivisuutta. Se voidaan mukauttaa tarvittaessa tilanteiden muuttuessa.

Kun pyörätuoli vaihtuu puoliaktiivisesta mallista aktiiviseen Prio 3A -malliin, sen antama tuki on astetta parempi. Hyvin tasapainotettu runko tekee tuolista turvallisen, ja keskikorkea selkätuki ja kallistuksen rajaus tukevat samalla itsenäistä toimintaa.

Jos tukea tarvitaan enemmän, pyörätuoliin voidaan lisätä vakaampi runkorakenne, korkea selkätuki ja enemmän istuimen säätömahdollisuuksia.

Prio 3A sopii hyvin kuntoutuville henkilöille, sillä sitä voidaan muokata käyttäjän toimintakyvyn mukaan.

Prio 3A tarjoaa muunneltavaa tukea ja mukavuutta.

## Ability Based Seating™

Etac-tuotteiden suunnittelun pohjalla on ajatus toimintakyvyn parantamisesta.

Pyörätuolimme ovat säädettävissä vartalon muodon mukaan; tavoitteenamme on maksimoida jokaisen yksilön mahdollisuus toimintaan ja liikkumiseen. Se puolestaan voi vahvistaa tasapainoa ja lisätä aktiivisuutta.

Tunnuslauseemme "Ability Based Seating™" kuvastaa tätä ajatusta.



Etac Cross 6

Kun toimintakyky paranee, puoliaktiiviseen pyörätuoliin siirtyminen tukee omatoimisuutta.

Puoliaktiivisen pyörätuolin vaihtaminen Prio 3A -malliin antaa pyörätuolin käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää tuolin säätöominaisuuksia ja ylläpitää liikkuvuttaan.



Etac Prio 3A (active-kokoonpano)

Prio 3A -pyörätuoli voidaan mukauttaa tilanteen mukaan toimintakyvyn edistämiseksi.

Prio 3A -kokoonpanon vaihtaminen aktiiviseen malliin mukavuuden ja tuen parantamiseksi.



Etac Prio 3A (comfort-kokoonpano)

Prio 3A varustettuna kaikilla mukavuutta ja tukea lisäävillä osilla.

## Vapauta toimintakykysi

Istumisen tarkoittaa muutakin kuin asentoa, painehoitoa ja mukavuutta. Pienetkin säädöt voivat vaikuttaa suuresti ihmisen toimintakykyyn.

Tällaisia tärkeitä toimintakyvyn parannuksia voivat olla esimerkiksi kyky kurottautua ottamaan kahvikuppi, kyky pitää päätä koholla ja tavoittaa katsekontakti tai kyky liikuttaa pyörätuolia niin, että voi olla kasvojen toisten kanssa.

Tunnuslauseemme "Ability Based Seating™" kuvastaa tätä ajatusmallia.

– Nyt on aika sanoa "Shape up" ja ottaa uusi askel toimintakyvyn tukemiseksi.



Shape up!

- Säädä 3A-selkätukea.
- Käytä dynaamista lantiotukea.
- Säädä hihnoja.
- Käytä hyväksesi Shape up -ratkaisuja.



## 3A-selkätuki

Huono istuma-asento kuluttaa voimia. Oikeanmallinen selkätuki tukee pyörätuolissa istuvan aktiivisuutta. Etac Prio 3A -mallissa on näppärä 3A-selkätuki, joka on helppo muuntaa käyttäjän tarpeiden mukaiseksi yksinkertaisilla säädöillä ja lisävarusteilla. Prio 3A on mukautettavissa aina tarpeen mukaan.



### Korkeussäädettävä selkätuki

Säätöväli on 46–62 cm.

Selkätuen jatkokappaleen kanssa 52–68 cm.



### Lantion asennon säätäminen

Säätöväli -12 – +10°



### Selkätuen kallistus

Säätöväli -3 – +20°  
(lisävarusteen kanssa 0 – +20°)



### Lantion takaosan dynaaminen tuki

Mukautettavissa sekä toimintaan että lepoon. Selkätukea kallistettaessa hihna löystyy automaattisesti niin, että lantio voi rentoutua ja kallistua hieman.

Toimii vain selkätukea kallistettaessa. Ei toimi sähköisen kallistuksen kanssa.

# Muokattavissa vartalon mukaiseksi

Ihmisillä on erilaiset vartalot, kyvyt ja tarpeet. Pyörätuolissa istuvan kannalta on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon ylävartalon muoto ja asento lantiosta ylöspäin. 3A-selkätukeen on mahdollista liittää toimivia lisävarusteita, joita ovat esimerkiksi kiilat, selkätuen levennysosa ja patentoitu 3D-pehmuste. Niiden avulla voidaan luoda kaikkiin suuntiin tilaa ja tukea aktiivisen käyttäjän tarpeisiin, mukaan lukien kyfoottinen ja epäsymmetrinen vartalo.

Lisätietoja erilaisten vartaloitten tukemisesta on sivustossa [www.etac.com](http://www.etac.com).

## Aktiivinen, mutta levon tarpeessa

Pyörätuolin käyttäjä voi olla toimintakykyinen, mutta kaivata silti lepoa ja mukavuutta.

Aktiivisuutta voidaan tukea kuljetuspyörien asennolla (1), kiinteillä jalkatuilla (2), keskikorkealla selkätuella ja selkätuen päällisellä (3). Selkätuen 3D-pehmuste puolestaan tarjoaa lisämukavuutta. Prio 3A-istuimen kallistusta voidaan säätää itsetoimivalla kallistusmekanismilla (4).



## Kyfoottinen ja epäsymmetrinen vartalo


Kyfoottiselle pyörätuolin käyttäjälle on tärkeää, että istuinalueella on riittävästi tilaa. Epäsymmetrinen vartalo vaatii tukemista eri puolilta.

Etacin tuotevalikoimassa on runsaasti vaihtoehtoja sopivan muodon ja tuen aikaansaamiseksi kyfoottiselle tai epäsymmetriselle vartalolle. Näitä ovat esimerkiksi säädettävä päätuki (1), lantion asennon säädöt selkätuessa (2), selkätuen 3D-pehmuste (3), joka soveltuu sekä kyfoottisen että epäsymmetrisen vartalon tukemiseen, dynaaminen lantiotuki (4) ja istuimen kulman lukitsin (5).

## Leveät hartiat

Leveäharteisen pyörätuolikäyttäjän mukavuutta voidaan parantaa leventämällä selkätukea sen sijaan, että selkätukea lasketaan.

Selkätukea voidaan leventää käyttämällä levennysosia (1), ja levennettyä muotoa voidaan täydentää mukavalla 3D-pehmusteella (2).

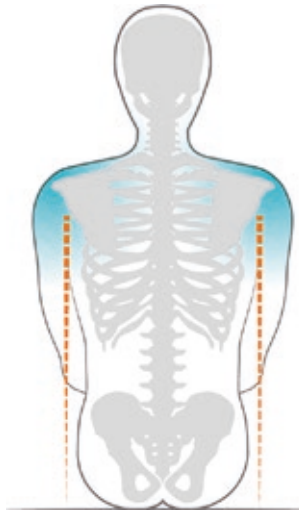

## Tuki ja mukavuus

Osa pyörätuolin käyttäjistä kaipaa hieman enemmän tukea ja mukavuutta.

Lisätukea ja -mukavuutta voidaan luoda esimerkiksi sivupehmusteilla (1) ja käsitukipehmusteilla (2), joita käytetään päätuon (3) ja selkätuen 3D-pehmusteen kanssa.

## Selkätuen pehmustevaihtoehdot



### Selkätuen pehmuste

Pehmeä ja joustava selkätuen pehmuste. Päälysvaihtoehdot harmaa plyysi tai harmaa hygienia-kangas.



### 3D-pehmuste

Kolmiosainen selkätuen pehmuste (3 paneelia), valmistettu pehmeästä plyysikan-kaasta. Antaa tukea ja mukautuu käyttäjän selän muotoon.



### Selkätuen päällinen

Ohut plyysipäällinen leventää selkätukea.

# Prio 3A

– riittää, että lantion leveys on tiedossa



Sopivan kokoisen pyörätuolin valintaan tarvitaan vain yksi tieto: lantion koko. Kaikki muu voidaan säätää käyttäjän tarpeiden mukaan.

Prio 3A tarjoaa enemmän mahdollisuuksia koota muoto- ja tukiratkaisuja sekä aktiiviseen/pystyasennossa istumiseen että levon aikaiseen rentoutumiseen. Pyörätuoli voidaan muokata täysin käyttäjän tarpeita vastaavaksi tekemällä säätöjä ja käyttämällä lisävarusteita. Nyt – ja myös jatkossa.

Tue toimintakykyä, äläkä anna periksi. Prio 3A -pyörätuoli auttaa saavuttamaan asento- ja aktiivisuustavoitteesi.

## Ominaisuudet



### Istuimen syvyys

Säätöväli 39–51 cm. Optimaalinen tasapainopiste on helppo löytää säätämällä kuljetus- ja tukipyöriä. Etuosan säätö 7 cm. Takaosan säätö 5 cm.



### Istuin- ja selkätukikallistus

Avustajan ohjattava istuinkallistuksen ( $-3^{\circ}(0^{\circ}) - +20^{\circ}$ ) ja selkätukikallistuksen ( $0 - +30^{\circ}$ ) säätö on vakiovaruste. Lisävarusteina on saatavana sähköinen kallistus ja käyttäjän ohjaama itsekallistus (vain istuinkallistus, ei selkätukikallistusta).



### Optimaalinen tasapaino

Valitse paras tasapainoasetus optimoimalla pyörän asento suhteessa istuimen syvyyteen.

## Shape Up -ratkaisut

Tarvittava tuki ja muoto on helppo koota muutamalla käteväällä lisävarusteella, jotka ovat vaivattomasti käden ulottuvilla.



### Selkätuen 3D-lisäpehmuste

Selkätuen 3D-pehmusteessa on kolme pehmustepaneelia, jotka on liitetty toisiinsa liukukankaalla. Muoto ja tuki voidaan optimoida joka suunnalta käyttäjän selän muodon mukaisesti. Selkätuen 3D-pehmuste on erinomainen ratkaisu kyfoottiselle tai epäsymmetriselle vartalolle.




### Selkätuen jatkokappale

Selkätuen jatkokappaleella ja yhdellä lisähihnalla voit pidentää selkätukea 6 cm. 3A-selkätuen jatkokappaleen avulla selkätuen korkeutta voidaan lisätä 68 cm:iin asti.



### Selkätuen levennysosa

Leveäharteisen pyörätuolikäyttäjän mukavuutta ja vakautta voidaan parantaa käyttämällä selkätukea leventäviä pidikkeitä. Selkätuen 3D-pehmusteen avulla voit tehdä uudesta kokoonpanosta mukavamman.

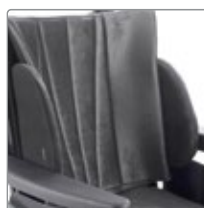

### Pehmeät sivutuet

Vartaloa ympäröivään tukeen voidaan yhdistää kaikkia pehmustevaihtoehtoja. Voit muokata tukea kahteen eri muotoon kiertämällä sitä. Tuki asetetaan käsituen tai sivustoppareiden varaan. Myydään yksittäiskappaleina.



### Paineenjakkaja

Joustava, mutta kiinteä paineenjakaja voidaan kiinnittää paineherkkiin kohtiin.



### Kaasujousien klipsit

Näiden klipsien avulla voidaan rajoittaa istuimen kallistusta ja selkätuen kulmaa. Erinomainen ratkaisu henkilölle, jonka raaja on amputoitu korkealta, tai jos kuljetuspyörät on siirretty eteenpäin käytön helpottamiseksi.



### Kiilat

Velcro-kiinnityksillä varustetut pehmeät kiilat, plyysikiilat ja solumuovikiilat ovat helppo ja nopea tapa koota oikea muoto ja tuki.



### Sivutyynyt vaatesuojiin

Päällinen lisää mukavuutta ja kaventaa käsinojien välissä olevaa istuinalueetta noin 1,5 cm puolta kohden. Kiinnitetään sivusuojiin.

Istuimen leveys / malli	Istuimen syvyys	Kokonaisleveys	Kuljetusleveys	Paino
40 cm / 13420405	39–51 cm	59 cm	56 cm	33,0 kg
45 cm / 13420409	39–51 cm	64 cm	61 cm	33,3 kg
50 cm / 13420413	39–51 cm	69 cm	66 cm	33,6 kg
55 cm / 13420417	39–51 cm	74 cm	71 cm	33,9 kg


Paino- ja mittatiedot ovat pyörätuolille, jossa on pikakiinnityskeskellä varustetut 24" umpikumiset kuljetuspyörät, ruostumatonta terästä olevat kelausvanteet, poikittaistangolla varustettu selkätuki, jalkatuet, jalkalaudat, kantapäähihnat, jarrut, käsituet ja keskikokoisilla haarukoilla varustetut 6,5" tukipyörät. Tiedoissa voi olla vaihtelua ± 2 %.

<b>Selkätuen korkeus</b> 46–62 cm 6 cm:n jatkokappaleen kanssa 52–68 cm	<b>Tasapainopisteet</b> 20°, 22° ja 24° pyörillä varustetuissa Etac Prio -tuoleissa on kolme vaihtoehtoista tasapainoasetusta kutakin istuin korkeutta varten.	<b>Kuljetuspaino</b> 22,9–23,8 kg ilman käsituksia, nostettavia jalkatukia, säärätukia ja kuljetuspyöriä.
<b>Kallistuskulma</b> -3 – +20°	<b>Kokonaispaino</b> Paino koskee pyörätuolia, jossa on käsituet, nostettavat jalkatuet, säärätuet, kuljetuspyörät ja kaatumissuojat.	<b>Käyttäjän enimmäispaino</b> 135 kg
<b>Selkätuen kallistuksen säätöväli</b> 0 – +30°	<b>Istuimen korkeus</b> 20°, 22° ja 24":n kuljetuspyörien kanssa: 38–52,5 cm. 16" kuljetuspyörien kanssa: 40–45 cm.	

# Lisävarusteet ja vaihtoehdot

Valitse laajasta lisävarustevalikoimastamme ja muokkaa Etac Prio 3A -pyörätuolista mieleisesi.

Lisätietoja eri varusteista ja vaihtoehdoista on saatavana osoitteesta [www.etac.com](http://www.etac.com), sekä tuotekohtaisista tiedoista.

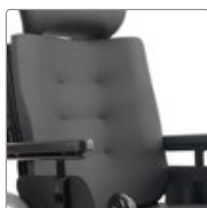

## Selkätuen pehmuste

Pehmeä ja joustava selkätuen pehmuste kiinnitetään Velcro-tarroilla. Sopii yhdistettäväksi sivutyynyihin ja kiiloihin. Päällinen: harmaa plyysi tai harmaa hygieniakangas.



## Selkätuen 3D-lisäpehmuste

Ainutlaatuinen selkätuen pehmuste antaa tukea ja tilaa kyfoottiselle tai epäsymmetriselle vartalolle. Velcro-kiinnitys. Pehmusteeseen on mahdollista yhdistää sivutyynyjä ja kiiloja. Päällinen: harmaa plyysi.



## Selkätuen päällinen.

Ohut päällinen leventää selkätukea. Siihen on mahdollista yhdistää sivutyynyjä ja kiiloja. Päällinen: harmaa plyysi.



## Lantion takaosan dynaaminen tuki

Hihna löystyy automaattisesti, kun selkätukea kallistetaan taaksepäin, ja kiristyy uudelleen, kun selkätuki nostetaan pystyasentoon. Erinomainen keino yhdistää aktiivisuus ja lepo. Lantiohihnan pituus on tarkasti säädettävissä.




## Selkätuen pehmusteen jatkokappale

Pidennä korkean selkätuen pehmustetta ja lisää tukipinta-alaa jatkokappaleella, joka peittää selkätuen pehmusteen ja istuimen välisen raon. Päällinen: harmaa hygieniakangas.



## Selkätuen päällisen jatkokappale

Selkätuen päällisen jatkokappale peittää huomaamattomasti istuimen ja pitkäksi säädetyin selkätuen välissä olevan raon. Käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjällä on inkontinenssisuoja. Selkätuen päällinen antaa myös lisätukea istuintyynylle.

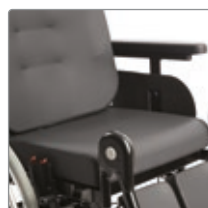

## Istuintyyny, basic

Basic-istuintyynyn takaosa on muotoiltu mukavaksi. Päällinen: harmaa plyysi tai harmaa hygieniakangas.



## Istuintyyny, Comfort

Comfort-tyynyssä on hieman madallettu takaosa. Tyynyssä on vakautta parantava viskoelastinen vaahtomuovityyte, ja myös reisitukien reunat on muotoiltu. Päällinen: harmaa plyysi tai harmaa hygieniakangas.



## Kiinteä istuin

Saatavana puisena tai muovisena.



## Istuimen tarrakiinnityssarja

Kiinnitetään kiinteään istuimeen ja istuintyynyn alapuolelle.



## Päätuki

Säädettävissä korkeus-, syvyys- ja sivusuunnassa. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Päällinen: harmaa plyysi tai harmaa hygieniakangas.



## Sivutuella varustettu päätuki

Säädettävä korkeus, syvyys, kulma ja sivusuunta. Päällisen voi irrottaa ja pestä. Päällinen: harmaa hygieniakangas.





### R82, anatominen päätuki

Anatominen muotoilu, varustettu sivutuilla. Pehmustettu tuki miellyttävällä päällisellä. Korkeus, syvyys, kulma ja sivusuunta ovat säädettävissä. Päällisen voi irrottaa ja pestä.



### Muistitoiminto

Päätuki voidaan varustaa muistitoiminnolla, joka auttaa varmistamaan oikean asennuksen, kun irrotettu päätuki asennetaan takaisin paikalleen.



### Käsituki

Säädettävä korkeus ja syvyys, irrotettava. Pituus: 49 cm  
Korkeus: 23,5–35 cm



### Käsituki, kapea

Auttaa pyörätuolissa istuvaa ulottumaan kelausvanteisiin paremmin. Säädettävä korkeus, irrotettava malli. Pituus: 38 cm  
Korkeus: 21–32,5 cm



### Pehmeä käsitukisuojaus

Pehmuste saatavana tavallisiin ja kapeisiin käsinojiin. Päällinen: harmaa plyysi.



### Hemikäsituki

Säädettävä kallistuskulma. Korkeus asetetaan käsituen mukaan. Sopii kapeaan käsitukeen. Päällinen: pehmustettu, irrotettava, harmaa plyysi.



### Sivutyynyt vaatesuojiiin

Kaventaa istuimen leveyttä 2,5 cm. Kiinnitetään sivulevyihin. Myydään yksittäiskappaleina. Päällinen: harmaa hygieniakangas.



### Pöytälevy

Läpinäkyvä, kiinnitetään käsitukiin.



### Hemiplegiapotilaan pöytälevy

Kiinnitetään käsituen pehmusteisiin Velcro-tarroilla (sisältyvät toimitukseen). Sopii sekä lyhyeen että kapeaan käsitukeen. Saatavana 50 cm:n istuinleveyteen asti. Valinnaisena lisävarusteena on saatavana liukuestealusta.



### Levennyssarja

Käsitukien väliin voidaan tehdä 2 cm lisää tilaa käyttämällä levennyssosia.



### Jalkatuki, säädettävä

Sivuun käännettävä, irrotettava. Taittavat, syvyys- ja korkeussäädettävät pohjetuet. Päällinen: harmaa hygieniakangas.



### Jalkatuki, Cross

Sivuun käännettävä ja irrotettava. Saatavana 90 tai 70 asteen kulmalla. Jos käytössä on 90 asteen kulma, suosittelemme levennettyjä tukipyörän haarukoita.



### Jalkalauta

Korkeus ja kulma säädettävissä. Voidaan muokata kääntämällä eri syvyyteen. Pituus: 13 cm.



### Kantapäähihna

Pituus säädettävissä. Ei sovi jalkatuen jatkokappaleeseen.



### Jalkatuen jatkokappale, yksiosainen

Yksiosainen alusta, joka asennetaan alkuperäisiin jalkalautoihin. Saatavana yksi koko: S-koko 250 x 225 mm.

*Käytä levennettyjä tukipyörän haarukoita.*



### Pohjehihnan pehmuste

Irrotettava. Saatavana pituudet 20, 30 ja 40 cm.



### Jalkalautojen jatkokappaleet

Asennetaan alkuperäisiin jalkalautoihin. Käytä erikseen tai kiinnitä yhteen niin, että muodostuu yhtenäinen alusta.

Saatavana kaksi kokoa:

M-koko 150 x 225 mm, L-koko 200 x 225 mm.

*Käytä levennettyjä tukipyörän haarukoita.*



### Pehmustettu pohjetuki

Pehmeä, lämmin ja mukava, Tarranauhoilla säädettävä. Kiinnitetään kiinteään tai nostettavaan jalkatukeen. Saatavana kaksi kokoa: 70 cm ja 90 cm.



### Jalkalaudan sivusuoja

Sivusuoja kiinnitetään lisäosana käytettäviin jalkalautojen jatkokappaleisiin estämään jalan joutuminen tukipyörän ja jalkalaudan väliin.

Myydään yksittäiskappaleina.



### Distaalinen reisituki

Auttaa pitämään reidet suorana ja polvet neutraalissa asennossa sekä kontrolloimaan jalkojen erkanemistä.



### Jalkatukisuoja

Asennetaan alkuperäisiin jalkalautoihin.

Saatavana kaksi kokoa:

M-koko istuinleveyksiin 40–45 cm,

L-koko istuinleveyksiin 50–52,5 cm.

*Käytä levennettyjä tukipyörän haarukoita.*



### Abduktiokiila

Irrotettava, korkeus ja syvyys säädettävissä.

Päällinen: harmaa hygieniakangas.



### Pidennetty jalkalauta

Sopii Cross-jalkalautaan.

Pituus: 21 cm.



### Amputaatiotuki

Korkeus, syvyys, kulma ja sivusuunta säädettävissä. Sopii sekä vasemmalle että oikealle puolelle. Vaihtoehtona plyysi tai hygieniakangas.



### Jalkalaudan päällinen

Plyysipäällinen tuo lisämukavuutta



### Vartalotuki, käännettävä

Säädettävä korkeus, syvyys ja leveys. Käsituen voi irrottaa, kun sivuosa käännetään ulos. Erinomainen ratkaisu sivuttaisiin siirtoihin. Pehmuste: polyuretaania.



### Pohjehihna

Pituus säädettävissä, irrotettava.



### Vartalotuki, säädettävä

Korkeus, syvyys ja leveys säädettävissä. Helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja. Pehmuste: polyuretaania.



### Vartalon tuen päällinen

Vartalon tuen päällinen, harmaata plyysiä, sisältää pienen, suoran pehmusteen.



### Pehmeä sivutuki

Vartaloa ympäröivä tuki. Voidaan muokata kahteen eri muotoon kiertämällä, tai yhdistää sivustoppariin. Myydään yksittäiskappaleina. Päällinen: harmaa plyysi.



### Sivustoppari, suora, 3A

Sivustoppari kiinnitetään 3A-selkätukeen. Siihen voi yhdistää kiiloja tai pehmeän sivutuen. Syvyys ja korkeus säädettävissä. Myydään yksittäiskappaleina.




### Paineenjakaaja

Jakaa selkätukiprofiilin tuottaman paineen tasaisemmin. Voidaan käyttää myös selkätuen leventämiseen. Myydään yksittäiskappaleina.



### 3A-selkätuen levennysosa 30 mm

Selkätuen levennysosa kiinnitetään 3A-selkätukeen, ja sen aikaansaama levennys on 30 mm sivua kohden. Sen kanssa voi käyttää kiiloja, paineenjakajia ja isompaa päällistä. Myydään yksittäiskappaleina.

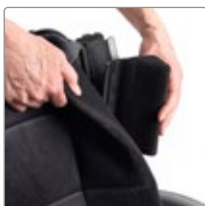

### Selkätukikiilat

Pehmeä kiila, joka kiinnitetään tarranauhoilla päällisen alle. Sopii käytettäväksi suoran sivustopparin tai levennysosan kanssa. Myydään yksittäiskappaleina. Kaksi kokoa: pituus 15 cm ja 30 cm. Päällinen: tummanharmaa veluuri.



### Tukikiilat

Solumuovia, tarrakiinnitys. Myydään pareittain. Saatavana kolme kokoa: Pituus x leveys x korkeus: S-koko: 13 x 9,5 x 2 cm M-koko: 19 x 12 x 2 cm L-koko 20 x 17 x 2,5 cm.



### Selkätuen levennysosa

Leventää selkätukea niin, että selkätuen profiilin tuottama paine jakautuu tasaisemmin. Myydään settinä, johon sisältyy lisäksi kaksi hihnaa kiristyksen säätämiseen. Sopii vain istuinleveyksiin 40 cm ja 45 cm.



### Selkätuen jatkokappale 3A

Pidentää 3A-selkätuen profiilia 6 cm. Selkätuen jatkokappaleen kanssa 3A-selkätuen korkeudeksi saadaan enintään 68 cm.




### Kaasujousien klipsit

Kukin klipsi pienentää kallistuskulmaa 2° tai selkätuen kulmaa 2,5°. Hyödyllinen tilanteissa, joissa toivotaan aktiivisempaa tasapainoa. Työkaluja ei tarvita. Sopii vain manuaaliseen kallistamiseen Etac Prio -pyörätuolissa.




### Lantiovyö

Pikalukolla, säädettävä pituus. Kaksi vaihtoehtoista kiinnityskohtaa rungossa. Kaksi pituusvaihtoehtoa: 100 cm ja 128 cm.

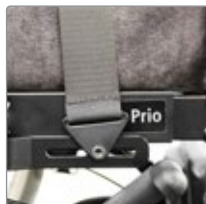

### Lantiovyön etuosan kiinnitys

Nelipistevyön kiinnittämiseen etupuolelle. Vaihtoehtoisesti sitä voidaan käyttää kaksipistevyön kiinnittämiseen. Myydään pareittain.

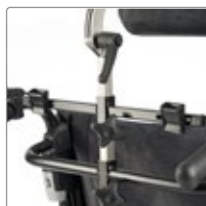

### Rintakehävyön pidike

Käytetään päätuen kanssa.



### Sähköinen kallistus

Selkätuen ja istuimen sähköinen kallistus on saatavana joko valmiiksi asennettuna tai lisävarusteena. Sitä ei voi käyttää yhdessä lantion takaosan dynaamisen tuen, Comfort-lukon, lukitustapin, selkätuen pikakiinnittimen, kaasujousien klipsien ja/tai korin kanssa.




### Turvareuna

Tarkoitettu kiinnitettäväksi 16 tuuman Transit-pyörillä varustettuun Prio-pyörätuoliin sähköisen kallistuksen kanssa.



### Käyttäjän ohjaama itsekallistus

Antaa toimintakykyiselle käyttäjälle mahdollisuuden hallita itsenäisesti istuimen kulmaa lepoa ja toimintaa varten. Voidaan käyttää vain istuimen kallistustoiminnon kanssa.

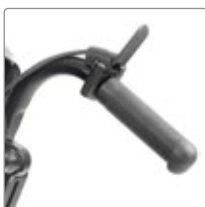

### Työntökahvat

Korkeus säädettävissä, irrotettava, kädensijoissa liukumattomat päälliset. Voidaan yhdistää avustajan jarruun.



### Työntökaari

Säädettävä korkeus, irrottavissa. Voidaan yhdistää avustajan jarruun.

Saatavana myös kulmasäädettävänä istuinleveyksille 40 cm, 45 cm ja 50 cm.



### Avustajan jarru

Varustettu liukumattomilla kädensijoilla. Jarrukahvan ja jarruvivun etäisyys on 10 cm.



### Kulmakahvalla varustettu jarru

Suurempi tarttumispinta. Väri vaihtoehdot: musta tai punainen. 20", 22" ja 24":n kuljetuspyörille.



### Pidennetty jarrukahva

Jarruvivun kulmaa voidaan kallistaa eteenpäin, jotta sivuttain siirtyminen helpottuu.



### Yhden käden jarru

Yhden käden jarru on asennettavissa oikealle tai vasemmalle sivulle. Se voidaan yhdistää avustajan jarruun. Sopii 22" ja 24" pyöriin.



### Vivun lukituslaite

Estää selkätuen kallistuksen aktivoitumisen. Kun haluat säätää asentoa, vedä lukituslaitetta ylöspäin. Lukitse painamalla uudelleen alas.




### Comfort-lukko

Tällä toiminnon varmistetaan sama esiasetettu kallistus. Asetusvaihtoehtoja on neljä: 0°, 4°, 8° tai 12°. Valitse yksi usein käytetty asento toimintaa tai lepoa varten. Ei sovi käytettäväksi Etac Prio -pyörätuolin sähköisen kallistuksen kanssa.



### Lukitustapin pikakiinnitys selkätukeen.

Selkätuen kokoontaittamisen helpottamiseksi alkuperäinen tappi voidaan vaihtaa pikakiinnittimeen. Ei sovi käytettäväksi Etac Prio -pyörätuolin sähköisen kallistuksen kanssa.

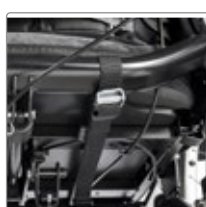

### Selkätuen kulman ohjain

Rajoittaa Prio-pyörätuolin selkätuen kallistusta eteenpäin, kun valitaan aktiivista istuimen asentoa.



### Yhden käden kelaus

Sopii tuolin vasemmalle ja oikealle sivulle. Umpinainen sisärenkas. Kelausvanteessa vinyylipinnoite. Ei voida käyttää avustajan jarrun, yhden käden jarrun, levennyssetin tai korin kanssa.



### Istuimen lisäkorkeudet 16 tuuman kuljetuspyörille

Etäisyys, joka mahdollistaa kaksi istuimen lisäkorkeutta 16 tuuman kuljetuspyörille: 40 cm ja 42,5 cm.



### Kuljetuspyörät

20", 22" tai 24". Umpi- tai ilmakumirenkaat. Pikakiinnityskeskio, kelausvanne alumiinia, muovia tai ruostumatonta terästä. 16" Transit-pyörät. Tavallinen Prio-tuolin pyörä lisää istuimen leveyttä vain 19 cm. Säädettävän kelausvanteen kanssa se lisää istuimen leveyteen 21 cm.



### Tukipyörät

6", 7" tai 8".



### Levennetty etuhaarukan kiinnitys

Siirtää tukipyörää 3 cm ulospäin. Tuolin kokonaisleveys ei muutu.



### Pinnasuojat

Harmaa tai keltainen väripainatus.



### Teleskooppimallinen kaatumiseste

Ylöskäännettävä, pituus, syvyys ja kulma säädettävissä. Sopii kaikkiin istuinkorkeuksiin.



### IV-teline

Toimitetaan kiinnitysosien kanssa. Ei voida käyttää pöytälevyn kanssa.



### Kori happipullolle

Voidaan käyttää myös kuljetuskorina. Korja ei voi käyttää yhdessä Etac Prio -pyörätuolin sähköisen kallistuksen kanssa.



### Työkalusarja

Sisältää kaikki tarpeelliset työkalut: kuusiokoloavain 3, 4, 5 ja 6 mm, rengasavain 8, 10, 13 ja 17 mm, hylsyavain 19/24 mm.

# Jalkalautajärjestelmä

Jalkalautajärjestelmä on lisäosa, joka kannustaa liikuttamaan jalkoja

Pienikin jalkojen liikuttelu edistää pyörätuolissa istuvan verenkiertoa ja aktivoi raajoja lonkasta alaspäin. Siitä on apua liikkumattomuuden aiheuttamaan levottomuuteen, kipuun ja epämukavuuden tunteeseen. Pienistä liikkeistä on erityisen paljon apua, jos pyörätuolin käyttäjä on aiemmin liikkunut kävellen.



*Jalkalaudan pinta-alaa voidaan lisätä jalkalautojen jatkokappaleilla ja jalkatukisuojailla, jotka kiinnitetään alkuperäisiin jalkalautoihin. Distaalinen reisituki auttaa pitämään reidet suorana ja polvet neutraalissa asennossa sekä kontrolloimaan jalkojen erkanemistä. Lisäosana toimitettavat jalkatuet on helppo kääntää pois tieltä henkilön siirtyessä pyörätuoliin tai siitä pois. Jalkatukisuoja on kiinteä. Siinä on painetta vähentävät pehmusteet, ja se auttaa hellävaraisesti asettamaan jalat mukavammin. Lisäosat ovat saatavana lisävarusteina, eivätkä ne kuulu alkuperäiseen kokoonpanoon.*







Etac on maailman johtava ergonomisten apuvälineiden sekä siirtämisen välineiden kehittäjä ja tuottaja. Erikoistuneiden tuotemerkkijemme kautta tarjoamme ensiluokkaisia tuotteita erilaisiin päivittäisiin tarpeisiin ja hoitoympäristöihin kaikissa elämänvaiheissa.

Viimeisimmät uutiset ja jatkuvasti päivitettyt tuotetiedot ovat osoitteessa [www.etac.com](http://www.etac.com)