



WC-/suihkupyörätuoli

Malli McWet 8013039 / 8013040 /
8013041 / 8014041

Käyttöohje



MEYRA®

Inhalt

Käytettyjen tunnusmerkkien merkitykset	5
Johdanto	5
Malliluettelo	5
Käytön aiheet / käytön esteet	6
Vastaanottaminen	6
Käyttötarkoitus	6
Käyttö	7
Toimitustapa	7
Mukautus	7
Yhdistäminen muiden valmistajien tuotteisiin	8
Uudelleenkäyttö	8
Käyttöikä	8
Yleiskuva	9
Malli: 8013039 / 8013040 / 8013041 / 8014041	9
Asennus	10
Painojarrujen säätö	11
Painojarrujen hienosäätö	11
Jarrut	12
Painojarru	12
Jarrujen kytkeminen	12
Jarrujen vapauttaminen	12
Käyttöjarru	12
Lukittavat ohjaavat pyörät	13
Astinlauta	14
Astinlaudan kääntäminen ylös	14
Käsinojat	14
Käsinojan kääntäminen ylös	14
Käsinojen kääntäminen alas	14

Istuinpehmuste	15
Istuinpehmusteen irrottaminen	15
Istuinpehmusteen asettaminen paikoilleen	15
Irrotettavan pehmusteen asettaminen	15
Irrotettavan pehmusteen irrottaminen	15
Wc-kansiosa	16
Pyörät	17
24-tuumaiset käyttöpyörät	17
Pikakiinnitysakseli	17
Perustason turvallisuusilmoituksia	18
Avustaja	19
Siirtyminen pois wc-/suihkupyörätuolista	19
Esineisiin tarttuminen	19
Alamäet, ylämäet ja kaltevat alustat	19
Esteiden ylittäminen	20
Wc-/suihkupyörätuolin lastaaminen ajoneuvoon	20
Kuljetus ajoneuvoissa	20
Tyhjän wc-/suihkupyörätuolin valmistelu kuljetusta varten	21
Henkilökuljetus ajoneuvossa	21
Matkustus julkisilla kulkuneuvoilla	21
Julkisessa liikenteessä ajaminen	21
Puhdistus	21
Pinnoite	21
Desinfointi	22
Korjaukset	22
Kuntoonpano	22
Huolto	22
Varaosat	22
Tavallista pidempiä käyttötaukoja koskeva ohje	22
Hävittäminen	23
Huolto	23
Huoltotyöt	23
Huoltokaavio	24

Tekniset tiedot	26
Renkaiden täyttöpaine ilmarenkaissa	26
Sovelletut standardit	26
Tekniset lisätiedot mallille 8013039 McWet	27
Tekniset lisätiedot mallille 8013040 McWet	28
Tekniset lisätiedot mallille 8013041 McWet	29
Tekniset lisätiedot mallille 8014041 McWet	30
Tyypikilvessä olevien symbolien merkitys	31
Tarkastustodistus	32
Takuusuoritukset/takuu	33
Vastuu- ja takuulomake	34
Tarkastustodistus luovutusta varten	34
Muistiinpanot	35

KÄYTETTYJEN TUN- NUSMERKINTÖJEN MERKITYKSET

Värillisellä taustalla näkyviä turvallisuusilmoituksia on ehdottomasti noudatettava!

- ☞ Tämä symboli tarkoittaa ohjeita ja suosituksia.
- [] Viittaus kuvanumeroon.
- () Viittaus toimintoelementtiin kuvassa.

JOHDANTO

Lue tämä asiakirja ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Lasten ja nuorten on luettava tämä asiakirja tarpeen mukaan ennen ensimmäistä käyttökertaa vanhempien tai hoitajan tai saattajan kanssa.

Jälleenmyyjän tulee lisäksi opastaa wc-/suihkupyörätuolin käytössä.

Tämä käyttöohje auttaa sinua osaltaan wc-/suihkupyörätuolin käsittelyyn tutustumisessa ja onnettomuuksien välttämässä.

- ☞ Käyttöohjeessa esiintyvät varustevaihtoehdot saattavat poiketa ostamasi mallin varusteista.

Sen vuoksi se sisältää myös lisätarvikkeita käsitteleviä lukuja, jotka eivät välttämättä koske juuri sinun wc-/suihkupyörätuoliasi. Luettelo saatavana olevista lisätarvikkeista ja -varusteista on wc-/suihkupyörätuolin tilauslomakkeessa.

Näkövammaisille käyttäjille on tarjolla PDF-tiedostoja ja lisätietoja tuotteistamme sivustossamme osoitteessa

< www.meyra.com >.

- ☞ Käänny tarvittaessa valtuutetun jälleenmyyjän puoleen.

Näkökyvyltään rajoittuneet henkilöt voivat myös pyytää avustajaa lukemaan ohjeet ääneen.

Käy säännöllisesti tarkistamassa lisätietoja tuotteiden tuoteturvallisuudesta ja mahdollisista takaisinkutsuista kohdasta < *Infozentrum* > (Tietokeskus) verkkosivuiltamme: < www.meyra.com >.

Olemme kehittäneet tuotteen, joka täyttää lääkinnälliselle tuotteelle määritetyt tekniset ja lakisääteiset ehdot. Mikäli käytön aikana kuitenkin esiintyy vakava haittatapahtuma, ilmoita siitä sähköpostiosoitteeseemme < info@meyra.de > ja raportoi se jäsenmaasi vastaavalle viranomaiselle.

MALLILUETTELO

Tämä käyttöohje koskee seuraavia malleja:

Malli 8013039

Malli 8013040

Malli 8013041

Malli 8014041

KÄYTÖN AIHEET / KÄYTÖN ESTEET

Jos wc-/suihkupyörätuolin käytön aikana ilmenee allergisia reaktioita, ihon punoitusta ja/tai painaumuksia, on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Wc-/suihkupyörätuoli helpottaa henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista itsenäisesti henkilöillä, joilla on muita kuin pakottavia sairauden aiheuttamia liikkumisrajoitteita (kävelykyvyttömyys tai kävelykyvyn voimakas rajoite).

Wc-/suihkupyörätuolia ei saa käyttää seuraavissa tapauksissa:

- istumiskyvyttömyys.

Wc-/suihkupyörätuolia saa käyttää vain henkilökohtaisen avustajan tuella seuraavissa tapauksissa:

- kognitiiviset häiriöt ja älyllinen kehitysvammaisuus, jotka sulkevat pois wc-/suihkupyörätuolin itsenäisen käytön
- lääkityksen vaikutus (keskusteltava lääkärin tai farmaseutin kanssa)
- vakavat tasapaino-ongelmat ja/tai aistihäiriöt
- Käsien ja jalkojen koukistumat, jotka estävät wc-/suihkupyörätuolin turvallisen käytön
- Käsien tai jalkojen amputaatiot.
 - ☞ Kysy näistä ja tuotteeseen liittyvistä muista mahdollisista riskeistä lääkäriltä, terapeutilta tai jälleenmyyjältä.

VASTAANOTTAMINEN

Kaikkien tuotteidemme virheettömyys tarkastetaan tehtaalla ja tuotteet pakataan erikoislaatikoihin.

- ☞ Pyydämme kuitenkin tarkastamaan wc-/suihkupyörätuolin välittömästi sen jälkeen, kun se on vastaanotettu – mieluiten tavarantoimittajan läsnä ollessa – jotta mahdolliset kuljetuksen aikana syntyneet vauriot havaitaan mahdollisimman nopeasti.
- ☞ Wc-/suihkupyörätuolin pakkaus tulee säilyttää mahdollisesti myöhemmin tarvittavaa kuljetusta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Wc-/suihkupyörätuoli on liikuntarajoitteisille tarkoitettu apuväline suihkussa ja wc:ssä käyntiin.

Wc-/suihkupyörätuolia saa käyttää vain sisätiloissa.

Wc-/suihkupyörätuoli on tarkoitettu ainoastaan yhden istuvan henkilön käyttöön, eikä sitä saa käyttää vetovälineenä, kuljetusvälineenä tms.

KÄYTTÖ

Älä milloinkaan koske pyörivien pyörien puoliin tai kitkapintoihin. – Loukkaantumisvaara!

Älä työnnä kättäsi painojarrun ja renkaiden väliin ajaessasi wc-/suihkupyörätuolilla. – Loukkaantumisvaara!

Vältä liikkumista takaperin wc-/suihkupyörätuolilla. – Kaatumisvaara!

Älä milloinkaan käytä wc-/suihkupyörätuolia ilman paikoilleen asennettuja jalkatukia ja käsinojajyksiköitä!

Wc-/suihkupyörätuoli on asetettava tasaiselle ja vakaalle alustalle ja sitä voi käyttää seuraavissa tiloissa:

- sisätiloissa (esim. asunnossa, päiväkodissa)
- Älä koskaan altista wc-/suihkupyörätuolia ääriämpötiloille ja vahingollisille ympäristöolosuhteille, kuten auringonvalolle, äärimmäiselle kylmyydelle ja suolapitoiselle vedelle.
- Suola ja muut likahiukkaset voivat kiinnittyä liikkuviin osiin ja estää niiden toiminnan.
- Ohjaa wc-/suihkupyörätuolia ainoastaan käyttöpyörien kelausvanteista.

Älä istu wc-/suihkupyörätuolissa kannettava, jos sitä nostetaan lattiatasolta. Pyörätuolin rakenneosat, joita ei ole kiinnitetty pysyvästi, esim. sivutuet tai jalkatuet, voivat irrota ja aiheuttaa putoamisen pyörätuolista.

☞ Wc-/suihkupyörätuoli on pyörätuoli, eikä kantoväline.

Käytä wc-/suihkupyörätuolia vain luvussa *Tekniset tiedot* sivulla 26 annettujen tietojen ja raja-arvojen mukaisesti.

TOIMITUSTAPA

Wc-/suihkupyörätuoli toimitetaan helposti koottavina osina.

☞ Katso tätä varten lukua *Asennus* sivulla 10.

MUKAUTUS

Anna aina jälleenmyyjän suorittaa kaikki mukautus-, asennus- ja korjaustyöt.

Wc-/suihkupyörätuoli voidaan sovittaa henkilökohtaisiin mittoihin sopivaksi. Ennen ensimmäistä käyttöä jälleenmyyjän tulee sovittaa wc-/suihkupyörätuoli käyttäjää varten ja kertoa sen toiminnoista. Tarkista wc-/suihkupyörätuolin toiminta ennen ensimmäistä käyttökertaa.


☞ Suosittelemme pyörätuolin sopivuuden säännöllistä tarkastamista, jotta se sopii käyttäjälle aina optimaalisesti myös sairauden tai vammojen muuttuessa. Erityisesti kasvuikäisillä käytettäessä suositellaan pyörätuolin säätämistä 6 kuukauden välein.

YHDISTÄMINEN MUI- DEN VALMISTAJIEN TUOTTEISIIN

Wc-/suihkupyörätuolin kaikenlainen yhdistäminen muiden kuin meidän toimittamiemme osien kanssa katsotaan wc-/suihkupyörätuoliin tehdyksi muutokseksi. Yhdistelmän voi hyväksyttää meillä.

UUELLEENKÄYTTÖ

Wc-/suihkupyörätuoli on uudelleenkäytettävä. Moduulirakenteensa ansiosta wc-/suihkupyörätuoli voidaan mukauttaa erilaisten käyttäjien vammojen ja mittojen mukaan. Wc-/suihkupyörätuoli on tarkastettava perusteellisesti ennen jokaista uudelleenkäyttöä.

 Uudelleenkäytön edellyttämät hygieniset toimenpiteet on tehtävä validoidun hygieniasuunnitelman mukaisesti ja niihin on kuuluttava desinfiointi.

Erikoistuneelle jälleenmyyjälle tarkoitetut huolto-ohjeet sisältävät tietoja wc-/suihkupyörätuolin uudelleenkäyttämisestä ja uudelleenkäyttämistiheydestä.

KÄYTTÖIKÄ


Wc-/suihkupyörätuolin odotettavissa oleva keskimääräinen käyttöikä on 4 vuotta, jos sitä käytetään määräysten mukaisesti ja kaikkia huolto- ja kunnossapitomääräyksiä noudatetaan. Wc-/suihkupyörätuolin käyttöikä riippuu sekä käyttökertojen tiheydestä, käyttöolosuhteista että hoidosta. Wc-/suihkupyörätuolin käyttöikää voi pidentää käyttämällä varaosia. Varaosia on saatavilla tavallisesti vielä 5 vuotta mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen.

 Ilmoitettu normaali käyttöikä ei merkitse käyttöikää koskevaa lisätakuuta.

YLEISKUVA

Malli: 8013039 / 8013040 / 8013041 / 8014041

Yleiskatsaus näyttää tärkeimmät komponentit ohjauslaitteet.

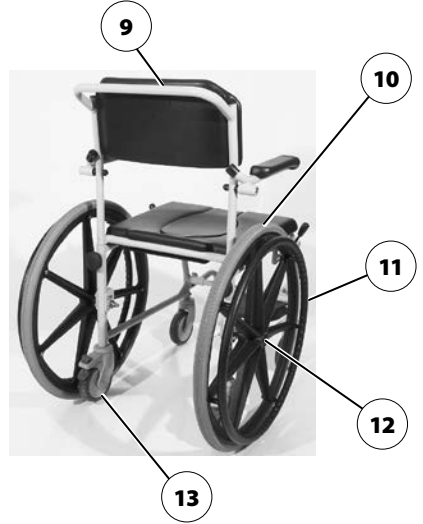

Kohta Osa

- | | | | |
|-----|----------------------|------|---------------------------------|
| (1) | Selkänoja | (9) | Työntötanko |
| (2) | Käsinoja | (10) | Käyttöpöyry |
| (3) | Istuinpehmuste | (11) | Kelausvanne |
| (4) | Irrotettava pehmuste | (12) | Pikakiinnitysakseli |
| (5) | Astinlauta | (13) | Ohjaava takapyörä – jarrullinen |
| (6) | Ohjaava etupyörä | | |
| (7) | Tyypikilpi | | |
| (8) | Painojarru | | |

ASENNUS

Jälleenmyyjä kokoaa pyörätuolin.

Wc-/suihkupyörätuoli toimitetaan osissa. Kokoaminen tehdään seuraavasti:

1. Aseta ensin selkänöjan putket molempiin takimmaisiiin rungonosiin [1] ja kiinnitä käsipyörät ruuveilla (2).

2. Asenna 24-tuumaiset pyörät yhdessä niiden kanssa toimitetun akselin ja ruuviliitosten kanssa kiinnityssovitimen alimmaiseen reikään [3].

☞ Tarvittaessa kiinnityslohkoa voidaan siirtää taaksepäin ruuvien sijaintia muuttamalla. Näin akseliväli pitenee.

3. Asenna painojarrut ja niihin kuuluvat kiinnitysosat jarrukiskoon oikealle ja vasemmalle [4].

☞ Katso tätä varten lukua *Painojarrujen säätö* sivulla 11.



4. Aseta istuinpehmuste [5].

☞ Katso tätä varten lukua *Istuinpehmuste* sivulla 15.

☞ Aseta tarvittaessa irrotettava pehmuste istuimen aukkoon (6).

5. Astinlauta voidaan taittaa tarvittaessa auki rungosta.

6. Tarkista lopuksi, että kaikki liitokset on tehty tiukasti.

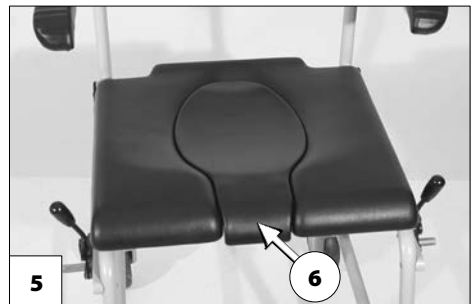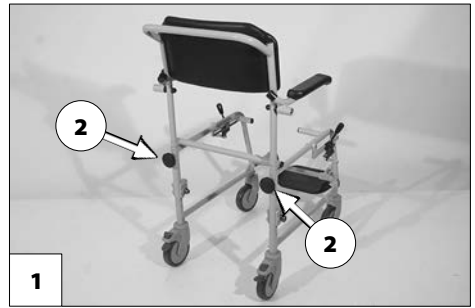

Painojarrujen säätö

Jarrut ovat äänekkäät *Huoltokaavio* sivulla 24 jokaisen kuljetuspyörien vaihdon jälkeen toiminta on heti tarkistettava ja säädettävä tarvittaessa uudelleen.

- Vapauta painojarrun kiristysruuvi (1).
- Sen jälkeen esiaseta kukin jarru vastavalla liikuttamisella.



Painojarru

Työnnä kiinniruuvaamattoman käyttäjarrun (2) jarrupulttia n. 5 mm - 10 mm kuljetuspyörän eteen ja suorista oikeaan kulmaan käyttöpöyrän suhteen.

- 🔧 Kiristä kiristysruuvi (1) uudelleen.

Asenna vastapäätä sijaitseva jarru kuten edellä kuvattu.

Painojarruja säädettäessä on huomioitava

- käyttöpöyrien renkaat
- renkaiden ilmanpaine ja
- käyttäjän paino

sekä säädettävä molemmat jarrut samalla tavoin. – Yksipuolinen jarruteho voi aiheuttaa onnettomuusvaaran!

Painojarrujen hienosäätö

- Löysää kiristysruuvi (1).
- Siirtämällä kumpaakin painojarrua vain hieman saadaan aikaan vastaava hienosäätö.
- Kiristä kiristysruuvi (1) uudelleen.
- 🔧 Tarkista käyttäjarrujen toiminta ja tiukkuus.

JARRUT

Jos wc-/suihkupyörätuolissa istuu ihminen ja jarrut on kytketty, pyörätuolia ei voi liikuttaa.

Jarrutehon heikentyessä on pyörätuoli välittömästi vietävä valtuutettuun huoltopisteeseen korjattavaksi.

Pyörätuolit, joissa on PU-renkaat, on pidempien varastointiaikojen ajaksi varastoitava niin, että painojarrut jätetään auki. Kytketty painojarru voi aiheuttaa varastoinnin aikana pysyvän jäljen pyörän liukupintaan.

Älä tue kehoa sivusuunnassa jarruvipuun (2).

Jos käyttöpyörät on irrotettu, wc-/suihkupyörätuolin liikettä voidaan jarruttaa vain lukitsemalla ohjaavat pyörät.

Jarrun painaminen aiheuttaa puristumisvaaran jarruvivun ja rungon väliin!

Jarrujen teho heikkenee, kun:

- renkaiden pinnat ovat kuluneet
- rengaspaineen laskiessa liian alhaiseksi,
- renkaat ovat märät
- painojarru on auki.

Painojarru


Jarrujen kytkeminen

Estä wc-/suihkupyörätuolin tahattomat liikkeet työntämällä molemmat jarruvivut (2) eteen pysäyttimeen asti [1].

- ☞ Wc-/suihkupyörätuolia ei pidä voida työntää jarrujen ollessa kytkettyinä.

Jarrujen vapauttaminen

Käännä molemmat jarruvivut taaksepäin vasteeseen saakka [3].

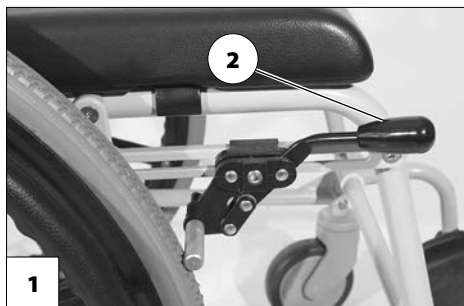

Käyttöjarru

Wc-/suihkupyörätuolin liikettä jarrutetaan kelausvanteesta.

- ☞ Wc-/suihkupyörätuolin jarruttamiseen tulee tarvittaessa käyttää sopivia suoja-käsineitä.

Lukittavat ohjaavat pyörät

Jos vain toinen pyörä on lukittu, vapaana oleva pyörä liikkuu lukitun pyörän ympärillä.– Onnettomuusvaara!

Vain avustaja voi tehdä tämän toiminnon, kun wc-/suihkupyörätuoli on käytössä.



Takimmaiseta ohjaavat pyörät voi lukita [1].

Ohjaavien pyörien lukitus

Lukitse ohjaavat pyörät painamalla suuri keinuvipu jalalla pysäyttimeen asti (2).

Ohjaavan pyörän lukituksen avaaminen

Vapauta ohjaavat pyörät painamalla pieni keinuvipu jalalla pysäyttimeen asti (3).

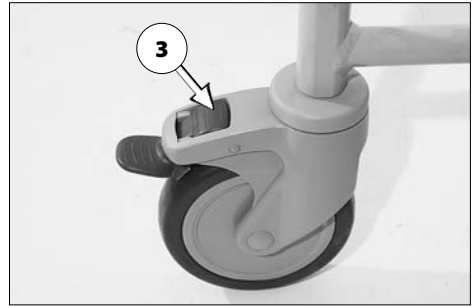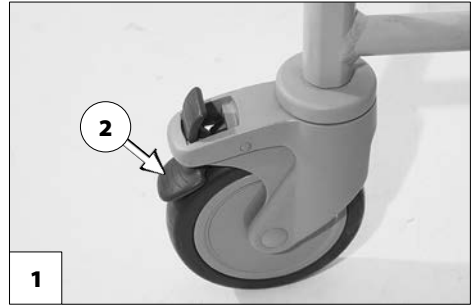

ASTINLAUTA

Ylös taitettu astinlauta ei ole kiinni ja voi pudota wc-/suihkupyörätuolin kuljetuksen yhteydessä takaisin alkuperäiseen asentoon.– Kiinnitä tarvittaessa!

Wc-/suihkupyörätuoli kallistuu helposti eteenpäin, jos astinlaudalle asetetaan painoa.– Onnettomuusvaara!

Astinlauta voidaan taittaa tarvittaessa auki rungosta.[1].

Astinlaudan kääntäminen ylös

Nosta ensin molemmat jalat astinlaudalta. Nosta sen jälkeen astinlauta ylös pysäyttimeen asti [2].

KÄSINOJAT

Kun käänät käsinojia alas, älä koske käsinojan pysäytinalueeseen takaputkessa.– Puristumisvaara!

Älä käytä käsinojia nousemistukena.

Käsinojan kääntäminen ylös

Käännä käsinojia ylös pysäyttimeen asti (3).

Käsinojen kääntäminen alas

Käännä käsinojia alas pysäyttimeen asti (4).



ISTUINPEHMUSTE

Tartu istuinpehmusteeseen alhaalta kalliistaessasi sitä alaspäin.– Puristumisvaara!

Istuinpehmuste voidaan irrottaa puhdistamista varten [1].

Istuinpehmusteen irrottaminen

Tartu istuinpehmusteeseen sen molemmista etukulmista ja nosta se ylös runkoputkista [2]. Nosta istuinpehmuste sen jälkeen irti takana olevasta poikittaisputkesta [1].

Istuinpehmusteen asettaminen paikoilleen



Työnnä istuinpehmusteen takaosassa oleva ohjausuurre rungon poikittaisputkeen (3). Paina sitten pehmusteen alapuolella olevat kiinnitysklipsit kiinni rungon putkiin [4].

Irrotettavan pehmusteen asettaminen

Aseta irrotettava pehmuste istuimen aukkoon aukon muodon mukaisesti (5).


Irrotettavan pehmusteen irrottaminen

Nosta irrotettava pehmuste ylös, jotta käyttäjä voi käyttää wc:tä [2].

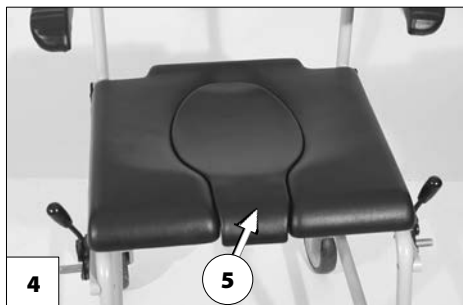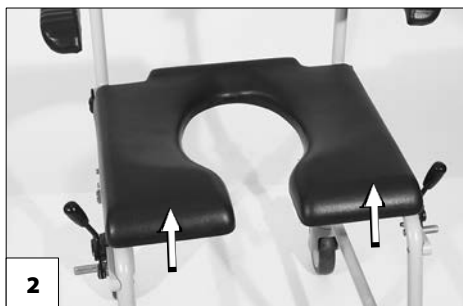

WC-KANSIOSA

Wc-kansiosa ja -istuin on puhdistettava ja desinfioitava huolellisesti käytön jälkeen.

 Katso tätä varten lukua *Desinfointi* sivulla 22.

Wc-istuimessa on erillinen Wc-kansiosa.

Wc-kansiosa voidaan työntää Wc-istuimen alla olevia ohjauskiskoja pitkin istuimen taaksaan luukku kiinnitettynä tai ilman luukku.

 Wc-kansiosa työnnetään käyttöä varten samalla tavalla Wc-istuimen aukon alle.

PYÖRÄT

Jos käyttöpyörät on irrotettu, wc-/suihkupyörätuolia ei voi jarruttaa tai pysäyttää jarruvivusta.

Wc-/suihkupyörätuolit, joissa on PU-renkaat, on pidempien varastointiaikojen ajaksi varastoitava niin, että painojarrut jätetään auki. Kytkeyty painojarru voi aiheuttaa varastoinnin aikana pysyvän jäljen pyörän liukupintaan.

Pyörien renkaat on valmistettu kumiseoksesta ja voivat jättää joillekin pinnoille vaikeasti poistettavia tai pysyviä jälkiä (esim. muovi-, puu- ja parkettilattia, matot, kokolattiamatot).

24-tuumaiset käyttöpyörät

Kun kuljetuspyörä on asetettu paikalleen, tulee lukitusnapin kohota joitakin millimetrejä pyörän mutteria korkeammalle.

Kuljetuspyörät on varustettu pikakiinnitys-akselilla.


- Wc-/suihkupyörätuolissa ei saa istua pyörän poistamisen tai asettamisen aikana. Wc-/suihkupyörätuolin on oltava tasaisella ja lujalla alustalla. Ennen pyörän poistamista wc-/suihkupyörätuoli on tuettava niin, että se ei pääse kaatumaan, ja pyörätuolin liikkeelle lähteminen on estettävä.

Pikakiinnitysakseli

Käyttöpyörät voidaan irrottaa ja asentaa ilman työkaluja.

- Avaa tällöin ensiksi lukitus painamalla jousinappia (1), vedä sen jälkeen kuljetuspyörä pois ulospäin.

Kuljetuspyörien paikalleen asettamiseksi on pikakiinnitysakseli vapautettava painamalla

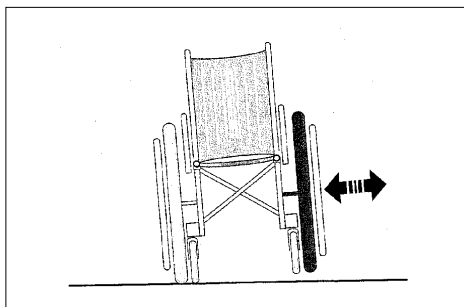

nappia (1) ja pyörä työnnettävä akselinkinnittimeen pohjaan asti.

- Lukitus on aina asennuksen jälkeen tarkastettava vetämällä/painamalla käyttöpyörää sivullepäin!
- Lukitusmekanismi on pidettävä puhtaana. Jos siihen pääsee likaa, kuten hiekkaa tai multaa, tai se pääsee jäätymään kosteassa kylmyydessä, voi seurauksena olla toimintahäiriöitä.
- Jos kuljetuspyörän asento ei ole vakaa tai jos pikakiinnitysakseli ei lukkiudu, käänny välittömästi valtuutetun jälleenmyyjän puoleen asian korjaamiseksi.

PERUSTASON TURVALLISUUSILMOITUKSIA

Nämä turvaohjeet ovat ote yleisistä turvallisuus- ja käsittelyohjeista, jotka ovat saatavilla verkkosivuiltamme: < www.meyra.com >.

Älä työnnä sormia rungon avoimiin reikiin.– Loukkaantumiswaara!

Pyörätuolissa teputtaminen (wc-/suihkupyörätuolin liikuttaminen ottamalla askelia jaloilla samalla pyörätuolissa istuen) on sallittua vain erittäin hitaasti vaakasuoralla ja tasaisella pinnalla.

Huomioi teputtaessasi jalkojen mahdollinen kiinnijäämisvaara.

Tässä istuma-asentoa ei saa siirtää istuimen ensimmäiselle kolmannekselle.

Wc-/suihkupyörätuolia käytettäessä myös paikallaan ollessa ja erityisesti nousuissa/laskuissa on taattava turvallinen istuma-asento.– Onnettomusvaara!

Turvallisessa istuma-asennossa käyttäjän niska on niskapehmusteessa kiinni ja hänen lantionsa on istuimen takaosan alueella.

Wc-/suihkupyörätuolista saa poistua ja siihen asettua nousuissa/laskuissa vain hätätapauksissa ja henkilökohtaisen avustajan ja/tai muun avustajan avulla!– Onnettomusvaara!

Vältä tupakointia wc-/suihkupyörätuolia käytettäessä.

Suoralle auringonpaisteelle altistettuina voivat istuinverhoilu/pehmusteet, käsi- nojapehmusteet, jalkatuet ja kahvat kuumentua yli 41 °C lämpötilaan.

– Loukkaantumiswaara paljaan ihon joutuessa kosketuksiin näiden osien kanssa!

Vältä kuumenemistä asettamalla wc-/suihkupyörätuoli varjoon.

Siinä ei ole erityisiä kiinnityskohtia mukaan otettaville tavaroille.

Varmista, että pyörätuolin kaikki neljä pyörää ovat vakaasti kosketuksessa lattiaan, jos tuolia käytetään ilman 24 tuuman käyttöpöyriä.– Onnettomusvaara!

Jos käyttäjällä avoimia haavoja, käytä steriiliä alustaa istuimen, selkänöjan, jalkatukien ja käsinojen pehmusteiden päällä.

Wc-/suihkupyörätuolia saa käyttää vain avustajan avulla.

Wc-/suihkupyörätuolia saa käyttää vain lyhyisiin siirtoihin.– Pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa haittaa terveydelle, koska pyörätuolissa ei ole pehmusteita.

Älä oikaise tai käytä muotonsa menettänyttä wc-/suihkupyörätuolia.– Onnettomusvaara!

Älä lepuuta jalkojasi pyörätuolissa istuessasi nostamalla niitä huonekalujen tai muiden esineiden päälle. – Taaksepäin nojautuminen muuttaa painopistettä ja lisää pyörätuolin kaatumisvaaraa.

Wc-/suihkupyörätuoli ei sovi jatkuvaan käyttöön ympäristössä, jossa on suolaa, esim. suolakylpylöissä.

Jos wc-/suihkupyörätuolia käytetään sellaisessa ympäristössä, se on puhdistettava käytön jälkeen huolellisesti vesijohtovedellä, jotta vaurioita ei synny.

Suihkuttamisen jälkeen wc-/suihkupyörätuoli on puhdistettava saippuajäämistä.– Onnettomusvaara.

Varmista, että jarru ei vapaudu vahingossa suihkun tai vessassa käynnin aikana.

Wc-/suihkupyörätuoli voi koostua helposti syttyvistä materiaaleista.

Tupakointi on kielletty wc-/suihkupyörätuolin käytön aikana.

Avustaja

Avustajaa on informoitava kaikista mahdollisista vaaratilanteista ennen ajon alkamista. Tarkista, että ne wc-/suihkutuolin osat, joihin avustaja tarttuu, ovat lujasti kiinni.

Siirtyminen pois wc-/suihkupyörätuolista

Siirry wc-/suihkupyörätuolilla mahdollisimman lähelle kohtaa, jossa haluat poistua siitä.

- ☞ Katso lisäksi kappaleiden *Jarrut* sivulla 12 ja *Käsinajan kääntäminen ylös* sivulla 14 tiedot.
- ☞ Suosittelemme siirtymään pois wc-/suihkupyörätuolista avustajan avulla. – Wc-/suihkupyörätuolin kaatumisvaara.

Esineisiin tarttuminen

Vältä taivuttamasta yläruumista eteen-, sivulle- tai taaksepäin erityisesti raskaita esineitä nostettaessa tai laskettaessa. – Wc-/suihkupyörätuolin kaatumisvaara.

Alamäet, ylämäet ja kaltevat alustat

Alustan kaltevuuden saavuttaessa tietyn jyrkkyyden tuolin vakaus, jarrutus ja ohjaus on merkittävästi rajoittunut vähentyneen pidon vuoksi.

- ☞ Katso tätä varten luku *Tekniset tiedot* sivulla 26.

Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme yli 1 %:n kaltevuuksilla ajamiseen avustajaa.

- ☞ Tämä alhainen kaltevuusarvo koskee niitä henkilöitä, jotka eivät itse kykene lainkaan muuttamaan kehonsa painopistettä siirtämällä ylävartaloaan.

Avustajan on otettava huomioon, että wc-/suihkupyörätuolin ohjaaminen ylä-/alamäessä vaatii enemmän voimaa kuin tasaisella

maalla ja että liukastumisen vaara kasvaa mäessä.

Älä koskaan nojaa ala- tai ylämäessä tai kaltevilla alustoilla alaspäin viettävään suuntaan.

Vältä nykiviä ajotilan muutoksia (erityisesti kriittisesti asetettujen ajoparametrien yhteydessä kuten esim. aktiivinen pyöräasento).

Älä koskaan aja nopeammin kuin kävelyvauhtia.

Takaperinajo muodostaa erityisen kaatumisvaaran.

Kaarreajossa ja käännytessä ylämäessä ja alamäessä uhkaa kaatumisvaara.

Jarrutusteho on kaltevilla ajopinnalla huomattavasti heikompi kuin tasaisella ja se heikkenee entisestään huonojen tieolosuhteiden (esim. kosteus, lumi, sora, lika) johdosta. Pyörien lukkiutuminen ja siitä seuraava vaarallinen liukuminen ja ei-toivottu suunnan muuttuminen voidaan välttää jarruttamalla varovaisesti ja ajonopeuteen sopeutumalla.

Mäen alla on varottava, että jalkalevyt eivät kosketa maata ja aiheuta äkkipysähdystä ja sen johdosta vaaratilannetta.

Kaltevilla alustoilla (esimerkiksi sivusuuntaan viettävällä jalkakäytävällä) wc-/suihkupyörätuoli kallistuu alaspäin viettävään suuntaan. Tämän suunnasta poikkeamisen korjaamiseksi on sinun tai henkilökohtaisen avustajan ohjattava vastaan.

Esteiden ylittäminen

Jokainen esteen ylitys muodostaa riskin! Kaatumisvaara on olemassa jo matalien esteiden (esim. kynnykset, maton reunat, askelmat jne.) kohdalla.

Esteiden ylittäminen on erityinen vaaratilanne, johon täytyy soveltaa ylämäkeen, alamäkeen ja sivusuunnassa kallistuvilla alustoilla ajamiseen liittyviä turvaohjeiden yhdistelmiä.

Ylitä kaikki esteet oman turvallisuutesi vuoksi vain avustajan saattamana.

Voit ylittää pieniä (< 4 cm) esteitä itsenäisesti vaarattomasti vain, jos hallitset wc-/suihkupyörätuolin käsittelyn riittävän hyvin.

Lähesty pienempiä esteitä, esim. kynnyksiä/reunoja, aina hitaasti ja aja niiden luo suorassa kulmassa (90°), kunnes ohjauspyörät lähes koskettavat estettä. Pysäytä wc-/suihkupyörätuoli hetkeksi ja aja sitten esteen yli.

Wc-/suihkupyörätuolin kaatumiselta sivulle vältytään ylittämällä este aina eteenpäin ajaen ja ylittämällä se molemmilla etupyörillä ja sen jälkeen molemmilla takapyörillä samanaikaisesti.

Säilytä kuiluihin, portaisiin, rinteisiin jne. niin pitkä turvallisuusväli, että sinulle jää riittävästi aikaa/tilaa reagoida, jarruttaa ja kääntä.

Mikäli mahdollista, anna useampien avustajien nostaa itsesi wc-/suihkupyörätuolista ja kantaa haluamaasi paikkaan.

Portaiden nouseminen on sallittua vain kahden avustajan avulla. Avustajien on tunnettava vaaratilanteet ja ohjattava wc-/suihkupyörätuolia vakaasti.

Avustajat saavat tarttua ainoastaan työntökahvoihin ja istuinkehikkoon nostamatta kuitenkaan wc-/suihkupyörätuolia kuljetuksen yhteydessä.

Wc-/suihkupyörätuolin lastaamisen ajoneuvoon

Älä nosta wc-/suihkupyörätuolia jalkatuista, käsinojista tai lisäosista!

Estä wc-/suihkupyörätuolin tahaton liikkeellelähtö ennen nostoa.

Katso tätä varten lukua *Jarrut* sivulla 12.

Lataamista varten purettu osat on säilytettävä huolellisesti ja asennettava takaisin paikalleen huolellisesti ennen ajoon lähtöä.

Wc-/suihkupyörätuolin paino pienenee, kun irrotettavat osat on irrotettu.

Wc-/suihkupyörätuolin voi lastata myös luisien tai nostotasojen avulla.

Noudata lastaamisessa aina soveltuvia käyttöohjeita ja huomioi rampin tai nostolavan enimmäiskantokyky.

Kuljetus ajoneuvoissa

Kuljetuksen ajaksi irrotetut osat on varastoitava turvallisesti ja asennettava huolellisesti takaisin ennen ajoon lähtöä.

Irrotettavien osien kantamista varten ei ole suunniteltu erityisiä kantokohtia.

Seuraavat toimenpiteet saattavat olla tilaisista välttämättömiä ajoneuvossa tapahtuvaa kuljetusta varten:

- Taita jalkatuet kasaan.
Katso tätä varten lukua *Astinlauta* sivulla 14.
- Selkäosan irrottaminen.
- Käyttöpyörien irrottaminen.
Katso tätä varten lukua *Pyörät* sivulla 17.

Tyhjän wc-/suihkupyörätuolin valmistelu kuljetusta varten

Noudata kuljetusyrityksen määräyksiä ja ohjeita. – Kysy niistä ennen kuljetusta.

Wc-suihkupyörätuoli kiinnitettävä siten, ettei se aiheuta vaaraa sinulle eikä muille.

Henkilökuljetus ajoneuvossa

Henkilökohtaista wc-/suihkupyörätuolia ei saa käyttää istuimena ajoneuvoissa.

Matkustus julkisilla kulkuneuvoilla

Wc-/suihkupyörätuolia ei ole tarkoitettu henkilön kyyditsemiseen julkisissa kulkuneuvoissa.

Julkisessa liikenteessä ajaminen

Wc-/suihkupyörätuolia ei ole tarkoitettu henkilön kyyditsemiseen julkisissa kulkuneuvoissa.

Puhdistus

Ei-ioniset tensidit sekä liuotinaineet ja erityisesti alkoholit kuluttavat muoviverhouksen osia.

Pehmusteissa ja päällisissä on tavallisesti hoito-ohjeet (tiedote).

Muissa tapauksissa tulee noudattaa seuraavia ohjeita:

- ☞ Puhdista pehmusteet lämpimällä vedellä ja tavallisella käsipesuaineella.
- ☞ Poista tahrat sienien tai pehmeän harjan avulla.
- ☞ Pyyhi vaikeat tahrat tavallisella kaupoista saatavalla hienopesuaineella.
- ☞ Ei vesipesua! Älä pese pesukoneessa!

Pyyhi tämän jälkeen puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

Alusta, valolaitteisto ja pyörät voidaan puhdistaa kosteina miedolla pesuaineella. Kuivaa osat hyvin puhdistamisen jälkeen.

- ☞ Tarkista, ettei alustassa esiinny korrosio- tai muita vaurioita.
- ☞ Puhdista muoviosat pelkällä lämpimällä vedellä ja neutraalilla puhdistusaineella tai suovalla.

Lisätietoja puhdistuksesta ja hoidosta on kohdassa < Infozentrum > (Tietokeskus) verkkosivullamme:

< www.meyra.com >.

Pinnoite

Korkealaatuisen pintakäsittelyn ansiosta pyörätuoli on optimaalisesti suojattu korrosiota vastaan.

- ☞ Jos pinnoitteeseen tulee naarmuja tai muita pieniä vaurioita, ne on helppo korjata jälleenmyyjän välityksellä liikkeestämme saatavan lakkakynän avulla.

Liikkuvat osat pysyvät kauan toimintakunnossa, kun niitä voidellaan aika ajoin.

Desinfointi

Jos wc-/suihkupyörätuolia käyttää useampi henkilö (esim. hoitokodissa), tavallisten kau-poista saatavien desinfioimisaineiden käyttö on pakollista.

- ☞ Pehmusteet ja kahvat on puhdistettava ennen desinfointia.
- ☞ Suihkuttaen tai pyyhkimällä suoritettava desinfointi on sallittu käytettäessä testattuja ja hyväksytyjä desinfointiaineita.

Tietoja testatuista ja hyväksytyistä desinfointiaineista ja -menetelmistä saa kansalliselta terveysviranomaiselta.

- ☞ Desinfointiaineiden käyttö saattaa aiheuttaa sen, että pinnat mahdollisesti muuttuvat tietyissä tapauksissa siten, että se haittaa pitkäaikaisesti rakennosien toimivuutta.
- ☞ Noudata aina myös näiden aineiden valmistajien antamia käyttöohjeita.

Korjaukset

Pääasiassa vain jälleenmyyjä saa tehdä korjaukset.

Kuntoonpano

Kunnostustöiden suorittamiseksi on käännittävä luottamuksella alan erikoisliikkeen puoleen. Siellä tunnetaan näiden töiden suorittamistavat.

Huolto

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteys jälleenmyyjään, joka huolehtii neuvonnasta, huollosta ja korjauksista.

Varaosat

Hanki pyörätuoliasi varten tarvitsemasi varaosat ainoastaan jälleenmyyjän kautta. Pyörätuolin korjauksissa saa käyttää ainoastaan alkuperäisiä varaosia!

- ☞ Muiden yritysten osat voivat aiheuttaa häiriöitä.

Jälleenmyyjällä on asianmukaisin tuotenumeroin ja piirustuksin varustettu luettelo varaosista.

Jotta oikea varaosa voidaan toimittaa, on joka tilauksen yhteydessä toimitettava wc-/suihkupyörätuolin sarjanumero (SN).Se on merkitty tyyppikilpeen.

Kaikki jälleenmyyjän suorittamat wc-/suihkupyörätuoliin kohdistuneet muutokset/ muokkaukset edellyttävät sitä, että wc-/suihkupyörätuolin käyttöohjeeseen on merkittävä lisätietoja, kuten asennus- /käyttöohjeita, sekä muutostöiden päivämäärä, ja tästä on ilmoitettava varaosatilauksen yhteydessä.


Näin myöhemmissä varaosatilauksissa ei esiinny vääriä tilaustietoja.

Tavallista pidempiä käyttötaukoja koskeva ohje

Tavallista pidemmät käyttötauat eivät aiheuta erityistoimia. Säilytyslämpötiloja on kuitenkin noudatettava.

- ☞ Katso tätä varten lukua *Tekniset tiedot* sivulla 26.

HÄVITTÄMINEN

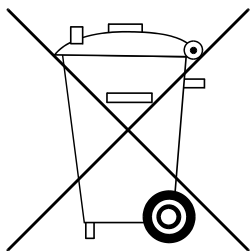

Pyörätuolin hävityksessä tulee noudattaa kulloisiakin kansallisia lakimääräyksiä.

Kysy paikallisten jätehuoltoyritysten tiedot oman asuinkaupunkisi/-kuntasi vastaavasta virastosta.

HUOLTO

Wc-/suihkupyörätuolin puutteellinen tai laiminlyöty hoito ja huolto johtavat valmistajan tuotevastuun rajoittamiseen.

Huoltotyöt

Seuraavassa huoltokaaviossa on ohjeet huoltotöiden suorittamiseen.

- ☞ Huoltokaavion mukaan ei voi päätellä wc-/suihkupyörätuolin todellisuudessa tarvittavien korjausten laajuutta.

Huoltokaavio

MILLOIN	MITÄ	HUOMAUTUS
Ennen käyttöä	Tarkasta, että jarrujärjestelmä toimii moitteettomasti. Työnnä jarru- tai keinuvipu pyssäyttimeen asti. Jarrulla lukitut pyörät/renkaat eivät saa pyöriä, kun jarru on kytketty. Jos näin kuitenkin on, anna ammattikorjaamon kunnostaa jarrut.	Tarkastus suoritetaan itse tai avustajan avulla.
Ennen käyttöä	Tarkasta painojarru kulumisen varalta. – Liikuta jarruvipua sivusuunnassa.	Suoritetaan itse tai avustajan avulla. Jos jarruvivun välys on lisääntynyt, ota välittömästi yhteyttä ammattikorjaamoon kunnostusta varten. – Onnettomuusvaara!
Ennen käyttöä	Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan: – selkänojan putken kiinnitys – käyttöpöyriä kiinnitys – käsinojen, istuinpehmusteiden sekä astinlaudan kiinnitys.	Suoritetaan itse tai avustajan avulla.
Ennen käyttöä	Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Vakiorenkaat: 4 bar = 56 psi Korkeapainerenkaat: 8,0 bar = 116 psi	Suoritetaan itse tai avustajan avulla. Käytä lisäksi ilmanpaineen tarkastuslaitetta tai, jos ei saatavilla, suorita "Peukalopainemenetelmä" tai vastaava.
Ennen käyttöä	Tarkista renkaiden pinnan kunto.	Silmämääräinen tarkastus suoritetaan itse. Jos rengasprofiili on kulunut tai rengas on vaurioitunut, ota yhteyttä ammattikorjaamoon kunnostusta varten.

MILLOIN	MITÄ	HUOMAUTUS
Ennen käyttöä	Tarkista selkäosan kehikon kestävyys. Tarkasta runkoputket vaurioiden varalta.	Tarkastus suoritetaan itse tai avustaja suorittaa sen. Jos havaitset vääntymiä tai halkeamia esim. hitsausauman alueella, ota välittömästi yhteys ammattikorjaamoon kunnostusta varten. – Onnettomuusvaara!
8 viikon välein (käyttötiheyden mukaan)	Lisää seuraaviin osiin muutama pisara öljyä. – Jarruvivun laakerointi.	Suoritetaan itse tai avustajan avulla. Ennen öljyämistä osista on poistettavat vanhat öljyjäämät.  Pidä huolta siitä, että ylimääräinen öljy ei pääse liikaamaan ympäristöä (esim. vaatteiksi).
8 viikon välein (ajomatkan pituuden mukaan)	Tarkista, että kaikki ruuviliitokset on kiristetty asianmukaisesti.	Suoritetaan itse tai avustajan avulla.
6 kuukauden välein (käyttötiheyden mukaan)	Tarkasta – puhtaus – yleiskunto	Katso lukua <i>Puhdistus</i> sivulla 21. Suoritetaan itse tai avustajan avulla.

TEKNISET TIEDOT

Kaikki < *Teknisten tietojen* > sisältämät tiedot koskevat vakiovarustusta.

Kokonaispituus riippuu käyttöpyörien paikasta ja koosta.

Ellei muuta mainita, mitat perustuvat käyttöpyöriin, joiden koko on: \varnothing 610 mm (24").

Leveydet on ilmoitettu kelausvanteiden etäisyydellä 15 mm.

Mitat ilmoitettu ± 15 mm:n ja $\pm 2^\circ$:n tarkkuudella.

Käyttäjän enimmäispainon laskeminen:

Suurin sallittu kokonaispaino koostuu wc-/suihkupyörätuolin tyhjäpainosta ja suurimmasta sallitusta käyttäjän (henkilön) painosta.

Ylimääräinen paino, esim. jälkikäteen asennetuista osista tai matkatavaroista johtuva, pienentää suurinta sallittua käyttäjäpainoa.

Esimerkki:

Käyttäjä haluaa ottaa mukaansa 5 kg matkatavaraa. Tästä johtuen käyttäjän suurin sallittu paino vähenee 5 kg.

Renkaiden täyttöpaine ilmarenkaissa

Renkaan maksimipaine löytyy kummaltakin puolelta renkaasta.

Rengaspaine – ohjauspyörä

Vakio:

2,5–3,5 bar = 36–50 psi

Rengaspaine – käyttöpyörä

Vakio:

3,0–4,0 bar = 44–58 psi

Ultrakevyessä kulussa:

6 bar = 87 psi

Suurpaine:

8 bar = 116 psi

Sovelletut standardit

Wc-/suihkupyörätuoli on seuraavien normien mukainen:

– ISO 17966: 2016

Tekniset lisätiedot mallille 8013039 McWet

	väh.	enint.
Kokonaispituus sis. jalkatuet	– mm	1020 mm
Kokonaispituus jalkatuet taitettuna	– mm	820 mm
Kokonaisleveys	– mm	630 mm
Kokonaiskorkeus	– mm	950 mm
Kokonaispaino	– kg	147 kg
Käyttäjän paino (sis. kuorman)	– kg	130 kg
Istumasyvyys	420 mm	420 mm
Istumaleveys	430 mm	430 mm
Istuinpinnan korkeus etureunasta	530 mm	530 mm
Istuinpinta	430x420 mm	
Selkäkankaan korkeus	410 mm	– mm
Staattinen vakaus, alamäki	–°	10°
Staattinen vakaus, ylämäki	–°	10°
Staattinen vakaus, sivusuunta	–°	5°
Käsinojien korkeus alkaen istuinpinnasta	220 mm	220 mm
Esteiden korkeus	450 mm	450 mm
Vähimmäiskääntymissäde (ISO-standardin mukainen suositus 1000 mm)	540 mm	– mm
<u>Ohjauspyörä</u>		
Ø 125 mm (5")		Täyskumi
<u>Käyttöpyörä</u>		
Ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Kuljetusmitat</u>		
Pituus (jalkatuet taitettuna)	820 mm	– mm
Leveys	630 mm	630 mm
Korkeus (selkäosa ruuvattu irti)	610 mm	610 mm
Tyhjäpaino (ilman selkäosaa ja istuinpehmustetta)	10,5 kg	– kg
<u>Käyttöympäristöä koskevat tiedot</u>		
Ympäristölämpötila		+10 °C...+40 °C
Varastointilämpötila		-30 °C...+60 °C

Tekniset lisätiedot mallille 8013040 McWet

	väh.	enint.
Kokonaispituus sis. jalkatuet	– mm	840 mm
Kokonaispituus jalkatuet taitettuna	– mm	640 mm
Kokonaisleveys	– mm	550 mm
Kokonaiskorkeus	– mm	930 mm
Kokonaispaino	– kg	143 kg
Käyttäjän paino (sis. kuorman)	– kg	130 kg
Istumasyvyys	420 mm	420 mm
Istumaleveys	430 mm	430 mm
Istuinpinnan korkeus etureunasta	530 mm	530 mm
Istuinpinta	430x420 mm	
Selkäkankaan korkeus	410 mm	– mm
Staattinen vakaus, alamäki	–°	10°
Staattinen vakaus, ylämäki	–°	10°
Staattinen vakaus, sivusuunta	–°	5°
Käsinojien korkeus alkaen istuinpinnasta	220 mm	220 mm
Esteiden korkeus	430 mm	430 mm
Vähimmäiskääntymissäde (ISO-standardin mukainen suositus 1000 mm)	540 mm	– mm
<u>Ohjauspyörä</u>		
Ø 125 mm (5")	Täyskumi	
<u>Kuljetusmitat</u>		
Pituus ilman käyttöpyöriä, jalkatuet taitettuna	560 mm	560 mm
Leveys	550 mm	550 mm
Korkeus (selkäosa ruuvattu irti)	530 mm	530 mm
Tyhjäpaino (ilman pyöriä, selkäosa)	5 kg	– kg
<u>Käyttöympäristöä koskevat tiedot</u>		
Ympäristölämpötila	+10 °C...+40 °C	
Varastointilämpötila	-30 °C...+60 °C	

Tekniset lisätiedot mallille 8013041 McWet

	väh.	enint.
Kokonaispituus sis. jalkatuet	– mm	1020 mm
Kokonaispituus jalkatuet taitettuna	– mm	820 mm
Kokonaisleveys	– mm	630 mm
Kokonaiskorkeus	– mm	950 mm
Kokonaispaino	– kg	148 kg
Käyttäjän paino (sis. kuorman)	– kg	130 kg
Istumasyvyys	420 mm	420 mm
Istumaleveys	430 mm	430 mm
Istuinpinnan korkeus etureunasta	530 mm	530 mm
Istuinpinta	430x420 mm	
Selkäkankaan korkeus	410 mm	– mm
Staattinen vakaus, alamäki	–°	10°
Staattinen vakaus, ylämäki	–°	10°
Staattinen vakaus, sivusuunta	–°	5°
Käsinojien korkeus alkaen istuinpinnasta	220 mm	220 mm
Esteiden korkeus	450 mm	450 mm
Vähimmäiskääntymissäde (ISO-standardin mukainen suositus 1000 mm)	540 mm	– mm
<u>Ohjauspyörä</u>		
Ø 125 mm (5")		Täyskumi
<u>Käyttöpyörä</u>		
Ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Kuljetusmitat</u>		
Pituus ilman käyttöpyöriä, jalkatuet taitettuna	560 mm	560 mm
Leveys	570 mm	570 mm
Korkeus (selkäosa ruuvattu irti)	530 mm	530 mm
Tyhjäpaino (ilman pyöriä, selkäosa)	5 kg	– kg
<u>Käyttöympäristöä koskevat tiedot</u>		
Ympäristölämpötila		+10 °C...+40 °C
Varastointilämpötila		-30 °C...+60 °C

Tekniset lisätiedot mallille 8014041 McWet

	väh.	enint.
Kokonaispituus sis. jalkatuet	– mm	1020 mm
Kokonaispituus jalkatuet taitettuna	– mm	820 mm
Kokonaisleveys	– mm	630 mm
Kokonaiskorkeus	– mm	950 mm
Kokonaispaino	– kg	151 kg
Käyttäjän paino (sis. kuorman)	– kg	130 kg
Istumasyvyys	420 mm	420 mm
Istumaleveys	430 mm	430 mm
Istuinpinnan korkeus etureunasta	530 mm	530 mm
Istuinpinta	430x420 mm	
Selkäkankaan korkeus	410 mm	– mm
Staattinen vakaus, alamäki	–°	10°
Staattinen vakaus, ylämäki	–°	10°
Staattinen vakaus, sivusuunta	–°	5°
Käsinojien korkeus alkaen istuinpinnasta	220 mm	220 mm
Esteiden korkeus	450 mm	450 mm
Vähimmäiskääntymissäde (ISO-standardin mukainen suositus 1000 mm)	540 mm	– mm
<u>Ohjauspyörä</u>		
Ø 125 mm (5")		Täyskumi
<u>Käyttöpyörä</u>		
Ø 610 mm (24 x 1 3/8")		PU
<u>Kuljetusmitat</u>		
Pituus ilman käyttöpyöriä, jalkatuet taitettuna	560 mm	560 mm
Leveys	570 mm	570 mm
Korkeus (selkäosa ruuvattu irti)	530 mm	530 mm
Tyhjäpaino (ilman pyöriä, selkäosa)	8 kg	– kg
<u>Käyttöympäristöä koskevat tiedot</u>		
Ympäristölämpötila		+10 °C...+40 °C
Varastointilämpötila		-30 °C...+60 °C

Tyypikilvessä olevien symbolien merkitys



Valmistaja



Tilausnumero




Sarjanumero



Valmistuspäivämäärä



Suurin sallittu käyttäjän paino

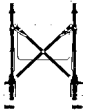

Maksimileveys ja maksimikorkeus



Noudata käyttöohjetta



Suurin sallittu ylämäki



Suurin sallittu alamäki



Käytettäväksi vain sisätiloissa



Lääkinnällinen laite

TARKASTUSTODISTUS

Ajoneuvon tiedot:

Malli:

Toimitustodistuksen nro:

Sarjanumero (SN):

Suosittelava turvatarkastus 1. vuonna (vähintään 12 kuukauden välein)

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

Suosittelava turvatarkastus 2. vuonna (vähintään 12 kuukauden välein)

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

Suosittelava turvatarkastus 3. vuonna (vähintään 12 kuukauden välein)

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

Suosittelava turvatarkastus 4. vuonna (vähintään 12 kuukauden välein)

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

Suosittelava turvatarkastus 5. vuonna (vähintään 12 kuukauden välein)

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

TAKUUSUORITUKSET/ TAKUU

Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen, väärin suoritettavat huoltotyöt sekä erityisesti ilman valmistajan suostumusta tehdyt tekniset muutokset ja täydennykset (lisäosat) johtavat valmistajan yleisen vastuun ja tuotteelle myönnetyn takuun raukeamiseen.

Tälle tuotteelle myönnämme yleisten myyntiehtojemme puitteissa lakisääteisen takuun sekä mahdollisesti luvattun tai sovitun takuun. Vastuu- ja takuuvaatimukset tulevat esittämään yhdessä jäljempänä olevan VASTUUN JA TAKUULOMAKKEEN kanssa jälleenmyyjälle. Takuulomakkeeseen on kirjoitettava mallin nimi, toimitustodistuksen numero ja päivämäärä sekä tuotteen sarjanumero (SN). Sarjanumero (SN) on nähtävissä tyyppikilvessä.

Vastuu- ja takuuvaatimusten hyväksymisen edellytyksenä on aina tuotteen määräysten mukainen käyttö, alan erikoisliikkeistä hankittujen alkuperäisvaraosien käyttö sekä säännölliset huolto- ja tarkastustyöt.

Takuu ei kata pintavaurioita, pyörien renkaiden vaurioita, irronneista ruuveista tai muttereista aiheutuneita vaurioita eikä usein toistuvista asennustöistä seuraavaa kiinnitysreikien kulumista.

Lisäksi takuun ulkopuolelle jäävät moottorin ja elektroniikan vauriot, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta puhdistamisesta höyrysuihkupesureilla tai komponenttien tahallisesta kastelemisesta tai tahattomasta kastumisesta.

Sellaisia vastuu- ja takuuvaatimuksia ei voida hyväksyä, jotka liittyvät säteilylähteiden, kuten voimakkaan lähetystehon omaavien matkapuhelimien, hifilaitteistojen ja muiden voimakkaasti säteilevien ja normimääritysten ulkopuolelle jäävien laitteiden aiheuttamiin häiriöihin.

Tämä käyttöohje on tuotteen osa, ja se on aina liitettävä mukaan käyttäjän tai omistajan vaihtuessa.

Voit arvioida tuotteemme sivustomme < www.meyra.com > < PMS > -alueen kohdassa < Infozentrum > (Tietokeskus).

Oikeus tekniikan edistymisestä johtuviin teknisiin muutoksiin pidetään.



Tämä tuote täyttää lääkinnällisistä laitteista annetun EY-direktiivin 93/42/ETY vaatimukset ja täyttää 25.05.2021 voimaan tulevan lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 vaatimukset.

Vastuu- ja takuulomake

Täytetään huolellisesti! Voidaan tarvittaessa kopioida ja kopio lähettää jälleenmyyjälle.

Takuusuoritukset/takuu

Mallinimike:

Toimitustodistuksen nro:

SN (katso tyyppikilpeä):

Toimituspäivä:

Jälleenmyyjän leima:

Tarkastustodistus luovutusta varten

Ajoneuvon tiedot:

Sarjanumero (SN):

Malli:

Toimitustodistuksen nro:

Jälleenmyyjän leima:

Allekirjoitus: _____

Paikka, aika: _____

Seuraava turvatarkastus 12 kuukauden kuluttua

Päivämäärä: _____

Jälleenmyyjä

Mediq Suomi Oy

Koskelonkuja 4

02920 Espoo

PL 69

02921 Espoo

Puh. 020 112 1510

Faksi 020 112 1513



www.mediq.fi/apuvaline

etunimi.sukunimi@mediq.com

Valmistaja: MEYRA GmbH

Meyra-Ring 2



32689 Kalletal-Kalldorf

SAKSA



Puh: +49 5733 922 - 311

Faksi: +49 5733 922 - 9311



info@meyra.de

www.meyra.de
