

Etac Socky -sukanvetolaite, lyhyt

etac®

Jalkoihin kurkottaminen voi olla tuskallista, jos kipu rajoittaa liikkuvuutta ja motoriset taidot ovat heikentyneet. Lyhyt Socky on täydellinen sukanvetolaite sekä lyhyille että polvipituisille sukille, lentosukat mukaan lukien. Se koostuu muovipohjasta, jossa on kaksi koukkuja valmiiksi taitellun nailonkankaan alla.

LYHYEN ETAC SOCKYN KÄYTTÖ

Sukka vedetään yksinkertaisesti Socky kankaan päälle, kunnes sen yläreuna ylittää koukkujen päälle. Aseta nauha pohkeen taakse ja vedä. Lyhyt Socky liukuu jalkaterän ja säären ympäri kevyesti ja asettaa sukan täydellisesti paikalleen.

Nailonkankaan alla olevat muovikoukut pitävät sukan paikallaan ja tekevät sukan pukemisesta helppoa.



TUOTE	TUOTENUMERO
Socky-sukanvetolaite, lyhyt	80601002

TUOTETIEDOT	
Pituus	40 cm
Paino	94 g
Materiaalit	kangas: polyesteri muoviosat: polypropeeni

PUHDISTUS

Käsinpesu pyyhkimällä tuote puhdistusaineella, joka ei sisällä liottimia ja jonka pH on 5-9 tai 70 % desinfiointiaineella. Kuivaa lopuksi.



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.