

Etac Socky -sukanvetolaite, pitkä

etac®

Jalkoihin kurkottaminen voi olla tuskallista, jos kipu rajoittaa liikkuvuutta ja motoriset taidot ovat heikentyneet. Pitkä Socky on täydellinen ratkaisu, kun käsivoimat ja liikkuvuus ovat rajoittuneita tai kun sukan ja lattian/matton välistä kitkaa on vähennettävä. Sitä voidaan käyttää sekä lyhyisiin että polvipituisiin sukkiin ja myös sukkahousuihin. Pitkä Socky koostuu pitkästä muovilevystä, joka on asetettu valmiiksi taitetun nailonkankaan alle ja jonka yläreunassa on kahva.

PITKÄN ETAC SOCKYN KÄYTTÖ

Sukka asetetaan yksinkertaisesti Socky kankaan ympärille ja vedetään ylös. Kahvaa käytetään pitkän Sockyn vetämiseen ylös samalla, kun muovilevy liukuu pitkin lattiaa ja pitää sukan varmasti paikallaan. Käytä sukkahousujen kanssa kahta pitkää Sockyä, jotka on yhdistetty toisiinsa Etac Socky-yhdistäjäosalla.

Kahva tekee pitkän Sockyn käytöstä helppoa, kun käsien ja käsivarsien voima ja liikkuvuus ovat rajoittuneita.



TUOTE	TUOTENUMERO
Socky-sukanvetolaite, pitkä	80601001

TUOTETIEDOT	
Pituus	60 cm
Paino	146 g
Materiaalit	kangas: polyesteri muoviosat: polypropeeni

PUHDISTUS

Käsinpesu pyyhkimällä tuote puhdistusaineella, joka ei sisällä liottimia ja jonka pH on 5-9 tai 70 % desinfiointiaineella. Kuivaa lopuksi.



Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.