



R82[®]

x:panda shape

Suunniteltu lapsesi yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi

Suunniteltu yksilöllisiin tarpeisiin

X:panda shape on suunniteltu parhaaksi mahdolliseksi istuimeksi, josta lapsesi voi elää elämänsä täysillä. Se on suunniteltu muuttumaan lapsesi kasvaessa ja kehittyessä, ja sen istuimen leveyttä ja syvyyttä sekä selkänöjan leveyttä ja korkeutta voidaan säätää, jotta varmistetaan yksilöllinen istuvuus ja korkea mukavuustaso. Näin se luo aina vakaan istuimen, josta lapsesi voi olla vuorovaikutuksessa ja osallistua elämään mahdollisimman itsenäisesti.



Ainutlaatuinen dynaaminen selkäosa

X:panda shape sisältää ainutlaatuisen dynaamisen selkäosan. Vastusvoima pysyy vakiona selkänojaa taaksepäin kallistettaessa. Säädetävän dynaamisen selkänojan avulla vastusta voidaan muuttaa päivittäin tai lapsen kasvaessa yksilöllisten tarpeiden mukaan.


X:panda shape on kehitetty kiinnittäen erityistä huomiota selkänojan niveltymiseen istuimeen nähden. Tavoitteena on luoda istuinjärjestelmä, joka liikkuu sopusoinnussa kehon kanssa. Dynaamisen selkänojan ansiosta lapsi voi ojentautua ja työntyä taaksepäin oikealla vastuksella ja palata sitten alkuperäiseen istuma-asentoon.



Sisäänrakennettu kasvu

Istuinjärjestelmän monisääteisyys ja kasvuominaisuudet mahdollistavat jalkatuen, selkänojan korkeuden sekä istuimen leveyden ja syvyyden säätämisen erikseen kasvun mukaan.

X:panda shape on hyvin muokattavissa ja se tarjoaa räätälöityä tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan. Se tukee vaativaa istuma-asentoa tai toimii yksinkertaisempaan aktiivi-istuimena - ja kaikkea siltä väliltä.

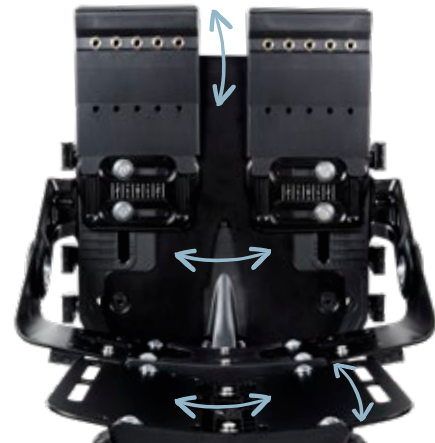

Vauvaistuin, yksinkertainen (simple) tai edistynyt (advanced) istuin


X:panda shape istuimen pohja toimii perustana vauva-istuimen, yksinkertaisen istuimen tai edistyneen istuimen rakentamiselle. Suunniteltu muuttamaan muotoaan ja kasvamaan lapsen mukana.



“Istuinkuoppa”

Istuinkiiilojen avulla saadaan istuimeen muotoa ja parannetaan toimivuutta sekä paineen jakautumista istuinkohyömyjen alueella. Kiiilat lisäävät käyttäjän ja tyynyn välistä kontaktipinta-alaa, jolloin lantio pysyy vakaana ja hallittavana optimaalisen asennon kautta, ja estäen lantion

liikkumisen taaksepäin. Kiiilojen pituus on säädettävissä kasvavan lapsen tarpeiden mukaan. Saatavana vain ”advanced”-istuimiin.

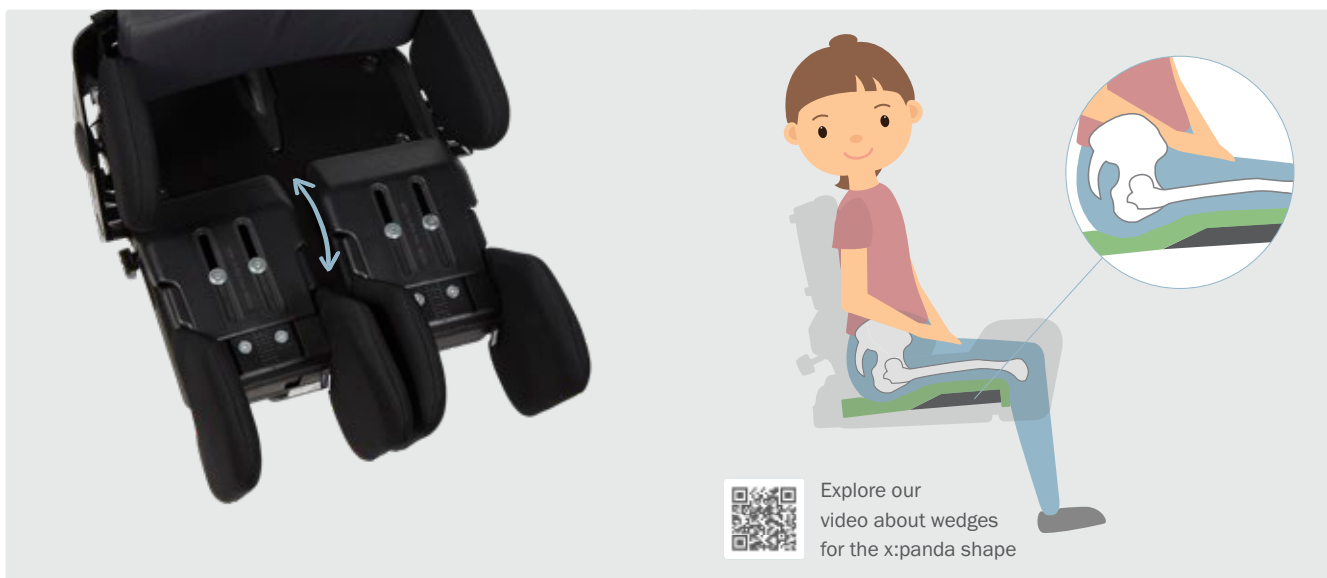


Lapsen varhainen tukeminen

Vauvaistuin mahdollistaa vauvalle tuetun istuimen ja tarjoaa siten mahdollisuuden varhaiseen tukemiseen auttaen lapsen osallistumista ja sosiaalista vuorovaikutusta vanhempien, hoitajien ja ympäristön kanssa.

Tämä istuin on suunniteltu luomaan mukava, turvallinen ja napakka istuma-asento pienimmillekin lapsille. Istuinjärjestelmää ja saatavilla olevia lisävarusteita voidaan säätää ja ne tukevat tarvittavaa asentoa.

Apuvälineitä, kuten x:panda shape, voidaan käyttää tukemaan ja antamaan lapselle mahdollisuus haastaa ja kehittää kognitiivisia, sosiaalisia, emotionaalisia, puhe- ja kielellisiä, hieno- ja karkeamotorisia taitojaan.

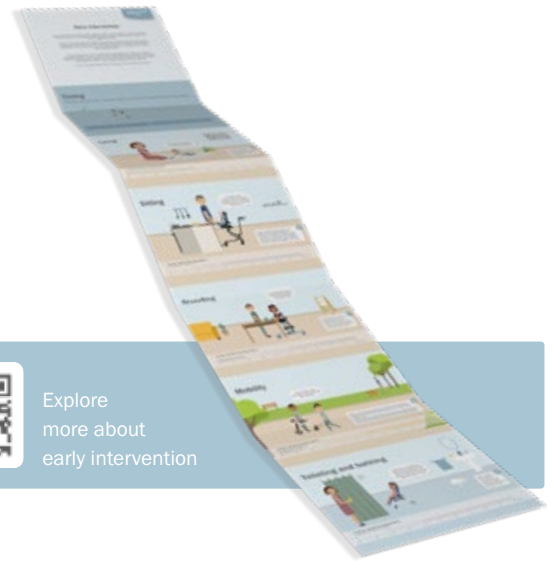

Explore
more about
early intervention



Kerroksellista mukavuutta

Tyynyt koostuvat kahdesta vaahtomuovikerroksesta: vaahtomuovista itse tyynyssä sekä ylimääräisestä vaahtomuovikerroksesta, joka on ommeltu päälliseen. Tämä auttaa parantamaan paineen jakautumista ja parantaa käyttäjän mukavuutta.

Päällinen

Päällinen on kestävä ja hengittävää. Saatavana 5 väriä istuinjärjestelmän koosta riippuen.

Nestelukko

Kestävä lääkinällistä laatua oleva ulkokangas. Saatavilla myös pyyhittävä päällinen.

Vaahtomuovi

Korkealaatuinen palosuojattu vaahtomuovi.

Tyynyn kiinnitys

Tyyny on helppo asentaa istuimeen tai irrottaa istuimesta.

Helppo tunnistus


Tyynyn koko merkitty selkeästi tyynyn takaosaan.

Hihnat

Hihnat istuimen fixlock-lukkoihin kiinnitystä varten.

Lisäkerros vaahtomuovia

Tyynyn mukavuuden ja paineen jakautumisen varmistamiseksi päällisen sisäpuolelle on ommeltu lisäkerros vaahtomuovia.

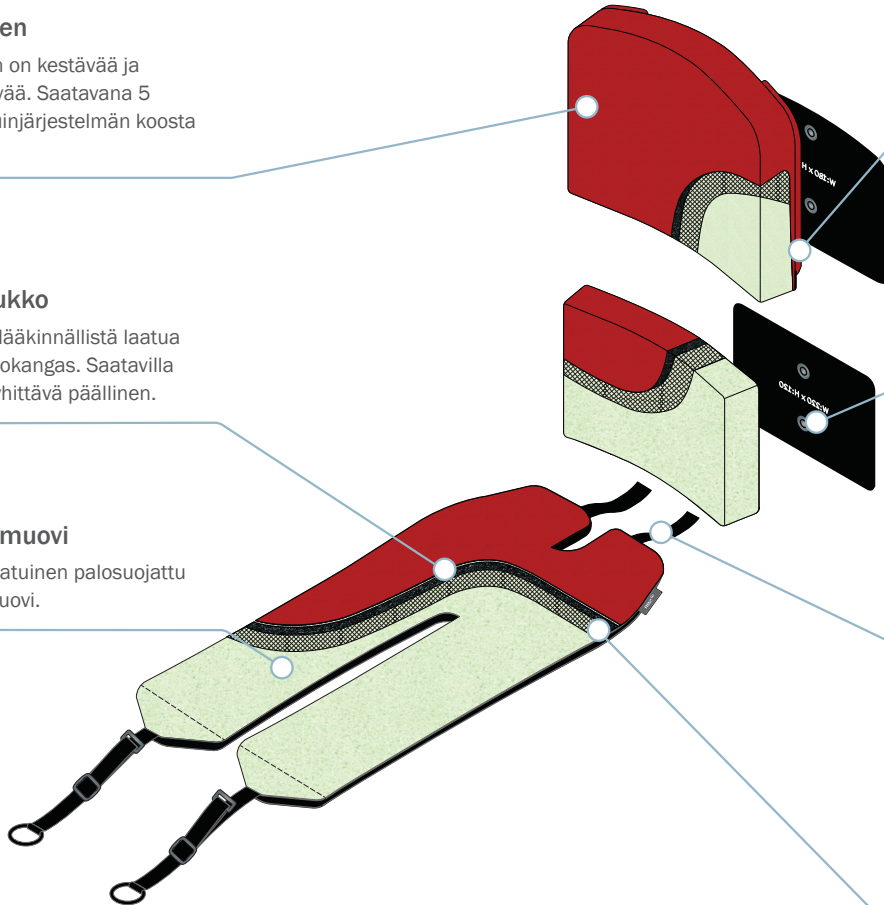

Istuimen ja selkäosan tyynyjen värit



Pink*

Light blue*

Red

Grey

Black,
wipeable

*Only available for infant seating

Lisävarusteiden tyynyjen värit



Black,
wipeable

Black

Tuotteen lisävarusteista

Useimmilla lapsilla ja nuorilla hyvä ja mukava istuma-asento voi helpottaa lapsen kykyä liikuttaa yläraajojaan ja päätään. Erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja on kehitetty, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen mukautuva istuma-asento yksittäisten käyttäjien istumistarpeiden mukaan.

Pään tuki

Laaja valikoima päätukia, mukaan lukien uusi 3D-kiinnike ja mukava kaareva tyyny. Tarjoaa monia mahdollisuuksia yksilölliseen tukeen levossa tai aktiivisessa toiminnassa.

Kiinteät tai kääntyvät vartalotuet

Kääntyvät tai kiinteät sivutuet valitaan sen mukaan, kuinka hyvin lapsi hallitsee vartalonsa ja pystyy käyttämään yläraajojaan.

Tyynyt ja päälliset

Mukavat tyynyt kestäväällä päällisellä istuin- ja selkätyynyissä, sivutuissa, lantio- ja polvituissa.

Säädettävät istuinkiilat

Kiilat lisäävät kosketuspinta-alaa käyttäjän ja tyynyn välillä, tukien lantion hallintaa optimaalisen asennon avulla ja estäen lantiota kallistumasta taaksepäin.

Alustat

X:panda shape istuin sopii moniin sisä- ja ulkoalustoihin

Liivit ja vyöt

X:pandan istuimessa ja selkäosassa on useita lukkoja liivien ja vöiden kiinnitystä varten.

Käsituet

Napsauta ja irrota -järjestelmän ansiosta voit helposti asentaa ja irrottaa käsituet. Merkinnät auttavat varmistamaan, että käsituet asetetaan samalle korkeudelle niiden irrottamisen jälkeen. Pehmustetut päälliset saatavilla.

Lonkan ja lantion tuet

Luo tukipinnan, joka estää sivusuuntaisen liikkeen istuimessa ja vähentää lantion taipumusta kallistua sivulle. Sekä lonkka- että lantiotukea voidaan säätää käyttäjän istuessa istuimessa.

Polven sisä- ja ulkotuet

Tarjoaa vakautta alaraajoille ja ehkäisee lonkan adduktiota tukemalla reiden alaosa, polven sisäosaa ja säären yläosaa.

Jalkatuki

Erilaisia jalkatukia on saatavana. Kiinnitetään käytettävään alustaan.



Go to video playlist with the x:panda shape



Merkinnit

X:panda shape mukautuu monenlaisiin tarpeisiin ja mahdollistaa lapselle parhaan mahdollisen istuma-asennon. Jotta käyttö ja tunnistaminen olisi helpompaa vanhemmille, hoitajille ja asiantuntijoille, x:panda shape -istuinjärjestelmän ulko- ja sisäpinnalla on selkeät merkinnit, jotka helpottavat tuotteen säätämistä.




Selkätuen ulkopinta

Näiden merkintöjen avulla voidaan tunnistaa, mistä säädetään selkänojan kallistus ja selkänojan ja pääntuen korkeus.



Selkätuen sisäpinta

Nämä merkinnit auttavat tunnistamaan selkätuen koon ja mistä säädetään alemmaa ja ylemmää selkäosaa.

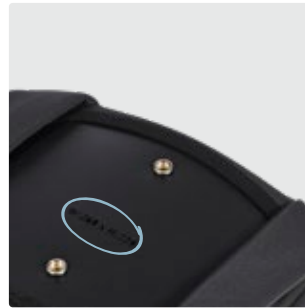

Tyynyn kokomerkintä

Merkintä tyynyn takaosassa kertoo tyynyn koon, joka vastaa istuinjärjestelmän selkänojan kokoa.



Lukitus kuljetusta varten

Dynaamisen selkäosan lukitus vaaditaan, jos istuinta käytetään kuljetukseen moottoriajoneuvoissa.



Istuinlevy (simple)

Istuimen syvyys ja leveys helppo tarkistaa levyn mittataulukoista.



Erilliset istuinlevyt (advanced)

Merkinnit kertovat erillisten istuinlevyjen asennosta sekä sisemmän ja ulomman polvituen säädöistä.



Selkätuen kallistus

Selkänojan kallistustoiminnon kulman helppo tunnistaminen.



Dynaamisen selkäosan vastuksen säätö

Säädettävä dynaamisen selkäosan vastuksen säätö.










Puhdistaminen

X:panda shape istuimen käyttö, puhdistus ja huolto on helppoa ja yksinkertaista, joten vanhemmille ja hoitajille jää enemmän aikaa mielenkiintoisempiin aktiviteetteihin. Tyynyjen päälliset voidaan helposti irrottaa pesua varten.



Explore our cleaning guide for the x:panda shape

Mitat

		Lapsi	1	2	3
	Istuimen leveys	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Istuimen syvyys	120-160 mm	160-320 mm	240-420 mm	350-550 mm
	Selkätuen korkeus	270-360 mm	280-370/320-420/ 360-470mm	340-440/380-490/ 430-560 mm	420-530/470-600/ 540-690 mm
	Max. käyttäjän paino	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Max. käyttäjän paino kuljetuksessa	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Selkätuen kulma	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
	Selkätuen leveys, yläosasta mitattuna	190 mm	180/220/260 /300/340 mm	180/220/260 /300/340/380 mm	220/260/300 /340/380/420 mm
	Kokonaisleveys	240 mm	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
	Paino	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

Mitat on otettu kumpikin lonkka max. loitonnuksessa. Kokojen 1-3 mitat otettu Advanced-istuimella. Lisätietoja mittauksista verkkosivuillamme.

Vaihtoehtoisia alustoja yksilöllisiin tarpeisiin

X:panda shape luo lantiolle, reisille ja jaloille vakaan perustan, jonka päälle vartalo, hartiat ja pää voivat asettua tasapainoisesti. Tämä mahdollistaa pään, käsivarsien ja käsien liikkeen. Istuin vastaa monimutkaisiinkin vaatimuksiin ja tarjoaa lapselle luotettavan ja optimaalisen asennon.


Kaikki säädöt ovat helposti oivallettavissa ja kohtuullisen helppoja tehdä. Istuimet voidaan asentaa koosta riippuen useisiin alustoihin, kuten Multi Frame, Combi frame ja muut alla luetellut alustat.




High-low:xo -sisäalusta ja -kuljetusalusta



Stingray Frame

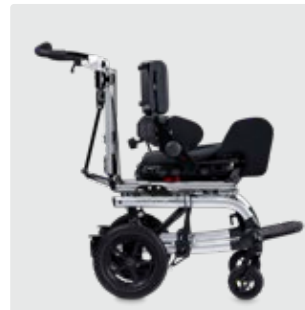


Combi Frame:x, Multi Frame:x & Multi Frame -pyörätuolialusta

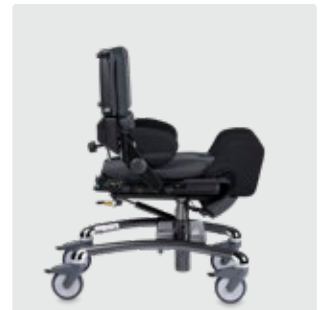


Strong Base

Lisävarusteet

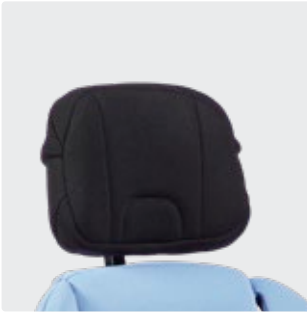

Pään tuet

See the accessory category online

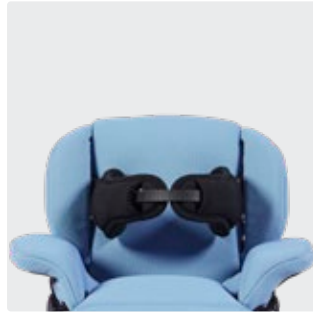

Vauvaistuimen rintakehä- tuki päällisineen

905028-xx



Työntökahva ylempään selkäosaan

90507x



Kuomu

87401x0

Vaatii lisäksi kiinnikkeet.




Säätävät tai kiinteät olka- varsituet

9050xx-xx



Kiinteät tai kääntyvät vartalotuet

See accessories category

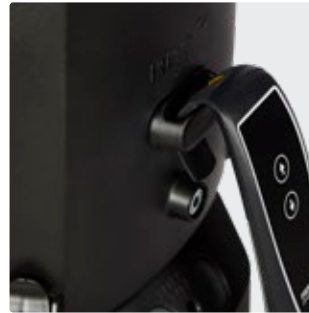

Kaukosäätimen pidike selkosaan tai käsitukeen

905030/905030-x



Liivit ja vyöt

See the accessory category online



Kiinnikkeet hihnan ohjausta varten, leveämmät

905068



Kiinnikkeet hihna ohjausta varten, korotus

8910260

Vaaditaan myös 905068



Terapiakitin putket ja väli- kappale, jossa on pehmuste ja suoju.

905059/90301x-xx



Dynaamisen selkäosan kallistus- moduuli

90515x



Pehmeä pöytä vauvaistuimeen
905066-70



Pöytä
See accessories category



Tartuntanko pöytään
8910750



Leluteline
8910740



Lantiotuki
90504x-xx



Lonkkatuki
90504x-xx



Polven sisä- ja ulkotuet
9050xx-xx




Haarakiila
9050xx-xx



Alastettava polven ulkotuki
90501x-xx
For size 2 and 3 advanced seating



Istuinkiilat
90505x

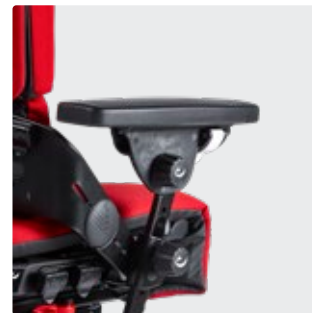

Käsituki ja säätöruuvi
891061x-xx/90501x-xx/8910615-11



Kiinnike kommunikaattoria varten
905033-x



B9501.1.0 | x-panda shape brochure - Global EN | 2023 | Reserving our rights for printer's error or discontinued products. Please find an updated edition on our website etac.com © R82 A/S All rights reserved.

Etac is a world-leading developer of innovative assistive devices and patient handling equipment. Since 1973, we have been committed to improving quality of life for the individual, family members and caregivers.

For the intended purpose of the products and latest information, please visit www.etac.com



Maahantuonti ja myynti:
Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algotrehab.fi

