

Master Glide Flexi – Käyttöohje



Varoitus

Suosittelava välimatka siirtymisalustojen välillä on max. 20 cm



Varmista, että jarrut ovat lukittuna sekä sängyssä että pyörätuolissa ennen siirtymistä.

Tekniset tiedot:



Materiaali:
Polyetyleeni – kierrätettävä

Liukuesteteippi:
100 % polyesteri

Tuote:	Koko:	Paino:	Kahvojen lkm:
MC 001-7000 Small	L 45 x B 35 cm x 5 mm	0,52 kg	5
MC 001-7010 Medium	L 60 x B 35 cm x 5 mm	0,88 kg	5
MC 001-7010 Large	L 75 x B 35 cm x 5 mm	1,12 kg	5



Käyttäjäpaino:

Suurin suositeltava käyttäjäpaino: 160 kg välimatka siirtymisalustojen välillä 20 cm.



Puhdistus ja desifointi Master Glide Flexi:

Master Glide voidaan pyyhkiä saippuaveteen kostutetulla liinalla, tai pinta voidaan puhdistaa ja desifoida kaikilla sairaaloissa käytettävillä alkoholia sis.aineilla.



Tarkista ennen käyttöönottoa:

Tarkista Master Glide silmämääräisesti varmistaaksesi, että tuote ei ole vioittunut – rokkoutunut, syviä naarmuja.



CE-merkintä:

Tuote on Medical Device Regulation (EU) 2017/745 – luokka 1 standardin mukainen tuote.



Käyttöohje:

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen Master Glide Flexin käyttöönottoa.



Hävittäminen:

Kansallisesti säädettyjen ohjeiden mukaisesti.



master-care.dk

Sofienlystvej 3, 8340 Malling

Tel. 86 93 85 85 E-Mail: info@master-care.dk