



FIActive Micro Plus

Käyttöopas – versio 105.0

MD CE



Guldmann™

Versio 105.0

Tuotenrot:
2815X1

1.00 Käyttötarkoitus ja käyttö	2
1.01 Valmistaja	2
1.02 Käyttötarkoitus	2
1.03 Käyttökohteet	2
1.04 Käyttöperiaate	2
1.05 Tärkeää/varotoimenpiteet	3
1.06 UHF RFID -tunniste	3
1.07 Etiketit ja merkinnät	3
1.08 Käyttö	3
2.00 Huolto	3
2.01 Puhdistus	3
2.02 Omistajan päivittäinen huoltotyö	3
2.03 Nostoliinon hävittäminen	4
3.00 Huolto ja käyttöikä	4
3.01 Turvallisuus-/huoltotarkastukset	4
3.02 Arvioitu käyttöikä	4
4.00 Tekniset tiedot	5
5.00 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
6.00 Ympäristöpoliittinen kannanotto – V. Guldmann A/S	5
7.00 Takuu ja huoltoehdot	5
A. Takuu	5
B. Huolto tai korjaus	5
8.00 Nostoliinan asettaminen	6
9.00 Nostoliinan asettaminen – Active Micro Plus / GLS5 Aktiivnostin	8
10.00 Tuoteyhdistelmät	9

1.00 Käyttötarkoitus ja käyttö**1.01 Valmistaja**

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N, Tanska
Puh. + 45 8741 3100
www.guldmann.com

1.02 Käyttötarkoitus

Nostoliina on tarkoitettu henkilön tai henkilön kehon osien nostamiseen tai tukemiseen.

1.03 Käyttökohteet

Nostoliina sopii käytettäväksi sairaaloissa, hoitokodeissa, kuntoutuskeskuksissa, laitoksissa ja yksityiskodeissa.

1.04 Käyttöperiaate

Nostoliina on tarkoitettu käytettäväksi sekä siirrettävien nostimien että katonostimien kanssa. Se sopii käytettäväksi istuma-asennossa olevan henkilön nostamiseen ja tietyissä tilanteissa puoli-istuvassa asennossa olevan henkilön nostamiseen Guldmann-päätuen kanssa.

Nostoliina on tarkoitettu henkilöille, jotka pystyvät kannattelemaan päätä, mutta ylävartalon, lantion ja reisien lihasvoima on heikentynyt. Se on suunniteltu tilanteisiin, joissa on erityisen tärkeää, että nostoliina on helppo ottaa käyttöön ja irrottaa tai tilanteisiin, joissa tarvitaan avointa muotoilua, kuten wc-käynnit ja hygieniat.

Edellytykset nostoliinan käytölle ovat:

- Nostoliinaa käyttävät ammattihenkilöt, jotka ovat saaneet opastuksen kyseisen liinan käyttöön.
- Käytetty nostoliina on oikean kokoinen.
- 255 kg:n (560 paunan) nimelliskuormitusta ei saa ylittää.
- Nostoliinaa käytetään nostamaan henkilöä istuvassa tai puoli-istuvassa asennossa.
- Avustaja huolehtii nostettavan henkilön hyvinvoinnista nostoliinaa käytettäessä.
- Nostoliina on tarkoitettu käytettäväksi Guldmann-nostoripustimien kanssa, katso sopivat yhdistelmät käyttöohjeen takasivulta. Jos nostoliinaa käytetään yhdessä muiden kuin Guldmannin valmistamien tuotteiden kanssa, ammattihenkilöstön on suoritettava riskinarviointi.

Tärkeää:

Guldmann ei ole vastuussa virheistä tai onnettomuuksista, jotka johtuvat seuraavista seikoista:

- nostoliinan väärä käyttö
- muiden toimittajien tuotteiden yhdistäminen Guldmannin tuotteisiin
- avustajan tai käyttäjän huolimattomuus

Jos nostohihnaa käytetään yhdessä muiden kuin Guldmannin valmistamien tuotteiden kanssa, nostoliina on kiinnitettävä nostoripustimeen samalla tavalla, ja ammattihenkilöstön on suoritettava riskinarviointi.

Suunnittele nosto-operaatio ensin huolella. Älä koskaan jätä nostettavaa henkilöä nostoliinaan yksin. Älä aloita nostamista ennen kuin olet tarkastanut, ettei käyttäjä juutu kiinni mihinkään ja ettei nostoliina tartu sänkyyn, pyörätuoliin tai muihin esineisiin. Nostettavan pään ja raajojen on oltava siten, etteivät ne pääse puristumaan mihinkään väliin. Varo letkuja ja johtoja, jotka on kiinnitetty käyttäjään ja/tai laitteeseen. Tarkista, että käsiohjaus ja se sen johto roikkuvat vapaasti, eivätkä ole kiertyneet mihinkään ennen kuin nostin on aktivoitu ylös tai alas.

1.05 Tärkeää/varotoimenpiteet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen nostoliinan käyttöä.
- Nostoliinan enimmäiskuormitusta ei saa koskaan ylittää.
- Nostoliinaa saa käyttää ainoastaan henkilöiden nostamiseen.
- Ennen nostoliinan käyttöä se on tarkastettava kohdan 2.02 mukaisesti.
- Älä koskaan käytä nostoliinaa, joka on liian suuri käyttäjälle.
- Vain valmistaja saa suorittaa mahdolliset korjaukset.
- Kaikki vaaratilanteet, joita tämän laitteen käyttöön liittyen ilmenee, on raportoitava valmistajalle ja paikalliselle viranomaiselle voimassaolevien määräysten mukaisesti.

1.06 UHF RFID -tunniste



Tässä tuotteessa on passiivinen UHF RFID -tunniste, joka on integroitu tuote-etikettiin. RFID-tunnistetta voidaan käyttää kalustonhallintaan ja seurantatarkoituksiin. RFID-tunniste on luettavissa laitteilla, jotka ovat EPC global UHF Class I Gen ISO 18000-63 -standardin mukaisia.

1.07 Etiketit ja merkinnät



CE-merkintä




Luokan I lääkekinnallinen laite
EU MDR -säädöksen mukaan




Lue käyttöopas ennen käyttöä


Esimerkki sarjanumeroetiketistä

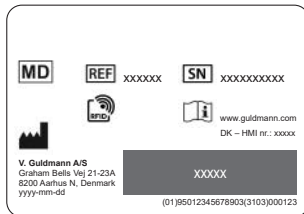

Tarkastusetiketti

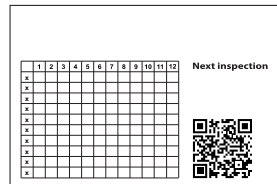

Tuote-etiketti

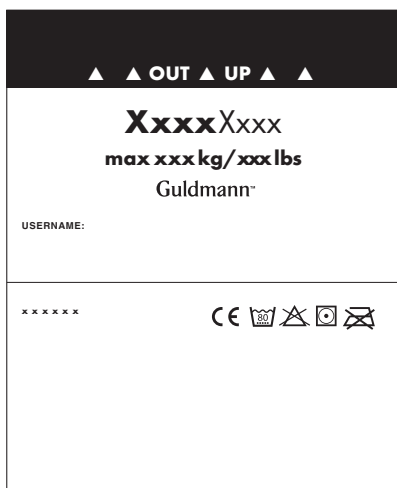

Kokoetiketti




1.08 Käyttö

Mikäli nostoliinan valinnassa tai käytössä esiintyy epäselvyyksiä, ota aina yhteyttä myyjään.

Nostoripustin, 4 kiinnityspistettä

Huomio!


Ole varovainen kiinnittäessäsi nostoliinan hihnoja nostokehikon koukkuihin. Varmista, että nostoliinan hihnat on asianmukaisesti asetettu nostoripustimen koukkuihin. Painaessasi käsiohjauksen nostopainiketta nostaaksesi, tarkista uudelleen, että kaikki hihnat on asetettu asianmukaisesti nostokehikon koukkuihin (kuva 1).

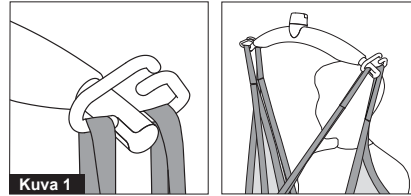

nostokehikko

Huomio!

Ole tarkkana kiinnittäessäsi nostoliinaa ripustimen koukkuihin. Varmista että hihnat on vedetty kokonaan nostokehikon kumisen turvasuojan (kuvassa A) läpi ja paikalleen nostoripustimen koukkuihin. Painaessasi nostopainiketta nostaaksesi, tarkista uudelleen, että kaikki hihnat on asetettu asianmukaisesti nostoripustimen koukkuihin (kuva 1a ja 1b).

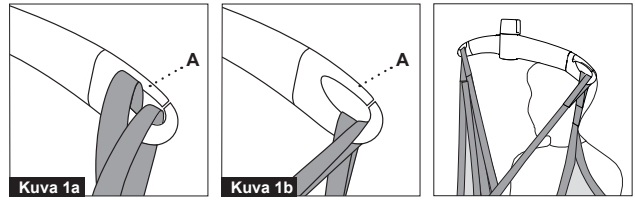

Nostoliinan asettaminen, katso sivu 5

2.00 Huolto

2.01 Puhdistus



Normaali pesu merkityssä lämpötilassa



Älä käytä valkaisuaineita



Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa



Älä silitä

2.02 Omistajan päivittäinen huoltotyö

Tarkista nostoliina kulumisen ja vaurioitumisen varalta ennen käyttöä seuraavan tarkistuslistan mukaan, jonka tarkoitus ei ole esittää kaikkia mahdollisia tarkistusvaiheita. Mahdolliset vauriot saattavat vaihdella. Tarkastaja päättää itse, mitkä tarkastukset ovat tarpeen käyttöpaikassa.

Nostoliinan tarkastuksen tarkistuslista

Tarkista ennen Guldmannin nostoliinan/tarvikkeen käyttöä seuraavat:

Onko nostoliina puhdas?

Noudata laitospaikoista infektioiden torjuntamenetelmää.

Onko nostoliinan tuote-etiketti paikallaan, luettavissa ja täydellinen?

Puuttuvat, lukukelvottomat tai epätäydelliset nostoliinan tuote-etiketit voivat tehdä nostoliinan oikean koon, käyttötarkoituksen ja/tai painorajan tunnistamisen mahdottomaksi.

Ovatko nostohihnat ja ompeleet ehjät?

- Tarkasta, etteivät ompeleet ole katkenneet tai kuluneet
- Tarkista, ettei hihnoissa ole solmuja
- Tarkista, etteivät hihnat ole revenneet tai haurastuneet
- Tarkista, ettei näkyvissä ole aukkoja tai reikiä
- Tarkista, ettei kankaaseen tai hihnoihin ole tarttunut mitään

Onko kangas vahingoittumaton?

- Tarkista, ettei näkyvissä ole tavanomaisesta poikkeavaa tai liiallista kulumista tai merkkejä hankautumisesta
- Tarkista, ettei kangas ole revennyt tai haurastunut
- Tarkista, ettei värissä ole muutoksia tai suuria poikkeamia
- Tarkista, ettei näkyvissä ole aukkoja, repeämiä tai reikiä
- Tarkista, etteivät saumat ole revenneet tai löystyneet
- Tarkista, ettei kankaassa ole kemikaalien/lämmön aiheuttamaa kulumista
- Tarkista, ettei materiaalissa ole muutoksia, esim. kankaan jäykistyminen
- Tarkista, ettei kankaaseen ole painunut tai kiinnittynyt mitään

Onko nostoliinan muotoa muutettu, lyhennetty tai pidennetty suhteessa alkuperäiseen kokoon käyttämällä solmuja, neuvoja, teippiä tai muita menetelmiä?

Johtopäätös

Jos nostoliinassa esiintyy vähintään yksi edellä mainituista asioista, se on poistettava käytöstä riippumatta nostettavan henkilön painosta.

2.03 Nostoliinojen hävittäminen

Nostoliinat hävitetään polttamalla. Asianmukaisella polttamisella polyesteri hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi.

3.00 Huolto ja käyttöikä

3.01 Turvallisuus-/huoltotarkastukset

Kansainvälisen nostinstandardin EN/ISO 10535 "Nostolaitteet vammaisten siirtoon – Vaatimukset ja testausmenetelmät" mukaan tarkastus on suoritettava kuuden kuukauden välein. Nostoliinojen tarkastusmenettely on oltava perusteellinen, järjestelmällinen ja säännöllinen. Tämän lisäksi suositellaan sekä käytännön että näönvaraisia tarkastuksia.

Tietyt vauriot on huomattavasti helpompi havaita käytännön tarkastuksessa kuin pelkällä näönvaraisella tarkastuksella. Esi-merkiksi: Materiaalin jäykkyys, vialliset hihnat ja kulunut kangas. Nämä havaitaan koskettamalla nostoliinaa fyysisesti. Näönvaraisella tarkastuksella ei todennäköisesti havaita kaikentyyppisiä nostoliinojen vaurioita.

Mieti nostoliinojen tarkastuksiin liittyvien kirjallisten asiakirjojen koostumusta ja käsittelyä. Asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot: valmistajan nimi, nostoliinan tyyppimerkintä, leveys ja pituus, nostoliinan yksilöllinen tunnistenumero (tärkeä samankaltaisten nostoliinojen erottamisessa) sekä nostoliinan kunto. Muita tärkeitä tietoja voivat olla nostoliinan vastaanotto- tai käyttöönottopäivämäärä laitoksessasi ja kaikki hyödylliset erityispiirteet.

Ole varovainen vaurioituneiden ja viallisten nostoliinojen kanssa ja poista ne käytöstä, jos vähintään yksi seuraavista asioista ilmenee:

- Kemialliset tai syöpymisen jäljet
- Sulamis- tai palamisjäljet

- Naarmut, reiät, repeämät tai viillot
- Katkenneet tai kuluneet ompeleet
- Puuttuvat, lukukelvottomat tai puutteelliset nostoliinan tuote-etiketit
- Solmut nostoliinassa
- Kuluminen ja repeytyminen
- Muut näkyvät vauriot, jotka saavat epäilemään nostoliinan vahvuutta.

Nostoliinojen tarkastukset suoritetaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan suojaamiseksi. Nostoliinojen järjestelmällisillä tarkastuksilla on lisäetuja:

- auttavat tunnistamaan vaurioiden syntymisen
- estävät mahdollisia vaaratilanteita
- varmistavat laadukkaan työn

HUOMAA: Asianmukaisesti ammattitaitoisen henkilön, joka tuntee nostoliinan rakenteen, käytön ja huollon, on suoritettava tarkastukset.

Visuaaliset näyte-esimerkit synteettisten liinojen vaurioista *)


Kemialliset/syövyttävät palojäljet



Rikkonainen sauma




Murskattu/rispaantunut verkko

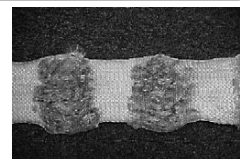

Solmut



Sulaminen/palaminen

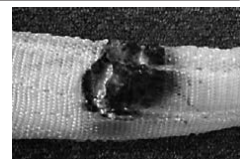

*) visuaalisten näytekuvioiden ei ole tarkoitus esittää kaikentyyppisiä mahdollisia vaurioita

3.02 Arvioitu käyttöikä

Nostoliinan odotettu käyttöikä on 5 vuotta, kuitenkin yksilöllisesti käytötavasta, pesusta jne. riippuen. Ennen käyttöä nostoliina on tutkittava osion 2.02 kuvauksen mukaisesti, ja jos se ei vastaa tarkastusvaatimuksia, se on hävitettävä.

Käyttö

Tuotteen käyttöympäristö:

- Käyttölämpötila +10 °C - +35 °C
- ilman suhteellinen kosteus välillä 30 % ja 70 %

Lämpötilaa lukuun ottamatta samat ympäristöolosuhteet koskevat kuljetusta ja varastointia. Nostoliinaa on säilytettävä tasaisella, puhtaalla alustalla tai ripustettuna nostolenkeistä koukkuihin.

- Kuljetus- ja varastointilämpötila -10 °C - +40 °C

4.00 Tekniset tiedot

Nostokapasiteetti, SWL 255 kg
Materiaali Polyesteri*)

*) EN 1021 -standardin mukainen palonsuoja-aine

5.00 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 5. huhtikuuta 2017 antaman asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti Luokan I lääkinälliseksi laitteeksi.

6.00 Ympäristöpoliittinen kannanotto – V. Guldmann A/S

Me Guldmannilla pyrimme aktiivisesti varmistamaan, että hallitsemamme kielteiset vaikutukset minimoidaan.

Guldmannin tavoitteena on varmistaa ympäristöjärjestelmämme ja sen suorituskyvyn jatkuva parantaminen:

- Tiivis yhteistyö toimittajiemme kanssa, varmistaa että käytämme mahdollisimman kestäviä materiaaleja ja prosesseja.
- Jätteiden ja päästöjen suhteellisen määrän vähentäminen ja mahdollisimman korkean kierrätysasteen varmistaminen
- Varmistamme, että tuotteistamme ei aiheudu tarpeettomia negatiivisia ympäristövaikutuksia käytön, kierrätyksen ja mahdollisen hävittämisen yhteydessä
- Voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen
- Varmistamme ympäristöjärjestelmämme ja siihen liittyvän ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen

Kaikki Guldmann-konsernin tytäryhtiöt noudattavat edellä esitettyä toimintalinjaa, ja edellytämme, että yhteistyökumppanimme (tavaran toimittajat ja jakelijat) noudattavat tätä toimintalinjaa.

Guldmannin kaikki työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi johdolle, jos heidän tietoonsa tulee, että organisaation sisällä tai yhteistyökumppaneissamme laiminlyödään ympäristönsuojelua koskevia periaatteita.

Toiminnassa otetaan huomioon käytettävissämme olevat taloudelliset ja teknologiset resurssit sekä yhtiön yleiset taloudelliset tavoitteet, jotka perustuvat perusarvoihimme.

7.00 Takuu ja huoltoehdot

A. Takuu

Guldmann takaa, että sen laitteissa ei ole normaalikäytössä olennaisia vikoja, ja että ne toimivat olennaisilta osin laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettujen määritysten mukaisesti.

Tämä nimenomainen takuu on voimassa yhden vuoden alkuperäisen hankinta- ja asennuspäivästä (takuu-aika). Jos takuu-aikana esitetään pätevä korvausvaatimus toimintahäiriöstä tai laitteistoviasta, Guldmann korjaa tai vaihtaa laitteen ilman lisäkustannuksia. Guldmann harkitsee itse, korjataanko vai vaihdetaanko laitteisto.

Takuu ei kata mitään laitteen osaa, joka on vahingoittunut käyttäjän tai muiden henkilöiden tekemien toimien johdosta. Takuu ei kata mitään laitteen osaa, jota käyttäjä tai muut henkilöt ovat muuttaneet tai muokanneet. Guldmann ei takaa, että nostolaitteen toiminnot täyttävät vaatimuksesi, ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä.

Edellä esitetty takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset ja oletetut takuut, olivatpa ne suullisia, kirjallisia tai oletettuja, ja edellä mainitut korjaustoimenpiteet ovat ainoat ja yksinomaiset oikeutesi. Vain

Guldmannin valtuutettu huoltohenkilö saa tehdä muutoksia tähän takuuseen tai lisätakuisiin, jotka sitovat Guldmannia. Näin ollen muut lausunnot, kuten mainonta tai esitykset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia, eivät ole Guldmannin takuita.


Tämä takuu on mitätön, jos laitetta käytetään ja huolletaan tavalla, joka on ristiriidassa sen käyttötarkoituksen tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden kanssa. Jotta takuu pysyy voimassa koko takuuajan, kaikki laitteiston huolto on annettava Guldmannin valtuuttaman teknikon tehtäväksi. Kaikki osat tai osat, jotka Guldmann-sertifioitu teknikko korjaa tai vaihtaa, ovat takuunalaisia jäljellä olevan takuuajan.

B. Huolto tai korjaus

Pyydä Guldmannin korjaajalta lupa palauttaa vialliset tuotteet takuuajana. Sinulle toimitetaan palautusvaltuutuksen numero ja osoite, jonka kautta voit palauttaa tuotteen takuuhuoltoon tai vaihtoa varten. Älä palauta tuotteita Guldmannille takuuajan saamatta palautusnumeroa.

Jos postitat tuotteen, pakkaa se huolellisesti tukevaan pakkaukseen, jotta se ei vahingoitu. Anna palautusvaltuutuksen numero, ongelman lyhyt kuvaus sekä palautusosoite ja puhelinnumero. Guldmann ei vastaa osien katoamisesta tai vaurioitumisesta kuljetuksen aikana, joten suosittelemme pakkauksen vakuuttamista.

1.

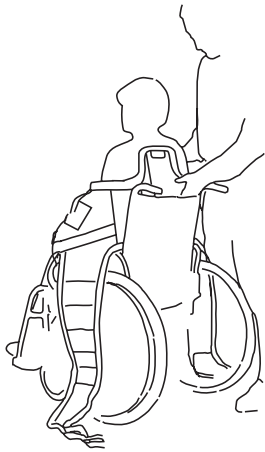
**Active Micro Plus**

Aseta nostoliina käyttäjän hartioille ja/tai pyörätuolin selkänojalle.

Varmista, että nostoliina on keskitetty tarkastamalla, että keskikohdan merkintä on käyttäjän selkärangan kohdalla.


Pyydä käyttäjää nojaamaan eteenpäin ja työnnä nostoliinaa varovasti alaspäin käyttäjän selän takana, kunnes kaksi sormea on lapaluiden alla ja kaksi sormea vyötärölinjan yläpuolella.

2.

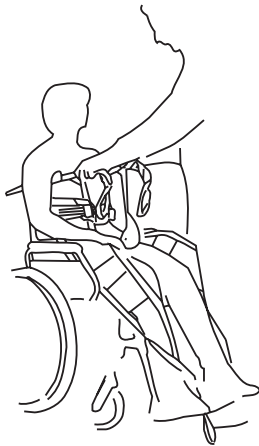**Active Micro Plus**


Aseta nostoliina käyttäjän kainaloiden alle ja vartalon ympäri varmistaen kahden sormen leveyden nostoliinan ja kainalon välissä.

3.

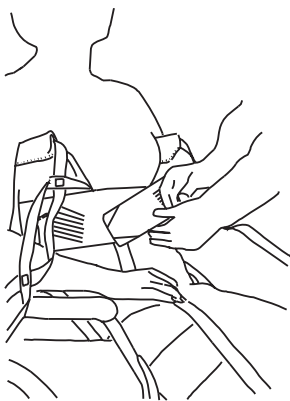**Active Micro Plus**


Kierrä ja kiinnitä tukivyö tiukasti ylävartalon ympäri estääksesi liinaa liukumasta.

4.

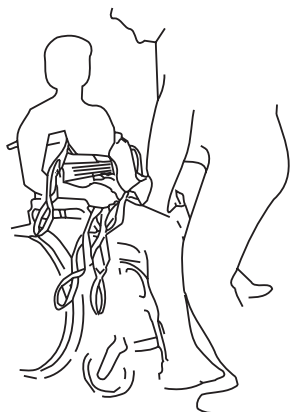**Active Micro Plus**

Aseta jalkatuet molempien reisien alle varmistaen rypyttömyyden mukavuuden maksimoimiseksi.

5.

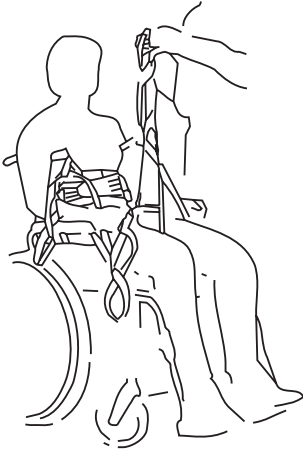**Active Micro Plus**

Tarkasta, että ylempät nostohihnat ylettyvät samalle korkeudelle kuin jalkatukien hihnat. Vedä jalkahihnat ristikkäin ennen kuin kiinnität ne ripustimeen.


Nosta nostoliinaa hieman niin, että hihnat ovat kireällä. Kiristä tarvittaessa tukivyo.

Tarkista hihnojen kiinnitys.

Jos nostat käyttäjää, jolla on alentunut lihasjänteys, pidä hänen jalkojaan/polviaan yhdessä.

Active Micro Plus -nostoliinaa voidaan käyttää nostamiseen istuma-asennosta sängyllä.

6.

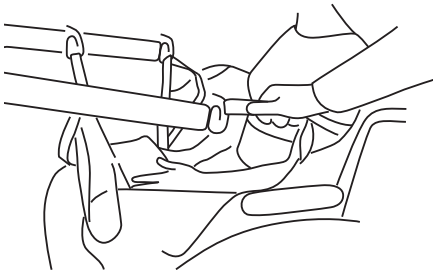
**Active Micro Plus / GLS5 Aktiivinostin**

Aseta käyttäjän jalat jalkalevyille ja säädä polvityyny - polvityynyn yläosan pitäisi olla säären yläosan tasalla kahden sormen leveyden päässä polvitaippeesta.

Pohjehihnaa **ei** käytetä tämän nostoliinan kanssa. Kiinnitä siksi hihnat polvityynyn taakse (vältä löysäämistä hihnoja).

Neljä hihnaa voidaan nyt kiinnittää puomin koukkuihin. Takakoukut ovat olkahihnoja varten ja etukoukut jalkahihnoille. Säädä tarpeen mukaan.

7.

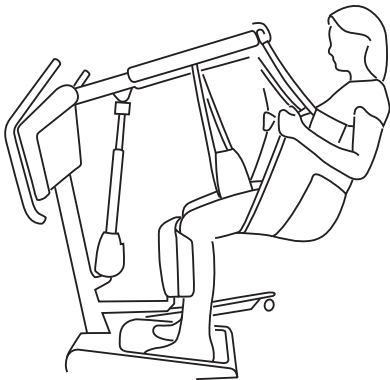
**Active Micro Plus / GLS5 Aktiivinostin**

Nosta nostopuomia venyttääksesi nostoliinaa – **varmista, että kaikki hihnat ovat edelleen tiukasti kiinni.**

Kommunikaatio on pidettävä yllä koko noston ajan.


Käytettäessä Active Micro -nostoliinaa käyttäjän on oltava 90 asteen polviasennossa mukavuuden ja tuen varmistamiseksi.

8.

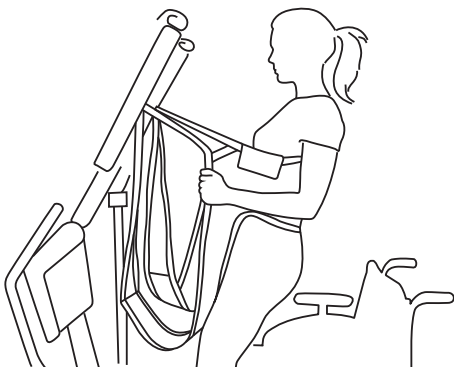**Active Micro Plus / GLS5 Aktiivinostin**

Jos sinun on riisuttava alavartalon vaatteita tai laskettava käyttäjä wc-istuimelle, älä käytä kahta jalkahihnaa ja nosta kuten seisomaliinalla.

9.

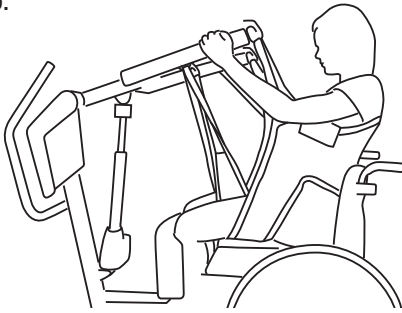

Active Micro Plus / GLS5 Aktiivinostin



Kun asetat henkilön takaisin istuma-asentoon, työnnä nostin tuolin yläpuolelle ja aseta käyttäjä siten, että hänen pohkeensa ovat tuolin suuntaisesti.

Aloita lasku ja pyydä käyttäjää työntämään lantiota taaksepäin varmistaaksesi oikean sijoituksen.

Riisu nostoliina suorittamalla pukemishjeet päinvastoin. Ole varovainen poistaessasi nostoliinaa käyttäjältä välttääksesi ihon hankautumisen ja liikkeen.

Product combinations

Lifting module / Mobile lifter

GH1, GH1 F, GH1 Q, GHZ, GH3, GH3+ lifting module	
GH3 Twin lifting module	

GL5.2 Mobile lifter	
---------------------	---

Sling	Item no.
Active Micro Plus	2810x1
Active Trainer	2830x1
Active Vest Kids	2831x1
Gait Trainer, Bariatric	283100
Gait Trainer, Bariatric	283180
Gait Trainer	2832x1
Vest for Stand Shell	2835x1

Basic sling, Polyester	2700x1
Basic Low sling, Polyester	2710x1
Basic High sling, Polyester	2720x1
Basic sling, Net, fixed padding	2701x3
Basic Low sling, Net, fixed padding	2711x3
Basic High sling, Net, fixed padding	2721x3
Basic Shell, sling	2750x2
Basic Comfort High, polyester	2770x1
Basic Comfort High, net	2770x2








Custom Amputee sejl	2900x1
Sit-On Comfort	2930x1
Sit-On Comfort High	2940x1
Sit-On II	2970x1
Sit-On High II	2980x1
Sit-On Comfort High, hygiene	2941x1
Modified Sling	2949x

Repo. Sling, Bariatric	284656
Repo. Sling	28465
Repo. Sling, Short	284653
Repo. Sling, Poly	284660
Repo. Sling, Grey net	284651
Repo. Sling, Grey net	284658
Repo. Sling, Grey net	284662
Repo. Sling, TENCEL	284657
Repo. Sling, Spacer	284659
Repo. Sling, Spacer, 6 loops	284669

Horizontal Sling, Standard	28463
Lifting sheet	2844851
Multi Support Sling, one size	28467
OR Sling, Poly	2848x1
Leg Sling Box of 10 pcs	28650
Pannus Support	28660
Turner	28700
Twin Turner	28751
Twin Turner, Bariatric	28760

Disposable High + Kids	2836x5
Disposable Twin Turner II, regular	287501
Disposable Twin Turner II, large	287511
Disposable Twin Turner, Bariatric	287521
Disposable Leg sling II	286501
Disposable High, bariatric	2836x2
Disposable Repositioning sling, 500 kg	284555
Disp. Horizontal sling, standard, 350 kg	284631
Disposable Multi support sling	284223
Disposable OR Sling	2848x5
Disposable Gait Trainer	2835x5
Disposable Comfort High	2770x5
Disposable Micro Plus	2815x5
Prone Positioning Sling (284221)	284225
Side Positioning Sling (Kit)	284226

Hanger

Lifting hanger X-SMALL Item no. 556870	Lifting hanger SMALL Item no. 556880	Lifting hanger MEDIUM Item no. 556890	H-hanger Item no. 556950	Cross hanger 400 kg Item no. 561610	Cross hanger 500 kg Item no. 550800	Connecting bar + Cross hanger 500 kg Item no. 550544
						
x	x	x	x	x	x	
						x

x	x	x	x	x		
---	---	---	---	---	--	--

2-4, 4-6, 6-10, 10-16, XS	10-16, XS, S, M	S, M, L, XL, 2XL (6-10, 10-16)	S, M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	
x	x	x	x	x	x	
x	x	x (x)	x	x	x	x
x	x	x (x)				
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		

x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x

x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x

		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x

x	x	x		x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x

x	x	x	x	x		
		x		x	x	
		x		x	x	
		x		x	x	x
		x		x	x	
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x



| Time to care |

V. Guldmann A/S
Puh. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann™