


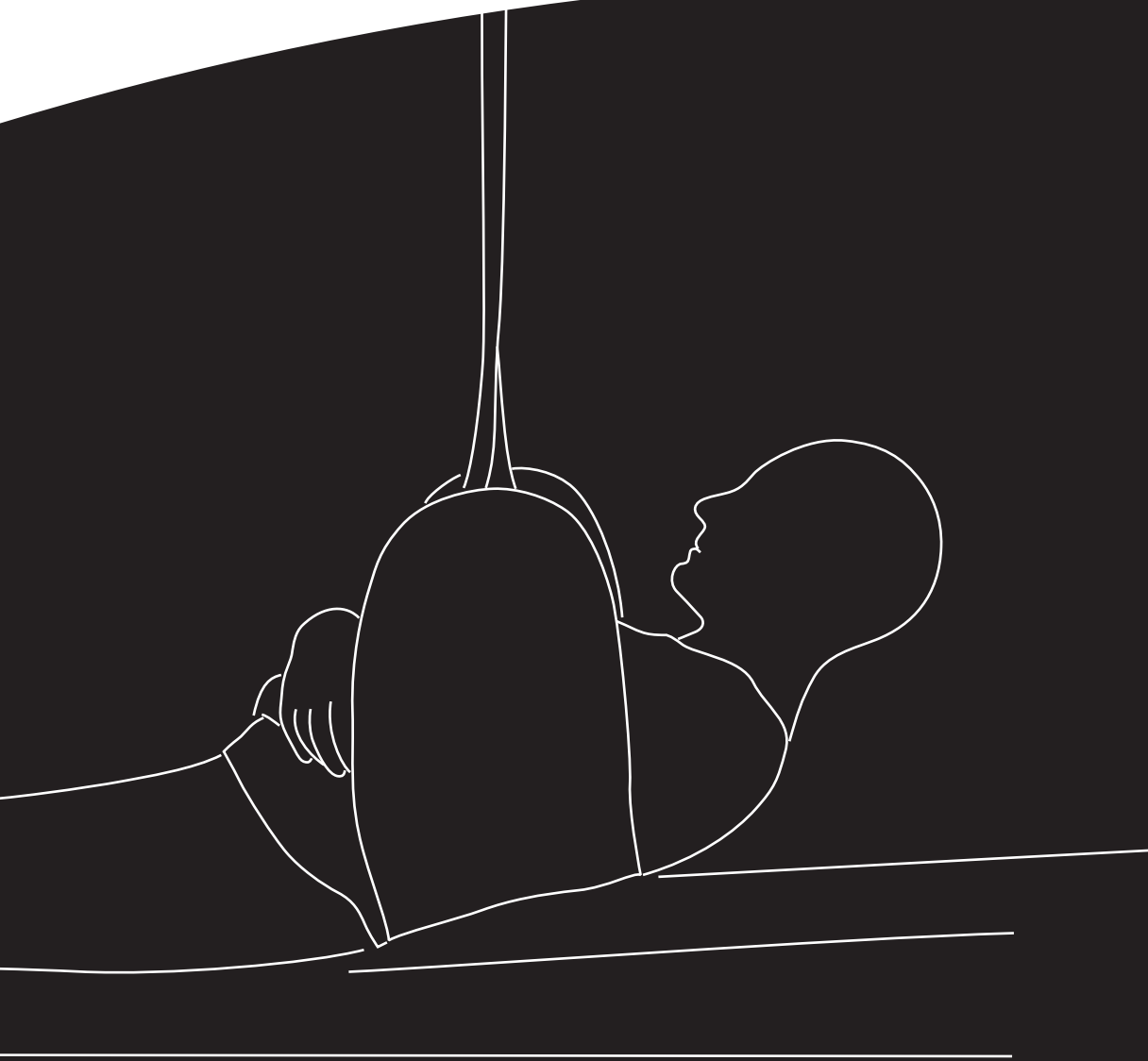

FIMulti support -monikäyttöliina

Käyttöopas – versio 103.0

MD CE



Guldmann™

Versio 103.0

Tuotenrot:

28467 Multisupport-monikäyttöliina, keltaista polyesteriä
284223 Multisupport-monikäyttöliina, valkoista polyesteriä

1.00 Käyttötarkoitus ja käyttö	2
1.01 Valmistaja	2
1.02 Käyttötarkoitus	2
1.03 Käyttökohteet	2
1.04 Käyttöperiaate	2
1.05 Tärkeää/varoimenpiteet	2
1.06 UHF RFID -tunniste – 28467 keltainen polyesteri	3
1.07 Etiketit ja merkinnät	3
– 28467 keltainen polyesteri	3
– 284223 valkoinen polyesteri	3
1.08 Käyttö	3
2.00 Huolto	4
2.01 Puhdistus	4
2.02 Omistajan päivittäinen huoltotyö	4
2.03 Liinojen hävittäminen	4
3.00 Huolto ja käyttöikä	4
3.01 Turvallisuus-/huoltotarkastukset	4
3.02 Arvioitu käyttöikä	5
– 28467 keltainen polyesteri	5
– 284223 valkoinen polyesteri	5
4.00 Tekniset tiedot	5
5.00 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
6.00 Ympäristöpoliittinen kannanotto	5
– V. Guldmann A/S	5
7.00 Takuu ja huoltoehdot	5
A. Takuu	5
B. Huolto tai korjaus	5
8.00 Nostoliinan asettaminen	6
– Multisupport-monikäyttöliina	6
9.00 Tuoteyhdistelmät	10

1.00 Käyttötarkoitus ja käyttö**1.01 Valmistaja**

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N, Tanska
Puh. + 45 8741 3100
www.guldmann.com

1.02 Käyttötarkoitus

Nostoliina on tarkoitettu henkilön tai henkilön kehon osien nostamiseen tai tukemiseen.

1.03 Käyttökohteet

Nostoliina sopii käytettäväksi sairaaloissa, hoitokodeissa, kuntoutuskeskuksissa, laitoksissa ja yksityiskodeissa.

1.04 Käyttöperiaate

Liina on tarkoitettu käytettäväksi sekä siirrettävien nostimien että kattonostimien kanssa. Liinaa käytetään nostamaan tiettyjä kehonosia, kuten raskaita jalkoja samalla kun asetetaan nostoliinoja tai kun hoidetaan käyttäjän henkilökohtaista hygieniaa tai suoritetaan muita hoitotoimenpiteitä.

Liinaa voidaan käyttää käyttäjän ylävartalon, säären, jalkaterän, käsivarren ja lantion nostamiseen.

Edellytykset liinan käytölle ovat:

- Liinaa saa käyttää vain ammattihenkilöstö tai henkilöt, jotka ovat saaneet ohjeet kyseisen liinan käyttöön.
- On käytettävä oikean kokoista liinaa.
- 225 kg:n enimmäisnostokapasiteettia ei saa koskaan ylittää.
- Avustaja huolehtii nostettavan henkilön hyvinvoinnista liinaa käytettäessä.
- Liinaa käytetään Guldmannin nostokehikon kanssa.

Tärkeää!

Suunnittele siirto, äläkä käytä liinaa ilman valvontaa. Varmista ennen nostoa, ettei käyttäjä voi jäädä jumiin ja ettei liina tartu sänkyyn, pyörätuoliin tai muihin ympäröiviin esineisiin. Käyttäjän pää ja raajojen on oltava siten, etteivät ne pääse puristumaan mihinkään väliin. Varo letkuja ja johtoja, jotka on kiinnitetty käyttäjään ja/tai lähellä olevaan laitteeseen. Tarkista, että käsiohjaus ja sen johto roikkuvat vapaasti, eivätkä ole kiertyneet mihinkään ennen kuin liikutat nostinta ylös tai alas.

Guldmann ei ole vastuussa vioista tai onnettomuuksista, jotka aiheutuvat nostoliinan virheellisestä käytöstä tai hoitajan tai käyttäjän huolimattomuudesta. Jos liinaa käytetään yhdessä muiden kuin Guldmannin valmistamien tuotteiden kanssa, ammattihenkilöstön on tehtävä riskinarviointi.

1.05 Tärkeää/varoimenpiteet

- Lue ohjeet huolellisesti ennen liinan käyttöä.
- Liinan enimmäiskuormitusta ei saa koskaan ylittää.
- Liinaa saa käyttää ainoastaan henkilöiden nostamiseen.
- Ennen liinan käyttöä se on tarkastettava kohdan 2.02 mukaisesti.
- Älä koskaan käytä liinaa, joka on liian suuri käyttäjälle.
- Vain valmistaja saa suorittaa mahdolliset korjaukset.
- Kaikki vaaratilanteet, joita tämän laitteen käyttöön liittyen ilmenee, on raportoitava valmistajalle ja paikalliselle viranomaiselle voimassaolevien määräysten mukaisesti.

1.06 UHF RFID -tunniste – 28467 keltainen polyesteri



Tässä tuotteessa on passiivinen UHF RFID -tunniste, joka on integroitu tuote-etikettiin. RFID-tunnistetta voidaan käyttää kalustonhallintaan ja seurantatarkoituksiin. RFID-tunniste on luettavissa laitteilla, jotka ovat EPC global UHF Class I Gen ISO 18000-63 -standardin mukaisia.

1.07 Etiketit ja merkinnät



CE-merkintä





Luokan I lääkkinnällinen laite
EU MDR -säädöksen mukaan




Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

– 28467 keltainen polyesteri

Esimerkki sarjanumeroetiketistä Tarkastusetiketti

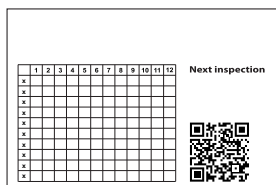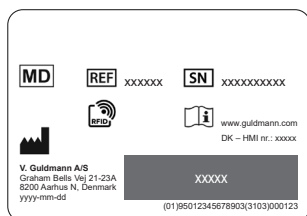

Tuote-etiketti

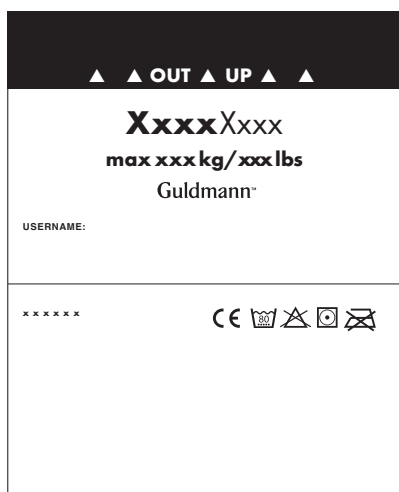

Kokoetiketti



Tuote-etiketti



Kokoetiketti




1.08 Käyttö

Mikäli nostoliinan valinnassa tai käytössä esiintyy epäselvyyksiä, ota aina yhteyttä myyjään.

Nostokehikko, 4 kiinnityspistettä

Huomio!


Ole varovainen kiinnittäessäsi nostoliinan hihnoja nostokehikon koukkuihin. Varmista, että nostoliinan hihnat on asianmukaisesti asetettu nostokehikon koukkuihin. Painaessasi käsiohjauksen nostopainiketta nostaaksesi, tarkista uudelleen, että kaikki hihnat on asetettu asianmukaisesti nostoriustimen koukkuihin (kuva 1).

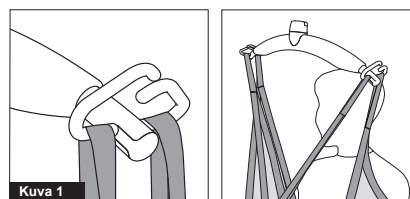

Nostoriustin

Huomio!


Ole tarkkana kiinnittäessäsi nostoliinaa ripustimen koukkuihin. Varmista että hihnat on vedetty kokonaan nostokehikon kumisen turvasuojan (kuvassa A) läpi ja paikalleen nostokehikon koukkuihin. Painaessasi nostopainiketta nostaaksesi, tarkista uudelleen, että kaikki hihnat on asetettu asianmukaisesti nostokehikon koukkuihin (kuva 1a ja 1b).

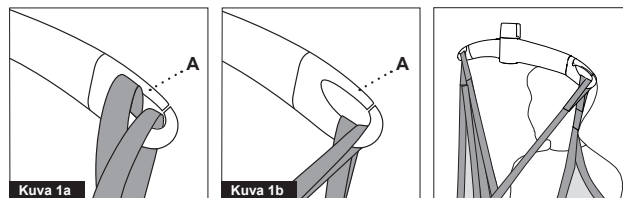

Multi support -monikäyttöliinan asettaminen, katso sivua 6

– 284223 valkoinen polyesteri

Esimerkki sarjanumeroetiketistä

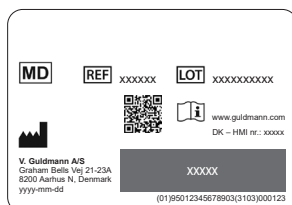

2.00 Huolto

2.01 Puhdistus



Normaali pesu merkityssä lämpötilassa

Huomioi: Valkoisesta materiaalista valmistettu nostoliina voidaan pestä enintään 5 kertaa



Älä käytä valkaisuaineita



Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa



Älä silitä

2.02 Omistajan päivittäinen huoltotyö

Tarkista nostoliina kulumisen ja vaurioitumisen varalta ennen käyttöä seuraavan tarkistuslistan mukaan, jonka tarkoitus ei ole esittää kaikkia mahdollisia tarkastusvaiheita. Mahdolliset vauriot saattavat vaihdella. Tarkastaja päättää itse, mitkä tarkastukset ovat tarpeen käyttöpaikassa.

Liinan tarkastuksen tarkistuslista

Tarkista ennen Guldmannin liinan/tarvikkeen käyttöä seuraavat:

Onko nostoliina puhdas?

Noudata laitospöytäistä infektioiden torjuntamenetelmää.

Onko liinan tuote-etiketti paikallaan, luettavissa ja täydellinen?

Puuttuvat, lukukelvottomat tai epätäydelliset liinan tuote-etiketit voivat tehdä liinan oikean koon, käyttötarkoituksen ja/tai painorajan tunnistamisen mahdottomaksi.

Ovatko nostohihnat ja ompeleet ehjät?

- Tarkasta, etteivät ompeleet ole katkenneet tai kuluneet
- Tarkista, ettei hihnoissa ole solmuja
- Tarkista, etteivät hihnat ole revenneet tai haurastuneet
- Tarkista, ettei näkyvissä ole aukkoja tai reikiä
- Tarkista, ettei kankaaseen tai hihnoihin ole tarttunut mitään

Onko kangas vahingoittumaton?

- Tarkista, ettei näkyvissä ole tavanomaisesta poikkeavaa tai liiallista kulumista tai merkkejä hankautumisesta
- Tarkista, ettei kangas ole revennyt tai haurastunut
- Tarkista, ettei värissä ole muutoksia tai suuria poikkeamia
- Tarkista, ettei näkyvissä ole aukkoja, repeämiä tai reikiä
- Tarkista, etteivät saumat ole revenneet tai löystyneet
- Tarkista, ettei kankaassa ole kemikaalien/lämmön aiheuttamaa kulumista
- Tarkista, ettei materiaalissa ole muutoksia, esim. kankaan jäykistyminen
- Tarkista, ettei kankaaseen ole painunut tai kiinnittynyt mitään

Onko liinan muotoa muutettu, lyhennetty tai pidennetty suhteessa alkuperäiseen kokoon käyttämällä solmuja, neuvoja, teippiä tai muita menetelmiä?

Johtopäätös

Jos liinassa esiintyy vähintään yksi edellä mainituista asioista, se on poistettava käytöstä riippumatta nostettavan henkilön painosta.

2.03 Liinojen hävittäminen

Liinat hävitetään polttamalla. Asianmukaisella polttamisella polysteri hajoaa hiilidioksidiksi ja vedeksi.

3.00 Huolto ja käyttöikä

3.01 Turvallisuus-/huoltotarkastukset

Kansainvälisen nostinstandardin EN/ISO 10535 "Nostolaitteet vammaisten siirtoon – Vaatimukset ja testausmenetelmät" mukaan tarkastus on suoritettava kuuden kuukauden välein. Liinojen tarkastusmenettely on oltava perusteellinen, järjestelmällinen ja säännöllinen. Tämän lisäksi suositellaan sekä käytännön että näönvaraisia tarkastuksia.

Tietty vauriot on huomattavasti helpompi havaita käytännön tarkastuksessa kuin pelkällä näönvaraisella tarkastuksella. Esi-merkiksi: Materiaalin jäykkyys, vialliset hihnat ja kulunut kangas. Nämä havaitaan koskettamalla liinaa fyysisesti. Näönvaraisella tarkastuksella ei todennäköisesti havaita kaikenlaisia liinojen vaurioita.

Mieti liinojen tarkastuksiin liittyvien kirjallisten asiakirjojen koostumusta ja käsittelyä. Asiakirjojen on sisällettävä seuraavat tiedot: valmistajan nimi, liinan tyyppimerkintä, leveys ja pituus, liinan yksilöllinen tunnistenumero (tärkeä samankaltaisten liinojen erottamisessa) sekä liinan kunto. Muita tärkeitä tietoja voivat olla liinan vastaanotto- tai käyttöönottopäivämäärä laitoksessasi ja kaikki hyödylliset erityispiirteet.

Ole varovainen vaurioituneiden ja viallisten liinojen kanssa ja poista ne käytöstä, jos vähintään yksi seuraavista asioista ilmenee:

- Kemialliset tai syöpymisen jäljet
- Sulamis- tai palamisjäljet
- Naarmut, reiät, repeämät tai viillot
- Katkenneet tai kuluneet ompeleet
- Puuttuvat, lukukelvottomat tai puutteelliset liinan tuote-etiketit
- Solmut liinassa
- Kuluminen ja repeytyminen
- Muut näkyvät vauriot, jotka saavat epäilemään liinan vahvuutta.

Liinojen tarkastukset suoritetaan potilaiden ja hoitohenkilökunnan suojaamiseksi. Liinojen järjestelmällisillä tarkastuksilla on lisäetuja:

- auttavat tunnistamaan vaurioiden syntymisen
- estävät mahdollisia vaaratilanteita
- varmistavat laadukkaan työn

HUOMAA: Tarkastusten suorittajan on oltava asianmukaisesti ammattitaitoinen henkilö, joka tuntee liinan rakenteen, käytön ja huollon.

Visuaaliset näyte-esimerkit synteettisten liinojen vaurioista*)


Kemialliset/syövyttävät palojäljet



Rikkonainen sauma



Musertunut/rispaantunut verkko

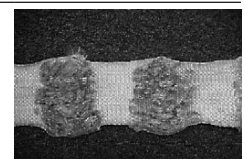

Solmut**Sulamisen/palaminen**

^{x)} visuaalisten näytekuvioiden ei ole tarkoitus esittää kaikenlaisia mahdollisia vaurioita

- dollisen hävittämisen yhteydessä
- Voimassa olevan lainsäädännön noudattaminen
- Varmistamme ympäristöjärjestelmämme ja siihen liittyvän ympäristönsuojelun tason jatkuvan parantamisen

Kaikki Guldmann-konsernin tytäryhtiöt noudattavat edellä esitettyä toimintalinjaa, ja edellytämme, että yhteistyökumppanimme (tavarantoimittajat ja jakelijat) noudattavat tätä toimintalinjaa.

Guldmannin kaikki työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan välittömästi johdolle, jos heidän tietoonsa tulee, että organisaation sisällä tai yhteistyökumppaneissamme laiminlyödään ympäristönsuojelua koskevia periaatteita.

Toiminnassa otetaan huomioon käytettävissämme olevat taloudelliset ja teknologiset resurssit sekä yhtiön yleiset taloudelliset tavoitteet, jotka perustuvat perusarvoihimme.

3.02 Arvioitu käyttöikä**– 28467 keltainen polyesteri**

Nostoliinan odotettu käyttöikä on 5 vuotta, kuitenkin yksilöllisesti käytettävästä, pesusta jne. riippuen. Ennen käyttöä liina on tutkittava osion 2.02 kuvauksen mukaisesti, ja jos se ei vastaa tarkastusvaatimuksia, se on hävitettävä.

Käyttö

Tuotteen käyttöympäristö:

- Käyttölämpötila +10 °C - +35 °C
- ilman suhteellinen kosteus välillä 30 % ja 70 %

Lämpötilaa lukuun ottamatta samat ympäristöolosuhteet koskevat kuljetusta ja varastointia. Nostoliinaa on säilytettävä tasaisella, puhtaalla alustalla tai ripustettuna nostolenkeistä koukkuihin.

- Kuljetus- ja varastointilämpötila -10 °C - +40 °C

– 284223 valkoinen polyesteri

Valkoisesta materiaalista valmistettu liina voidaan pestä enintään 5 kertaa.

Muista merkitä etikettiin aina kun liina pestään.

Hävitä liina viiden käyttökerran jälkeen.

4.00 Tekniset tiedot

Nostokapasiteetti 255 kg
Materiaali, 28467 Polyesteri^{x)} (keltainen)
Materiaali, 284223 Polyesteri (valkoinen)

^{x)} EN 1021 -standardin mukainen palonsuoja-aine

5.00 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tuote on valmistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 5. huhtikuuta 2017 antaman asetuksen (EU) 2017/745 mukaisesti Luokan I lääkekinnalliseksi laitteeksi.

**6.00 Ympäristöpoliittinen kannanotto
– V. Guldmann A/S**

Me Guldmannilla pyrimme aktiivisesti varmistamaan, että hallitsemamme kielteiset vaikutukset minimoidaan.

Guldmannin tavoitteena on varmistaa ympäristöjärjestelmämme ja sen suorituskyvyn jatkuva parantaminen:

- Tiivis yhteistyö toimittajiemme kanssa, varmistaa että käytämme mahdollisimman kestäviä materiaaleja ja prosesseja.
- Jätteiden ja päästöjen suhteellisen määrän vähentäminen ja mahdollisimman korkean kierrätysasteen varmistaminen
- Varmistamme, että tuotteistamme ei aiheudu tarpeettomia negatiivisia ympäristövaikutuksia käytön, kierrätyksen ja mah-

7.00 Takuu ja huoltoehdot**A. Takuu**

Guldmann takaa, että sen laitteissa ei ole normaalikäytössä olennaisia vikoja, ja että ne toimivat olennaisilta osin laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettujen määräysten mukaisesti.

Tämä nimenomainen takuu on voimassa yhden vuoden alkuperäisen hankinta- ja asennuspäivästä (takuu-aika). Jos takuu-aikana esitetään pätevä korvausvaatimus toimintahäiriöstä tai laitteistovian, Guldmann korjaa tai vaihtaa laitteen ilman lisäkustannuksia. Guldmann harkitsee itse, korjataanko vai vaihdetaanko laitteisto.

Takuu ei kata mitään laitteen osaa, joka on vahingoittunut käyttäjän tai muiden henkilöiden tekemien toimien johdosta. Takuu ei kata mitään laitteen osaa, jota käyttäjä tai muut henkilöt ovat muuttaneet tai muokanneet. Guldmann ei takaa, että nostolaitteen toiminnot täyttävät vaatimuksesi, ovat keskeytymättömiä tai virheettömiä.

Edellä esitetty takuu korvaa kaikki muut nimenomaiset ja oletetut takuut, olivatpa ne suullisia, kirjallisia tai oletettuja, ja edellä mainitut korjaustoimenpiteet ovat ainoat ja yksinomaiset oikeutesi. Vain Guldmannin valtuutettu huoltohenkilö saa tehdä muutoksia tähän takuuseen tai lisätakuisiin, jotka sitovat Guldmannia. Näin ollen muut lausunnot, kuten mainonta tai esitykset, olivatpa ne suullisia tai kirjallisia, eivät ole Guldmannin takuita.

Tämä takuu on mitätön, jos laitetta käytetään ja huolletaan tavalla, joka on ristiriidassa sen käyttötarkoituksen tai tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden kanssa. Jotta takuu pysyy voimassa koko takuuajan, kaikki laitteiston huolto on annettava Guldmannin valtuuttaman teknikon tehtäväksi. Kaikki osat tai osat, jotka Guldmann-sertifioitu teknikko korjaa tai vaihtaa, ovat takuunalaisia jäljellä olevan takuuajan.


B. Huolto tai korjaus

Pyydä Guldmannin korjaajalta lupa palauttaa vialliset tuotteet takuuajana. Sinulle toimitetaan palautusvaltuutuksen numero ja osoite, jonka kautta voit palauttaa tuotteen takuuhuoltoon tai vaihtoa varten. Älä palauta tuotteita Guldmannille takuuajana saamatta palautusnumeroa.

Jos postitat tuotteen, pakkaa se huolellisesti tukevaan pakkaukseen, jotta se ei vahingoitu. Anna palautusvaltuutuksen numero, ongelman lyhyt kuvaus sekä palautusosoite ja puhelinnumero. Guldmann ei vastaa osien katoamisesta tai vaurioitumisesta kuljetuksen aikana, joten suosittelemme pakkauksen vakuuttamista.

A1.

Ylävartalon nostaminen

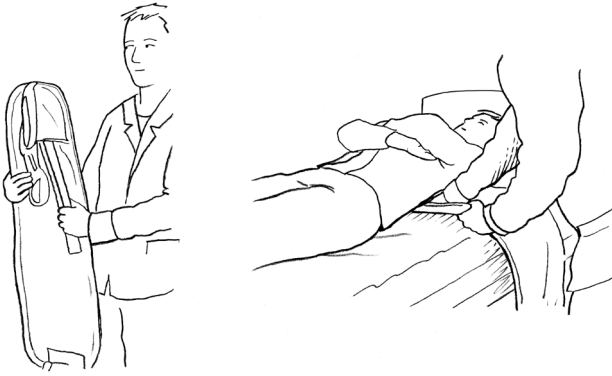

Aseta lannerangan alueen yläosaan ja ylävartalon alaosaan.

Aseta kämmen liinalle ja paina alustaa alaspäin työntämällä samalla liinaa käyttäjän alle.

A2.


Ylävartalon nostaminen



Vedä liinan viimeinen osa ulos toiselta puolelta siten, että liina jakautuu tasaisesti käyttäjän molemmin puolin.

A3.

Ylävartalon nostaminen

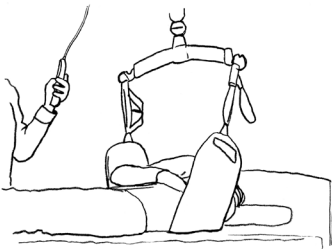


Kiinnitä nostohihnat nostokehikkoon ja nosta käyttäjän ylävartaloa alustasta.

B1.

Jalan nostaminen sängystä

Työnnä liina jalan alle, missä hoitotoimenpide voidaan parhaiten suorittaa.

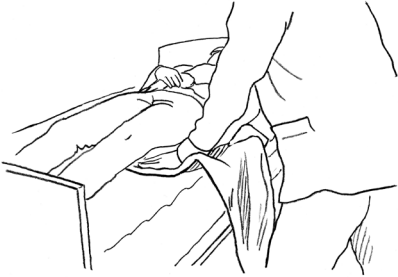


B2.

Jalan nostaminen sängystä

Kiinnitä nostohihnat nostokehikkoon.


Nosta käyttäjän jalkaa hänen polvensa ollessa taipuneena, aseta liina säären yläpuoliskon alle.

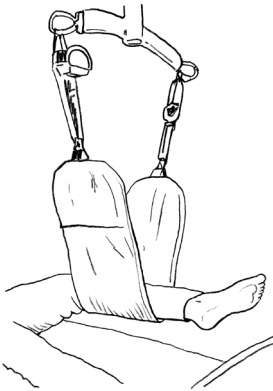

B3.

Jalan nostaminen sängystä

Nosta käyttäjän jalkaa hänen polvensa ollessa suorana, aseta liina säären alapuoliskon alle. Tue tarvittaessa käyttäjän reittä tyynyllä tai muulla taitoksella sängyssä.

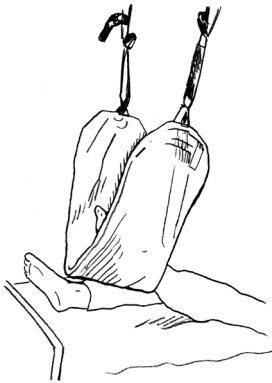

C1.

Jalan nostaminen pyörätuolista



Vie liina käyttäjän reiden ja polven ta-
kaosan alitse.

C2.

Jalan nostaminen pyörätuolista




Työnnä varovasti ja vedä liina käyttäjän
jalan alitse siten, että liina jakautuu tasai-
sesti käyttäjän molemmin puolin.

Kun nostohihna on kiinnitetty nostokehik-
koon, jalka voidaan nostaa alustasta.

D1.

Muut käyttötavat


Lantion nostaminen

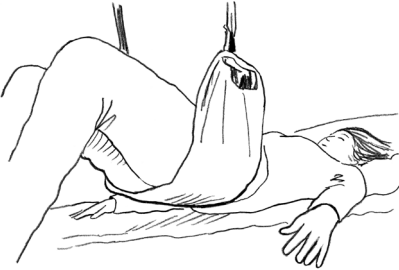

D2.


Muut käyttötavat

Jalan nostaminen käyttäjän maatessa
kyljellään (tarvitaan 2 liinaa).

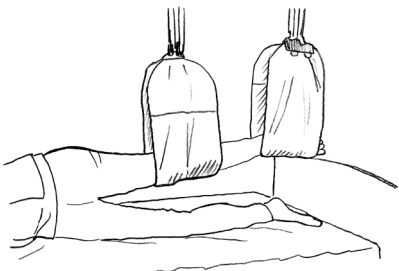

D3.

Muut käyttötavat

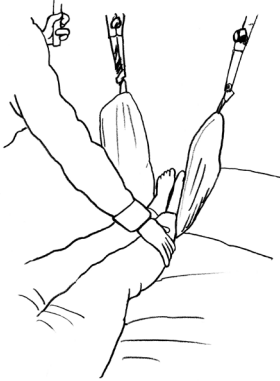

Sellaisen käyttäjän jalan nostaminen, jonka on päästävä sänkyyn/sängystä pois.

D4.


Muut käyttötavat



Käsivarren nostaminen.

D5.

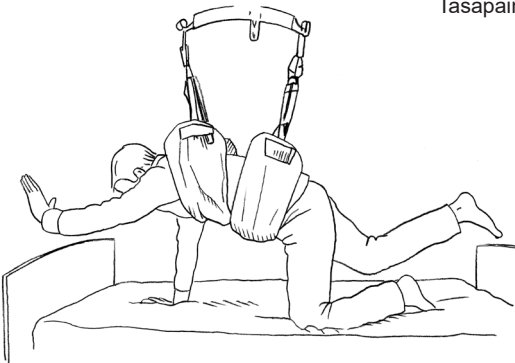

Muut käyttötavat










Tasapainoharjoitteluun.

Product combinations

Lifting module / Mobile lifter

GH1, GH1 F, GH1 Q, GHZ, GH3, GH3+ lifting module	
GH3 Twin lifting module	

GL5.2 Mobile lifter	
---------------------	---

Hanger						
Lifting hanger X-SMALL Item no. 556870	Lifting hanger SMALL Item no. 556880	Lifting hanger MEDIUM Item no. 556890	H-hanger Item no. 556950	Cross hanger 400 kg Item no. 561610	Cross hanger 500 kg Item no. 550800	Connecting bar + Cross hanger 500 kg Item no. 550544
						
x	x	x	x	x	x	
						x
x	x	x	x	x		

Sling	Item no.
Active Micro Plus	2810x1
Active Micro, Poly	2840x1
Active Trainer	2830x1
Active Vest Kids	2831x1
Gait Trainer, Bariatric	283100
Gait Trainer	2832x1
Vest for Stand Shell	2835x1

2-4, 4-6, 6-10, 10-16, XS	10-16, XS, S, M	S, M, L, XL, 2XL (6-10, 10-16)	S, M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	M, L, XL - 5XL	
x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x (x)	x	x	x	x
x	x	x (x)				
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		

Basic sling, Polyester	2700x1
Basic Low sling, Polyester	2710x1
Basic High sling, Polyester	2720x1
Basic Hammock, sling	2740x1
Basic sling, Net, fixed padding	2701x3
Basic Low sling, Net, fixed padding	2711x3
Basic High sling, Net, fixed padding	2721x3
Basic Shell, sling	2750x2
Basic Comfort High, polyester	2770x1
Basic Comfort High, net	2770x2

x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		

Custom Amputee seji	2900x1
Sit-On Comfort	2930x1
Sit-On Comfort High	2940x1
Sit-On II	2970x1
Sit-On High II	2980x1
Sit-On Comfort High, hygiene	2941x1
Sit-On	2950x1
Sit-On High	2960x1
Modified Sling	2949x

x	x	x				
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x

Repo. Sling, Bariatric	284656
Repo. Sling	28465
Repo. Sling, Short,	284653
Repo. Sling, Poly	284660
Repo. Sling, Grey net	284651
Repo. Sling, Grey net	284658
Repo. Sling, Grey net	284662
Repo. Sling, TENCEL	284657
Repo. Sling, Spacer	284659
Repo. Sling, Spacer, 6 loops	284669

		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x

Horizontal Sling, Standard	28463
Lifting sheet	2844851
Multi Support Sling, one size	28467
OR Sling, Poly	2848x1
Leg Sling Box of 10 pcs	28650
Pannus Support	28660
Turner	28700
Twin Turner	28751
Twin Turner, Bariatric	28760

x	x	x		x	x	x
x	x	x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x

Disposable High + Kids	2836x5
Disposable Twin Turner II, regular	287501
Disposable Twin Turner II, large	287511
Disposable Leg sling II	286501
Disposable High, bariatric	2836x2
Disposable Repositioning sling, 500 kg	284555
Disp. Horizontal sling, standard, 350 kg	284631
Disposable Multi support sling	284223
Disposable OR Sling	2848x5
Disposable Gait Trainer	2835x5
Disposable Comfort High	2770x5
Disposable Micro Plus	2815x5
Prone Positioning Sling (284221)	284225
Side Positioning Sling (Kit)	284226

x	x	x	x	x		
		x		x	x	
		x		x	x	
		x		x	x	
		x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x
x	x	x		x	x	
				x		
	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x		
x	x	x	x	x	x	x
		x		x	x	x
		x		x	x	x



| Time to care |

V. Guldmann A/S
Puh. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann™