

R82<sup>®</sup>

# Wombat Living

Monipuolinen työtuoli aktiiviseen arkeen

# R82 Wombat Living

Wombat Living on lukuisia muuntelumahdollisuuksia tarjoava tuoli aktiiviseen istumiseen. Se soveltuu täydellisesti erilaisiin arjen toimintoihin koulussa, ystävien kanssa leikittäessä sekä kotitöissä avustamiseen. Laajan korkeussäätönsä ansiosta se on monipuolinen toimintatuoli helpottaen siirtymisiä ja työskentelyä erikorkuisten tasojen ääressä. Kolme lapsen/nuoren kasvun mukaan säädettävää kokoa mahdollistavat saman tuolikoon käyttämisen jopa useita vuosia ilman vaihtotarvetta isompaan.

## Kun muotoilu ja toiminnallisuus kohtaavat

Jatkuvan tuotekehityksen sekä asiakkailta ja terapeuteilta saadun palautteen ansiosta Wombat Living tarjoaa kaikki ne ominaisuudet ja edut, joita vaaditaan toiminnalliselta aktiivituolilta. Wombat Living on suunniteltu sekä lasten että teini-ikäisten käyttöön. Pirteä ulkonäkö ja modernit värit tekevät siitä soveltuvan käytettäväksi kaikenlaisissa sisätiloissa. Korkeussäädettävän rungon ansiosta istuin laskee alas 29 cm:n korkeuteen lattian tasosta ja yhdessä istuimen eteenpäin kallistuksen kanssa helpottaa seisten tapahtuvaa siirtymistä tuoliin ja siitä pois vähentäen samalla tarpeetonta ja toistuvaa nostelua.

Säädettävä runkokorkeus helpottaa mahdollisuutta lisätä aktiivisuutta ja osallistumista päivittäiseen elämään, kuten vaikkapa pallon pelaamiseen ystävien kanssa lattiatasolla ja perheen kanssa aterioimiseen ruokapöydän ääressä. Wombat Livingin ulkonäkö on selkeä ja se sopii mihin tahansa ympäristöön rungon muotoilun ja verhoilun värimaailman ansiosta. Istuinta on saatavana



kolmessa eri koossa ja istuma-asentoa voidaan tukea käyttäjien tarpeiden mukaisesti saatavilla olevien monien lisävarusteiden avulla.

Tuolin runkoon on asennettavissa kulmasäädettävä työntökaari. Työntökaaren avulla voit säätää istuimen korkeutta ja istuimen kallistusta ja kaaren voi taittaa pois tieltä, kun se ei ole käytössä. Selkätukeen kiinnitettävät erilliset työntökahvat ja työntökaari ovat saatavana lisävarusteena.

Wombat Living on varustettu joko neljällä 75mm:n, 100 mm:n tai 125 mm:n sileäpintaisella pyörällä, joten tuolia on erittäin helppo liikuttaa. Kaikki pyörät on varustettu jarruilla turvallisen siirtymisen varmistamiseksi tuoliin ja tuolista pois. Käsi- tai jalkakäyttöinen keskusjarrujärjestelmä voidaan lisätä 100 mm:n pyöriin helpottamaan ja nopeuttamaan tuolin käsittelyä.

# Ominaisuuudet

## Oikea tuenta

Wombat Living on aktiivituoli, joka sopii täydellisesti päivittäisiin toimintoihin niin koulussa, ystävien kanssa leikittäessä kuin kotona kotitöitä tehdessäkin.

## Istu mukavasti

Erilaisten asentotarpeiden täyttämiseksi sekä istuin- että selkätyynyjä on saatavana eri kokoja ja muotoja. Vakiotyynyt tarjoavat hyvän istumismukavuuden, kun taas muotoilluissa tyynyissä yhdistyvät mukavuus ja erinomainen istuma-asennon tuenta.

## Kallistus eteenpäin

Wombat Livingissä on jopa -10° anteriorinen istuimenkallistus. Kallistamalla istuimen kulmaa eteenpäin kallistettuun asentoon (miinuskulmaan) rohkaistaan lasta siirtämään painoaan eteenpäin.

## Muunneltavuus

Wombat Living on aktiivituoli, jossa on lukuisia muuntelumahdollisuuksia. Riippuen käyttäjän toimintakyvystä tuoli voidaan varustaa erilaisiin tarpeisiin sopivilla toiminnoilla.

## Itsenäisyys

Wombat Livingissä on korkeussäätö, etukallistus ja jarrut kaikissa pyörissä, minkä ansiosta siihen siirtyminen on vakaata ja turvallista.

## Mix and match

Erilaisten asentotarpeiden täyttämiseksi sekä istuin- että selkätyynyjä on saatavana eri kokoja ja muotoja. Vakiotyynyt tarjoavat hyvän istumismukavuuden, kun taas muotoilluissa tyynyissä yhdistyvät mukavuus ja erinomainen istuma-asennon tuenta.

## Korkeudensäätö

Wombat Livingissä on neljä erilaista tapaa tehdä korkeudensäätö. Rungossa olevalla jalkapainikkeella joko kaasujousella tai hydraulisesti, avustajaa varten työntökaareen asennetun säätövivun avulla kaasujousisäätöisenä tai sähkötoimisena ohjaimen, jota voi käyttää joko avustaja tai käyttäjä itse, kautta.

## Korkeussäätöväli

Wombat Living säätyy istuinkorkeudesta 29 cm ja jopa 70 cm:n korkeuteen riippuen tuolin koosta ja varustelusta.



Katso ohjevideo  
(englanniksi)

Katso mitat  
(englanniksi)



# Mix and match!

Wombat Living on aktiivituoli, jossa on lukuisia kokoonpanomahdollisuuksia. Riippuen käyttäjän toimintakyvystä tuoli voidaan varustaa erilaisiin tarpeisiin sopivilla toiminnoilla. Joillekin käyttäjille riittää muutamilla lisävarusteilla ja yksinkertaisilla vakiotoiminnoilla varustettu tuoli. Toiset saattavat tarvita tuolin, jossa on paljon enemmän lisävarusteita ja teknisiä toimintoja, kuten korkeudensäätö sähkötoimisena.

## Päälliset ja värit!

Tyynyjen päällisiä on saatavana kolmessa eri värissä. Hengittävä ja vettähylkivä päällinen lisää käyttömukavuutta. Sekä istuin- että selkänojapäälliset on käsitelty hylkimään irtolikaa ja yllättäviä vuotoja ja roiskeita vastaan. Kaikki läikkynyt neste voidaan pyyhkiä ja kuiva lika voidaan harjata helposti pois. Näin voit elää, työskennellä tai leikkiä huolettomammin. Pestävä inkontinenssipäällinen on saatavana lisävarusteena.

Petroleum



Red



Grey



Grey Contoured



## Kyse ei ole vain istumisesta

Mikäli arvostat hyvää istumamukavuutta yhtä paljon kuten me - Wombat Living on sinun tuolisi! Erilaisiin asentotukitarpeisiin sopivia tyynyjä on saatavana erikokoisina ja -muotoisina. Perustynyt tarjoavat hyvän istuinmukavuuden, kun taas muotoilluissa istuin- ja selkätyynyissä yhdistyvät sekä mukavuus että erinomainen tuki. Lisätukea antava lannerangan tuki on saatavilla lisävarusteena. Istumisen mukavuus ja sen mahdollistama toiminnallisuus on keskeistä ja siksi Wombat Living on paras valinta seuraavaksi tuoliksesi.

Hyvän istuma-asennon tulee:

- tukea yläraajojen ja käsien käyttöä erilaisissa toiminnoissa esim. kirjoittaminen, syöminen ja juominen,
- tukea kommunikaatioapuvälineiden käyttöä ja lapsen puheen kehitystä,
- mahdollistaa leikin ja seurustelun ikätovereidensa kanssa,
- tukea lapsen itsenäisyyttä ja vähentää hoitajien huomiota ja tarvetta.



## Korkeuden säätö

Wombat Livingin istuimen korkeutta voidaan säätää aina 29 cm:stä ylös 70 cm:iin saakka lattiatasosta tuolin koosta ja kokoonpanosta riippuen. Korkeussäädettävä runko helpottaa seisten siirtymistä tuoliin ja sieltä pois vähentäen tarpeetonta ja toistuvaa nostamista.

Vot valita sopivimman neljästä eri tavasta säätää korkeutta. Rungossa olevalla jalkapainikkeella joko kaasujousella tai hydraulisesti, avustajaa varten työntökaareen asennetun säätövivun avulla kaasujousisäätöisenä tai sähkötoimisena ohjaimen, jota voi käyttää joko avustaja tai käyttäjä itse, kautta.

## Nojaa eteenpäin ja ole aktiivinen!

Wombat Living -mallissa on jopa -10° eteenpäin suuntautuva kallistus. Säätämällä istuinkulmaa eteenpäin kallistettuun asentoon, lapsen on helpompi siirtää painoaan eteenpäin pakaroista jaloille, mikä taas helpottaa lapsen nousua istumasta seisomaan. Lisäksi kallistus madaltaa istuimen etureunan korkeutta helpottaen pienempien lasten siirtymistä istuma-asentoon.

Istuma-asennon vaihtaminen istuinkulman ja selkänojan kallistuksen avulla tukee toiminnallista istumista. Istuma-asennon säädettävyys saattaa vähentää kipua ja väsymystä, jolloin lapsen toimintakyky voi parantua sekä lisätä hänen osallistumistaan jokapäiväiseen elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ikätovereidensa kanssa.



## Käyttäjän mittaaminen

Käyttäjän mittaamisella varmistetaan, että tuolin rakenteelliset ominaisuudet ovat käyttäjälle oikeat. Tarkan mittaustuloksen saamiseksi, varmista aina, että käyttäjä makaa tukevalla, tasaisella alustalla lantio, polvet ja nilkat 90 asteen kulmassa. Vertaa saamiasi mittoja alla olevaan mittataulukkoon valitaksesi sopivan istuimen koon.

| Mitat |                                        | 1<br>Kaasu & sähkö | 2<br>Kaasu & sähkö | 3<br>Kaasu & sähkö | 3<br>Hydraulinen |
|-------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|       | Istuimen leveys                        | 300 mm             | 370 mm             | 420 mm             | 420 mm           |
|       | Istuimen syvyys                        | 180–310 mm         | 250–380 mm         | 320–500 mm         | 320–500 mm       |
|       | Selkätuen korkeus                      | 280–340 mm         | 310–380 mm         | 390–475 mm         | 390–475 mm       |
|       | Selkätuen korkeus (Korkea)             | 360–430 mm         | 395–460 mm         | 460–550 mm         | 460–550 mm       |
|       | Istuimen korkeus mitattuna etureunaan* | 230–610 mm         | 230–610 mm         | 330–630 mm         | 390–630 mm       |
|       | Max. käyttäjän paino                   | 45 kg              | 45 kg              | 70 kg              | 70 kg            |
|       | Selkätuen kulma                        | 0°–28°             | 0°–28°             | 0°–33°             | 0°–33°           |
|       | Istuimen kulma                         | –10°–30°           | –10°–30°           | –10°–22°           | –10°–22°         |
|       | Pituus                                 | 650 mm             | 650 mm             | 650 mm             | 750 mm           |
|       | Kokonaisleveys                         | 550 mm             | 550 mm             | 550 mm             | 610 mm           |
|       | Paino                                  | 18 kg              | 18,5 kg            | 23,5 kg            | 26,2 kg          |

\*Mitattu 75 mm pyörillä kaasujousi- ja sähköalustoilla ja 100 mm pyörillä hydraulialustalla rungon peruskokoonpanossa.  
Lisätietoja mittauksista verkkosivuiltamme.

# Wombat tuoteperhe

Meillä on kaksi erilaista työtuolia Wombat-perheessä, joten oikean tuolin valitseminen on tärkeää. Olemme listanneet molempien työtuolien tärkeimmät ominaisuudet, jotta voit tehdä tietoon perustuvan valinnan valitessasi sinulle sopivaa työtuolia.



## Wombat Solo:

Wombat Solo on kehitetty mahdollistamaan tarvittaessa käyttäjän omatoiminen tuolin käyttö säätöineen. Sen suunnittelun lähtökohtana oli yksinkertaisuus, jotta tämä työtuoli tukisi käyttäjänsä toimintaa erilaisissa sisätiloissa.

- Istuimen korkeussäätö kaasujousella.
- Matala siirtymäkorkeus, 12 cm:n korkeussäätö jokaisessa 6:ssa säätöalueessa.
- Säätövivut korkeuden säätöä tai istuimen kallistusta varten joko istuimen alla, työntökaaressa tai rungossa jalkapainikkein.
- Istuimen 90°:n kääntö säädettävissä istuimen alla olevalla vivulla.

## Wombat Living:

Wombat Living on aktiivituoli, joka mahdollistaa ergonomiset työskentelyolosuhteet avustajalle. Istuimen korkeuden vaivaton säätö mahdollistaa käyttäjän aktiivisuuden siirtymisten aikana ja toimimisen ikätovereidensa kanssa samalla tasolla.

- Korkeussäätö kaasujousella, hydraulisesti tai sähkötoimisena.
- Matala siirtymäkorkeus, korkeussäätö 29 cm:stä 70 cm:n korkeuteen asti lattiatasosta, tuolin koosta ja kokoonpanosta riippuen.
- Työntökaareen saatavilla säätövivut korkeuden säätöä ja istuimen kallistuksen säätöä varten.



Lue lisää Wombat Solosta  
(englanniksi)

Lue lisää Wombat Livingistä  
(englanniksi)





Founded in 1973, Etac is a world-leading developer and provider of ergonomic assistive devices and patient handling equipment. Our ambition is to provide solutions that optimise quality of life for the individual, family members and caregivers.

For the latest news and continuously updated product information – visit: [www.etac.com](http://www.etac.com)