

Tuolihissin hoito

Malli: **260 Siena**



Stannah



Kysyttäessä keneltä tahansa tiimimme jäseneltä vastaus on, että olemme sitoutuneet valmistamaan parhaan tuolihissin. Pidämme myös tämän lupauksemme.

Stannahille tärkeimpiä ovat ihmiset. Riippumatta siitä, mitä tehtävää kukin yrityksessä hoitaa, yhteisenä intohimonamme on maailmanluokan tuolihissien tekeminen.

Olipa vastuualueena tietyn osan asentaminen tai valmiin tuolihissin tarkistus tuotteen liukuessa pois tuotantolinjalta, kaikki pyrkivät parhaansa mukaan varmistamaan, että jokainen pieni yksityiskohta on täydellinen. Tätä sitoutumista ja ylpeyttä inspiroi tapa, nähdä asiakkaamme - yksilöinä. Jokainen työntekijä ymmärtää, että sinun on voitava luottaa täydellisesti siihen, että tuolihissisi toimii juuri niin kuin sen pitääkin.

Tämä henkilökohtainen panostus ja Stannahin linja tehdä jokainen tuolihissi valmiiksi omissa tiloissamme varmistaa sen, että jokainen meiltä lähtevä porrashissi on paras mahdollinen. Kaikkien näiden periaatteiden käyttövoimana on yksi visio: Stannahin lupaus siitä, että me pidämme sanamme.

Kaikki työntekijämme uskovat siihen, mitä me edustamme, ja olemme sitoutuneet täyttämään lupauksemme sinulle tehdä tuolihissi, jonka laadun, luotettavuuden ja suorituskyvyn ansiosta voit elää kotonasi mukavasti, turvallisesti ja itsenäisesti.

Tervetuloa Sienan käyttöoppaaseen.

Jotta saisit parhaan hyödyn uudesta tuolihissistäsi, käytä muutama minuutti tämän oppaan lukemiseen. Säilytä sen jälkeen opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Jos sinulla on jotain kysyttävää tuolihissistäsi, älä epäröi ottaa yhteyttä sen myyjään. Yhteystiedot löydät oppaan takasivulta.



Siena

Kiitos, että valitsit Stannahin

Sisältö

Opi tuntemaan tuolihissisi	6-9
Tuolihissin käyttö	10
Virta-avain	10
Kauko-ohjaimet	11
Tuolin avaaminen	12
Saranoitu kisko	13
Turvavyö	14
Käsiohjain	15
Tuolin kääntäminen	16
Tuolihissistä nouseminen	17
Tuolihissin puhdistaminen	18
Vaatimustenmukaisuustodistus	19
Paristojen vaihtaminen	20
Tekniikka ja turvallisuus	22
APUOHJEET	24

Sarjanumero: _____



Tärkeiden turvallisuusohjeiden edessä on aina yllä oleva **HUOMIO, TURVALLISUUS** -symboli.


Tärkeää:

Tuolihissiiä ei ole suunniteltu toimimaan tulipalon sattuessa eikä sitä tule käyttää hätäpoistumisvälineenä.

Opi tuntemaan tuolihissisi

Sienna-tuolihissi

Kulkuasennossa

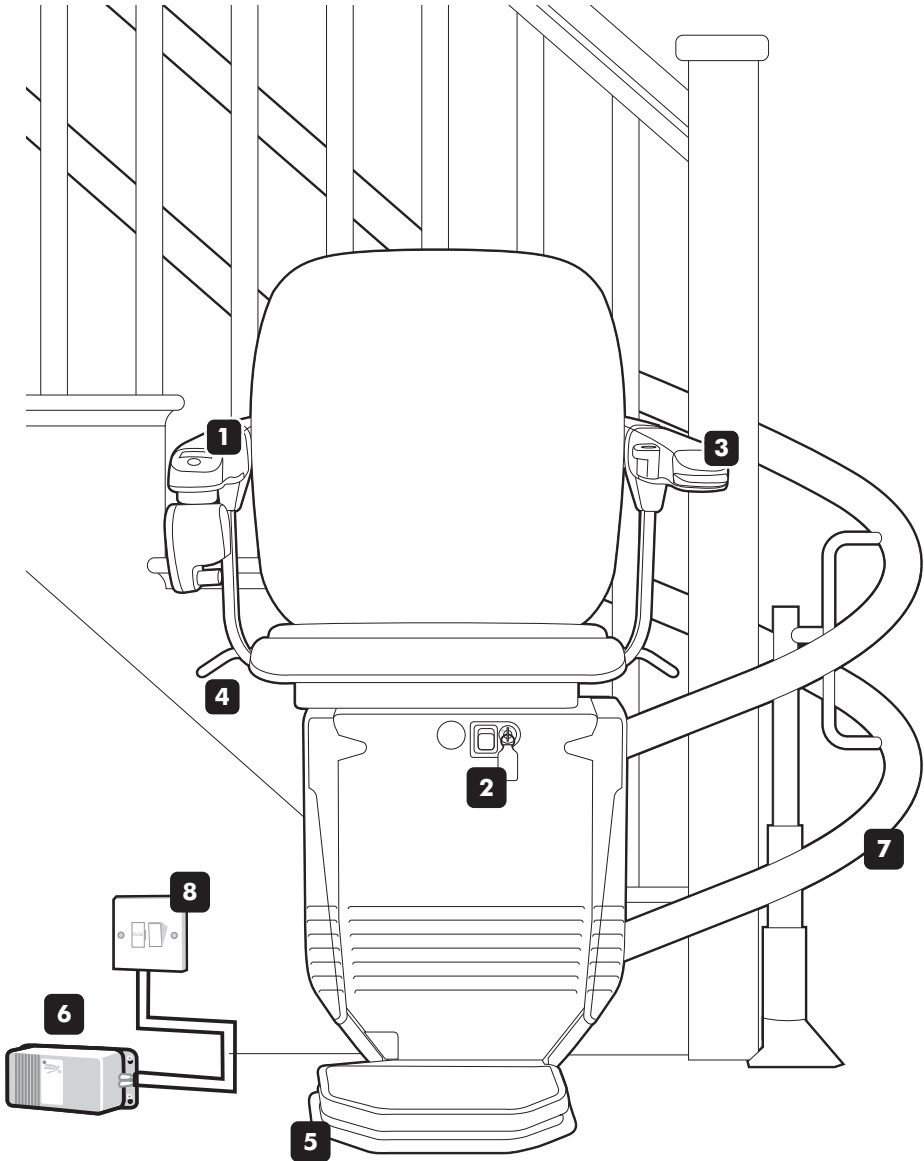

1 Virtakytkin ja virtavalo

Vihreä merkkivalo syttyy, kun avain käännetään on-asentoon.

2 Virta-avain

Avaimenreikä sijaitsee tuolin edessä. Avaimen tulee olla työnnettynä sisään ja käännettynä on-asentoon, ennen kuin tuolihissi voi toimia – katso sivua 10. *Jos haluat estää toisia käyttämästä tuolihissiäsi, voit ottaa virta-avaimen pois.*

3 Käsiohjain

Käsiohjain liikuttaa tuolihissiäsi haluamaasi suuntaan. Jos tuolissasi on automaattinen kääntöistuim, voit käyttää ohjainta myös istuimen kääntämiseen.

4 Kääntövivut

Istuimen kääntövivut sijaitsevat istuimen molemmin puolin. Voit kääntää istuinosaa portaan yläpäässä helpottaaksesi hissiin nousua ja siitä pois.

5 Turvareunat

Turvareunat pysäyttävät hissin, mikäli se törmää johonkin esineeseen ja estää näin esineiden kiillautumisen hissin ja portaan väliin. Katso lisätietoja sivulta 24.

6 Paristojen lataus

Pidä laturi aina kytkettynä, tällöin hissi on aina käyttövalmiina kun sitä tarvitset. Laturi voi olla joko portaikon ylä- tai alapäässä.

7 Kisko

8 Seinässä oleva käyttökytkin

Sen tulee normaalisti olla aina päälle kytkettynä. Katso lisätietoja sivulta 9.



Opi tuntemaan tuolihissisi

Kauko-ohjaimet

Kauko-ohjaimet sijaitsevat sekä portaikon ylä- että alapäässä. Niiden avulla voit kutsua tuolihissin haluamaasi kerrokseen.

Ohjaimet eivät toimi, ellei virta-avainta ole käännetty päälle-asentoon.

Ohjain on paristokäyttöinen. Paristojen vaihtamista koskevat ohjeet löydät sivulta 20.

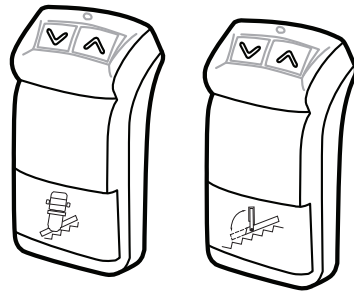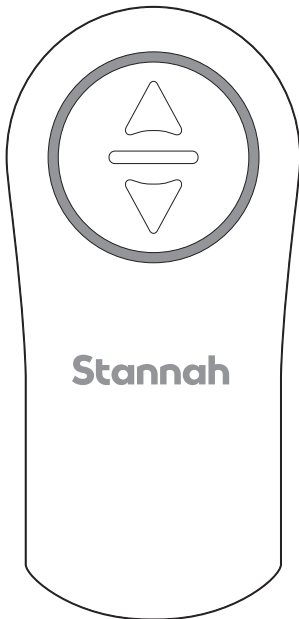

Jos käytössä on saranoitu kisko, kauko-ohjaimesi näyttävät tältä. Kiskoa varten on erillinen ohjain. Kaikkien ohjainten päällä on selkeät merkinnät, joiden avulla ne erottaa toisistaan.



HUOMIO, TURVALLISUUS

Ennen kuin kutsut tuolihissin seinään asennetuilla kauko-ohjaimilla, varmista, että kukaan ei ole käyttämässä sitä. Jos hissillä on useita käyttäjiä, katso sivua 25.


Päävirtakytkin ja seinässä oleva käyttökytkin

Päävirtakytkin on tuolin etuosassa ja se tulee normaalisti jättää päälle (on).

Tuolihiisi ei toimi, jos päävirtakytkin on käännetty pois päältä (off).

Jos lähdet pitemmäksi aikaa esim. lomalle, voit kytkeä päävirtakytkimen ja seinässä olevan käyttökytkimen pois päältä.

*Muista kytkeä **sekä** päävirtakytkin että seinässä oleva käyttökytkin pois-asentoon – niin varmistat, että akut ovat yhä ladattuina palatessasi.*

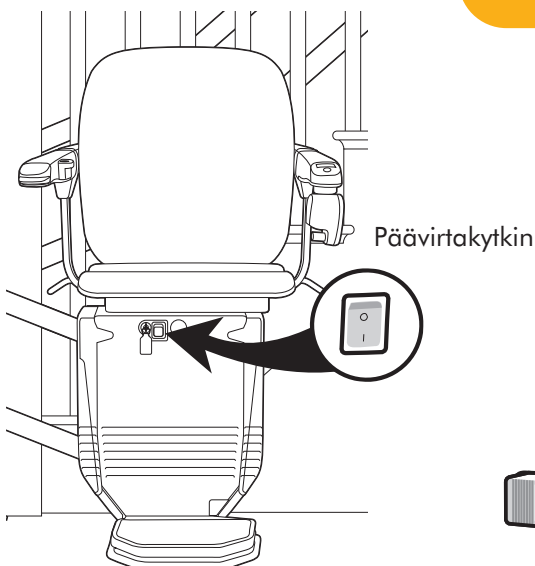

Katso 'APUOHJEITA' sivulta 24

Valittavat toiminnot

Olet saattanut jo valita lukuisista Siena-tuolihissin valittavista toiminnoista.

Kaikki alla olevaan luetteloon kerätyt vaihtoehdot on esitelty tässä käyttöoppaassa. Jos kuitenkin haluat lisätietoja muista toiminnoista, joita ei ole mainittu, ota yhteys Stannah-jälleenmyyjään.

Käännettävät istuimet


- Manuaalinen kääntöistuim.
- Automaattinen kääntöistuim.

Saranoitu kisko

- Sähkötoiminen saranoitu kisko.

Turvavyö

- Liikkeen estävä turvavyö.

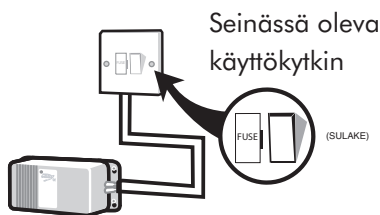

Tuolihissin käyttö

1. Käännä virta-avain päälle



Virta-avaimen päälle kääntäminen

Työnnä avain tuolin edessä olevaan avaimenreikään.

Käännä virtakytkin ON-asentoon.

Tuolihissi ja kauko-ohjain eivät toimi, mikäli et ole työntänyt virtakytkintä paikalleen.


Kun sekä avain että virtakytkin ovat on-asennossa, virtakytkimen merkkivalo palaa.

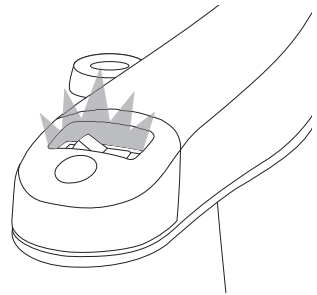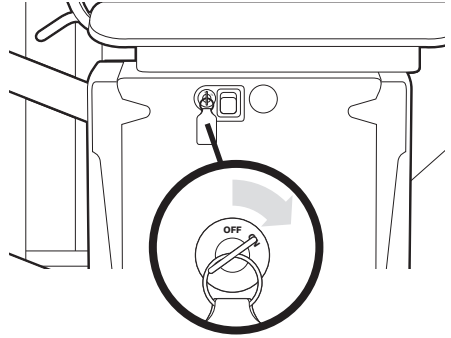

Virta-avaimen kääntäminen pois päältä

Käännä virtakytkin OFF-asentoon.
Merkkivalo sammuu.

Jos et halua poistaa virta-avainta, jätä se kuvassa esitettyyn asentoon.

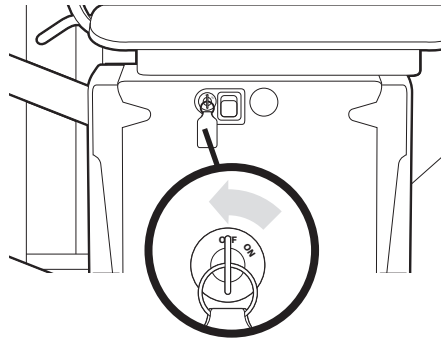

HUOMIO, TURVALLISUUS

Jos haluat estää toisia käyttämästä tuolihissiäsi, voit ottaa virta-avaimen pois.

Tuolihissin käyttö

Kauko-ohjaimen käyttö


Käytä näitä, kun haluat siirtää tuolihissin portaikon toiseen päähän.

Tuolihissin siirtäminen kiskoa pitkin

Paina ja pidä painettuna kauko-ohjaimen nuolipainiketta, niin saat siirrettyä tuolihissin haluamaasi suuntaan. Voit siirtää tuolihissiä sekä kokoon taitettuna että avatussa asennossa.

Tuolin avaamista koskevat ohjeet ovat nähtävissä sivulla 12.

Jos vapautat nuolipainikkeen, tuolihissi pysähtyy eikä liiku uudelleen muutama sekuntiin. Odota muutama sekunti, ennen kuin käynnistät tuolihissin uudelleen.

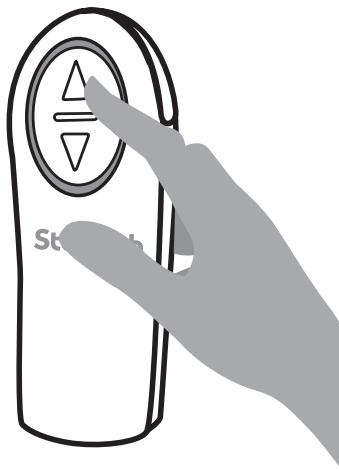

Paristojen lataustila

Kun painat yhtä nuolipainikkeista, ohjauspainikkeiden valomerkki osoittaa paristojen lataustason.

Paristot kestävät noin vuoden verran keskimääräisessä käytössä.

Paristojen tarkistusta ja vaihtamista koskevat ohjeet löydät sivulta 20.



Jos käytössä on saranoitu kisko, kauko-ohjaimesi näyttävät tältä.

Katso 'APUOHJEITA' sivulta 24

Tuolihissin käyttö


2. Avaa tuoli

Tuoli voidaan taittaa kokoon tilan säästämiseksi portaikon ylä- ja alapäässä silloin kun sitä ei käytetä.

Tuolin avaaminen

Laske jalkatuki tuolin sivulla olevan vivun avulla.


Laske sitten molemmat käsinojat ja istuin.

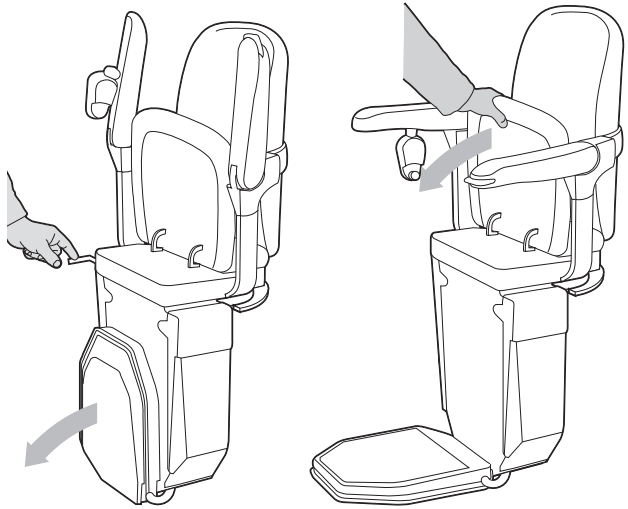

Jalkatuen avauspainike

(lisävaruste)

Jos tuolissasi on jalkatuen avauspainike, voit sen avulla laskea jalkatuen erikseen alas.

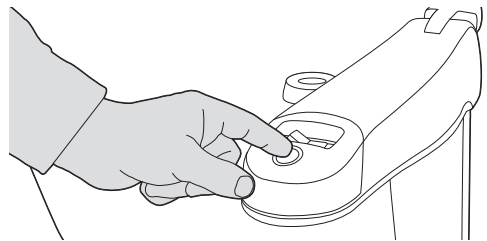

HUOMIO, TURVALLISUUS

Seiso niin, että jalkasi ovat selvästi jalkatuella, kun lasket istuinta.

Tuolihissin käyttö

Saranoidun kiskon käyttö (lisävaruste)

Tuolihissi voidaan asentaa saranoituun kiskoon. Näin se ei ole esteenä ovien edessä tai käytävillä.

Huomaa, että tuolihissi ei toimi, ennen kuin saranoitu kisko on laskeutunut ala-asentoon.

Sähkötoimisen saranoidun kiskon käyttö



Varmista aina, että tuoli on portaikon yläpäässä. Paina saranoidun kiskon kauko-ohjaimen nuolipainiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes kisko on täysin noussut tai laskeutunut.

Huomaa, että valo vilkkuu ja kuulet sarjan merkkiääniä, jotka varoittavat sinua ja muita saranoidun kiskon liikkumisesta.

Kun olet portaikon alapäässä, sinun täytyy siirtää tuolihissi takaisin portaikon yläpäähän, jotta saranoitu kisko ei ole esteenä ovien edessä tai käytävillä. Näin varmistat myös sen, että tuolihissi on latauksessa.

Paina saranoidun kiskon kauko-ohjaimen ylänuolta ja pidä sitä painettuna, kunnes saranoitu kisko on täysin noussut.

Huomaa, että jos jätät tuolihissin portaikon alapäähän, siitä alkaa kuulua merkkiääni. Se varoittaa siitä, että tuolihissi saattaa olla muiden tiellä ja että se ei ole latauksessa.

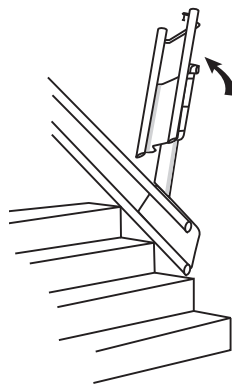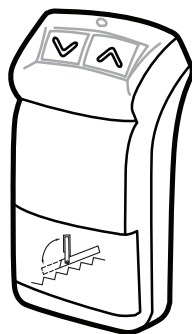

HUOMIO, TURVALLISUUS

Ole varovainen, kun nostat tai lasket saranoitua kiskoa.

Tuolihissin käyttö

3. Asetu istuimelle ja käynnistä tuolihissi

Varmista, että virtakytkin on off-asennossa ja että merkkivalo ei pala. Istu sen jälkeen tuoliin ja laita turvavyö kiinni. Kun olet valmis käyttämään tuolihissiä ylös tai alas, käännä virtakytkin on-asentoon ja ohjaa tuolihissiä käsiohjaimella haluamaasi suuntaan.


Turvavyön käyttö

Vedä turvavyö jalkojesi ylitse ja työnnä se turvavyön pidikkeeseen, niin että se napsahtaa.

Liikkeen estävä turvavyö

(lisävaruste)

Jos käytössä on liikkeen estävä turvavyö, tuolihissi ei lähde liikkeelle, ennen kuin turvavyö on laitettu kiinni.

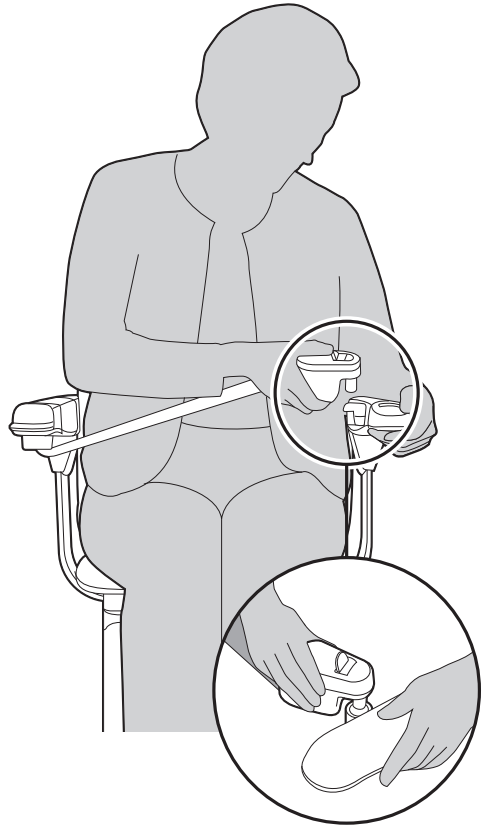

HUOMIO, TURVALLISUUS

Käytä aina turvavyötä. Irrota turvavyö vasta sitten, kun olet päässyt portaikon toiseen päähän ja olet valmiina nousemaan pois tuolihissistä. Pidä kynärpäät lähellä vartaloa, kun käytät tuolihissiä.


Tuolihissin käyttö

Käsiohjaimen käyttö

Käännä ja pidä käännettynä käsiohjainta siihen suuntaan, johon haluat tuolihissin kuljettavan sinut – tuolihissi käynnistyy muutaman sekunnin kuluessa. Viiveellinen käynnistys on turvatoiminto.

Kun tuolihissi on saavuttanut portaikon ylä- tai alapään, se pysähtyy automaattisesti.

Jos vapautat käsiohjaimen kesken matkan, tuolihissi pysähtyy.

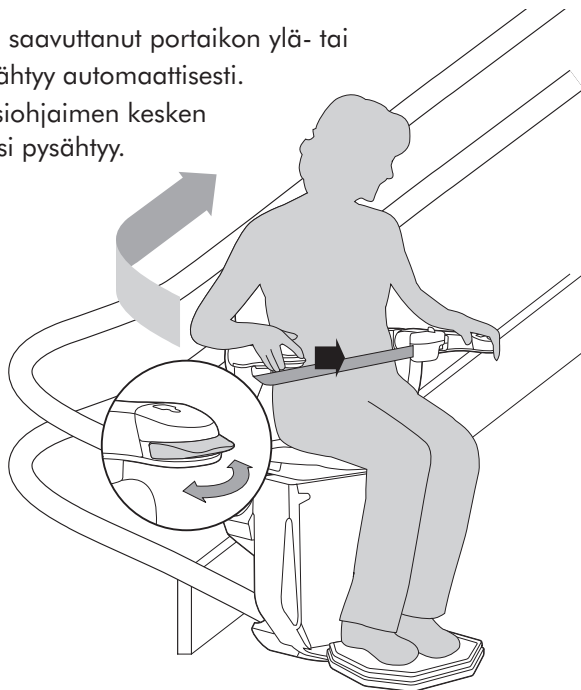

Automaattinen kääntöistuin (lisävaruste)

Jos käytössäsi on automaattinen kääntöistuin, voit pitää käsiohjaimia edelleen siirrettynä päästyäsi perille, ja istuin kääntyy automaattisesti sivulle. Katso sivua 16.

Huomaa, että tuolihissin pysähdyttyä kuluu muutama sekunti, ennen kuin istuin kääntyy.



HUOMIO, TURVALLISUUS

Tuolihissiä saa käyttää ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.

Tuolihissin käyttö

4. Käänä istuinta


Portaikon ylä- tai alapäässä voit kääntää istuimen, jotta sinun olisi helpompi nousta pois tuolihissistä.

Voit myös kääntää istuinta myös silloin, kun siirryt istumaan tuolihissiin.

Tuolin kääntäminen manuaalista kääntöistuinta käytettäessä

Nosta istuimen sivuissa olevat kääntövivut ja käännä istuin.

Voit kääntää tuolia ainoastaan portaikon yläpään suuntaan – tämä on turvatoiminto.

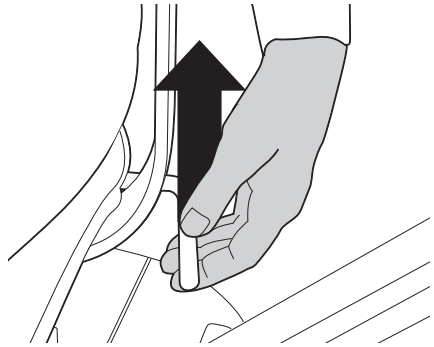


Tuolin kääntäminen automaattista kääntöistuinta käytettäessä

Paina ja pidä painettuna käsiohjainta siihen suuntaan, johon haluat kääntää istuimen.

Kaksisuuntainen automaattinen kääntöistuin

Jos käytössäsi on kaksisuuntainen automaattinen kääntöistuin, voit kääntää istuimen sekä portaikon ylä- että alapäässä.

Jos olet valinnut kaksisuuntaisen kääntöistuimen, huomioi, että istuin kääntyy ainoastaan alasuuntaan, kun se on portaikon alapäässä.

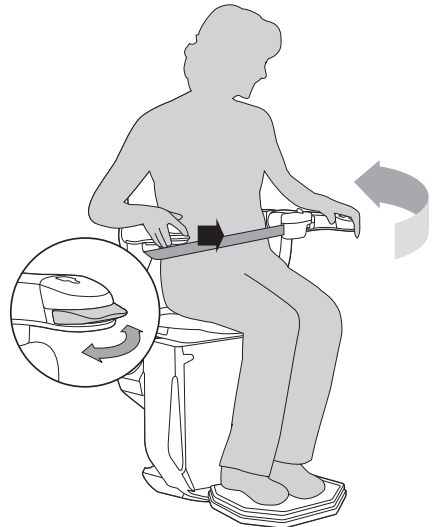

Tuolihissin käyttö

5. Nouse pois tuolihissistä


Varmista, että virtakytkin on off-asennossa ja että merkkivalo on sammunut. Nouse varovasti pois tuolihissistä ja käännä istuin takaisin kuljetusasentoon. Voit myös taittaa tuolin heti kokoon, jos haluat.

Nouseminen pois tuolihissistä


Avaa turvavyö.

Liu'uta painiketta käsinojaan päin ja vedä kiinnike ulos pidikkeestä.

Nouse varovasti pois tuolihissistä.

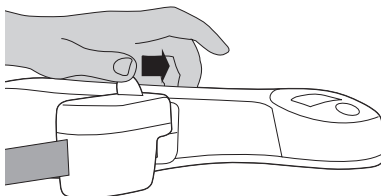


Käännä istuin takaisin kulkuasentoon joko manuaalisella kääntövuilla tai kauko-ohjaimella, jos käytössäsi on automaattinen kääntöistuim.

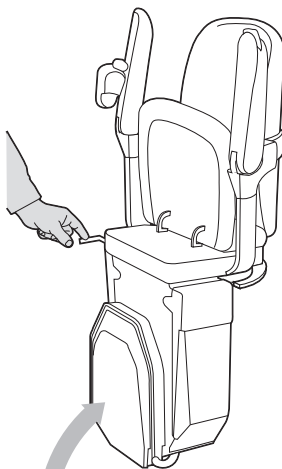

Jalkatuen avauspainike (lisävaruste)

Jos tuolissasi on jalkatuen avauspainike, voit sen avulla laskea jalkatuen erikseen alas.

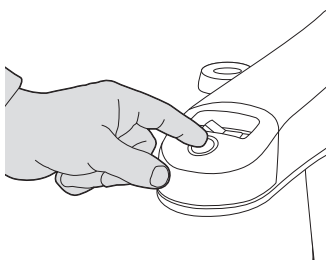

Katso 'APUOHJEITA' sivulta 24

Tuolihissin puhdistaminen

Jos olet epävarma jostakin tuolihissin puhdistukseen liittyvästä seikasta, ota yhteyttä Stannah-jälleenmyyjään.

Kiskon puhdistus

Käytä kosteaa kangasta lian tai pölyn poistamiseen.

Verhoilun puhdistaminen

Käytä kosteaa kangasta lian tai pölyn poistamiseen.

Älä käytä puhdistukseen liuottavia, valkaisevia, hiovia tai synteettisiä puhdistusaineita, vaha-silikoni-kiillottimia tai aerosoli-suihkeita ilman, että olet ensin tarkistanut niiden sopivuuden tuolihissin jälleenmyyjältä.

Lisätietoja

Kulma Painoraja

Enintään 52° 135 kg

Maksimimelutaso: 70 dB.

Paristolaturin ottoteho: 100 - 240 V AC 50/60 Hz. Antoteho tuolihissiin: 24 V DC 750 mA. Antoteho saranoituun kiskoon: 12 V DC 140 mA.




Tuolihissin kierrätys ja hävittäminen

Älä heitä mitään tämän tuotteen osia pois kotitalousjätteen mukana. Pyydä lisätietoja tuolihissin kierrätyksestä ja hävittämisestä Stannah-jälleenmyyjältä. Yhteystiedot takasivulla.

Stannah

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 768/2008/EY liitteen III mukaisesti

1. Tuotemalli:
Tuote Porrashissi, jossa kaartuva kisko – seuraavat manuaalisesti tai sähköisesti kääntyvät istuimet (SP, Siena, Starla, Sadler, Solus, Sofia, Sarum ja Saxon) ja sähkökäyttöinen saranakiskovaihtoehto.
- Malli** 260
- Sarjanumero** 26016010001-26026529999
2. **Valmistaja:** Stannah Stairlifts Ltd
Nimi Watt Close, East Portway
Osoite Andover, Hampshire
SP10 3SD Englanti
- Maahantuoja:** Stannah GmbH
Jägerhofstraße 29,
40479 Düsseldorf,
Germany
3. *Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.*
4. *Vakuutuksen kohde: Keskeiset elementit – istuin, liikkuva alusta, kisko ja sarjat*
5. *Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaankuuluvan yhdenmukaistamista koskevan unionin lainsäädännön vaatimusten mukainen:*
- 2006/42/EY Konedirektiivi
2014/30/EU Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi
2011/65/EU Vaarallisten aineiden rajoittamista koskeva direktiivi
6. *Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin tekniisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu:*
- Viite**
EN 81-40:2008 Hissien suunnittelua ja rakentamista koskevat turvallisuusohjeet. Erikoishissit henkilöiden ja tavaroiden kuljetukseen. Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen tarkoitettut porrashissit ja kaltevassa tasossa liikkuvat nostolavat
7. *Direktiivin 2006/42/EY 12 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaan kone on valmistettu asiaankuuluvan yhdenmukaistetun standardin EN 81-40:2008 mukaisesti ja noudattaen liitteessä VIII säädettyä koneen valmistuksen sisäiseen tarkastukseen perustuvaa vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä.*
- Muiden direktiivien osalta on noudatettu sisäistä tuotannonvalvontamenettelyä (moduuli A)*
8. **Lisätietoja:**
Tämä kone on asennettava, otettava käyttöön ja testattava käyttöohjeen mukaisesti.
- Koneen tekniset asiakirjat voi toimittaa:
Ross Pascoe, tekninen johtaja, yllä mainitussa valmistajan osoitteessa.
- Antamispaikka** Andover
Antamispäivämäärä 20. syyskuuta 2021
Nimi Andrew Hastilow
Tehtävä Toimitusjohtaja
- Allekirjoitus**


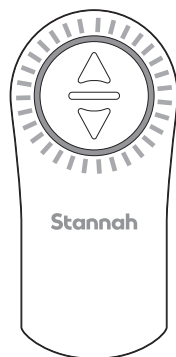
Rev 3 - 20/9/2021

Paristojen vaihtaminen kauko-ohjaimeen

Kauko-ohjaimen paristot kestävät noin vuoden keskimääräisessä käytössä.

Kun painat yhtä nuolipainikkeista, ohjauspainikkeiden viereiset merkkivalot osoittavat, kuinka paljon paristoissa on latausta jäljellä.

Kiertävä valo	<i>Paristot OK</i>
Palaa jatkuvasti	<i>Paristojen lataustila alhainen – vaihda paristot niin pian kuin mahdollista</i>
Ei merkkivaloa	<i>Paristoissa ei ole latausta</i>



Valot palavat jatkuvasti, kun paristojen lataus on alhainen.

Jos käytössä on saranoitu kisko, kauko-ohjauksen merkkivalo toimii seuraavalla tavalla:

Vihreä merkkivalo syttyy	<i>Akut OK</i>
Vihreä merkkivalo vilkkuu	<i>Paristojen lataustila alhainen – vaihda paristot niin pian kuin mahdollista</i>
Ei merkkivaloa	<i>Paristoissa ei ole latausta</i>




Vihreä valo vilkkuu, kun paristojen lataus on alhainen.

Paristojen vaihtaminen


Irrota ruuvi, liu'uta paristokotelon kansi alas ja avaa se ja aseta uudet paristot.

Yhteen kauko-ohjaimen tulee asettaa kolme AA-paristoa.

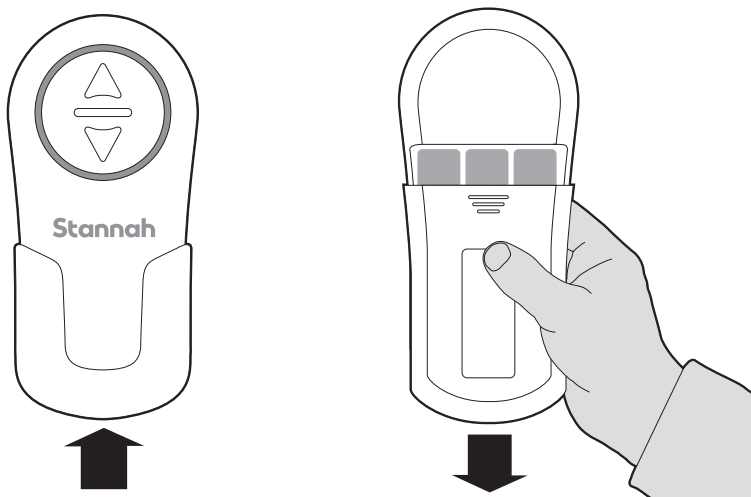

Jos käytössä on saranoitu kisko, kauko-ohjaimen paristolokero on erilainen.

Avaa paristolokeron kansi ja aseta sisään uusi 9V PP3 -paristo.

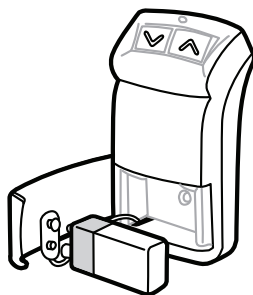


Katso 'APUOHJEITA' sivulta 24

Tekniikka ja turvallisuus


On hyvin epätodennäköistä, että tuolihissi pysähtyy sitä käyttäessäsi. Jos näin kuitenkin käy, olemme varanneet käyttöösi käsikäyttötyökalun ja ohjeet tuolihissin siirtämiseen pois tieltä sen avulla.

Jos tuolihissi pysähtyy kiskon päässä ja käsinojan vihreä virtavallo sammuu, käytä sivulta 24 löytyvää tarkistuslistaa. Jos tarkistuslista ei auta ongelman ratkaisemisessa, noudata seuraavia ohjeita. Epäselvissä tapauksissa ota yhteys Stannah-jälleenmyyjään. Lisätietoja on takasivulla.

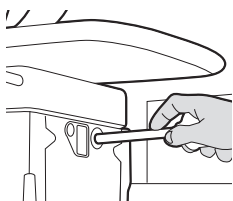

Tuolihissin siirtäminen käsikäyttötyökalulla

Kytke päävirtakytkin pois päältä. Katso sivu 9.
Poista muovitulppa istuimen alaosan edestä.
Työnnä käsikäyttötyökalu reiästä sisään.
Käännä kahvaa tuolin alaosan kyltin osoittamalla tavalla.

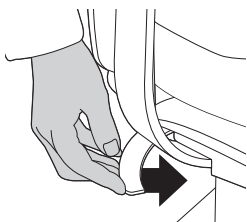

Tuolin kääntäminen automaattista kääntöistuinta käytettäessä

Kytke päävirtakytkin pois päältä.
Paina vipua sisäänpäin
Voit sen jälkeen kääntää tuolia,
kunnes se on kuljetusasennossa.














HUOMIO, TURVALLISUUS

Älä koskaan käytä tuolihissiä, kun käsikäyttötyökalu on reiässä.

Tekniikka ja turvallisuus

Seuraa näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät tuolihissiä aina turvallisesti.

-  Ennen kuin kutsut tuolihissin kauko-ohjaimella, varmista, että kukaan toinen ei ole käyttämässä sitä.
-  Jos haluat estää toisia käyttämästä tuolihissiäsi, voit ottaa virta-avaimen pois.
-  Seiso niin, että jalkasi ovat selvästi jalkatuella, kun lasket istuinta.
-  Varmista ennen tuolihissin käyttöä, että saranoitua kiskoa ympäröivällä alueella ei ole esteitä.
-  Käytä aina turvavyötä. Irrota turvavyö vasta sitten, kun olet päässyt portaikon toiseen päähän ja olet valmiina nousemaan pois tuolihissistä.
-  Pidä kynärpäsi vartalonmyötäisesti, kun käytät tuolihissiä.
-  Tuolihissiä saa käyttää ainoastaan yksi henkilö kerrallaan.
-  Älä koskaan käytä tuolihissiä, kun käsikäyttötyökalu on reiässä.
-  Älä anna lasten käyttää tuolihissiä ilman valvontaa.
-  Älä milloinkaan yritä purkaa tuolihissiä osiin.
-  Jos olet yksin kotona tuolia käyttäessäsi, suosittelemme matkapuhelimen tai vastaavan kommunikointivälineen käyttämistä, jotta voit tarvittaessa kutsua apua noustaksesi pois tuolihissistä.

Apuohjeet

Jos hissituolisi käytössä ilmenee ongelmia, toimi seuraavan tarkistuslistan mukaan.

Jos tarkistuslista ei auta ongelmiasi ratkaisussa, ota yhteyttä tuolihissisi myyjään. Yhteystiedot takasivulla.

Tuolihissi ei liiku

Vihreä merkkivalo ei pala

- Varmista, että päävirtakytkin on kytketty päälle – katso sivu 9.
- Varmista, että virta-avain on työnnetty paikoilleen ja käännetty on-asentoon – katso sivu 10.
Tuolihissi ei toimi, jos toinen näistä on pois päältä.

Vihreä merkkivalo palaa

- Tarkista, että tuoli kääntyy takaisin kulkuasentoonsa ja että kääntövivut ovat täysin alhaalla.
Istuin ei liiku, ellei se ole tässä asennossa – katso sivut 6 ja 15.
- Tarkista, onko turvareunojen edessä tai hissien välissä jokin este – katso vasemmalla olevaa kuvaa.
Jos on, tuolihissi pysyy päällä ja sitä voidaan siirtää vastakkaiseen suuntaan, jotta voit poistaa esteen hissien välistä. Nyt voit jatkaa matkaasi portaissa haluamaasi suuntaan.
Jos sinulla on lisävarusteena saatava sähkökäyttöinen saranoitu kisko,
- Varmista, että saranoitu kisko on täysin laskettu.

Jos tuolihissi ei vielääkään liiku

(1) Käännä virta-avain off-asentoon ja takaisin on-asentoon.

(2) Käytä ohjainta alaspäin ja pidä sitä siinä – muutaman sekunnin kuluttua tuolihissi käynnistyy. Ota sitten yhteyttä Stannah-jälleenmyyjäsi.

Jos tuolihissi pysähtelee edelleen, toista vaiheita 1 ja 2, kunnes pääset portaiden alapäähän.

Jos vaiheet 1 ja 2 eivät toimi oikein, pyydä kotona olevaa toista henkilöä ottamaan yhteys Stannah-jälleenmyyjään.

Jos olet yksin kotona tuolia käyttäessäsi, suosittellemme matkapuhelimen tai vastaavan kommunikointivälineen käyttämistä, jotta voit tarvittaessa kutsua apua noustaksesi pois tuolihissistä.

Viimeisenä toimenpiteenä käännä tuoli portaiden yläpäätä kohti, avaa turvavyö ja poistu portaisiin. Soita sen jälkeen Stannah-jälleenmyyjälle.

Apuohjeet

Tuolihissistä kuuluu piipittävä merkkiäni

Akut eivät lataudu.

Huomaa, että tuolihissi voi jatkaa toimintaa akkuvirralla.

- Varmista, että seinässä oleva käyttökytkin on päällä.
Seinässä olevan käyttökytkimen sijainti on esitetty käyttöoppaan sivulla 9.
- Tarkista, ettei ole sattunut sähkökatkosta.
- Tarkista, että tuolihissi on portaiden ylä- tai alapäässä.

Ellet pysty korjaamaan vikaa, voit sammuttaa hissin kääntämällä päävirtakytkimen off-asentoon – katso sivu 9. Soita sen jälkeen Stannah-jälleenmyyjälle.

Tuolihissi rakennuksessa useamman henkilön käytössä

- Kytke virta-avain pois päältä, ennen kuin nouset istuimeen ja pois siitä. Niin varmistat, että kukaan toinen ei voi kutsua tuolihissia, kun olet käyttämässä sitä.
- Varmista, että virta-avain käännetään päälle, kun olet perillä. Niin varmistat, että muut voivat käyttää tuolihissia.

Kauko-ohjaimet eivät toimi


- Tarkista paristot – katso sivu 20.

Automaattinen kääntöistuin ei toimi

- Ota yhteys tuolihissin jälleenmyyjään.
Käytä normaalia kääntövipua tuolihissisi kääntämiseen – katso sivua 22.


Lisävarusteinen sähkökäyttöinen saranoitu kisko ei toimi

- Ota yhteys tuolihissin jälleenmyyjään.
- *Jos saranoitu kisko on tiellä, voit nostaa sitä käsin sen alapuolelta – katso kuvaa.*

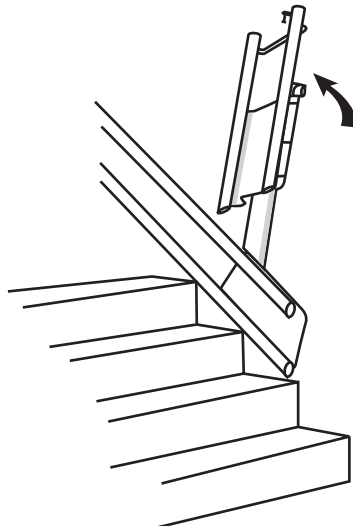

Apuohjeet

Tuotteen merkinnät

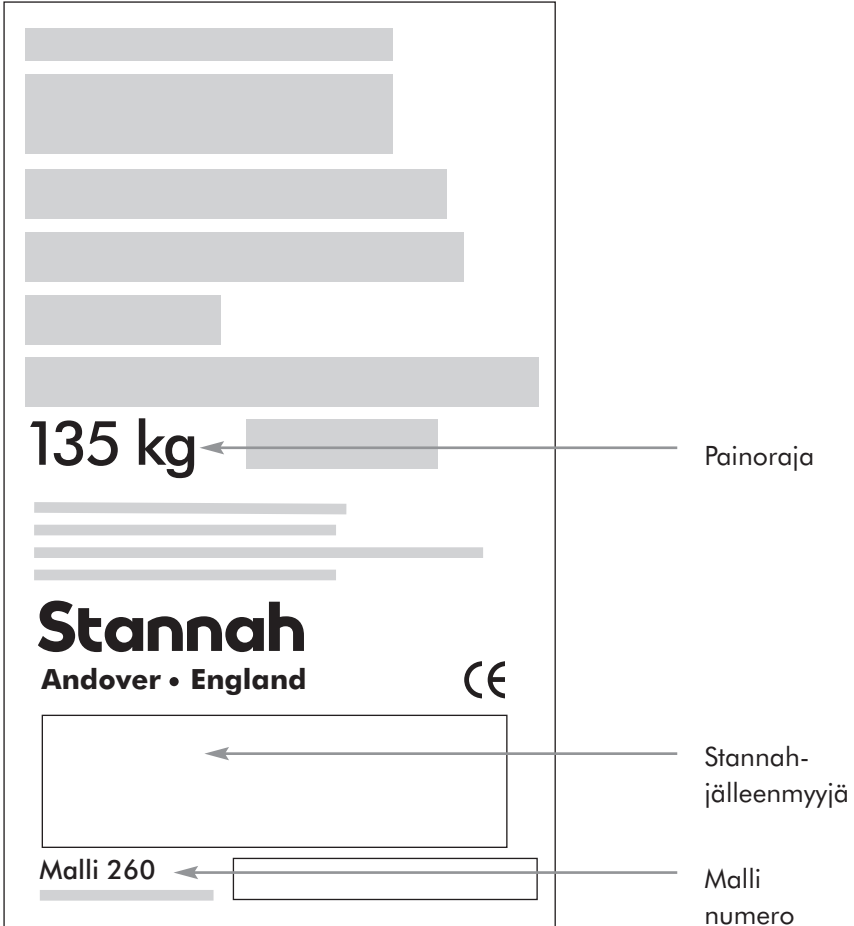

Olemme täällä auttamassa, joka päivä ja kaikkialla.

Me Stannahilla tiedämme, että emme ole tekemisissä pelkästään tuolihissien kanssa, vaan myös sinun. Siksi olemme käytettävissäsi aina, jos tarvitset apua.

Jos satut tarvitsemaan apua tuolihissisi kanssa, voit aina soittaa meille. Jos sinulla on ongelma jota et pysty ratkaisemaan, ei syytä huoleen: olemme aina valmiita auttamaan. Katso yhteystietomme takasivulta.

Yhteystiedot

Stannah

Stannah Stairlifts, Watt Close, East Portway, Andover,
Hampshire, SP10 3SD, United Kingdom www.stannah.com

Julkaisu 4. syyskuu 2021



600427

Suomeksi

Alkuperäiset ohjeet

