

Skötsel av trapphissen

Modell: **600 Siena**



Stannah



Fråga vem som helst i vårt team och de kommer att säga att de engagerat sig i att tillhandahålla de bästa trapphissarna. Och de håller sitt ord.

Här på Stannah är vår personal vårt hjärta. Vilken roll de än spelar, delar de vår passion för att tillverka trapphissar i världsklass.

Vare sig de är ansvariga för att montera en speciell del eller kontrollera varje avslutad trapphiss när den lämnar produktionsbanan, är var och en ytterst noggrann för att säkerställa att varje minsta detalj är perfekt. Detta åtagande och stoltheten inspireras av det sätt som de ser våra kunder – som individer. Alla anställda förstår att du måste ha totalt förtroende att trapphissen kommer att fungera precis som den ska, så att den uppfyller dina förhoppningar.

Det är detta personliga engagemang, tillsammans med vår policy att tillverka varje trapphiss i våra Stannah-anläggningar, som säkerställer att varje modell som lämnar våra lokaler är så bra som möjligt. Och det finns ett mål som driver alla dessa principer – Stannah-löftet om att hålla vårt ord.

Alla som arbetar för oss tror på vad vi står för och förbinder sig att uppfylla vårt löfte till dig - att förse dig med en trapphiss som erbjuder all den kvalitet, pålitlighet och prestanda som du behöver för att känna dig bekväm, trygg och självständig i hemmet.

Välkommen till bruksanvisningen för Siena.

För att få ut så mycket som möjligt av din nya trapphiss ber vi dig ägna ett par minuter åt att läsa igenom denna bruksanvisning. Förvara den sedan på ett säkert ställe om du skulle behöva kontrollera detaljer i framtiden. Om du känner dig osäker på något som rör trapphissen, kontakta gärna eran trapphissleverantör (se uppgifterna på baksidan).

Tack för att du valt Stannah



Siena

Innehåll

Lär känna din trapphiss	6-9
Användning av trapphissen	10
Strömnyckel	10
Fjärrkontroll	11
Utfällning av stolen	12
Infällbar skena	13
Säkerhetsbälte	14
Armreglage	15
Svängning av sitsen	16
Stiga av trapphissen	17
Rengöring av trapphissen	18
Byte av batterier	19
Teknisk information och säkerhet	20
HJÄLP	22
Certifiering	25

Serienr: _____




Viktig säkerhetsinformation finns där du ser den ovanstående symbolen för **SÄKERHETSINFORMATION.**

Viktigt:
Trapphissen är inte avsedd att användas vid brand och får inte användas som räddningsmedel.

Lär känna din trapphiss

Siena trapphiss

visad under rörelse

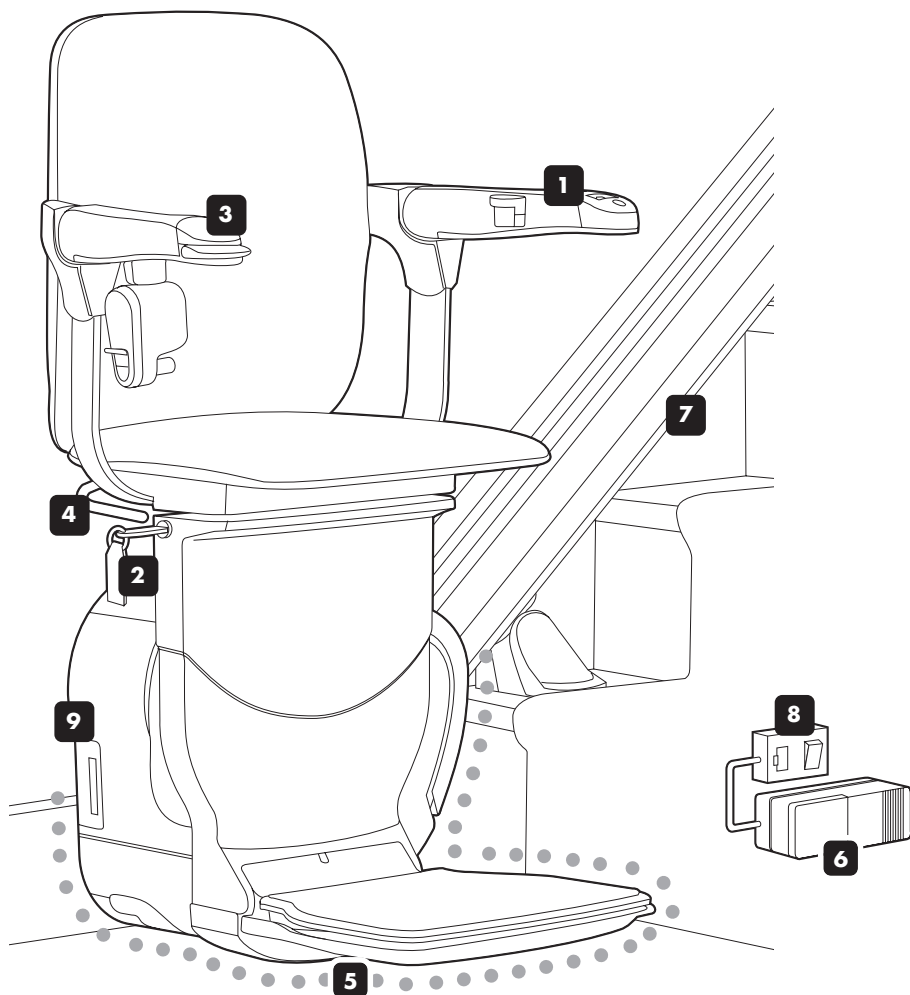

Lär känna din trapphiss

1 På/Av-brytare & Strömlampa

Strömlampan tänds när brytaren är i på-läget.

2 Strömnyckel

Nyckelhålet sitter på stolens sida. Nyckeln måste vara helt insatt och vriden till på-läget för att trapphissen ska fungera – se sidan 10.

Du kan ta ut strömnyckeln för att hindra andra från att använda trapphissen.

3 Armreglage

Armreglaget flyttar trapphissen i den riktning som du vill åka. Om stolen har en sits med automatisk svängning, kan du även använda reglaget för att svänga sitsen.

4 Svängspakar

Dessa sitter på båda sidor av sitsen. Sitsen svänger utåt vid trappans övre del för att hjälpa dig att stiga i eller ur trapphissen.

5 Skyddskanter

Skyddskanterna är till för att stoppa trapphissen om de kommer i kontakt med ett hinder. Detta förhindrar att något kommer i kläm medan trapphissen används. Se sidan 22 för utförligare information.

6 Batteriladdare

Laddar batterierna så att trapphissen alltid är klar att använda. Den kan monteras antingen på trappans övre eller nedre del.

7 Skena

8 Väggbrytare

Denna ska i normala fall lämnas påslagen. Se sidan 9 för utförligare information.

9 Bildskärmspanel

Panelen är placerad på trapphissens sida och låter dig se hissens status - se sidan 22.


Lär känna din trapphiss

Fjärrkontroller

Fjärrkontrollerna är placerade på trappans övre och nedre del och gör det möjligt att tillkalla trapphissen när du befinner dig i motsatt ände.

Fjärrkontrollerna fungerar bara om på/av-brytaren står i på-läget.

Reglagen är batteridrivna. Information om hur batteriet byts ut finns på sidan 19.

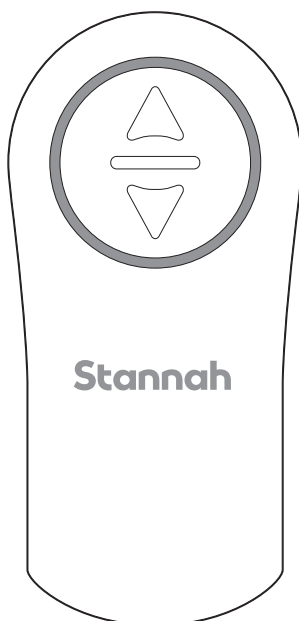

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

Se till att ingen använder trapphissen innan du anropar den med de väggmonterade fjärrkontrollerna.


Huvudströmbrytare och väggbrytare

Huvudströmbrytaren sitter på baksidan av stolens nedre del och ska normalt vara påslagen.

Trapphissen fungerar inte om denna strömbrytare är frånslagen.

Om du ska resa bort en längre tid – om du t.ex. åker bort på semester – kan du stänga av huvudströmbrytaren och väggbrytaren.

Se till att stänga av **både** huvudströmbrytaren och väggbrytaren – detta garanterar att batterierna fortfarande är laddade när du kommer tillbaka.

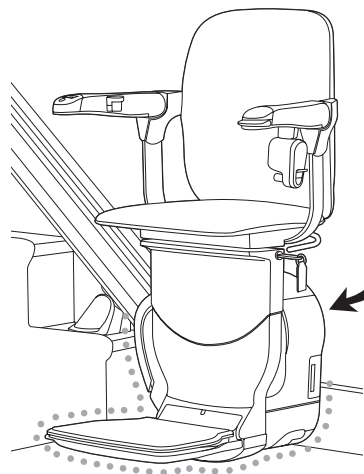

Tillval

Kanske har du valt från det utbud av tillval som finns för trapphissen Siena.

Samtliga tillval listade nedan behandlas i denna handbok. Kontakta den lokala Stannahleverantören om du behöver mer information om andra tillval som inte framgår här.

Svängbara sitsar


- Manuellt svängbar sits.
- Automatiskt svängbar sits.
- Automatiskt svängbar 2-vägssits.

Säkerhetsbälte

- Säkerhetsbälte med startspärr.

Infällbar skena

- Infällbar skena.

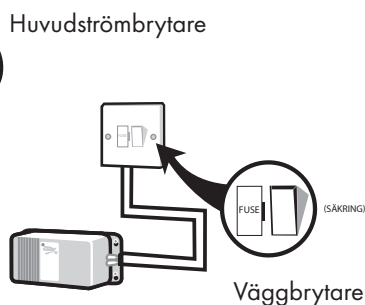

För avsnittet 'HJÄLP', se sidan 22

Användning av trapphissen


1. Sätt på strömmen

För att slå på strömmen


Sätt in nyckeln i nyckelhålet på stolens sida.

Se till att nyckeln är helt insatt.

Trapphissen och fjärrkontrollerna fungerar inte förrän du har satt in strömnyckeln.

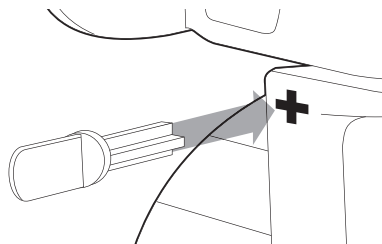

Då nyckeln är insatt och på/av-brytaren är i på-läget, tänds lampan på brytaren.

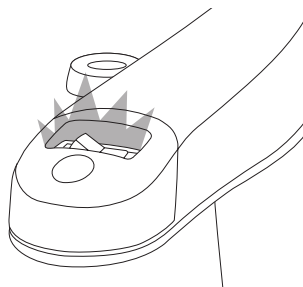


För att stänga av strömmen

Sätt på/av-brytaren i av-läget.

Ta ut nyckeln.

Om du inte vill ta ut nyckeln, kan den sitta kvar så som visas.

Lampan pulserar på och av.

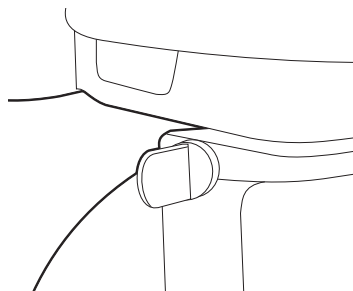

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

Du kan ta ut strömnyckeln för att hindra andra från att använda trapphissen.

Användning av trapphissen

Användning av fjärrkontrollerna


Använd dessa när du vill köra trapphissen till den motsatta delen av trappan.

För att köra trapphissen längs skenan

Håll pilknappen på fjärrkontrollen intryckt för att flytta trapphissen i den riktning du önskar. Trapphissen kan flyttas vare sig stolen är hopfälld eller nedfälld.

Information om hur stolen fälls ned finns på sidan 12.

Om du släpper upp pilknappen, stannar trapphissen och startar inte igen under ett par sekunder. Vänta ett par sekunder innan du startar trapphissen igen.

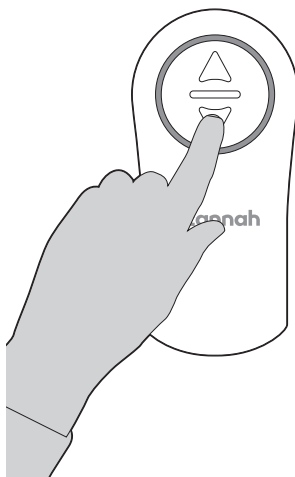


Batteristatus

När en av pilknapparna trycks in, visar lampan på kontrollen hur mycket batterikapacitet det finns kvar.

Batterierna räcker i cirka ett år vid normal användning.

Mer information om hur batterierna kontrolleras och byts ut finns på sidan 19.

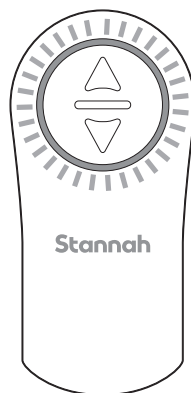

Användning av trapphissen

2. Nedfällning av stolen


Då stolen inte används, kan den fällas ihop för att ge mer plats runt trappans övre och nedre del.

För att fälla ned stolen

Fäll ned sitsen.

Fotstödet fälls ut tillsammans med sitsen.


Sänk ned bägge armstöden.

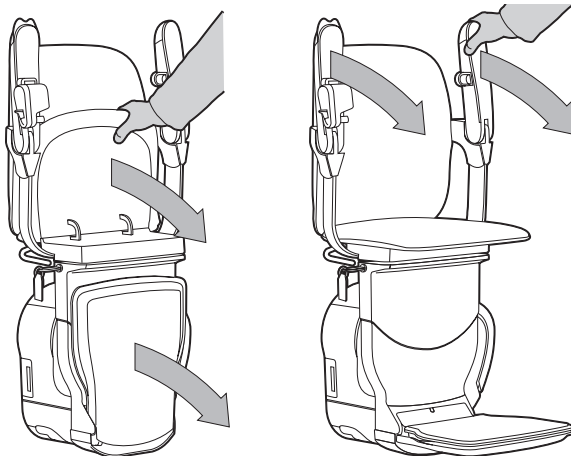

Hopfällningsknapp för fotstöd

(tillval)

Om du har en hopfällningsknapp för fotstödet, kan du använda denna för att sänka ned endast fotstödet.

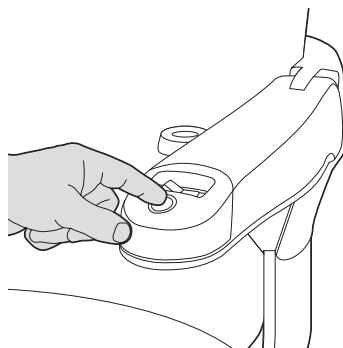

SÄKERHETSFÖRESKRIFT

Håll fötterna borta från fotstödet då sitsen sänks.

Användning av trapphissen


Att använda den infällbara skenan (tillval)

Trapphissen kan vara försedd med en infällbar skena som automatiskt höjs så att den inte är i vägen vid dörrar och passager.

För att använda den infällbara skenan

Den infällbara skenan kommer automatiskt att röra sig då du åker på trapphissen.

Observera att en lampa börjar blinka och en serie ljudsignaler hörs för att varna dig och andra om att den infällbara skenan rör sig.


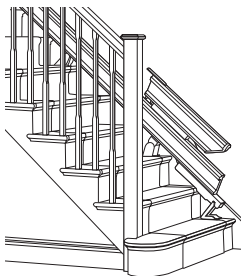


När du befinner dig på trappans nedre del, måste du skicka upp trapphissen uppför trappan så att den infällbara skenan inte hindrar dörröppningar eller passager.

Detta garanterar även att trapphissen står på laddning.

Håll pilen "upp" på fjärrkontrollen intryckt tills den infällbara skenan har höjts helt.

Observera att signalen ljuder om du lämnar trapphissen på trappans nedre del. Detta varnar dig för att trapphissen kan utgöra ett hinder och att den inte står på laddning.

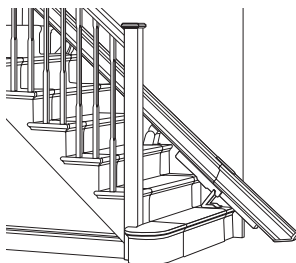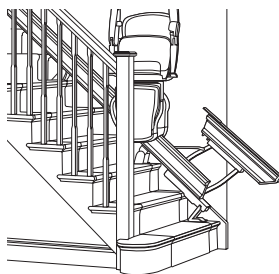

SÄKERHETSFORESKRIFT

Kontrollera att området runt den infällbara skenan är fritt innan du flyttar trapphissen.


Användning av trapphissen

3. Sätt dig på sitsen och starta trapphissen

Se till att på/av-brytaren står i av-läget och att lampan pulserar. Sätt dig sedan på sitsen och fäst säkerhetsbältet. När du är klar att åka upp- eller nedför trappan, sätt på/av-brytaren i på-läget och använd armreglaget för att starta trapphissen.

För att använda säkerhetsbältet

Dra säkerhetsbältet över höfterna och sätt fast det i låset. Trapphissen startar inte förrän säkerhetsbältet är festsatt.

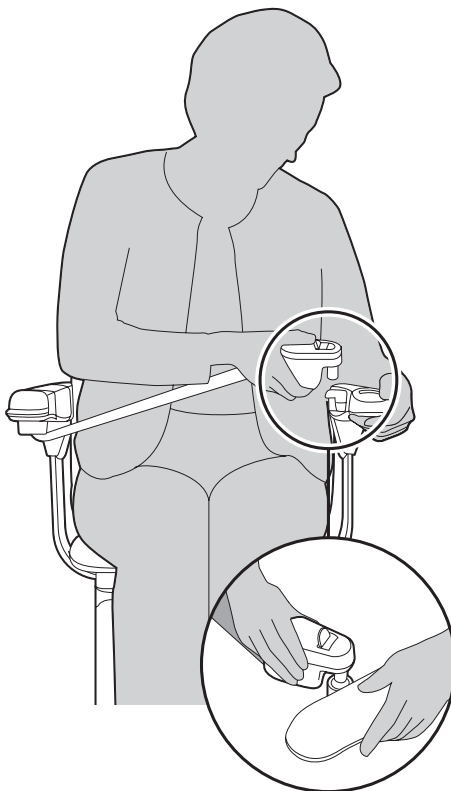

SÄKERHETSFÖRESKRIFT


Använd alltid säkerhetsbältet. Ta bara av det då du har kommit till trappans övre eller nedre del och du är klara att stiga av. Håll armbågarna nära kroppen när du använder trapphissen.

Användning av trapphissen

För att använda armreglaget

Håll armreglaget i den riktning du vill åka – trapphissen startar efter ett par sekunder. Den fördröjda starten är en säkerhetsåtgärd.

Trapphissen stannar när den har nått trappans övre eller nedre del. Om du släpper armreglaget vid något tillfälle, stannar hissen.

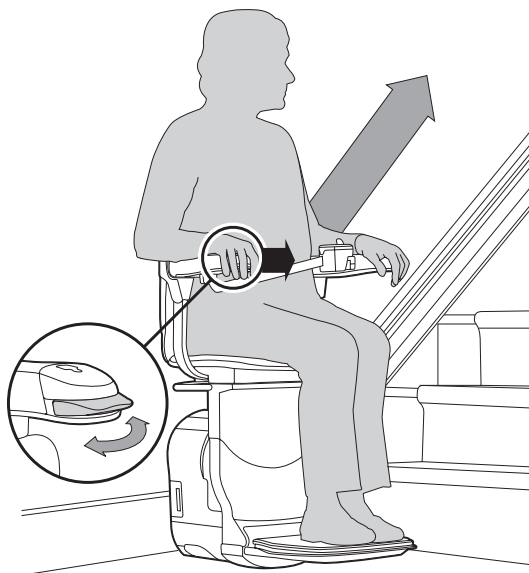

Automatiskt svängbar sits (tillval)

Om du har en automatiskt svängbar sits, kan du fortsätta att hålla armreglaget när du kommit fram och sitsen svänger automatiskt åt sidan. Se sidan 16.

När trapphissen har stannat, tar det några sekunder innan sitsen svänger.



SÄKERHETSFORESKRIFT

Endast en person åt gången kan använda trapphissen.

Användning av trapphissen

4. Svängning av sitsen


På trappans övre del kan du svänga sitsen till sidan så att det går lättare att stiga av.

Sitsen kan också svängas så att det går lättare att stiga på trapphissen när du vill åka ned.

För att svänga stolen med den manuella sitsen

Lyft svängspakarna på sidan av sitsen och sväng den i sidled.

Detta kan endast göras i riktning mot trappans övre del – detta för säkerhetens skull.

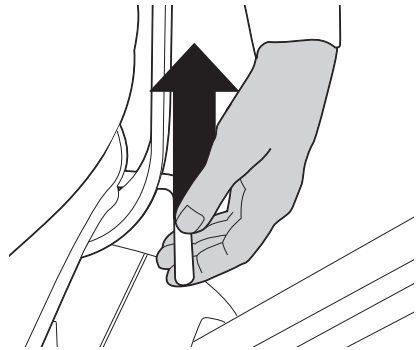


För att svänga stolen med användning av den automatiskt svängbara sitsen (tillval)

Håll armreglaget i den riktning du vill att sitsen skall svänga.

För att svänga stolen med användning av det automatiskt svängbara sätet (tillval)

Om du har en automatiskt svängande tvåvägssits, kan du svänga sitsen vid trappans övre och nedre del.

Observera att, om du har en tvåvägssits, svänger trapphissen endast i nedåtgående riktning när den står nederst i trappan.

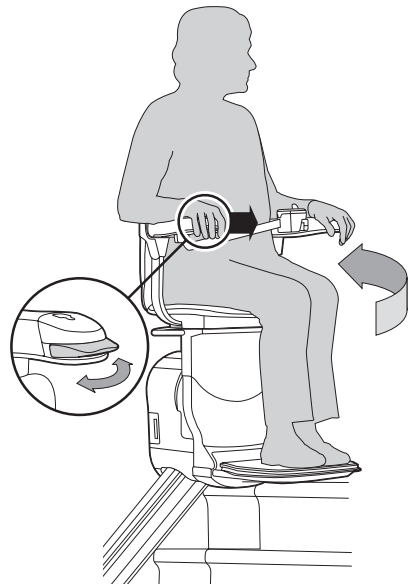

Användning av trapphissen


5. Att stiga av trapphissen

Se till att på/av-brytaren står i av-läget och att lampan pulserar. Gå försiktigt av trapphissen och sväng tillbaka sitsen till åkpositionen. Stolen kan fällas undan om du önskar.


För att stiga av

Lossa säkerhetsbältet.

För knappen mot armstödet och lyft ut spännet ur hållaren. Gå försiktigt av trapphissen.

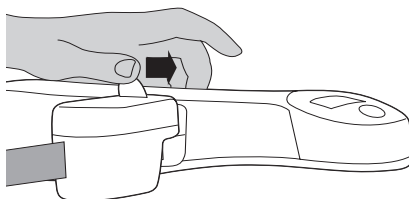


Sväng tillbaka sitsen till åkpositionen med hjälp av antingen de manuella svängspakarna eller, om du har en automatisk svängning, fjärrkontrollerna. Stolen kan fällas undan om du önskar.

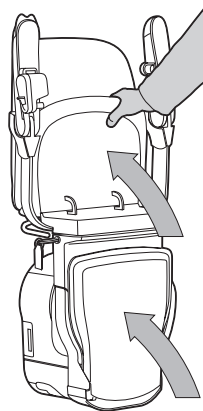

Hopfällningsknapp för fotstöd (tillval)

Om du har en hopfällningsknapp för fotstödet, kan du använda denna för att höja endast fotstödet.

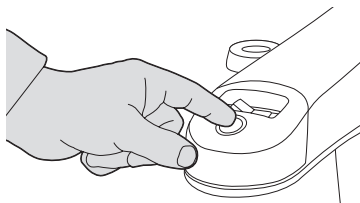

För avsnittet 'HJÄLP', se sidan 22

Rengöring av trapphissen

Vid tvivel ifråga om rengöringen av din trapphiss, kontakta din trapphissleverantör.

Rengöring av skenan

Använd en fuktig duk för att avlägsna damm och smuts.

För att rengöra dynorna

Använd en fuktig duk för att avlägsna damm och smuts.

Använd inte lösnings- eller blekmedel, slipmedel, syntetiska rengöringsmedel, bonvax eller aerosolspray utan att först ha kontrollerat med leverantören.

Vidare information

Max. viktgräns är

Vinkel	Viktgräns
Upp till 52°	160 kg inklusive infällbar skena

Max. ljudemission: 70 dB

Batteriladdarens ineffekt: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Uteffekt till trapphissen: 24 VDC 750 mA.



Återvinning och bortskaffning av trapphiss

Kasta inte bort några delar av denna produkt som hushållsavfall. För mer information om återvinning och bortskaffning av trapphissen, kontakta din trapphissleverantör (se uppgifter på baksidan).

Byte av batteri på fjärrkontrollen

Batterierna i fjärrkontrollen räcker i cirka ett år vid normal användning.

När en av pilknapparna trycks ned, visar ljuset runt knapparna hur mycket batterikapacitet som finns kvar.

Roterande lampor	Batterier OK
Lampor konstant tända	Låg batterinivå – byt ut batterierna så snart som möjligt
Inget ljus	Batterierna är slut




Lamporna lyser hela tiden då batterinivån är låg.

För att byta batteriet


Ta bort skruven, skjut ned och öppna batterilocket och sätt in de nya batterierna.

Varje fjärrkontroll har tre AA-batterier.

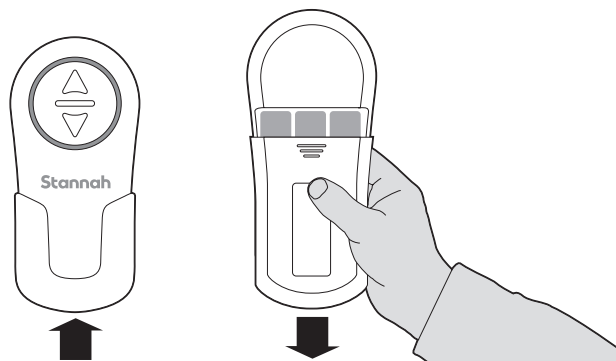

Teknisk information och säkerhet

Det är högst osannolikt att trapphissen skulle stanna under färd. Om den ändå skulle göra det och utgöra ett hinder i trappan, har vi tillhandahållit instruktioner för att flytta undan trapphissen.

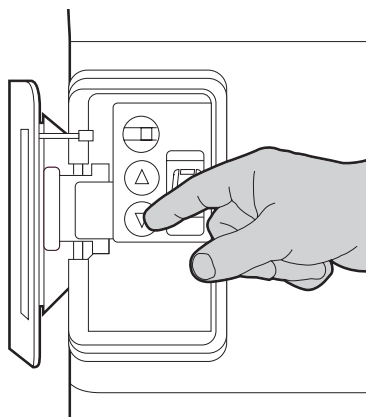

Använda nöddrivningen

Öppna luckan till trapphissens nödkontroller. Tryck på den översta knappen för att ställa den på nödfunktion.

Tryck på kontrollen för att köra trapphissen i önskad riktning. Tryck igen på den översta knappen för att växla tillbaka till det normala funktionsläget.


För att svänga stol med automatisk svängsits

Stäng av huvudströmbrytaren – se sidan 9.

Tryck båda spakarna inåt.

Du kan sedan svänga stolen.

Den måste befina sig i åkposition för att trapphissen ska kunna köras uppåt och nedåt i trappan.

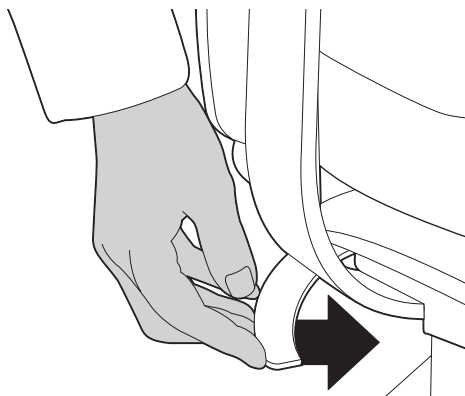

Teknisk information och säkerhet

Följ dessa punkter för att säkerställa att trapphissen alltid används på säkert sätt.



Innan du tillkallar trapphissen med fjärrkontrollerna, se först till att ingen använder den.



Du kan ta ut strömnyckeln för att hindra andra från att använda trapphissen.



Håll fötterna borta från fotstödet då sitsen sänks.



Använd alltid säkerhetsbältet. Ta bara av det när du har kommit till trappans övre eller nedre del och du är klar att gå av.



Håll armbågarna tätt mot kroppen då trapphissen används.



Endast en person åt gången kan använda trapphissen.



Kontrollera att området runt den infällbara skenan är fritt innan du flyttar trapphissen.



Låt aldrig barn använda trapphissen utan uppsikt.




Försök aldrig att ta isär trapphissen.



Om du är ensam hemma när du använder trapphissen, rekommenderar vi att du tar med en mobiltelefon eller annat kommunikationsmedel, så att du kan larma andra om du behöver hjälp för att stiga av trapphissen.

Hjälp

Nedanstående checklista används för att identifiera eventuella fel och se vad som kan göras för att lösa dem. Om checklistan inte hjälper dig att lösa problemet, kontakta din trapphissleverantör, se detaljerna på baksidan.

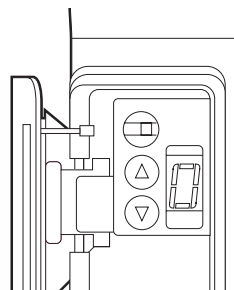

Kod	Varför?	Vad ska jag göra?
-/1	Laddning/Batterifel.	Kontrollera att väggkontakten är på. Kontrollera att inget strömavbrott inträffat. Om problemet kvarstår, ring din trapphissleverantör.
2	Inga fel funna.	Ring din trapphissleverantör
3	Hinder upptäckt runt fotstöd/vagn.	Kontrollera om någonting är i vägen för skyddskanterna. Om så är fallet, är trapphissen fortfarande på och kan flyttas i motsatt riktning så att du kan ta bort hindret. Du kan sedan fortsätta upp- eller nedför trappan.
4	Nyckeln inte rätt insatt eller så är på/av-brytaren i läget "av".	Kontakta din Stannah-leverantör
5	Nedre armen är inte sänkt	Kontakta din Stannah-leverantör
6	Säkerhetsbältet med startspärr inte rätt påsatt (tillval).	Om ett säkerhetsbälte med startspärr är monterat, se till att det är låst på plats - se sidan 14.
7	Sitsen inte i sin åkposition.	Sväng tillbaka sitsen till åkpositionen - se sidan 6.
9/F	Servicetekniker behövs.	Kontakta din Stannah-leverantör

Hjälp

Om trapphissen fortfarande inte rör sig

(1) Ta ut och sätt in nyckeln - se sidan 10.

(2) Håll reglaget i ned-riktningen – trapphissen startar efter några sekunder. Ring sedan din trapphissleverantör.

Om trapphissen stoppar under ovanstående, upprepa steg 1 och 2 tills du når trappans nedre del.

Om steg 1 och 2 inte fungerar, be en annan person i hemmet att kontakta din trapphissleverantör.

Om du är ensam hemma när du använder trapphissen, rekommenderar vi att du tar med en mobiltelefon eller annat kommunikationsmedel, så att du kan larma andra om du behöver hjälp för att stiga av trapphissen.



Som sista utväg, sväng stolen mot trappans övre del, öppna säkerhetsbältet och gå upp för trappan. Ring sedan din trapphissleverantör.

Tillvalet infällbar skena fungerar inte.

Kontakta din trapphissleverantör.

Om den vikbara rälsen orsakar hinder kan du lyfta den för hand genom att använda justeringshandtaget på följande sätt:

- (1) Placera handtaget på den plats som visas.
- (2) Skjut in handtaget och vrid det i önskad riktning.

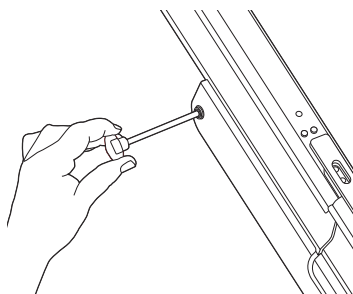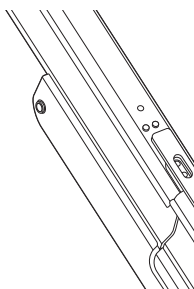

Produktens varningsdekal

Sitter på
vagnen

Stannah
Andover • England

160kg

600
CE

1 Viktgräns.
Detta är den maximala personvikten för säker användning av trapphissen.

2 Adressuppgifter.
Detta är kontaktinformationen till din trapphissleverantör.

3 Modell.
Detta identifierar den trapphissmodell som du har. Du kan bli ombedd att uppge detta nummer om du ringer din trapphissleverantör.

Stannah

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

I enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG bilaga III

1. *Produktmodell:*

Produkt Trapphiss med rak skena – innehåller följande stolar med manuell svängning eller autosvängning (Siena, Starla, Solus, Sofia) och dragbart alternativ.
Modell 600
Serienr. 60016010001 - 60026529999

2.

Namn	Tillverkare:	Importör:
Adress	Stannah Stairlifts Ltd Watt Close, East Portway Andover, Hampshire England SP10 3SD	Stannah GmbH Jägerhofstraße 29, 40479 Düsseldorf, Germany

3. *Denna försäkrans utfärdas på tillverkarens eget ansvar.*

4. *Föremål för försäkrans:* Nyckelkomponenter – stol, vagn, skena och byggsatser.

5. *Föremålet för försäkrans ovan överensstämmer med den relevanta harmoniserade gemenskapslagstiftningen:*

2006/42/EG	Maskindirektivet
2014/30/EU	Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
2011/65/EU	Direktivet om begränsning av farliga ämnen

6. *Hänvisningar till de relevanta harmoniserade standarder som används eller hänvisningar till andra tekniska specifikationer i förhållande till vilka överensstämelsen försäkras:*

Referens

EN 81-40:2020 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar. Specialhissar för transport av personer och gods. Trapphissar och plattformshissar som rör sig längs en lutande bana, avsedda för personer med nedsatt rörelseförmåga.

7. *Enligt direktiv 2006/42/EG artikel 12.3 a är maskinen tillverkad i enlighet med den relevanta harmoniserade standarden EN 81-40:2020 och följde förfarandet för bedömning av överensstämmelse genom interna kontroller av tillverkningen av en maskin enligt bilaga VIII.*

Förfarandet för intern tillverkningskontroll (modul A) har följts för de andra direktiven.

8. *Ytterligare information:*

Denna maskin måste installeras, tas i drift och testas i enlighet med bruksanvisningen.

Den tekniska dokumentationen för maskinen är nns tillgänglig från:
Andy Hoath – Head of Engineering på tillverkarens adress ovan.

Plats	Andover
Datum	20 november 2022
Namn	Andrew Hastilow
Befattning	Verkställande direktör

Namnsteckning



Rev 4 - 21/10/2022

Vi är här för att hjälpa, varje dag och var som helst.

På Stannah vet vi att vår verksamhet inte bara handlar om trapphissar, den handlar även om dig. Det är därför vi finns här om du behöver hjälp.

Om du mot förmodan skulle behöva hjälp med trapphissen, räcker det att du ringer. Om ett problem som du inte kan lösa uppstår, behöver du inte oroa dig - vi är alltid redo att hjälpa. Se uppgifterna på baksidan.



Kontaktuppgifter

Stannah

Stannah Stairlifts, Watt Close, East Portway, Andover,
Hampshire, SP10 3SD, United Kingdom

www.stannah.com

Utgåva 6 November 2022



600465

Svenska

Originalinstruktioner

