

KÄYTTÖOHJE fi / BRUKSANVISNING sv / GUIDANCE NOTES en

Etac Socky sukanvetolaite, lyhyt / strumppådragare, kort / stockin aid, short

Sukka vedetään Sockyn kankaan päälle, kunnes sukan yläreuna ylittää koukkujen päälle. Aseta nauha pohkeen taakse ja vedä. Lyhyt Socky liukuu jalkaterän ja säären ympäri kevyesti ja sukka asettuu hyvin paikalleen. Nailonkankaan alla olevat muovikoukut pitävät sukan paikallaan ja tekevät sukan pukemisesta helppoa.

Strumppådragare Socky kort kan användas för att ta på korta och långa strumpor eller sockor. Den är liten och smidig och därför lätt att bära med sig. Strumpan glider över nylontyget, som sedan enkelt träs över foten.

The sock is simply pulled onto the Socky fabric until the top of the sock reaches over the hooks. Place the string behind the calf and pull. Socky short slides up around your foot and lower leg with ease, placing the socks perfectly.



Nimi / Namn / Name:

Socky sukanvetolaite, lyhyt / Socky Strumppådragare, kort /
Socky stocking aid, short

**Tuotenumero / Artikelnummer /
Article number:**

80601002

Pituus / Längd / Length:

40 cm

Paino /Vikt / Weight:

94 g

**Materiaalit / Material /
Materials:**

Kangas: polyesteri, Muoviosat: polypropeeni
Tyg: Polyester, Plastdetaljer: Polypropen
Fabric: Polyester, Plastic parts: Polypropylene

Puhdistus / Rening / Cleaning :

Käsinpesu pyyhkimällä tuote puhdistusaineella, joka ei sisällä liottimia, ja jonka pH on 5-9 tai 70% desinfiointiaineella.

Rengör med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel med pH-värde 5-9. Desinficeras med 70% rengöringssprit.

Hand clean the product with a solvent-free cleaning agent (pH 5-9 or 70% disinfectant).

Takuu / Garanti / Warranty

2 vuotta / år / years