

## TTA150 - varrellinen kääntölevy



Varrellinen kääntölevy on helppokäyttöinen siirtoapu, joka keventää hoitajan työtä silloin, kun avustetaan siirtymään istuma-asennosta toiseen. Varrellinen kääntölevy on avustajalle ergonominen ja siirrettävää aktivoiva. Välinettä voidaan käyttää esimerkiksi siirtymisissä sängystä pyörätuoliin tai suihkutuoliin sekä pyörätuolin tai tavallisen tuolin välillä. Siirtoalusta voi olla myös apuna, jos istuma-asentoa halutaan vain kohentaa.

Varrellisen kääntölevyn otekahvan ja polvitukien korkeutta voidaan säätää helposti. Säädöt varmistavat, että siirrettävä saa mahdollisimman hyvän tuen, ja että siirtotilanne on mahdollisimman turvallinen. Alusta on matala, joten siihen on helppo nostaa jalat. Siirtoalustan pinta on karhennettu ja se antaa hyvän tuen jalan alla. Kevyesti rullaavat pyörät helpottavat kääntölevyn siirtämistä tyhjänä paikasta toiseen.

Soveltuu käytettäväksi henkilöillä, joiden paino on enintään 150 kg.



Siirrä istuimelta toiselle istuimelle alustaa kääntäen.

Tuote on CE-merkitty lääkinällinen laite.

### TEKNISET TIEDOT

Otekahvan säätöalue	85-121 cm
Säärituen säätöalue	30-53 cm
Alustan halkaisija	40 cm
Mitat (L×K)	579×1201 mm
Alustan korkeus	16 mm
Pyörät	75 mm
Paino	n. 14 kg
Käyttäjän maksimipaino	150 kg