


Liko Amputee HighBack Sling -nostokangas, malli 75

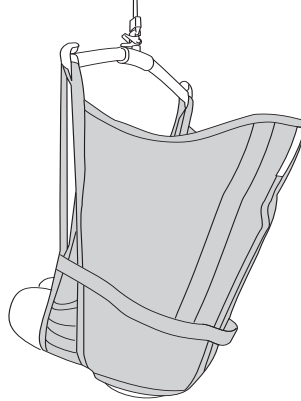

Käyttöohje



Tuotekuvaus

Käyttötarkoitus:

AmputeeSling-nostokankaat on suunniteltu erityisesti sellaisten avustettavien nostamiseen, joiden molemmat jalat on amputoitu. AmputeeSling-nostokangas käyttämisestä suositellaan myös sellaisten avustettavien nostamiseen, joiden jalvoja ei ole amputoitu mutta jotka yleensä liukuvat ulos saman tyyppisistä nostokankaista. Lisäksi Amputee Sling-nostokangas saattaa soveltua muille avustettaville, kuten henkilöille, joiden toinen jalka on amputoitu.

Se on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä: terveydenhuoltoympäristöt, tehohoito, ensiapu, kuntoutus, sopeuttaminen ja kotisairaanhoido.

Liko AmputeeSling on turvallinen ja helppokäyttöinen nostokangas. Se on suunniteltu erityisesti sellaisten avustettavien nostamiseen, joiden molemmat jalat on amputoitu ylhäältä. AmputeeSling-nostokankaan käyttämistä suositellaan myös sellaisten avustettavien nostamiseen, joiden jalvoja ei ole amputoitu mutta jotka yleensä liukuvat ulos saman tyyppisistä nostokankaista. Lisäksi AmputeeSling-nostokangas saattaa soveltua muille avustettaville, kuten henkilöille, joiden toinen jalka on amputoitu.

Jalkatuet

Jalkatuet ovat normaalisti päällekkäin kummankin reiden alla. AmputeeSling-nostokankaassa on vahvistetut jalkatuet, jotka jakavat paineen tasaisesti ja estävät nostokankaan rypistymisen reisien alle.

Nostokankaan sivussa olevat ohjauslenkit varmistavat jalkatukien oikean asennon ja estävät istuinosan aukon suurenemisen, mikä lisää turvallisuutta noston aikana. Avustettavan kädet ovat nostokankaan sisäpuolella.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue sekä nostimen että nostovarusteiden käyttöohjeet ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeiden sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu avustaja. Koulutuksen saadakseen avustajan pitää lukea ja ymmärtää käyttöohjeet. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan henkilön turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Koot

Oikein sovitettuna ja käytettynä AmputeeSling-nostokangas varmistaa, että avustettavalla on mukava ja turvallinen olo noston aikana.

AmputeeSling-nostokankaassa on päätuki.

Jos avustettava on kookas tai jos hän on herkkä hartioihin kohdistuvalle paineelle, nostokankaan kanssa on suositeltavaa käyttää Universal SlingBar 600 -nostokaarta.

Kankaat

AmputeeSling-nostokangas on valmistettu polyesteristä. Se on kestävä ja kitkaton materiaali, joka tekee nostokankaasta helposti aseteltavan ja helposti poistettavan. Nostokankaasta on saatavana myös verkkopolyesterista valmistettu malli, joka soveltuu tilanteisiin, joissa nostokangas jätetään tuoliin noston jälkeen tai joissa halutaan käyttää ilmavampaa vaihtoehtoa.

AmputeeSling-nostokankaan voi asettaa ja poistaa joko istuma- tai makuuasennossa.

Sopivat nostimet

AmputeeSling-nostokangasta voidaan käyttää kaikkien **Likon** katonostimien ja liikuteltavien nostimien kanssa. Valittavana ovat **LikoGuard**-katonostin, **Likorall**-katonostin ja **Multirall**-katonostin tai liikuteltava **Golvo**-nostin, liikuteltava **Viking**-nostin, liikuteltava **Uno**-nostin ja liikuteltava **Liko M220/M230** -nostin.

Turvallisuustietoja

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormitus määräytyy aina järjestelmän sen osan mukaan, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.
- Tarkista, että nostotarvikkeet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka **Liko** nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina noston/siirron aikana.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos jostakin syystä on tarkoituksenmukaisempaa jättää nostokangas paikalleen siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää verkkopolyesteristä valmistettua nostokangasta.

Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.

Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.

Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa!

Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa nostokankaan läheisyyteen!

Älä käytä, säilytä tai siirrä nostokangasta lemmikkieläinten, tuhoeläinten tai ilman valvontaa olevien lasten läheisyydessä!

Älä säilytä nostokangasta paikassa, jossa se voisi altistua suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, kuten lämpöpatterit, takat tai hella/uuni!

Kuluneen nostokankaan käytöstä voi aiheutua puristumisvaara tai vähäisten vammojen vaara, jos avustettava asetetaan nostokankaaseen epätasapainoisesti tai jos nostokangasta ei poisteta varovasti.

Varmista, että avustettava ja avustaja pysyvät etäällä puristuskohdista ja liikkuvista osista noston aikana. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

Arvioi avustettavan puristumisriski ja valvo avustettavaa asiaankuuluvasti. Varmista, että avustettavan pää ja raajat eivät ole nostokankaan lenkeissä tai niiden välissä noston aikana. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

 Lääkinnällinen luokan I laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hillrom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisien sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

Tuotemuutokset

Liko-tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hillromin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden




























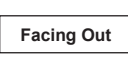

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniiikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota. Symboli on keltainen kolmio, jossa on musta reunus ja musta huutomerkki keskellä.		
	Kierrätettävä		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä. Symboli on sininen ympyrä, jonka sisällä on valkoinen piirros henkilöstä lukemassa kirjaa.		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä		Huomio! Tutustu käyttöohjeeseen.
	CE-merkintä: merkintä Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin vaatimustenmukaisuudesta, luokan I lääkinnällinen laite		
	Valtuutettu edustaja Sveitsissä		
	Laillinen valmistaja		Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste		Lääkinnällinen laite
	Sarjanumero		Yksilöllinen laitetunniste
	Kemiallinen pesu kielletty		Ripusta kuivumaan varjoon
	Silitys kielletty		Valkaisu kielletty
	Rumpukuivaus		Pesu kielletty
	Rumpukuivaus kielletty		
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).		
	Lateksiton		
	Määräaikaistarkastus		
	Älä käytä tuotetta. (Vain Solo-tuotteissa. Tulee näkyviin vain pesun jälkeen, kun käyttö on kiellettyä.)		Avustettavan nimi
	Yhden avustettavan käyttöön (vain Solo-tuotteet)		
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli		Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 (01) 0100887761997127 (11) VVKKPP (21) 012345678910	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) valmistuspäivä (21) sarjanumero		

Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- kangas
- hihnat
- saumat
- lenkit.

⚠ **Älä käytä vahingoittuneita nostovarusteita.**

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Jos nostokangasta käytetään kylvyssä tai suihkussa:

Kylvyssä ja suihkussa käyttämisen jälkeen nostokangas on sijoitettava niin, että se kuivuu mahdollisimman nopeasti.

Pesu- ja desinfiointiohjeet:

Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Materiaali:

AmputeeSling-nostokangas on valmistettu polyesteristä. M-kokoinen nostokangas on saatavilla myös verkkopolyesteristä valmistettuna mallina.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Lisätietoa käytännöistä saat Hillromin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 5 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttöikeys, pesumenetelmä ja kuormien paino. Hillrom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöajan ajan.


Kierrätysohjeet


Koko nostokangas, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava polttokelpoiseen jätteeseen.

Hillrom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfioimisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja/tai paikallisia lakeja ja asetuksia.







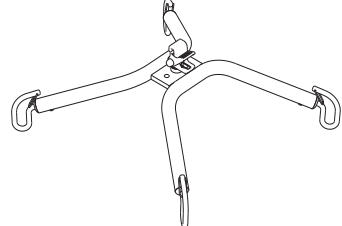
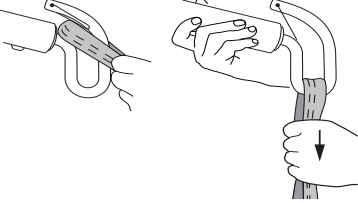
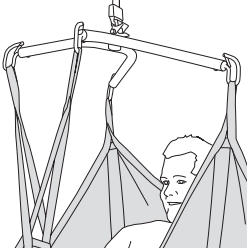
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen ja pyydettävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Määritelmät

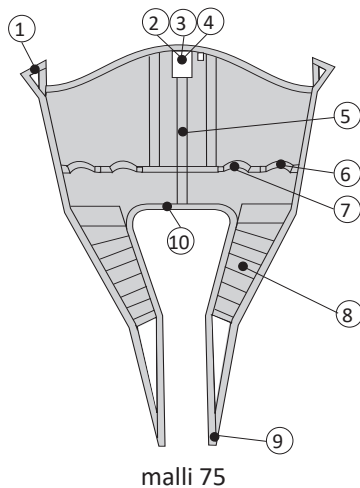


1. Ylempi hihnalenkki
2. Tuotelappuun sisältyy:
Valmistusvuosi ja -kuukausi ()
Sarjanumero (**SN**)
3. Lappu: Määräaikaistarkastus
4. Lappu: Yksilöllinen merkintä (Belongs to)
5. Keskisaumanauha ja kokomerkintä
(S = oranssi, M = keltainen, L = sininen, XL = musta)
6. Ohjauslenkki
7. Kädensija
8. Jalkatuki
9. Jalkatuen lenkki
10. Alareuna

Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

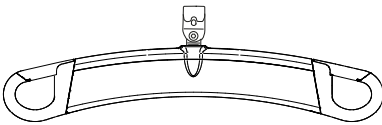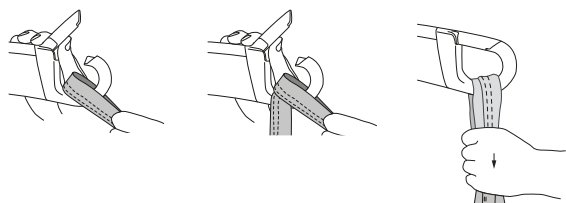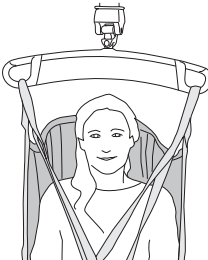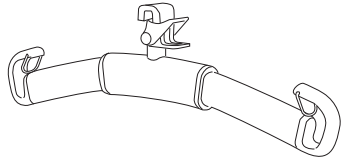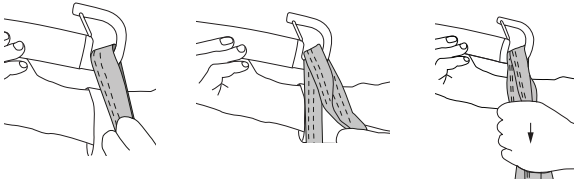Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="279 492 422 526">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="287 784 414 817">Universal</p>		
 <p data-bbox="295 1086 430 1120">Cross-Bar</p>		





Väärin!

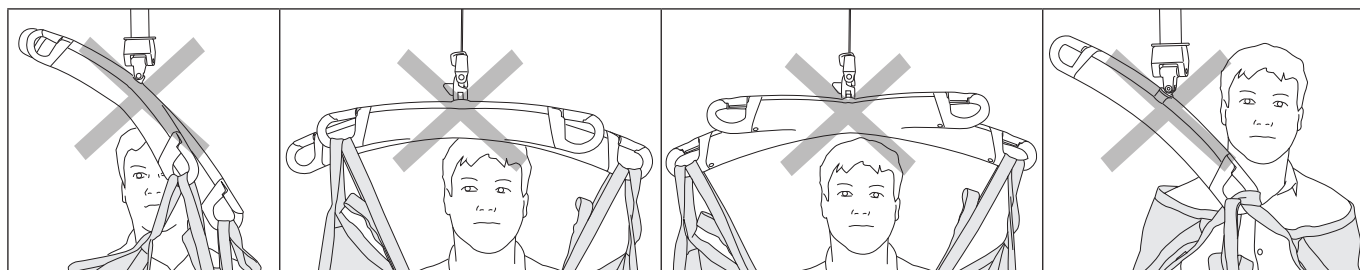

Kuvissa näkyy kaksoisnostokaari, mutta sama ohje koskee myös Cross-Bar-ristikkonostokaarta.

AmputeeSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen

⚠ AmputeeSling-nostokankaan ja Cross-Bar-ristikkonostokaaren yhdistelmä on tarkoitettu avustettaville, joilta ei ole amputoitu jalkoja.

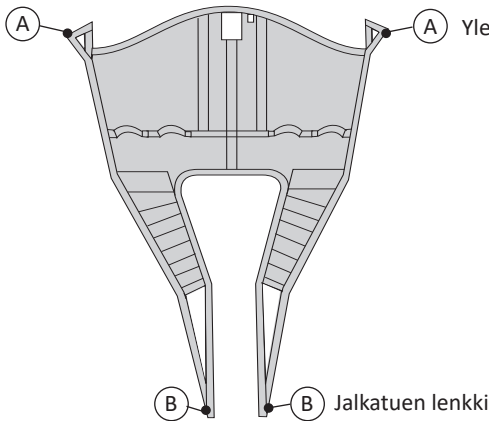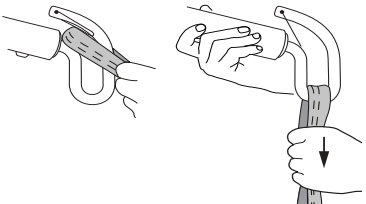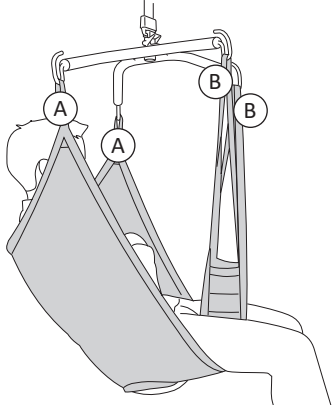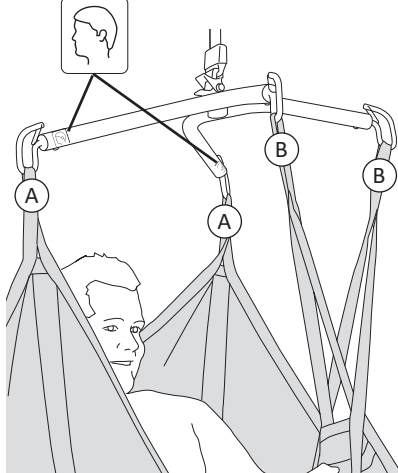 <p>A Ylempi hihnalenkki</p> <p>B Jalkatuen lenkki</p>	<p>1.</p> 
<p>2. Kun AmputeeSling-nostokangasta käytetään Cross-Bar-ristikkonostokaaren kanssa, jalkatuet on asetettava ristikkäin vartalon etupuolelle.</p> 	<p>3. Cross-Bar 670</p>  <p>Kuvissa 1, 2 ja 3 näkyy Cross-Bar 670 -kaksoisnostokaari, mutta sama ohje koskee myös Cross-Bar 450 -ristikkonostokaarta ja SideBars-sivukaarilla varustettua SlingBar 600 -nostokaarta.</p>

Nostokankaan koon valitseminen


⚠ Käytä vain nostokangasta, joka on avustettavalle sopivan kokoinen. Koulutetun avustajan on arvioitava oikea koko. Muuten vaarana voi olla avustettavan puristuminen tai tukehtuminen.

Avustettavan lantion ja nostokankaan lantiokohdan leveyden mittaaminen auttaa nostokankaan koon valinnassa. Vertaa avustettavasta otettua mittausta (katso mittausohje) ja nostokankaan mittausta (katso mittausohje).

Oikean koon valitseminen:

Valitse nostokangas, jonka lantiokohdan leveysmitta on +/- 8 cm avustettavan lantion leveydestä.

Mittaa avustettavan lantion leveys seuraavasti:

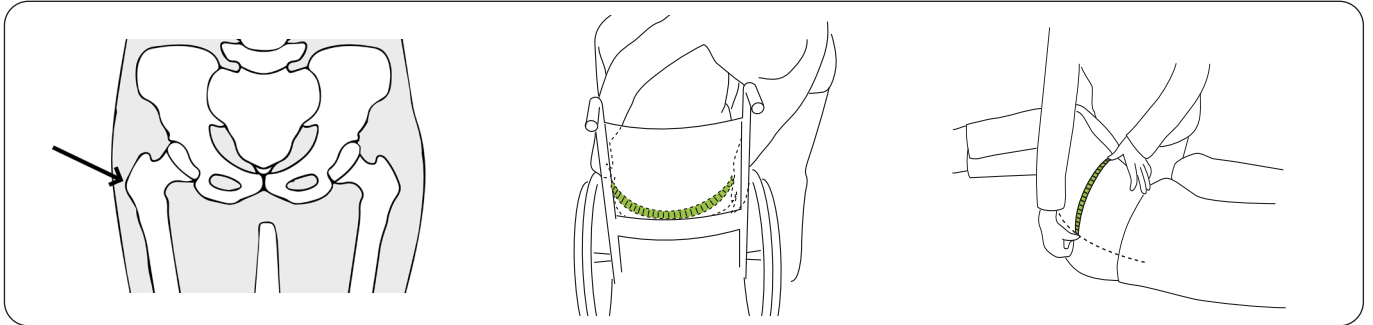


Sarvennoinen: Sarvennoinen on reisiluun hyvin tuntuva uloke avustettavan lantiossa. Sarvennoisen löytää mittausta varten kevyesti painamalla.

Vaihtoehto A. Avustettavan nojatessa eteenpäin mittaa lantion leveys leveimmästä kohdasta eli sarvennoisten välistä.

Vaihtoehto B. Avustettavan ollessa kyljellään mittaa sarvennoisen ja selkärangan keskiviivan välinen etäisyys ja kerro se kahdella.

Mittaa nostokankaan lantiokohdan leveys seuraavasti:

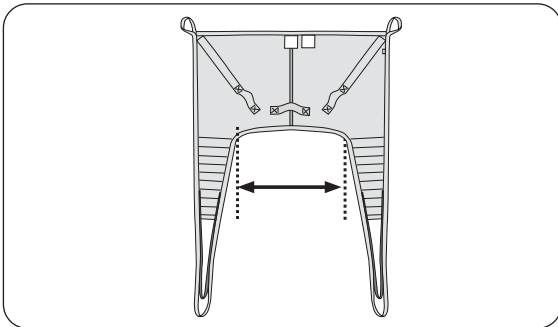


Mittaa nostokankaan jalkatukien välinen etäisyys.

Lantion leveyden mitat

Nostokankaan koko (mallinnumero)	Lantion leveys
S (3575114)	43
M (3575115)	46
L (3575116)	59
XL (3575117)	67
M (3575315)	46

Kaikki mitat ovat senttimetreinä.

Mitat

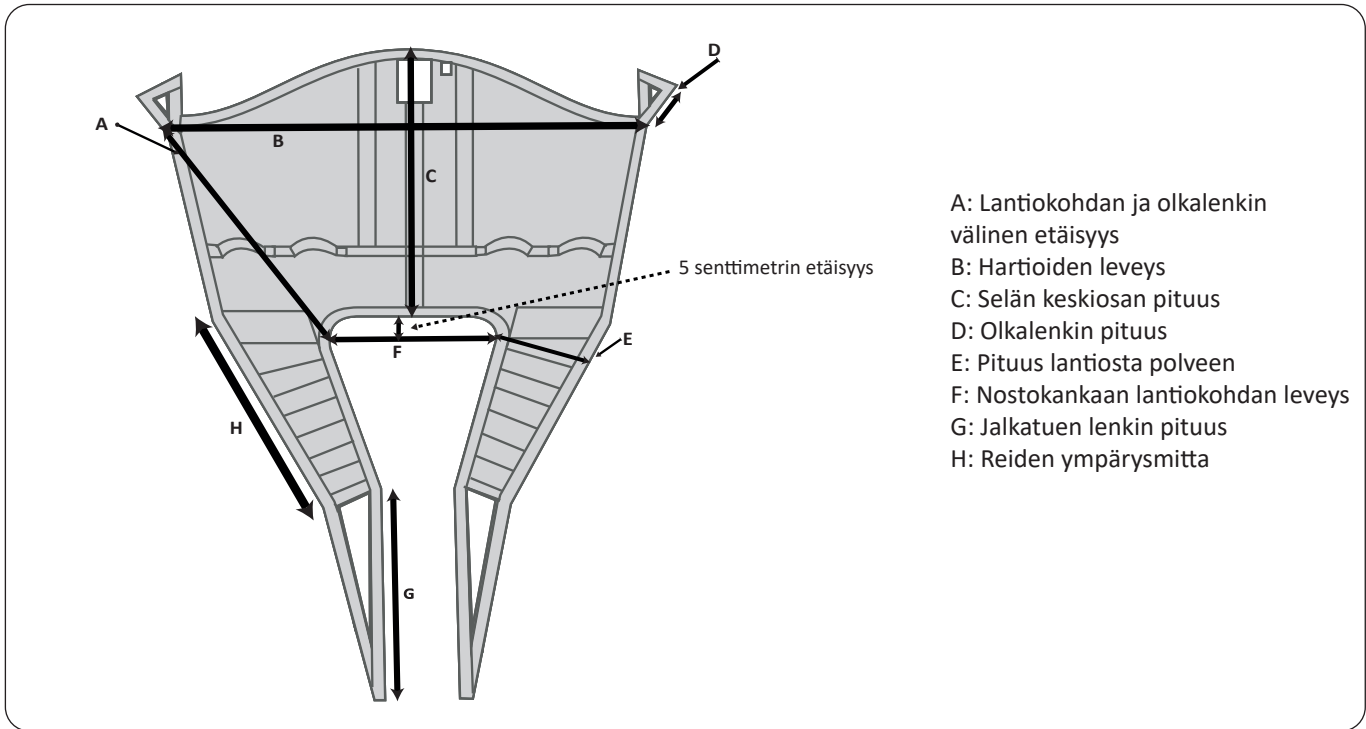


Mitat senttimetreinä

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (kg)	Tuotenro
S	69	95	84	12	20	43	65	69	200	3575114
M	78	109	90	12	20	46	69	66	200	3575115
L	78	109	94	12	20	59	70	73	200	3575116
XL	86	131	100	12	26	67	77	80	300	3575117
M	78	109	90	12	20	46	69	66	200	3575315

Mitat tuumina

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (lb)	Tuotenro
S	27	37	33	5	8	17	26	27	440	3575114
M	31	43	35	5	8	18	27	26	440	3575115
L	31	43	37	5	8	23	28	29	440	3575116
XL	34	52	39	5	10	26	30	32	660	3575117
M	31	43	35	5	8	18	27	26	440	3575315


Nosto istuma-asennosta

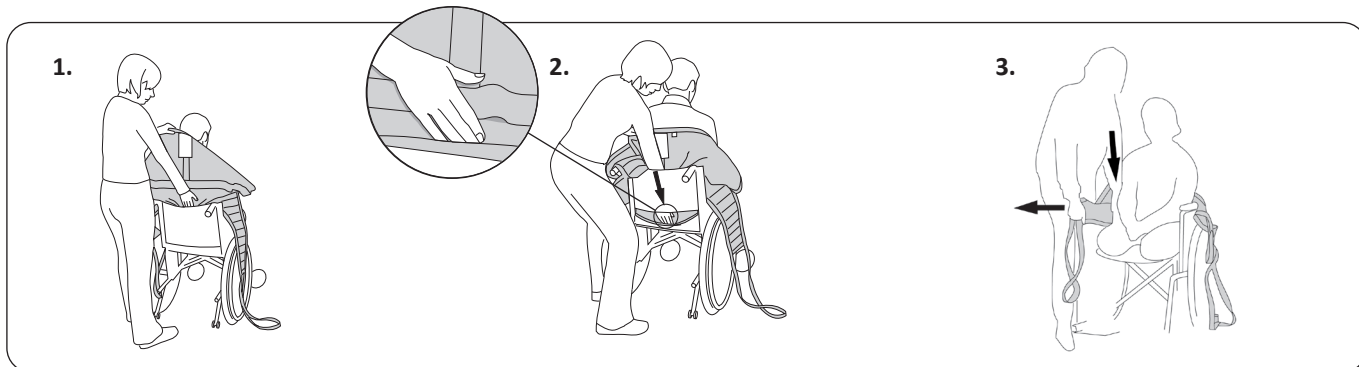

1. Aseta nostokangas avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympäri, jotta se on helpompi ohjata paikalleen.

2. Paina kämmenellä nostokankaan alareuna avustettavan häntäluun tasolle. Tämä on erittäin tärkeää. Vinkki: Nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettavaa kallistetaan hieman eteenpäin.


3. Vedä jalkatuet sivuilta eteen avustettavan reisien viereen. **Hyödyllinen vinkki:** Asettamalla kämmenesi vartalon ja nostokankaan väliin pystyt ohjaamaan jalkatuen hihnan alas istuinta kohti. Vedä samalla jalkatukea toisella kädellä eteenpäin, jotta kangas kiristyy.

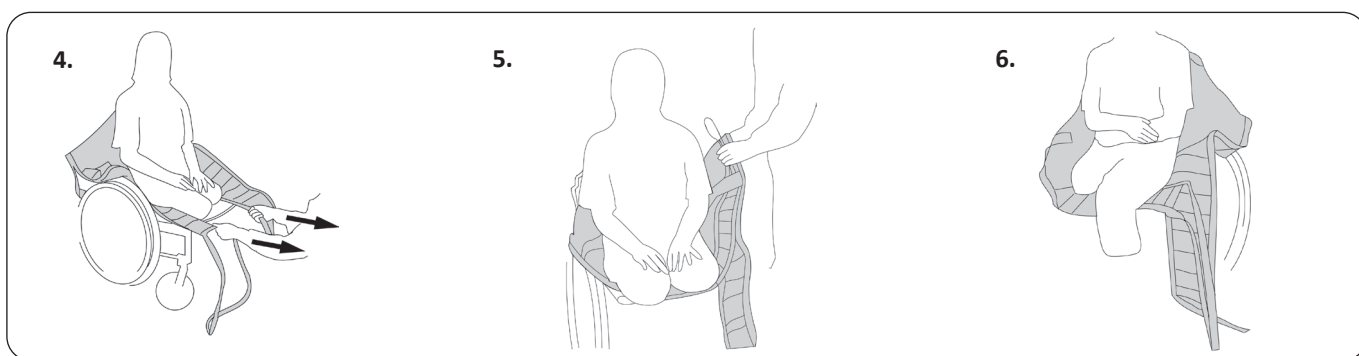

4. Varmista, että nostokankaan alareuna asettuu tiukasti pakaroihin vasten, vetämällä jalkatukien lenkkejä varovasti. **Vinkki:** jalkatuet on helpompi vetää eteen, kun painat kevyesti avustettavan säätäjä.

5. Avustettavan lyhyemmän raajan puolella oleva jalkatuki on asetettava lähimmäksi avustettavaa. Jos esimerkiksi oikea reisi on amputoitu ylemmää kuin vasen, oikeanpuoleinen jalkatuki on asetettava ennen vasemmanpuoleista, jottei distaaliseen päähän kohdistu painetta.

6. Aseta jalkatuki avustettavan reiden tai reisien alle ja ohjaa se mahdollisimman pitkälle pakaroihin kohti. Pujota jalkatuen lenkki nostokankaan sisäpuolella olevan ohjauslenkin läpi.

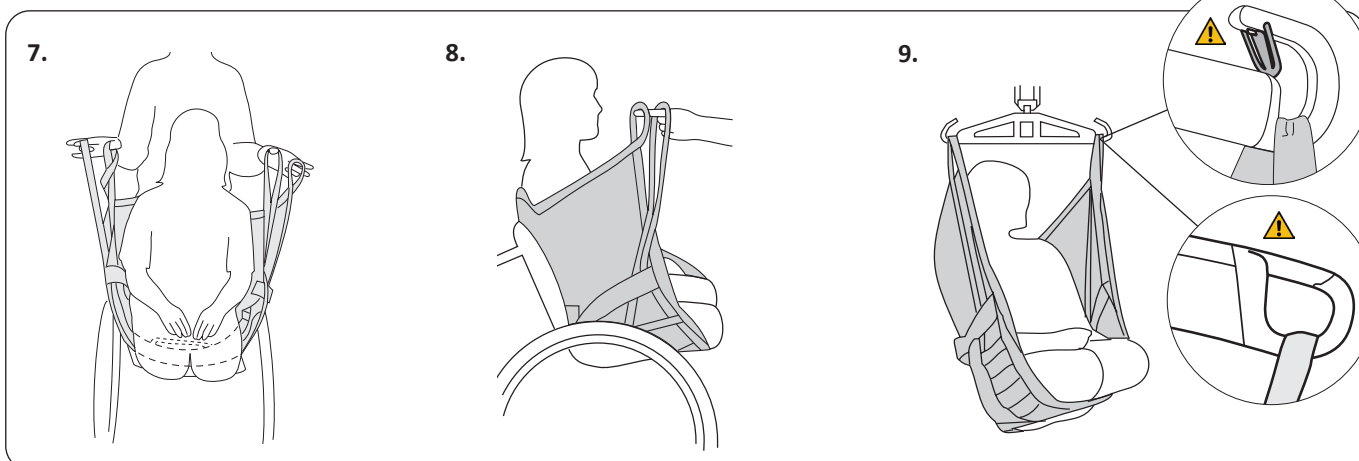


7. Aseta toinen jalkatuki vastaavasti ensimmäisen alle ja pujota jalkatuen lenkki nostokankaan ulkopuolella olevan ohjauslenkin läpi.

8. **Tärkeää:** Varmista, että jalkatuen lenkki ulottuu yhtä korkealle kuin ylempi hihnalenkki. Jos näin ei ole, säädä jalkatuen asentoa.

9. Kiinnitä ylemmät hihnalenkit ja jalkatukien lenkit nostokaareen. Katso kohdista "Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin" sivulla 5 ja "AmputeeSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuihin nostokaareen" sivulla 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava. Varmista, että avustettava istuu mukavasti ja tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.

Nostaminen istuma-asentoon

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, tuoliin tai WC-istuimelle, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse mukavasti ja tukevasti. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.

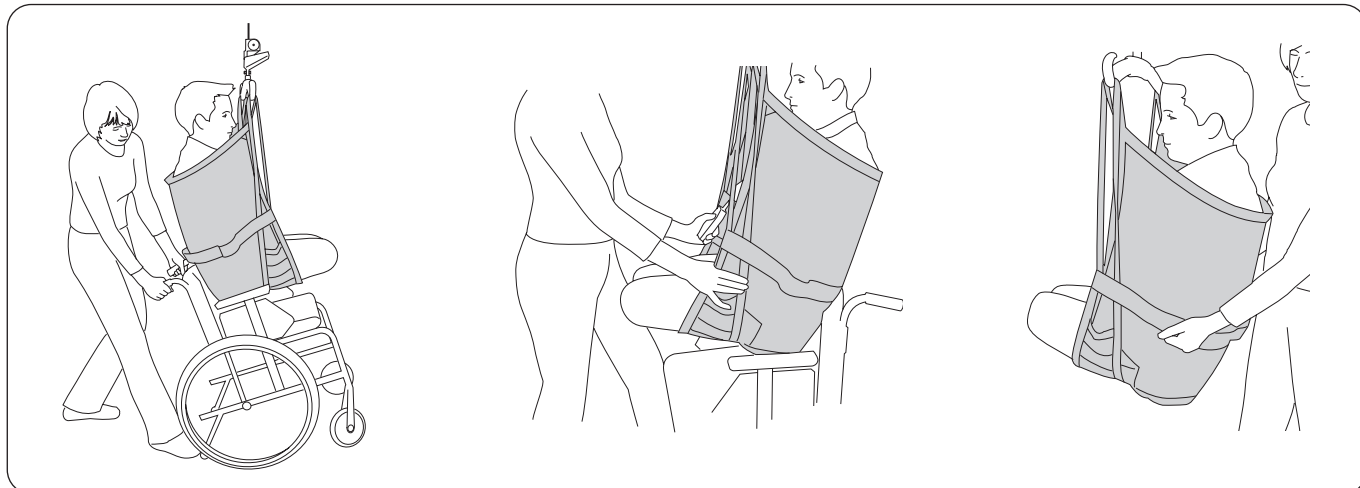

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin:


Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua lopuksi alas selkänojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.

Kun avustettava asetetaan tuoliin tai WC-istuimelle (vaihtoehtoinen menetelmä pyörätuolille): Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa hellävaraisesti reisien alta niin, että pakarat asettuvat tuolin selkänojaa vasten tai oikeaan kohtaan WC-istuimella. Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voi käyttää ohjaimina.

⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista/WC-istuimesta


Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Älä jätä nostokangasta paikalleen, kun avustettava siirretään WC-istuimelle.

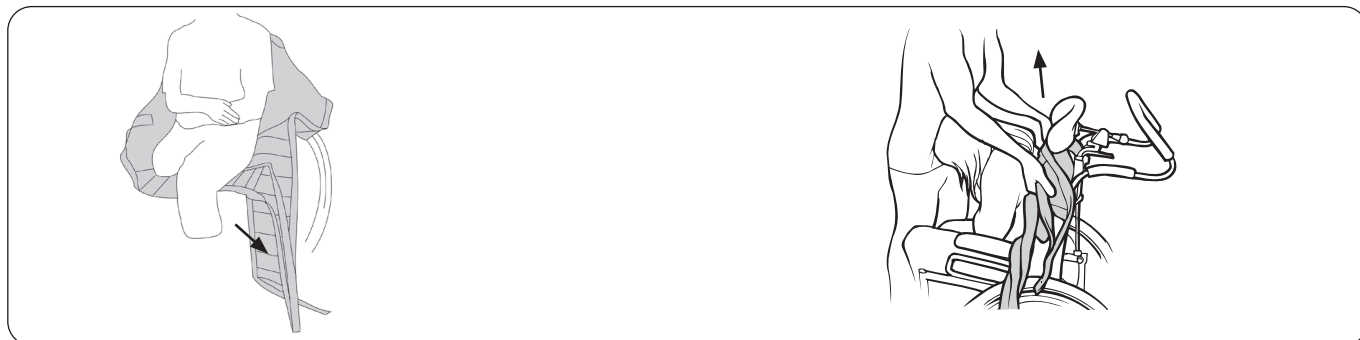

Poista jalkatuki varovasti. Hellävaraisinta on vetää jalkatuen lenkit pois jalkatuen kangasosan alta.

Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.


Nosto vaaka-asennosta

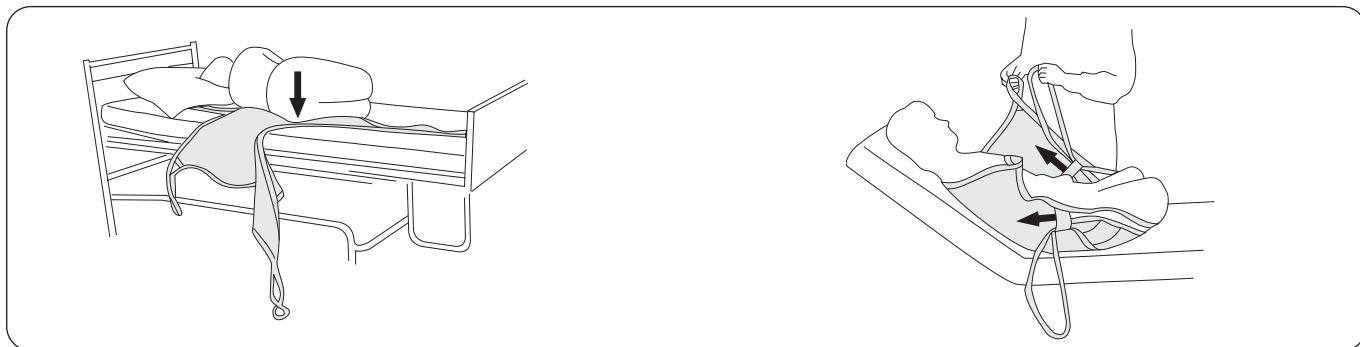

Jos sängyssä on esimerkiksi korkeudensäätö, hyödynnä sitä parhaan toiminnan ja ergonomian saavuttamiseksi. Aloita nostamalla sänky avustajalle/avustajille sopivaan korkeuteen.

Käännä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei pääse putoamaan sängystä. Aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että alareuna on samalla tasolla häntäluun kanssa. Taita nostokangas siten, että sen keskisaumanauha on avustettavan selkärangan kohdalla, kun avustettava käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Aseta toinen jalkatuki kummankin reiden alle ja ohjaa se mahdollisimman pitkälle pakaroihin kohti. Avustettavan lyhyemmän raajan puolella oleva jalkatuki on asetettava lähimmäksi avustettavaa. Jos esimerkiksi oikea reisi on amputoitu ylempää kuin vasen, oikeanpuoleinen jalkatuki on asetettava ennen vasemmanpuoleista, jottei distaaliseen päähän kohdistu painetta. Pujota jalkatuen lenkki nostokankaan sisäpuolella olevan ohjauslenkin läpi. Toista vaiheet toisella jalkatuella ja pujota sen hihnalenkki nostokankaan ulkopuolella olevan ohjauslenkin läpi.

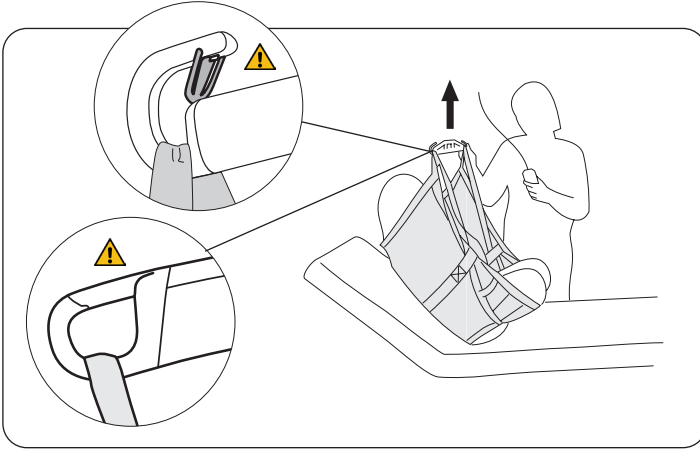


Nosta päätuki. Tarkista, että kaikki tukilenkit ovat samalla korkeudella, kun niitä venytetään ennen nostamista. Kiinnitä hihnalenkit ja jalkatukien lenkit nostokaareen. Katso kohdista "Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin" sivulla 5 ja "AmputeeSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuseen nostokaareen" sivulla 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava. Varmista, että avustettava istuu mukavasti ja turvallisesti, ennen kuin siirto aloitetaan.

Nosto vaaka-asentoon

Nosta sängyn pääpuolta ennen avustettavan asettamista sängylle. Näin avustettavan on miellyttävämpi olla. Siirrä jalkatuet pois ja poista nostokangas vetämällä se varovasti ylös avustettavan selän takaa tai laske selkätuki ja käännä avustettava kyljelleen. Taita nostokangas selän alle, käännä avustettava varovasti toiselle kyljelleen ja vedä nostokangas pois.

Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?

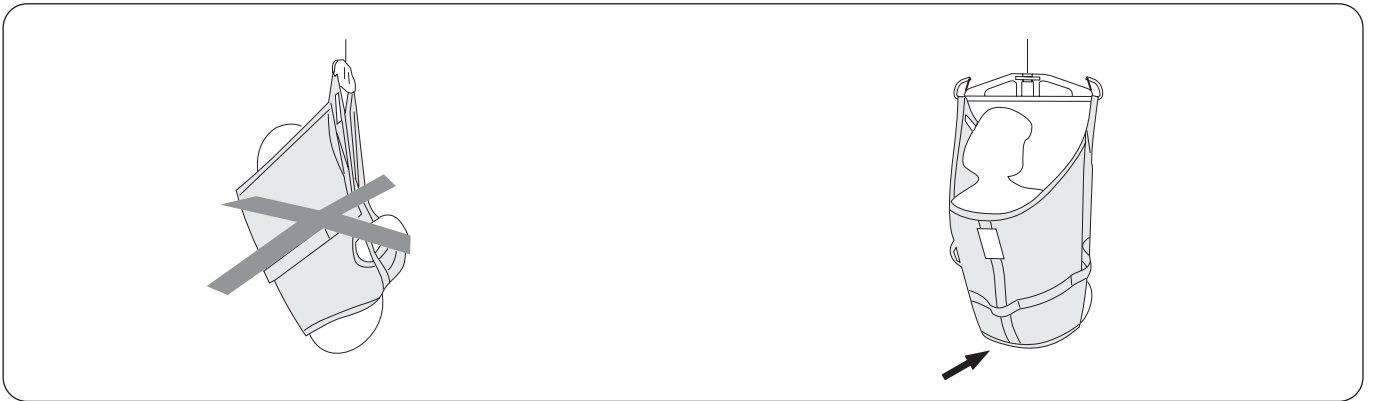

Nostokangasta ei ehkä ole vedetty asetettaessa tarpeeksi alas selkää pitkin. Avustettavan pakarat roikkuvat alhaalla, ja avustettava nojaa liikaa taaksepäin.

Laske avustettavaa ja säädä nostokankaan asentoa. On ehdottoman tärkeää, että **kaikki hihnalenkit ulottuvat yhtä korkealle** (ovat saman pituisia) ennen noston aloittamista. Katso "Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin" sivulla 5 ja "AmputeeSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuseen nostokaareen" sivulla 6.

Nosto ristikkäisten jalkatukien avulla

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeen käyttää AmputeeSling-nostokangasta myös muiden kuin alaraaja-amputoitujen avustettavien nostamiseen asettamalla jalkatuet ristiin. Seuraavassa esitettyä lukuun ottamatta nämä ohjeet eivät sovellu kyseiseen toimenpiteeseen. Noudata sen sijaan ohjeita, jotka koskevat **Liko** Original Highback Sling -nostokankaan mallia 200/210.

Nosto yli 90 asteen avointa lantiikulmaa käyttämällä

Jos avustettavan jalkoja ei ole amputoitu mutta hänet on nostettava avointa lantiikulmaa käyttämällä, on suositeltavaa käyttää M-kokoista AmputeeSling-nostokangasta yhdessä Sling Cross-bar 670 -ristikkonostokaaren kanssa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Universal Slingbar 450- tai 600-nostokaarta yhdessä SideBars-sivukaarien kanssa.




AmputeeSling, M-koko ja Sling Cross-bar 450 tai 670.

AmputeeSling, M-koko ja SideBars 450.

Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm
 Extension Loop, vihreä, 22 cm
 Extension Loop, harmaa, 12 cm
 Extension Loop, harmaa, 22 cm

Tuotenro 3691102
 Tuotenro 3691103
 Tuotenro 3691302
 Tuotenro 3691303

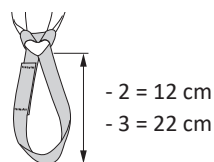

Yleiskuvaus: Liko AmputeeSling -nostokangas, malli 75

Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus ²
Liko AmputeeSling HB, polyesteri	3575114	S Pieni	< 40 kg	200 kg
Liko AmputeeSling HB, polyesteri	3575115	M Keskipikokoinen	40–60 kg	200 kg
Liko AmputeeSling HB, polyesteri	3575116	L Suuri	60–80 kg	200 kg
Liko AmputeeSling HB, polyesteri	3575117	XL Erittäin suuri	> 70 kg	300 kg
Liko AmputeeSling HB, verkkopolyesteri	3575315	M Keskipikokoinen	40–60 kg	200 kg

¹ Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

² Enimmäiskuormituksen toteutumisen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

Liian pieni nostokangas ei välttämättä tue riittävästi ja voi olla hankala asettaa paikoilleen.

Jos nostokangas on liian suuri, avustettava voi pudota siitä.

Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut AmputeeSling-nostokankaan ja LIKON nostokaarien yhdistelmät:	Universal SlingBar 450	Standard 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	Univ. 600 + SideBars	Sling Cross-Bar 450	Sling Cross-Bar	Sling Cross-Bar 670
AmputeeSling, S	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
AmputeeSling, M	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
AmputeeSling, L	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹
AmputeeSling, XL	✓	✓	✓	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹	✓ ¹

¹ Nostokankaan jalkatuet asetetaan ristikkäin vartalon etupuolelle, katso ”Nosto yli 90 asteen avointa lantiokulmaa käyttämällä” sivulla 11.

¹ ⚠ Tarkoitettu avustettaville, joilta ei ole amputoitu jalkoja.

Selitys: ✓ = suositeltava

Vaikka tämä taulukko toimii ohjenuorana, on tärkeää huomioida, että jotkin nostokankaan ja nostokaaren yhdistelmät eivät välttämättä sovellu käytettäväksi tietyissä olosuhteissa. Koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen on aina arvioitava ja hyväksyttävä taulukossa esitetyt yhdistelmät.

Muut yhdistelmät

⚠ Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, Multirall, Uno ja Viking ovat Baxter International Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Sweden
 +46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom