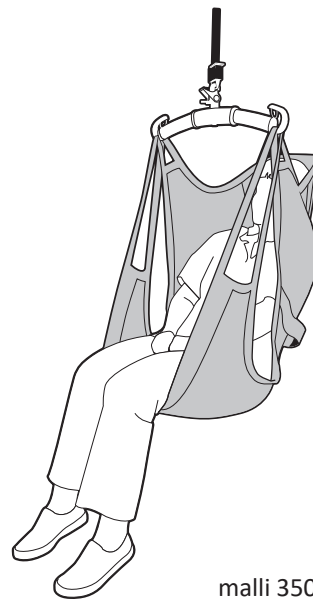


malli 300



malli 350

## Tuotekuvaus

### Käyttötarkoitus:

Liko ComfortSling Plus -nostokangas mahdollistaa miellyttävän istuma-asennon ja avustettavan turvallisen siirron esimerkiksi sängyn ja pyörätuolin välillä. ComfortSling Plus -nostokangas sopii avustettaville, jotka ovat erityisen herkkiä lihas- tai nivelkivuille. ComfortSling Plus -nostokangas sopii usein myös raaja-amputoiduille henkilöille, koska se tukee avustettavaa koko istuma-alalta.

Se on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä: terveydenhuoltoympäristöt, tehohoito, ensiapu, kuntoutus, sopeuttaminen ja kotisairaanhoido.

Se mukautuu avustettavalle ilman erillisiä säätöjä.

Oikein sovitettuna ja käytettynä ComfortSling Plus -nostokangas antaa avustettavalle suuren turvallisuuden ja mukavuuden tunteen sekä tukee avustettavan selkää ja päätä (malli 350).

ComfortSling Plus -nostokangas on miellyttävä käyttää, koska avustettava on selinmakuulla asettamisen aikana ja nostokangas jää tuoliin siirtämisen jälkeen. Kun avustettava on valmis siirrettäväksi takaisin sänkyyn, nostokangas on valmiina paikallaan. Hihnalenkkit voidaan tämän jälkeen kiinnittää helposti nostokaareen ja avustettava voidaan nostaa.

ComfortSling Plus -nostokangas sopii avustettaville, jotka ovat erityisen herkkiä lihas- tai nivelkivuille.

ComfortSling Plus -nostokangas sopii usein myös raaja-amputoiduille henkilöille, koska se tukee avustettavaa koko istuma-alalta. ComfortSling Plus High -nostokankaassa (malli 350) on sisäänrakennettu päätuki, ja se mahdollistaa miellyttävän nojaavan istuma-asennon. Se sopii erityisen hyvin avustettaville, joilla on heikko keskivartalon ja pään stabiilitihti.

### Materiaali

ComfortSling Plus -nostokangas on valmistettu verkkopolyesteristä.

### Sopivat nostimet

ComfortSling-nostokangasta voidaan käyttää kaikkien Likon katonnostimien ja liikuteltavien nostimien kanssa. Valittavana ovat LikoGuard-kattonostin, Likorall-kattonostin ja Multirall-kattonostin tai liikuteltava Golvo-nostin, liikuteltava Viking-nostin, ja liikuteltava Liko M220/M230 -nostin.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä avustajaksi.

### TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue sekä nostimen että nostovarusteiden käyttöohjeet ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeiden sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu avustaja. Koulutuksen saadakseen avustajan pitää lukea ja ymmärtää käyttöohjeet. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan henkilön turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoritua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

# Turvallisuustietoja

## **Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:**

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Turvallisuus- ja hygieniasyistä nostokankaat on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.
- Tarkista, että nostotarvikkeet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka **Likon** nostokaarissa on salvat, on erityistä varovaisuutta kuitenkin noudatettava. Varmista, että hihnat on kiinnitetty oikein nostokaareen, kun hihnat ovat kiristyneet. Tee tämä ennen avustettavan nostamista alustalta.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina noston/siirron aikana.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Älä jätä nostokangasta suoraan auringonvaloon, kun sitä ei käytetä.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**


 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**


 **Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa!**

 **Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa nostokankaan läheisyyteen!**

 **Älä säilytä nostokangasta paikassa, jossa se voisi altistua suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, kuten lämpöpatterit, takat tai hella/uuni!**

 **Älä käytä, säilytä tai siirrä nostokangasta lemmikkieläinten, tuhoeläinten tai ilman valvontaa olevien lasten läheisyydessä!**

 **Kuluneen nostokankaan käytöstä voi aiheutua puristumisvaara tai vähäisten vammojen vaara, jos avustettava asetetaan nostokankaaseen epätasapainoisesti tai jos nostokangasta ei poisteta varovasti.**

 **Varmista, että avustettava ja avustaja pysyvät etäällä puristumiskohdista ja liikkuvista osista noston aikana. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.**

 **Arvioi avustettavan puristumisriski ja valvo avustettavaa asiaankuuluvasti. Varmista, että avustettavan pää ja raajat eivät ole nostokankaan lenkeissä tai niiden välissä noston aikana. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.**

 Lääkinnällinen luokan I laite

**PATENTTI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.**

Hillrom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisien sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

### **Tuotemuutokset**

**Liko**-tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hillromin edustajalta.

### **Design and Quality by Liko in Sweden**

**Liko** on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkitätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti.



























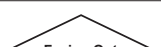


**Liko** on myös ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

### **Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa**

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

## Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota. Symboli on keltainen kolmio, jossa on musta reunus ja musta huutomerkki keskellä.		
	Kierrätettävä		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä. Symboli on sininen ympyrä, jonka sisällä on valkoinen piirros henkilöstä lukemassa kirjaa.		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä		<b>Huomio!</b> Lue käyttöohje.
	CE-merkintä: merkintä Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin vaatimustenmukaisuudesta, luokan I lääkinnällinen laite		
	Valtuutettu edustaja Sveitsissä		
	Laillinen valmistaja		Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste		Lääkinnällinen laite
	Sarjanumero		Yksilöllinen laitetunniste
	Kemiallinen pesu kielletty		Ripusta kuivumaan varjoon
	Silitys kielletty		Valkaisu kielletty
	Rumpukuivaus		Pesu kielletty
	Rumpukuivaus kielletty		
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).		
	Lateksiton		
	Määräaikaistarkastus		
	Älä käytä tuotetta. (Vain Solo-tuotteissa. Tulee näkyviin pesun jälkeen, kun käyttö on kiellettyä.)		Avustettavan nimi
	Yhden avustettavan käyttöön (vain Solo-tuotteet)		
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli		Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
 (01) 0100887761997127 (11) VVKKPP (21) 012345678910	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) valmistuspäivä (21) sarjanumero		

## Hoito ja kunnossapito

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- kangas
- hihnat
- saumat
- lenkit.

**⚠ Älä käytä vahingoittuneita nostovaruksia.**

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

### Pesu- ja desinfiointiohjeet:

Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

### Materiaali:

ComfortSling-nostokangas on valmistettu verkkopolyesteristä.

### Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätä useammin. Lisätietoa käytännöistä saat Hillromin edustajalta. Hillrom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöajan ajan.

### Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 3 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat materiaali, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino. Hillrom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöajan ajan.

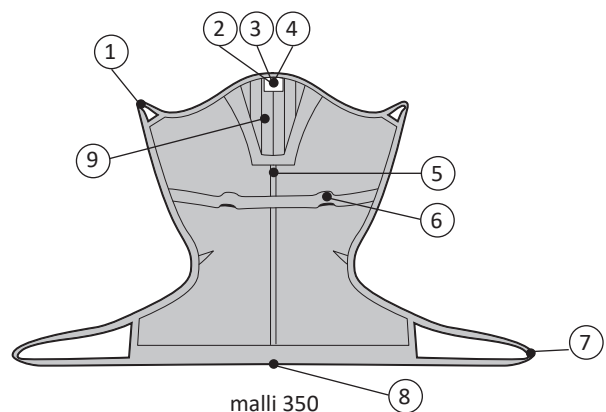
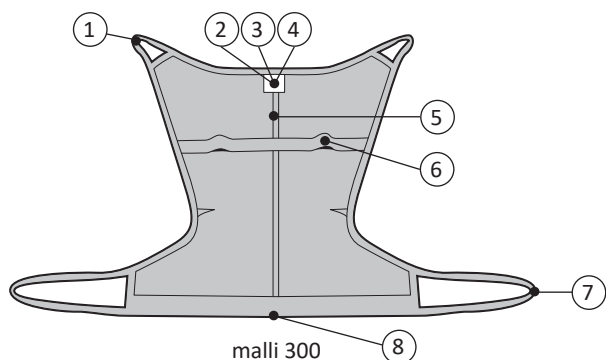
### ♻ Kierrätysohjeet


Koko nostokangas, mukaan lukien säleät, pehmusteet jne., on lajiteltava polttokelpoiseen jätteeseen.

Hillrom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinnällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinnällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja/tai paikallisia lakeja ja asetuksia.

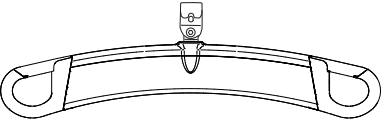
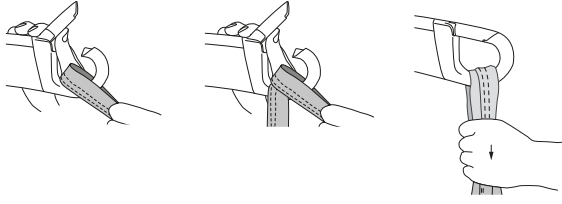
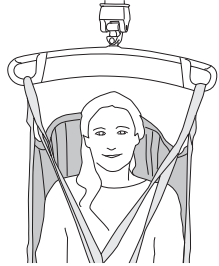
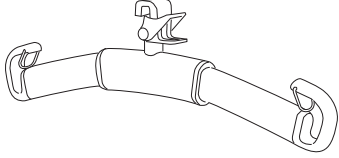
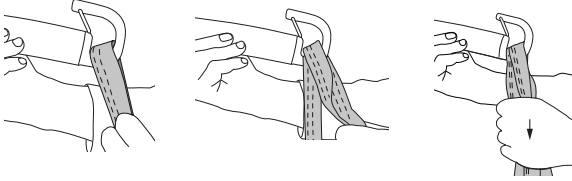

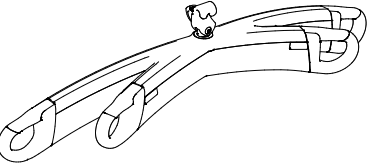
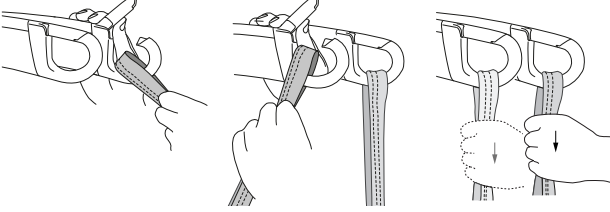
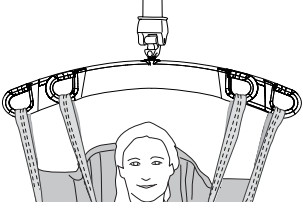
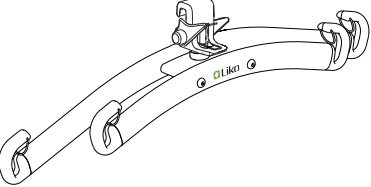
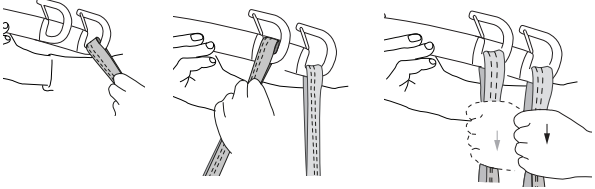
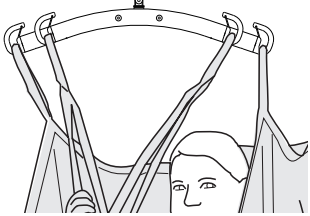
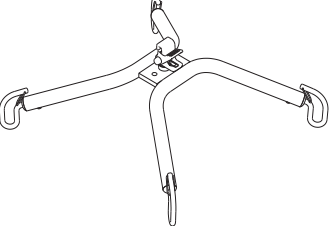
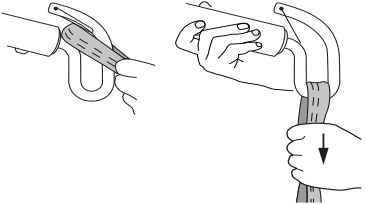
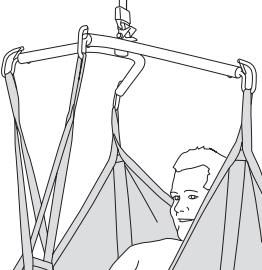
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

## Määritelmät

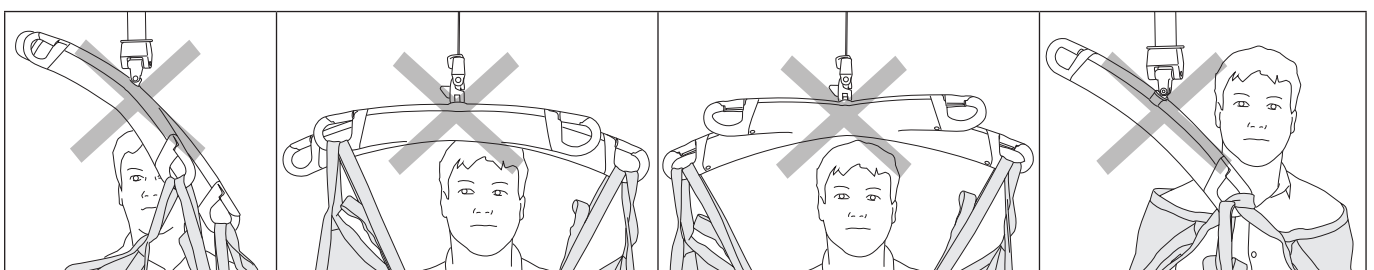


1. Ylempi hihnalenkki
2. Tuotelappuun sisältyy:  
Valmistusvuosi ja -kuukausi (  )  
Sarjanumero ( **SN** )
3. Lappu: Määräaikaistarkastus
4. Lappu: Yksilöllinen merkintä (Belongs to)
5. Keskisaumanauha ja kokomerkinä  
(S = oranssi, M = keltainen, L = sininen, XL = musta)
6. Kädensija
7. Alempi hihnalenkki
8. Alareuna
9. Pehmeä päätuki (malli 350)






## Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="277 501 424 533">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="288 792 414 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="244 1077 456 1108">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="252 1375 445 1406">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="288 1675 414 1706">Cross-Bar</p>		








### Väärin!



# ComfortSling Plus -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret ja Cross-Bar-ristikkonostokaaret)

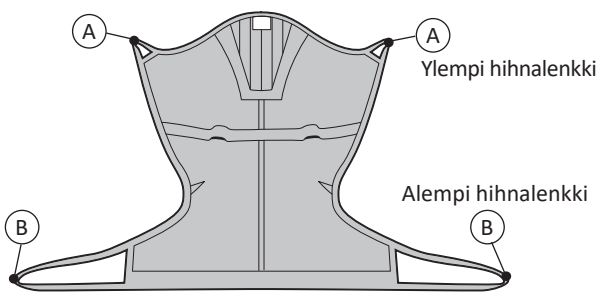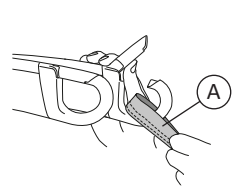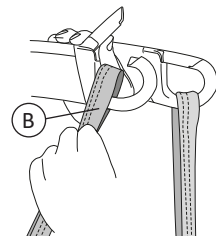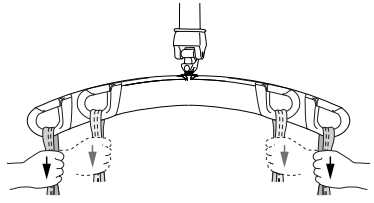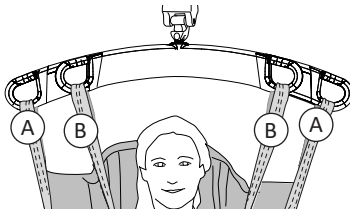 <p>A A Ylempi hihnalenkki</p> <p>B B Alempi hihnalenkki</p>	<p>1.</p>  
<p>2.</p> 	<p>3.</p>  <p>Kuvissa 1, 2 ja 3 näkyy kaksoisnostokaari, mutta sama ohje koskee myös Cross-Bar-ristikkonostokaarta ja SideBars-sivukaarilla varustettua nostokaarta.</p>

## Erilaiset nostokaaret

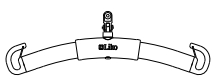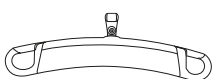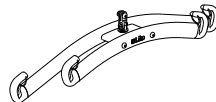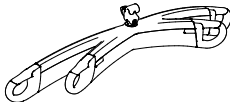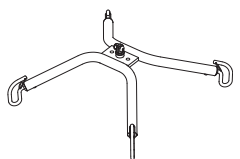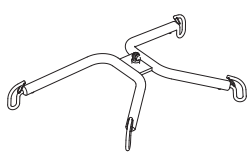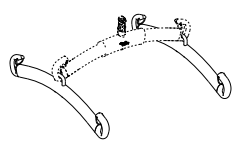			
<p><b>Universal SlingBar 450*</b> Tuotenro 3156075</p>	<p><b>SlingGuard 450*</b> Tuotenro 3308020</p>	<p><b>Universal TwinBar 670*</b> Tuotenro 3156077</p>	<p><b>SlingGuard 670 Twin*</b> Tuotenro 3308040</p>
 <p><b>Sling Cross-bar 450*</b> Tuotenro 3156021</p>	 <p><b>Sling Cross-bar 670*</b> Tuotenro 3156018</p>	 <p><b>Universal SideBars 450</b> Tuotenro 3156079</p>	<p>* Nostokaaria on eri malleja, katso lisätietoja tuoteluettelosta.</p>

## Nostokankaan koon valitseminen

**⚠ Käytä vain nostokangasta, joka on avustettavalle sopivan kokoinen. Koulutetun avustajan on arvioitava oikea koko. Muuten vaarana voi olla avustettavan puristuminen tai tukehtuminen.**

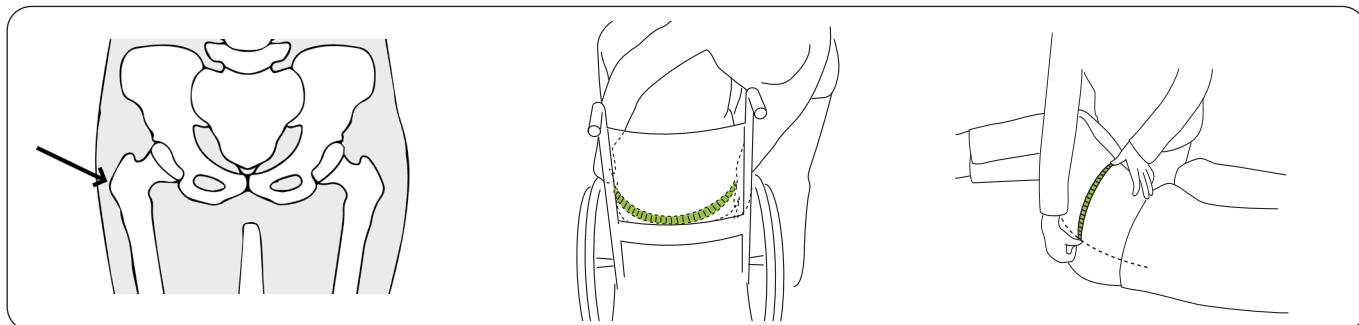
Avustettavan lantion ja nostokankaan lantiokohdan leveyden mittaaminen auttaa nostokankaan koon valinnassa.

Vertaa avustettavasta otettua mittausta (katso mittausohje) ja nostokankaan mittausta (katso mittausohje).

### Oikean koon valitseminen:

Valitse nostokangas, jonka lantiokohdan leveysmitta on +/- 8 cm avustettavan lantion leveydestä.

### Mittaa avustettavan lantion leveys seuraavasti:




**Sarvennoinen:** Sarvennoinen on reisiluun hyvin tuntuva uloke avustettavan lantiossa. Sarvennoisen löytää mittausta varten kevyesti painamalla.

**Vaihtoehto A.** Avustettavan nojatessa eteenpäin mittaa lantion leveys leveimmästä kohdasta eli sarvennoisten välistä.

**Vaihtoehto B.** Avustettavan ollessa kyljellään mittaa sarvennoisen ja selkärangan keskiviivan välinen etäisyys ja kerro se kahdella.

### Katso nostokankaan lantiokohdan leveys kohdasta "Mitat" sivulla 8:

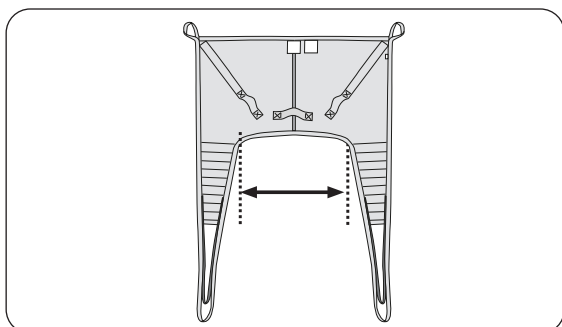

Mittaa nostokankaan jalkatukien välinen etäisyys.

### Lantiokohdan leveysmitta, ComfortSling Plus -nostokankaan malli 300

Nostokankaan koko	Lantion leveys
S	46
M	56
L	77
XL	81

Kaikki mitat ovat senttimetreinä.

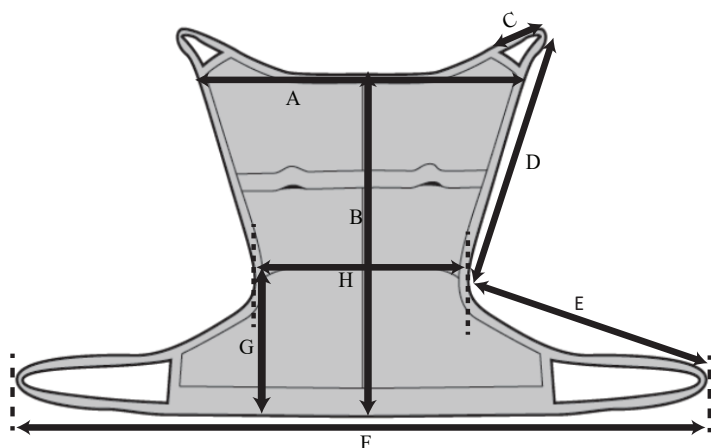
### Lantiokohdan leveysmitta, ComfortSling Plus -nostokankaan malli 350

Nostokankaan koko	Lantion leveys
S	45
M	54
L	66
XL	67

Kaikki mitat ovat senttimetreinä.

## Mitat

ComfortSling Plus, malli 300



- A: Hartioiden leveys
- B: Selkätuki keskeltä
- C: Olkalenkin pituus
- D: Selkätuen sivu
- E: Eteen tulevan tuen sivu
- F: Jalka- ja reisituki
- G: Pituus lantiosta polveen
- H: Nostokankaan lantiokohdan leveys


Mitat senttimetreinä

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (kg)	Tuotenro
S	87	85	15	79	75	171	34	47	200	35300304
M	100	100	15	81	78	179	37	56	200	35300305
L	107	121	15	83	66	182	38	78	200	35300306
XL	106	128	15	89	77	205	38	80	300	35300307

Mitat tuumina

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (lb)	Tuotenro
S	34	34	6	31	30	67	13	19	440	35300304
M	39	40	6	32	31	71	15	22	440	35300305
L	42	48	6	33	26	72	15	31	440	35300306
XL	42	51	6	35	30	81	15	32	660	35300307

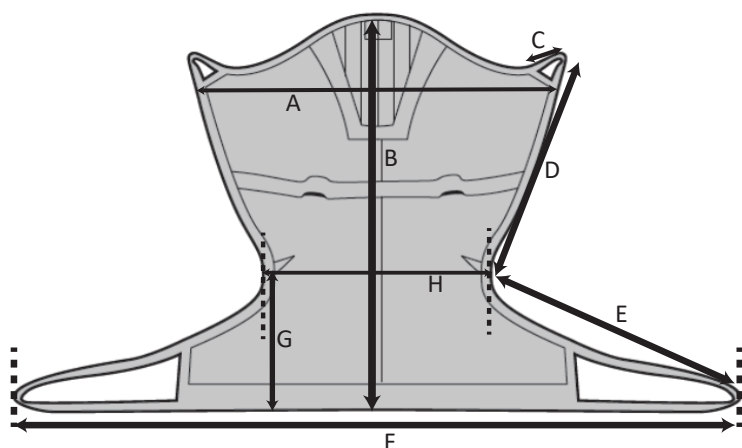ComfortSling Plus, malli 350



- A: Hartioiden leveys
- B: Selkätuki keskeltä ja niskatuki
- C: Olkalenkin pituus
- D: Selkätuen sivu
- E: Eteen tulevan tuen sivu
- F: Jalka- ja reisituki
- G: Pituus lantiosta polveen
- H: Nostokankaan lantiokohdan leveys

Mitat senttimetreinä


KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (kg)	Tuotenro
S	92	120	11	65	70	155	34	47	200	35350304
M	113	136	11	77	81	184	38	56	200	35350305
L	121	145	11	83	81	193	41	67	200	35350306
XL	127	153	11	91	90	212	40	67	300	35350307

Mitat tuumina

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	Enimmäiskuormitus (lb)	Tuotenro
S	36	47	4	26	28	61	13	19	440	35350304
M	45	54	4	30	32	72	15	22	440	35350305
L	48	57	4	33	32	76	16	27	440	35350306
XL	50	61	4	36	35	84	16	27	660	35350307


## Nostaminen selinmakuuasennosta

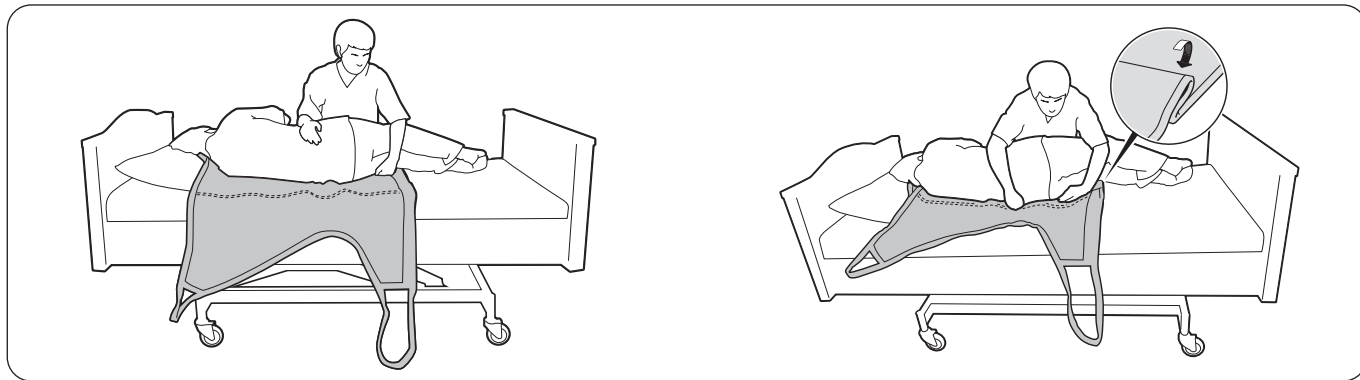Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.



Käännä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei pääse putoamaan sängystä. Aseta nostokankaan reuna niin pitkälle avustettavan alle kuin mahdollista siten, että alareuna on juuri avustettavan polvitaiteiden alapuolella.

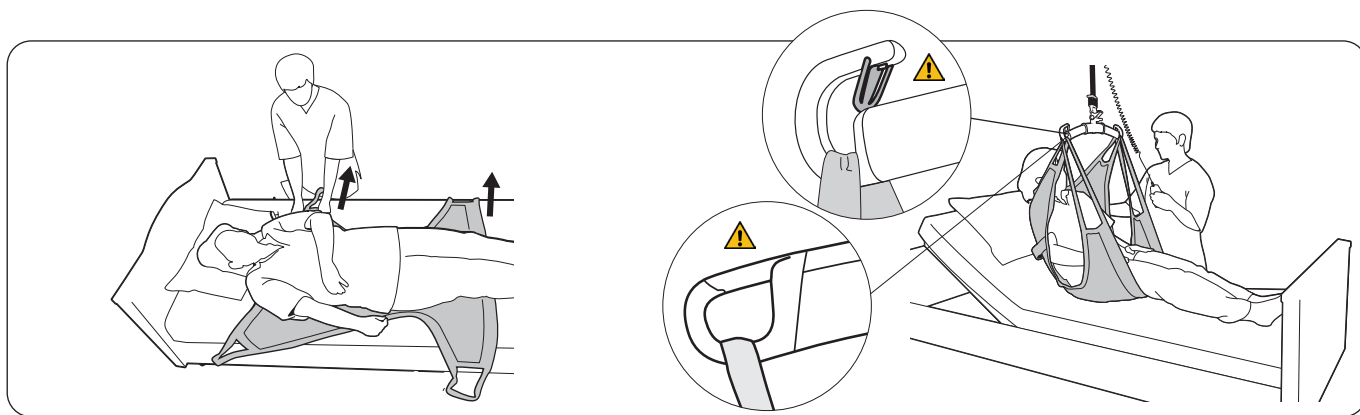Taita nostokangasta siten, että sen keskisaumanauha on avustettavan selkärangan suuntainen, kun avustettava käännetään varovasti takaisin selälleen.



Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta. Varmista, että avustettava on nostokankaan keskellä. Säädä asentoa tarvittaessa. Nostokankaan alareunan tulisi olla juuri avustettavan polvitaiteiden alapuolella.


Nosta selkätuki. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten alemmat hihnalenkit. Katso kohdista sivu 5 ja sivu 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava. Kun avustettava on nostettu, nostokankaan alareuna on noin 0–10 cm polvitaiteiden yläpuolella.

**Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä:** Jos avustettavaa ei voi kääntää kyljelleen, on mahdollista käyttää liukulakanoita nostokankaan asettamiseen avustettavan ollessa selinmakuuasennossa. Aseta kaksi liukulakanaa avustettavan alle ja aseta nostokangas paikalleen vetämällä se liukulakanoiden välistä. Pyydä lisätietoja ottamalla yhteyttä paikalliseen Hillromin edustajaan.

## Siirtäminen takaisin selinmakuulle

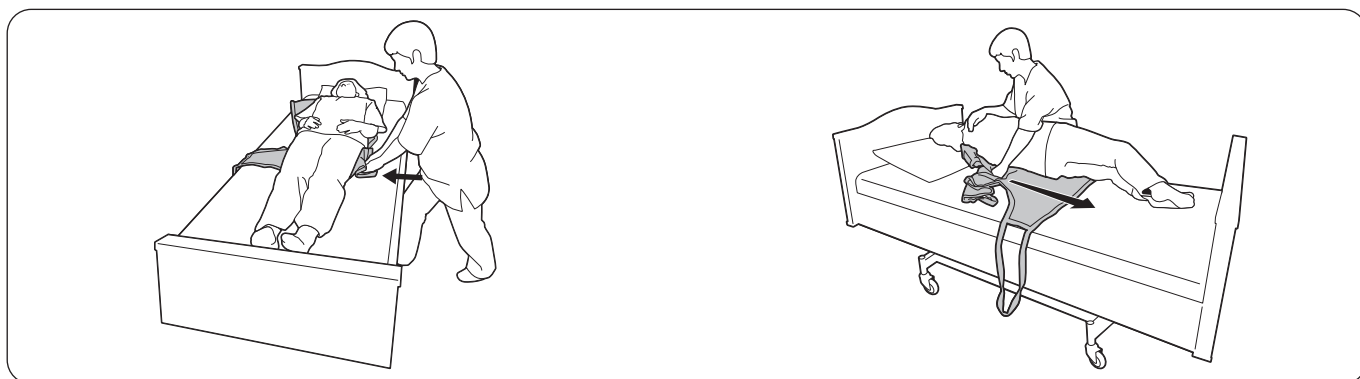Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja. Laske avustettava sängylle ja irrota nostokankaan hihnalenkit nostokaaresta.

## Nostokankaan poistaminen



Taita nostokangasta itsensä alle ja paina se mahdollisimman pitkälle avustettavan alle.


Käännä avustettava varovasti itseesi päin. **Vinkki:** Käytä nostokangasta apuna kääntämiseen. Vedä nostokangas varovasti pois.

## Nostaminen lattialta

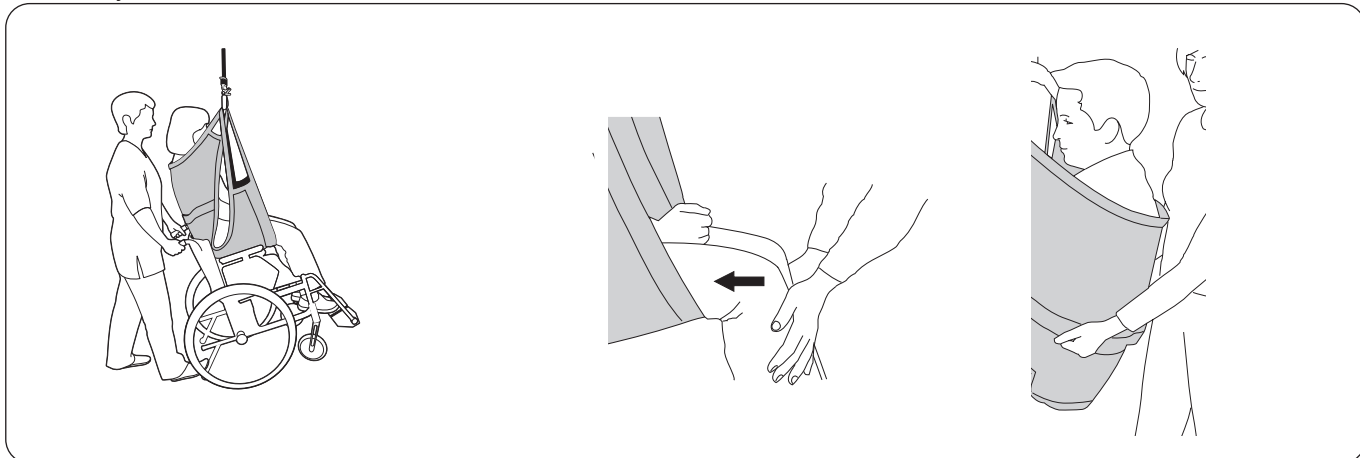Lattialta nostamiseen on suositeltavaa käyttää **Liko ComfortSling Plus High** -nostokankaan mallia 350, joka tukee päätä.

## Nostaminen istuma-asentoon

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, tuoliin tai WC-istuimelle, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse mukavasti ja tukevasti. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.



*Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin:* Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua loppuun alas selkänojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.

*Kun avustettava asetetaan tuoliin tai WC-istuimelle (vaihtoehtoinen menetelmä pyörätuolille):* Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa hellävaraisesti sääristä niin, että pakarot asettuvat tuolin selkänojaa vasten tai oikeaan kohtaan WC-istuimella. Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voi käyttää ohjaimina.

**⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.**

## Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista/WC-istuimesta

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Älä jätä nostokangasta paikalleen, kun avustettava siirretään WC-istuimelle.



Kun avustettava on nostettu tuoliin tai pyörätuoliin, irrota hihnalenkit nostokaaresta ja taita nostokangas pois.

Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

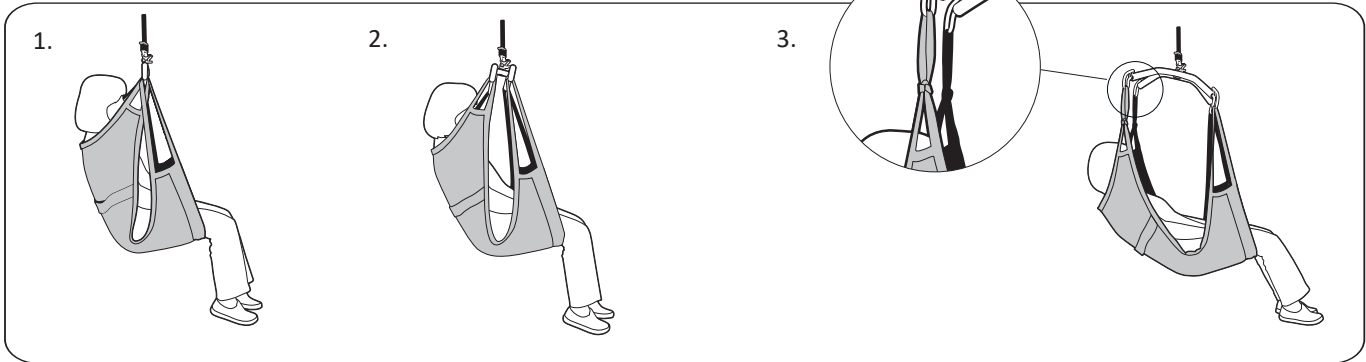
## Nostaminen pyörätuolista

**⚠ Varmista, että nostokangas on asetettu oikein, ennen kuin avustettava siirretään pyörätuolista.**

Joskus avustettava on voinut siirtyä eteenpäin pyörätuolissa ja nostokankaassa. Nostokankaan on peitettävä vähintään puolet reisistä alapuolelta, jotta nosto on turvallinen. Jos näin ei ole, avustettava on asetettava käsin asianmukaiseen asentoon.

## Erilaisia istuma-asentoja nostokaaren valinnan mukaan

### Liko ComfortSling Plus -nostokangas, malli 300



1. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 300, mahdollistaa yhdessä **Liko Universal SlingBar 450** -nostokaaren kanssa suoran istuma-asennon.


2. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 300, mahdollistaa yhdessä kaksoisnostokaaren 670 kanssa hieman nojaavan istuma-asennon sekä antaa lisätilaa hartioille.

3. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 300, mahdollistaa yhdessä **Liko Sling Cross-bar 450**- tai **670**-ristikkonostokaaren kanssa nojaavan istuma-asennon, jossa lonkkanivel taipuu vähemmän. **Cross-Bar 670** -ristikkonostokaari antaa myös lisätilaa hartioille.

**Liko Universal SlingBar 450** -nostokaari yhdessä **SideBars**-sivukaarien kanssa mahdollistaa samanlaisen nojaavan istuma-asennon.

⚠ Kohdassa 3 luetelluissa yhdistelmissä on **aina** kiinnitettävä 12 cm:n **Extension Loop** -jatkolenkit ylempiin hihnalenkkeihin. Varmista noston aikana, että nostokankaan alareuna on samassa tasossa polvitaiteiden kanssa. Tämä pätee myös käytettäessä vanhempaa **Liko Sling Cross-bar** -mallia.

### Liko ComfortSling Plus High -nostokangas, malli 350

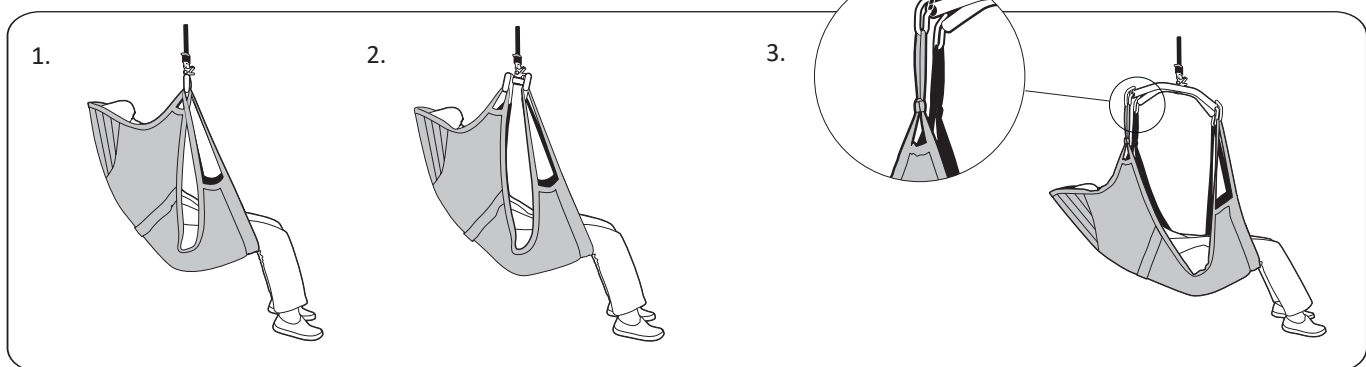

1. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 350, mahdollistaa yhdessä **Liko Universal SlingBar 450** -nostokaaren kanssa miellyttävän nojaavan istuma-asennon.

2. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 350, mahdollistaa yhdessä kaksoisnostokaaren 670 kanssa nojaavan istuma-asennon, jossa lonkka taipuu vähemmän ja hartioille jää enemmän tilaa.

3. **Liko ComfortSling Plus** -nostokangas, malli 350, mahdollistaa yhdessä **Liko Sling Cross-bar 450**- tai **670**-ristikkonostokaaren kanssa nojaavan istuma-asennon. **Cross-Bar 670** -ristikkonostokaari antaa myös lisätilaa hartioille.


**Liko Universal SlingBar 450** -nostokaari yhdessä **SideBars**-sivukaarien kanssa mahdollistaa samanlaisen nojaavan istuma-asennon.

⚠ Kohdassa 3 luetelluissa yhdistelmissä on **aina** kiinnitettävä 12 cm:n **Extension Loop** -jatkolenkit ylempiin hihnalenkkeihin. Varmista noston aikana, että nostokankaan alareuna on samassa tasossa polvitaiteiden kanssa. Tämä pätee myös käytettäessä vanhempaa **Liko Sling Cross-bar** -mallia.

## Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm  
Extension Loop, vihreä, 22 cm  
Extension Loop, harmaa, 12 cm  
Extension Loop, harmaa, 22 cm

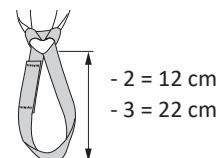Tuotenro 3691102  
Tuotenro 3691103  
Tuotenro 3691302  
Tuotenro 3691303



## Yleiskuvaus: LIKO ComfortSling Plus, mallit 300, 350

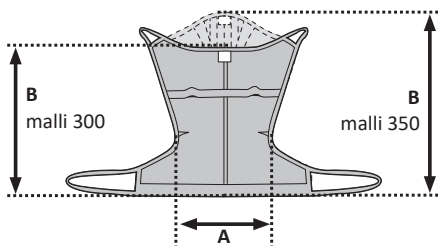
Tuote	Tuotenro	Koko		Enimmäiskuormitus <sup>1</sup>
Liko ComfortSling Plus -nostokangas, malli 300	35300304	S	Pieni	200 kg
Liko ComfortSling Plus -nostokangas, malli 300	35300305	M	Keskikokoinen	200 kg
Liko ComfortSling Plus -nostokangas, malli 300	35300306	L	Suuri	200 kg
Liko ComfortSling Plus -nostokangas, malli 300	35300307	XL	Erittäin suuri	300 kg
Liko ComfortSling Plus High -nostokangas, malli 350	35350304	S	Pieni	200 kg
Liko ComfortSling Plus High -nostokangas, malli 350	35350305	M	Keskikokoinen	200 kg
Liko ComfortSling Plus High -nostokangas, malli 350	35350306	L	Suuri	200 kg
Liko ComfortSling Plus High -nostokangas, malli 350	35350307	XL	Erittäin suuri	300 kg

<sup>1</sup>Enimmäiskuormituksen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

Malli	Koko	Avustettavan paino <sup>2</sup>	Leveys (A)	Pituus (B)
300	S Pieni	25–50 kg	47 cm	85 cm
300	M Keskikokoinen	40–80 kg	56 cm	100 cm
300	L Suuri	70–110 kg	78 cm	121 cm
300	XL Ekstrasuuri	> 100 kg	80 cm	128 cm
350	S Pieni	25–50 kg	47 cm	85 cm
350	M Keskikokoinen	40–80 kg	56 cm	100 cm
350	L Suuri	70–110 kg	78 cm	121 cm
350	XL Ekstrasuuri	> 100 kg	80 cm	128 cm

<sup>2</sup>Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

Jos avustettavalla on heikko lihastonus ja hän vajoaa liian alas ComfortSling-nostokankaassa, harkitse pienemmän koon käyttöä.



## Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut ComfortSling Plus -nostokankaan ja LIKON nostokaarien yhdistelmät:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Universal SlingBar 450	SlingBar Standard 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	SlingGuard 670 Twin	Universal TwinBar 670	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
ComfortSling Plus, S	✓	✓	✓	✓	✓				✓ <sup>1</sup>		✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>
ComfortSling Plus, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>

<sup>1</sup> ⚠ Käytä ylemissä hihnalenkeissä aina 12 cm:n Extension Loop -jatkolenkkejä. Istuttaessa nostokankaan alareunan tulisi olla lähellä polvitaiteita.

**Selitys:** ✓ = suositeltava

Vaikka tämä taulukko toimii ohjenuorana, on tärkeää huomioida, että jotkin nostokankaan ja nostokaaren yhdistelmät eivät välttämättä sovellu käytettäviksi tietyissä olosuhteissa. Koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen on aina arvioitava ja hyväksyttävä taulukossa esitetyt yhdistelmät.

Lisätietoja yhdistelmistä muiden **Liko** nostokaarien kanssa saa Hillromilta.

### Muut yhdistelmät

⚠ Muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden yhdistelmäkäyttö voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, Multirall, Uno ja Viking ovat Baxter International Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä julkaisussa mainitut tavaramerkit, tuotenimet ja tuotekuvat ovat omistajiensa omaisuutta.



[www.hillrom.com](http://www.hillrom.com)