


## Käyttöohje

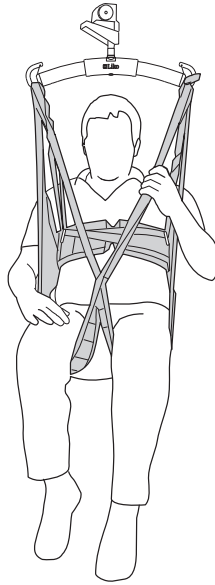

Malli 45

## Tuotokuvaus

### Käyttötarkoitus:

**Liko HygieneSling** (malli 45) on suunniteltu helpottamaan vaatteiden pukemista ja riisumista, kun avustettava nostetaan WC-istuimelle ja -istuimelta. Se on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä: terveydenhuoltoympäristöt, tehohoito, ensiapu, kuntoutus, sopeuttaminen ja kotisairaanhoido.

Tämä käyttöohje koskee **Liko HygieneSling with SafetyBelt** -nostokankaan mallia 45, mutta tekstissä käytetään vain nimitystä **Liko HygieneSling** -nostokangas.

Tällaiset nostotilanteet ovat usein raskaita ja vaikeita avustajille. HygieneSling-nostokankaan ansiosta pukeminen ja riisuminen voidaan tehdä varsinaisen noston aikana, sillä nostokankaan istuinosassa on väljä aukko.

Kokemus on osoittanut, että HygieneSling-nostokangas soveltuu käytettäväksi myös silloin, kun avustettavalla on päällään pitkät housut tai hame ja sukkahousut.

**Liko HygieneSling** -nostokangasta on helppo käyttää myös silloin, kun pyörätuolin ympärillä on rajoitetusti tilaa.

**Liko HygieneSling** -nostokangas on usein sopivin vaihtoehto avustettaville, joilla esiintyy tietynasteista jäykkyyttä.

HygieneSling-nostokangas on valmistettu vihreästä polyesterikankaasta, ja sen jalkatuet on vahvistettu ja pehmustettu polyesteri-/puuvillakankaalla.

Avustettavalla tulisi olla hyvä keskivartalon ja pään stabiliteetti, jotta hän voi istua mukavasti ja tukevasti HygieneSling-nostokankaassa. Jos avustettavalla on heikko lihastonus, on suositeltavaa käyttää pienempää HygieneSling-nostokangasta tai HygieneVest-liivin mallia 55.

Jos avustettavalla on taipumus valua alaspäin nostokankaassa, turvavyö jakaa paineen tasaisesti ja antaa lisätukea noston aikana.

HygieneSling-nostokangasta voidaan käyttää **Likon** katonostimien ja liikuteltavien nostimien kanssa. Valittavana ovat **LikoGuard**-katonostin, **Likorall**-katonostin ja **Multirall**-katonostin tai liikuteltava **Golvo**-nostin, liikuteltava **Viking**-nostin, liikuteltava **Uno**-nostin ja liikuteltava **Liko M220/M230** -nostin.

*Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja auttavaa henkilöä avustajaksi.*

### TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue sekä nostimen että nostotarvikkeiden käyttöohjeet ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu avustaja. Koulutuksen saadakseen avustajan pitää lukea ja ymmärtää tämä käyttöohje. Varmista, että nostotarvikkeet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan henkilön turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

# Turvallisuustietoja

## **Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:**

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyypiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormituksen määrittää aina järjestelmän tuote, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Pese nostokangas aina avustettavan vaihtuessa hygieenisyyden ja avustettavan turvallisuuden varmistamiseksi.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.
- Tarkista, että nostotarvikkeet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka **Likon** nostokaarissa on salvat, erityistä varovaisuutta tulee silti aina noudattaa. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Älä käytä kädensijojä nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina noston/siirron aikana.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.
- Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa.

 **Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.**


 **Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.**

 **Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa!**

 **Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa nostokankaan läheisyyteen!**

 **Älä säilytä nostokangasta paikassa, jossa se voisi altistua suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, kuten lämpöpatterit, takat tai hella/uuni!**

 **Kuluneen nostokankaan käytöstä voi aiheutua puristumisvaara tai vähäisten vammojen vaara, jos avustettava asetetaan nostokankaaseen epätasapainoisesti tai jos nostokangasta ei poisteta varovasti.**

 **Varmista, että avustettava ja avustaja pysyvät etäällä puristuskohdista ja liikkuvista osista noston aikana. Seurauksena voi olla henkilövahinko.**

 **Arvioi avustettavan puristumisriski ja valvo avustettavaa asiaankuuluvasti. Varmista, että avustettavan pää ja raajat eivät ole nostokankaan lenkeissä tai niiden välissä noston aikana. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.**

 **Älä käytä, säilytä tai siirrä nostokangasta lemmikkieläinten, tuhoeläinten tai ilman valvontaa olevien lasten läheisyydessä!**

 **HygieneSling-nostokangasta ei ole testattu käytettäväksi magneettiresonanssikuvausympäristössä (magneettikuvaus, MRI). Siirrä avustettava magneettikuvaukseen soveltuvalle pinnalle ja vie nostokangas pois magneettikuvaushuoneesta.**

 Lääkinnällinen luokan I laite

**PATENTTI [www.hillrom.com/patents](http://www.hillrom.com/patents)**

**Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.**

Hillrom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisen sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

## **Tuotemuutokset**

Liko-tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoitua. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hillromin edustajalta.

## **Design and Quality by Liko in Sweden**
























Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkitätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on myös ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

## **Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa**

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

## Symbolien kuvaus

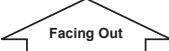Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Varoitus: Tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota. Symboli on keltainen kolmio, jossa on musta reunus ja musta huutomerkki keskellä.		
	Kierrätettävä		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä		
	CE-merkintä: merkintä Euroopan unionin lääkintälaitedirektiivin vaatimustenmukaisuudesta, luokan I lääkinnällinen laite		
	Valtuutettu edustaja Sveitsissä		
	Laillinen valmistaja		Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste		Lääkinnällinen laite
	Sarjanumero		Yksilöllinen laitetunniste
	Kemiallinen pesu kielletty		Rumpukuivaus
	Silitys kielletty		Rumpukuivaus kielletty
	Valkaisu kielletty		Ripusta kuivumaan varjoon
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).		
	Lateksiton		
	Määräaikaistarkastus		
	Yhden avustettavan käyttöön		Avustettavan nimi
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli		
	Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli		
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) valmistuspäivä (21) sarjanumero		

## Hoito ja tarkastus

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- kangas
- hihnat
- saumat
- lenkit.

⚠ **Älä käytä vahingoittuneita nostotarvikkeita.**

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

### Pesu- ja desinfiointiohjeet:

Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

### Materiaali:

HygieneSling on valmistettu polyesteristä.

### Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Lisätietoa käytännöistä saat Hillromin edustajalta.

### Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 5 vuotta. Odotettuun käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino. Hillrom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.


### Kierrätysohjeet

Koko nostokangas, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava polttokelpoiseen jätteeseen.







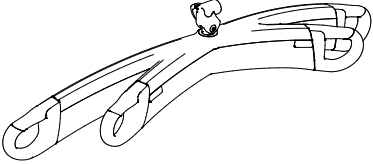
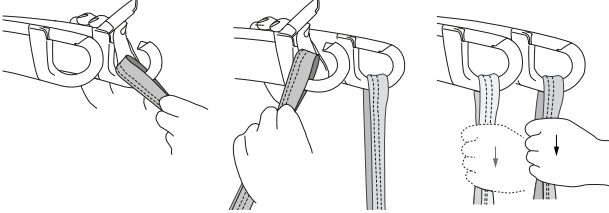
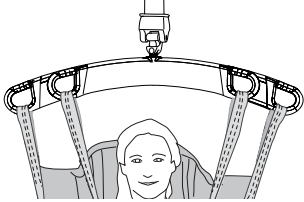
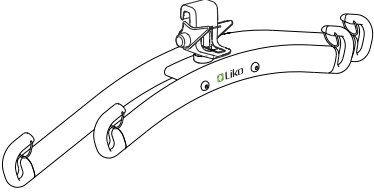
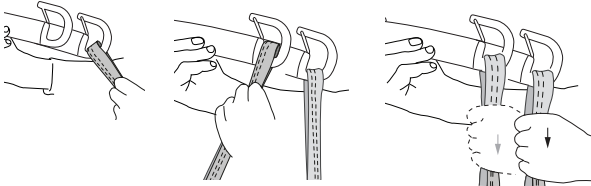
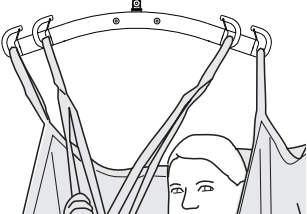
Hillrom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja/tai paikallisia lakeja ja asetuksia.

Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.


## Määritelmät

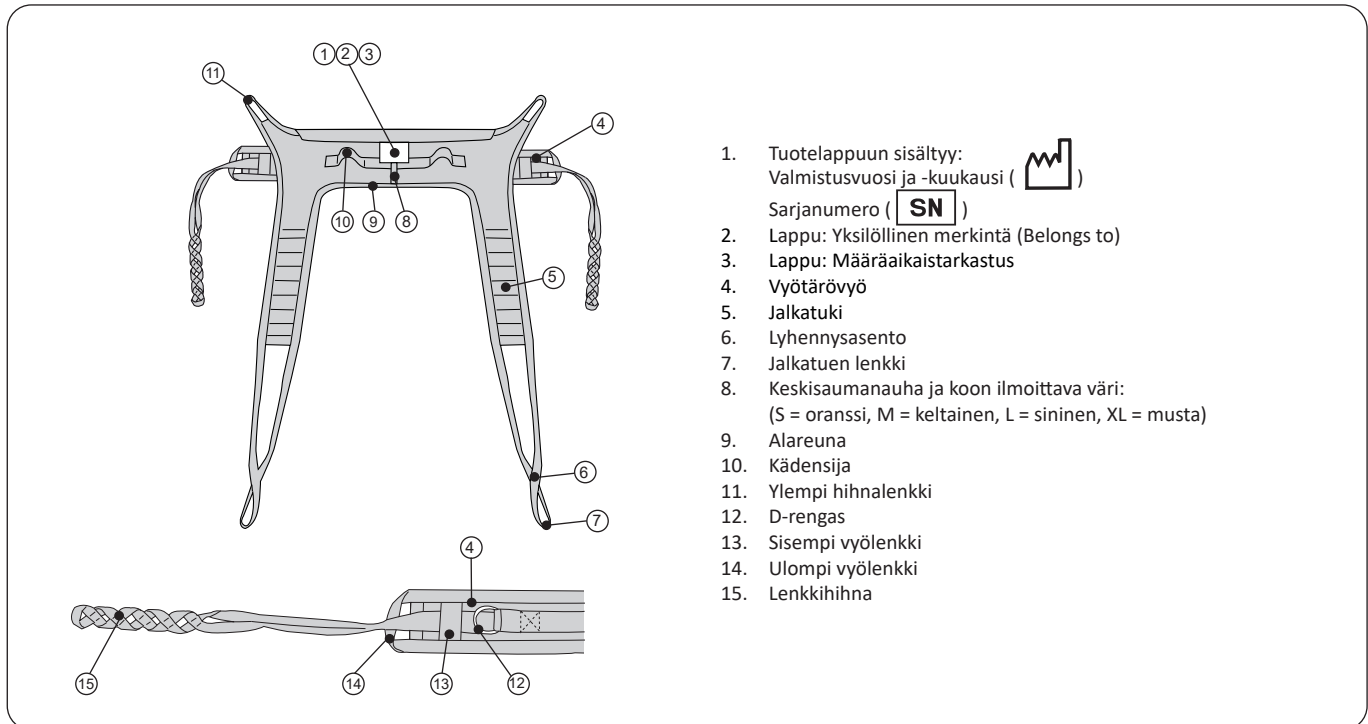


## Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

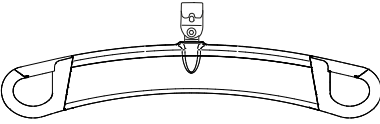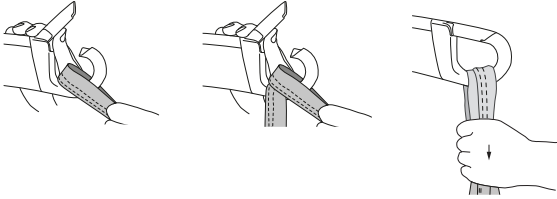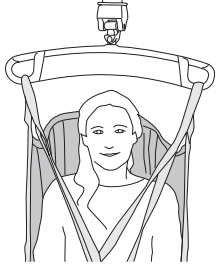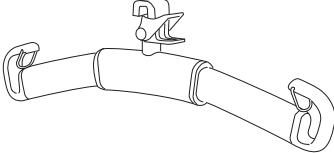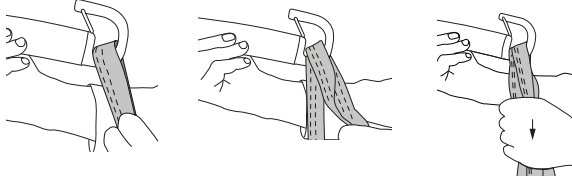Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="279 499 424 533">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="290 792 414 826">Universal</p>		
 <p data-bbox="245 1077 459 1111">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="255 1375 443 1408">Universal Twin</p>		

### Väärin!

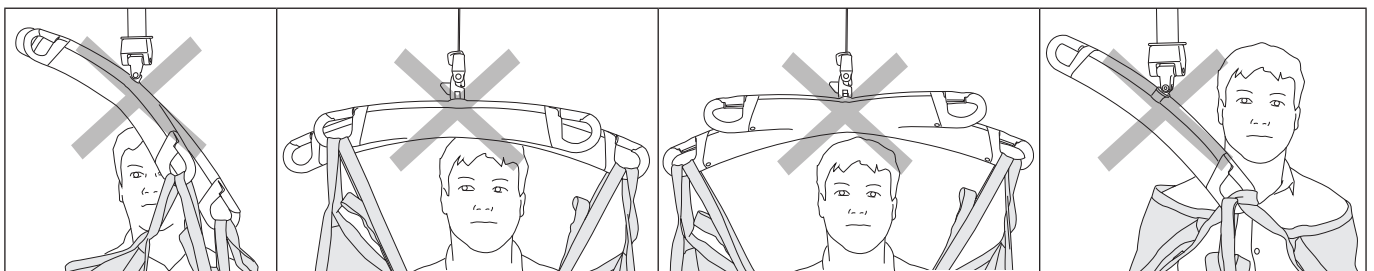

# HygieneSling-nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret)

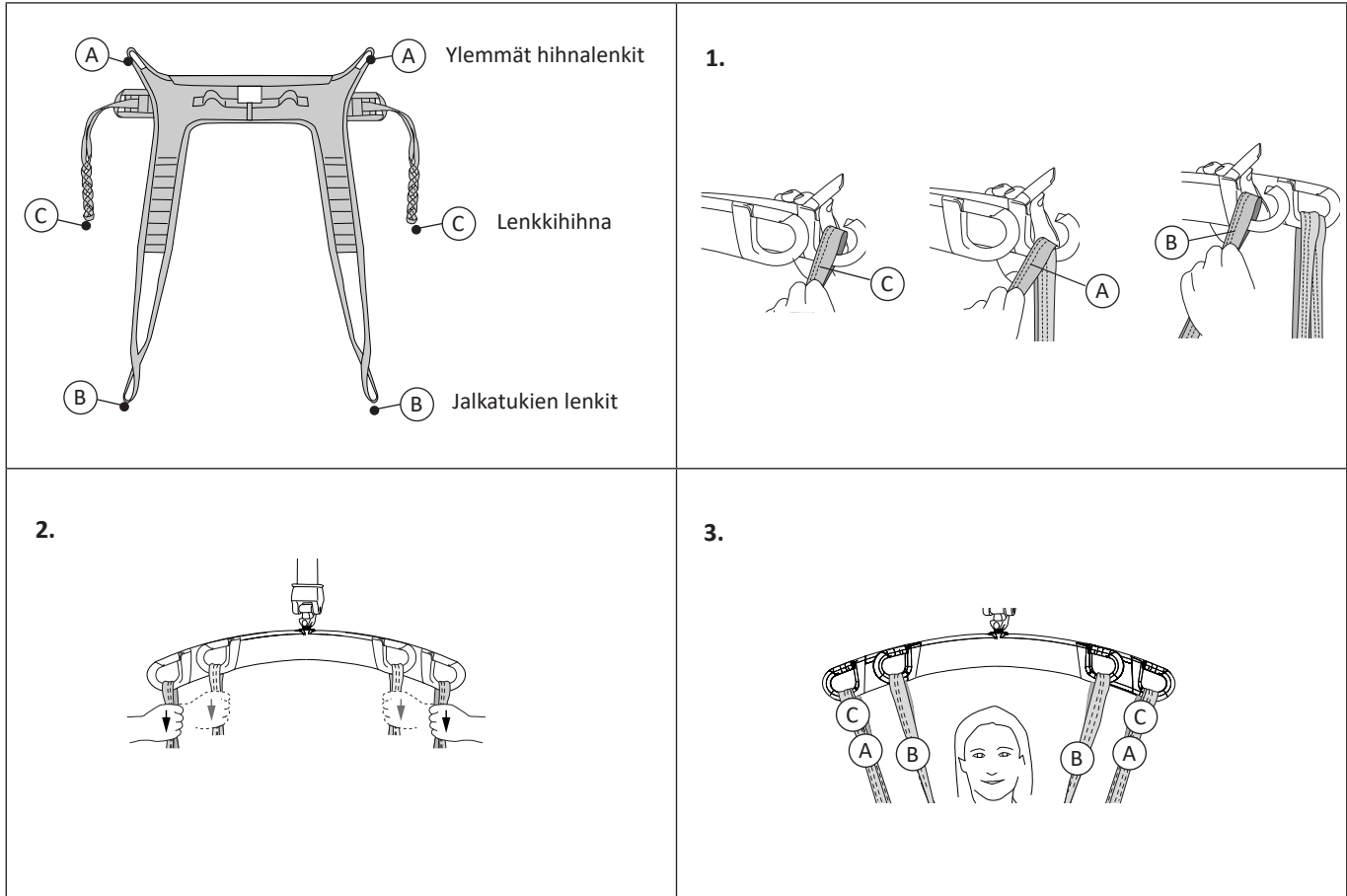

## Nostokankaan koon valitseminen

**⚠ Käytä vain nostokangasta, joka on avustettavalle sopivan kokoinen. Koulutetun avustajan on arvioitava oikea koko.**

**Muuten vaarana voi olla avustettavan puristuminen tai tukehtuminen.**


Avustettavan lantion ja nostokankaan lantiokohdan leveyden mittaaminen auttaa nostokankaan koon valinnassa.

Vertaa avustettavasta otettua mittausta (katso mittausohje) ja nostokankaan mittausta (katso mittataulukko tai mittausohje).

**Oikean koon valitseminen:**

Valitse nostokangas, jonka lantiokohdan leveysmitta on +/- 8 cm avustettavan lantion leveydestä.

**Mittaa avustettavan lantion leveys seuraavasti:**

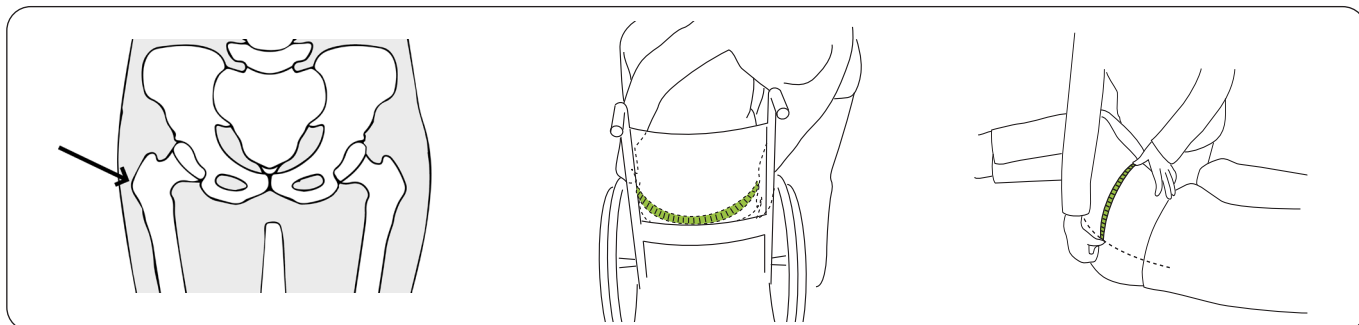


**Sarvennoinen:** Sarvennoinen on reisiluun hyvin tuntuva uloke avustettavan lantiossa. Sarvennoisen löytää mittausta varten kevyesti painamalla.

**Vaihtoehto A.** Avustettavan nojatessa eteenpäin mittaa lantion leveys leveimmästä kohdasta eli sarvennoisten välistä.

**Vaihtoehto B.** Avustettavan ollessa kyljellään mittaa sarvennoisen ja selkärangan keskiviivan välinen etäisyys ja kerro se kahdella.

**Katso nostokankaan lantiokohdan leveys kohdasta "Mitat" sivulla 8:**

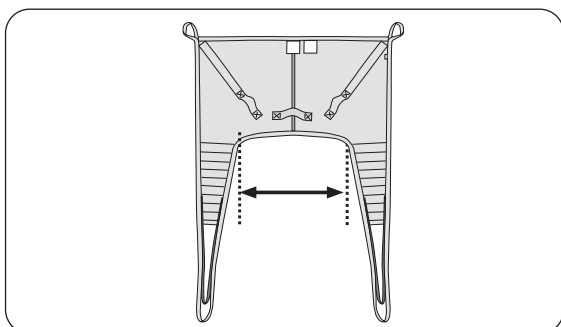


Mittaa nostokankaan jalkatukien välinen etäisyys.

**Lantion leveyden mitat**

Nostokankaan koko	Lantion leveys
S	54
M	68
L	70
XL	81

Kaikki mitat ovat senttimetreinä.

## Mitat

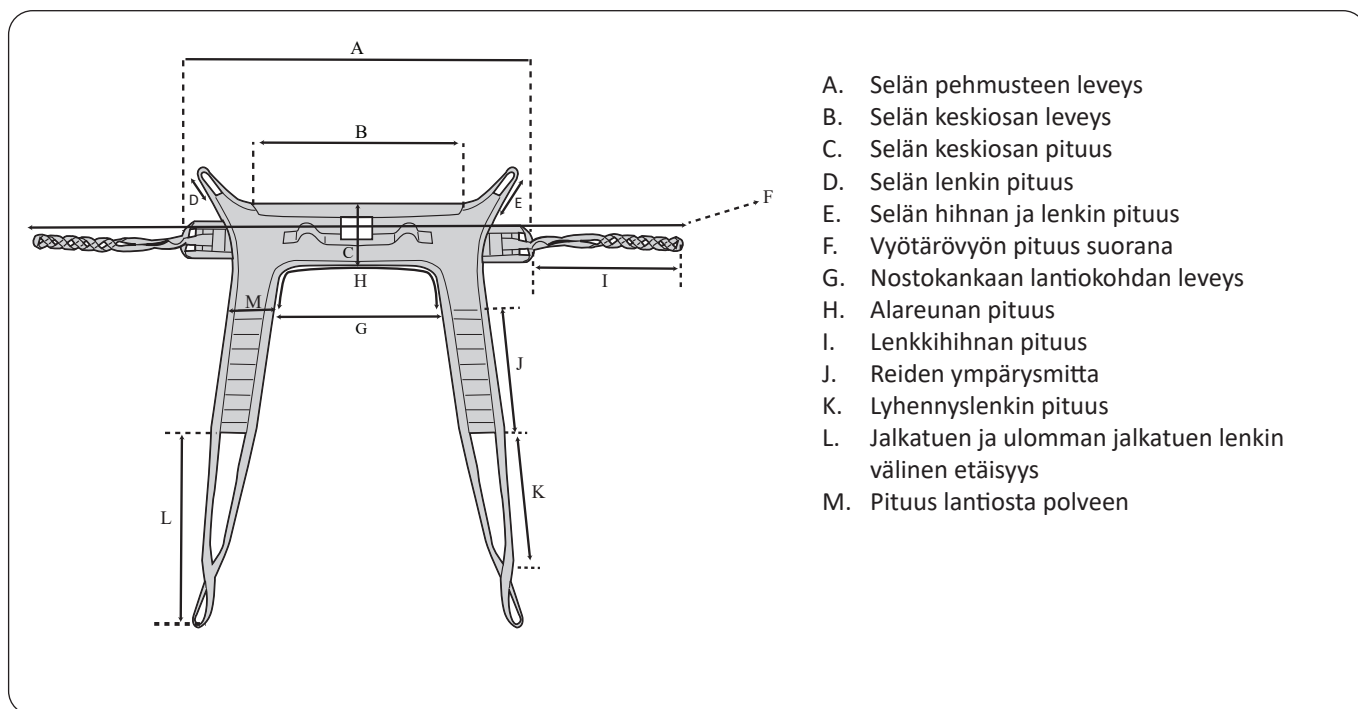

- A. Selän pehmusteen leveys
- B. Selän keskiosan leveys
- C. Selän keskiosan pituus
- D. Selän lenkin pituus
- E. Selän hihnan ja lenkin pituus
- F. Vyötärövyön pituus suorana
- G. Nostokankaan lantiokohdan leveys
- H. Alareunan pituus
- I. Lenkkihinnan pituus
- J. Reiden ympärysmitta
- K. Lyhennyslenkin pituus
- L. Jalkatuen ja ulomman jalkatuen lenkin välinen etäisyys
- M. Pituus lantiosta polveen

Mitat senttimetreinä


KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Enimmäiskuormitus (kg)	Tuotenro
S	97	69	21	27	38	223	54	81	63	46	45	60	15	200	3545134
M	111	79	24	21	32	234	68	100	61	46	45	60	15	200	3545135
L	132	91	28	21	31	264	70	88	67	60	48	64	15	200	3545136
XL	152	104	28	15	23	265	81	102	57	60	49	63	15	300	3545137

Mitat tuumina

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Enimmäiskuormitus (lb)	Tuotenro
S	38	27	8	10	15	88	21	32	25	18	18	24	6	440	3545134
M	44	31	9	8	13	92	27	39	24	18	18	24	6	440	3545135
L	52	36	11	8	12	104	28	35	26	24	19	25	6	440	3545136
XL	60	41	11	6	9	104	32	40	22	24	19	25	6	660	3545137

## Nostaminen pyörätuolista WC-istuimelle


Tutustu ensin turvavyön toimintaan, käyttöön ja säätöihin. Tee alkuvalmistelut avustettavan riisumista varten avaamalla napit ja vetoketjut.

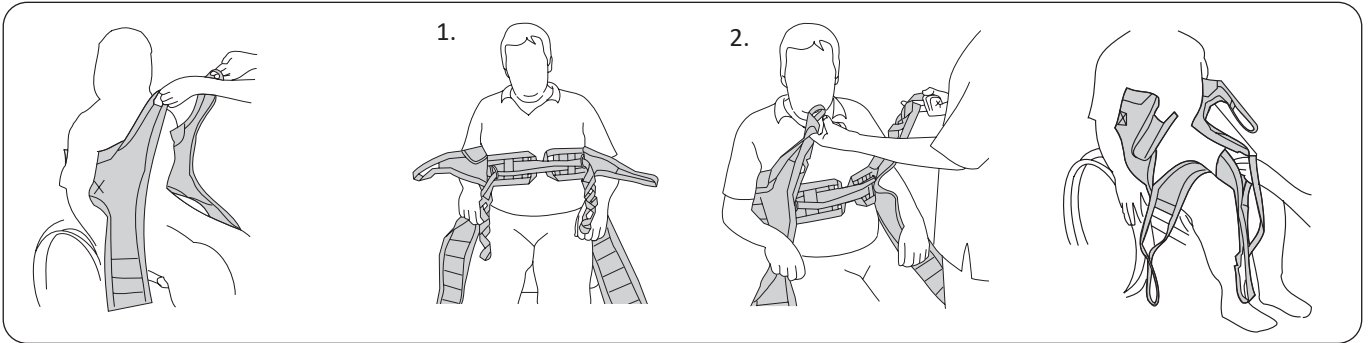

Aseta HygieneSling-nostokangas suunnilleen puoliväliin avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Pehmustetun yläreunan tulisi asettua suoraan kainaloiden alle.

1. Vedä oikeanpuoleinen hihnalenkki vasemmanpuoleisen D-renkaan läpi. Vedä vasemmanpuoleinen hihnalenkki oikeanpuoleisen D-renkaan läpi.
2. Testaa, mitkä lenkit ovat sopivimmat, vetämällä HygieneSling-nostokankaan ylemmää hihnalenkkiä ja yhtä lenkkihihnan lenkkiä samanaikaisesti yllä olevan kuvan mukaisesti.

Aseta jalkatuet avustettavan reisien alle. Aseta jalkatuet ristikkäin pujottamalla toinen jalkatuen lenkki toisen lävitse.

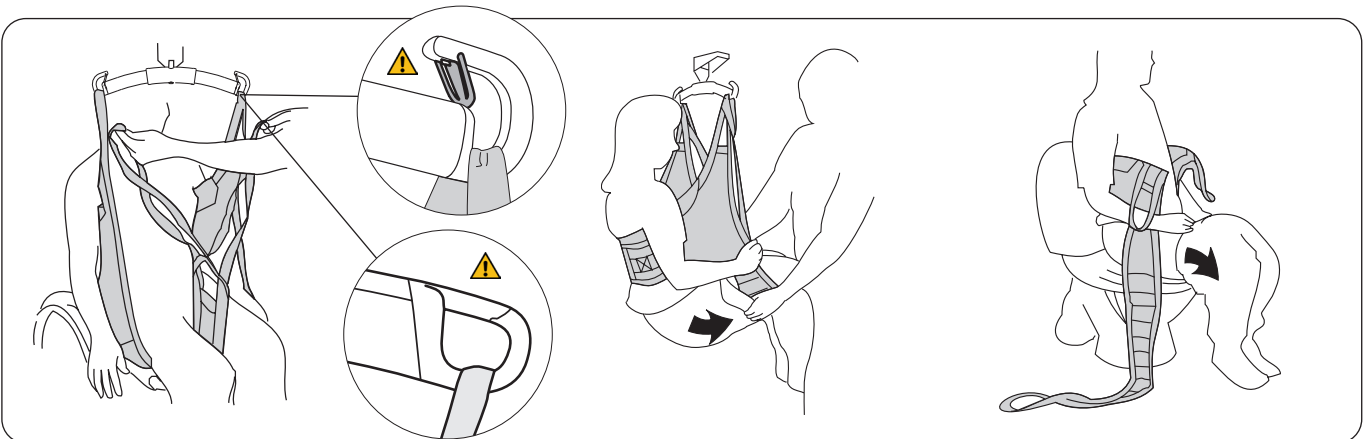

Siirrä nostokaarta eteenpäin ja kiinnitä ensin lenkkihihnat. Kiinnitä sitten ylemmät hihnalenkit ja lopuksi jalkatukien lenkit. Katso kohdista sivu 5 ja sivu 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin.


Nosta avustettava. Vedä avustettavan housut mahdollisimman alas.

Laske avustettava WC-istuimelle. Taita jalkatuet sivuun ja vedä housuja vielä alemmas.

## Pyörätuoliin paluu WC-istuimelta

Seuraavassa esitellään kaksi tapaa avustettavan pukemiseen WC-käynnin jälkeen. Sopiva toimintatapa valitaan avustettavan kunnon ja vaatetuksen mukaan.

**Toimintatapa 1:** Jalkatuet housujen ulkopuolella. Soveltuu silloin, kun housut eivät ole joustavaa kangasta.

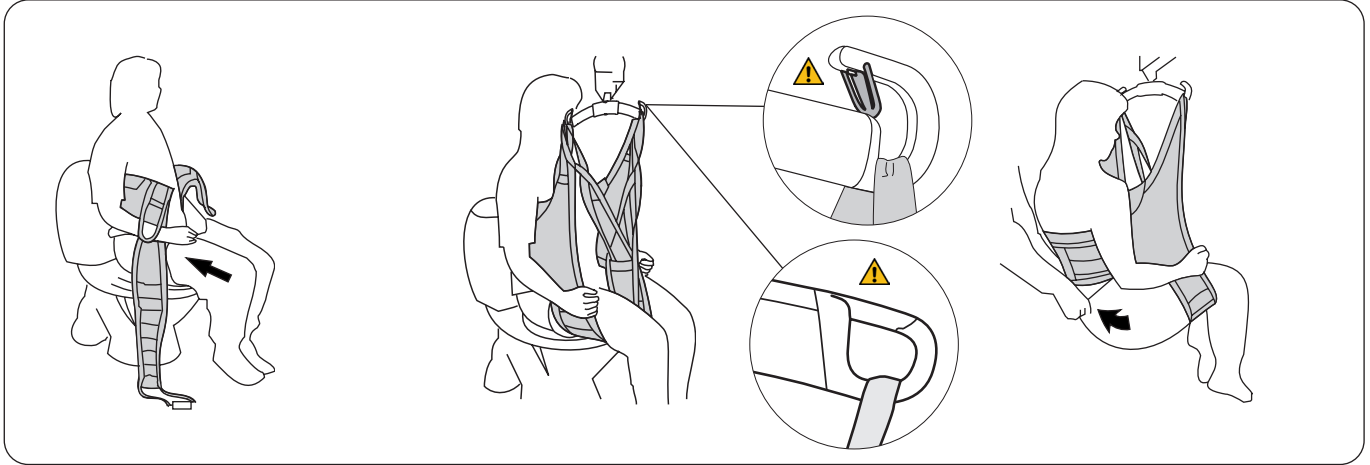


Vedä housut mahdollisimman pitkälle ylös nivusia kohti.

Aseta jalkatuet jalkojen alle mutta housujen ulkopuolelle. Kiinnitä kaikki lenkit. Katso kohdista sivu 5 ja sivu 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Jos käytetään inkontinenssisuojaa, aseta se paikalleen ennen housujen vetämistä kokonaan ylös. Siirrä ja laske avustettava tuoliin.

**Toimintatapa 2:** Jalkatuet ensin – housut ulkopuolella. Soveltuu silloin, kun housut ovat joustavaa kangasta.

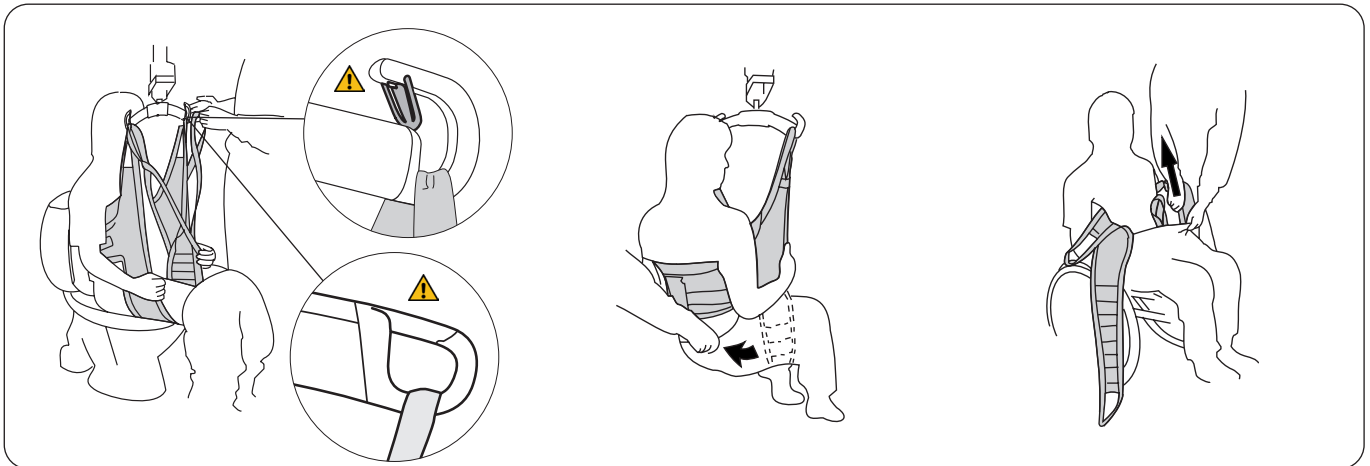

Aseta HygieneSling-nostokangas kohdassa sivu 9 esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Kiinnitä kaikki lenkit. Katso kohdista sivu 5 ja sivu 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava. Jos käytetään inkontinenssisuojaa, aseta se ristikkäin menevien jalkatukien sisäpuolelle.


Vedä housut istuinosan ja nostokankaan yli avustettavan istuessa vielä HygieneSling-nostokankaassa. Laske avustettava tuoliin.

Irrota nostokangas nostokaaresta. Vedä jalkatuet varovasti pois housujen sisältä ja poista HygieneSling-nostokangas.

# Koesovitusohjeet

⚠ Istuma-asento riippuu siitä, mihin kohtaan jalkatuet asetetaan avustettavan jalkojen alle. Jos avustettavan lihastonus on heikko, jalkatuet on sijoitettava ylemmäs nivusia kohti, jotta avustettava ei istu liian alhaalla nostokankaassa.

Jos avustettavan lihastonus on heikko, hän saa yleensä paremman asennon pienemmässä HygieneSling-nostokankaassa. Jos avustettavan lihastonus on hyvä, tilanne on päinvastainen. Tällöin avustettava saa paremman asennon suuremmissa HygieneSling-nostokankaassa edellyttäen, että selkätuki asettuu riittävän korkealle ja että jalkatuet ovat riittävän lähellä polvitaiteita.

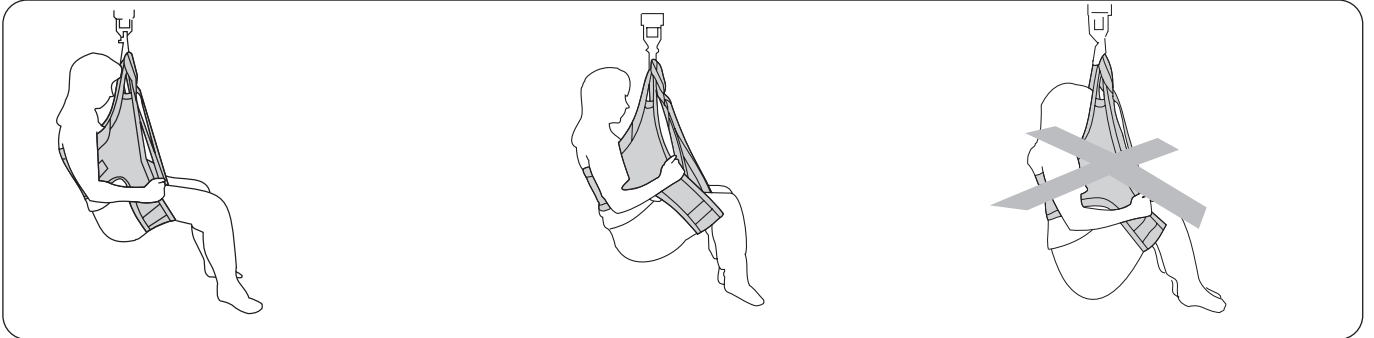

Useimmissa tapauksissa, varsinkin jos avustettavalla on heikko lihastonus, jalkatuet on asetettava mahdollisimman lähelle nivusia.


Jos avustettavan lihastonus on hyvä, jalkatuet voidaan asettaa lähemmäksi polvia. Tämä helpottaa pukemista ja riisumista sekä auttaa vähentämään lihasjäykkyyttä.

Syvälle vajoava ja epämukava istuma-asento johtuu liian lähelle polvia asetetuista jalkatuista ja/tai liian suuresta nostokankaasta. Kokeile pienempää kokoa.

## Erlaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset riskit yksilökohtaisesti.


Seuraava ohje on yleisluonteinen, sillä samat periaatteet koskevat useita nostokangasmalleja.

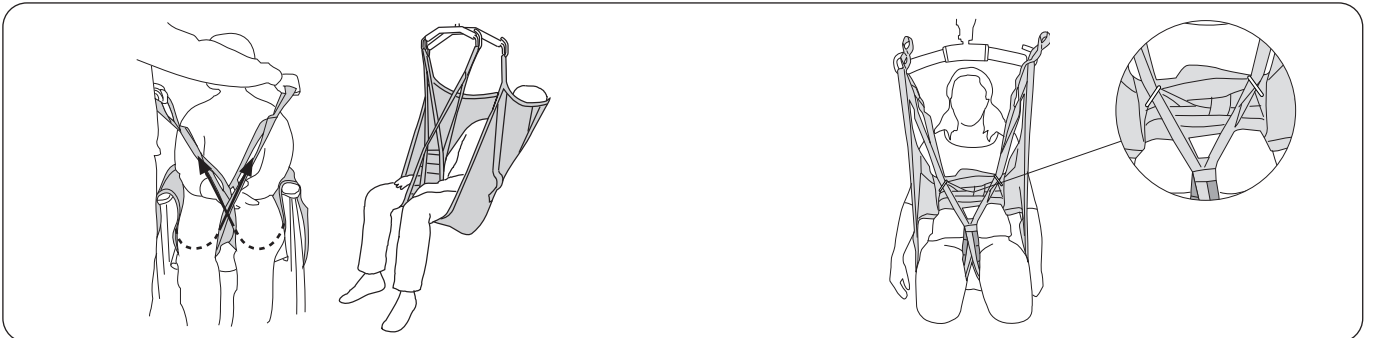

### Jalkatuet ristikkäin.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun avustettava on amputoitu, voi olla hyvä vetää jalkatukien lenkit metallisten D-renkaiden läpi ennen kiinnittämistä nostokaareen. Tämä estää jalkatukia liukumasta eteenpäin jalkoja pitkin.

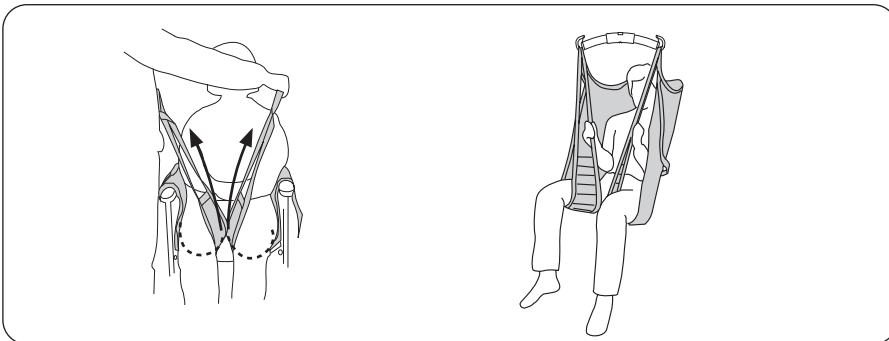

### Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.

Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos avustettava on erityisen herkkä genitaalialueelta.

⚠ Suurempi liukumisen riski.



## Lyhennysasento


Joissakin tapauksissa voi olla hyvä lyhentää jalkatukien lenkkejä, jotta avustettava saa tukevan asennon nostokankaassa. Lyhennysasentoa voidaan käyttää tilapäisesti oikean pituuden löytämiseksi, mutta pitkittynyt käyttö voi vahingoittaa ompeleita. Jos haluat lyhentää jalkatukien lenkkejä pitkäaikaista käyttöä varten, on suositeltavaa, että solmit lenkkiin solmun, jolloin se lyhenee noin 10 cm. Tässä tapauksessa ulompi jalkatuen lenkki kiinnitetään nostokaareen.

## SafetyBelt-turvavyön kuvaus

Turvavyö antaa lisätukea avustettaville, joilla on heikko lihastonus. Vyö tukee avustettavan ylävartaloa, jos avustettavalla on taipumus valua alaspäin nostokankaassa noston aikana.

Turvavyötä ei kuitenkaan saa kiristää niin tiukalle, että se nostaa avustettavan vartaloa ylöspäin. Toisin sanoen avustettava ei saa nostaa turvavyön varassa, ennen kuin HygieneSling-nostokankaan ylempien hihnalenkkiä nostovaikutus alkaa. Jos näin tapahtuu, avustettava voi kallistua ikävästi taaksepäin.

## Lenkkihihnojen säätäminen

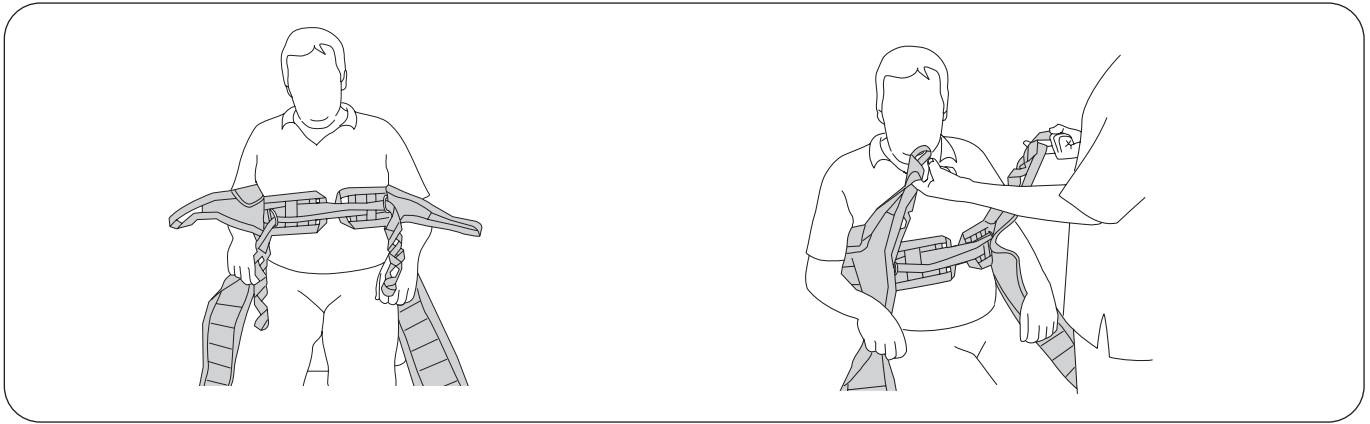


Lenkkihihnat on asetettava ristiin ja vedettävä D-renkaiden läpi ennen valitun hihnalengin ripustamista nostokaareen.

Lenkkihihnojen kireys ylävartalon ympärillä määräytyy sen mukaan, mitkä lenkit on kiinnitetty nostokaareen. Voit säätää sopivan kireyden kokeilemalla nostoa eri lenkeistä samaan aikaan, kun käytät HygieneSling-nostokankaan ylempiä hihnalenkkejä. Sisempi lenkki lisää kireyttä, kun taas ulompi lenkki vähentää kireyttä.

**Oikein säädettyjen lenkkihihnojen pitäisi tuntua HygieneSling-nostokankaan ylempiä hihnalenkkejä löysemmiltä.**


## Merkintäliuskat

Tätä hyödyllistä lisävarustetta käytetään lenkkien merkitsemiseen silloin, kun tietyille henkilölle on löydetty sopivat säädöt. Näin avustajat löytävät heti oikean lenkin nostokaareen kiinnittämistä varten.

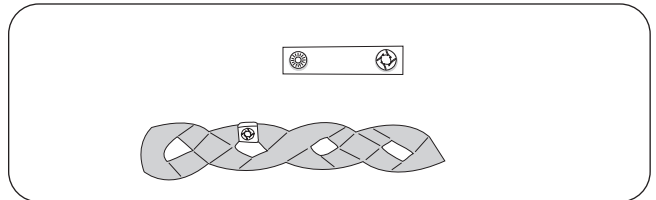

## Hihnan pituuden säätäminen avustettavan vyötärömitan mukaan

Optimaalisen toiminnan varmistamiseksi vyötärövyön pituutta voidaan tarvittaessa säätää avustettavan vyötärömitan mukaan.

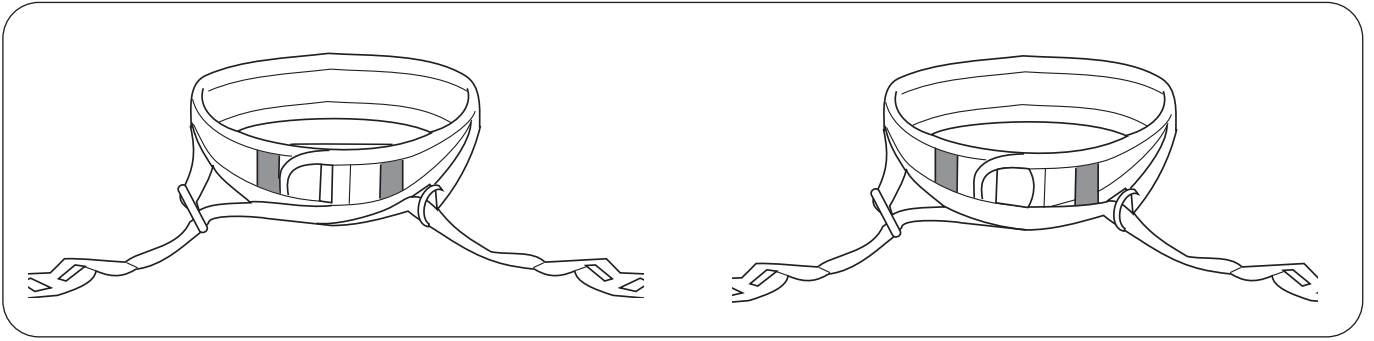


### Vaihtoehto A: Erittäin hoikat avustettavat

Vedä lenkkihihnat ulos sisemmistä vyölenkeistä ennen niiden pujottamista metallirenkaiden läpi. Tämä mahdollistaa maksimikireyden.

### Vaihtoehto B: Keskikokoiset avustettavat

Vedä vain yksi lenkkihihna ulos sisemmästä vyölenkeistä. Aseta lenkkihihnat ristiin ja pujota ne metallirenkaiden läpi.

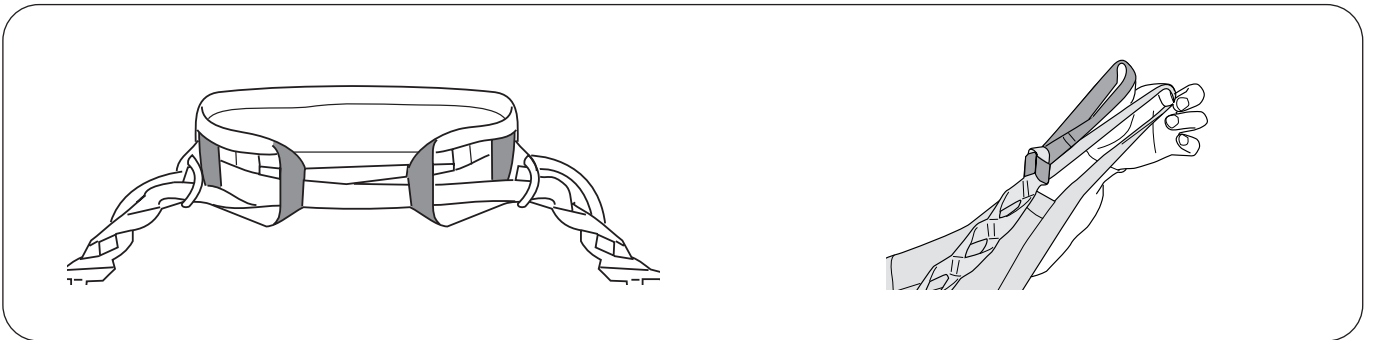

### Vaihtoehto C: Kookkaat potilaat

Pujota lenkkihihnat sekä sisempien että ulompien vyölenkkien läpi ennen niiden pujottamista metallirenkaiden läpi.

**Hyödyllinen vinkki:** Lenkkihihnoja voidaan pidentää **Liko** Extension Loop -jatkolenkkien avulla, jos avustettavan ympärysmitta on vielä suurempi.

## Vaihtoehtoiset nostokankaat nostoihin WC-istuimelle ja -istuimelta

Laajassa nostokangasvalikoimassamme on monia malleja, joita voidaan käyttää nostoihin WC-käyntien yhteydessä. Seuraavassa luetellaan joitakin mahdollisia vaihtoehtoisia nostokankaita. Lisätietoja saa osoitteesta [www.hillrom.com](http://www.hillrom.com).

**Liko** HygieneSling with Belt, malli 41

**Liko** HygieneVest High Back, malli 55

**Liko** MasterVest, malli 60


**Liko** MasterVest, front closure, malli 64

## Lisävarusteet

### Merkintäliuskat

Merkintäliuskat, punainen, 4 kpl  
Merkintäliuskat, oranssi, 4 kpl  
Merkintäliuskat, keltainen, 4 kpl  
Merkintäliuskat, sininen, 4 kpl  
Merkintäliuskat, musta, 4 kpl


Tuotenumero 3666033  
Tuotenumero 3666034  
Tuotenumero 3666035  
Tuotenumero 3666036  
Tuotenumero 3666037

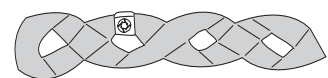

### Extension Loop

Extension Loop, vihreä, 12 cm  
Extension Loop, vihreä, 22 cm  
Extension Loop, harmaa, 12 cm  
Extension Loop, harmaa, 22 cm

Tuotenumero 3691102  
Tuotenumero 3691103  
Tuotenumero 3691302  
Tuotenumero 3691303

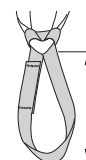

- 2 = 12 cm  
- 3 = 22 cm

## Yleiskuvaus: LIKO HygieneSling -nostokangas, malli 45

Tuote	Tuotenro	Koko	Avustettavan paino <sup>1</sup>	Enimmäiskuormitus <sup>2</sup>
Liko HygieneSling	3545134	S	25–50 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545135	M	40–90 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545136	L	80–120 kg	200 kg
Liko HygieneSling	3545137	XL	> 100 kg	300 kg

<sup>1</sup> Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

<sup>2</sup> Enimmäiskuormituksen toteutumisen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään samansuuruisen kuormituksen.

### Suosittelut käyttöyhdistelmät

Nostokaarien yhteensopivuuskaavio:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Universal SlingBar 450	Standard 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 600	SlingGuard 670 Twin	Universal TwinBar 670	Sabina II 350 Slingbar*
Liko HygieneSling, S	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Liko HygieneSling, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liko HygieneSling, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liko HygieneSling, XL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

\* HygieneSling-nostokangasta voi käyttää passiiviseen nostamiseen. Lisätietoja on **Sabina II** -tuotteen käyttöohjeessa.

**Selitys:** ✓ = suositeltava

Liko HygieneSling -nostokankaan ja Cross-Bar-ristikkonostokaaren, Cross-Bar 450/670 -ristikkonostokaaren tai SideBars-sivukaarien yhdistelmät ovat epäsopivia.

Vaikka tämä taulukko toimii ohjenuorana, on tärkeää huomioida, että jotkin nostokankaan ja nostokaaren yhdistelmät eivät välttämättä sovellu käytettäväksi tietyissä olosuhteissa. Koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen on aina arvioitava ja hyväksyttävä taulukossa esitetyt yhdistelmät.

### Muut yhdistelmät

**⚠ Käyttö yhdistelmänä muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden kanssa voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.**

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, Sabina ja Viking ovat Baxter International Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



www.hillrom.com

Liko AB  
Nedre vägen 100  
975 92 Luleå, Sweden  
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for  
patients and their caregivers:

Hill-Rom