


Multirall

Kattonostin
Pikakäyttöopas

Suomi

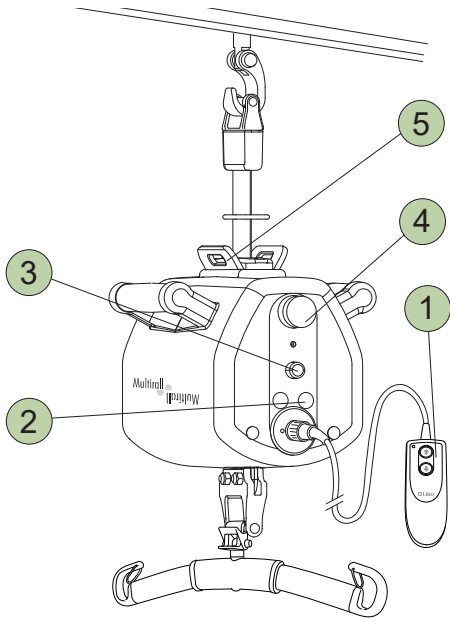


1 Käsiohjain



↑ Ylös ↓ Alas


⚠ Käytä nostinta vain kun nostohihna on kireällä!

2 Sähköinen varalasku-/nostotoiminto

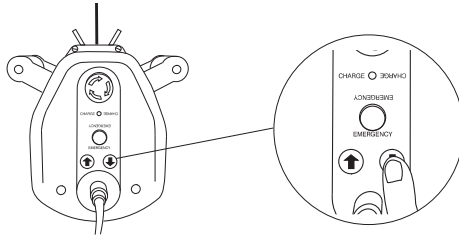

⚠ Nuolet vastaavat nostimen liikkeen suuntaa, kun nostoyksikkö on asennettu niin, että nostohihna on nostoyksikön yläpuolella.


3 Mekaaninen varalasku

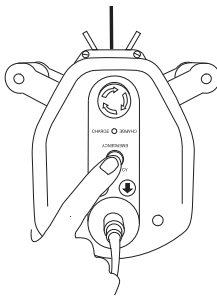


Laske nostinta hätätilanteessa painamalla painiketta, jossa lukee Emergency (Hätätilanne).

4 Hätäpysäytin


Aktivointi:

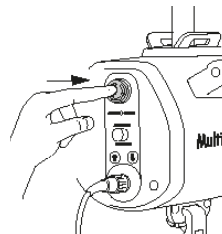

Vapauttaminen:

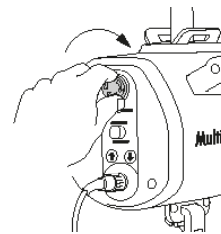


5 SSP-rajakatkaisija

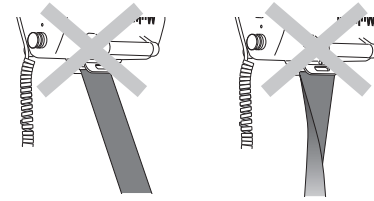


Nostoliike keskeytyy, kun nostohihnan kuorma on epätasapainossa tai kun nostohihna on kiertynyt.

Nostotarvikkeiden vaihtaminen

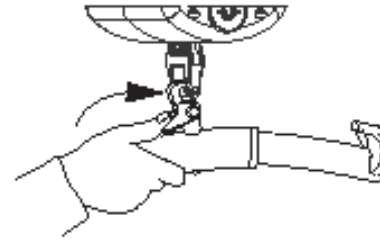

Vaihtoehtoinen käyttötapa

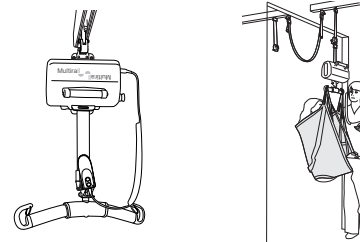

📖 Lisätietoa eri vaihtoehtoista on nostimen käyttöohjeessa.

Akkujen lataaminen



- Lataa nostin säännöllisesti käytön jälkeen.
- Varmista, että hätäpysäytintä ei paineta latauksen aikana.

Ergonomia

- Älä koskaan nosta käsin – käytä nostinta.
- Älä hätäile. Toimi rauhallisesti ja järjestelmällisesti.
- Älä rasita selkääsi! Työskentele pystyasennossa ja pidä selkä suorassa.
- Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.
- Vähennä vipuvoimaa. Työskentele lähellä avustettavaa ja nostinta.

Puhdistus

Puhdista nostin tarvittaessa kostealla liinalla käyttämällä yleispuhdistusainetta tai desinfiointiainetta.

Nopea vianetsintä

Tarkista, että:

- Hätäpysäytintä ei ole painettu.
- Akku on latautunut.
- Käsiohjain on oikein kiinnitetty.

Muita pikakäyttöoppaita

Liko-nostimien ja -nostokankaiden pikakäyttöoppaat voi ladata osoitteesta www.hillrom.com.



Multirall ja Liko ovat Baxter International, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



www.hillrom.com

Valmistaja:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Ruotsi
+46 (0)920 474700

Turvaohjeet

- Lue nostimen ja nostotarvikkeiden käyttöohje ennen käyttöä.
- Suunnittele nosto huolellisesti.
- Varmista, että nostokankaan hihnaolenkit ovat oikein kiinni nostokaaren koukuissa, kun nostokankaan hihna on ojennettuna, mutta ennen avustettavan nostamista alustalta.
- Enimmäiskuormitus: 200 kg**
Enimmäiskuormituksen säilyttämiseksi on tärkeää, että käytetään saman tai suuremman enimmäiskuormituksen mukaisia lisävarusteita.

📖 TÄRKEÄÄ!

Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen käyttöohjetta, jonka voit ladata osoitteesta www.hillrom.com.