


Käyttöohje

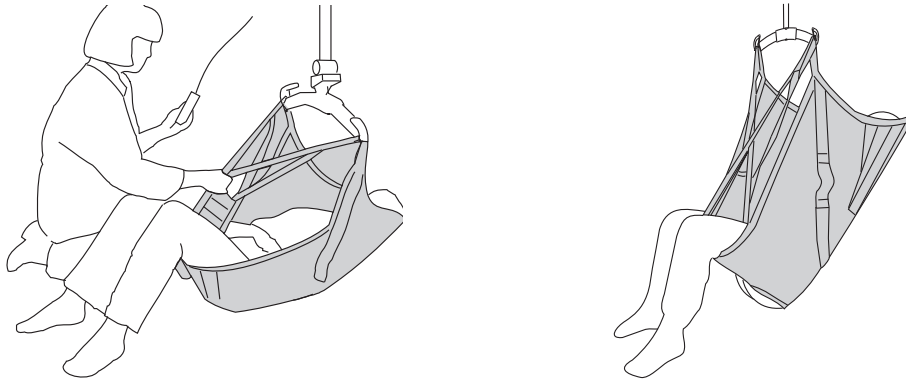

Tuotekuvaus

Käyttötarkoitus

Liko Soft Original HighBack Sling -nostokangas on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa ympäristöissä: terveydenhuoltoympäristöt, tehohoito, ensiapu, kuntoutus, sopeuttaminen ja kotisairaahoito. Soft Original HighBack Sling -nostokangasta voidaan käyttää kaikissa tavanomaisissa nostotilanteissa. Vahvistettu pehmeä päätuki tukee miellyttävästi päätä sekä istuma- että makuuasennossa.

LIKO Soft Original HighBack Sling -nostokangas on perusmalli, joka on suunniteltu mukautumaan avustettavalle ilman erillisiä säätöjä. Se on yksi eniten käytetyistä nostokankaistamme.

Se mahdollistaa hieman takakenoisen istuma-asennon ja tukee erinomaisesti koko vartaloa, minkä ansiosta se soveltuu erityisesti avustettaville, joiden pään ja ylävartalon stabiliteetti on heikentynyt. Oikein sovitettuna ja käytettynä nostokangas antaa avustettavalle suuren turvallisuuden ja mukavuuden tunteen.

Kankaat

Soft Original HighBack Sling -nostokangas on valmistettu polyesteristä. Polyesteri on kestävä ja kitkaton materiaali, joka tekee nostokankaasta helposti aseteltavan ja helposti poistettavan. Jos halutaan vastaava nostokangas eri materiaalista, käytetään Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210. Original HighBack Sling -nostokankaasta on saatavana verkkopolyesteristä valmistettu malli, jota on suositeltavaa käyttää, jos nostokangas jätetään tuoliin siirron jälkeen. Kylvyssä ja suihkussa käyntiä varten on saatavana muovipinnoitetusta polyesteriverkosta valmistettu malli, joka läpäisee vettä ja on helppo pyyhkiä puhtaaksi. Materiaali kuivuu nopeasti eikä kylmetä avustettavaa samalla tavalla kuin kostea ja vettä imevä kangas.

Nostokankaan nostohihnat ovat kestävää polyesteriä ja erittäin lujat.

Koot

Soft Original HighBack Sling -nostokankaasta on saatavana eri kokoja. On tärkeää valita oikean kokoinen nostokangas, jotta se on avustettavalle mahdollisimman miellyttävä ja turvallinen. Liian suuresta nostokankaasta avustettava saattaa liukua ulos, kun taas liian pieni nostokangas voi olla epämiellyttävä tiukka nivusista. Isommissa kokoluokissa nostokankaan käyttäminen yhdessä 670- tai SlingGuard 670 Twin -kaksoisnostokaaren kanssa voi olla hyvä vaihtoehto.

Jalkatuet

Soft Original HighBack Sling -nostokankaaseen voi valita vahvistettuja jalkatukia, jotka antavat lisämukavuutta, jakavat paineen tasaisesti ja estävät nostokankaan rypistymisen reisien alle.

Sopivat nostimet

Soft Original HighBack Sling -nostokangasta voidaan käyttää kaikkien **Likon** kattonostimien ja liikuteltavien nostimien kanssa. Valittavana ovat **LikoGuard**-kattonostin, **Likorall**-kattonostin ja **Multirall**-kattonostin tai liikuteltava **Golvo**-nostin, liikuteltava **Viking**-nostin, liikuteltava **Uno**-nostin ja liikuteltava **Liko M220/M230** -nostin.

Tässä käyttöohjeessa nostettavaa henkilöä kutsutaan avustettavaksi ja häntä auttavaa henkilöä avustajaksi.

TÄRKEÄÄ!

Avustettavan nostamiseen ja siirtämiseen liittyy aina riskejä. Lue sekä nostimen että nostovarusteiden käyttöohjeet ennen käyttöä. On tärkeää ymmärtää käyttöohjeen sisältö täysin. Laitetta saa käyttää vain koulutettu avustaja. Koulutuksen saadakseen avustajan pitää lukea ja ymmärtää käyttöohjeet. Varmista, että nostovarusteet soveltuvat käytettävään nostimeen. Noudata huolellisuutta ja varovaisuutta käytön aikana. Avustajana olet aina vastuussa avustettavan henkilön turvallisuudesta. Sinun on oltava tietoinen avustettavan edellytyksistä suoriutua nostotilanteesta. Ota epäselvissä tilanteissa yhteys valmistajaan tai maahantuajaan.

Turvallisuustietoja

Huomioi seuraavat asiat ennen nostamista:

- Hoitoyksikön vastuuhenkilön tulee arvioida avustajien tarvittava lukumäärä tapauskohtaisesti.
- Varmista, että nostokangas sopii malliltaan, kooltaan, materiaaliltaan ja tyyppiltään avustettavan tarpeisiin.
- Nostojärjestelmän enimmäiskuormituksen määrittää aina järjestelmän tuote, jonka määritetty enimmäiskuormitus on pienin.
- Pese nostokangas aina avustettavan vaihtuessa hygieenisyyden ja avustettavan turvallisuuden varmistamiseksi.
- Suunnittele nostotilanne ennen nostamista, jotta kaikki tapahtuisi mahdollisimman turvallisesti ja sujuvasti.
- Tarkista, että nostotarvikkeet riippuvat pystysuorassa ja pääsevät liikkumaan esteettömästi.
- Vaikka **Likon** nostokaarissa on salvat, erityistä varovaisuutta tulee silti aina noudattaa. Ennen avustettavan nostamista alustalta ja hihnojen kiristämistä on tärkeää varmistaa, että hihnat on kiinnitetty nostokaaren koukkuihin oikein.
- Varmista, että avustettava istuu tukevasti nostokankaassa, ennen kuin siirto toiseen paikkaan aloitetaan.
- Älä koskaan nosta avustettavaa korkeammalle kuin siirron toteuttamiseksi on välttämätöntä.
- Varmista, että pyörätuolin, sängyn, paarien jne. pyörät ovat lukittuina noston/siirron aikana.
- Käytä aina ergonomisia työmenetelmiä. Hyödynnä avustettavan kykyä osallistua aktiivisesti toimenpiteisiin.

Nostokankaan puutteellinen kiinnitys nostokaareen voi aiheuttaa avustettavalle vakavia vammoja.

Avustettavan käsivarainen kääntäminen sängyssä voi aiheuttaa avustajalle vammoja.

Älä koskaan jätä avustettavaa ilman valvontaa nostotilanteessa!

Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa nostokankaan läheisyyteen!

Älä säilytä nostokangasta paikassa, jossa se voisi altistua suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, kuten lämpöpatterit, takat tai hella/uuni!

Älä käytä, säilytä tai siirrä nostokangasta lemmikkieläinten, tuhoeläinten tai valvomattomien lasten läheisyydessä!

Kuluneen nostokankaan käytöstä voi aiheutua puristumisvaara tai vähäisten vammojen vaara, jos avustettava asetetaan nostokankaaseen epätasapainoisesti tai jos nostokangasta ei poisteta varovasti.

Varmista, että avustettava ja avustaja pysyvät etäällä puristuskohdista ja liikkuvista osista noston aikana. Seurauksena voi olla henkilövahinko.

Arvioi avustettavan puristusriski ja valvo avustettavaa asiaankuuluvasti. Varmista, että avustettavan pää ja raajat eivät ole nostokankaan lenkeissä tai niiden välissä noston aikana. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla vakava vamma tai kuolema.

 Lääketieteellinen luokan 1 laite

PATENTTI www.hillrom.com/patents

Saattaa kuulua yhden tai useamman patentin piiriin. Katso edellä mainittu verkko-osoite.

Hillrom-yhtiöt ovat eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisien sekä muiden patenttien ja vireillä olevien patenttihakemusten omistajia.

Tuotemuutokset

Liko-tuotteita kehitetään jatkuvasti, minkä vuoksi pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin ilman ennakoilmoitusta. Ohjeita ja lisätietoja tuotepäivityksistä saa Hillromin edustajalta.

Design and Quality by Liko in Sweden




























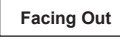

Liko on laatusertifioitu standardin ISO 9001 ja vastaavan lääkintätekniikan yrityksille tarkoitetun standardin ISO 13485 mukaisesti. Liko on ympäristösertifioitu standardin ISO 14001 mukaisesti.

Huomautus käyttäjille ja/tai avustettaville EU:ssa

Kaikki laitteeseen liittyvät vakavat vaaratilanteet on ilmoitettava valmistajalle ja käyttäjän ja/tai avustettavan asuinmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Symbolien kuvaus

Tässä asiakirjassa ja/tai tuotteessa voidaan käyttää seuraavia symboleja.

Symboli	Kuvaus	Symboli	Kuvaus
	Varoitus: tämä tilanne edellyttää erityistä varovaisuutta ja huomiota. Symboli on keltainen kolmio, jossa on musta reunus ja musta huutomerkki keskellä.		
	Kierrätettävä		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä: symboli on sininen ympyrä, jonka sisällä on valkoinen piirros henkilöstä lukemassa kirjaa.		
	Lue käyttöohje ennen käyttöä		Huomio! Tutustu käyttöohjeeseen.
	CE-merkintä: merkintä Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin vaatimustenmukaisuudesta, luokan I lääkinnällinen laite		
	Valtuutettu edustaja Sveitsissä		
	Laillinen valmistaja		Valmistuspäivämäärä
	Tuotetunniste		Lääkinnällinen laite
	Sarjanumero		Yksilöllinen laitetunniste
	Kemiallinen pesu kielletty		Ripusta kuivumaan varjoon
	Silitys kielletty		Valkaisu kielletty
	Rumpukuivaus		Älä pese
	Rumpukuivaus kielletty		
	Pesu Symbolin yhteydessä näkyy aina suositeltu pesulämpötila (°C ja °F).		
	Lateksiton		
	Määräaikaistarkastus		
	Älä käytä tuotetta. (Vain Solo-tuotteissa. Tulee näkyviin vain pesun jälkeen, kun käyttö on kiellettyä.)		Avustettavan nimi
	Yhden avustettavan käyttöön (vain Solo-tuotteet)		
	Suunta ylöspäin; välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli		Välineen ulkopinnalla esiintyvä symboli
	GS1 Data Matrix -viivakoodi, joka voi sisältää seuraavia tietoja: (01) kansainvälinen tuotenumero (11) valmistuspäivä (21) sarjanumero		

Hoito ja tarkastus

Tarkista nostokangas ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista seuraavat osat kulumisen ja vaurioiden varalta:

- Kangas
- Hihnat
- Saumat
- Ripustuslenkit

⚠ **Älä käytä vahingoittuneita nostovälineitä.**

Epäselvissä tilanteissa on otettava yhteys valmistajaan tai maahantuojaan.

Pesu- ja desinfiointiohjeet:

Katso nostokankaan tuotelappu ja mukana oleva liite ”Liko-nostokankaiden hoito ja kunnossapito”.

Materiaali:

Soft Original HighBack -nostokangas on valmistettu polyesteristä.

Määräaikaistarkastus

Tuote on tarkastettava vähintään kuuden kuukauden välein. Jos tuotetta käytetään tai pestään normaalia enemmän, tarkastus on tehtävä tätäkin useammin. Katso **Likon** käytäntö ohjeesta ”Liko-tekstiilituotteiden määräaikaistarkastus”. Lisätietoa käytännöistä saat Hillromin edustajalta.

Odotettu käyttöikä

Tuotteen odotettu käyttöikä on normaalikäytössä 5 vuotta. Käyttöikään vaikuttavat kangas, käyttötiheys, pesumenetelmä ja kuormien paino. Hillrom suosittelee tuotteen käyttämistä vain sen odotetun käyttöiän ajan.


Kierrätysohjeet


Koko tuote, mukaan lukien säleet, pehmusteet jne., on lajiteltava poltettaviin jätteisiin.

Hillrom opastaa käyttäjiä laitteiden turvallisessa käsittelyssä ja hävittämisessä auttaakseen ehkäisemään muun muassa viiltoja, pistohaavoja, hiertymiä ja muita vammoja. Lisäksi se opastaa käyttäjiä lääkinällisten laitteiden puhdistamisessa ja desinfiomisessa käytön jälkeen ja ennen hävittämistä. Asiakkaiden on noudatettava kaikkia lääkinällisten laitteiden ja lisävarusteiden turvalliseen hävittämiseen liittyviä kansallisia, alueellisia ja/tai paikallisia lakeja ja asetuksia.







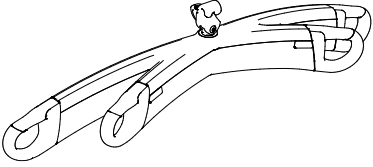
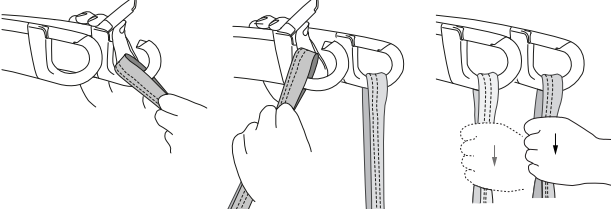
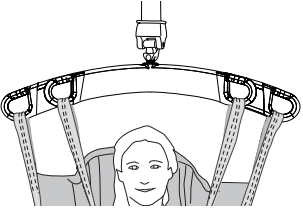
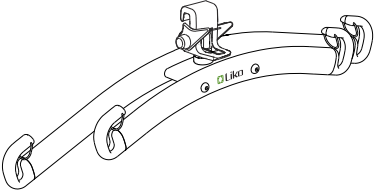
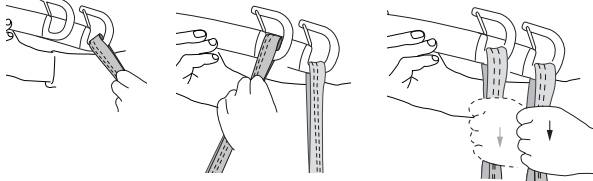
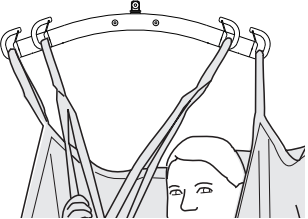
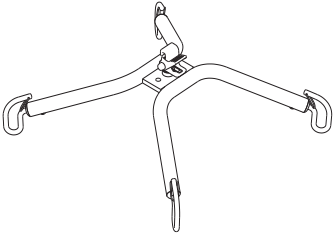
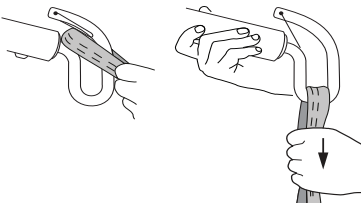
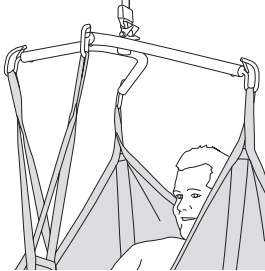
Epäselvissä tapauksissa laitteen käyttäjän on ensin otettava yhteyttä Hillromin tekniseen tukeen ja pyydyttävä ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Määritelmät

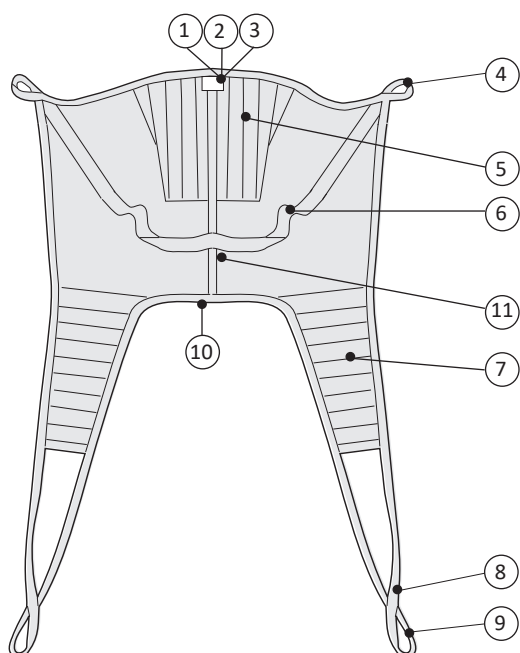


1. Tuotelappuun sisältyy:
Valmistusvuosi ja -kuukausi ()
Sarjanumero (**SN**)
2. Lappu: Yksilöllinen merkintä (Avustettava)
3. Lappu: Määräaikaistarkastus
4. Ylempi hihnalenkki
5. Pehmeä päätuki ja säleet
6. Kädensija
7. Jalkatuki
8. Lyhennysasento
9. Jalkatuen lenkki
10. Alareuna
11. Keskisaumanauha ja koon ilmoittava väri:
(S = oranssi, MS = harmaa, M = keltainen, L = sininen, XL = musta)


Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin

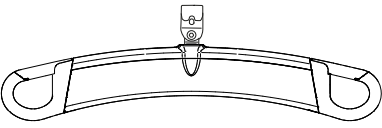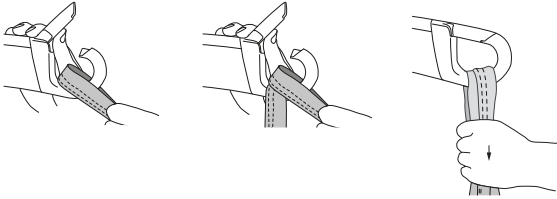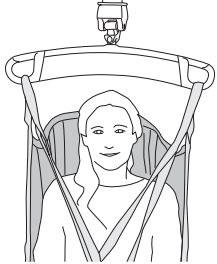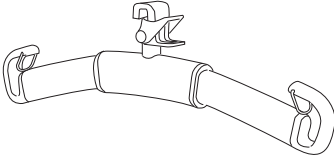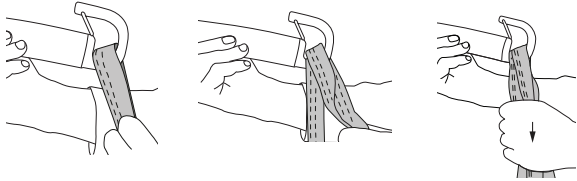Nostokaari	Nostokankaan lenkit nostokaaren koukkuihin	Oikein
 <p data-bbox="284 501 421 533">SlingGuard</p>		
 <p data-bbox="293 792 411 824">Universal</p>		
 <p data-bbox="252 1079 453 1111">SlingGuard Twin</p>		
 <p data-bbox="261 1375 443 1406">Universal Twin</p>		
 <p data-bbox="293 1675 411 1706">Cross-Bar</p>		

Väärin!

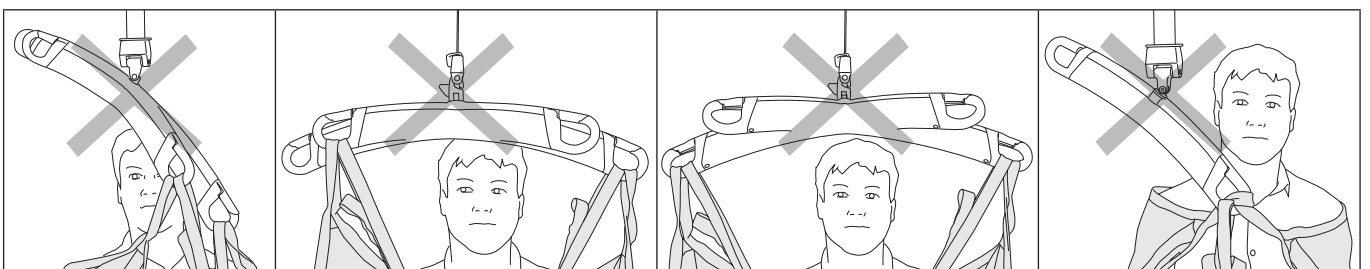

Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret [Twin] ja ristikkonostokaaret [Cross])

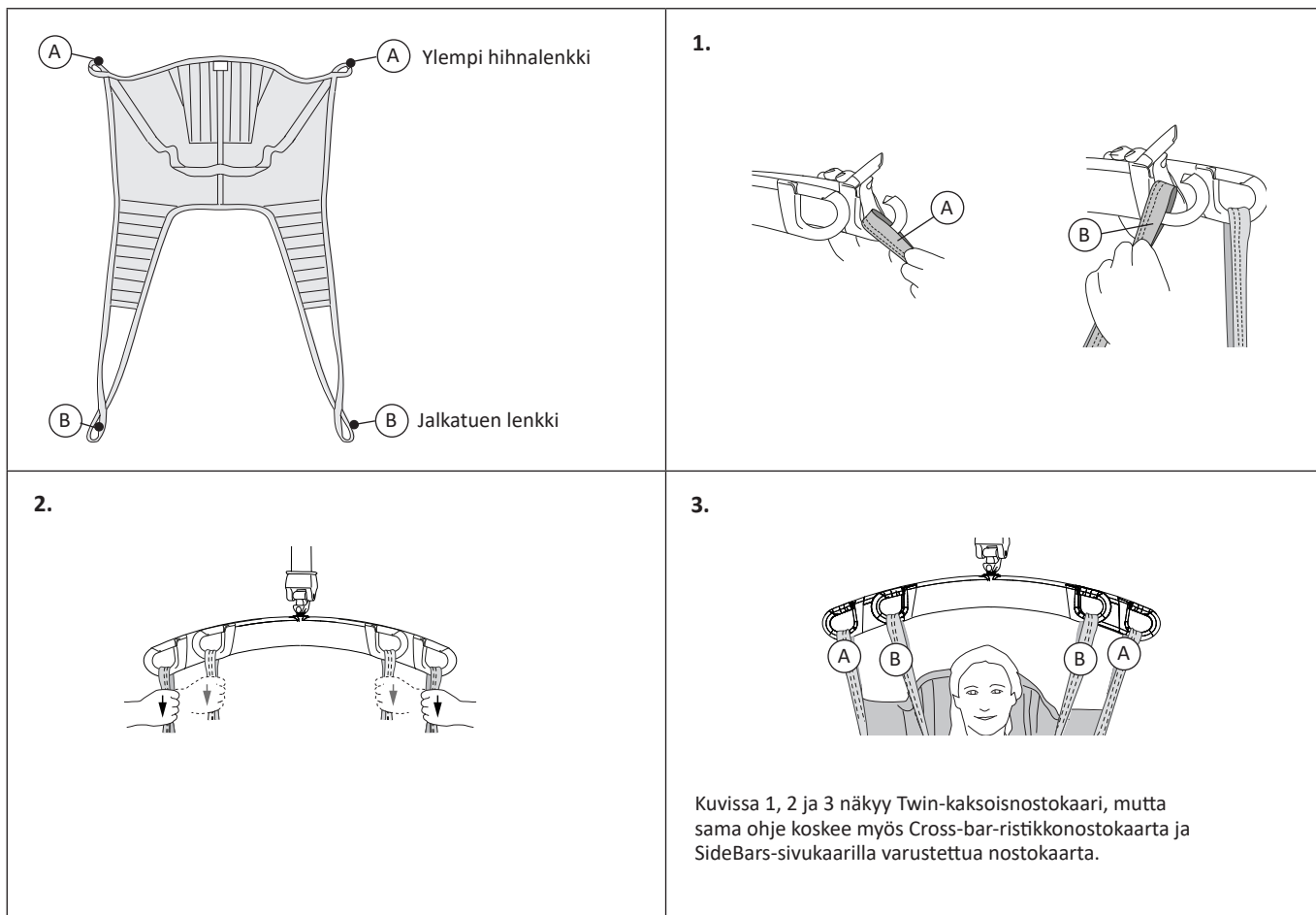

Nostokankaan koon valitseminen


⚠ Käytä vain nostokangasta, joka on avustettavalle sopivan kokoinen. Koulutetun avustajan on arvioitava oikea koko. Muuten vaarana voi olla avustettavan puristuminen tai tukehtuminen.

Avustettavan lantion ja nostokankaan lantiokohdan leveyden mittaaminen auttaa nostokankaan koon valinnassa. Vertaa avustettavasta otettua mitta (katso mittausohje) ja nostokankaan mitta (katso mittataulukko tai mittausohje).

Oikean koon valitseminen:

Valitse nostokangas, jonka lantiokohdan leveysmitta on +/- 8 cm avustettavan lantion leveydestä.

Mittaa avustettavan lantion leveys seuraavasti:

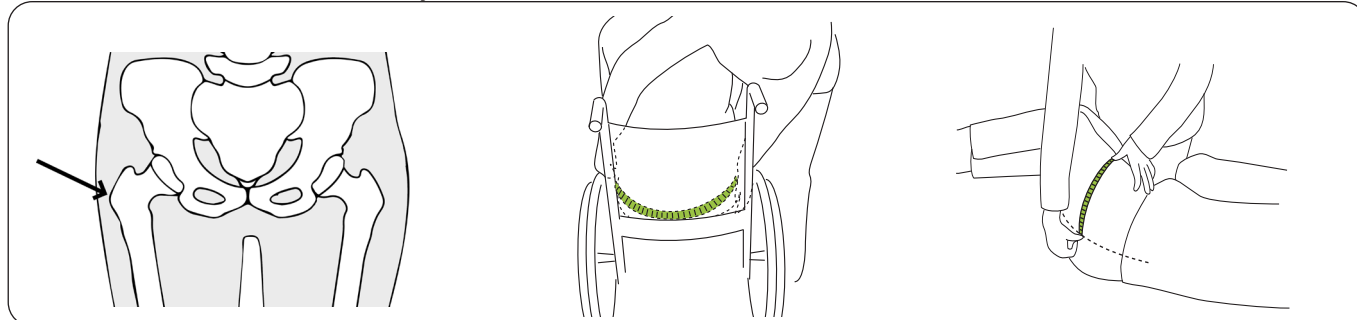


Sarvennoinen: Sarvennoinen on reisiluun hyvin tuntuva uloke avustettavan lantiossa. Sarvennoisen löytää mittausta varten kevyesti painamalla.

Vaihtoehto A. Avustettavan nojatessa eteenpäin mittaa lantion leveys leveimmästä kohdasta eli sarvennoisten välistä.

Vaihtoehto B. Avustettavan ollessa kyljellään mittaa sarvennoisen ja selkärangan keskiviivan välinen etäisyys ja kerro se kahdella.

Katso nostokankaan lantiokohdan leveys kohdasta "Mitat" seuraavasti:

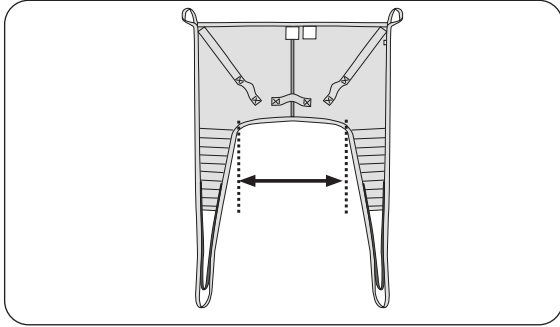


Lantion leveyden mitat

Nostokankaan koko	Lantion leveys
MS	39
M*	46
L*	58
XL*	60
XXL*	96

* on taitettu alareunasta.
Kaikki mitat ovat senttimetreinä.

Mitat

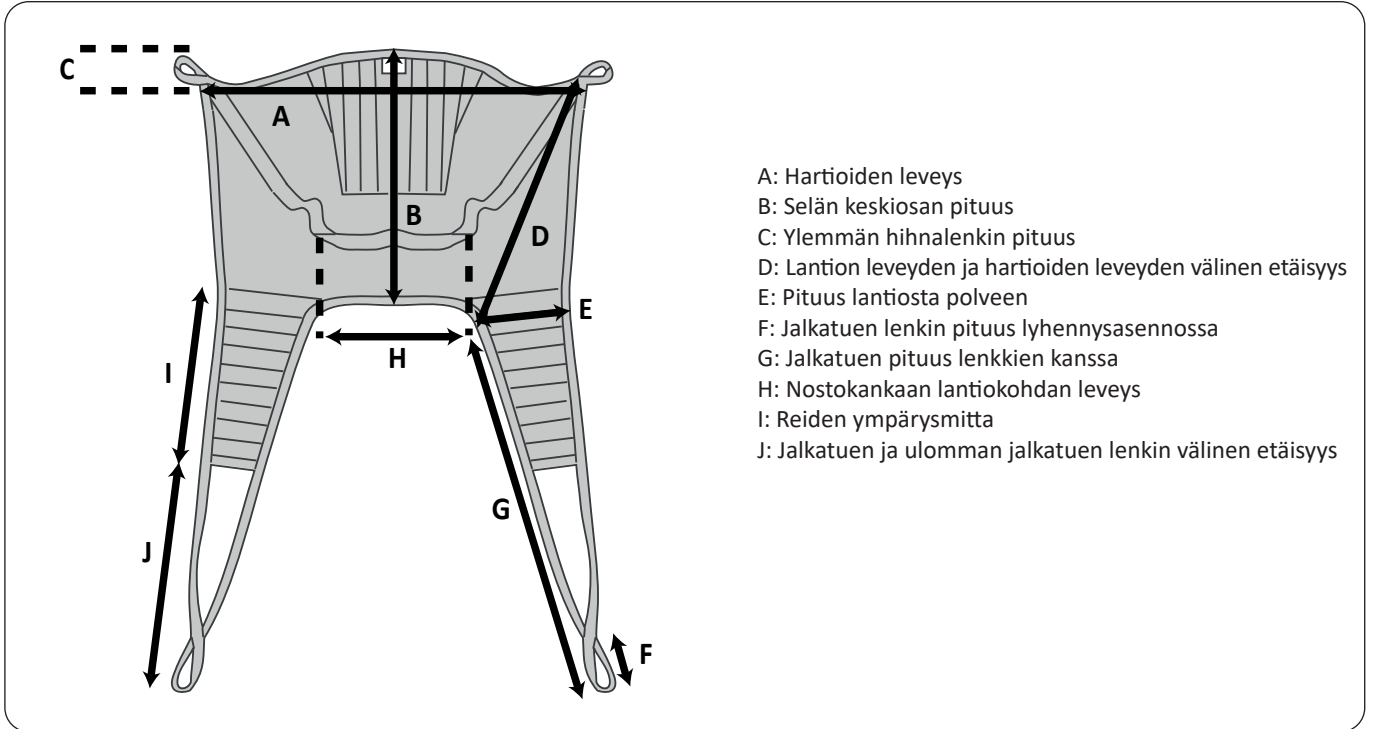

Mitat senttimetreinä


KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Enimmäiskuormitus (kg)	Tuotenro
MS	105	90	13	82	25	14	99	39	46	61	200	3526111
M	114	91	14	83	26	14	100	45	52	56	200	3526115
L	117	99	14	86	27	14	103	58	53	55	200	3526116
XL	112	100	14	87	27	-	102	60	51	57	500	3526117
XXL	127	101	12	91	31	-	112	96	59	53	500	3526118

Mitat tuumina

KOKO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Enimmäiskuormitus (lb)	Tuotenro
MS	41	36	5	32	10	5	39	16	18	24	440	3526111
M	45	36	5	33	10	6	39	18	21	22	440	3526115
L	46	39	6	34	11	6	40	23	21	22	440	3526116
XL	44	39	5	34	11	-	40	24	20	22	1 100	3526117
XXL	50	40	5	36	12	-	44	38	23	21	1 100	3526118

Nostaminen istuma-asennosta

Nostokankaan asettamiseen ergonomiohjeiden mukaisesti tarvitaan kaksi avustajaa. Yleensä avustettavaa kallistetaan hieman eteenpäin, jolloin on tärkeää, että avustaja seisoo avustettavan edessä, jotta tämä ei kaadu eteenpäin.

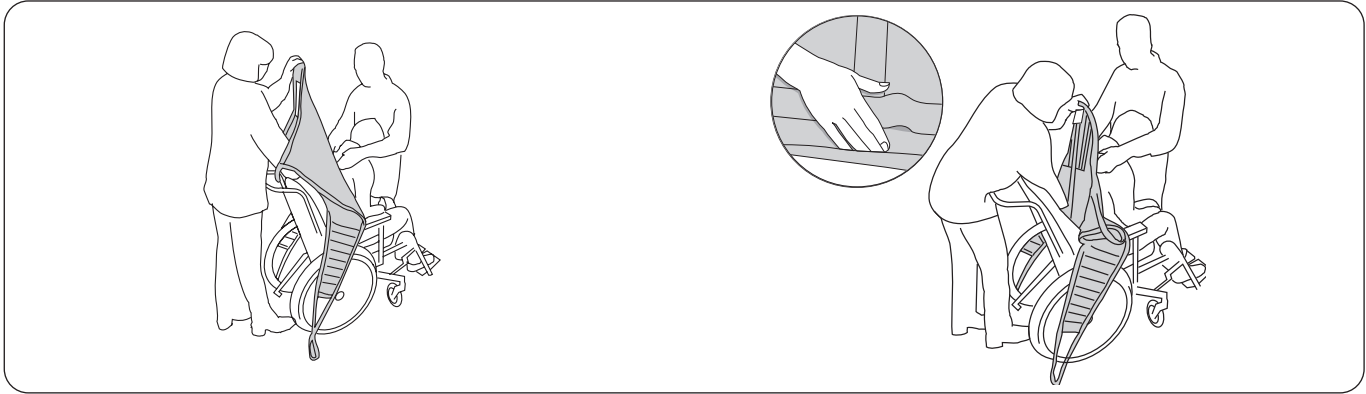

Aseta nostokangas avustettavan selän taakse siten, että tuotelappu osoittaa ulospäin. Taita nostokankaan alareuna sormenpäiden ympäri ja ohjaa nostokangas paikalleen.

Paina kämmenellä nostokankaan alareuna avustettavan häntäluun tasolle. **Tämä on erittäin tärkeää.**


Vinkki: nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettavaa kallistetaan hieman eteenpäin.



Vedä nostokankaan jalkatuet sivuilta eteen avustettavan reisien viereen. Aseta kämmen avustettavan vartalon ja nostokankaan väliin ja paina jalkatuen alareunaa alas istuinta kohti. Venytä samalla jalkatukea vetämällä sitä toisella kädellä eteenpäin.


Suorista mahdolliset rypyt takaa vetämällä jalkatukia eteen. Tarkista, että molemmat jalkatuet ulottuvat yhtä pitkälle eteen.

Vinkki: jalkatuki on helpompi vetää eteen, kun painat kevyesti avustettavan säärtä.

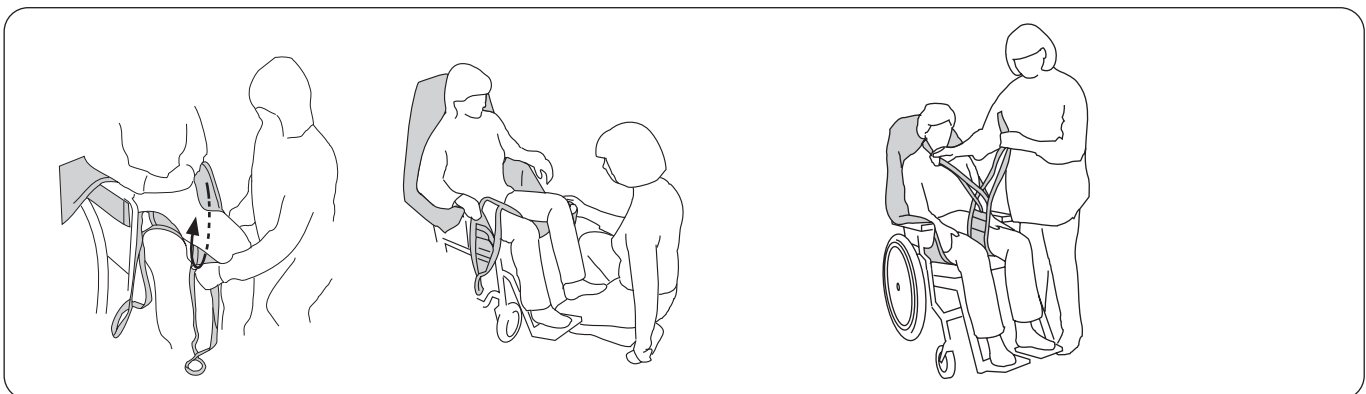

Aseta jalkatuet reisien alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. **Vinkki:** Jalkatukien asettamista helpottaa, jos avustettavan jalkoja nostetaan hieman irti istuimesta. Se onnistuu asettamalla avustettavan jalat tuolin jalkalevyille tai oman reitesä päälle kuvan mukaisesti.

Valmistele jalkatukien kiinnitys. Yleisin tapa kiinnittää jalkatuet on asettaa ne ristikkäin. Katso vaihtoehtoiset kiinnitystavat kohdasta "Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen" sivulla 13.

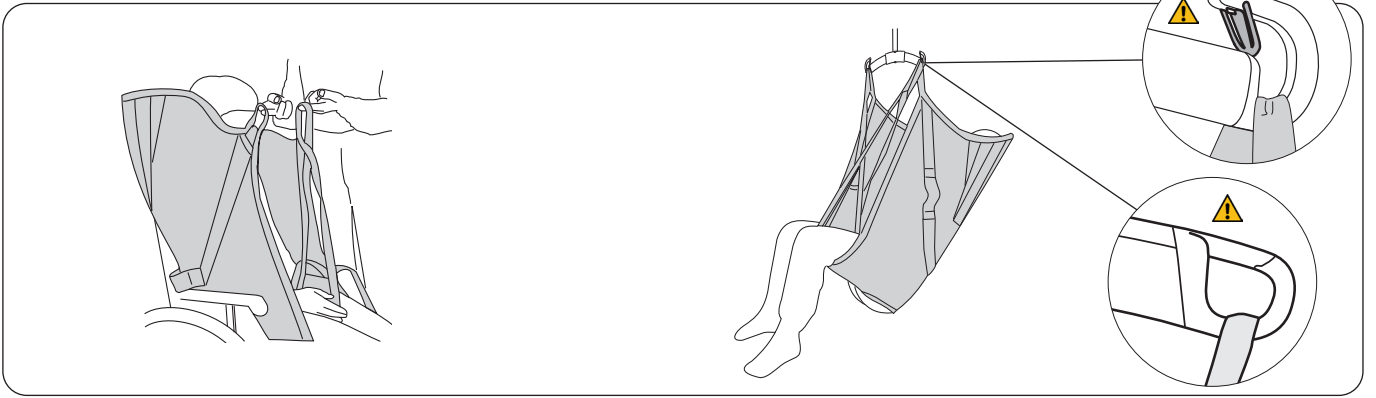


Vinkki: Tarkista, että kaikki ripustuslenkit ovat samalla korkeudella, kun niitä venytetään ennen nostamista. Säädä nostokankaan asentoa, jos ripustuslenkit eivät ole samalla korkeudella.

Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso kohdista "Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin" sivulla 5 ja "Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret [Twin] ja ristikkonostokaaret [Cross])" sivulla 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.

Nostaminen istuma-asentoon

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin, tuoliin tai WC-istuimelle, on tärkeää, että hänet saadaan istumaan mahdollisimman taakse mukavasti ja tukevasti. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavalla.

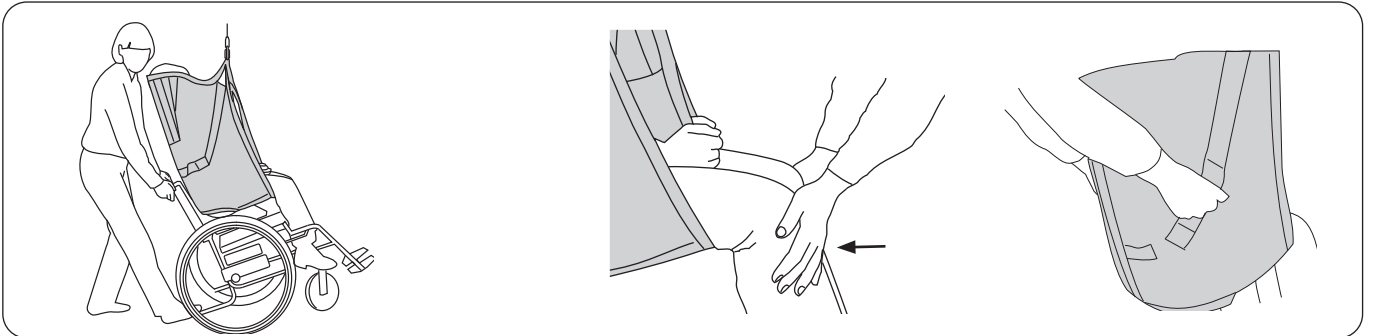

Kun avustettava asetetaan pyörätuoliin:
Kallista tuolia taaksepäin avustettavan alas laskemisen aikana. Anna avustettavan pakaroiden liukua loppuksi alas selkänojaan saakka. Säädä pyörätuolin kallistuskulmaa pitämällä jalkaasi kaatumistuen päällä.


Kun avustettava asetetaan tuoliin tai WC-istuimelle (vaihtoehtoinen menetelmä pyörätuolille): Alas laskemisen aikana työnnä avustettavaa hellävaraisesti polvien alta niin, että pakarat asettuvat tuolin selkänojaa vasten tai oikeaan kohtaan WC-istuimella.

Jos nostokankaassa on kädensijat, niitä voi käyttää ohjaimina.

⚠ Älä käytä kädensijoja nostamiseen! Liian suuri kädensijoihin kohdistuva voima voi aiheuttaa nostokankaan repeytymisen.

Nostokankaan poistaminen tuolista/pyörätuolista/WC-istuimesta

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos on tarkoituksenmukaista jättää nostokangas tuoliin siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210, joka on valmistettu verkkopolyesteristä. Älä jätä nostokangasta paikalleen, kun avustettava siirretään WC-istuimelle.

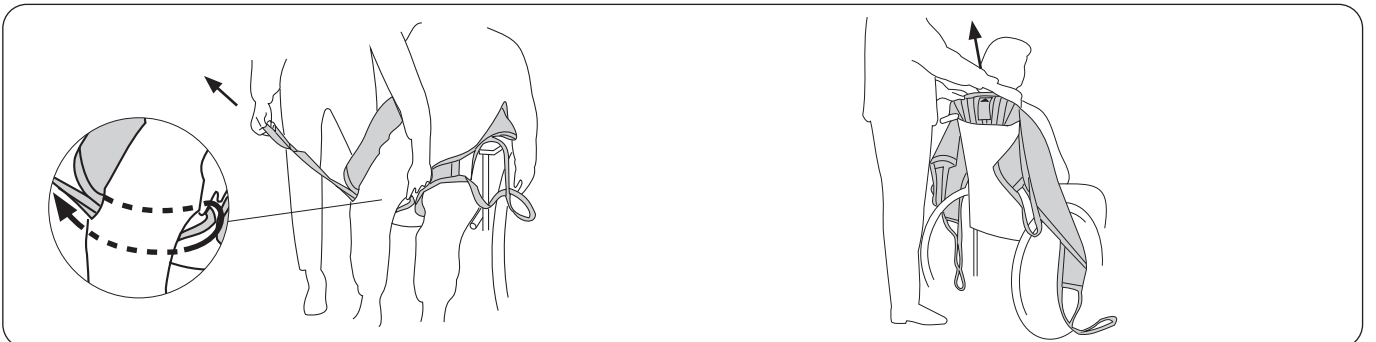


Poista jalkatuki varovasti. Hellävaraisinta on vetää jalkatuen lenkit pois jalkatuen kangasosan alta.

Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

Nostaminen sängystä

Nostokangas suositellaan asetettavaksi paikalleen, kun avustettava makaa vaakasuorassa, koska tällöin se on helpointa. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos avustettavan ei ole mahdollista maata vaakasuorassa, nostokangas voidaan asettaa avustettavan istuessa sängyllä (katso alla oleva kohta **Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä**).

Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.

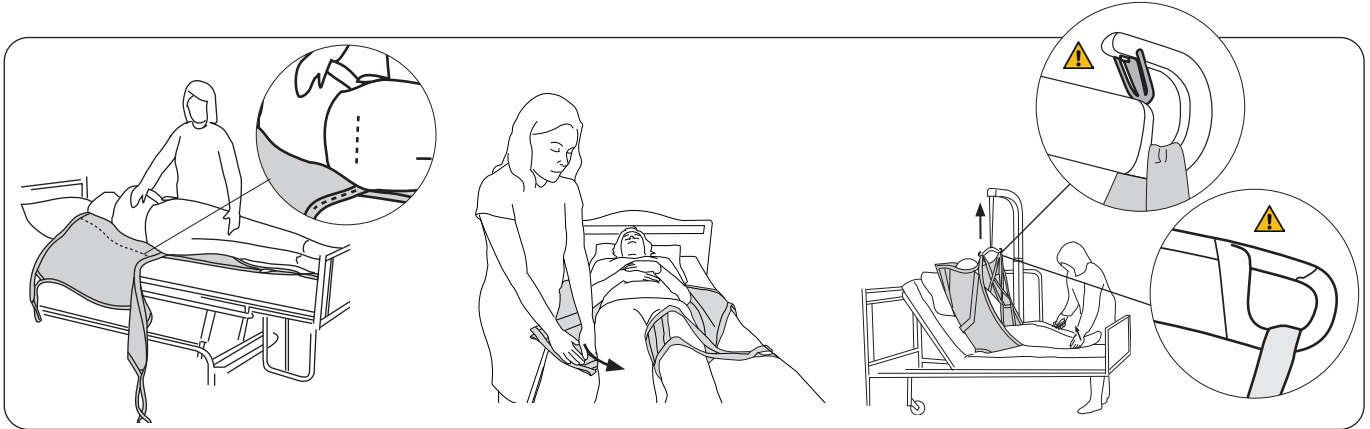

Käännä avustettava itseäsi kohti, jotta hän ei pääse putoamaan sängystä. Aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. Taita nostokangas siten, että keskiselkähihna on avustettavan selkärangan kohdalla, kun hänet käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Aseta jalkatuet jalkojen alle. Se tapahtuu helpoimmin painamalla jalkatukea patjaa vasten ja asettamalla se samanaikaisesti avustettavan reiden alle. Varmista, että kangas on suorassa ja tukee jalkaa kunnolla. Jalkatuet voidaan kiinnittää eri tavoilla, katso ”Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen” sivulla 13.

Korota sänkyä pään puolelta. Kiinnitä ensin ylemmät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso kohdista ”Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin” sivulla 5 ja ”Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuihin nostokaareen (kaksoisnostokaaret [Twin] ja ristikkonostokaaret [Cross])” sivulla 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Nosta avustettava.


Nostokankaan vaihtoehtoinen käyttömenetelmä: Nosta sänkyä avustettavan pään puolelta. Aseta nostokangas sängyn päälle tuotelappu alaspäin patjaa vasten. Ohjaa nostokangas alas avustettavan selän taakse siten, että alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. **Vinkki!** Nostokankaan asettamista helpottaa, jos avustettavaa kallistetaan eteenpäin.

Nostaminen sänkyyn

Nostokankaan poistaminen siirron jälkeen on suositeltavaa. Jos on tarkoituksenmukaista jättää nostokangas sänkyyn siirron jälkeen, on suositeltavaa käyttää Original HighBack Sling -nostokangasmallia 200/210, joka on valmistettu verkkopolyesteristä.

Ota huomioon oma työasentosi ja avustettavan mukavuus. Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.

Nostokankaan poistaminen istuma-asennossa sängyssä

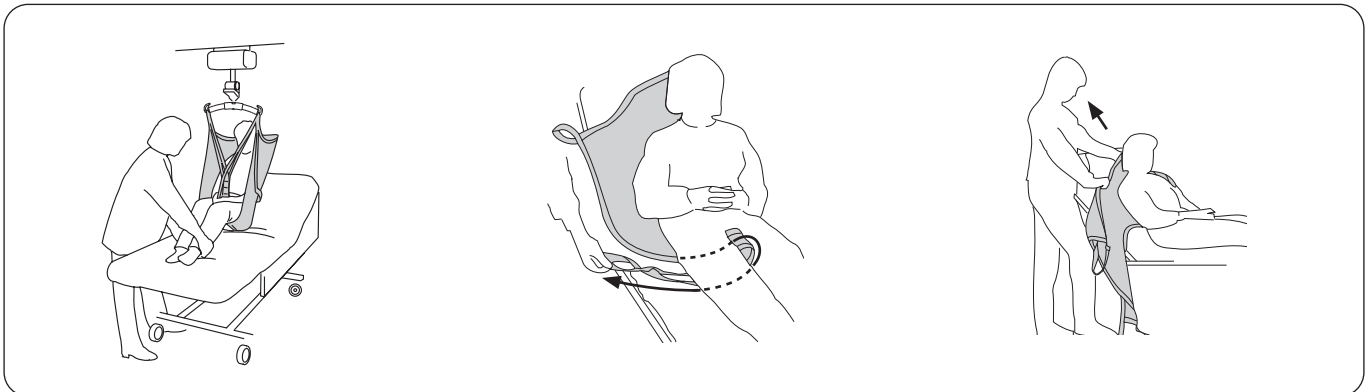


Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle.

Poista jalkatuet vetämällä jalkatukien lenkit jalkatuen kangasosan alta. **Vinkki:** tämä on helpompaa, jos avustettavan jalat ovat koukussa.


Poista nostokangas vetämällä varovasti ylöspäin.

Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä tai lattialla

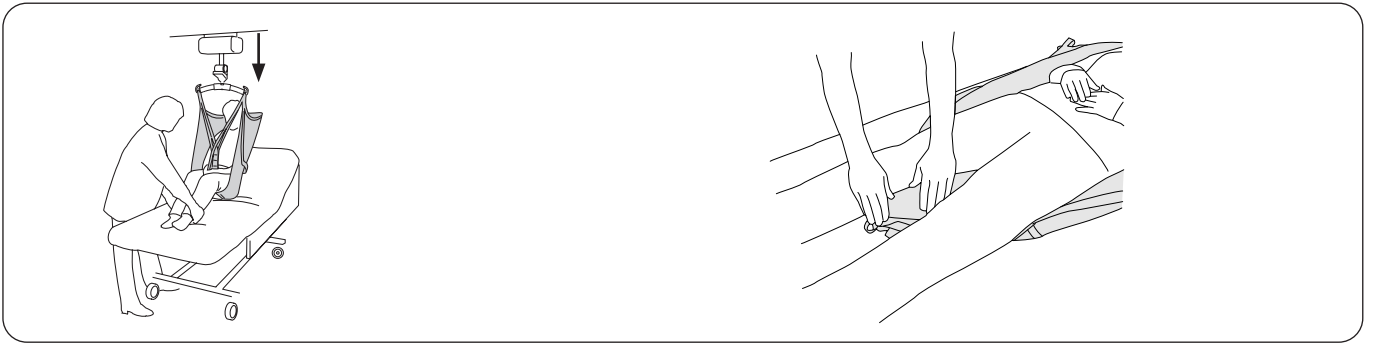

Aseta avustettava sängyn yläpuolelle. Nosta sängyn pääpuolta ylöspäin, jotta avustettavan on mukavampi olla. Laske avustettava sängylle. Laske sängyn pääpuoli alas.

Aseta jalkatukien lenkit jalkatukien alle avustettavan jalkojen väliin.

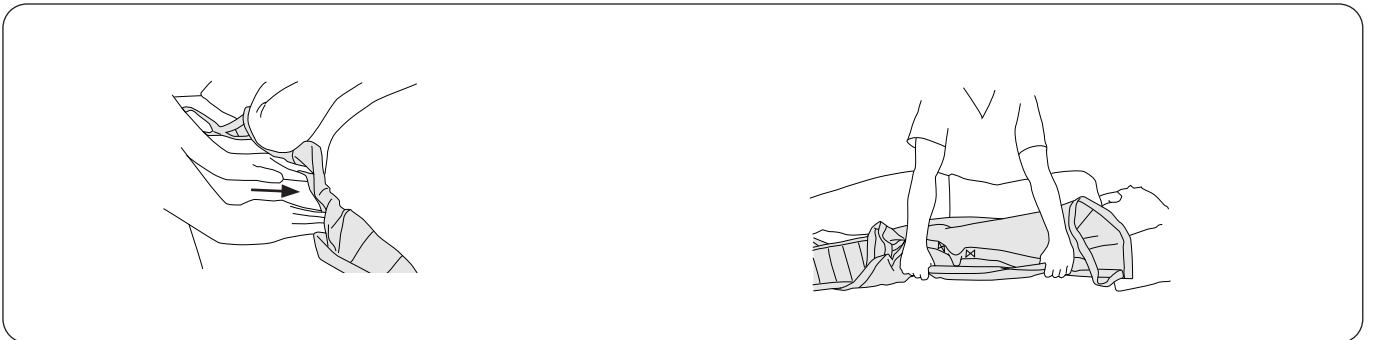


Ota kiinni nostokankaan reunasta. Työnnä nostokankaan reuna kankaan alle. Paina nostokangasta patjaa vasten ja avustettavan alle.

Käännä avustettava varovasti kyljelleen. Ota nostokankaasta kiinni alakautta ja vedä se varovasti pois.

Nostaminen lattialta


Seuraavassa kuvataan nostamista lattialta liikuteltavalla **Golvo**-nostimella. Sama menetelmä soveltuu nostamiseen myös muilla **Likon** liikuteltavilla ja kiinteillä nostimilla. Lue käytettävän nostimen käyttöohje.

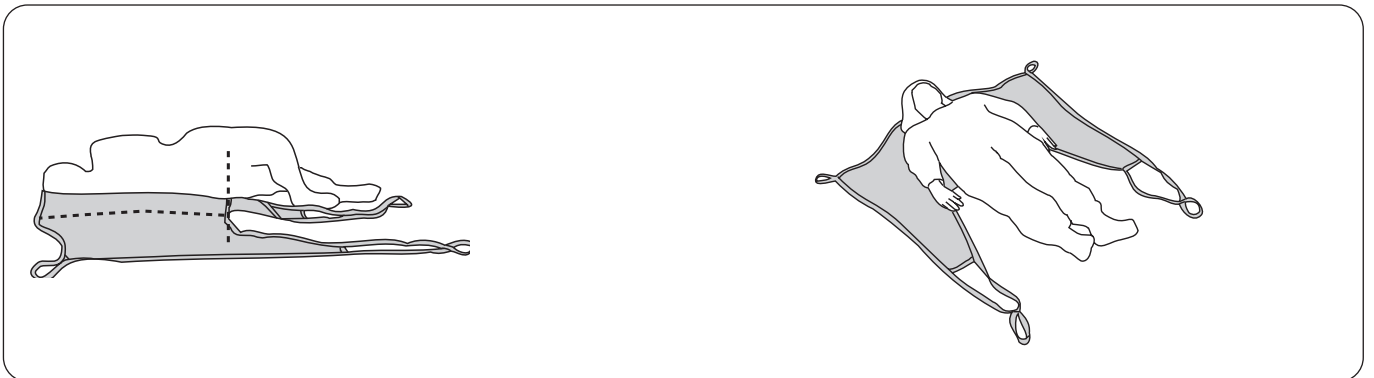

Käännä avustettava varovasti kyljelleen ja aseta nostokankaan reuna avustettavan alle siten, että kankaan alareuna on **samalla tasolla häntäluun kanssa**. Taita nostokangas siten, että sen keskisaumanauha on avustettavan selkärangan kohdalla, kun avustettava käännetään varovasti takaisin selinmakuulle. Vedä nostokangas varovasti esiin toiselta puolelta.

Tarkista, että nostokangas on symmetrisesti avustettavan alla, ja korjaa asentoa tarvittaessa. Aseta jalkatuet jalkojen alle.



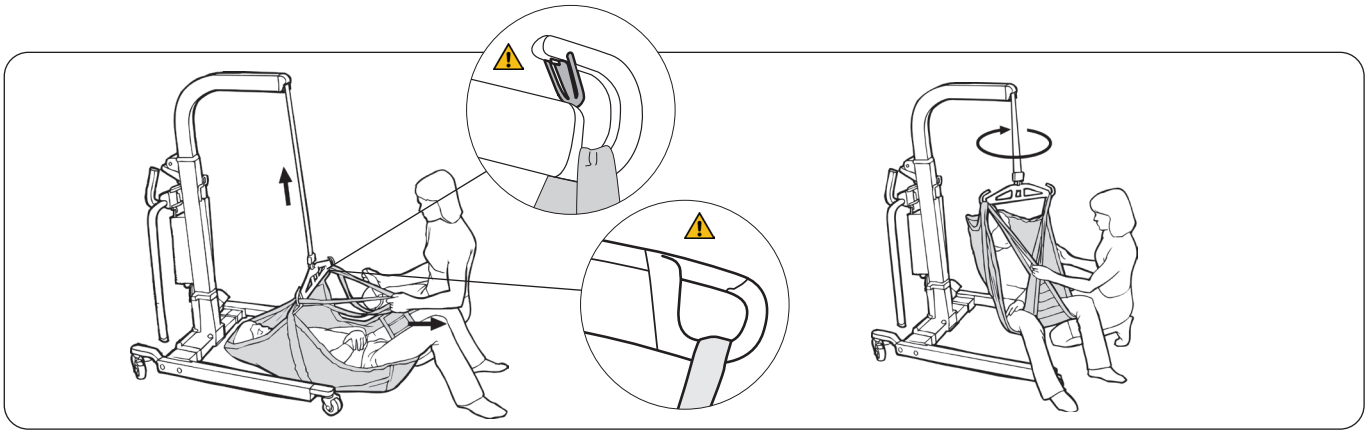


Suorista jalkatuet avustettavan jalkojen alla. Kiinnitä ensin ylempät hihnalenkit nostokaareen ja kiinnitä sitten jalkatukien lenkit. Katso kohdista ”Nostokankaan kiinnittäminen eri nostokaariin” sivulla 5 ja ”Soft Original HighBack Sling -nostokankaan kiinnittäminen nelikoukkuiseen nostokaareen (kaksoisnostokaaret [Twin] ja ristikkonostokaaret [Cross])” sivulla 6 ohjeet nostokankaan lenkkien kiinnittämiseen eri nostokaariin. Varmista, etteivät jalkatuet osu nivusiin, jotta avustettava on mukava olla. Tämä on helpompaa, jos avustettavan jalat ovat koukussa tai tuettuina.

Nosta avustettava lattialta. Avustettavaa voi kääntää hieman, jotta hänen päänsä ei ole liian lähellä nostopylvästä.

⚠ Liikuteltava nostin on lukittava, kun avustettavaa nostetaan niin, että hänen päänsä on nostinta vasten.


Nostaminen lattialle

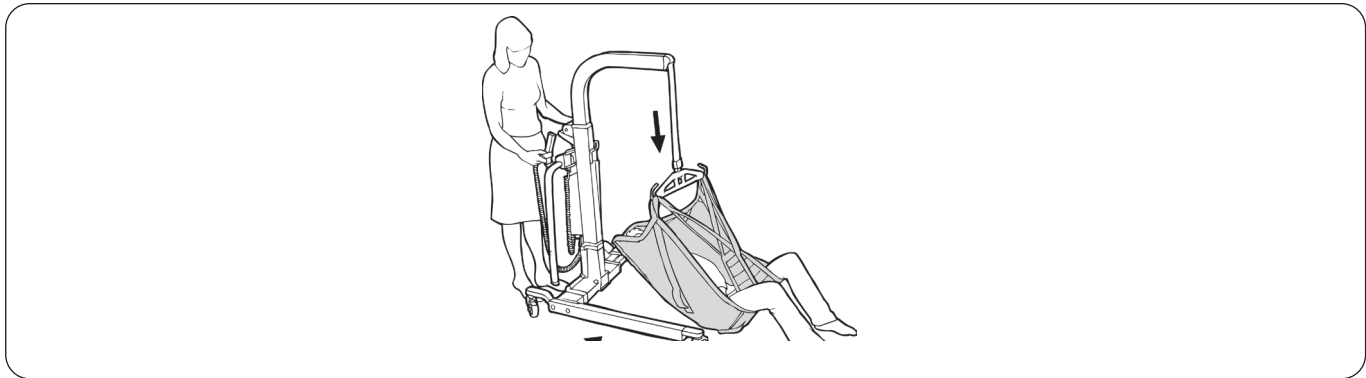

Nostettaessa lattialle nostimen pyörät eivät saa olla lukittuina. Kun avustettava koskettaa lattiaa, nostinta vedetään taaksepäin, jotta avustettavan pää ei osu mihinkään. **Vinkki:** Jos avustettava nostetaan ohuelle jumbamatolle, nostimen voi työntää maton alle, jolloin matto toimii pehmusteena nostimen ja avustettavan välissä. Jos nostokangas on tarpeen poistaa, katso ”Nostokankaan poistaminen makuuasennossa sängyssä tai lattialla” sivulla 11.

Kiinnitysohje

Erilaisia istuma-asentoja

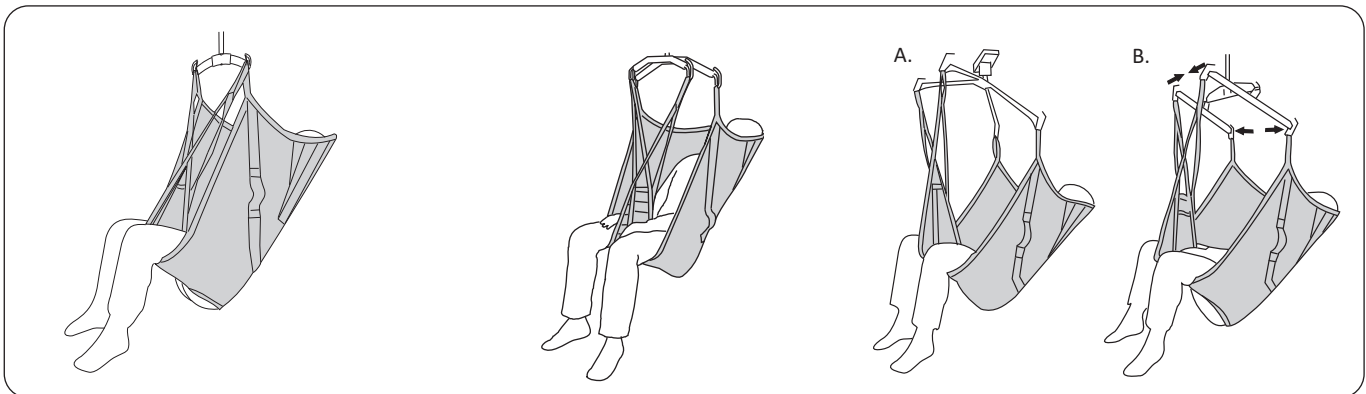

Kaksipisteisellä ripustuksella kiinnitettävässä Soft Original HighBack Sling -nostokankaassa avustettava istuu hieman takakenossa ja kangas tukee päätä erinomaisesti. Lonkkanivel on noin 90 asteen kulmassa.


Soft Original HighBack Sling -nostokankaan ja **Twin 670** -kaksoisnostokaaren yhdistelmässä nostokangas on väljempi hartioiden kohdalta kuin jalkatukien kohdalta, minkä vuoksi se soveltuu kookkaille avustettaville tai avustettaville, jotka ovat herkkiä hartioihin kohdistuvalle paineelle.

A. Kun nostokangasta käytetään yhdessä **Liko Cross-bar** -ristikkonostokaaren kanssa, avustettava on hieman enemmän takakenossa ja lonkkanivelen kulma on suurempi.

B. Kun nostokangasta käytetään yhdessä **SideBars**-sivukaarien kanssa, avustettava on hieman enemmän takakenossa ja nostokangas on väljempi hartioiden kohdalta kuin jalkatukien kohdalta. Tämä yhdistelmä soveltuu avustettaville, jotka ovat herkkiä hartioihin kohdistuvalle paineelle.

Erilaisia tapoja jalkatukien kiinnittämiseen

Ennen kiinnitystavan valintaa on aina arvioitava mahdolliset riskit yksilökohtaisesti.

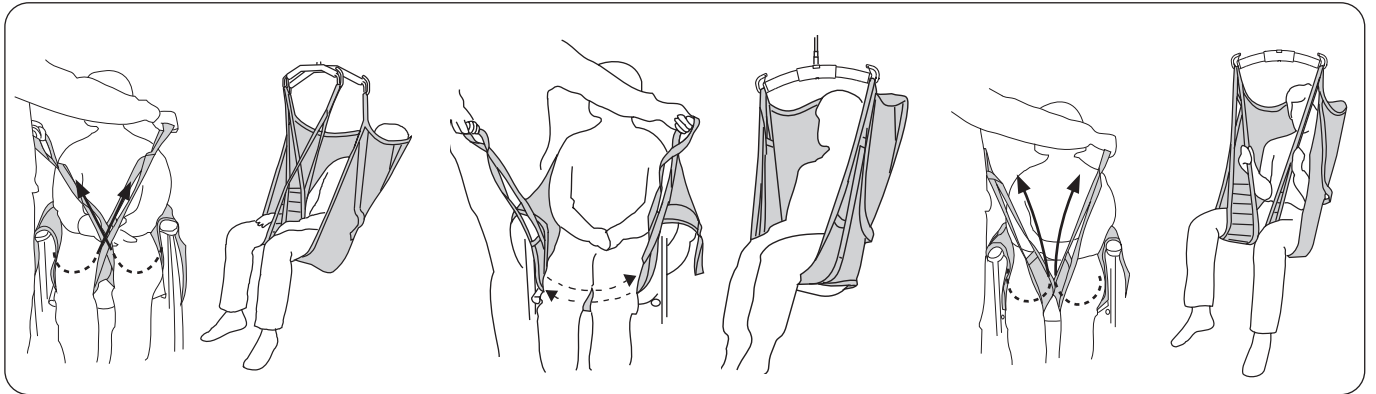

Jalkatuet ristikkäin.

Yleisin tapa asetella nostokangas. Yksi jalkatuen lenkki pujotetaan toisen läpi ennen lenkkien kiinnittämistä nostokaareen.

Kietaisu kummankin reiden alta.

Tämä on mahdollista esimerkiksi nostettaessa avustettavaa, jonka jalat on amputoitu.


Vinkki: liian takainen istuma-asento vältetään kiinnittämällä jalkatukien lenkkeihin Extension Loop -jatkolenkit.

Kumpikin jalkatuki kiinnitettynä erikseen nostokaareen.

Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, jos avustettava on erityisen herkkä genitaalialueelta.

⚠ Suurempi liukumisen riski.

Avustettava ei istu hyvin nostokankaassa – mistä se voisi johtua?

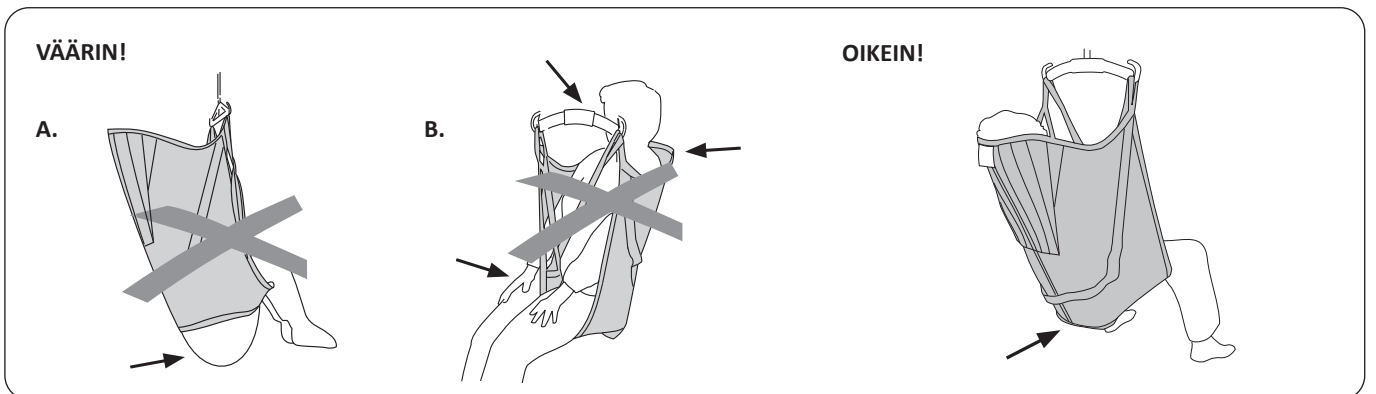

A. Liukumisen riski. Pakarat roikkuvat alhaalla. Nostokangas voi olla liian suuri. Syynä voi olla myös se, ettei nostokangasta ole vedetty riittävän alas avustettavan selkäpuolelta.

Tarkista ennen nostamista, että alareuna on suorassa ja kangas ulottuu kunnolla jalkojen ympäri.

B. Liian pieni nostokangas voi aiheuttaa sen, että jalkatuet hiertävät epämukavasti nivusista, nostokaari jää liian lähelle kasvoja ja/tai selkä ei saa riittävästi tukea.

Nostokankaan alareuna on samalla tasolla häntäluun kanssa. Jalkatuet on asetettu oikein jalkojen alle.


Lyhennysasento

Joissakin tapauksissa voi olla hyvä lyhentää jalkatukien lenkkejä, jotta avustettava saa tukevan istuma-asennon Soft Original HighBack Sling -nostokankaassa. Lyhennysasentoa voidaan käyttää tilapäisesti oikean pituuden löytämiseksi, mutta pitkittynyt käyttö voi vahingoittaa saumakohtia. Jos haluat lyhentää jalkatukien lenkkejä pitkäaikaista käyttöä varten, on suositeltavaa, että solmit lenkkiin solmun, jolloin se lyhenee noin 10 cm. Tässä tapauksessa ulompi jalkatuen lenkki kiinnitetään nostokaareen.

Lisävarusteet

Extension Loop, vihreä, 12 cm
 Extension Loop, vihreä, 22 cm
 Extension Loop, harmaa, 12 cm
 Extension Loop, harmaa, 22 cm

Tuotenro 3691102
 Tuotenro 3691103
 Tuotenro 3691302
 Tuotenro 3691303

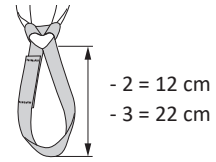

Yleiskatsaus – LIKO Soft Original HighBack Sling -nostokangas, malli 26

Tuote	Tuotenro	Koko		Avustettavan paino ¹	Enimmäiskuormitus ²
Soft Original HighBack Sling	3526111	MS	Keskikoinen kapea (hoikka aikuinen)	30–50 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526115	M	Keskikokoinen	40–80 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526116	L	Suuri	70–120 kg	200 kg
Soft Original HighBack Sling	3526117	XL	Erittäin suuri	110–250 kg	500 kg
Soft Original HighBack Sling	3526118	XXL	Suurin	200–500 kg	500 kg

¹ Ilmoitetut avustettavien painot ovat suuntaa antavia. Eroja voi esiintyä.

² Enimmäiskuormituksen toteutumisen edellytyksenä on, että nostin/lisävarusteet kestävät vähintään saman suuruisen kuormituksen.

Suosittelut käyttöyhdistelmät

Suosittelut LIKO Soft Original HighBack Sling -nostokankaiden ja LIKON nostokaarien yhdistelmät:	Mini 220	Universal SlingBar 350	Standard 450	SlingGuard 450	Universal SlingBar 450	Universal SlingBar 600	Universal TwinBar 670	SlingGuard 670 Twin	Sling Cross-bar 450	Sling Cross-bar 670	Univ. SideBars + Universal 350	Univ. SideBars + Universal 450
Soft Original HighBack Sling, MS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft Original HighBack Sling, M	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft Original HighBack Sling, L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft Original HighBack Sling, XL*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soft Original HighBack Sling, XXL*				✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓

*Käytä XL- ja XXL-kokoja Ultra-nostojärjestelmän kanssa. Katso Ultra-nostojärjestelmän käyttöohje (7**111103).

Selitys: ✓ = suositeltava

Vaikka tämä taulukko toimii ohjenuorana, on tärkeää huomioida, että jotkin nostokankaan ja nostokaaren yhdistelmät eivät välttämättä sovellu käytettäväksi tietyissä olosuhteissa. Koulutetun terveydenhuollon ammattilaisen on aina arvioitava ja hyväksyttävä taulukossa esitetyt yhdistelmät.

Muut yhdistelmät

⚠ Käyttö yhdistelmänä muiden kuin Likon suosittelemien lisävarusteiden tai tuotteiden kanssa voi vaarantaa avustettavan turvallisuuden. Muuten seurauksena voi olla henkilövahinko.

Golvo, Hillrom, Liko, LikoGuard, Likorall, Multirall, Uno ja Viking ovat Baxter International Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



www.hillrom.com

Liko AB
 Nedre vägen 100
 975 92 Luleå, Sweden
 +46 (0)920 474 700

Liko AB is a subsidiary of Hillrom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

