


Likorall

Kattonostin


242/243/250

Pikakäyttöopas


Suomi

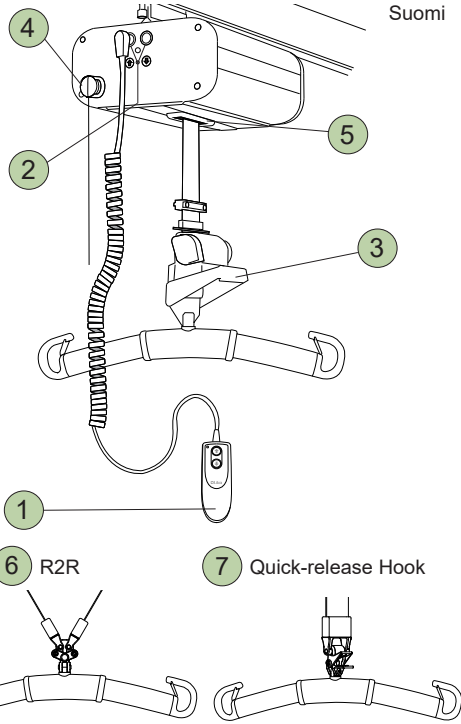


1 Käsiohjain

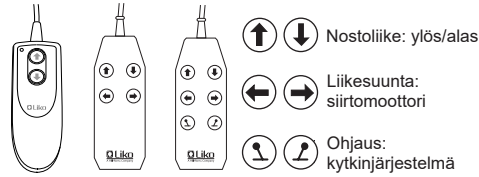

IR-käsiohjain:

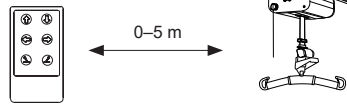


2 Laskeminen/nostaminen hätätilanteessa (sähköinen)

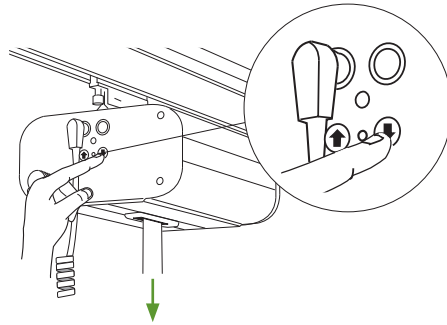

3 Mekaaninen varalasku

Vain: 242 S, ES

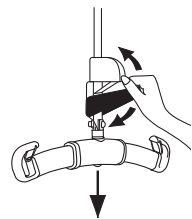

Aktivointi:

Paina varalaskukahvaa toistuvasti alaspäin.


Uudelleenasetus:

Poista kuorma nostohihnasta. Pidä varalaskukahvaa painettuna puoliväliin asti ja käännä mustaa nuppia samalla myötäpäivään.


4 Häätäpysäytin

Aktivointi:


Vaihtoehto 1

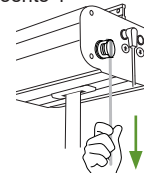


Uudelleenasetus:

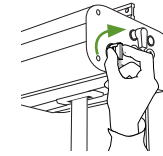

Vaihtoehto 2

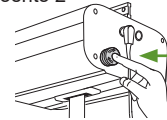

5 SSP-rajakatkaisija

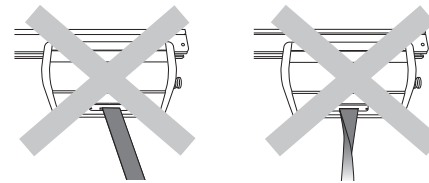


Nostoliike keskeytyy, kun nostohihnan kuorma on epätasapainossa tai kun nostoliina on kiertynyt.

6 7 Nostokaaren liitäntä

6. R2R-nostokaaressa on koukut kahdelle nostohihnalle kahden nostimen välistä siirtoa varten.

7. Nostokaaren Quick-release Hook mahdollistaa nostokaaren vaihtamisen nopeasti ja helposti.

Akkujen lataaminen

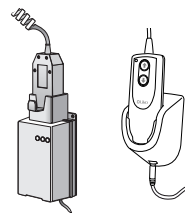

- Lataa nostin säännöllisesti käytön jälkeen.
- Nostin ei toimi latauksen aikana.
- Varmista, että hätäpysäytintä ei paineta latauksen aikana.**

Ergonomia

- Älä koskaan nosta käsin – käytä nostinta.
- Älä hätäile. Toimi rauhallisesti ja järjestelmällisesti.
- Älä rasita selkääsi! Työskentele pystyasennossa ja pidä selkä suorassa.
- Käytä sängyn nosto- ja laskutoimintoja.
- Vähennä vipuvoimaa. Työskentele lähellä avustettavaa ja nostinta.

Puhdistus

Puhdista nostin tarvittaessa kostealla liinalla käyttämällä yleispuhdistusainetta tai desinfiointiainetta.

Nopea vianetsintä

Tarkista, että:

- Hätäpysäytintä ei ole painettu.
- Akku on latautunut.
- Käsiohjain on oikein kiinnitetty.
- Mekaaninen varalaskulaite on nolattu.

Muita pikakäyttöoppaita

Liko-nostimien ja -nostokankaiden pikakäyttöoppaat voi ladata osoitteesta www.hillrom.com.

Turvaohjeet

- Lue nostimen ja nostotarvikkeiden käyttöohje ennen käyttöä.
- Ennen avustettavan nostamista alustalta ja ennen kuin nostoliivin hihnat ovat kunnolla kiristyneet, on tärkeää varmistua siitä, että hihnat on kiinnitetty nostokaareen oikein.
- Enimmäiskuormitus, Likorall™ 242 -kattonostin: 200 kg**
- Enimmäiskuormitus, Likorall™ 243 -kattonostin: 230 kg.**
- Enimmäiskuormitus, Likorall™ 250 -kattonostin: 250 kg.**

Enimmäiskuormituksen säilyttämiseksi on tärkeää, että käytetään saman tai suuremman enimmäiskuormituksen mukaisia lisävarusteita.

TÄRKEÄÄ!

Tämä pikakäyttöopas ei korvaa nostimen käyttöohjetta, jonka voit ladata osoitteesta www.hillrom.com.



Likorall ja Liko ovat Baxter International, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.



A Hill-Rom Company

www.hillrom.com

Valmistaja:

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700